

SUPERSONIC
imagine

AIXPLO~~R~~ER[®]

MultiWave™

Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitungs-Ref. -Nr. :
SSIP01131
Revision 10B
März 2016

Copyright 2016
SuperSonic Imagine S.A.
Alle Rechte vorbehalten
Gedruckt in 2016







SuperSonic Imagine

510, rue René Descartes Bat F
13857 Aix en Provence Cedex



SuperSonic Imagine Ultrasound Produkte werden gemäß einem oder mehreren der nachfolgenden US-Patente und entsprechenden Patenten in anderen Ländern hergestellt oder betrieben:

US -Patentnummern:

- (USA) 5606971
- (USA) 5810731
- (USA) 9117439
- (USA) 7252004

Andere Patentanmeldungen in verschiedenen Ländern sind derzeit in Bearbeitung.

Die für dieses System verwendete Software enthält Software, die Eigentum von SuperSonic Imagine ist, und Software, die SuperSonic Imagine mit Zustimmung eines Lizenzgebers verwenden darf.

Die Verfügbarkeit dieser Software und der zugehörigen Dokumente ist beschränkt.

Die Software und die zugehörigen Dokumente dürfen nur für dieses System verwendet werden.

Ihnen werden keinerlei Rechte am geistigen Eigentum dieser Software und der zugehörigen Dokumente übertragen.

Sie dürfen die Software oder die Dokumente weder kopieren noch die Software ganz oder teilweise verändern.

Sie dürfen die Software nicht neu kompilieren oder neu assemblieren.

Sie dürfen die Software oder die Dokumente nicht an Dritte abtreten, übertragen, ihnen diese offenlegen oder Unterlizenzen hierfür erteilen.

Die Ultraschallsystem-Software unterliegt den US-amerikanischen und französischen Ausfuhrbestimmungen und Exportkontrollgesetzen und Sie dürfen die Software ohne ausdrückliche Genehmigung der US-amerikanischen oder französischen Behörden weder ganz noch teilweise exportieren oder reexportieren.

Die in den Dokumenten enthaltenen Informationen oder die Programme in der Software können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.



ACHTUNG

Das System darf nicht modifiziert werden.


Die folgenden Namen sind Marken oder eingetragene Marken von SuperSonic Imagine, Inc:

- Aixplorer®
- The Theragnostic Company™
- ShearWave™-Elastographie
- SWE™-Modus
- Q-Box™
- UltraFast™-Bildgebung
- SuperCompound™
- UltimateFocus™
- SuperRes™
- TissueTuner™
- SonicTouch™
- SonicSoftware™
- ManualTouchTGC™
- SuperLinear™ 15-4 Schallkopf
- SuperCurved™ 6-1 Schallkopf
- SuperEndocavity™ 12-3 Schallkopf
- SuperEndocavity™ Volumetrischer 12-3 Schallkopf
- SuperLinear™ Volumetrischer 16-5 Schallkopf
- SuperLinear™ 10-2 Schallkopf
- SuperMicroConvex™ 12-3 Schallkopf
- SuperLinear™ HockeyStick 20-6 Schallkopf
- TouchRing™
- SonicResearch™
- MultiWave™
- Thy-RADS™
- ReportBuilder™
- UltraFast™ Doppler

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung	1
Willkommen!	3
Über diese Bedienungsanleitung	4
Schulung	4
Über dieses Gerät	5
Allgemeine Beschreibung	5
Verwendungszweck	5
Anwendungsgebiete	6
Kontraindikationen	6
Verschreibungspflichtiges Gerät	7
Conformance Standards	7
Zertifikate	8
Kontakte	9
Frankreich	9
USA	9
Großbritannien	10
Deutschland	10
China	10
Service	10
Service	11
Upgrades und Updates	12
2. Physikalischer Überblick	13
Abmessungen	15
Elektrische Betriebsanforderungen	16
Eingangs-/Ausgangsanschlüsse	17
USB Ports	17
DVI-Port	19
CD/DVD-Laufwerk	20
Drucker	22
Systemintegrierte Drucker (optional)	22
Zusätzlicher Drucker	22
Zusätzliche Video-Geräte	24
Temperatur-, Luftdruck- und Feuchtigkeitsgrenzen	26
Annehmen und Lagern des Aixplorer®	26
Lagern des Geräts	27

Sichere Entsorgung des Geräts	27
3. Sicherheit	29
Warnhinweise	31
Symbole	32
Allgemeine Gerätesicherheit	34
Elektrische Sicherheit	36
Elektromagnetische Interferenzen	38
Empfohlene Abstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsmitteln und dem Aixplorer®	39
Erklärung zu elektromagnetischen Aussendungen....	42
Störfestigkeits-Erklärung	43
Thermische Sicherheit	46
Mechanische Sicherheit	47
Sichere Durchführung von Ultraschalluntersuchungen mit dem SuperSonic Imagine Aixplorer® System.....	50
Bioeffekte und Biophysik im Ultraschall	50
Thermische Mechanismen	60
Nicht-thermische Mechanismen	68
Vorteile und Risiken des Ultraschalls	72
Das ALARA-Prinzip	76
Der Output Display Standard	81
Anwendung des ALARA-Prinzips	89
Alarm-System	110
4. System im Überblick	117
Systembeschreibung	119
Monitor und Gelenkarm	120
Bedienpult	121
Bewegen des Bedienpults Auf und ab	121
Schwenken des Bedienpults	121
Lautsprecher und Lautstärkeregelung	122
Schallköpfe	123
Anschließen Schallkopf	123
Lagern, Aufheben Schallkopf	124
Verwenden der Kabelhalterung	125
Ablage auf dem System	126
Gelhalter	126
Ablagebereich	126

Mobilität	128
Griffe	128
Lenkrollen-Sperren	129
Fußstützen	129
Bewegen des Systems	130
Vor dem Bewegen des Systems	130
Bewegen des Systems	130
Anschließen des Netzkabels und Schutzerde	
.....	132
Informationen zum richtigen Anschluss des	
Potentialausgleichsleiters ():	133
Kompatibles Zubehör	133
Gele	134
Gelwärmer	135
Schallkopf-Schutzhüllen	136
Reinigungsmittel	146
Druckerpapier und Toner	146
Biopsie-Nadelführungen	147
5. Verwendung des Systems	149
Konventionen	151
In dieser Bedienungsanleitung verwendete	
Konventionen	151
Im System verwendete Konventionen	152
Knopftechnik	153
Erste Schritte	156
System ein- und ausschalten	156
Einstellen von Uhrzeit und Datum	159
Einstellen der Sprache	159
Herstellung einer Netzwerkverbindung	159
Auswahl eines Schallkopfs	160
Beginn einer Untersuchung	162
Untersuchung beenden	170
Bildgebungs-Modi	171
Allgemeine Informationen zu den Bildgebungs-Modi	
.....	171
Allgemeine Bedienelemente	177
B-Modus Bildgebung	185
ShearWave™-Elastographie	207
Farb-Modus Bildgebung	217

Pulsed Wave Doppler Modus	236
3D-Bildgebung	249
Contrast Enhanced Ultrasound Imaging (CEUS)	260
M-Modus Bildgebung	270
Analysieren eines Bilds	279
Verwendung der Schnittbildmarkierungen	279
Annotationen hinzufügen	281
Messungen durchführen	285
BI-RADS®-Analyse	327
Thy-RADS™-Analyse	331
6. Berichte	335
Beschreibung der Berichtfunktion	337
Berichtaufbau	337
Beschreibung des Berichtaufbaus	337
Patienteninformationen	338
Bilder	339
Messungen	341
Worksheet	342
Fazit	349
Generieren von Berichten	350
Drucken von Berichten	350
7. Bild- und Datenmanagement	351
Daten speichern	353
Bilder und Clips aufnehmen	353
Untersuchung überarbeiten	357
Bilder drucken	361
Untersuchung senden	363
Untersuchungen und Bilder löschen	370
Löschen eines oder mehrerer Bilder	370
Löschen von Untersuchungen	370
Bildersuche mit Query and Retrieve	371
Allgemeine Informationen zu Query-Retrieve -	
Abfrageabruf	371
Suche mit der Query-Funktion	374
Retrieve - Abruf	376
Query-Bilder anzeigen und navigieren	377
Beenden von Query and Retrieve	379
Untersuchung beenden	379
Untersuchung fortsetzen	379

8. Individuelle Systemeinstellungen	381
.....	381
Beschreibung der Systemkonfiguration	383
System/Anzeige	384
Beschreibung des Registers System/Anzeige	384
System	384
Regionale Parameter	387
Untersuchung	388
Geräteeinstellungen	390
Beschreibung des Registers Geräteeinstellungen..	390
Medieneinstellungen	390
Medienzuordnung	392
System-DICOM-Optionen	393
Administration	395
Beschreibung des Registers Administration	395
Geräte	396
Netzwerkconfiguration	401
Netzwerk-Tools	402
Diskpflege	403
Medizinisches Personal	406
Voreinstellungen	407
Beschreibung des Registers Voreinstellungen	407
Annotations	408
Bodymarker	410
Bildgebungs-Voreinstellungen	414
Messungen	420
Beschreibung des Registers Messungen	420
Messungen	420
Messungen (Module) und Berechnungen	421
Packages	422
Obstetrik	425
Systemdiagnose	429
9. Systempflege und Instandhaltung&	431
.....	431
Papier und Toner auffüllen	433
Reinigung des Systems	433
Reinigungshäufigkeit	433
Reinigung des Gehäuses	435
Reinigung des Monitors	435

Reinigung der Touchscreen-Anzeige	436
Reinigung der Luftfilter	436
Reinigung und Desinfektion von Schallköpfen	
.....	439
Sicherheitshinweise	439
Reinigen und Desinfizieren von Schallköpfen Anleitung	
.....	441
Allgemeines Reinigungs- und Desinfektionsverfahren	
für Aixplorer® Schallköpfe	442
Reinigungs- und Desinfektionsprodukte	445
Grenzen für das Eintauchen	451
Weitere Informationen zur Reinigung und Desinfektion	
von Ultraschallköpfen	452
10. Fehlersuche	455
11. Akustische Leistungstabellen ...	459
Daten zur Maximaltemperatur	461
In akustischen Leistungstabellen verwendete	
Symbole	461
Schalleistungstabellen	463
Übersicht der Schalleistung Schallkopf/Modus	463
Messungenauigkeiten	465
Ausführliche Schalleistungstabellen	465
12. Literaturverzeichnis	537
Allgemeines Literaturverzeichnis	539
Literaturverzeichnis zur Obstetrik	544
Gleichungen und Tabellen zum fetalen Wachstum..	544
Gleich. u. Tab. zum Gestationsalter	583
Gleichungen und Tabellen zum geschätzten	
Fetalgewicht	648
Stichwortverzeichnis	663
13. ANMERKUNGEN	671

Kapitel 1. Einführung

Willkommen!

Willkommen und herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Aixplorer® Ultraschallsystems.

Die folgenden Dokumente sind für das Aixplorer® Ultraschallsystem verfügbar:

- **Kurzanleitung**
- **Bedienungsanleitung**

Die Kurzanleitung enthält grundlegende Informationen über die Verwendung des Produkts.


Sie ersetzt nicht die Bedienungsanleitung.

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen über die Verwendung und die Sicherheit des Produkts. Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und verwahren Sie sie an einem leicht zugänglichen Ort.

Bei der Entwicklung des Aixplorer® Systems standen die Sicherheit für den Bediener und den Patienten an erster Stelle.

Lesen Sie die nachfolgenden Kapitel aufmerksam durch, bevor Sie anfangen, mit dem System zu arbeiten.

SuperSonic Imagine garantiert die bestimmungsgemäße Funktion des Systems nur bei Beachtung und Einhaltung aller in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise.

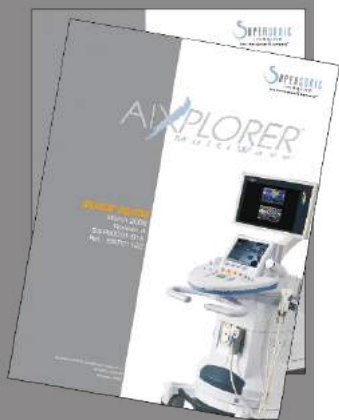

Über diese Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen über die Verwendung Ihres Ultraschallsystems.

Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind u. U. optional. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen SuperSonic Imagine-Vertriebs- oder Servicemitarbeiter.

Die Bilder sind unverbindlich und dienen lediglich der allgemeinen Information.

Sie enthält auch Informationen zur Kontaktaufnahme mit SuperSonic Imagine falls Sie Unterstützung benötigen.

Diese Anleitung ist vorgesehen für den Gebrauch durch, oder im Auftrag von, und unter direkter Aufsicht eines zugelassenen Arztes, der qualifiziert ist, die Verwendung des Ultraschallgeräts anzuordnen.

Diese Anleitung ist für Benutzer vorgesehen, die im Gebrauch von medizinischen Ultraschallgeräten geschult oder anderweitig damit vertraut sind.

Dieses Handbuch ist keine klinische Anleitung für die Durchführung einer Ultraschalluntersuchung.

Diese Bedienungsanleitung entspricht:

- Europäische Richtlinie 93/42/EWG, modifiziert durch Europäische Richtlinie 2007/47/EWG
- FDA-Richtlinie, 21 CFR § 801

Schulung

Wenn weitere Informationen erforderlich sind, werden Schulungen empfohlen, die auf Anfrage bei SuperSonic Imagine erhältlich sind. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Vertretung.

Über dieses Gerät

Allgemeine Beschreibung

Das SuperSonic Imagine Aixplorer® System ist ein mobiles Ultraschall-Bildgebungssystem, das bei der allgemeinen Diagnose mittels Ultraschallbildern eingesetzt wird.

Das System enthält einen Scan Converter und kann mit verschiedenen Schallköpfen für Linear-, Konkav-, Mikro-Konkav- und angetriebene Lineararrays verbunden werden, deren erfasste Bilder auf einem LCD-Monitor angezeigt werden.

Über das einstellbare Bedienpult mit integriertem Touchscreen kann der Benutzer schnell und effizient eine Ultraschalluntersuchung gemäß dem ALARA-Prinzip durchführen.

Das System ermöglicht es dem Benutzer auch, Messungen und entsprechende Berechnungen durchzuführen, Bilder an einen digitalen Speicher oder ein externes Gerät (z. B. Drucker) zu übertragen und diagnostische Untersuchungen in einem Berichtsformat zu überprüfen.

Das System funktioniert ähnlich wie vorhandene Geräte und Schallköpfe für die Bildgebungs-Modi: B-Modus, M-Modus, Farb-Dopplersonographie, Pulsed Wave Doppler, Harmonic Imaging, Amplitude Power Doppler Imaging, Directional Amplitude Power Imaging, Kontrastbildgebung, Elastographie und 3D-Bildgebung.

Verwendungszweck

Das SuperSonic Imagine Aixplorer® Ultraschallsystem ist vorgesehen für die Mehrzweck-Ultraschallbildgebung im Puls-Echo-Verfahren, die Doppler-Analyse von Flüssigkeitsströmungen im menschlichen Körper und die Elastographie von weichen Geweben.

Anwendungsgebiete

Das SuperSonic Imagine Aixplorer® Ultraschallsystem ist für folgende Anwendungen in der nichtinvasiven Bildgebungsdiagnostik ausgelegt: Abdominal, Kleine Organe, Bewegungsapparat, Oberflächlicher Bewegungsapparat, Vaskulär, Peripher Vaskulär OB-GYN, Becken, Pädiatrie, Kopfbereich bei Neugeborenen/Erwachsenen, Urologie

Das SuperSonic Imagine Aixplorer® Ultraschallsystem ist für folgende Anwendungen in der invasiven Bildgebungsdiagnostik ausgelegt: Kleine Organe, Transrektal, Transvaginal, GYN, Becken, Urologie, Vaskulär und Gehirn.¹

Mit dem System lassen sich auch anatomische Strukturen vermessen (Abdominal, Kleine Organe, Bewegungsapparat, Oberflächlicher Bewegungsapparat, Peripher Vaskulär, GYN, Becken, Pädiatrie, Urologie, Transrektal, Transvaginal, Kopfbereich bei Neugeborenen/Erwachsenen, Fetal/Obstetrik).

Dieses Gerät ist vorgesehen für den Gebrauch durch oder im Auftrag von und unter der Aufsicht eines zugelassenen Arztes, der qualifiziert ist, die Verwendung des Geräts anzuordnen.²

Dieses System darf nur von geschulten Sonografie-Fachkräften verwendet werden, denen die Risiken übermäßiger Schallenergieexposition im Körper, insbesondere bei Vorhandensein großer Flüssigkeitsmengen im Scan-Bereich, bekannt sind.

Kontraindikationen

Das Aixplorer® System ist weder für den Einsatz am Auge noch für eine Verwendung vorgesehen, bei der der Schallstrahl durch das Auge verläuft.

Das Aixplorer® System ist nicht für kardiale Anwendungen geeignet. Die Verwendung des Aixplorer® Systems mit einem Defibrillator ist verboten.

¹Die Anwendung für Gehirn ist nur in Europa zugelassen

²Die vom Gerät ausgegebenen Daten sind ausschließlich für die Verwendung durch qualifizierte Ärzte bestimmt, die zu einer Diagnosestellung befugt sind.

Das Aixplorer® System ist nicht für die Anwendung mit brennbarer Anästhetika oder in Kombination mit brennbaren Wirkstoffen geeignet.

Verschreibungspflichtiges Gerät

Achtung: Nach US-Bundesrecht dürfen Ultraschall diagnostikgeräte nur von Ärzten oder auf Anordnung von Ärzten verkauft werden ².

Conformance Standards

Gemäß der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG, modifiziert durch Europäische Richtlinie 2007/47/EWG, ist Aixplorer® ein Medizinprodukt der Klasse IIa.

Gemäß:

- IEC/EN 60601-1, Betriebsmittel der Schutzklasse I, Typ BF.
- IEC 60601-1-2, Betriebsmittel der Schutzklasse A.

Das Produkt entspricht folgenden Normen:

- UL 60601-1 Medizinische elektrische Geräte, Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit
- CAN/CSA-C22.2 Nr. 601.1 Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit
- IEC/EN 60601-1-1 Medizinische elektrische Geräte – Teil 1-1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit – Ergänzungsnorm: Sicherheitsanforderungen für medizinische elektrische Geräte.
- IEC/EN 60601-1-2 Medizinische elektrische Geräte – Teil 1-2: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit – Ergänzungsnorm: Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen und Prüfungen.
- IEC 60601-2-37 Medizinische elektrische Geräte – Teil 2-37: Besondere Festlegungen für die Sicherheit von Ultraschall-Geräten für die medizinische Diagnose und Überwachung.
- IEC 62304 Medizingeräte-Software - Software-Lebenszyklus-Prozesse
- NEMA UD 2 Norm für die Messung der Schall-Ausgangsleistung bei Ultraschall diagnostikgeräten

- NEMA UD 3 Norm für die Echtzeitanzeige von thermischen und mechanischen Schall-Ausgangsleistungsindizes bei Ultraschalldiagnostikgeräten.
- EN ISO 10993-1: Biologische Beurteilung von Medizinprodukten - Teil 1: Beurteilung und Prüfung
- EN ISO 14971: Medizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte
- IEC/EN 60601-1 Medizinische elektrische Geräte – Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit
- IEC 61340-5-1: Elektrostatik – Teil 5-1: Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Phänomene - Allgemeine Anforderungen
- IEC 61340-5-2: Elektrostatik – Teil 5-2: Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Phänomene - Benutzerhandbuch
- EN 50419: 2006 Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten entsprechend Artikel 11(2) der Richtlinie 2002/96/EG (WEEE)
- Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM): PS 3 -2011

Zertifikate

SuperSonic Imagine ist gemäß ISO 13485 zertifiziert.

Kontakte

Bei Fragen stehen Ihnen unsere lokalen Kundendienstmitarbeiter zur Verfügung.

Wenden Sie sich für Unterstützung bitte an Ihren lokalen SuperSonic Imagine-Vertriebs- oder Servicemitarbeiter.

Frankreich



SuperSonic Imagine

Les Jardins de la Duranne - Bât E & F

510, rue René Descartes

13857 Aix en Provence Cedex - Frankreich

Telefon: +33 (0)442 99 24 32

Telefon: +33 (0)426 70 02 70

Fax: +33 (0)442 52 59 21

E-Mail: contactsFR@supersonicimagine.com

USA



SuperSonic Imagine, Inc.

18706 North Creek Parkway, Suite 120

Bothell, WA 98004 - USA

Telefon: +1(425) 686 6380

Fax: +1(425) 686 6387

E-Mail: contactsUSA@supersonicimagine.com



SuperSonic Imagine, Inc.

2625 Weston Road

Weston, FL 33331- USA

Telefon: +1(954) 660 3528

E-Mail: contactsUSA@supersonicimagine.com



Großbritannien

SuperSonic Imagine Ltd.,

18 Upper Walk

Virginia Water

Surrey GU25 4SN - Großbritannien

Telefon: +44 (0)845 643-4516

E-Mail: contactsUK@supersonicimagine.com



Deutschland

SuperSonic Imagine GmbH

Zeppelinstr. 71 – 73

81669 München - Deutschland

Telefon: +49 89 36036 - 844

Fax: + 49 89 36036 - 700

E-Mail: contactsDE@supersonicimagine.com



China

SuperSonic Imagine

Suite 2304, Block D, Ocean International, DongSiHuan ZhongLu,

Chaoyang District, Peking (100025), China

Telefon: +86-10- 85861023/ 2951/ 2917

Fax: + 86-10-8586 2389

E-Mail: beijing@supersonicimagine.com

Service

Wenden Sie sich an Ihren lokalen SuperSonic Imagine-Vertreter.

Service

Das SuperSonic Imagine Aixplorer® Ultraschallsystem ist für eine langjährige Betriebszeit ausgelegt.

Die Lebensdauer des Produkts ist direkt abhängig von folgenden Variablen:

- Anzahl der klinischen Betriebsstunden des Produkts
- Anzahl der Stunden, in denen das Produkt eingeschaltet ist ohne für eine klinische Anwendung verwendet zu werden
- Umwelteinflüsse wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck, die auf das Produkt einwirken
- Entsprechende Bedingungen bei der Stromversorgung
- Ordnungsgemäße Handhabung und Transport des Produkts
- Ordnungsgemäße Lagerung des Produkts bei Nichtgebrauch
- Ordnungsgemäße Wartung und Reinigung des Produkts
- Qualität der Reparaturen
- Qualität des mit dem Gerät verwendeten Zubehörs

Das SuperSonic Imagine Aixplorer® Ultraschallsystem muss von einem autorisierten SuperSonic Imagine-Vertriebs- oder Servicemitarbeiter aufgestellt werden.

Zur Optimierung des Betriebs und Maximierung der Lebensdauer des Produkts empfehlen wir eine jährliche, von einem autorisierten SuperSonic Imagine-Vertreter durchzuführende Wartung.

Hierfür sind Wartungs- und Instandhaltungsverträge erhältlich.

Alle Reparaturen sind von einem autorisierten SuperSonic Imagine-Vertreter durchzuführen.

Die unter **Kapitel 9, *Systempflege und Instandhaltung*** beschriebenen Wartungsmaßnahmen können vom Benutzer durchgeführt werden.

Durch eine unsachgemäße Aufstellung, Reparatur oder Wartung werden sämtliche mit diesem Produkt verbundenen Garantien ungültig.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an einen lokalen SuperSonic Imagine-Vertriebs- oder Servicemitarbeiter.

Upgrades und Updates

Es kann sein, dass Upgrades veröffentlicht werden, die Verbesserungen der Hardware oder Software beinhalten.

Diesen System-Updates sind Benutzerinformationen beigelegt.

Stellen Sie stets sicher, dass Sie die für Ihre Produktversion entsprechend überarbeitete Fassung dieses Dokuments verwenden.

Um zu überprüfen, ob Sie die richtige Dokumentenversion für Ihr System verwenden, oder um die jeweils aktuelle Fassung zu erhalten, kontaktieren Sie Ihren SuperSonic Imagine-Vertreter oder lokalen Vertriebsändler.

Kapitel 2. Physikalischer Überblick

Abmessungen


Breite: 61 cm

Höhe:

- 169 cm mit voll ausgefahrenem Monitor
- 131 cm mit festgestelltem Monitor

Tiefe: 105 cm

Gewicht: etwa 97 kg ohne Zubehör.

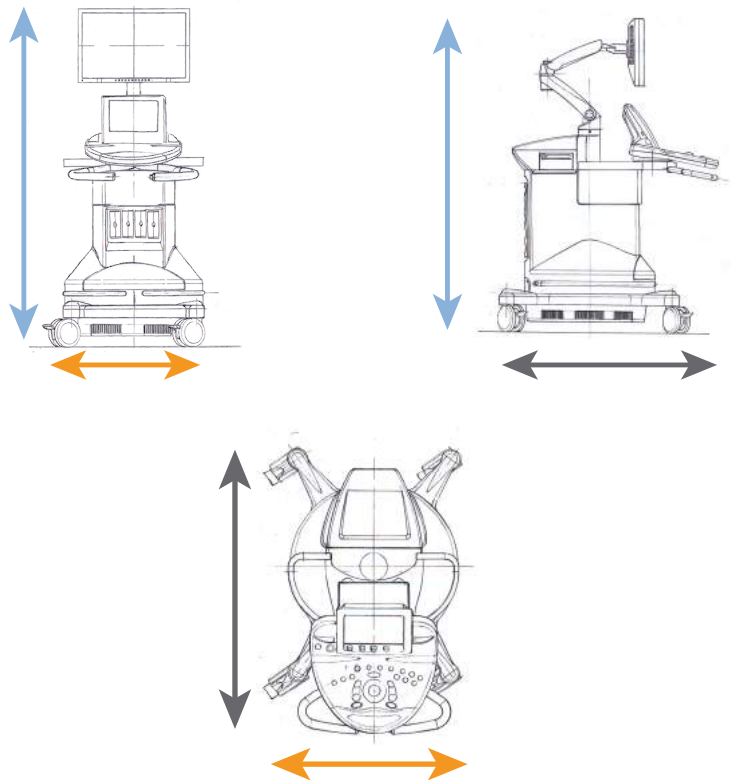

Elektrische Betriebsanforderungen

Das System enthält eine interne Stromversorgung, die bei folgenden Spannungsbereichen arbeiten kann:s:

- 100-240 V, 50/60 Hz, 1500 W.

Die Stromversorgung muss über eine geerdete, Hospital-Grade-Steckdose erfolgen (UL 60601-1).



Eingangs-/ Ausgangsanschlüsse

USB Ports



ACHTUNG

Extern betriebene USB-Geräte dürfen nicht an die USB-Ports des Aixplorer® Ultraschallsystems angeschlossen werden.

Ethernet-Stecker dürfen nur an IEC-zertifizierte Geräte angeschlossen werden.

An die beiden USB-Ports des Systems können beliebige USB-Geräte angeschlossen werden, solange sie über den USB-Port oder über eine externe, IEC60601-konforme Spannungsquelle versorgt werden können.



WARNUNG

Bei der Verwendung eines USB-Ports muss darauf geachtet werden, dass weder der Anwender noch der Patient den USB-Port mit den Händen oder anderen Körperteilen außen oder innen berührt.


Auf dem System sind folgende Ports verfügbar:

- Ein USB-Port befindet sich auf der Rückseite des Bedienpults:



an diesen USB-Port kann ein Speicherstick angeschlossen werden.

- An der Rückseite des Bedienpults befinden sich zwei USB-Ports über den Luftfiltern:

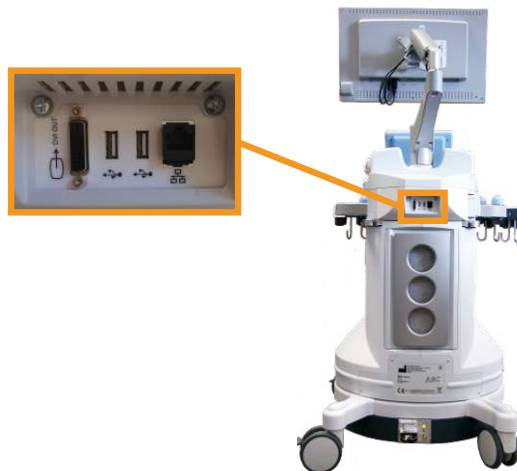

- Ein USB-Port befindet sich zwischen den zwei Fußstützen:



An diesen USB-Port kann ein Fußschalter angeschlossen werden.

Mit dem Aixplorer® System kann als Option ein KINESIS-Zweipedal-Fußschalter geliefert werden.

Anschließen eines Fußschalters:

- Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Port zwischen den zwei Fußstützen ein (siehe Bild oben).
- Wenn das System eingeschaltet ist, können Sie Funktion der beiden Pedale im Setup konfigurieren (siehe [Kapitel 8, Individuelle Systemeinstellungen \[381\]](#)).


DVI-Port

An der Rückseite des Systems befindet sich ein DVI-Port. Der Anschluss unterstützt den Typ DVI-D.



ACHTUNG

Nur Geräte, die den Richtlinien IEC 60601-1 entsprechen, dürfen an den DVI-Port angeschlossen werden.

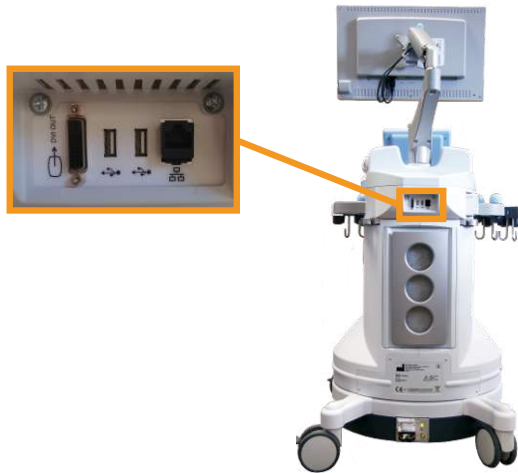

An diesen Port kann ein DVI-fähiger Monitor angeschlossen werden.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter **„Zusätzliche Video-Geräte“** [24].

CD/DVD-Laufwerk

Das CD-Laufwerk befindet sich auf der linken Seite des Bedienpults:



Das CD/DVD-Laufwerk unterstützt folgende Medien:

- DVD-R
- DVD+R
- DVD-RW
- DVD+RW

- CD-R
- CD-RW

Auswerfen einer CD/DVD

1. Klicken Sie auf das entsprechende Symbol (CD or DVD)
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm

Weitere Informationen über Symbole finden Sie in [„Hinweissymbole“ \[174\]](#).

Zum manuellen Auswerfen der CD/DVD führen Sie das Ende einer aufgebogenen Büroklammer in die kleine Bohrung neben dem CD/DVD-Player ein.



Drucker

Systemintegrierte Drucker (optional)

In das System ist ein monochromer Thermodrucker von SONY integriert. Er befindet sich an der Rückseite des Wagens.

Der mit dem System gelieferte monochrome Thermodrucker von SONY sollte eingeschaltet bleiben.

Er schaltet selbsttätig in den Energiesparmodus. Das Ausschalten und Neustarten des Druckers belastet das Aixplorer® -System und kann andere elektrische Probleme verursachen.

Zusätzlicher Drucker

Wenn gewünscht, kann ein zusätzlicher Drucker an Ihren Aixplorer® angeschlossen werden.



WARNUNG

Verbinden Sie nie einen Drucker, der nicht die Norm IEC 60601-1 erfüllt, mit einem USB-Port Ihres Aixplorer®.

Wenn der Drucker die IEC 60950 erfüllt, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Stellen Sie sicher, dass das Aixplorer® -Gerät an das Netzwerk angeschlossen ist (der Ethernet-Port befindet sich an der Rückseite des Wagens).
2. Stecken Sie das Netzkabel des externen Druckers in eine Steckdose ein.
3. Schließen Sie das Netzkabel des externen Druckers an das Netzwerk an.



4. Schalten Sie den externen Drucker ein.
5. Konfigurieren Sie das Aixplorer® -System für den Drucker im gleichen Netzwerk



ANMERKUNG

Das Aixplorer® und der externe Drucker dürfen an das gleiche Netzwerk in Ihrer Einrichtung angeschlossen sein.

Wenn der Drucker die IEC 60601-1 erfüllt, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Stecken Sie das Netzkabel des externen Druckers in eine Steckdose ein.
2. Führen Sie je nach Druckermodell einen der folgenden Schritte aus:
 - Schließen Sie den Drucker mit dem USB-Kabel an den Aixplorer® an
 - Schließen Sie den Drucker mit dem Netzkabel an den Aixplorer® an

Eine Liste der empfohlenen Drucker erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem SuperSonic Imagine-Vertreter.

Zusätzliche Video-Geräte

Wenn gewünscht, kann ein zusätzliches Videogerät wie ein LCD-Bildschirm oder ein Beamer an Ihren Aixplorer® angeschlossen werden.

Der Aixplorer® besitzt einen digitalen Videoausgang mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080.

An das Aixplorer® System lassen sich Videogeräte anschließen, die mit diesem Anschlusstyp und der Videoauflösung kompatibel sind.

Wenn Ihr externes Videogerät die Vorgaben der IEC60601-1 und die hier genannten Anforderungen erfüllt, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Schalten Sie Ihr externes Videogerät ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass das externe Videogerät eingeschaltet ist und stellen Sie es auf die Eingangssignale vom DVI-Stecker ein. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des externen Videogeräts.
3. Schließen Sie das externe Videogerät mit einem DVI-Kabel mit maximal 5 m Länge an das Aixplorer® System an.
4. Schalten Sie die Stromversorgung ein für den Aixplorer®. Die Hauptanzeige wird auf der im System integrierten Anzeige und auf dem externen Bildschirm angezeigt.

*DVI-Kabel mit 5 m Länge wurden getestet mit dem Aixplorer®. Längere Kabel können zu einer Verschlechterung oder dem Verlust des digitalen Signals führen.



HINWEIS ZUR FEHLERSUCHE

Wenn das externe Videogerät die Auflösung von 1920 x 1080 nicht unterstützt, können unter anderem folgende Effekte auftreten:

1. Am externen Videogerät wird kein Signal angezeigt.
2. Das Bild wird mit schwarzen Balken an den Rändern angezeigt (Letterbox-Effekt).
3. Das Bild wird nicht mit dem originalen Ansichtsverhältnis dargestellt. Dies kann zu einer gestauchten oder gedehnten Darstellung führen, um den Bildbereich auszufüllen.

Falls Probleme mit der Videoqualität oder dem Ansichtsverhältnis auftreten, unterstützt das externe Videogerät wahrscheinlich nicht die native Auflösung von 1920 x 1080. Dieses Problem kann behoben werden durch einen „Digitalen Skalierer“ zwischen dem externen Bildschirm und dem Aixplorer®. Für weiteren Informationen hierzu kontaktieren Sie bitte Ihre SuperSonic Imagine-Vertretung.



ACHTUNG

Etwaige Zusatzgeräte, die an medizinische elektrische Geräte angeschlossen werden, müssen die entsprechenden IEC- bzw. ISO-Normen (z.B. IEC 60950 für Datenverarbeitungsgeräte) erfüllen.

Zudem müssen sämtliche Konfigurationen die Anforderungen für medizinische elektrische Geräte erfüllen (siehe IEC 60601-1).

Jede Person, die Zusatzgeräte an medizinische elektrische Geräte anschließt, nimmt Konfigurationen an einem medizinischen Gerät vor und ist infolgedessen dafür verantwortlich, dass dieses/diese Gerät/e die Anforderungen für medizinische elektrische Geräte erfüllt/erfüllen.

Beachten Sie, dass örtliche Bestimmungen vor o.g. Anforderungen Vorrang haben.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Vertretung oder den Kundendienst.

Temperatur-, Luftdruck- und Feuchtigkeitsgrenzen

Das System muss innerhalb der unten angegebenen Grenzwerte betrieben, gelagert und transportiert werden.

Die Betriebsumgebung des Gerätes muss konstant gehalten werden, anderenfalls muss das Gerät abgeschaltet werden.

	Betrieb	Lagerung	Transport
Temperatur	Von 10# bis 35# (Von 10,00# bis 35,00#)	Von -20# bis 50# (Von -4°F bis 122°F)	Von -20# bis 50# (Von -4°F bis 122°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	Von 30 % bis 80 %	Von 30 % bis 80 %	Von 30 % bis 80 %
Druck	Von 700 hPA bis 1.060 hPa	Von 500 hPA bis 1.060 hPa	Von 500 hPA bis 1.060 hPa
Höhe	Unter 3000 m		

Annehmen und Lagern des Aixplorer®

Lassen Sie nach der Lieferung und ersten Installation die Systemverpackung von einem autorisierten Vertreter von SuperSonic Imagine öffnen. Wenn Sie das Gerät zum Service an SuperSonic Imagine zurücksenden müssen, verpacken Sie es nicht. Kontaktieren Sie Ihren lokale SuperSonic Imagine-Vertreter.

Das Aixplorer® System darf ausschließlich von autorisiertem SuperSonic Imagine-Personal aufgestellt werden.

Vor dem ersten Einschalten muss sich das System unbedingt für 48 Stunden an die Umgebungstemperatur angleichen.

Lagern des Geräts

Das Aixplorer® Ultraschallsystem kann unter den in diesem Kapitel angegebenen Umgebungsgrenzwerten für unbegrenzte Zeit eingelagert werden.

Bei längerer Lagerung (über 1 Jahr) besteht die Möglichkeit, dass sich die eingebauten Batterien entladen.

Wenn Sie planen, das Gerät über längere Zeit nicht zu verwenden, kontaktieren Sie einen autorisierten SuperSonic Imagine-Servicevertreter und lassen Sie die Batterien vor der Lagerung entfernen.

Entsprechend kann es sinnvoll sein, dass beim Neustart des Systems nach längerer Lagerdauer ein Servicevertreter anwesend ist.

Sichere Entsorgung des Geräts

Das Aixplorer® Ultraschallsystem enthält Komponenten, die in ähnlicher Form auch in Personal Computern zu finden sind.

Diese elektronischen Komponenten innerhalb des Gehäuse können geringe Mengen Blei (elektrische Komponenten), Quecksilber (elektrische Komponenten und Batterien) und sowie Lithiumverbindungen (Batterien) enthalten.

Das Gehäuse besteht aus recycelbaren Kunststoffen. Bei der Entsorgung des Geräts mit den elektrischen Komponenten und Kunststoffen sind die geltenden Entsorgungsbestimmungen zu beachten.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen SuperSonic Imagine-Vertreter.

Kapitel 3. Sicherheit

Warnhinweise

Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:

Das Symbol **WARNUNG** weist auf nötige Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Verletzungen mit eventueller Todesfolge hin.



WARNUNG




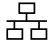



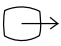






Das Symbol **ACHTUNG** weist auf nötige Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz des Gerätes hin.









ACHTUNG

Symbole

Die nachstehenden Symbole befinden sich auf dem Ultraschall-System.

Symbol	Bedeutung
Allgemeine Bedienelemente	
	Auf dem Betriebsschalter, bedeutet EIN und AUS des Systems
	Auf dem Bedienpult bedeutet System EIN/Standby
Elektrizität und Elektronik	
	USB-Eingang/-Ausgang
	Ethernet-Verbindung
	Potentialausgleich
	Isolierter Patientenanschluss. Typ BF
	Erde
	DVI-Ausgang
Andere	
	CE-Zeichen für Konformität mit Europäischer Richtlinie 93/42/EWG und Ergänzung 2007/47/EWG
	Auf sichere Entsorgung des Geräts achten
	Elektrostatisch gefährdetes Bauteil
 	Achtung: Siehe Bedienungsanleitung
	Warnung: Siehe Bedienungsanleitung

Symbol	Bedeutung
	Quetschgefahr. Hände und Finger fernhalten.
	Vermeiden Sie seitliches Schieben des Aixplorer oder ein Anschieben über den Monitor, und schieben Sie das System auch nicht bei starkem Widerstand. Es könnte umkippen.
	Sitzen Sie nicht auf dem System, der Druckerabdeckung, dem Bedienpult oder den Griffen.
	Hersteller - Herstellungsdatum
	Feuchtigkeitsgrenzwerte Zeigt den Luftfeuchtigkeitsbereich an, in dem das medizinische Gerät sicher betrieben werden kann.
	Grenzwerte für den atmosphärischen Druck Zeigt den atmosphärischen Druck an, bei dem das medizinische Gerät sicher betrieben werden kann.

Allgemeine Gerätesicherheit

Lesen Sie die Bedienungsanleitung bitte sorgfältig und machen Sie sich mit Ultraschallsystem und den Schallköpfen vor der Anwendung vertraut.



WARNUNG

Nehmen Sie keinesfalls das Gehäuse ab. Im Inneren des Systems sind gefährliche Spannungen vorhanden.

Verwenden Sie ausschließlich mitgelieferte Netzkabel und schließen Sie diese an entsprechend geerdete Wandsteckdosen an, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

Betreiben Sie das System nicht in der Nähe von entflammaren Anästhetika. Dies kann zu einer Explosion führen.

Nehmen Sie das System niemals in Betrieb, wenn eine größere Menge (2 ml oder mehr, nasse Oberfläche) Flüssigkeit (Wasser, Salzlösung, Alkohol, Blut usw.) durch das Außengehäuse, einschließlich des Bedienpults, getreten ist. Nehmen Sie das System erst nach Entfernen der Flüssigkeit in vollkommen trockenem Zustand wieder in Gebrauch.

Bewegen Sie das System auf Rampen und in engen Gängen vorsichtig.

Halten Sie Hände und Füße von den Rädern fern, wenn Sie das System umstellen oder transportieren.

Betätigen Sie vor Wartungs- oder Reinigungsarbeiten stets den ON/Standby-Schalter, um das System in den Ruhemodus zu versetzen. Stellen Sie dann den Betriebsschalter auf OFF und trennen Sie das System vom Netz.

Vermeiden Sie seitliches Schieben des Systems, und schieben Sie das System auch nicht bei starkem Widerstand. Es könnte umkippen.



ACHTUNG

Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Personal erfolgen.

Reparatur- und Wartungsarbeiten müssen ausschließlich von autorisiertem Personal vorgenommen werden. Der Anwender ist verantwortlich für Reparatur- und Wartungsarbeiten, die von nicht autorisiertem Personal vorgenommen werden und zum Verlust jeglicher ausdrücklicher oder stillschweigender Garantieansprüche führen können.

Für einen optimalen Betrieb sollte das Aixplorer® System an einen Stromkreis mit einer Belastbarkeit von mindestens 1500 W angeschlossen werden.

Zur Vermeidung von Interferenzen wird von einem Betrieb des Geräts in einer Umgebung abgeraten, in der tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte verwendet werden.

Vermeiden Sie das Hantieren mit Flüssigkeiten in der Nähe des Systems. Dringt Flüssigkeit durch die Entlüftung des Systems ein, kann dies zu einem Ausfall der Stromversorgung führen.

Warme Luft tritt an der Rückseite, den beiden Seiten und an der Unterseite des Systems aus. Dies ist normal, wenn das System in Betrieb ist. Achten Sie darauf, die Lüftungsöffnungen auf der Hinterseite des Systems nicht zu blockieren oder zu verstopfen.

Verwenden Sie zum Umstellen des Systems den Griff auf der Vorderseite

Achten Sie darauf, nicht über die Kabel des Systems oder der Schallköpfe zu fahren, um diese nicht zu beschädigen.

Versuchen Sie niemals, die Systemabdeckungen, Schallköpfe oder Schallkopfanschlüsse zu öffnen.

Tauchen Sie die System- und Schallkopfkabel nicht in Flüssigkeit ein.

Ultraschall-Schallköpfe werden durch falsche Handhabung schnell beschädigt. Lassen Sie den Schallkopf nicht fallen und halten Sie ihn von scharfen oder scheuernden Oberflächen und Objekten fern.

Unsachgemäßes Reinigen oder Sterilisieren des Schallkopfs kann permanente Schäden verursachen. Siehe [Kapitel 9, Systempflege und Instandhaltung](#) [431].

Die automatische Freeze-Funktion schaltet die Energiezufuhr zum Schallkopf ab, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Hierdurch wird eine zu starke Erwärmung und Beschädigung des Schallkopfs vermieden.

Sollte eine Fehlermeldung auf dem Monitor angezeigt werden, die auf eine Gefahrensituation hinweist, so notieren Sie sich den Fehlercode und schalten das System aus. Wenden Sie sich zur Lösung des Problems an den Kundendienst von SuperSonic Imagine.

Stellen Sie keine Peripheriegeräte oder andere Geräte mit einem Gewicht über 10 kg auf das System. Es könnte sonst kippen.

Bei Erreichen einer übermäßig hohen Innentemperatur zeigt das System eine Warnmeldung an und schaltet sich schließlich automatisch für 30 Minuten ab, um einen Überhitzungsschaden zu vermeiden.

Elektrische Sicherheit

Dieses System wurde von einem unabhängigen Prüfunternehmen getestet und als Elektrogerät der Klasse 1 mit isolierten Teilen vom Type BF zur Anwendung an Patienten befunden.

Das Produkt erfüllt folgende Normen:

- IEC 60601-1, UL 60601-1, CAN/CSA- C22.2 Nr. 601.1



WARNUNG

Es besteht die Gefahr eines Stromschlages, wenn das System nicht ordnungsgemäß geerdet ist. Das System muss an eine geerdete Wandsteckdose angeschlossen werden. Die Erdungsleitung muss in einwandfreiem Zustand sein. Verwenden Sie keinesfalls Adapter oder Konverter für den Anschluss an eine Steckdose (Dreistift-auf-Zweistift-Adapter).

Verwenden Sie ausschließlich die von SuperSonic Imagine mitgelieferten Kabel und schließen Sie diese gemäß dem Montageverfahren an.

Überprüfen Sie die Stromkabel und Stecker regelmäßig auf ihren einwandfreien Zustand, um Stromschlag- und Brandgefahr zu vermeiden.

Im Inneren des Systems sind gefährliche Spannungen vorhanden. Das Gehäuse des Systems darf daher nicht abgenommen werden.

Einstellungsänderungen und Komponentenaustausch im Inneren des Systems müssen von einem autorisierten SuperSonic Imagine-Servicemitarbeiter durchgeführt werden.

Wartung der Stromversorgung: das System muss mindestens für zwei Minuten von der Stromversorgung getrennt sein, bevor Sie auf die stromführenden Teile der Stromversorgung zugreifen können.

Überprüfen Sie stets den Schallkopf vor der Verwendung, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass seine Oberfläche keine Sprünge, Risse oder Brüche aufweist und dass weder Gehäuse noch Kabel beschädigt sind.

Elektrostatische Entladungen und Schläge sind ein Naturphänomen. Ein elektrostatischer Schlag ist eine Entladung von elektrischer Energie, die auf Aktenschränke, Computergeräte, Metalltürgriffe und andere Personen übertragen werden kann. Elektrostatische Schläge treten am häufigsten unter feuchtigkeitsarmen Umgebungsbedingungen infolge von Heizung oder Klimaanlage auf.

Um Schäden am System oder an Schallköpfen infolge einer elektrostatischen Entladung eines Anwenders oder Patienten zu vermeiden, empfiehlt sich die Verwendung antistatischer Matten, Sprays oder einer Masseverbindung zwischen dem System und der Patientenliege.



ACHTUNG

Ethernet-Stecker dürfen nur an IEC-zertifizierte Geräte angeschlossen werden. Es kann jedes beliebige USB-Gerät an das System angeschlossen werden, sofern es über eine eigene Stromversorgung verfügt.

Vorsicht beim Ein- und Ausstecken des Systems.

Achten Sie darauf, beim Ein- oder Ausstecken des Schallkopfes die Pin-Verbindung nicht zu berühren.

Führen Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen des Gehäuses ein.

Sollte ein Gegenstand durch eine Öffnung des Gehäuses fallen, so schalten Sie das System sofort aus und verwenden Sie es erst wieder, nachdem es von einem autorisierten Service-Mitarbeiter überprüft wurde.

Elektromagnetische Interferenzen

Für medizinische elektrische Geräte sind besondere Vorsichtsmaßnahmen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) erforderlich. Die Aufstellung und Inbetriebnahme hat nach den EMV-Vorgaben zu erfolgen. Das Aixplorer® System darf ausschließlich von autorisiertem SuperSonic Imagine-Personal aufgestellt werden. Dieses System wurde getestet und entspricht den Normen für Medizinprodukte der Klasse A nach IEC 60601-1-2. Diese Normen sorgen für einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen in Krankenhäusern und Kliniken. Dieses Gerät kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Bei Nichtbeachtung der Anweisungen für Aufstellung und Einsatz des Aixplorer kann es zu Interferenzen mit anderen Geräten in seiner Nähe kommen. Ein Ausschalten und erneutes Einschalten des Systems zeigt, ob die Störung von diesem Gerät verursacht wird. Überdies können elektromagnetische Felder aus ortsfesten Sendern wie etwa Basisstationen für Mobil- oder Schnurlostelefone sowie beweglicher Landfunk, Amateurfunk, AM- und FM-Radio- und Fernsehsender mit der Verwendung dieses Geräts interferieren. Tragbare und mobile HF-Kommunikationssysteme können die Funktion des Geräts beeinträchtigen. Diese Felder können die Bildqualität des Geräts beeinträchtigen. EMI-Quellen können nicht immer im Voraus erkannt werden.

Sollte es zu schädlicher Interferenz zwischen diesem System und anderen Geräten kommen oder weist das System Interferenzmuster auf dem Bild auf, so versuchen Sie bitte, die Interferenz folgendermaßen zu beheben:

- Vergrößern Sie den Abstand zwischen den Teilen des Systems
- Stellen Sie sicher, dass das System nicht an dieselbe Steckdose wie andere Geräte angeschlossen ist.
- Verwenden Sie nur abgeschirmte Kabel für den Anschluss des Systems an Netzwerke und Peripheriegeräte.
- Richten Sie das System neu aus.
- Bitten Sie den Hersteller oder Kundendienstberater um Hilfe.

Sollte der Betrieb danach weiterhin beeinträchtigt sein, so sind eventuell weitere Maßnahmen wie eine Umstellung des Systems erforderlich.

Empfohlene Abstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsmitteln und dem Aixplorer®

Der Aixplorer® ist für den Einsatz in einer elektromagnetischen Umgebung mit kontrollierten HF-Störungen ausgelegt. Der Kunde oder der Benutzer des Aixplorer® kann dazu beitragen, elektromagnetische Störungen zu verhindern, indem er den im Folgenden aufgeführten Mindestabstand zwischen den tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsmitteln (Sender) und dem Aixplorer® einhält, der für die maximale Nennleistung des Kommunikationsgeräts gilt.

Maximale Nennleistung Sender w	Schutzabstand gemäß Sendefrequenz m		
	150 kHz bis 80 MHz $d = 35 \sqrt{P}$	80 MHz bis 800 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	800 MHz bis 2,5 GHz $d = 2.3 \sqrt{P}$
0.01	3.5	0.12	0.23
0.1	11	0.40	0.73
1	35	1.2	2.3
10	111	3.8	7.3
100	350	12	23

Für Sender mit einer anderen maximalen Nennleistung als den o.g. Werten kann der empfohlene Schutzabstand d in Metern (m) anhand der Gleichung für die Senderfrequenzen berechnet werden, wobei P die maximale Nennleistung des Senders in Watt (W) gemäß Angaben des Senderherstellers ist.

ANMERKUNG 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Schutzabstand für den höheren Frequenzbereich.

ANMERKUNG 2: Diese Leitlinien gelten möglicherweise nicht in allen Fällen. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch die Absorption und Reflexion von Gebäuden, Gegenständen und Personen beeinflusst.



WARNUNG

Dieses System darf nur von medizinischem Fachpersonal betrieben werden.

Dieses System kann Funkstörungen verursachen oder den Betrieb von Geräten in der Umgebung unterbrechen.

Eventuell sind Entstörungsmaßnahmen erforderlich, wie etwa eine Neuausrichtung oder Umstellung des Aixplorer® oder eine Abschirmung des Standortes



ACHTUNG

Wird das System beim Vorhandensein eines elektromagnetischen Feldes eingesetzt, kann dies zu einer Betriebsleistung außerhalb der angegebenen Leistungsparameter führen.

Vermeiden Sie die Verwendung von Mobiltelefonen, Pagern, Radiogeräten, Fernsehern oder Geräten zur Mikrowellenübertragung in der Nähe des Systems.

Werden andere Kabel, Schallköpfe und Zubehörteile als die mit dem Produkt mitgelieferten verwendet, kann dies zu erhöhten Emissionen des Systems führen.

Achten Sie darauf, beim Ein- oder Ausstecken des Schallkopfes die Pin-Verbindung nicht zu berühren.

Schließen Sie den Schallkopf nur an, wenn Vorsichtsmaßnahmen für den Fall einer elektrostatischen Entladung getroffen wurden.

Aixplorer® ist mit folgenden Kabeln ausgestattet:

Kabeltyp	Länge
Stromkabel	3m
Schallkopf-Kabel	2,10m
Ethernet-Kabel	5m

Aixplorer® wurde mit folgendem Zubehör auf elektromagnetische Verträglichkeit getestet:

- SONY UP-D711MD, integrierter Schwarz-Weiß-Drucker
- SONY UP-D25MD, Farbdrucker mit Einbaueinheit
- SuperSonic Imagine SL15-4 Schallkopf

- SuperSonic Imagine SC6-1 Schallkopf
- SuperSonic Imagine SE12-3 Schallkopf
- SuperSonic Imagine SLV16-5 Schallkopf
- SuperSonic Imagine SLV10-2 Schallkopf
- SuperSonic Imagine SLH20-6 Schallkopf
- SuperSonic Imagine SMC12-3 Schallkopf
- SuperSonic Imagine XP5-1 Schallkopf
- Ethernet-Kabel, CAT6a SFTP (PIMF) 500MHz (geschirmt) AWG26/7, entspricht den Standards EIA/TIA568 B2- ISO/IEC11801, maximale Länge 5 m
- Fußschalter



WARNUNG

Der Gebrauch von Zubehör und Kabeln, die hier nicht erwähnt wurden, kann zu erhöhten Emissionen oder einer größeren Systemanfälligkeit führen.

Erklärung zu elektromagnetischen Aussendungen

Aixplorer® ist für den Einsatz in nachstehend genannter Umgebung geeignet. Der Anwender muss gewährleisten, dass das System nur in dem in der Tabelle angegebenen elektromagnetischen Umfeld genutzt wird.

Emissionstest	Konformität	Elektromagnetische Umgebung - Leitfadern
HF-Emission CISPR 11	Gruppe 1	Aixplorer® verwendet HF-Energie nur für seine interne Funktion. Seine HF-Emissionen sind daher minimal und Störungen von benachbarten elektronischen Geräten unwahrscheinlich.
HF-Emission CISPR 11	Klasse A	Aixplorer® ist für den Einsatz in allen Einrichtungen außer Wohnräumen und jenen mit unmittelbarem Anschluss an das öffentliche Niederspannungsnetz zur Versorgung von Gebäuden für Wohnzwecke geeignet.
Emission von Oberschwingungen nach IEC 61000-3-2	Klasse A	
Emission von Spannungsschwankungen/ Flicker nach IEC 61000-3-3	konform	




WARNUNG

Aixplorer® und Zusatzgeräte sollten nicht neben anderen elektrischen Geräten betrieben oder mit ihnen gelagert werden.

Lässt sich dies nicht vermeiden, überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Aixplorer® und der Zusatzgeräte.

Störfestigkeits-Erklärung

Leitlinien und Herstellererklärung - Elektromagnetische Störfestigkeit			
Aixplorer® ist für den Einsatz in nachstehend genannter Umgebung geeignet. Der Anwender muss sicherstellen, dass das System gemäß den vorgegebenen Leitlinien und ausschließlich in der elektromagnetischen Umgebung gemäß folgenden Vorgaben verwendet wird:			
Störfestigkeit	IEC 60601 Konformitätsniveau	Prüfpegel	Leitlinien für elektromagnetische Umgebung
Geleitete HF-Störgrößen nach IEC 61000-4-6 Gestrahlte HF-Störgrößen nach IEC 61000-4-3	3 Veff 150 kHz bis 80 MHz 3 V/m 80 MHz bis 2,5 GHz	0,10 Veff 3,0 V/m	Zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten und beliebigen Teilen des Aixplorer® Systems (einschließlich seiner Verkabelung) muss der empfohlene Abstand eingehalten werden, der sich aus der Berechnungsformel für die entsprechende Sendefrequenz ergibt. Empfohlener Schutzabstand $d = 35 \sqrt{P}$ $d = 1.2 \sqrt{P}$ 80 MHz bis 800 MHz $d = 2.3 \sqrt{P}$ 800 MHz bis 2,5 GHz mit P als der Nennleistung des Senders in Watt (W) gemäß Angaben des Senderherstellers und d als empfohlenem Schutzabstand in Metern (m). In der Umgebung von Geräten mit dem folgenden Symbol können Störungen auftreten: 

ANMERKUNG 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.

ANMERKUNG 2: Diese Leitlinien gelten möglicherweise nicht in allen Fällen. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch die Absorption und Reflexion von Gebäuden, Gegenständen und Personen beeinflusst.

a) Die Feldstärke stationärer Sender, wie z. B. Basisstationen von Funktelefonen (mobil/schnurlos) und mobilen Landfunkgeräten, Amateurfunkstationen, AM- und FM-Rundfunk- und Fernsehsender können theoretisch nicht genau vorherbestimmt werden. Um die

elektromagnetische Umgebung hinsichtlich der stationären HF-Sender zu ermitteln, sollte eine Studie des Standorts erwogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke am Standort des Aixplorer® den anzuwendenden HF-Grenzwert überschreitet, sollte der Aixplorer® beobachtet werden, um sicherzustellen, dass ein normaler Betrieb gewährleistet ist. Sollte der Betrieb beeinträchtigt sein, so sind eventuell weitere Maßnahmen wie eine Neuausrichtung oder Umstellung des Aixplorer® erforderlich..

b) Über den Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollte die Feldstärke unter [VI] V/m liegen.

Störfestigkeitstest	IEC 60601 Prüfpegel	Konformitätsniveau	Leitlinien für elektromagnetische Umgebung
Elektrostatische Entladung (ESD) nach IEC 61000-4-2	±6 kV Kontaktentladung ± 8 kV Luftentladung	± 4 kV Kontakt ± 8 kV Luft	Fußböden sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen sein. Bei Fußböden aus synthetischem Material muss die relative Luftfeuchtigkeit min. 30% betragen.
Schnelle transiente elektr. Störgrößen/ Bursts nach IEC 61000-4-4	±2 kV für Netzleitung ±1 kV für Eingangs-/ Ausgangsleitungen	±2 kV für Netzleitung ±1 kV für Eingangs-/ Ausgangsleitungen	Die Qualität der Versorgungsspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Stoßspannung (Surge) nach IEC 61000-4-5	±1 kV Gegentaktspannung ±2 kV Gleichtaktspannung	±1 kV Gegentaktspannung ±2 kV Gleichtaktspannung	Die Qualität der Versorgungsspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Schwankungen der Versorgungsspannung	<5 % UT (>95 % Einbruch in UT) für 0,5 Zyklen 40 % UT	<5 % UT (>95 % Einbruch in UT) für 0,5 Zyklen 40 % UT	Die Qualität der Versorgungsspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen.
HINWEIS: UT ist die Netzwechselfspannung vor der Anwendung des Testbereichs.			

Störfestigkeitstest	IEC 60601 Prüfpegel	Konformitätsniveau	Leitlinien für elektromagnetische Umgebung
nach IEC 61000-4-11	(60% Einbruch in UT) für 5 Zyklen 70 % UT (30 % Einbruch in UT) für 25 Zyklen <5 % UT (>95 % Einbruch in UT) für 5 Sek	(60% Einbruch in UT) für 5 Zyklen 70 % UT (30 % Einbruch in UT) für 25 Zyklen <5 % UT (>95 % Einbruch in UT) für 5 Sek	entsprechen. Wenn ein ununterbrochener Betrieb des Aixplorer® auch bei Unterbrechungen der Hauptstromversorgung gewährleistet sein muss, ist es empfehlenswert, den Aixplorer® über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zu betreiben.
Magnetfeld bei der Versorgungsfrequenz (50/60Hz) nach IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Magnetfelder bei der Netzfrequenz sollten den typischen Werten, wie sie in der Geschäfts- und Krankenhausumgebung vorzufinden sind, entsprechen.
HINWEIS: UT ist die Netzwechselspannung vor der Anwendung des Testbereichs.			

Thermische Sicherheit

Unser System wurde so konzipiert, dass (gemessen nach der IEC Norm 60601-2-37) seine Oberflächentemperatur 50°C in der Luft bzw. 43°C bei Kontakt mit dem Patienten oder Anwender nicht übersteigt. Das Ultraschallsystem und der Schallkopf erzeugen ein gewisses Maß an Wärme. Die von den elektrischen Bestandteilen des Ultraschallsystems erzeugte Wärme wird über spezielle Lüftungsausgänge abgeleitet.

Die Oberfläche des Ultraschallkopfes kann sich ebenfalls erwärmen. In einigen Fällen lässt sich die Wärme des Schallkopfs auf der Haut spüren. Dies kann der Fall sein, wenn der Schallkopf längere Zeit an der gleichen Körperstelle verbleibt.

Das Ultraschallsystem wurde mit Innensensoren ausgestattet, die den Temperaturanstieg im Gehäuse überwachen. Bei einer Überhitzung kann das System Alarme und WARNUNGEN anzeigen. Bei extremer oder übermäßig langer Erwärmung schaltet sich das System automatisch aus.

Sollte die Erwärmung des Schallkopfes oder Systems zu Problemen führen, so wenden Sie sich bitte sofort an Ihren SuperSonic Imagine-Servicemitarbeiter.



WARNUNG

Übersteigt die Umgebungstemperatur die empfohlenen Betriebstemperaturwerte, kann es zu einer Überhitzung des Systems kommen. Stellen Sie zur Vermeidung von Überhitzung sicher, dass das System bei normaler Raumtemperatur betrieben wird und ein angemessenes Belüftungssystem vorhanden ist.

Ultraschall kann gesundheitsschädigende Wirkungen auf Gewebe haben und eventuell zu Verletzungen des Patienten führen. Achten Sie stets darauf, die Belastungszeit für den Patienten so kurz wie möglich zu halten. Arbeiten Sie mit niedriger Ultraschallintensität, wenn höhere Werte keinen medizinischen Vorteil bringen (ALARA-Prinzip).

Im Fall einer Überhitzung des Systems aufgrund äußerer Bedingungen oder eines internen Defekts gibt das System eine Warnmeldung aus und schaltet sich abrupt ab, um Hitzeschäden oder Brand zu vermeiden. Schalten Sie das System in diesem Falle nicht mehr ein, und wenden Sie sich an Ihren SuperSonic Imagine Service-Mitarbeiter.

Die Schallkopffläche kann sich erwärmen. Dies tritt vor allem bei längerer Verwendung des Schallkopfes auf und/oder wenn die Kontaktstelle mit dem Körper unverändert bleibt. Halten Sie sich bitte an das ALARA-Prinzip, um eine unnötige Erwärmung des Patienten bzw. Schallkopfes zu vermeiden.

Wird der Schallkopf nicht verwendet, empfiehlt sich die Anwendung der „FREEZE“-Funktion, um die Schallenergiezufuhr zu unterbrechen.

Positionieren Sie den Schallkopf nicht zu lange auf derselben Kontaktstelle, da es sonst zu leichten Verbrennungen kommen kann.



ACHTUNG

Nehmen Sie das System nicht in Betrieb, wenn die Umgebungstemperatur die empfohlenen Grenzwerte überschreitet.

Vorsicht beim Betrieb des Systems in kleinen Räumen. Die Raumtemperatur kann sich erhöhen.

Ersetzen bzw. reinigen Sie die Luftfilter regelmäßig, um einer Überhitzung des Systems vorzubeugen.

Das Ultraschallsystem ist mit einer Auto-FREEZE-Funktion ausgestattet, die sich aktiviert, wenn innerhalb eines vom Anwender festgesetzten Zeitraums keines der Bildgebungs-Bedienelemente betätigt wird. So wird eine Erhitzung des Schallkopfes vermieden. Verwenden Sie die FREEZE-Taste, um die Abtastung fortzusetzen.

Gibt das System ständig Betriebstemperaturwarnungen aus, so brechen Sie die Untersuchung mit dem System ab. Wenden Sie sich zur Lösung des Problems an Ihren SuperSonic Imagine Service- Mitarbeiter.

Erreicht das System eine bestimmte Temperatur, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Mechanische Sicherheit

Bei der ergonomischen und mechanischen Optimierung dieses Ultraschallsystems stehen Bedienkomfort, Leistungseffizienz und

Sicherheit im Vordergrund. Voraussetzung für optimale Ergebnisse sind jedoch die genaue Befolgung sämtlicher Anweisungen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen, die in dieser Anleitung besprochen werden.

Brechen Sie im Falle eines mechanischen Schadens den Einsatz des Systems sofort ab und bitten Sie einen autorisierten SuperSonic Imagine-Servicemitarbeiter um Hilfe.



WARNUNG

Nehmen Sie das System niemals in Betrieb, wenn Teile des Gehäuses fehlen, Sprünge aufweisen, beschädigt oder falsch montiert sind.

Eine Berührung der elektrischen bzw. mechanischen Innenbauteile kann zu Verletzungen oder Tod führen.

Sollte ein Gegenstand durch eine Öffnung des Gehäuses fallen, so schalten Sie das System sofort aus und verwenden Sie es erst wieder, nachdem es von einem autorisierten Service-Mitarbeiter überprüft wurde.

Vermeiden Sie seitliches Schieben des Aixplorer oder ein Anschieben über den Monitor, und schieben Sie das System auch nicht bei starkem Widerstand. Es könnte umkippen.



ACHTUNG

Vorsicht beim Zugang zu den für Peripheriegeräte vorgesehenen Bereichen.

Vorsicht beim Anfassen der Kabel auf der Rückseite des Systems. Einige der mechanischen Außenteile können Abschürfungen verursachen.

Gleiten die Räder des Systems nicht widerstandslos über den Boden, so wenden Sie keine Kraft an.

Stellen Sie keine Peripheriegeräte oder andere Geräte mit einem Gewicht über 10 kg auf das System. Es könnte sonst kippen.

Achten Sie darauf, nicht über die Kabel des Systems oder der Schallköpfe zu fahren, um diese nicht zu beschädigen.

Versuchen Sie niemals, einen Schallkopf oder Schallkopfanschluss zu öffnen.

Tauchen Sie die System- und Schallkopfkabel nicht in Flüssigkeit ein.

Sichere Durchführung von Ultraschalluntersuchungen mit dem SuperSonic Imagine Aixplorer® System

Bioeffekte und Biophysik im Ultraschall

Frequenz und Energieniveau von Ultraschallwellen

Ultraschall ist Schall oberhalb der menschlichen Hörgrenze, im Frequenzbereich von über 20 kiloHertz (kHz). Medizinisch-diagnostische Ultraschallsysteme erzeugen in der Regel Ultraschallwellen zwischen 1 und 20 MegaHertz (MHz). Ein Aufnehmer, oder Schallkopf wird auf den Körper des Patienten gehalten. Er strahlt Ultraschallwellen ab, die in den Körper eintreten und an den Grenzen zwischen Gewebetypen reflektiert werden. Der Schallkopf empfängt diese Reflexionen. Sie werden von einem Computersystem zusammengesetzt und verarbeitet, und werden anschließend als Bild auf einem Monitor angezeigt. Die Hauptparameter der Ultraschallwellen, wie Frequenz, Dichte, Fokussierung und Apertur, können variieren. So erzeugen Strahlen bei höheren Frequenzen zwar Bilder mit einer höheren Auflösung, dringen jedoch nicht so tief in den Körper ein wie niedrigere Frequenzen, die wiederum Bilder mit geringerer Auflösung erzeugen. Die Frequenzwahl ist daher immer ein Kompromiss zwischen räumliche Auflösung und Bildtiefe. Das Energieniveau von Ultraschallwellen wird in W/cm^2 gemessen. Es werden zwei Schlüsselwerte berechnet und berücksichtigt: der räumliche Spitzenwert der zeitlich gemittelten Intensität (I_{SPTA} , gemessen in mW/cm^2 , sowie der räumliche Spitzenwert der gemittelten Pulsintensität (I_{SPPA} , der in W/cm^2 gemessen wird. Diagnostische Ultraschallsysteme arbeiten normalerweise mit einem Energieniveau, das einem I_{SPTA} zwischen 0 und $720 mW/cm^2$ entspricht.

Richtlinienänderung und Anwenderschulung

Die ersten für die Ultraschallgeräte-Hersteller vorgesehenen Richtlinien und Empfehlungen wurden 1983 vom American Institute Of Ultrasound In Medicine (AIUM) vorgelegt. Diese Richtlinien wurden 1988 revidiert, wobei die Energiehöchstgrenze auf 100 mW/cm² festgelegt wurde. Unterhalb dieser Grenze wurden keine unerwünschten Bioeffekte bei Tieren oder Menschen berichtet, obwohl später (1993) gegenteilige Beobachtungen berichtet wurden. Seit 1993 hat die Food and Drug Administration (FDA) eine Höchstgrenze für die akustische Leistung von Ultraschallgeräten festgesetzt. Im Zuge der Entwicklung immer ausgefeilterer Systeme mit verbesserter Bildqualität und größerer diagnostischer Sensitivität erkannte man jedoch, dass eine sichere Erhöhung des Limits unter bestimmten Umständen diagnostische Vorteile mit sich bringt (z.B. bei Patienten mit ausgeprägtem Fettgewebe). 1997 erhöhte die FDA die Höchstgrenze für das Energieniveau beträchtlich (siehe Abschnitt Aktueller Stand von Ausgangswerten und erkannte dem Anwender bei der Minimierung möglicher biologischer Effekte des Ultraschalls eine wichtigere Rolle zu. Abschließend ist der Anwender für eine fundierte Entscheidung im Hinblick auf die gewünschten diagnostischen Informationen im Vergleich zu den möglichen unerwünschten Bioeffekten verantwortlich. Jeder Anwender muss daher über eine entsprechende Ausbildung oder Schulung verfügen, um diese Entscheidungen verantworten zu können. In diesem Zusammenhang veröffentlichte das AIUM 1994 das Dokument „Medical Ultrasound Safety“, das wie diese Schulungsinhalte sehr empfohlen wird.

Ultraschall-Anwendung: Historie und Sicherheitsaspekte

Ab den 1950er Jahren fand der Ultraschall Anwendung in der klinischen Medizin. Er wurde trotz anhaltender Sicherheitsbedenken stets als mögliches medizinisches Bildgebungsverfahren betrachtet: Von Anfang an zeigten verschiedene Studien, dass sich genügend hohe Ultraschallintensitäten schädlich auf biologisches Material auswirken können, und dies sogar bei niedrigeren Dosen als den heute verwendeten. Da jedoch keine Nebenwirkungen bei Patienten auftraten, wurde die diagnostische Ultraschalltechnologie immer weiter entwickelt und

verbessert, bis Mitte der 1980er Jahre mit Graustufen- und Echtzeit-Bildgebung ein neuer Höhepunkt erreicht war. Gleichzeitig verbesserte sich auch die Quantifizierung von Ultraschallfeldern maßgeblich, womit ein Instrument zur präzisen Messung von Ultraschallintensitäten geschaffen war. Die diagnostische Ultraschall-Bildgebung hat im Laufe der letzten 50 Jahre eine hervorragende Sicherheitsbilanz aufzuweisen. Auch die jüngste Entwicklung neuer Anwendungen und Modi sowie der vermehrte Einsatz von Ultraschall haben diese Bilanz nicht trüben können. Das Thema Sicherheit bleibt im Fokus der Regulierungsbehörden. Diese befassen sich weiterhin mit der Überarbeitung von Richtlinien und Normen, um Risiken möglichst klein zu halten und sichere Rahmenbedingungen für Patienten, Hersteller und Anwender zu gewährleisten.

Potentielle Gefahren bei hoher Ausgangsleistung

Schädliche Wirkungen von Ultraschall wurden erstmals von Paul Langevin im Jahre 1917 beobachtet: „Fische, die in einem kleinen Gefäß in den Schallstrahl in der Nähe der Emissionsquelle gestellt wurden, starben sofort, während verschiedene Beobachter einen Schmerz verspürten, als sie die Hand in diesen Bereich hielten“. 1930 veröffentlichte Harvey die erste Studie über biologische Effekte des Ultraschalls: Er berichtete von den physikalischen, chemischen und biologischen Auswirkungen, die Änderungen bei Makromolekülen, Mikroorganismen, Zellen, isolierten Zellen, Bakterien, Gewebe und Organen hervorriefen. Dabei konzentrierte er sich auf Wechselwirkungsmechanismen. Mitte der 1990er Jahre wurden im Rahmen einer Tierstudie Lungen- und Darmblutungen bei einer dreiminütigen gepulsten 2-MHz-Ultraschalluntersuchung beobachtet, die jedoch nicht interoperativ mittels transösophagealer Echokardiographie bestätigt wurden.

Einige Beispiele für mögliche schädliche biologische Auswirkungen des Ultraschalls:

- Zellen der Sinnesorgane (Augen, Ohren, Nervengewebe) sind besonders empfindlich gegenüber Ultraschall und können durch thermische Effekte zerstört werden.
- Kavitationsmechanismen können Risse an den Innenwänden der Blutgefäße verursachen und thrombogene Prozesse auslösen.

- Zellyse wurde in-vitro bei kontinuierlicher 1-MHz-Ultraschallbelastung aufgrund von Kavitation beobachtet.
- Vorzeitige Herzkontraktion mit normaler Erholung wurde bei Fröschen bei einer 1,2-MHz-Belastung mit einem 5-Millisekunden-Einzelimpuls beobachtet.
- Bei Affen wurde eine veränderte Entwicklung der Blutzellen nach mehrfacher Belastung mit Ultraschall unter diagnostischen Bedingungen beobachtet.

Überdies können mögliche biologische Auswirkungen des Ultraschalls auf subzellulärer Ebene zu Struktur- und Funktionsänderungen in den Zellmembranen führen, was die Signalübertragung beeinträchtigen kann.

Mechanismen für thermische und nicht-thermische biologische Effekte

Ultraschall kann eine Gewebeerwärmung (thermische Effekte) verursachen und nicht-thermische Effekte (mechanische Effekte) hervorrufen.

THERMISCHE EFFEKTE

Ultraschallwellen, die sich in biologischem Gewebe ausbreiten, werden in einem gewissen Abstand von ihrer Emissionsquelle durch Streuung (Umlenkung des Ultraschallstrahls) und/oder Absorption (Umwandlung in Wärme) gedämpft. Je nach Gewebebeschaffenheit kommt es zu einem Temperaturanstieg, wenn die Erwärmungsgeschwindigkeit größer als die Abkühlgeschwindigkeit des Gewebes ist. Diese Auswirkungen können die Vorteile einer Ultraschalluntersuchung aufheben. Der Anwender muss sich dieses Risikos bewusst sein.

NICHT-THERMISCHE ODER MECHANISCHE EFFEKTE

Nicht-thermische Effekte sind u.a. Kavitation, Erzeugung von Hörschall, Zellbewegung in Flüssigkeit, elektrische Veränderungen

in Zellmembranen, Schrumpfung und Ausdehnung von Blasen in Flüssigkeit und akustische Druckänderungen. Das Phänomen der Kavitation wurde eingehend untersucht: es tritt auf, wenn Blasen in einem Ultraschallfeld zu schwingen beginnen. Dieser Effekt wurde jedoch nicht in menschlichem Gewebe nachgewiesen; es wurden lediglich einige Fälle von Blutungen in der Lunge oder dem Darm von Labortieren beobachtet. Weitere ultraschallbedingte nicht thermische Effekte sind Änderungen von Druck, Kraft, Torsion (verursacht Gewebeschwingungen) und Strömung. Akustische Phänomene und elektrische Veränderungen von Zellmembranen können die Folge derartiger Änderungen sein und zu Zellschäden führen. Die Folgen nicht-thermischer biologischer Effekte können Gewebeschäden, letztendlich Zelltod, Zellmembranrupturen oder Rupturen kleiner Blutgefäße sein. Auch wenn diese biologischen Auswirkungen bislang nicht am Menschen beobachtet wurden, ist ihr Auftreten bei Technologien der Zukunft nicht ausgeschlossen.

STUDIEN ZUR BELASTUNGS-AUSWIRKUNG

Die biologischen Effekte von Ultraschall auf Ungeborene sind aufgrund der Gewebeentwicklung seit jeher ein wichtiges Thema, das in den späten 1980er Jahren, als neue Ultraschallverfahren (harmonische Bildgebung, Farb-Doppler und 3D-Bildgebung) aufkamen und sich neue diagnostische Möglichkeiten auftaten, noch mehr in den Vordergrund rückte. Da diese Verfahren potentiell mehr Ultraschallenergie benötigten, revidierte die FDA Anfang der 90er Jahre ihre Richtlinien für diagnostischen Ultraschall. Infolgedessen wurde die für fetale Untersuchungen erlaubte Höchstgrenze der Ausgangsleistung um mehr als das 7-fache ihres ursprünglichen Wertes erhöht. Diese neuen Richtlinien wurden mit einer gewissen Skepsis betrachtet und Forscher führten epidemiologische Studien durch, um Zusammenhänge zwischen Ultraschallbelastung und Geburtsfehlern in Verbindung mit der fötalen Entwicklung aufzudecken. Wie vom National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) geprüft wurde, beobachtete eine der größten Studien 15.000 Frauen in Australien. Sie galt jedoch nicht der Untersuchung von Geburtsfehlern. Die Tatsache, dass kein Anstieg von Geburtsfehlern beobachtet wurde, war daher zwar beruhigend, galt jedoch nicht als beweiskräftig. Eine weitere groß angelegte kanadische Studie befasste sich mit der Korrelation zwischen Ultraschalluntersuchung und Frühgeburt. Sie kam zu dem Ergebnis, dass die Säuglinge der Gruppe mit einer höheren Anzahl an Ultraschall-Screenings ein

geringfügig niedrigeres Geburtsgewicht aufwiesen. Die Interpretation epidemiologischer Studien kann jedoch dadurch beeinflusst werden, dass Ultraschalluntersuchungen auch bei Verdacht auf einen fötalen Defekt vorgenommen werden. Zudem gibt es laut NCRP nur ungenügende Beweise für den Rückschluss, dass diagnostischer Ultraschall unerwünschte Wirkungen wie niedriges Geburtsgewicht oder andere Nebenwirkungen verursacht. Diese Schlussfolgerung schließt jedoch die Möglichkeit von Nebenwirkungen nicht aus. Der Forschung sind Grenzen gesetzt, da Ärzte keine stringenteren Untersuchungen an ihren Patienten vornehmen können. Als einen vorläufigen verpflichtenden Schritt empfiehlt NCRO mehr Tierstudien.

Vorteile und Risiken

Diagnostische Ultraschallsysteme liefern diagnostische Informationen, die für Patient, Arzt und Gesundheitssystem von großem Vorteil sind. Die derzeit verfügbaren Systeme liefern sehr gute Bildqualität und verlässliche Daten, die dem Arzt optimale Entscheidungen ermöglichen.

Die Ultraschall-Bildbearbeitung ist aus verschiedenen Gründen eines der bevorzugten bildgebenden Verfahren:

- gilt als sicher,
- liefert hochsensitive und hochspezifische diagnostische Informationen,
- erfährt bei Patienten breite Akzeptanz,
- ist im Gegensatz zu anderen radiologischen Verfahren kostengünstiger.

Es sind jedoch Risiken mit der Entscheidung für oder gegen eine Ultraschalluntersuchung verbunden:

So wird der Patient durch die Ultraschalluntersuchung möglicherweise unerwünschten biologischen Effekten durch Erwärmung bzw. Kavitation ausgesetzt, auch wenn derartige Vorfälle bei diagnostischer Ultraschallintensität an Menschen bisher nicht beobachtet wurden. Ärzte müssen auch den erwarteten Vorteil gegen die möglichen Risiken einer Ultraschalluntersuchung abwägen. Sie müssen die für die Untersuchung erforderliche Intensität und Energie gegen die zu erzielenden nützlichen Informationen abwägen. Eine Erhöhung der Intensität, Belastungszeit,

der fokalen Eigenschaften und des Schalldrucks gehen mit einem erhöhten Risiko an biologischen Auswirkungen einher. Allerdings kann eine zu geringe Intensität zu mangelhaften diagnostischen Informationen führen.

Die Entscheidung gegen eine Ultraschalluntersuchung kann Ärzten und Patienten wichtige diagnostische Informationen vorenthalten oder letztendlich zur Anwendung anderer, invasiverer Verfahren oder Verfahren mit Ionenstrahlenbelastung führen, um zum selben Ergebnis zu kommen. Eine Entscheidung zugunsten einer Ultraschalluntersuchung sollte heutzutage ohne Zögern getroffen werden, wenn signifikante klinische Vorteile erwartet werden. Bei Ultraschalluntersuchungen des Herzens mittels transösophagealer Echokardiographie lassen sich Struktur und Funktion des Herzens sowie seiner großen Blutgefäße darstellen, so dass der Anwender den Verlauf des Blutflusses innerhalb des Herzens verfolgen kann. In den frühen 1980er-Jahren empfahl die National Institute of Health Consensus Development Conference, keine routinemäßigen Ultraschalluntersuchungen durchzuführen, hat aber eine Anzahl von entsprechenden klinischen Indikationen für die Verwendung der Ultraschall-Bildgebung während der Schwangerschaft identifiziert.

„Diagnostischer Ultraschall wird seit den spätern 1950er-Jahren eingesetzt. Auf Grundlage der bekannten Vorteile und anerkannten Wirksamkeit im Rahmen der medizinischen Diagnose, einschließlich der Verwendung während der Schwangerschaft beim Menschen, hat sich das American Institute of Ultrasound in Medicine mit der klinischen Sicherheit einer derartigen Verwendung befasst: Bisher wurden keine bestätigten Bioeffekte bei Patienten oder Geräteanwendern berichtet, die durch die Exposition mit einer Intensität verursacht wurde, die für heutige diagnostische Ultraschallgeräte üblich ist. Obwohl die Möglichkeit besteht, dass derartige Bioeffekte in Zukunft festgestellt werden, zeigen die aktuellen Daten, dass bei umsichtiger Verwendung des diagnostischen Ultraschalls der Nutzen für die Patienten die Risiken, sofern diese überhaupt vorhanden sind, überwiegt.“

AKTUELLER STAND VON AUSGANGSWERTEN

Seit der Einführung des Output Display Standard (ODS) 1992 sowie der Veröffentlichung der revidierten FDA-Richtlinien im September 1997 muss nach dem Output Display Standard für diagnostische Ultraschallsysteme, einschließlich des fötalen Dopplers (mit Ausnahme

von fötalen Herzfrequenzmonitoren), ein anwendungsunabhängiger maximaler Ausgangswert angegeben werden. Der Höchstwert ist derzeit auf (1) ein herabgesetztes I_{SPTA} -Limit von 720 mW/cm² und (2) einen maximalen MI von 1,9 oder herabgesetzten I_{SPPA} von 190 W/cm² festgesetzt. Einzige anwendungsspezifische Ausnahme sind Augenuntersuchungen mit geringeren Höchstwerten. Im Vergleich zu den in den Jahren 1985 und 1987 festgelegten und veröffentlichten anwendungsspezifischen Höchstwerten (siehe nachstehende Tabelle) sind die Höchstwerte heutiger Systeme weitaus höher.

Tabelle 3.1. FDA-Grenzwerte für diagnostische Ultraschallsysteme (FDA, 1985)

	Herabgesetzte Intensitätswerte		
	I_{SPTA} (mW/cm ²)	I_{SPPA} (W/cm ²)	I_m (W/cm ²)
Herz	430	65	160
Peripheres Gefäß	720	65	160
Auge	17	28	50
Fötale Bildgebung und andere*	46	65	160

* Pelvis, Intraop., Small Parts (Brust, Schilddrüse, Hoden), Schädel Neonatal, Schädel Adult

Tabelle 3.2. FDA-Grenzwerte für diagnostische Ultraschallsysteme (FDA, 1987)

	Herabgesetzte Intensitätswerte		
	I_{SPTA} (mW/cm ²)	I_{SPPA} (W/cm ²)	I_m (W/cm ²)
Herz	430	190	310
Peripheres Gefäß	720	190	310
Auge	17	28	50
Fötale Bildgebung und andere*	94	190	310

* Pelvis, Intraop., Small Parts (Brust, Schilddrüse, Hoden), Schädel Neonatal, Schädel Adult

Mit der Veröffentlichung der ODS im Jahre 1992 sind Anwender von Ultraschallgeräten in der Lage, ihre Systeme auf der Basis von

Echtzeit-Informationen zu den möglichen Risiken biologischer Effekte im Gewebe zu betreiben. Die Echtzeit-Informationen bestehen aus zwei biophysikalischen Kennzahlen, die als thermischer Index (mögliches Risiko eines Temperaturanstiegs) und mechanischer Index (mögliches Risiko einer mechanischen Gewebebeschädigung) bezeichnet werden. Diese Kennzahlen ermöglichen dem Anwender, angemessene und fundierte klinische Entscheidungen zu treffen, Risiken gegen Vorteile abzuwägen, und das ALARA-Prinzip (As Low As Reasonably Achievable) anzuwenden.

Empfohlene Kennzahlen als Indikatoren thermischer und mechanischer Effekte

THERMISCHER INDEX

Der thermische Index (TI) berechnet den Temperaturanstieg im beschallten Gewebe; sein Wert ergibt sich aus dem Verhältnis der Gesamtschalleistung zur Schalleistung, die für den Anstieg der Gewebetemperatur um 1°C erforderlich ist. Jeder Gewebetyp weist unterschiedliche Absorptionseigenschaften und somit einen anderen Absorptionskoeffizienten auf, der direkt proportional zur Ultraschallwellenfrequenz ist: je höher die Frequenz, desto größer die Absorption und desto geringer die Eindringtiefe. Bei einer Optimierung der Eindringtiefe für das Bild muss also das erhöhte Risiko eines Temperaturanstiegs im Gewebe bedacht werden. Da verschiedene Gewebe (Blut, Fruchtwasser, Liquor, Urin, Weichgewebe und Knochen) unterschiedliche Absorptionsfähigkeiten und Absorptionskoeffizienten haben, teilen einige Geräte den TI weiter entsprechend dem geschallten Gewebe in Unterkategorien ein: Thermischer Index für Weichgewebe (TIS) für homogenes Weichgeweben, Thermischer Index für Schädelknochen (TIC). für oberflächennahe Knochen und Thermischer Index für Knochen (TIB) für Knochen, die in Weichgewebe eingebettet sind, dass vom Strahl durchdrungen wird. Knochen weisen einen sehr hohen Absorptionskoeffizienten auf. Bei biologischen Flüssigkeiten wie Fruchtwasser, Liquor und Harn beträgt der Absorptionskoeffizient Null. Daher weisen sie nur einen minimalen Temperaturanstieg auf. Weichgewebe hat einen Absorptionskoeffizienten, der irgendwo zwischen Flüssigkeit und Knochen angesiedelt ist.

MECHANISCHER INDEX

Die mechanischen bzw. nicht-thermischen Effekte der Ultraschallabsorption werden anhand einer relativen Messung kalkuliert: dem sogenannten mechanischen Index (MI). Dazu wird der räumliche Spitzenwert des Unterdrucks (0,3 dB/cm-MHz an jedem Punkt entlang der Strahlachse) durch die Quadratwurzel der Mittenfrequenz dividiert. Wie zuvor erläutert, ergeben sich mechanische Effekte aus der Kompression und Dekompression im Gewebe sowie der Bildung von Mikroblasen (Kavitation). Dieses Phänomen steht mit dem negativen Spitzendruck während eines Impulses in Zusammenhang, der wiederum mit der mittleren Impulsintensität zusammenhängt. Daher besteht ein Zusammenhang zwischen dem räumlichen Spitzenwert der gemittelten Pulsintensität (I_{SPPA}) und der Kavität. Viele Ultraschallgeräte stützen sich für ihre Spezifikationen auf den I_{SPPA} , was größte Sorgfalt des Anwenders voraussetzt. Aktuelle Standards empfehlen bei einem Ultraschallsystem, das einen TI bzw. MI über 1,0 erreichen kann, auf der Intensitätsanzeige den entsprechenden Indexwert anzuzeigen, damit der Anwender mögliche unerwünschte biologische Auswirkungen vorhersehen kann.

Thermische Mechanismen

Thermische Bioeffekte

Wie bereits im vorhergehenden Abschnitt angesprochen, kann die Absorption von Ultraschallenergie durch biologisches Gewebe Wärme erzeugen. Die Eigenerwärmung des Schallkopfs kann ebenfalls zur Gewebeerwärmung beitragen. Der Mechanismus thermischer Bioeffekte ist hinreichend bekannt und kann für verschiedene Belastungsbedingungen berechnet werden. Obwohl verschiedene Studien mit Säugergewebe zeigen, dass etliche Aspekte in der Theorie klar sind, bleiben noch zahlreiche Fragen hinsichtlich des Anstiegs der in-vivo-Temperaturen offen.

Der Grad der Wärmeerzeugung pro Volumeneinheit ist direkt proportional zur:

- zeitlich gemittelten Ultraschallintensität, die sich wiederum proportional zur Druckamplitude und indirekt proportional zur Dichte des Mediums verhält
- Ultraschallamplitudenabsorption, die mit der Frequenzerhöhung steigt

Treten Gewebeschäden aufgrund hoher Temperaturen auf, hängt das Ausmaß der Schäden von der Belastungsdauer sowie der erreichten Temperatur ab. Schädliche Einwirkungen werden in vitro im Allgemeinen bei Temperaturen zwischen 39–43°C und bei ausreichend langer Dauer beobachtet. Bei höheren Temperaturen (>44°C) kann es zur Proteinkoagulation kommen. Diese Wirkungen sind in experimentellen Untersuchungen von wärmeinduziertem Zelltod in Zellkulturen belegt. Anwender von Ultraschallgeräten müssen besonders beachten, dass in manchen Fällen die Risiken die Vorteile einer Ultraschalluntersuchung möglicherweise aufheben. Dies gilt beispielsweise dann, wenn der Temperaturanstieg in der Fokuszone des Ultraschallstrahles, z.B. bei fötalen echographischen Untersuchungen, mit mehr als 3°C für 10 Minuten oder länger errechnet wird. Für den Aixplorer® wird die Temperatur für die Echtzeit-Anzeige thermischer und mechanischer Intensitäts-Indizes auf diagnostischen Ultraschallsystemen berechnet. Diese Berechnung erfolgt nach dem Standard NEMA UD3-2004 (siehe Abschnitt „Bedeutung von TI und MI sowie Zusammenhang mit biologischen Effekten“). Von Grenzwerten ausgehende Daten weisen darauf hin, dass für nicht fötales Weichgewebe

und Abtastbedingungen gemäß üblichen B-Modus-Untersuchungen, bei denen die Belastungsdauer an ein und derselben Stelle weniger als ein paar Sekunden beträgt, der zulässige maximale Temperaturanstieg für längere Belastungen gelockert werden könnte.

Tabelle 3.3. Temperaturgrenzwerte für biologische Risiken im embryonalen Gewebe und im Gewebe Erwachsener

Thermischer Grenzwert	Temperatur (°C)	Biologisches Risiko
Physiologisch	37.0	sicherer Bereich
Embryonales Gewebe	39.5	Risiko für Obstetrik und Pädiatrie
Gewebe von Erwachsenen	41.0	allgemeine Risiken

Einfluss von Gewebeeigenschaften auf thermische Effekte von Ultraschall

Ultraschallwellen, die sich in biologischem Gewebe ausbreiten, werden aufgrund bestimmter Gewebeeigenschaften geschwächt. Diese Abschwächung ist entweder auf Absorption (ein Teil der Wellenenergie wird in Wärme umgewandelt) oder Streuung (ein Teil der Wellenenergie wird umgelenkt) zurückzuführen. Je höher die Absorption, desto höher das mögliche Risiko eines Temperaturanstiegs im Gewebe. Überdies sind, wie zuvor erläutert, Gewebe mit geringer Vaskularisation (z.B. Augen, Sehnen, Fettgewebe) sowie wärmeleitende Gewebe (Knochen) anfällig für höhere Temperaturanstiege.

Einfluss von technischen Faktoren und Belastungsfaktoren auf thermische Effekte von Ultraschall

Verschiedene technische Faktoren haben ebenfalls einen Einfluss auf den Temperaturanstieg im beschallten Gewebe:

- Frequenz der Ultraschallwelle

Die Gewebeerwärmung hängt von der Absorption des Ultraschalls ab; die Absorption hängt von der Frequenz der empfangenen

Ultraschallwelle ab. Die Gewebeerwärmung steigt also mit der Erhöhung der Ultraschallwellenfrequenz.

- Strahlfokussierung

Die Strahlfokussierung verbessert die Bildauflösung, erhöht jedoch auch die Intensität und Gefahr eines Temperaturanstiegs.

- Art der Ultraschallwelle (gepulst oder kontinuierlich)

Gepulste Ultraschallwellen erzeugen in der Regel weniger Wärme als eine kontinuierliche Emission. Der räumliche Spitzen- und zeitliche Mittelwert (ISPTA) ist definiert als die Intensität bei maximalem zeitlicher Mittelwert der Intensität.

Weitere Faktoren sind u.a. Impulsdauer, Impulswiederholungsfrequenz und Strahl-/Abtastkonfiguration. Der Arbeitszyklus ist das Produkt aus Impulsdauer und Impulswiederholungsfrequenz. Die Gewebeerwärmung ist proportional zum Arbeitszyklus.

- Belastetes Gewebevolumen

Bei den Abtastmodi (B-Modus und Farb-Doppler) wird der Ultraschallenergie einem größeren Gewebevolumen ausgesetzt, was die Gefahr einer Erwärmung vermindert. Modi ohne Abtastung (M-Modus und Doppler spektral) arbeiten mit einem stationären Strahl über einem engeren Gewebevolumen. Bei diesen Modi besteht eine höhere Gefahr von Gewebeerwärmung. Zum höchsten Temperaturanstieg kommt es zwischen Fokuspunkt und Oberfläche, der exakten Stelle des „heißesten Punktes“, je nach Abschwächung und Absorption des Gewebes sowie der Fokustiefe.

- Dauer der Ultraschallbelastung

Die Energieabsorption während der Ultraschallbelastung wirkt sich auf die Temperatur aus. Je länger das Gewebe dem Ultraschall ausgesetzt ist, desto größer die Absorption und somit das Risiko einer Erwärmung.

THERMISCHE DOSIS

Unmittelbare Konsequenz eines Temperaturanstiegs sind erhöhte biochemische Reaktionsraten. Bei den meisten Enzymen erhöht sich

die biologische Aktivität um Faktor 3 pro 10°C Temperaturanstieg. Bei Temperaturen über 39°C setzt jedoch ihre Denaturierung ein. Schädliche Wirkungen wurden in vitro bei Temperaturen zwischen 39 und 43°C bei ausreichend langer Belastungsdauer beobachtet. Das Konzept der thermischen Dosis beschreibt die Abhängigkeit zwischen Belastungsdauer und Temperaturanstieg. Bei biologischem Gewebe erwies sich eine Temperatur von 43°C als Übergangstemperaturgrenze, die als Referenzwert dient, wobei die Einheiten einer thermischen Dosis als „äquivalente Minuten bei 43°C“ definiert sind. Praktisch halbiert jeder Temperaturanstieg um 1°C über 43°C die äquivalente Zeit, während jeder Temperaturabfall um 1°C unter 43°C eine vierfache äquivalente Zeit ergibt.

BIOLOGISCH SENSIBLE BEREICHE

Jedes biologische Gewebe ist temperaturempfindlich. Dies kann schädliche und irreversible Auswirkungen haben. Feten und Augenlinsen sind zwei Beispiele für besonders empfindliches Gewebe. Während der Schwangerschaft kann der Fötus einen höheren Temperaturanstieg aufnehmen als das umliegende Gewebe der Mutter. Außerdem kann die sich entwickelnde Ossifikation im ersten Trimester zu einer Veränderung von Hirngewebe durch Wärmeleitung innerhalb des Neugeborenenenschädels führen. Folgende Empfehlungen der World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB) zu ultraschallinduzierter Temperaturerhöhung wurden 1998 veröffentlicht:

1. Eine Belastung mit diagnostischem Ultraschall, bei der sich die normale Körpertemperatur (37°C) durch einen maximalen in-situ-Temperaturanstieg von 1,5°C erhöht, ist für den klinischen Einsatz unbedenklich.
2. Eine Belastung mit diagnostischem Ultraschall, bei der die embryonale und fötale in-situ-Temperatur für mindestens 5 Minuten auf über 41°C (4°C über Normaltemperatur) ansteigt, ist als bedenklich zu betrachten.
3. Das Risiko einer unerwünschten Belastung steigt mit der Dauer der Belastung.

ABSORPTION

Das Maß der absorptionsbedingten Wärmeerzeugung ist proportional zur Schallintensität und -absorption bei einer Einzelfrequenz. Nach der anfänglichen Ausbreitung verbreitet sich die Wärme langsam im Gewebe, dehnt sich gleichmäßig aus und schwindet langsam. Die Gewebeeigenschaften beeinflussen den durch die Ultraschallenergie bewirkten Temperaturanstieg in der Weise, wie die Wärmeabsorption direkt vom Proteinanteil im Gewebe beeinflusst wird (Kollagen hat eine besonders hohe Absorptionsfähigkeit). In den meisten klinischen Situationen weisen Knochengewebe den größten Absorptionskoeffizient auf, Haut und Sehnen dagegen eine mittlere Absorptionsfähigkeit. Gehirn, Leber und Niere haben eine geringe Absorptionsfähigkeit. Der Absorptionskoeffizient von Flüssigkeiten ist gleich Null. Die Absorptionseigenschaften hängen bekanntermaßen von der Wellenfrequenz ab. Man muss jedoch beachten, dass sich die Amplitude und Art der Wellenformen bei der Ausbreitung ebenfalls verändern und Energie im Medium absorbiert wird. Die Absorption im Körper ist ein äußerst wichtiger Effekt, vor allem deshalb, weil sie die Eindringtiefe der Ultraschallwellen, d.h. die maximale Tiefe, bei der Gewebe im Körper abgebildet werden kann, begrenzt. Im Allgemeinen erhöhen Bildgebungssysteme die Schallamplitude je nach Tiefe, um den Absorptionseffekt zu kompensieren.

UMLIEGENDES GEWEBE

Der tatsächliche Temperaturanstieg im Gewebe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel von der ortsspezifischen Wärmekapazität, der Belastungsdauer, dem Grad des Temperaturanstieges und dem Grad der Ausbreitung von Wärme in umliegendes Gewebe. Der messbare Parameter für diese Wärmeverbreitung, bekannt als Perfusionslänge, ist direkt proportional zur Wärmeleitfähigkeit des Gewebes und umgekehrt proportional zur Blutflussrate und der spezifischen Blutwärmekapazität. Die Perfusionslänge wird in Millimetern gemessen und liegt je nach Gewebe zwischen 1 (für stark vaskularisierte Organe) und 20 (für schwach vaskularisiertes Gewebe). Die Durchblutung spielt eine wichtige Rolle in der Gewebekühlung und muss bei der Kalkulation der Gewebetemperatur und ihrer Abweichungen berücksichtigt werden. Bei Geweben mit geringer Vaskularisation (z.B. Sehnen, Fett, Hornhaut) sowie bei wärmeleitenden Geweben, wie etwa Knochen, steigen die Temperaturen stärker. Ist die Perfusionslänge kleiner als die Größe des

beschallten Volumens, so ist die Wärmeübertragung aus umliegendem Gewebe gering. Ist sie jedoch größer als das beschallte Volumen, so ist die Wärmeübertragung im beschallten Volumen signifikant. Aufgrund der Wärmeleitung ist Gewebe in Knochenumgebung daher besonders anfällig für einen Wärmeanstieg.

WÄRMELEITUNGS-EFFEKT

Der Temperaturanstieg durch Wärmeleitung ist der Anstieg der lokalen Temperatur im Gewebe in der Nähe eines anderen Wärmeobjekts. Steigt die Temperatur in einer Knochenstruktur im Körper aufgrund von Absorption, kann sich das umliegende Gewebe durch Wärmeleitung erwärmen. Dieser Effekt ist besonders für die Erwärmung des Gehirns aufgrund der Nähe zum Schädel relevant. Er kann auch auftreten, wenn ein Schallkopf ausgewählt und nicht benutzt wird. Die Schalleistung kann zur äußeren Absorptionslinse fließen und eine Eigenerwärmung verursachen. Beginnt der Anwender dann mit der Untersuchung, kann der Schallkopf den Körper mittels Wärmeleitung durch direkten Kontakt erwärmen. Allerdings ist die Erwärmung der Auflagefläche des Schallkopfs nur geringfügig, wenn sich diese in der Luft und in einer Luft-Gel-Mischung befindet. Wird der Schallkopf bei der Untersuchung eingesetzt, wird der Effekt der durch Wärmeleitung bewirkten Temperaturänderung oft vernachlässigt, da er sich auf die Körperfläche beschränkt und geringer als der Absorptionsbeitrag ist.

STREUEFFEKT

Der Streueffekt hängt von der Form und Rauheit des beschallten Objekts (Streukörper) ab. Je nach der Größe des Streukörpers unterscheidet man drei Kategorien.

Spiegelnde Streuung

Unter spiegelnder Streuung versteht man die Reflexion von Objekten, die viel größer als eine Wellenlänge sind. Ist das Objekt größer dimensioniert als die Wellenlänge, so bildet die Annäherung der Reflexion auf dem Objekt eine Wellenfront, welche die Form des Objekts imitiert.

Diffuse Streuung

Diffuse Streuung tritt bei Objekten auf, die viel kleiner als eine Wellenlänge sind. Unregelmäßigkeiten auf der Objektoberfläche erzeugen einzelne Reflexionen, die keine signifikanten Interferenzen verursachen. In der medizinischen Bildgebung ist die diffuse Streuung von Relevanz, da biologisches Gewebe oft als Ansammlung kleiner Sub-Wellenlängen-Punktstreukörper betrachtet wird. Doppler-Verfahren messen den Blutfluss je nach Streueffekt durch zahlreiche kleine räumlich unaufgelöste Blutzellen. Die meisten Ultraschall-Kontrastmittel wirken ebenfalls als Tracer zur Verstärkung der Streuung von Ultraschall auf gasgefüllten Resonanzkügelchen.

Diffraktive Streuung

Diffraktive Streuung tritt bei Objekten auf, deren Größe etwas kleiner als eine Wellenlänge oder bis zu hundert Mal so groß ist. Dies ist die größte Gruppe von Streuobjekten. Hier kann man davon ausgehen, dass die gestreuten Wellen von der Oberfläche der Streukörper erzeugt werden, die als zweite Ultraschallquelle fungieren.

Räumliches Volumen von beschalltem Gewebe

Bei einer bestimmten Belastungsdauer und bei einer bestimmten Schallenergie werden größere Volumen von beschalltem Gewebe einer diffuseren Erwärmung ausgesetzt, um erhöhte lokale Temperaturen zu vermeiden. Genau an der Fokussierungsstelle des Ultraschallstrahls ist die Temperatur höher als vor oder nach dem Fokusbereich. Die Apertur des Ultraschallstrahls wirkt sich ebenfalls auf das Erwärmungsvermögen des Ultraschallstrahls aus: je nachdem, ob ein Ultraschallstrahl mehr oder weniger fokussiert ist, wird mehr oder weniger Energie an das Gewebe abgegeben. Wie zuvor erwähnt, kann sich auch der Abtastmodus auf das räumliche Volumen des beschallten Gewebes auswirken.

Gewebehomogenität im beschallten Volumen

Die Homogenität des beschallten Gewebes ist einer der Schlüsselfaktoren in der Wärmeübertragung. Ultraschallwellen durchdringen die verschiedenen Gewebeschichten der Organe. Diese Schichten beeinflussen die Absorption der Ultraschallenergie, da eine erhöhte Absorption in einer der Schichten die an der interessierenden Stelle verfügbare Ultraschallenergie vermindert. Der dämpfende Einfluss der Gewebeschichten auf die biologischen Effekte von Ultraschall wurde in der Obstetrik eingehend untersucht. Dabei zeigte sich, dass das überlagerte Gewebemodell die beste Übereinstimmung zwischen Dämpfungsmodell und tatsächlichen Beobachtungen ergibt. Dabei hängt die Dämpfung sowohl von der Frequenz als auch von der Entfernung zu nicht flüssigen Komponenten ab. Zudem wurde gezeigt, dass der von internationalen Standards verlangte Dämpfungskoeffizient zwei- bis dreimal niedriger war als die gemessenen mittleren Werte zur Berechnung von Ultraschallintensitäten in Gewebe.

Nicht-thermische Mechanismen

Neben der Wärme weisen Ultraschallwellen zudem eine Reihe von mechanischen Effekten auf biologische Gewebe und Medien aus, die auch als nicht-thermische Effekte bezeichnet werden.

Kavitation und die Rolle der Gasblasen

KAVITATION

Akustische Kavitation tritt auf, wenn der Ultraschallstrahl durch einen Hohlraum wie zum Beispiel eine Gasblase geht. Einige Gewebetypen von Erwachsenen enthalten Gasblasen (Lunge und Darm) und sind daher eher für Kavitation anfällig. Bei der akustischen Kavitation kommt es aufgrund der Expansion wie auch Kontraktion des Gaskörpers zur Veränderung bestehender Blasen bzw. der Bildung neuer Blasen. Ultraschallwellen können zu einer rhythmischen Expansion und Kontraktion der Blasen führen, d.h. zu einer Pulsierung oder Schwingung. Die Hypothese einer Bildung von Blasen in gasfreiem Gewebe und Organen wird derzeit untersucht.

GLEICHGERICHTETE DIFFUSION

Unter Beschallung und bestimmten Bedingungen kann es zu Schwingung und Wachstum einer Gasblase statt zu ihrer Auflösung in der Flüssigkeit des Mediums kommen. Die Ultraschallwelle lässt die Blase expandieren und aufgelöste Gase werden hineingepumpt, wodurch sie sich schnell vergrößert.

Kavitation auslösende Faktoren

Die Entstehung einer Kavitation hängt von zahlreichen Faktoren ab, unter anderem dem Ultraschalldruck, dem Typ der generierten Ultraschallwelle (fokussiert oder nicht, gepulst oder kontinuierlich), dem Vorhandensein von stehenden Wellen sowie der Beschaffenheit und dem Zustand des Materials. Kavitation kann in erster Linie

dadurch verhindert werden, dass darauf geachtet wird, ob Gasblasen im beschallten Gewebe vorhanden sind. In flüssigen Medien ist die Dichte der Flüssigkeit ein weiterer entscheidender biologischer Faktor für die Kavitationsbildung: Bei Flüssigkeiten mit hoher Dichte kommt es zu stärkerer Kavitationsbildung mit stärkerem Kollaps. Zur Vermeidung einer Kavitation können sich einige technische Faktoren ebenfalls als äußerst hilfreich erweisen, unter anderem die Begrenzung der Druckamplitude des Ultraschallimpulses und die Impulslänge. Sind Gasblasen im Gewebe vorhanden, so sind auch ihre Anzahl, Größe und Position relevante Faktoren, die zu diesem Effekt beitragen.

Kavitationstypen

STABILE KAVITATION UND MIKROSTRÖMUNG&

Stabile Kavitation bedeutet die periodische Expansion bzw. Kontraktion einer Gasblase. Der gasförmige Körper pulsiert aufgrund des Ultraschallfeldes und bleibt stabil. Ein Teil des flüssigen Mediums um die Gasblasen kann mit den Schwingungen zu strömen beginnen. Dies führt zur sogenannten Mikroströmung. Es ist theoretisch möglich, dass Mikroströmung in flüssigen Medien auch durch „akustische Strömung“ aufgrund der Rührwirkung der Ultraschallwelle verursacht wird. Wie auch bei der Mikroströmung führt die akustische Strömung mit steigendem Ultraschalldruck zu einer Beschleunigung des Flüssigkeitsstromes. Dieses Phänomen kann Rupturen der Zellmembran verursachen. Eine Zellmembranschädigung wurde bislang jedoch nur bei Tierversuchen beobachtet. Ob sie auch bei Menschen auftreten kann, ist noch unklar.

Nukleierungsstellen

Wenn beschalltes Gewebe Gas- oder Dampfblasen enthält, so kann die ultraschallinduzierte Dehnung zu einer Kavitationsbildung ausgehend vom Ort des Gases, der sogenannten „Nukleierungsstelle“, führen. Die genaue Beschaffenheit und der Ursprung von Nukleierungsstellen in einem komplexen Medium wie Gewebe sind noch nicht völlig klar. Theoretische Analysen und Hypothesen wurden bislang nicht durch Versuche bestätigt.

INERTE KAVITATION

Die inerte Kavitation, bei ihrer ersten Beobachtung als instabile oder „transiente Kavitation“ bezeichnet, ist das schnelle Anwachsen und heftige Implodieren einer Gasblase. Sie gilt als Schwellenwerteffekt und steigt bei höherer Frequenz. Dieser Effekt steht in engem Zusammenhang mit extrem hohen Temperaturen (ca. 5000°K) und zu seinen Folgen zählen u.a. die Entstehung biologischer toxischer Verbindungen, die Entstehung von Schockwellen und „Sonolumineszenz“.

WEITERE MECHANISCHE EFFEKTE

Ultraschallwellen können auch andere mechanische Effekte hervorrufen, die nicht mit Gasblasen in Zusammenhang stehen. Dazu zählen u.a. Änderungen von Druck, Kraft, Torsion und Strömung. Sie können akustische Phänomene erzeugen und elektrische Veränderungen in Zellmembranen verursachen und so ihre Durchgängigkeit für große Moleküle erhöhen. Sie können zu Bewegung und Umverteilung von Zellen in Flüssigkeit führen und Zellen schädigen.

Strahlenenergie

In letzter Zeit wurden statische oder dynamische Schallstrahlenergie-Verfahren in der Ultraschalldiagnose eingesetzt. Eines der verschiedenen Verfahren, das Schallstrahlenergie zur lokalen Bewegung bzw. zum Vibrieren von Gewebe nutzt, ist das vom Aixplorer® System angewandte Supersonic Shear Imaging. Diese Technik nutzt die ultraschallinduzierte zeitlich gemittelte Krafteinwirkung auf das Medium zu Erzeugung der Gewebebewegung. Das Ausmaß dieses Effekts verhält sich proportional zur lokalen zeitlich gemittelten Intensität und bewegt sich im Mikrometerbereich.

Schwellenwertphänomene

Der Kavitationseffekt ist eine weitaus schnellere Reaktion als der Temperaturanstieg und zudem ein Schwellenwertphänomen. Bei der inerten Kavitation wird der Schwellenwert anhand der Amplitude der Ultraschallwelle, ihrer Frequenz sowie der Größe bestehender

Nukleierungsstellen definiert. Der Schwellenwert ist die Grenze eines kritischen Größenbereichs, in dem Gasblasen inerter Kavitation ausgesetzt sind, wenn sie von einem entsprechenden Schallfeld beschallt werden. Mit anderen Worten, bei einer bestimmten Frequenz und Schalldruckamplitude sind Blasen innerhalb eines bestimmten Radius inerter Kavitation ausgesetzt. Blasen außerhalb dieses Bereichs sind nicht davon betroffen.

Pulmonale Hämorrhagie bei Tieren

Um unerwünschte biologische Effekte nachweisen zu können, müssen Versuche mit Ultraschall außerhalb des diagnostischen Bereichs erfolgen. Das Auftreten von Lungenblutungen ist wohl die am meisten untersuchte unerwünschte Auswirkung, wenn auch ihr Mechanismus bislang unklar geblieben ist. Thermische Bioeffekte und inerte Kavitation wurden als Ursachen für Lungenläsionen ausgeschlossen. Die umfangreichen Grenzwertstudien zu ultraschallinduzierten Lungenschäden lassen dennoch generelle Rückschlüsse zu. Zum einen scheint das Ausmaß der bei Tieren beobachteten Schäden kein relevanter Faktor zu sein, da der Grad des Lungenschadens begrenzt ist und sich das Organ von diesem Effekt erholen kann. Zum anderen ist der Auslösemechanismus der Lungenläsion anscheinend bei allen Gattungen ähnlich und die Merkmale der induzierten Läsionen sind unabhängig von Frequenz, Impulswiederholungsfrequenz und Strahlbreite. Ähnliche biologische Mechanismen können bei Patienten, bei denen eine Ultraschalluntersuchung der Lunge vorgenommen wird, jedoch von Relevanz sein, vor allem bei Patienten mit Lungenerkrankungen oder bei Risiko-Neugeborenen.

Vorteile und Risiken des Ultraschalls

Vorteile

Zweifelsohne hat die Ultraschall-Bildgebung die medizinisch diagnostische Bildgebung revolutioniert. In der Kardiologie und Obstetrik gibt es viele Beispiele für die Vorteile der Ultraschall-Bildgebungsdiagnostik. In der Kardiologie ermöglicht der Ultraschall die genaue Darstellung der anatomischen Struktur und Funktion des Herzens sowie seiner großen Blutgefäße. Der Radiologe sieht den Blutfluss in den Herzkammern und den Vorhöfen sowie die Funktion der Klappen unter normalen und pathologischen Bedingungen. In der Obstetrik gibt es Bedenken hinsichtlich möglicher Bio-Effekte auf den Embryo/Fötus während der Schwangerschaft. Dennoch wird Ultraschall aufgrund seiner hervorragenden Sicherheitsbilanz weltweit routinemäßig eingesetzt. Im Laufe der letzten Jahre hat sich die Technik der Ultraschall-Bildgebung enorm verbessert und ihr klinischer Anwendungsbereich vergrößert sich ständig. Verschiedenste Ultraschallsysteme für spezifische medizinische und klinische Anwendungen, wie etwa Elastographie, Gefäßmedizin, Untersuchungen des Herzens und des Bewegungsapparats, stehen zur Auswahl. Die jüngsten technologischen Entwicklungen haben eine weitaus höhere Bildqualität und bessere diagnostische Informationen möglich gemacht. Dieser technologische Fortschritt und die erweiterte Anwendungspalette bedeuten jedoch auch größere Verantwortung für den Anwender. Aus der Sicht des Gesundheitssystems wie auch der Patienten sind Ultraschall-Untersuchungen aufgrund ihrer Kosteneffizienz und nicht-invasiven Eigenschaft eine ideale Lösung. Ultraschall-Untersuchungen werden allgemein von Patienten akzeptiert und die Kosten von den Krankenkassen übernommen.

Risiken

Trotz der hervorragenden Sicherheitsbilanz existiert das Risiko möglicher unerwünschter Bioeffekte auf Gewebe- und Zellebene. Wie zuvor erwähnt, können biologische Mechanismen von Lungenläsionen in der Art, wie sie bei nichtmenschlichen Säugern beobachtet wurden, bei Patienten mit Lungenexposition im Zuge sonografischer Verfahren von

Relevanz sein. Zudem können theoretisch Bioeffekte auf subzellulärer Ebene auftreten, auch wenn über diese Effekte bislang keine große Klarheit herrscht. An Säugetieren beobachtete unerwünschte biologische Effekte wurden niemals bei menschlichen Patienten festgestellt. Daher betonen die Vorschriften nun verstärkt die Verantwortung des Anwenders, das Risiko unerwünschter biologischer Effekte für ihre Patienten möglichst klein zu halten. Damit der Anwender fundierte Entscheidungen treffen und die möglichen biologischen Effekte gegen die erwarteten diagnostischen Informationen abwägen kann, müssen ihm alle erforderlichen Informationen zur Verfügung gestellt werden. Neuere Anwendungen (transösophageale Echokardiographie, intravaskulärer Ultraschall) rufen möglicherweise unvorhergesehene biologische Effekte hervor. Weitere gezielte Forschungstätigkeit ist hier nötig, bevor sich alle Risiken definieren lassen.

Risiken einer Entscheidung gegen den Einsatz von Ultraschall

Anwender von Ultraschallgeräten sollten stets zwischen möglichen biologischen Effekten und den echten Gefahren abwägen, die mit der Entscheidung gegen eine Ultraschall-Untersuchung und somit dem Verzicht auf wichtige diagnostische Informationen verbunden sind. In der Obstetrik und Kardiologie haben die im Rahmen der klinischen Diagnostik erhaltenen Ultraschallinformationen für die Mediziner einen großen Stellenwert. Dabei ist allgemein anerkannt, dass für den Patienten ein höheres Risiko besteht, wenn keine Ultraschalluntersuchung durchgeführt wird. Die Ultraschall-Bildgebung liefert zahlreiche wertvolle klinische und sachdienliche Informationen für verschiedenste diagnostische Anwendungen. Diese Informationen können anstelle von risikoreicheren Verfahren oder auch gemeinsam mit anderen diagnostischen Verfahren genutzt werden, um die diagnostische Sicherheit zu erhöhen oder um entscheidende diagnostische Daten zu gewinnen. Der Erwerb dieser Daten mit Hilfe anderer Test- oder Bildgebungsverfahren ist meist mit höheren Kosten und Risiken verbunden.

Je höher die akustische Leistung desto höher das Risiko

Die zeitlich gemittelte Ultraschallintensität an einer bestimmten Gewebestelle ist I_{TA} , während der Grad der Wärmezeugung pro Volumeneinheit mit $Q = 2\alpha I_{TA}$ ausgedrückt wird, wobei α für den Absorptionskoeffizienten der Ultraschallamplitude steht. Dies bedeutet, dass sich der Temperaturanstieg proportional zu einem Mittelwert der Ultraschallintensität innerhalb eines Zeitraums, auch als akustische Leistung bezeichnet, verhält. Das Risiko von thermischen Bioeffekten im beschallten Gewebe hängt also direkt von der akustischen Leistung ab.

Je höher die akustische Leistung desto mehr diagnostische Information

Seit 1991 hat der technische Fortschritt bei Ultraschallsystemen eine signifikante Steigerung der akustischen Leistung und somit bessere räumliche Auflösung, bessere Kontraste, höhere Bildschärfe und höhere diagnostische Sensitivität möglich gemacht. Reale 3D- und 4D-Bildgebungs-Modi, Farb-Doppler, und in letzter Zeit das „Strain Imaging“ verdeutlichen das neue und verbesserte Bildgebungspotenzial der aktuellen Ultraschallsysteme. Weitere Vorteile einer höheren akustischen Leistung sind die Möglichkeit, in größerer Tiefe zu schallen, unter anderem aufgrund verbesserter Echo- und Doppler-Signalerfassung und Signaldurchdringung, sowie Auflösung durch höhere Frequenzen. Auch das Wissen um unerwünschte biologische Effekte von Ultraschall wurde weitgehend vertieft und führte zur genaueren Abwägung der Risiken und Vorteile eines besseren Ultraschallbildes.

Mehr Verantwortung für den Anwender bei höherer Ausgangsleistung

Mit der Lockerung der Grenzwerte für die akustische Ausgangsleistung aktueller Ultraschallsysteme haben die Regulierungsbehörden natürlich auch die Entwicklung komplexerer diagnostischer Einsatzmöglichkeiten und eine erhöhte Bildqualität ermöglicht, gleichzeitig jedoch auch dem Anwender mehr Verantwortung auferlegt. Der Anwender muss die

Risiken und Vorteile von diagnostischem Ultraschall im Allgemeinen wie auch einer Erhöhung der akustischen Leistung zur Erzielung einer besseren Bildqualität selbst beurteilen. Dazu müssen Ultraschall-Anwender die Ultraschall-Systeme und -Werkzeuge genau kennen. Dies erfordert eine spezielle Ausbildung und Schulung, die inzwischen in den meisten Industrieländern Teil des Akkreditierungsverfahrens für den klinischen Einsatz von Ultraschall sind.

Der Anwender sollte:

1. mit den möglichen Risiken vertraut sein
2. wissen, dass gute Bildqualität eine entsprechende Anpassung der akustischen Leistung erfordert,
3. den klinischen Zustand der Patienten beurteilen und berücksichtigen
4. alle Bedienelemente des Systems in Zusammenhang mit der akustischen Leistung genau kennen.

Die aktuellen Ultraschallsysteme ermöglichen dem Anwender, Risiken gegen Vorteile abzuwägen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Echtzeit-Informationen über die möglichen Risiken unerwünschter biologischer Effekte werden in Form von Kennzahlen zur Ausgangsintensität und den möglichen thermischen und mechanischen Risiken angezeigt (thermischer Index: TI und mechanischer Index: MI). Laut NCRP müssen die Risiken von diagnostischem Ultraschall bei einem MI über 0,5 bzw. einem TI über 1,0 gegen die Vorteile abgewogen werden. In der Praxis heißt dies, dass bessere Bildqualität mit höherem Risiko für den Patienten verbunden sein kann, das vor allem von seinem Körperbau und Gesundheitszustand abhängt: die Risiken von dünnen und fettleibigen Patienten sind unterschiedlich. Eine volle oder leere Blase zum Zeitpunkt der Untersuchung bedeutet ebenfalls ein unterschiedliches Risiko und auch das Vorhandensein von Gasblasen im geschallten Körperbereich kann das Risiko durch eine Unterschalluntersuchung für den Patienten erhöhen.

Das ALARA-Prinzip

Nach der Internationalen Strahlenschutzkommission ist „medizinische Strahlenbelastung die einzige Kategorie, in der eine starke Reduktion der durchschnittlichen Dosis möglich ist. Daher ist es höchst wünschenswert, medizinische Strahlenbehandlungen, die dem Patienten keine Vorteile bringen, zu reduzieren und sinnlose Bestrahlung im Zuge medizinischer Untersuchungen zu minimieren“. Zur Verminderung der Belastungsrisiken bei Ultraschalluntersuchungen sollte nach dem ALARA-Prinzip verfahren werden: ALARA bedeutet „As Low As Reasonably Achievable“, d.h. „so niedrig wie sinnvollerweise erreichbar“. Die Gesamtbelastung durch Ultraschall sollte also so niedrig wie sinnvollerweise erreichbar gehalten werden, um die Sicherheit des Patienten zu gewährleisten und gleichzeitig den diagnostischen Informationsgewinn zu optimieren.

Steuerung der Ultraschallenergie

Das ALARA-Prinzip empfiehlt für die diagnostische Ultraschall-Bildgebung, die Gesamtultraschallenergie unterhalb der Grenze zu halten, ab der biologische Auswirkungen möglich sind, und gleichzeitig die ausreichende Gewinnung diagnostischer Informationen sicherzustellen. Durch die Implementierung von ALARA werden alle erforderlichen Informationen erhalten, während eventuelle biologische Effekte so gering wie vertretbar gehalten werden. Es wird empfohlen, dass der Anwender die Untersuchung mit der Auswahl der richtigen Schallkopffrequenz und Anwendung beginnt und zunächst mit einer niedrigen Ausgangsleistung arbeitet. Sämtliche Bedienelemente zur Optimierung der Bildqualität sollten verwendet werden (Fokus, Empfangsverstärkung...). Nur wenn das Bild damit keinen diagnostischen Nutzen hat, sollte die akustische Leistung erhöht werden. Die Ausgangsleistungssteuerung ermöglicht dem Anwender die Auswahl von Intensitäten unter dem festgesetzten Höchstwert. Ein bedachter und sorgfältiger Einsatz besteht darin, die niedrigst mögliche Intensität zu wählen, bei der eine gute Bildqualität erzielt wird.

Belastungszeit kontrollieren

Bei den angezeigten Kennzahlen wird die Belastungsdauer nicht berücksichtigt. Da sich die an einer Stelle empfangene Gesamtenergie proportional zur Belastungsdauer an dieser Stelle verhält, sollte der Anwender auch die Gesamtbelastungszeit an ein und derselben Stelle so kurz wie möglich halten. Eine erweiterte Definition des ALARA-Prinzips heißt daher: Ausgangsleistung so niedrig wie möglich, diagnostische Informationen so gut wie möglich, Belastungszeit so kurz wie möglich.

Steuerung des Kontrollvorgangs

Die Bedienungsrichtlinien nach dem ALARA-Prinzip sollten völlig klar und auf bestmögliche diagnostische Information ausgerichtet sein.

Zudem sollte der Anwender sicherstellen, dass:

- nur medizinisch erforderliches Schallen durchgeführt wird,
- eine Untersuchung niemals hastig durchgeführt wird,
- der Qualitätsstandard immer eingehalten wird.

Eine schlecht durchgeführte Untersuchung erfordert höchstwahrscheinlich eine zweite Untersuchung oder Nachuntersuchung, was die Belastungszeit erhöht

Steuerung der Systemeinstellungen

Die Auswahl der idealen Systemeinstellungen (Schallkopf, Anwendung) ist der erste Schritt vor Beginn einer Ultraschalluntersuchung. Anschließend wird der Anwender die richtige Schallintensität für die Anwendung auswählen, falls dies nicht automatisch erfolgt. Letztendlich ist der Anwender verantwortlich für die richtige klinische Anwendung. Das Aixplorer® Ultraschallsystem bietet die Möglichkeit automatischer Einstellungen (vorgegeben) oder manueller Einstellungen (benutzerseitig wählbar).

Auswirkungen der Systemfunktionen

Das System bietet 3 verschiedene Möglichkeiten zur Steuerung der akustischen Leistung.

Direkte Bedienelemente - wirken sich direkt auf die akustische Leistung aus. Dazu gehören die Wahl der Anwendungen (siehe oben) und der Ausgangsleistung. Die Anwendungswahl beeinflusst den zulässigen Ausgangsintensitätsbereich. Die Auswahl der richtigen Schallintensität für die Anwendung ist einer der ersten Schritte bei jeder Untersuchung. So sind z.B. periphere vaskuläre Intensitätsstufen nicht für fötale Untersuchungen geeignet. Es gibt Systeme, bei denen die Auswahl des geeigneten Intensitätsbereichs für eine bestimmte Anwendung automatisch erfolgt, während dieser bei anderen manuell eingestellt werden muss. Letztendlich ist der Anwender verantwortlich für den richtigen klinischen Einsatz. Das Aixplorer® Ultraschallsystem bietet die Möglichkeit automatischer Einstellungen (vorgegeben) oder manueller Einstellungen (benutzerseitig wählbar). Die Ausgangsleistung wirkt sich direkt auf die Schallintensität aus, indem sie diese erhöht oder senkt. Nach Auswahl der Anwendung ermöglicht die Steuerung der Ausgangsleistung dem Anwender die Auswahl von Intensitätsstufen unter dem festgesetzten Höchstwert. Ein bedachter und sorgfältiger Einsatz besteht darin, die niedrigst mögliche Intensität zu wählen, bei der eine gute Bildqualität erzielt wird.

Indirekte Bedienelemente - wirken sich indirekt auf die Schallintensität aus. Dazu gehören die Auswahl des Schallkopfes (siehe „Auswirkungen des Schallkopfes“ unten), der Bildgebungsmodus (siehe „Auswirkungen des Betriebsmodus“ unten), die Impulswiederholungsfrequenz, Fokustiefe und Impulslänge. Sie alle wirken sich indirekt auf die Ausgangsintensität aus: so muss z.B. die Betriebsfrequenz des Schallkopfes auf die erwartete Abtasttiefe abgestimmt werden; ebenso geben Abtastmodus und stationärer Modus an derselben Stelle nicht dieselbe Energie ab. Nähere Informationen zu weiteren indirekten Bedienelementen entnehmen Sie bitte dem Unterkapitel „Indirekte Bedienelemente“ des Kapitels „Anwendung des ALARA-Prinzips mit dem Aixplorer® Ultraschall-Bildgebungssystem“. Die Impulswiederholungsfrequenz oder -rate ist die Anzahl der Ultraschall-Energieimpulse innerhalb einer bestimmten Zeitdauer. Je höher die Impulswiederholungsfrequenz, desto mehr Energieimpulse werden innerhalb einer bestimmten Zeitdauer erzeugt. Eine Reihe von Bedienelementen wirken sich auf die Impulswiederholungsfrequenz aus:

Fokustiefe, Darstellungstiefe, Abtastvolumentiefe, Flussoptimierung, Skala, Anzahl der Fokusbereiche und Abschnittsbreite. Der Fokus des Ultraschallstrahls wirkt sich auf die Bildauflösung aus. Zur Beibehaltung bzw. Erhöhung der Auflösung bei einem anderen Fokus muss die Ausgabe über dem Fokusbereich geändert werden. Diese Änderung der Ausgabe ist eine Funktion der Systemoptimierung. Je nach Untersuchung sind verschiedene Fokustiefen erforderlich. Die Fokuseinstellung auf die richtige Tiefe verbessert die Auflösung der Zielstruktur. Unter Impulslänge versteht man die Dauer eines Ultraschallimpulses. Je länger der Impuls, desto größer die zeitlich gemittelte Intensität. Je größer die zeitlich gemittelte Intensität, desto größer die Wahrscheinlichkeit einer Temperaturerhöhung und Kavitation. Die Impulslänge bzw. Impulsdauer ist die Ausgangsimpulsdauer beim PW-Doppler. Mit der Erhöhung des Doppler-Abtastvolumens erhöht sich die Pulslänge.

Bedienelemente für den Empfang dienen der Verbesserung der Bildqualität und wirken sich nicht auf die akustische Leistung aus. Sie ändern die Art des Ultraschallechoempfangs und sollten vor einer Erhöhung der Ausgangsleistung eingestellt werden. Zu diesen Bedienelementen gehören Verstärkung, TGC, dynamischer Bereich und Bildverarbeitung. Was vor einer Erhöhung der Ausgangsleistung keinesfalls vergessen werden darf, ist die Optimierung der Bedienelemente für den Empfang. Zum Beispiel: Optimierung der Verstärkung zur Verbesserung der Bildqualität vor Erhöhung der Ausgangsleistung.

Auswirkungen der Anwendungsmodi

Die Wahl des Bildgebungsmodus bestimmt die Art des Ultraschallstrahls. So ist beispielsweise der B-Modus ein Abtastmodus, während Doppler ein stationärer Modus oder Modus ohne Abtastung ist. Ein stationärer Ultraschallstrahl konzentriert die Energie auf eine einzige Stelle. Ein bewegter oder abgetasteter Ultraschallstrahl verteilt seine Energie über eine Fläche, so dass der Strahl gegenüber einem Modus ohne Scannen nur für einen Bruchteil der Zeit auf die gleiche Fläche konzentriert ist.

Auswirkungen der Schallkopfwahl

Die Wahl des Schallkopfes wirkt sich indirekt auf die Ausgangsintensität aus. Die Gewebedämpfung ändert sich je nach Frequenz. Je höher

die Betriebsfrequenz des Schallkopfes, desto größer ist die Dämpfung der Ultraschallenergie. Eine höhere Betriebsfrequenz des Schallkopfes erfordert mehr Ausgangsleistung, um tiefer zu schallen. Um bei derselben Ausgangsintensität tiefer schallen zu können, ist eine niedrigere Schallkopffrequenz erforderlich. Eine größere Verstärkung und höhere Ausgangsleistung ohne entsprechende Verbesserung der Bildqualität erfordern eventuell einen Schallkopf mit niedrigerer Frequenz.



WARNUNG

Die Ultraschallbelastungszeit sollte stets kurz gehalten werden; gehen Sie jedoch bei der Untersuchung nicht zu hastig vor.

Stellen Sie sicher, dass die Indizes und Belastungszeit minimal gehalten werden, ohne dabei die diagnostische Sensitivität zu beeinträchtigen.

Der Output Display Standard

Zweck des Output Display Standard

Der Output Display Standard (ODS) des Systems umfasst zwei grundlegende Indizes: einen mechanischen Index und einen thermischen Index. Der thermische Index setzt sich aus folgenden Indizes zusammen: ein thermischer Index für Weichgewebe (TIS), ein thermischer Index für Knochen oder Gewebe nahe eines Knochens (TIB) und ein thermischer Index für den Schädelknochen (TIC). Der Aixplorer® -Benutzer kann weiterhin das Anzeigeformat für TI und MI in der Systemkonfiguration wählen, d. h. TIS und/oder TIB und/oder TIC, oder das Maximum dieser drei TI-Werte, die wiederum von der gegebenen Anwendung abhängen. Entweder TIS, oder TIB oder der maximale Wert dieser Indizes wird permanent angezeigt. Welcher Index angezeigt wird, hängt von der Systemeinstellung oder Auswahl des Anwenders ab und richtet sich nach der Anwendung. Dass der Index anwendungsspezifisch ist, hat auch einen wichtigen Einfluss auf das Indexverhalten. Die Standardeinstellung ist ein Systemsteuerungsstatus, der vom Hersteller oder Bediener vordefiniert wird. Das System verfügt über Index-Voreinstellungen für jede Schallkopfanwendung. Die Standardeinstellungen werden automatisch aktiviert, wenn das Ultraschallsystem eingeschaltet wird, neue Patientendaten in die Systemdatenbank eingegeben oder die Anwendung geändert wird.

Die Entscheidung, welcher der 3 thermischen Indizes oder das Maximum dieser drei Werte angezeigt werden soll, basiert auf den folgenden Kriterien:

- Geeigneter Index für die klinische Anwendung: TIS für die Bildgebung von Weichgewebe TIB für einen Fokus am oder nahe dem Knochen, und TIC bei der Bildgebung durch den Schädelknochen oder nahe des Schädels.
- Faktoren, die künstlich hohe oder niedrige thermische Index-Messwerte ergeben können: Ort der Flüssigkeit bzw. des Knochens oder der Blutfluss. Liegt zum Beispiel ein stark dämpfender Gewebepfad vor, so ist das tatsächliche Erwärmungspotential für den lokalen Bereich geringer als vom thermischen Index angezeigt wird.

Die Verwendung eines Modus mit oder ohne Abtastung beeinflusst den thermischen Index. Bei einer Abtastung entsteht die Erwärmung im

Allgemeinen in Oberflächennähe, bei Modi ohne Abtastung eher tiefer im Fokusbereich.

Mechanischer Index

Mechanische Bioeffekte sind Schwellenwerteffekte, die bei Überschreitung eines bestimmten Intensitätsniveaus auftreten. Der Schwellenwert ist je nach Gewebetyp verschieden. Das mögliche Auftreten von mechanischen Bioeffekten hängt vom Spitzenwert des akustischen Unterdrucks und der Ultraschallfrequenz ab. Der MI berücksichtigt diese beiden Faktoren. Je höher der MI-Wert desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines Auftretens von mechanischen Bioeffekten. Es gibt keinen spezifischen MI-Wert, der anzeigt, dass tatsächlich ein mechanischer Effekt auftritt. Der MI dient als Orientierungshilfe für die Umsetzung des ALARA-Prinzips.

Thermischer Index

Der TI informiert den Anwender über Anzeichen, die zu einer Temperaturerhöhung an der Körperoberfläche führen können, und zwar im Körpergewebe oder an der Stelle des Ultraschallstrahlfokus auf Knochen. Der TI informiert den Anwender also über einen möglichen Temperaturanstieg im Körpergewebe. Dabei handelt es sich um den ungefähren Temperaturanstieg in Gewebe mit spezifischen Eigenschaften. Der tatsächliche Temperaturanstieg wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, z. B. Gewebetyp, Vaskularität oder Betriebsmodus. Der TI dient als Orientierungshilfe für die Umsetzung des ALARA-Prinzips. Der thermische Index für Knochen (TIB) informiert den Anwender über eine mögliche Erwärmung am oder nahe dem Fokus, nachdem der Ultraschallstrahl durch das Weichgewebe oder Flüssigkeit gedrungen ist, zum Beispiel am oder nahe dem fetalen Knochen im zweiten oder dritten Trimester. Der thermische Index für Schädelknochen (TIC) informiert den Anwender über eine mögliche Erwärmung von Knochen an oder nahe der Oberfläche, um Beispiel dem Schädelknochen. Der thermische Index (TI) informiert den Anwender über eine mögliche Erwärmung im Gewebe. Je nach Auswahl des Aixplorer® -Benutzers werden TIS und/oder TIB und/oder TIC oder das Maximum der drei Werte kontinuierlich zwischen 0,0 und

maximaler Ausgangsleistung angezeigt. Der mechanische Index wird im Ausgangsleistungsbereich von 0,0 bis 1,9 ständig angezeigt.

Systemanzeige und Genauigkeit von MI und TI

Wie oben beschrieben und abhängig von der Auswahl des Aixplorer® - Benutzers werden TIS und/oder TIB und/oder TIC oder das Maximum der drei Werte basierend auf Schallkopf und Anwendung kontinuierlich von 0,0 bis zur maximalen Ausgangsleistung in Schritten von 0,1 angezeigt. Der mechanische Index wird im Ausgangsleistungsbereich von 0,0 bis 1,9 in Schritten von 0,1 ständig angezeigt. Daher beträgt die Genauigkeit von MI und TI im Aixplorer® System 0,1 Einheiten. Die Genauigkeitsschätzungen für die MI- und TI-Anzeige des Aixplorer® Systems sind in den akustischen Leistungstabellen dieses Anwenderhandbuches aufgeführt. Diese Genauigkeitsschätzungen berücksichtigen unterschiedliche Schallköpfe und Systeme, Grundfehler der akustischen Leistungsmodellierung sowie Messschwankungen, über die im nachfolgenden Text berichtet wird. Die angezeigten Werte sind als relative Daten zu betrachten, die dem Anwender bei der Umsetzung des ALARA-Prinzips durch eine überlegte Anwendung des Systems helfen sollen. Die Werte sind nicht als tatsächliche physikalische Größen in untersuchtem Gewebe oder untersuchten Organen zu interpretieren. Die Basisdaten, die für die Anzeige der Ausgangsleistung verwendet werden, stammen aus Labormessungen nach dem AIUM-Messstandard. Die Messungen werden dann in Form von Algorithmen zur Berechnung der angezeigten Ausgangswerte verwendet. Viele der im Mess- und Berechnungsverfahren verwendeten Annahmen sind konservativ. Eine Überbewertung der tatsächlichen in-situ-Belastung wurde für die meisten Gewebepfade in das Mess- und Berechnungsverfahren integriert.

Zum Beispiel:

- Die im Wassertank gemessenen Werte wurden anhand eines konservativen Industriestandards und Dämpfungskoeffizienten von 0,3 dB / cm-MHz herabgesetzt.
- Für die TI-Modelle wurden konservative Werte für Gewebemerkmale verwendet. Für die Gewebe- oder Knochenabsorptionsrate, Durchblutungsrate, Bluterwärmungsvermögen und Wärmeleitfähigkeit des Gewebes wurden konservative Werte ausgewählt.

- Die TI-Industriestandardmodelle gehen von einem stationären Temperaturanstieg aus, d.h. es wird angenommen, dass der Schallkopf lange genug in einer Position verbleibt, um diesen stationären Zustand zu erreichen.

Eine Reihe von Faktoren werden bei der Genauigkeitsschätzung der angezeigten Werte einbezogen: Hardware-Unterschiede, Genauigkeit des Algorithmus und Messschwankungen und die Unterschiede bei Schallköpfen und Systemen sind ein ausschlaggebender Faktor. Bei Schallköpfen sind sie auf das Leistungspotential der piezoelektrischen Kristalle, verfahrensbedingte Impedanzunterschiede und unterschiedlich empfindliche Linsenfokussierungsparameter zurückzuführen. Systemunterschiede bei der Spannungssteuerung und Leistung des Impulsgebers tragen ebenfalls zu den Schwankungen bei. Die zur Schätzung der akustischen Leistungswerte für verschiedene Betriebsbedingungen und Impulsgeberspannungen verwendeten Algorithmen weisen bestimmte Messunsicherheiten auf. Ungenauigkeiten bei Labormessungen sind unter anderem auf Unterschiede bei Hydrophonkalibrierung und -leistung, Positionierungs-, Ausrichtungs- und Umwandlungstoleranzen sowie auf wechselndes Testpersonal zurückzuführen. Die konservativen Annahmedaten der Leistungsschätzungsalgorithmen zur linearen Ausbreitung bei allen Tiefen durch ein 0,3 dB/cm-MHz-Dämpfungsmedium wurden bei der Genauigkeitsschätzung für die Anzeige nicht berücksichtigt. Weder eine lineare Ausbreitung der Schallwelle noch eine einheitliche Dämpfungsrate von 0,3 dB/cm-MHz treffen für Wassertankmessungen und die meisten Gewebepfade im Körper zu. Gewebe und Organe im Körper weisen unterschiedliche Dämpfungseigenschaften auf. Im Wasser ist die Dämpfung praktisch gleich Null. Im Körper, und vor allem bei Wassertankmessungen, treten bei einer Erhöhung der Impulsgeberspannung nichtlineare Ausbreitungs- und Sättigungsverluste auf. Die Schätzungen der Anzeigenauigkeit berücksichtigen Unterschiede von Schallköpfen und Systemen, Grundfehler der akustischen Leistungsmodellierung sowie Messschwankungen. Diese Schätzungen basieren nicht auf Fehlern bei Messungen oder aufgrund von Messungen nach den AIUM-Messstandards oder den Auswirkungen von nichtlinearem Verlust auf die Messwerte.

Bedeutung von TI und MI sowie Zusammenhang mit biologischen Effekten

THERMISCHER INDEX

Der TI ist ein relativer Indikator für den möglichen Temperaturanstieg an einer bestimmten Stelle entlang des Ultraschallstrahls. „Relativ“ deswegen, weil die angenommenen Bedingungen für die Gewebeerwärmung derart komplex sind, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass dieser Index den tatsächlichen Temperaturanstieg unter allen Bedingungen anzeigt. Ein TI von 2 bedeutet daher einen höheren Temperaturanstieg als ein TI von 1, jedoch nicht unbedingt einen Anstieg um 2° C. Dieser Temperaturanstieg ist ein theoretischer Schätzwert auf der Basis von Versuchsbedingungen, die möglicherweise nicht für klinische Bedingungen gelten. Der TI ist demnach als wichtiger Indikator anzusehen, der den Anwender auf einen möglichen Temperaturanstieg an einer bestimmten Gewebestelle aufmerksam macht. Die Relevanz eines durch Ultraschall verursachten Temperaturanstiegs im Körper ist auf die beobachteten Veränderungen der Zellaktivität in Abhängigkeit von der Temperatur zurückzuführen. Im Allgemeinen tritt bei einer gesunden Enzymaktivität ungefähr eine Verdoppelung für jeden Anstieg um 10°C auf. Der menschliche Körper hält heißen Getränken und Fieber für einen gewissen Zeitraum stand. Bei einer durchschnittlichen Körperkerntemperatur von 37° C ist ein Temperaturanstieg von 2°C kein Problem. Die folgende Tabelle zeigt die Auswirkungen verschiedener Temperaturstufen.

Tabelle 3.4. *Temperaturauswirkungen von Millet and Ziskin, 1989*

Temperaturbereich °C	Auswirkung
37-39	Keine gesundheitsgefährdenden Auswirkungen über einen längeren Zeitraum
39-43	Gesundheitsgefährdende Auswirkungen nach einiger Zeit
>41	Schwellenwert für fötale Komplikationen, längere Zeit
44-46	Koagulation von Protein
>45	Enzymdenaturierung setzt ein
>41.8	Krebszellen sterben ab (keine Vermehrung möglich). Wird oft als Schadensgrenzwert angenommen, außer für Augen

Der Temperaturanstieg im Gewebe während einer Ultraschalluntersuchung ist auf die Absorption der Schallenergie zurückzuführen. Mit Absorption bezeichnet man die Umwandlung von Ultraschallenergie in Wärme. Das Ausmaß der Absorption hängt vom Gewebetyp ab. Eine spezifisches Verfahren zur Quantifizierung der Gewebeabsorptionseigenschaften ist der „Absorptionskoeffizient“. Der Absorptionskoeffizient wird in Dezibel pro Zentimeter pro MegaHertz ausgedrückt. Der Absorptionskoeffizient hängt stark vom beschallten Organ oder Gewebetyp ab. Fruchtwasser, Blut und Harn weisen einen sehr niedrigen Absorptionskoeffizienten auf, was bedeutet, dass es dort zu einem geringen Temperaturanstieg kommt und der Ultraschall beinahe ungemindert durch die Flüssigkeit geht. Knochen weisen hingegen einen sehr hohen Absorptionskoeffizienten auf. Dichte Knochen absorbieren die Energie sehr schnell, was zu einem raschen Temperaturanstieg führt. Weichgewebe weist je nach Organ eine unterschiedliche Dichte auf, innerhalb eines Organs ist die Dichte jedoch weitgehend gleich. Die Absorption wird von der Ultraschallfrequenz beeinflusst. Je höher die Frequenz, desto höher die Absorption. So kann der Temperaturanstieg minimiert werden: Der Temperaturanstieg hängt von der Intensität und Dauer der Belastung an ein und derselben Stelle, der Größe und Stelle des Fokus sowie der Energieabsorption durch das Gewebe ab. Der Anwender kann die Intensität (Ausgangsleistung), Dauer oder Belastungszeit steuern. Der Schallkopf ist normalerweise während der Untersuchung ständig in Bewegung, was die Belastungszeit an einer bestimmten Gewebestelle vermindert. Ein weiterer ausschlaggebender Faktor für den Temperaturanstieg ist die Absorption der Ultraschallenergie in Gewebeschichten vor der Zielstelle. Eine erhöhte Absorption

in diesen Schichten vermindert die an der Zielstelle abgegebene Ultraschallenergie.

MECHANISCHER INDEX

Durch die Ultraschallbelastung werden neben dem Wärmeeffekt eine Reihe von mechanischen Effekten im Körper erzeugt. Diese Effekte lassen sich in zwei Kategorien unterteilen. Die erste Kategorie wird als akustische Kavitation bezeichnet. Sie tritt auf, wenn der Schall einen Bereich mit einem Hohlraum, z.B. Gasblase oder Luftsack, passiert. Einige Gewebetypen, vor allem Lunge und Darm von Erwachsenen enthalten Gasblasen und sind daher eher für diese Kavitationseffekte anfällig. Fötale Lunge und Darm enthalten keine offensichtlichen Luftblasen, da der Fötus noch keine Luft einatmet - er bekommt den Sauerstoff aus dem mütterlichen Blutstrom. Es könnten sich jedoch eventuell kleine Gasblasen in anderen Körperteilen als Lunge und Darm bilden. Dieser Bereich muss noch eingehender erforscht werden. Bei Kavitation können die Schallwellen dazu führen, dass Blasen oder Lufteinschlüsse sich rhythmisch ausdehnen und zusammenziehen: mit anderen Worten, sie können pulsieren oder schwingen. Beim Pulsieren senden die Gasblasen sekundäre Schallwellen in alle Richtungen aus. Bei einer Kontraktion der Gasblasen zum Implosionspunkt hin kann es für einige Zehntel Nanosekunden zu extrem hohen Temperaturen kommen. Diese hohen Temperatur- und Druckwerte können hochreaktive chemische Substanzen, sogenannte freie Radikale, und andere potenziell toxische Verbindungen bilden, die theoretisch - wenn auch unwahrscheinlich - genetischen Schaden verursachen können. Die rasche Gasblasenkontraktion bei der Kavitation kann zudem Mikro-Flüssigkeitsstrahlen bilden, die Zellen beschädigen können. Bei der Fokussierung von diagnostischem Ultraschall auf die Lunge oder den Darm von Versuchstieren mit Gasblasen wurden Rupturen sehr kleiner Blutgefäße durch diese Kavitationseffekte beobachtet. Die Sicherheitsrichtlinien für diagnostischen Ultraschall sind darauf ausgerichtet, Kavitationseffekte zu vermeiden, da sie potenziell schädlich sind. Wenn darauf geachtet wird, ob Gasblasen im beschallten Gewebe vorhanden sind und zudem die Druckamplitude des Ultraschallimpulses begrenzt wird, kann Kavitation leichter vermieden werden. Andere Faktoren wie etwa die Impulslänge und Flüssigkeitsdichte sind ebenfalls für eine mögliche Kavitationsbildung ausschlaggebend. Wenn Gasblasen im Gewebe vorhanden sind, so sind auch ihre Anzahl, Größe und Position relevante Faktoren, die zu diesem

Effekt beitragen. Das Auftreten von Kavitation und ihrem Verhalten hängt von zahlreichen Faktoren ab, u.a. Ultraschalldruck und Frequenz, Ultraschallfeld (fokussiert oder nicht, gepulst oder kontinuierlich), Vorhandensein von stehenden Wellen sowie Beschaffenheit und Zustand des Materials und seiner Begrenzungen. Derzeit gibt es keinerlei Beweise für das Auftreten von Kavitation in menschlichem Gewebe oder Flüssigkeiten infolge einer diagnostischen Ultraschallbelastung. Zudem begrenzen die Parameter der Bedienelemente unseres Ultraschall-Bildgebungssystems die Spitzenausgangsleistung. Ultraschall kann zudem andere mechanische Effekte ohne Vorhandensein von Blasen verursachen. Dazu zählen u. a. Änderungen von Druck, Kraft, Torsion (verursacht Drehen von Teilchen) und Strömung (verursacht Schwingungen von Flüssigkeit). Diese Änderungen können wiederum akustische Phänomene, elektrische Veränderungen in Zellmembranen und ihre erhöhte Durchgängigkeit für große Moleküle, Bewegung und Umverteilung von Zellen in Flüssigkeit sowie Zellschäden verursachen. Wenn Ultraschall Flüssigkeit passiert, verursacht er eine Art Umrührwirkung, die als akustische Strömung bezeichnet wird. Mit dem Anstieg des Ultraschalldruckes wird der Flüssigkeitsstrom beschleunigt. Theoretisch könnte diese Umrührwirkung in flüssigkeitsgefüllten Körperteilen eines Patienten, wie etwa Blutgefäßen, Blase oder Fruchtblase, auftreten. Bei Tierversuchen wurde das Auftreten von Scherung beobachtet, wenn der Flüssigkeitsstrom in die Nähe eines Festkörpers gelangt, was zur Beschädigung der Thrombozyten und zu abnormaler Blutgerinnung (Thrombose) führen kann. Es ist nicht klar, in welchem Ausmaß dieser Effekt bei Menschen unter diagnostischer Ultraschallbelastung auftreten kann. Trotz des Vorhandenseins möglicher unerwünschter Wirkungen von Ultraschall wurde das Gesamtrisiko einer diagnostischen Ultraschalluntersuchung als minimal eingestuft, sogar bei mittlerer bis langer Belastung. Unter normalen Untersuchungsbedingungen hat sich eine bedachte und vorsichtige Anwendung von Ultraschall unter Befolgung des ALARA-Prinzips als sicheres, wirksames und zuverlässiges diagnostisches Hilfsmittel erwiesen.

Anwendung des ALARA-Prinzips

Implementieren des ALARA-Prinzips

ALARA-PRINZIP

Das Leitprinzip für die Anwendung von diagnostischem Ultraschall basiert auf dem Grundsatz „As Low As Reasonably Achievable“ (ALARA), d.h. „so niedrig wie sinnvollerweise erreichbar“. Die Entscheidung darüber, was als sinnvoll gilt, wird dem Urteil und der Erkenntnis von qualifiziertem Fachpersonal überlassen. Es ist unmöglich, Regeln aufzustellen, die das richtige Verhalten in jeder Situation vorschreiben. Der Anwender kann das Risiko an biologischen Effekten minimieren, indem er die Ultraschallbelastung bei der Bildakquisition so gering wie möglich hält.

DER ANWENDER SOLLTE SICH BEI JEDER UNTERSUCHUNG AN DAS ALARA-PRINZIP HALTEN

Da es keine bestimmten Grenzwerte für die biologischen Effekte von diagnostischem Ultraschall gibt, ist der Anwender für die Kontrolle der an den Patienten abgegebenen Gesamtenergie verantwortlich. Er muss den richtigen Kompromiss zwischen Belastungszeit und Bildqualität finden. Zur Sicherstellung der Bildqualität und Begrenzung der Belastungszeit sind Ultraschall-Systeme mit Bedienelementen ausgestattet, die während der Untersuchung reguliert werden können, um die Untersuchungsergebnisse zu optimieren. Es ist wichtig, dass der Anwender in der Lage ist, nach dem ALARA-Prinzip zu handeln. Die Fortschritte im Bereich des diagnostischen Ultraschalls - nicht nur in der Technologie, sondern auch in ihrer Anwendung - haben die Notwendigkeit verdeutlicht, den Anwender umfassender zu informieren und anzuleiten. Die Indizes der Ausgangsleistung sind beispielsweise so ein wichtiges Mittel zur Information. Es gibt eine Reihe von Variablen, welche die Verwendung dieser Indizes bei der Umsetzung des ALARA-Prinzips beeinflussen. Zu diesen Variablen zählen Indexwerte, Körpergröße, Lage des Knochens in Relation zum Fokus, Dämpfung

im Körper und Ultraschallbelastungszeit. Die Belastungszeit ist eine besonders nützliche Variable, da sie vom Anwender gesteuert werden kann. Die Möglichkeit einer Begrenzung der Indexwerte erleichtert die Umsetzung des ALARA-Prinzips.

UMSETZUNG VON ALARA ANHAND VON TI- UND MI-INDIZES

Das ALARA-Konzept wird anhand der auf dem Bildschirm in Form von biologisch relevanten Belastungsindizes angezeigten Informationen umgesetzt: TI und MI. Die Anzeige von biologischen Indizes dient lediglich als Hilfsmittel. Der sichere Einsatz des Ultraschall-Bildgebungssystems wird anhand der Verwendung niedrigst möglicher Indizes, die bestmögliche diagnostische Informationen liefern, gewährleistet.

BEDIENELEMENTE UND AKUSTISCHE LEISTUNG

Eine Ultraschalluntersuchung an einem Patienten beginnt stets mit der Wahl der geeigneten Schallkopffrequenz. Nach der Wahl von Schallkopf und Anwendung je nach Anatomie des Patienten wird die Ausgangsleistung so eingestellt, dass eine Bilddarstellung mit der niedrigstmöglichen Intensität gewährleistet ist. Nach der Aufnahme folgen die Einstellung des Schallkopffokus, die Erhöhung von Empfangsverstärkung, dynamischem Bereich und TGC für eine einheitliche Darstellung des Gewebes. Wird durch die Einstellung von Verstärkung und TGC eine gute Bildqualität erzielt, so sollte die Ausgangsleistung verringert werden. Erst nach diesen Einstellungen darf der Anwender die Ausgangsleistung um eine Stufe erhöhen. Im Anschluss an die B-Bild-Darstellung des abgetasteten Organs kann auf die farbkodierte Flussdarstellung (CFI) zur Ortung des Blutflusses zurückgegriffen werden. Wie zuvor bei der B-Bilddarstellung müssen Verstärkung, TGC und Bildverarbeitungsparameter vor einer Erhöhung der Ausgangsleistung optimiert werden. Nach der Ortung des Blutflusses wird das Abtastvolumen anhand der Doppler-Bedienelemente über dem Gefäß positioniert. Stellen Sie vor der Erhöhung der Ausgangsleistung den Geschwindigkeitsbereich und die Doppler-Verstärkung ein, um eine optimale Doppler-Abtastung zu erzielen. Nur wenn bei maximaler Doppler-Verstärkung kein akzeptables Bild erzeugt wird, darf der Anwender die Ausgangsleistung

erhöhen. Kurz gefasst: Wählen Sie die richtige Schallkopffrequenz und Anwendung für die Untersuchung aus; beginnen Sie mit einer niedrigen Leistungsstufe; optimieren Sie das Bild mittels Fokus, Empfangsverstärkung und anderer Bildgebungs-Bedienelemente; ist das Bild danach weiterhin diagnostisch unbrauchbar, so darf die Ausgangsleistung erhöht werden. Gesamtverstärkung und TGC sind die beiden wichtigsten Empfangsregler, die der Anwender zur Verbesserung der Bildqualität verwenden sollte, bevor er die akustische Leistung erhöht. Diese Bedienelemente wirken sich nicht auf die akustische Leistung, sondern lediglich auf den Empfang des Ultraschallechos aus. Was vor einer Erhöhung der Ausgangsleistung keinesfalls vergessen werden darf, ist die Optimierung der Bedienelemente für den Empfang. Zum Beispiel: Optimierung der Verstärkung zur Verbesserung der Bildqualität vor Erhöhung der Ausgangsleistung. Der dynamische Bereich und die Bildnachverarbeitung sind ebenfalls Empfangsregler, die sich nicht auf die akustische Ausgangsleistung auswirken. Auch hier gilt stets: Zuerst muss der Anwender diese beiden Bedienelemente optimieren, bevor die Ausgangsleistung erhöht wird.

Systemanwendung und akustische Leistung

Die Wahl der Anwendung und Steuerung der Ausgangsleistung wirken sich direkt auf die Schallintensität aus. Je nach der Auswahl des Anwenders sind verschiedene zulässige Intensitäts- bzw. Ausgangsleistungsbereiche verfügbar. Die Auswahl der richtigen Schallintensität für die Anwendung ist einer der ersten Schritte bei jeder Untersuchung. So sind z.B. periphere vaskuläre Intensitätsstufen nicht für fötale Untersuchungen geeignet. Es gibt Systeme, bei denen die Auswahl des geeigneten Intensitätsbereichs für eine bestimmte Anwendung automatisch erfolgt, während dieser bei anderen manuell eingestellt werden muss. Letztendlich ist der Anwender verantwortlich für den richtigen klinischen Einsatz. Das Aixplorer® Ultraschallsystem bietet die Möglichkeit automatischer Einstellungen (vorgegeben) oder manueller Einstellungen (benutzerseitig wählbar). Die Ausgangsleistung wirkt sich direkt auf die Schallintensität aus. Nach Auswahl der Anwendung ermöglicht die Steuerung der Ausgangsleistung dem Anwender die Erhöhung bzw. Senkung der Intensität. Diese Steuerung ermöglicht dem Anwender die Auswahl von Intensitäten unter dem festgesetzten Höchstwert. Ein bedachter und sorgfältiger Einsatz schreibt vor, die

niedrigst mögliche Intensität zu wählen, bei der gute Bildqualität erzielt wird.

Schallkopfwahl und akustische Leistung

Folgende Bedienelemente wirken sich auf die akustische Leistung aus:

- Impulswiederholungsfrequenz
- Fokustiefe
- Impulslänge
- Schallkopfwahl.

Die Impulswiederholungsfrequenz oder -rate ist die Anzahl der Ultraschall-Energieimpulse innerhalb einer bestimmten Zeitdauer. Die Verweilzeit ist der Kehrwert der Impulswiederholungsfrequenz minus der Impulsdauer. Je höher die Impulswiederholungsfrequenz, desto mehr Energieimpulse innerhalb einer bestimmten Zeitdauer und desto kürzer die Verweilzeit. Eine Reihe von Bedienelementen wirken sich auf die Impulswiederholungsfrequenz aus: Fokustiefe, Darstellungstiefe, Abtastvolumentiefe, Flussoptimierung, Skala, Anzahl der Fokusbereiche und Abschnittsbreite. Der Fokus des Ultraschallstrahls wirkt sich auf die Bildauflösung aus. Zur Beibehaltung bzw. Erhöhung der Auflösung bei einem anderen Fokus muss die Ausgabe über dem Fokusbereich geändert werden. Diese Änderung der Ausgabe ist eine Funktion der Systemoptimierung. Je nach Untersuchung sind verschiedene Fokustiefen erforderlich. Die Fokuseinstellung auf die richtige Tiefe verbessert die Auflösung der Zielstruktur. Unter Impulslänge versteht man die Dauer eines Ultraschallimpulses. Je länger der Impuls, desto größer die zeitlich gemittelte Intensität. Je größer die zeitlich gemittelte Intensität, desto größer die Wahrscheinlichkeit einer Temperaturerhöhung und Kavitation. Die Impulslänge, auch als Impulsdauer bezeichnet, ist die Ausgangsimpulsdauer beim PW-Doppler. Mit der Erhöhung des Doppler-Abtastvolumens erhöht sich die Pulslänge. Die Auswahl des Schallkopfes wirkt sich indirekt auf die Intensität aus. Die Gewebedämpfung ändert sich je nach Frequenz. Je höher die Betriebsfrequenz des Schallkopfes, desto größer ist die Dämpfung der Ultraschallenergie. Eine höhere Betriebsfrequenz des Schallkopfes erfordert mehr Ausgangsleistung, um tiefer zu schallen. Um bei derselben Ausgangsintensität tiefer schallen zu können, ist eine niedrigere Schallkopffrequenz erforderlich. Eine größere Verstärkung

und höhere Ausgangsleistung ohne entsprechende Verbesserung der Bildqualität erfordern eventuell einen Schallkopf mit niedrigerer Frequenz.

Betriebsmodus und akustische Leistung

Die Wahl des Bildgebungsmodus bestimmt die Art des Ultraschallstrahls. Der B-Modus ist ein Abtastmodus, der Doppler und der M-Modus sind stationärer Modi oder Modi ohne Abtastung. Ein stationärer Ultraschallstrahl konzentriert die Energie auf eine einzige Stelle. Ein bewegter oder abgetasteter Ultraschallstrahl verteilt seine Energie über eine Fläche, so dass der Strahl gegenüber einem Modus ohne Scannen nur für einen Bruchteil der Zeit auf die gleiche Fläche konzentriert ist.

Die ShearWave™-Elastographie arbeitet mit beiden Typen, also Modi mit und ohne Abtastung:

- die Erzeugung der Schallstrahlenenergie ist eine Ultraschallemission mit Abtastung
- die Erfassung der Transversalwellen-Ausbreitung erfolgt mittels flacher Beschallung ohne Abtastung bei sehr hoher Frequenz (UltraFast™),
- die B-Modus-Bildgebung wird im Interleave-Verfahren mit der Elastographie-Sequenz ausgeführt und ist ein Modus mit Abtastung.

Steuerung der Belastungszeit

Ein wichtiger Faktor, der bei der Umsetzung des ALARA-Prinzips eine Rolle spielt, aber nicht angezeigt wird, ist die Zeit. Da sich die Gesamtbelastung direkt proportional zur Zeitdauer des Ultraschallstrahls in einem Bereich verhält, sollte der Anwender neben dem TI und MI auch die Gesamtbelastungszeit an ein und derselben Stelle so gering wie möglich halten. Nach dem ALARA-Konzept sollte die Ultraschallbelastung zur Erzielung klinisch verwertbarer Informationen so kurz wie möglich und nur mit der kleinstmöglichen Ausgangsleistung erfolgen. Wenn der Anwender die neuen Verantwortlichkeiten klar verstanden hat, wird er die neuen Hochleistungsgeräte optimal nutzen und dabei das Risiko für den Patienten minimieren können. Stellen

Sie sicher, dass die Beschallungszeit minimal gehalten und nur medizinisch erforderliches Schallen durchgeführt wird. Beeinträchtigen Sie niemals die Qualität der Aufnahmen mit hastig durchgeführten Untersuchungen. Eine schlecht durchgeführte Untersuchung erfordert eine Nachuntersuchung, was letztendlich die Belastungszeit erhöht. Der diagnostische Ultraschall ist ein wichtiges medizinisches Hilfsmittel und sollte wie jedes andere effizient und wirksam eingesetzt werden.

Anwendung von ALARA mit dem Aixplorer® Ultraschall-Bildgebungssystem

Der gewählte Bildgebungs-Modus des Systems richtet sich nach den benötigten Informationen. Der B-Modus liefert anatomische Informationen. PW-Doppler, Color Power-Darstellung (CPI), Direktionale Farb-Power-Darstellung (DCPI) und farbkodierte Flussdarstellung (CFI) liefern Informationen zum Blutfluss. Der M-Modus wird für die Herzfunktionsprüfung und Messung der fetalen Herzfrequenz verwendet. Die ShearWave™-Elastographie zeigt Informationen zur Gewebesteifigkeit über eine Farbskala oder Graustufenskala an. Ein Abtastmodus wie der B-Modus, SWE™, CPI, DCPI oder CFI, verteilt oder streut die Ultraschallenergie über einen Bereich, während ein stationärer Modus wie PW-Doppler die Ultraschallenergie konzentriert. Der M-Modus ist anstelle der spektralen Pulsed Wave Doppler-Bildgebung für die Dokumentation der embryonalen/fetalen Herzfrequenz zu verwenden. Ein klares Verständnis der einzelnen Bildgebungsmodi ermöglicht dem Anwender eine sachkundige Anwendung des ALARA-Prinzips. Zudem muss der Anwender über Schallkopffrequenz, Systemeinstellungswerte und Schalltechniken Bescheid wissen, sowie über entsprechende Erfahrung verfügen, um nach dem ALARA-Prinzip zu handeln. Die Entscheidung über die Höhe der akustischen Leistung liegt letztendlich beim Anwender. Diese Entscheidung muss auf folgenden Faktoren beruhen: Patiententyp, Art der Untersuchung, Anamnese des Patienten, leichte oder schwierige Gewinnung diagnostisch nützlicher Informationen, sowie die mögliche lokale Erwärmung des Patienten aufgrund der Oberflächentemperatur des Schallkopfes. Ein bedachter Einsatz des Systems bedeutet, die nötige Belastungsdauer für den Patienten bei niedrigstmöglichen Index-Werten so kurz wie möglich zu halten, um akzeptable diagnostische Ergebnisse zu erzielen. Auch wenn

hohe Index-Werte nicht unbedingt das Auftreten biologischer Effekte implizieren, sollten sie ernst genommen werden. Der Anwender sollte alles unternehmen, um die möglichen Auswirkungen eines hohen Indexwertes zu minimieren. Eine begrenzte Belastungsdauer ist eine wirksame Maßnahme, um dieses Ziel zu erreichen. Dem Anwender stehen verschiedene Bedienelemente für die Einstellung der Bildqualität und Begrenzung der Schallintensität zur Verfügung. Diese Bedienelemente stehen mit den Techniken in Zusammenhang, die der Anwender zur Umsetzung des ALARA-Prinzips einsetzen kann. Diese Bedienelemente lassen sich in drei Kategorien unterteilen: direkte, indirekte und Bedienelemente für den Empfang. Mit den Systemeinstellungen können sich die TI- und MI-Werte ändern. Dies ist bei der Einstellung der Ausgangsleistung am deutlichsten; andere Systemeinstellungen wirken sich hingegen auf die angezeigten Ausgangswerte aus.

DIREKTE BEDIENELEMENTE

Ausgangsleistung

Die Ausgangsleistung steuert die Schall-Ausgangsleistung des Systems. Auf dem Bildschirm werden zwei Echtzeit-Werte angezeigt: TI und MI. Sie ändern sich je nach Reaktion des Systems auf die Einstellung der Ausgangsleistung. Beim kombinierten Modus, wie simultanem CFI- und B-Modus, trägt jeder einzelne Modus zum Gesamt-TI bei. Ein Modus liefert dabei den Hauptbeitrag zu diesem Gesamtwert. Der angezeigte MI stammt vom Modus mit dem größten Spitzendruck.

INDIREKTE BEDIENELEMENTE

B Bedienelemente

SEKTORBREITE

Das Verengen des Sektorwinkels kann die Bildrate erhöhen. Dies erhöht den TI. Die Impulsgeberspannung kann mithilfe von Softwaresteuerungen automatisch nach unten angepasst werden, um den

TI unterhalb der Systemhöchstwerte zu halten. Eine Verringerung der Impulsgeberspannung senkt auch den MI.

ZOOM

Eine Zoom-Vergrößerung durch Drücken auf „Zoom“ kann die Bildrate erhöhen. Dies erhöht den TI. Zur Verbesserung der Auflösung kann sich die Anzahl der Fokusbereiche ebenfalls automatisch erhöhen. Dadurch kann sich der MI ändern, da die Spitzenintensität bei einer unterschiedlichen Tiefe auftreten kann.

ANZAHL DER FOKUSBEREICHE

Mehr Fokusbereiche bedeuten möglicherweise eine Änderung des TI und MI durch die automatische Änderung der Bildrate oder Fokustiefe. Niedrigere Bildraten senken den TI. Der angezeigte MI bezieht sich auf den Bereich mit der größten Spitzenintensität.

FOKUS

Eine Änderung der Fokustiefe ändert den MI. Allgemein gilt, dass die MI-Werte höher sind, wenn die Fokustiefe in der Nähe des natürlichen Fokus des Schallkopfes liegt.

M Bedienelemente

Auf den M-Modus kann über die B-Modus-Bedienelemente zugegriffen werden. Alle oben erwähnten 2D-Bedienelemente gelten für das Bild des M-Modus. In ähnlicher Weise werden der MI und/oder TI auf dem Aixplorer® -Monitor angezeigt, wenn sich dieser im M-Modus befindet. Zusätzliche, dem M-Modus zugewiesene indirekte Bedienelemente wirken sich ebenfalls auf den TI und MI aus.

ABTASTVOLUMENTIEFE

Wird die M-Modus-Abtastvolumentiefe erhöht, kann sich die PRF automatisch erhöhen, was zu einem Anstieg des TI führt.

CFI, CPI und DCPI Bedienelemente

FLUSSOPT.

Eine Erhöhung der Farbsensitivität über Flussopt. kann den TI erhöhen. Die Abtastung des Farbbildes dauert länger. Farbimpulse sind der dominierende Impulstyp bei diesem Modus.

FARBBOX/SEKTORBREITE

Eine kleinere Farbsektorbreite erhöhte die Farbbildrate und in der Folge den TI. Das System kann die Impulsgeberspannung automatisch verringern, um unter dem Höchstwert des Systems zu bleiben. Eine Verringerung der Impulsgeberspannung senkt den MI.

FARBBOX/SEKTORTIEFE

Eine größere Farbsektortiefe kann die Farbbildrate automatisch senken oder einen neuen Farbfokusbereich oder eine andere Farbimpulslänge auswählen. Der TI ändert sich aufgrund der Kombination dieser Effekte. Allgemein gilt, dass sich der TI mit steigender Farbsektortiefe verringert. Der MI bezieht sich auf die Spitzenintensität des dominierenden Impulstyps, der ein Farbimpuls ist.

SKALA

Bei Verwendung der Skala zur Erhöhung des Farbgeschwindigkeitsbereichs kann sich der TI erhöhen. Das System kann die Impulsgeberspannung automatisch einstellen, um unter den Höchstwerten des Systems zu bleiben. Eine Verringerung der Impulsgeberspannung senkt auch den MI.

SEKTORBREITE

Eine schmalere 2D-Sektorbreite bei der Farbbildgebung erhöht die Farbbildrate. Der TI erhöht sich. Der MI bleibt unverändert.

Pulsed Wave Doppler-Bedienelemente

ABTASTVOLUMENTIEFE

Bei Erhöhung der Doppler-Abtastvolumentiefe wird die Doppler-PRF automatisch verringert. Mit der PRF nimmt auch der TI zu. Das System kann die Impulsgeberspannung automatisch einstellen, um unter den Höchstwerten des Systems zu bleiben. Eine Verringerung der Impulsgeberspannung senkt auch den MI.

Elastographie Bedienelemente

ELASTOGRAPHIE-BOX/SEKTORBREITE

Eine kleinere Elastographie-Sektorbreite erhöht die Elastographie-Bildrate und in der Folge den TI. Das System kann die Impulsgeberspannung automatisch verringern, um unter dem Höchstwert des Systems zu bleiben. Eine Verringerung der Impulsgeberspannung senkt den MI.

ELASTOGRAPHIE-BOX/SEKTORTIEFE

Eine größere Elastographie-Sektortiefe kann die Elastographie-Bildrate automatisch senken. Der TI ändert sich. Allgemein gilt, dass sich der TI mit steigender Elastographie-Sektortiefe verringert. Der MI bezieht sich auf die Spitzenintensität des dominierenden Impulstyps im kombinierten Modus.

SEKTORBREITE

Eine schmalere 2D-Sektorbreite bei der Elastographie verringert die Elastographie-Bildrate. Der TI erhöht sich. Der MI bleibt unverändert.

Andere

B-MODUS, CFI, CPI, DCPI, PULSED WAVE DOPPLER, UND ELASTOGRAPHIE

Bei Auswahl eines neuen Bildgebungsmodus werden TI und MI auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Jeder Modus hat seine entsprechende Impuls-Wiederholungsfrequenz und maximale Intensität. Bei Kombinations- oder Simultanmodi ergibt sich der TI aus der Summe der Anteile der aktivierten Modi, und der MI entspricht dem MI für den Fokusbereich und dem Modus mit der größten herabgesetzten Intensität.

TIEFE

Eine Erhöhung der B-Modus-Tiefe senkt automatisch die Bildrate im B-Modus. Dies senkt den TI. Das System kann zudem automatisch eine größere B-Modus-Fokustiefe auswählen. Eine Änderung der Fokustiefe kann den MI ändern. Der angezeigte MI entspricht jenem des Bereichs mit der größten Spitzenintensität.

ANWENDUNG

Die Standardwerte für die akustische Leistung werden eingestellt, wenn der Anwender eine Anwendung auswählt. Die werkseitigen Standardeinstellungen sind je nach Schallkopf, Anwendung und Modus verschieden. Die Standardeinstellungen wurden unter Beachtung der von der FDA vorgegebenen Höchstwerte für den jeweiligen Verwendungszweck gewählt.

Klinische Anwendungen, Beispiele

SMALL PARTS

Der Anwender beginnt eine Ultraschalluntersuchung der Small Parts mit der Auswahl der geeigneten Anwendung und Gewebevoreinstellung (Brust/Brust, Nah- und Fernfeld, Urogenital/Skrotum, Schilddrüse/Schilddrüse oder Allgemein mit dem SL15-4 Schallkopf oder Brust bzw. Allgemein mit dem SLV16-5 oder Schilddrüse mit dem SL10-2), startet anschließend das Schallen des Gewebes und beginnt mit den Anpassungen der Ausgangsleistung, um sicherzustellen dass die kleinstmögliche Einstellung verwendet wird, um ein B-Modus-Bild zu erhalten. Danach passt er den Bereich und die Tiefe der Fokuszone des Schallkopfs an. Der Anwender versucht, eine möglichst gleichmäßige Gewebedarstellung zu erzielen. Dazu benutzt er AutoTGC oder erhöht die Empfangsverstärkung. Erzielt er ein zufriedenstellendes Bild durch die Anpassung/Erhöhung der Verstärkung, sollte er die Ausgangsleistung verringern. Ist nach diesen Einstellungen das produzierte Bild unbefriedigend, kann der Anwender die Leistung erhöhen.

Nach der B-Modus-Darstellung der Small Parts/des oberflächennahen Gewebes kann auf CFI CPI und/oder DCPI zur Ortung des Blutflusses zurückgegriffen werden. Wie beim B-Bild sollten Verstärkung und Bildeinstellungen optimiert werden, bevor die Ausgangsleistung, falls notwendig, erhöht wird.

Hat der Anwender den Blutfluss lokalisiert, setzt er den PW-Doppler ein und positioniert das Abtastvolumen über dem Gefäß. Vor einer Erhöhung der Ausgangsleistung optimiert der Anwender den Geschwindigkeitsbereich oder Skala, um eine optimale Doppler-Kurve zu erzielen. Nur wenn bei maximaler Doppler-Verstärkung kein akzeptables Doppler-Spektrum erzeugt wird, darf der Bediener die Ausgangsleistung erhöhen.

Nach dem Einsatz von 2D, Color Flow und Pulsed Wave Doppler kann der Elastographie-Modus verwendet werden, um die Gewebesteifigkeit zu überprüfen. Einstellungen von SWE Opt. (Auflösung, Standard oder Eindringtiefe), Größe und Positionierung der SWE-Box und SWE-Verstärkung sollten so vorgenommen werden, dass ein optimales Elastographie-Bild erzielt wird, bevor eine Erhöhung der Ausgangsleistung erfolgt. Ist die Bildarstellung nach Optimierung

der Einstellungen und maximaler Elastographie-Verstärkung nicht zufriedenstellend, kann der Anwender die Ausgangsleistung erhöhen.

Im Anschluss an die konventionellen 2D-Darstellungen können 3D-Aufnahmen mit dem SLV16-5 vom B-Modus der ShearWave™ Elastographie gemacht werden.

BEWEGUNGSAPPARAT

Jede MSK-Bildgebung beginnt der Anwender mit dem Auswählen der entsprechenden Anwendung und Gewebeforeinstellung (MSK/Schulter, Ellbogen, Handgelenk/Hand, Knie, Knöchel/Fuß oder Muskel auf dem SL15-4, SL10-2, SLH20-6 Schallkopf), startet anschließend das Schallen des Gewebes und beginnt mit den Anpassungen der Ausgangsleistung, um sicherzustellen dass die kleinstmögliche Einstellung verwendet wird, um ein B-Modus-Bild zu erhalten. Danach passt er den Bereich und die Tiefe der Fokuszzone des Schallkopfs an. Der Anwender versucht, eine möglichst gleichmäßige Gewebedarstellung zu erzielen. Dazu benutzt er AutoTGC oder erhöht die Empfangsverstärkung. Erzielt er ein zufriedenstellendes Bild durch die Anpassung/Erhöhung der Verstärkung, sollte er die Ausgangsleistung verringern. Ist nach diesen Einstellungen das produzierte Bild unbefriedigend, kann der Anwender die Leistung erhöhen.

Nach der B-Modus-Darstellung der Small Parts/des oberflächennahen Gewebes kann auf CFI CPI und/oder DCPI zur Ortung des Blutflusses zurückgegriffen werden. Wie beim B-Bild sollten Verstärkung und Bildeinstellungen optimiert werden, bevor die Ausgangsleistung, falls notwendig, erhöht wird.

Hat der Anwender den Blutfluss lokalisiert, setzt er den PW-Doppler ein und positioniert das Abtastvolumen über dem Gefäß. Vor einer Erhöhung der Ausgangsleistung optimiert der Anwender den Geschwindigkeitsbereich oder Skala, um eine optimale Doppler-Kurve zu erzielen. Nur wenn bei maximaler Doppler-Verstärkung kein akzeptables Doppler-Spektrum erzeugt wird, darf der Bediener die Ausgangsleistung erhöhen.

Nach dem Einsatz von 2D, Color Flow und Pulsed Wave Doppler kann der Elastographie-Modus verwendet werden, um die Gewebesteifigkeit zu überprüfen (bei SLH20-6 nicht verfügbar). Einstellungen von SWE Opt. (Auflösung, Standard oder Eindringtiefe), Größe und Positionierung der SWE-Box und SWE-Verstärkung sollten so vorgenommen werden, dass ein optimales Elastographie-Bild erzielt wird, bevor eine Erhöhung der Ausgangsleistung erfolgt. Ist die Bilddarstellung nach Optimierung der Einstellungen und maximaler Elastographie-Verstärkung nicht zufriedenstellend, kann der Anwender die Ausgangsleistung erhöhen.

ABDOMEN/PELVIS

Bei Ultraschalluntersuchungen des Abdomens beginnt der Anwender mit der Wahl des geeigneten Schallkopfs (SC6-1 und XP5-1 für tieferliegende und SL15-4 oder SL10-2 für oberflächennahe Organe) und der geeigneten Gewebeforeinstellung (Niere, Abdomen, Prostata oder Gynäkologie bei Einsatz des SC6-1 oder XP5-1 und Darm beim Einsatz des SL15-4 oder SL10-2 für Untersuchungen des Intestinums). Anschließend schallt der Anwender das Zielorgan und regelt die Ausgangsleistung, wobei er die niedrigst mögliche Einstellung wählt, um ein optimales Bild zu erzielen. Anschließend wird er den Bereich und die Tiefe der Fokuszone einstellen und versuchen, durch eine Erhöhung der Empfangsverstärkung ein möglichst gleichmäßiges Bild des Gewebes zu erzielen. Wird ein angemessenes Bild mit der Verstärkungserhöhung erzielt, so sollte die Ausgangsleistung verringert werden. Erst nach diesen Einstellungen darf der Bediener ggf. die Ausgangsleistung auf die nächste Stufe erhöhen.

Nachdem ein B-Bild des Zielorgans erstellt wurde, können CFI, CPI und/oder DCPI eingesetzt werden, um den Blutfluss zu lokalisieren. Wie bei der B-Modus-Bildanzeige müssen Verstärkung und Bildverarbeitungsparameter vor einer Erhöhung der Ausgangsleistung optimiert werden. Im Falle von Artefakten infolge der Verstärkungserhöhung wird empfohlen, die Flash-Unterdrückungstaste zu aktivieren, um die Verstärkung erhöhen und die Schalleistung verringern zu können.

Nach der Ortung des Blutflusses wird das Abtastvolumen anhand der PW-Doppler-Bedienelemente über dem Gefäß positioniert. Stellen Sie vor der Erhöhung der Ausgangsleistung den Geschwindigkeitsbereich und die Doppler-Verstärkung ein, um eine optimale Doppler-Umfahrung zu erzielen. Nur wenn bei maximaler Doppler-Verstärkung kein akzeptables Doppler-Spektrum erzeugt wird, darf der Bediener die Ausgangsleistung erhöhen.

Nach dem Einsatz von 2D, Color Flow und Pulsed Wave Doppler kann der Elastographie-Modus verwendet werden, um die Gewebesteifigkeit des Organs zu überprüfen. Einstellungen von SWE Opt. (Auflösung, Standard, oder Eindringtiefe), Größe und Positionierung der SWE-Box und SWE-Verstärkung sollten so vorgenommen werden, dass ein optimales Elastographie-Bild erzielt wird, bevor eine Erhöhung der Ausgangsleistung erfolgt. Nur wenn die Bilddarstellung nach Optimierung der Einstellungen und maximaler Elastographie-

Verstärkung nicht zufriedenstellend ist, kann der Anwender die Ausgangsleistung erhöhen.

ENDOKAVITÄRE ANWENDUNGEN (NICHT GEBURTSHILFLICH)

Bei der urogenitalen und gynäkologischen Bildgebung beginnt der Anwender mit der Wahl des geeigneten Schallkopfs (SE12-3 für intrakavitäre Untersuchungen), der klinischen benötigten Anwendung und der entsprechenden Gewebeforeinstellung (Urogenital/Prostata oder OB-GYN/Gyn/). Anschließend schallt der Anwender das Zielorgan und regelt die Ausgangsleistung, wobei er die niedrigst mögliche Einstellung wählt, um ein B-Modus-Bild zu erzielen. Anschließend wird er den Bereich und die Tiefe der Fokuszone einstellen und versuchen, durch eine Erhöhung der Empfangsverstärkung ein möglichst gleichmäßiges Bild des Organs zu erzielen. Wird ein angemessenes Bild mit der Verstärkungserhöhung erzielt, so sollte die Ausgangsleistung verringert werden. Erst wenn nach diesen Einstellungen das produzierte Bild unbefriedigend ist, sollte der Anwender die Leistung erhöhen.

Nachdem ein B-Bild des Zielorgans erstellt wurde, können CFI, CPI und/oder DCPI eingesetzt werden, um den Blutfluss zu lokalisieren. Wie bei der B-Modus-Bildanzeige müssen Verstärkung und Bildverarbeitungsparameter vor einer Erhöhung der Ausgangsleistung optimiert werden. Der Anwender stellt dann den PW-Doppler-Modus ein und positioniert das Abtastvolumen über dem Gefäß. Vor einer Erhöhung der Ausgangsleistung optimiert der Anwender den Geschwindigkeitsbereich oder Skala, um eine optimale Doppler-Kurve zu erzielen. Nur wenn bei maximaler Doppler-Verstärkung kein akzeptables Bild erzeugt wird, darf der Anwender die Ausgangsleistung erhöhen.

Nach der Aufnahme von B-Modus-, Color Flow- und Pulsed Wave Doppler-Bilder kann der Elastographie-Modus verwendet werden, um die Gewebesteifigkeit des Zielorgans zu überprüfen (bei Obstretik-Voreinstellungen nicht verfügbar). Einstellungen von SWE Opt. (Auflösung, Standard, oder Eindringtiefe), Größe und Positionierung der SWE-Box und SWE-Verstärkung sollten so vorgenommen werden, dass ein optimales Elastographie-Bild erzielt wird, bevor eine Erhöhung der Ausgangsleistung erfolgt. Nur wenn die Bilddarstellung nach Optimierung der Einstellungen und maximaler Elastographie-Verstärkung nicht zufriedenstellend ist, kann der Anwender die Ausgangsleistung erhöhen.

VASKULÄR

Bei der vaskulären Bildgebung beginnt der Anwender mit der Wahl des geeigneten Schallkopfs (SL15-4 und SMC12-3 für vaskuläre Bildgebung an der Oberfläche, SLH10-2 für die intraoperative, vaskuläre Bildgebung, SC6-1 für die vaskuläre abdominale Bildgebung und XP5-1 für transkranielle Bildgebung) und der entsprechenden Gewebevoreinstellung (Karotis, obere Extremität Arterie/Vene, Untere Extremität Arterie/Vene für SL15-4, SMC12-3 oder SL10-2, Vaskulär Abdominal für SC6-1). Der Arzt beginnt mit der Bildgebung der Zielgefäßes bzw. -organs und nimmt die Einstellungen der Ausgangsleistung vor, um sicherzustellen, dass die niedrigstmögliche Leistung zur Erzeugung eines angemessenen B-Modus-Bildes verwendet wird. Nach der Aufnahme eines ersten B-Modus-Bildes folgen die Einstellung der Tiefe und Breite des Fokusbereiches. Hierauf sollte die Erhöhung der Empfangsverstärkung für eine einheitliche Darstellung des Gefäßes bzw. Organs folgen. Wird ein angemessenes Bild mit der Verstärkungserhöhung erzielt, so sollte die Ausgangsleistung verringert werden. Erst nach diesen Einstellungen darf der Bediener ggf. die Ausgangsleistung auf die nächste Stufe erhöhen.

Nach der Aufnahme der B-Modus-Bilder des Zielgefäßes oder -organs kann auf die CFI, CPI und/oder dCPI zur Ortung des Blutflusses zurückgegriffen werden. Wie bei der B-Modus-Bildanzeige müssen Verstärkung und Bildverarbeitungsparameter vor einer Erhöhung der Ausgangsleistung optimiert werden. Im Falle von Artefakten infolge der Verstärkungserhöhung wird empfohlen, die Flash-Unterdrückungstaste zu aktivieren, um die Verstärkung erhöhen und die Schalleistung verringern zu können.

Nach der Ortung des Blutflusses wird das Abtastvolumen anhand der PW-Doppler-Bedienelemente über dem Gefäß positioniert. Stellen Sie vor der Erhöhung der Ausgangsleistung den Geschwindigkeitsbereich und die Doppler-Verstärkung ein, um eine optimale Doppler-Umfahrung zu erzielen. Nur wenn bei maximaler Doppler-Verstärkung kein akzeptables Doppler-Spektrum erzeugt wird, darf der Bediener die Ausgangsleistung erhöhen.

OBSTETRIK

Diagnostische Ultraschallstudien des Fötus während Schwangerschaft gelten im Allgemeinen als sicher. Dieses Diagnoseverfahren ist nur bei einer gültigen medizinischen Indikation durchzuführen. Dabei ist die kleinstmögliche Einstellung der Ultraschallexposition zu verwenden, um die notwendigen Diagnoseinformationen unter dem ALARA (As Low As Reasonably Achievable)-Prinzip zu erhalten.

Der thermische Index für Weichgewebe (TIS) ist vor der 10. Gestationswoche und der thermische Index für Knochen (TIB) zur 10. Gestationswoche oder später verwendet werden, wenn die Ossifikation offenkundig ist. Unter Beibehaltung des ALARA-Prinzips sollte die M-Modus-Bildgebung anstelle der spektralen Doppler-Bildgebung für die Dokumentation der embryonalen/fetalen Herzfrequenz verwendet werden.

Für die Verwendung der Voreinstellung „Frühe OB“ auf dem SC6-1 und SE12-3 begrenzt das System den mechanischen Index auf einen Höchstwert von 1,0 (auf beiden Schallköpfen) und den thermischen Index auf einen Höchstwert von 2,0 (auf beiden Schallköpfen). Diese Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen und Richtlinien für den sicheren Gebrauch eines Ultraschall-Diagnosesystems während einer Fötusuntersuchung:

- American institute of ultrasound of medicine (AIUM)
- British medical ultrasound society (BMUS)
- European committee for medical ultrasound safety (ECMUS)
- Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOCG) et Santé Canada

Besonders erwähnt werden die Informationen des AIUM zu den Bioeffekten des Ultraschalls und seine im Journal of Ultrasound in Medicine im April 2008 veröffentlichten Empfehlungen sowie der von DL Miller veröffentlichte Artikel.

Während des ersten Trimesters der Schwangerschaft und insbesondere während der ersten 10 Wochen ist die Einhaltung dieser Empfehlungen äußerst wichtig.

Bei der Obstetrik-Bildgebung beginnt der Anwender mit der Auswahl des entsprechenden Schallkopfs (SE12-3 für Frühe OB-Schallung, SC6-1 für Allgemeines OB-Schallung) und der gewünschten klinischen

Anwendung (OB-GYN-Anwendung, GYN, Frühe OB oder Allg OB). Anschließend schallt der Anwender die Zielorgane und regelt die Ausgangsleistung, wobei er die niedrigst mögliche Einstellung wählt, um ein B-Modus-Bild zu erzielen. (Obstetrik-Voreinstellungen haben einen begrenzten mechanischen Index und thermischen Index [MI und TI], um den Empfehlungen und Richtlinien von AIUM, BMUS, ECMUS und SOCG zu entsprechen).& Anschließend wird er den Bereich und die Tiefe der Fokuszone einstellen und versuchen, durch eine Erhöhung der Empfangsverstärkung ein möglichst gleichmäßiges Bild des Organs zu erzielen. Wird ein angemessenes Bild mit der Verstärkungserhöhung erzielt, so sollte die Ausgangsleistung verringert werden. Erst wenn nach diesen Einstellungen das produzierte Bild unbefriedigend ist, sollte der Anwender die Leistung erhöhen.

Nachdem ein B-Bild der Zielorgane erstellt wurde, können CFI, CPI und/oder DCPI eingesetzt werden, um den Blutfluss zu lokalisieren. Wie bei der B-Modus-Bildanzeige müssen Verstärkung und Bildverarbeitungsparameter vor einer Erhöhung der Ausgangsleistung optimiert werden.

Im Anschluss an B-Bild und Color Flow kann der Benutzer das gewünschte Organ mithilfe der M-Modus-Bildgebung schallen. Der M-Modus kann zur Bewertung der Schläge pro Minute der fetalen Herzaktivität verwendet werden. Vor Erhöhung der Ausgangsleistung sollte der Benutzer erst die entsprechenden B/M-Modus-Parameter wie Verstärkung, Karten, dynamischer Bereich und die Größe und Lage der M-Zone anpassen, um eine optimale Umfahrung im M-Modus zu erhalten. Nur wenn die Umfahrung nach Optimierung der Einstellungen und maximaler M-Modus-Verstärkung nicht zufriedenstellend ist, kann der Anwender die Ausgangsleistung erhöhen.

Im Anschluss an B-Modus, Color Flow und M-Modus hat der Anwender auch die Möglichkeit zur Verwendung des Pulsed Wave (PW) Doppler-Modus und Anpassung seiner Bedienelemente zur Positionierung des Abtastvolumens über dem Gefäß. Vor einer Erhöhung der Ausgangsleistung optimiert der Anwender den Geschwindigkeitsbereich oder Skala, um eine optimale Doppler-Kurve zu erzielen. Nur wenn bei maximaler Doppler-Verstärkung kein akzeptables Bild erzeugt wird, darf der Anwender die Ausgangsleistung erhöhen. Der PW-Doppler kann zur Beurteilung des Blutflusses in späteren Phasen der fetalen Entwicklung verwendet werden.

PÄDIATRIE

Bei der pädiatrischen Untersuchung beginnt der Anwender mit der Wahl des geeigneten Schallkopfs (oberflächliche, pädiatrische Untersuchung auf dem SL15-4, SL10-2, SLH20-6 oder SMC12-3 und tiefe, pädiatrische Untersuchung auf dem SC6-1, SMC12-3) und der entsprechenden Anwendung und Gewebeforeinstellung (Pädiatrie/Allgemein und Neugeborenenkopf), startet anschließend das Schallen des Gewebes und beginnt mit den Anpassungen der Ausgangsleistung, um sicherzustellen dass die kleinstmögliche Einstellung verwendet wird, um ein B-Modus-Bild zu erhalten. Danach passt er den Bereich und die Tiefe der Fokuszzone des Schallkopfs an. Der Anwender versucht, eine möglichst gleichmäßige Gewebedarstellung zu erzielen. Dazu benutzt er AutoTGC oder erhöht die Empfangsverstärkung. Erzielt er ein zufriedenstellendes Bild durch die Anpassung/Erhöhung der Verstärkung, sollte er die Ausgangsleistung verringern. Ist nach diesen Einstellungen das produzierte Bild unbefriedigend, kann der Anwender die Leistung erhöhen.

Nachdem ein B-Bild des Gewebes des Kindes erstellt wurde, können CFI, CPI und/oder DCPI eingesetzt werden, um den Blutfluss zu lokalisieren. Wie beim B-Bild sollten Verstärkung und Bildeinstellungen optimiert werden, bevor die Ausgangsleistung, falls notwendig, erhöht wird.

Hat der Anwender den Blutfluss lokalisiert, setzt er den PW-Doppler ein und positioniert das Abtastvolumen über dem Gefäß. Vor einer Erhöhung der Ausgangsleistung optimiert der Anwender den Geschwindigkeitsbereich oder Skala, um eine optimale Doppler-Kurve zu erzielen. Nur wenn bei maximaler Doppler-Verstärkung kein akzeptables Doppler-Spektrum erzeugt wird, darf der Bediener die Ausgangsleistung erhöhen.

Nach dem Einsatz von 2D, Color Flow und Pulsed Wave Doppler kann der Elastographie-Modus verwendet werden, um die Gewebesteifigkeit zu überprüfen (bei SLH20-6 nicht verfügbar). Einstellungen von SWE Opt. (Auflösung, Standard oder Eindringtiefe), Größe und Positionierung der SWE-Box und SWE-Verstärkung sollten so vorgenommen werden, dass ein optimales Elastographie-Bild erzielt wird, bevor eine Erhöhung der Ausgangsleistung erfolgt. Ist die Bildarstellung nach Optimierung der Einstellungen und maximaler Elastographie-Verstärkung nicht zufriedenstellend, kann der Anwender die Ausgangsleistung erhöhen.

Alarm-System

Die Verwendung des Aixplorer® Ultraschallsystems erfordert die direkte Anwesenheit des Anwenders. Da sich Anwender und Patient beide beim System befinden, ist das Alarmsystem des Aixplorer® nur visueller Art. Das Aixplorer® Alarmsystem verwendet entweder ein Pop-up-Fenster, in dem Maßnahmen vorgeschlagen werden, oder eine Mitteilung im Informationsbereich des Hauptmonitors. Die Aixplorer® Alarmbedingungen können durch einen Anwender nicht konfiguriert werden. Das Aixplorer® zeichnet die Alarmvorgänge auf, damit diese später von einem SuperSonic Imagine-Mitarbeiter evaluiert werden können.

Bei einem Alarm mittlerer Priorität wird das System automatisch blockiert. Systembedingt ist eine Situation eingetreten, die dem Patienten, dem Anwender oder dem System schaden könnte. Der Anwender wird durch eine entsprechende Warnung auf dem Bildschirm informiert. Wurde ein Alarm ausgelöst, kann der Anwender nur einen SuperSonic Imagine-Mitarbeiter informieren und melden, dass ein Neustart des Systems erfolgte.

Warnungen mit niedriger Prioritätsstufe haben eine Informationsfunktion. Der Anwender kann die Arbeit am System fortzusetzen, ist aber durch die Warnung informiert, dass aufgrund der eingetretenen Situation der Arbeitsablauf beeinträchtigt sein könnte.

Folgende Warnungen werden in den Pop-up-Fenstern für die **mittlere** Alarmstufe angezeigt:

Warnung	Mitteilung
Schalleistung	API-Fehler: Bitte führen Sie einen Neustart durch und kontaktieren Sie die SSI-Vertretung Problem bei API-Berechnung aufgetreten.
BLS (karten integrierte Sequenz)	Hardware Fehler: Neustart erforderlich. Bitte kontaktieren Sie einen SuperSonic Imagine-Mitarbeiter. BLS-Anweisungsfehler.
BLS CRC	Hardware Fehler: Neustart erforderlich. Bitte kontaktieren Sie einen SuperSonic Imagine-Mitarbeiter. Ein Problem mit der CRC-Übertragung ist aufgetreten.
Kanal-Gruppe	Hardware Fehler: Neustart erforderlich. Bitte kontaktieren Sie einen SuperSonic Imagine-Mitarbeiter. Hardware-Controller-Platinen-Alarm.
Hardware-Enumeration	Hardware Fehler: Neustart erforderlich. Bitte kontaktieren Sie einen SuperSonic Imagine-Mitarbeiter. Problem während des Enumerations-Prozesses.
Hardware-Ausfall	Hardware Fehler: Neustart erforderlich. Bitte kontaktieren Sie einen SuperSonic Imagine-Mitarbeiter. Hardware-Controller-Fehler-Alarm.
Hardware-Ladesequenz	Hardware Fehler: Neustart erforderlich. Bitte kontaktieren Sie einen SuperSonic Imagine-Mitarbeiter. Während der Ladesequenz ist ein Problem aufgetreten.
Hardware-Version	Hardware Fehler: Neustart erforderlich. Bitte kontaktieren Sie einen SuperSonic Imagine-Mitarbeiter. Ein DAB-Treiberversionsfehler ist aufgetreten.
Stromversorgung	Hardware Fehler: Neustart erforderlich. Bitte kontaktieren Sie einen SuperSonic Imagine-Mitarbeiter. Problem bei der TPC: Kommunikation
Überwachung der Stromversorgung	Hardware Fehler: Neustart erforderlich. Bitte kontaktieren Sie einen SuperSonic Imagine-Mitarbeiter. Problem bei der TPC: Monitoring
Einstellung der Stromversorgung	Hardware Fehler: Neustart erforderlich. Bitte kontaktieren Sie einen SuperSonic Imagine-Mitarbeiter. Problem bei der TPC: Settings
Temperaturüberwachung	Fehler Ein Fehler ist aufgetreten, die Temperaturüberwachung ist nicht verfügbar. Die Hardware wird ggf. nicht unterstützt.

Warnung	Mitteilung
Schallkopf-Interface	Hardware Fehler: Neustart erforderlich. Bitte kontaktieren Sie einen SuperSonic Imagine-Mitarbeiter. Ein Problem ist aufgetreten beim SHI.
Schallkopf-Interface-Temperatur	Hardware Fehler: Neustart erforderlich. Bitte kontaktieren Sie einen SuperSonic Imagine-Mitarbeiter. Temperaturalarm wurde vom SHI angehoben.
Unerwartetes Hardware-Problem	Hardware Fehler: Neustart erforderlich. Bitte kontaktieren Sie einen SuperSonic Imagine-Mitarbeiter. Es ist ein unerwartetes Problem aufgetreten.
Signalverarbeitung angehalten	Hardware Fehler: Neustart erforderlich. Bitte kontaktieren Sie einen SuperSonic Imagine-Mitarbeiter. Erfasste, nicht verarbeitete Daten.
Hohe Temperatur	Das System muss aus Sicherheitsgründen gestoppt werden (Temperatur zu hoch).
Prozess beendet	Fehler Ein Fehler ist aufgetreten, das System wird neu gestartet
Prozess reagiert nicht	Fehler Der Prozess <i>processName</i> reagiert nicht; warten Sie einige Sekunden oder erzwingen Sie einen Neustart
Fehler erkannt	Fehler Ein Fehler ist aufgetreten, Neustart erforderlich.

Folgende Warnungen werden über Pop-up-Fenster für die **niedrige** Alarmstufe angezeigt:

Warnung	Mitteilung
3D-Steuerung nicht verbunden	Die 3D-Bildgebung ist nicht verfügbar. Verwenden Sie den 3D-Schallkopf nicht für die Biopsie. Bitte kontaktieren Sie einen SuperSonic Imagine-Mitarbeiter. Die 3D-Steuerung ist nicht angeschlossen.
3D-Steuerung Version	Die 3D-Bildgebung ist nicht verfügbar. Verwenden Sie den 3D-Schallkopf nicht für die Biopsie. Bitte kontaktieren Sie einen SuperSonic Imagine-Mitarbeiter. Die 3D-Steuerung wird nicht identifiziert.
3D-Steuerung USB	Die 3D-Bildgebung ist nicht verfügbar. Verwenden Sie den 3D-Schallkopf nicht für die Biopsie. Bitte kontaktieren Sie einen SuperSonic Imagine-Mitarbeiter. 3D-Motorsteuerung USB ist nicht angeschlossen.
3D-Steuerung Timeout	Die 3D-Bildgebung ist nicht verfügbar. Verwenden Sie den 3D-Schallkopf nicht für die Biopsie. Bitte kontaktieren Sie einen SuperSonic Imagine-Mitarbeiter. Die 3D-Steuerung reagiert nicht.
3D-Akquisitionsspeicher	Speicherfehler: 3D-Akquisition benötigt mehr Speicher als verfügbar ist. Bitte kontaktieren Sie einen SuperSonic Imagine-Mitarbeiter. Versuchen Sie, die Aufnahmeparameter zu ändern.
CPU-Prozessor-Temperatur	Fehler Temperatur ist zu hoch.
Graphikkarten-Temperatur	Fehler Temperatur ist zu hoch.
Festplatten-Temperatur	Fehler Temperatur ist zu hoch.
Bild-Review	Review-Fehler: Korrupte Daten, Bild kann nicht geladen werden. Sie werden zum B-Modus umgeleitet.

Warnung	Mitteilung
IRQ Timeout DMA Export	DMA-Sequenzwarnung – 0x000001 Heben Sie FREEZE auf, um fortzufahren.
IRQ Timeout DMA Import	DMA-Sequenzwarnung – 0x000002 Heben Sie FREEZE auf, um fortzufahren.
IRQ Timeout	DMA-Sequenzwarnung – 0x000003 Heben Sie FREEZE auf, um fortzufahren.
IRQ Timeout-Trigger	Trigger-Timeout – 0x000004 Drücken Sie eine Modustaste, um fortzufahren.
Keine aktive Unters. für Report	Keine laufende Untersuchung. Sie können auf den Bericht nicht zugreifen.
PCI Bus-Temperatur	Fehler Temperatur ist zu hoch.
Schnittstellen-Temperatur	Fehler Temperatur ist zu hoch.
Zu viele/alte Aufträge in der Auftragsliste	Die Auftragsliste enthält mehr als 500 anstehende Aufträge und/oder einige anstehende Aufträge, die älter als eine Woche sind. Bitte wählen Sie diese Aufträge aus und löschen Sie diese manuell von der Auftragsliste
Ungültige SGL	DMA-Warnung: Ungültige SGL-Handhabung Heben Sie FREEZE auf, um fortzufahren.
Timeout Hardware- Hauptschleifensperre	Timeout HWC-Hauptschleifensperre Heben Sie FREEZE auf, um fortzufahren.

Nachstehende Mitteilungen werden für einige Zeit auf dem Hauptmonitor angezeigt. und sind von niedriger Priorität.


Warnung	Mitteilung
Zu viele Aufträge	Die Auftragsliste enthält mehr als 500 anstehende Aufträge und/ oder einige anstehende Aufträge, die älter als eine Woche sind. Bitte wählen Sie diese Aufträge aus und löschen Sie diese manuell von der Auftragsliste.
Speicher Festplatte	WARNUNG: FESTPLATTE FAST VOLL Bitte löschen Sie Daten von Ihrem System.

Warnung	Mitteilung
USB-Übertragung	FEHLER bei der Übertragung von Daten auf das USB-Gerät

Kapitel 4. System im Überblick

Systembeschreibung

Das Aixplorer® System ist ein fahrbares Ultraschallsystem, das aus einer Zentraleinheit in einem unteren Gehäuse sowie einem beweglichen Bedienpult mit Touchscreen, Monitor und mehreren Schallköpfen besteht.

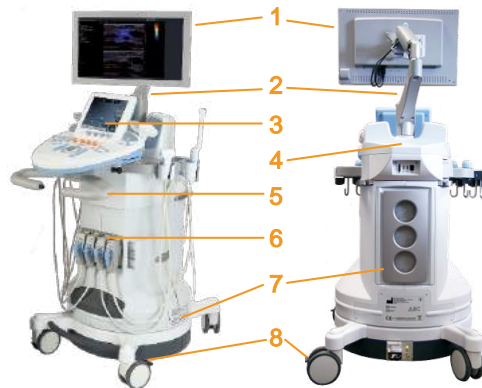

- 1. Monitor
- 3. Touchscreen
- 5. Griffe
- 7. Luftfilter

- 2. Monitor-Gelenkarm
- 4. Ablagebereich
- 6. Schallkopfanschlüsse
- 8. Lenkrollen-Sperren



- 1. Gelhalter
- 3. Lautsprecher
- 5. TouchRing™

- 2. Touchscreen
- 4. Trackball
- 6. Handstütze

Monitor und Gelenkarm


Der Monitor ist auf einem Gelenkarm montiert und kann vertikal sowie horizontal positioniert werden.

Die Position des Monitors lässt sich auf verschiedene Bedienpositionen und Bedienhöhen einstellen.



Nach dem Lösen der Transportsperre kann der Monitor nach oben und unten geneigt, nach links und rechts geschwenkt sowie von Seite zu Seite bewegt werden.

Zur Freigabe des Monitors aus der Transportsperre drehen Sie die Schraube auf dem Gelenkarm gegen den Uhrzeigersinn.

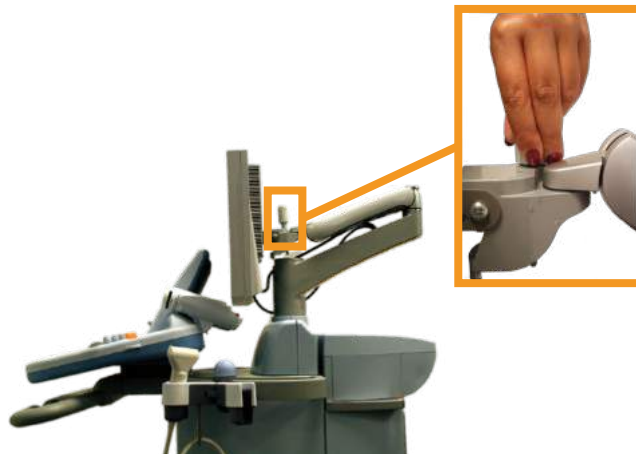

Zum Transportieren klappen Sie den Monitor nach unten und drehen die Schraube im Uhrzeigersinn, um ihn in dieser Position zu blockieren.

Zum Einstellen des Monitors wird dieser einfach an den Seiten erfasst und entsprechend geneigt, gedreht oder verschoben.

Bedienpult

Bewegen des Bedienpults Auf und ab

1. Drücken Sie den Sperrknopf am Außenende des rechten Griffes wie auf der Abbildung gezeigt:



2. Halten Sie den Knopf gedrückt und
 - drücken Sie den Griff nach unten, um das Bedienpult abwärts zu bewegen
 - lassen Sie das Bedienpult nach oben gehen, ohne es anzuheben, um es aufwärts zu bewegen.

Schwenken des Bedienpults

1. Ziehen Sie am Hebel unter dem Bedienpult, um die Sperre zu lösen.
2. Drehen Sie das Bedienpult je nach Wunsch nach links oder rechts.



Lautsprecher und Lautstärkeregelung

Die Lautstärke kann über den Drehknopf mit dem Lautsprechersymbol eingestellt werden, der sich auf dem Bedienpult neben dem Ein-/Aus-Schalter befindet.



ACHTUNG

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Lautsprecher gelangt.

Achten Sie ebenso darauf, dass nach jedem Einsatz des Systems bei einer Untersuchung Gelreste von der Oberfläche des Bedienpult entfernt werden.

Vermeiden Sie, Flüssigkeiten in der Nähe der Lautsprechergitter abzustellen.

Schallköpfe

Anschließen Schallkopf

Anschließen eines Schallkopfs:

Schließen Sie den Schallkopf an und drehen Sie den Sperrhebel im Uhrzeigersinn, um den Stecker zu blockieren.



Zum Trennen des Schallkopfes drehen Sie den Hebel gegen den Uhrzeigersinn, um den Schallkopfstecker zu lösen, fassen den Stecker an und ziehen ihn gerade heraus.



ACHTUNG

Verbleibt beim Anschließen bzw. Trennen eines Schallkopfes ein Bild auf dem Monitor, kann dies beim System und/oder dem Schallkopf eine Betriebsstörung verursachen.

Schließen Sie während des Einschalt- bzw. Abschaltvorgangs des Systems keinen Schallkopf an bzw. trennen Sie ihn nicht vom System. Dies kann zu einer Betriebsstörung des Systems führen.

Sollte ein Schallkopf zu Boden fallen oder andere Stoßeinwirkungen erleiden, so untersuchen Sie ihn vor der Verwendung genau auf etwaige Beschädigungen.

Stellen Sie sicher, dass der Schallkopf keine Sprünge aufweist und das Kabel sowie die Isolierung intakt sind.

Sollten Sie Zweifel am einwandfreien Zustand des Schallkopfes haben, so brechen Sie die Verwendung ab und wenden sich an einen autorisierten SuperSonic-Service-Mitarbeiter.

Lagern, Aufheben Schallkopf

Wenn der Schallkopf nicht in Gebrauch ist, können Sie ihn am System ablegen.

Schließen Sie den Schallkopf an und platzieren Sie ihn in der Schallkopfhalterung.



Verwenden der Kabelhalterung

Anbringung



1. Platzieren Sie den unteren Teil der Kabelhalterung auf dem Ring unter dem Bedienpult.
2. Befestigen Sie die Halterung mit einer Schraube.

Gebrauch



1. Nachdem die Kabelhalterung angebracht ist, führen Sie das Schallkopfkabel durch die zwei Haken.
2. Vor Scanbeginn führen Sie das Kabel durch die obere Kabelführung.



ANMERKUNG

Die Kabelhalterung ist flexibel und sorgt für komfortables Scannen.

Ablage auf dem System

Gelhalter



Der Wagen ist mit praktischen Gelhaltern ausgestattet.
Die Gelhalter befinden sich an beiden Seiten des Touchscreens.
Sie bieten Platz für Gelflaschen in Standardgröße à 250 ml und sind während der Untersuchung bequem zu erreichen.



TIPP

Platzieren Sie die Gelflaschen in den Gelhaltern mit der Öffnung nach unten, damit das Gel leicht herausfließen kann.



Die Gelhalter sind zur leichten Reinigung abnehmbar.
Reinigen Sie sie mit Warmwasser und einer weichen Bürste, um eingetrocknete Gelreste zu entfernen.

Ablagebereich



Hier können Sie Gegenstände wie Notizbücher, Protokolle, DVD und Handtücher aufbewahren.



ACHTUNG

Versuchen Sie niemals, das Gehäuse zu öffnen, um Geräte anzuschließen.

Wenden Sie sich hierfür bitte an Ihren SuperSonic Imagine-Vertreter oder Servicemitarbeiter vor Ort.

Bei falsch angeschlossenen elektronischen Geräten erlischt jeglicher Garantieanspruch für das Ultraschallsystem und es kann zu Betriebsstörungen, Stromschlag oder Brand kommen.

Stellen Sie keine Peripheriegeräte oder andere Geräte mit einem Gewicht über 9 kg auf das System.

Eine übermäßige Belastung des Systems mit Peripheriegeräten bzw. eine Anordnung von Peripheriegeräten außerhalb des dafür vorgesehenen Bereichs kann zur Instabilität des Systems führen und dieses oder Peripheriegeräte zum Kippen bringen.

Mobilität

Das SuperSonic Imagine Aixplorer® Ultraschallsystems ist ein mobiles System.

Das Gestell ist auf vier Lenkrollen montiert, die ein leichtes Bewegen des Systems auf ebenen Oberflächen erleichtern.

Die Lenkrollen ermöglichen dem Anwender, das System um Ecken zu lenken.



TIPP

Es ist einfacher und sicherer, das System zu schieben, als es zu ziehen. Fassen Sie zum Schieben die Griffe fest an und bewahren Sie eine aufrechte Haltung.

Griffe



Das System ist auf der Vorderseite unterhalb des Bedienpults mit Griffen ausgestattet, um es während des Bewegens bequem und sicher halten zu können.

Durch die großen, unter dem Bedienpult angebrachten Griffe kann der Benutzer das System beim Verschieben sicher festhalten.

Zum Lenken des Systems bewegen Sie die Griffe in die Gegenrichtung der gewünschten Lenkrichtung (d.h. wenn Sie das System nach links lenken möchten, bewegen Sie die Griffe nach rechts).



WARNUNG

Die Griffe sind nicht zum Heben des Systems vorgesehen.

Sie dürfen nur zum Schieben und Ziehen des Geräts verwendet werden.

Zum Heben des Systems muss dieses auf einer Palette fixiert werden, oder in seiner Versandkiste verpackt sein.

Benutzen Sie keinen Handkarren zum Umstellen des Systems.


Lenkrollen-Sperren



Der Sperrmechanismus an den Lenkrollen dient der Stabilisierung des Systems während des Bewegens, Schallens oder Aufbewahrens.


Jede Lenkrolle ist mit einem Sperrmechanismus versehen.

Der Mechanismus lässt sich mit dem schwarzen Pedal betätigen.

Wird das Pedal auf die  Position gestellt, wird die Lenkrolle blockiert und verhindert ein freies Bewegen des Systems.

Verwenden Sie diese Position, um das System vor dem Schallen zu stabilisieren.

Wird das Pedal auf die  Position gestellt, wird die Lenkrolle so blockiert, dass das System vorwärts und rückwärts bewegt, jedoch nicht gedreht werden kann.

Wird das Pedal auf die  Position gestellt, wird die Lenkrollensperre gelöst und das System kann frei bewegt werden.

Es empfiehlt sich, die Lenkrollen zu blockieren, wenn das System unbeaufsichtigt ist oder in Gängen bzw. an anderen Orten abgestellt wird, wo die Gefahr eines Zusammenstoßes besteht.



ACHTUNG

Die Lenkrollensperren sind nicht dafür vorgesehen, das System auf Rampen oder abschüssigen Flächen zu stabilisieren.

Stellen Sie das System nicht auf abschüssigen oder unebenen Flächen ab.

Fußstützen

Das System ist mit zwei praktischen Fußstützen ausgestattet.

Diese befinden sich zwischen und über den vorderen Lenkrollen.

Sie ermöglichen eine ergonomische Fußposition in neutraler Stellung während des Schallens im Sitzen.



Bewegen des Systems

Vor dem Bewegen des Systems

1. Schalten Sie das System aus.
2. Stecken Sie das Netzkabel und etwaige andere Kabel aus (Netzwerk, usw.).
3. Achten Sie darauf, dass sich die Schallkopfkabel über Lenkrollenhöhe befinden. Nutzen Sie dazu die Kabelführungsvorrichtung.
4. Entfernen bzw. sichern Sie alle Peripheriegeräte und Gegenstände auf der Ablage.
5. Blockieren Sie den Gelenkarm des Monitors in seiner niedrigsten Position.
6. Lösen Sie die Sperren der Lenkrollen

Bewegen des Systems

1. Fassen Sie das System fest an den Vordergriffen an.
2. Schieben Sie es in aufrechter Haltung vorwärts.
3. Zum Lenken des Systems bewegen Sie die Griffe in die Gegenrichtung der gewünschten Lenkrichtung (d.h. wenn Sie das System nach links lenken möchten, bewegen Sie die Griffe nach rechts).



WARNUNG

Vorsicht beim Verstellen des Systems. Sie können sich oder andere verletzen, wenn es über Füße rollt oder gegen Schienbeine stößt.

Verwenden Sie die Sperrmechanismen des Monitor-Arms und Bedienfelds, wenn Sie das System bewegen.

Versuchen Sie niemals, das System aus eigener Kraft zu heben.

Verwenden Sie entsprechende Hilfsmittel, wie Rampen oder Aufzüge, um Verletzungen zu vermeiden.

Vorsicht beim Aufwärts- bzw. Abwärtsbewegen auf Rampen.

Schieben Sie das System nicht mit übermäßiger Kraft von der Seite an. Es könnte umkippen.

Achten Sie darauf, dass die Lenkrollen nicht über Schallkopf- oder Netzkabel rollen.

Sollten Sie einen Defekt am Rad-, Griff- oder Bremsmechanismus feststellen, so stellen Sie das System auf einer ebenen Fläche an einem sicheren Ort ab, aktivieren die Lenkrollsperrung und verwenden es nicht mehr, bis die mechanischen Bauteile von einem autorisierten SuperSonic Image Service-Mitarbeiter überprüft wurden.

Anschließen des Netzkabels und Schutz Erde



WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker an eine geerdete Dreistift-Steckdose mit den auf dem Typenschild angegebenen Eigenschaften angeschlossen wird.

Sollte eine derartige Steckdose nicht verfügbar sein, so wenden Sie sich bitte an Ihre SuperSonic-Vertretung.

Beim Einschalten des Systems zeigt die Farbe der drei LED-Anzeigen neben dem Betriebsschalter folgende Zustände an:



LED	ZUSTAND
Grün	Normaler Betrieb
Gelb	Hochspannungsfehler
Blau oder weiß	Unterbrechung der Stromversorgung

Beim Aufleuchten einer gelben, blauen oder weißen LED schalten Sie das System bitte aus und wenden Sie sich an Ihren örtlichen SuperSonic Imagine-Vertreter.

Warten Sie, bis die **GRÜNE** LED-Anzeige der Stromversorgung leuchtet und nicht blinkt, bevor Sie das Bedienpult anschalten.

Informationen zum richtigen Anschluss des

Potentialausgleichsleiters (▽):

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät mit diesem System verwenden, so ist ein Potentialausgleichskabel für den Anschluss an eine Potentialausgleichschiene erforderlich. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrer SuperSonic Imagine-Vertretung. Stellen Sie sicher, dass das Potentialausgleichskabel angeschlossen ist, bevor Sie das System ans Netz anschließen. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass das Netzkabel des Systems ausgesteckt ist, bevor Sie das Potentialausgleichskabel ausstecken, um die Gefahr eines Stromschlages zu vermeiden.

Kompatibles Zubehör

Unter bestimmten Anwendungsbedingungen kann von Ärzten bei der Durchführung von Untersuchungen mit dem System Zubehörmaterial von Drittlieferanten verwendet werden. Die Entscheidung, Produkte von Drittlieferanten mit dem System und den Schallköpfen zu verwenden, liegt beim Arzt. Die folgenden Tabellen enthalten eine Auflistung der Produkte, die zur Verwendung mit dem Aixplorer® System und den Schallköpfen geeignet sind. Die Verwendung anderer Produkte als die folgenden aufgelisteten erfolgt auf eigene Gefahr des Anwenders und Patienten.

Gele

Die meisten Gele auf Wasserbasis sind für die Schallköpfe des Ultraschallsystems geeignet.

Die folgenden Gele werden aufgrund ihrer Kompatibilität mit unseren Schallköpfen empfohlen. Bitte überprüfen Sie, ob die in folgender Tabelle empfohlenen Produkte in Ihrem Land für die Verwendung zugelassen sind.

Gel	Sterilität	Hersteller
Aquasonic 100	Nicht steril	Parker Laboratories, Inc
Ultra/Phonic Conductivity	Nicht steril	Pharmaceutical Innovations
Ultra/Phonic Free	Nicht steril	Pharmaceutical Innovations
Steril Aquasonic 100	Steril	Parker Laboratories, Inc
Steril Ultrasound Gel	Steril	Sonogel



WARNUNG

Benutzen Sie nur empfohlene Gele (Kontaktmittel). Andere Produkte können den Schallkopf beschädigen und die Garantie ungültig machen.

Gelwärmer



Sie erhalten einen Gelwärmer.

Er erwärmt das Gel auf 40 °C.

Mehr dazu finden Sie in der dem Gelwärmer beigelegten Montageanleitung und Gebrauchsanweisung.



WARNUNG

Erwärmen Sie das Gel nicht zu stark, um das Risiko von Verletzungen oder Verbrennungen zu vermeiden.



WARNUNG

Der Gelwärmer verfügt über 2 Überhitzungsschutzsysteme: einen Sensor und einen Ausschaltmechanismus. Mehr dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Gelwärmers.

Verwenden Sie den Gelwärmer ausschließlich mit den für den Aixplorer® empfohlenen Gelen, die auch von Parker empfohlen werden.

Beachten Sie das Verfallsdatum des Gels.



WARNUNG

Das System und dessen Zubehör sind nicht für den Einsatz im Freien vorgesehen.



ACHTUNG

Der Gelwärmer kann mit einem weichen, feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel oder einem in Krankenhäusern üblichen Desinfektionsmittel, wie z. B. ProteX™ Wipes, gereinigt werden.

Achten Sie darauf, die elektronische Steuerung nicht zu befeuchten.

Verwenden Sie kein Scheuermittel oder Isopropylalkohol zum Reinigen des Gelwärmers.

Tauchen Sie den Gelwärmer nicht in Wasser ein.

Mehr dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Gelwärmers.



ACHTUNG

Achten Sie auf eine ordnungsgemäße und stabile Positionierung des Gelwärmers.



ACHTUNG

Wenn sich der Gelwärmer im Ablagebereich des Systems befindet, bewegen Sie das System vorsichtig, damit der Gelwärmer nicht herunterfällt.



ACHTUNG

Verwenden Sie ausschließlich Ultraschallgele im Gelwärmer. Verwenden Sie keine anderen Produkte.



ACHTUNG

Der Gelwärmer hat eine beschränkte Garantie. Mehr dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Gelwärmers.

Schallkopf-Schutzhüllen

Unter bestimmten Bedingungen, wenn der Schallkopf in Kontakt mit Schleimhäuten, Blut oder Körperflüssigkeiten kommt, empfiehlt sich die Verwendung einer Schallkopf-Schutzhülle.



WARNUNG

Es wird empfohlen, eine Schallkopf-Schutzhülle zu benutzen.

Nach dem Gebrauch muss die Einweghülle entfernt und entsorgt werden.

Endokavitäre Schallköpfe sollten mit einer sterilen Schutzhülle eingesetzt werden.

Werden die Schallköpfe bei Biopsievorgängen benutzt, sollte alles Biopsie-Zubehör für diesen Vorgang steril sein und nach jedem Gebrauch erneut gesäubert und sterilisiert werden. Verfahren Sie dabei gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Die SE12-3 und SEV12-3 Schallköpfe sollten nach jeder Anwendung gesäubert und auf höchster Stufe desinfiziert werden. Dies sollte auch dann geschehen, wenn eine sterile Schutzhülle benutzt wurde,

da Schutzhüllen während des Einsatzes undicht werden können und der Grad der Ansteckung dann nicht so leicht einzuschätzen ist.

Die folgenden Tabellen enthalten eine Auflistung steriler Schutzhüllen, die für unsere Ultraschallköpfe geeignet sind. Bitte überprüfen Sie, ob die in folgender Tabelle empfohlenen Produkte in Ihrem Land für die Verwendung zugelassen sind.

SL15-4



Breite der Schallkopfauflagefläche 6,58 cm; Kabellänge 2,1 m

Hersteller	Sterilität	Latex/ Latexfrei	Beschreibung	Produktnummer	Abmessungen
CIVCO	Steril	Latexfrei	CIV-Flex/ Teleskopgefaltet	610-637	8,9 x 91,5cm
CIVCO	Steril	Latexfrei	CIV-Flex/ Teleskopgefaltet	610-1000	10,2 x 147cm
CIVCO	Steril	Latexfrei	CIV- Flex/Flach gefaltet	610-001	8,9 x 61cm
CIVCO	Nicht steril	Latexfrei	CIV- Flex/ Flach gefaltet (3D)	610-362	14 x 61cm

SC6-1 und XC6-1



Breite der Schallkopfauflagefläche 7,89 cm; Kabellänge 2,1 m

Hersteller	Sterilität	Latex/ Latexfrei	Beschreibung	Produktnummer	Abmessungen
CIVCO	Steril	Latexfrei	CIV-Flex/ Teleskopgefaltet	610-637	8,9 x 91,5cm
CIVCO	Steril	Latexfrei	CIV-Flex/ Teleskopgefaltet	610-1000	10,2 x 147cm
CIVCO	Steril	Latexfrei	CIV-Flex/ Teleskopgefaltet (3D)	610-542	14 x 91,5cm
CIVCO	Nicht steril	Latexfrei	CIV- Flex/ Flach gefaltet (3D)	610-362	14 x 61cm

SE12-3




Breite der Schallkopfauflagefläche 2,42 cm; maximale Schallkopfbreite mit Handstück 4 cm; Kabellänge 2,1 m

Hersteller	Sterilität	Latex/ Latexfrei	Beschreibung	Produktnummer	Abmessungen
CIVCO	Steril	Latexfrei	CIV-Flex/Flach gefaltet	610-006	11,9 verjüngt auf 3,8 x 61cm
CIVCO	Nicht steril	Latexfrei	CIV-Flex/Flach gefaltet/ Kein Gel	610-007	11,9 verjüngt auf 3,8 x 61cm
CIVCO	Steril	Latex	Gerollt	610-1199	3,5 x 20cm
CIVCO	Steril	Latex	Neo-Guard	610-213	2,6 x 30cm
CIVCO	Steril	Latex	Gerollt/ Einzel perforierte Pakete	610-214	3,5 x 20cm
CIVCO	Steril	Latexfrei	Neo-Guard/ Gerollt	610-843	2,6 x 30cm

Bei perioperativer Anwendung am Gehirn (nur für Europa verfügbar), muss der SE12-3 Schallkopf mit einer dieser sterilen Schutzhüllen eingesetzt werden:

Hersteller	Sterilität	Latex/ Latexfrei	Beschreibung	Produktnummer	Abmessungen
CIVCO	Steril	Latexfrei	Pyrogenfreie CIV-Flex, intraoperativ	610-956	4,1 x 147 cm
CIVCO	Steril	Latexfrei	Pyrogenfreie CIV-Flex, intraoperativ	610-1107	10,2 x 147 cm
CIVCO	Steril	Latexfrei	Pyrogenfreie NeoGuard, intraoperativ	610-1118	15,2 x 244 cm

SEV12-3

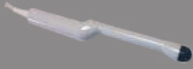

Breite der Schallkopfauflagefläche 2,47 cm; maximale Schallkopfbreite mit Handstück 4 cm; Kabellänge 2,1 m

Hersteller	Sterilität	Latex/ Latexfrei	Beschreibung	Produktnummer	Abmessungen
CIVCO	Steril	Latex	Gerollt/ Einzel perforierte Pakete	610-214	3,5 x 20cm

SLV16-5



Breite der Schallkopfauflagefläche 6,4cm; Kabellänge 2,1 m

Hersteller	Sterilität	Latex/ Latexfrei	Beschreibung	Produktnummer	Abmessungen
CIVCO	Steril	Latexfrei	Surgi Intraoperative/ Akkordeon- ähnlich gefaltet/ Kein Gel	610-023	15,2 verjüngt auf 7,6 x 244 cm
CIVCO	Steril	Ultra-Pro II. Einweg- Wechselkit	CIV-Flex/ Teleskopgefaltet (3D)	610-608	14 x 91,5cm

SLH20-6



Breite der Schallkopfauflagefläche 3,2 cm; Kabellänge 2,1 m

Hersteller	Sterilität	Latex/ Latexfrei	Beschreibung	Produktnummer	Abmessungen
CIVCO	Steril	Latexfrei	Mehrfach teleskopgefalte/ befestigte, formschlüssige Spitze	610-797	15,2 x 244cm
CIVCO	Steril	Latexfrei	Pyrogenfrei/ CIV-Flex/ Teleskopgefaltet mit Bändern	610-956	7,6 verjüngt auf 4,1 x 147 cm

SL10-2



Breite der Schallkopfauflagefläche 5,928 cm; Kabellänge 2,1 m

Hersteller	Sterilität	Latex/ Latexfrei	Beschreibung	Produktnummer	Abmessungen
CIVCO	Steril	Latexfrei	CIV- Flex/Flach gefaltet	610-323	6 x 91,5cm
CIVCO	Steril	Latexfrei	CIV- Flex/Flach gefaltet	610-001	8,9 x 61cm

XP5-1



Breite der Schallkopfauflagefläche 2,89 cm; maximale Schallkopfbreite mit Handstück 3,79 cm; Kabellänge 2,1 m

Hersteller	Sterilität	Latex/ Latexfrei	Beschreibung	Produktnummer	Abmessungen
CIVCO	Steril	Latexfrei	CIV- Flex/Flach gefaltet	610-323	6 x 91,5cm

SMC12-3



Breite der Schallkopfauflagefläche 0,91 cm; maximale Schallkopfbreite mit Handstück 2,78 cm; Kabellänge 2,1 m

Hersteller	Sterilität	Latex/ Latexfrei	Beschreibung	Produktnummer	Abmessungen
CIVCO	Steril	Latex	Latex Pro/ Gerollt	610-213	2,6 x 30cm
CIVCO	Steril	Latexfrei	Neo-Guard/ Gerollt	610-1126	2 x 30cm
CIVCO	Nicht steril	Latexfrei	Neo-Guard/ Gerollt	610-838	4 x 30cm

Alle sind CE-zertifiziert und haben die Zulassungsnummer CE 0120. Alle mit FDA-Zulassung:

- Universal CIV-Flex latexfreie Schallkopf-Schutzhüllen unter FDA K970513
- CIV-Flex 3D Schallkopf-Schutzhüllen unter FDA K002546
- Neo-Guard und Eclipse Schallkopf-Schutzhüllen unter FDA K991236
- Universal-Latex Schallkopf-Schutzhüllen unter FDA K970515



SCHALLKOPF-SCHUTZHÜLLEN AUS LATEX

Schallköpfe können für semikritische Anwendungen mit Latex- bzw. latexfreien Schutzhüllen überzogen werden. Bei der Verwendung von Schutzhüllen aus Latex besteht jedoch die Gefahr allergischer Reaktionen.

Der Abdruck des folgenden medizinischen Warnhinweises soll den Anwender über die möglichen Gefahren von Latex-Schutzhüllen aufklären:

Medizinischer Warnhinweis der FDA vom 29. März 1991, Allergische Reaktionen auf latexhaltige Medizinprodukte (FDA MDA91-1)

Aufgrund des Auftretens schwerer allergischer Reaktionen auf Medizinprodukte, die Latex (Naturkautschuk) enthalten, empfiehlt die FDA Ärzten und anderem medizinischen Fachpersonal, auf Latex empfindlich reagierende Patienten zu identifizieren und auf die Behandlung allergischer Reaktionen vorbereitet zu sein.

Reaktionen auf Latex reichen von Kontakturtikaria bis zu systemischer Anaphylaxie.

Latex ist ein Bestandteil, der in zahlreichen Medizinprodukten vorkommt, unter anderem in Operations- und Untersuchungshandschuhen, Kathetern, Intubationsschläuchen, Narkosemasken und dem in der Zahnmedizin benutzten Kofferdam.

In letzter Zeit haben sich Meldungen bei der FDA über allergische Reaktionen auf latexhaltige Medizinprodukte gehäuft.

Eine Marke für latexüberzogene Klistierspitzen wurde unlängst vom Markt genommen, da mehrere Patienten infolge anaphylaktischer Reaktionen im Zuge eines Bariumeinlaufs starben.

Weitere Berichte über Latexallergie wurden auch in der medizinischen Literatur gefunden.

Eine mehrfache Latexexposition durch Medizinprodukte oder auch andere Konsumartikel kann einer der Gründe für das erhöhte Auftreten von Latexallergien sein.

So wurde beispielsweise berichtet, dass 6%-7% des chirurgischen Personals und 18%-40% der Patienten mit Spina bifida allergisch gegenüber Latex sind.

Im Latex enthaltene Proteine scheinen die Hauptquelle der allergischen Reaktionen zu sein.

Auch wenn unbekannt ist, wie hoch der Proteinanteil sein muss, um schwere Reaktionen auszulösen, arbeitet die FDA mit Herstellern latexhaltiger Medizinprodukte zusammen, um den Proteinanteil in den Produkten so gering wie möglich zu halten.

Die FDA empfiehlt medizinischem Fachpersonal diesbezüglich folgende Vorgehensweise:

Befragen Sie Patienten im Rahmen der Anamnese zu einer eventuellen Latexallergie.

Diese Empfehlung gilt ganz besonders für chirurgische und radiologische Patienten, Patienten mit Spina bifida sowie medizinisches Personal.

Fragen über Jucken, Ausschlag oder Atembeschwerden nach dem Tragen von Latexhandschuhen oder Aufblasen eines Luftballons können dabei hilfreich sein.

Bei Patienten mit positiver Anamnese muss dies auf dem Krankenblatt vermerkt werden.

Bei Verdacht auf eine Latexallergie sollten Produkte aus anderen Materialien, wie etwa Kunststoff, verwendet werden. Im Falle einer Allergie des Patienten kann die medizinische Fachkraft beispielsweise Handschuhe aus einem anderen Material über den Latexhandschuhen tragen.

Falls sowohl die medizinische Fachkraft als auch der Patient eine Latexallergie haben, kann ein Latexhandschuh auch zwischen zwei Paar Handschuhen aus einem anderen Material getragen werden. (Latexhandschuhe, die als „hypoallergen“ gekennzeichnet sind, gewähren nicht immer Schutz vor allergischen Reaktionen.)

Seien Sie stets auf allergische Reaktionen vorbereitet, wenn latexhaltige Medizinprodukte verwendet werden, vor allem bei einem Kontakt zwischen Latex und Schleimhäuten.

Sollte es zu einer allergischen Reaktion kommen und fällt der Verdacht auf Latex als Ursache, so weisen Sie den Patienten auf eine mögliche Latexallergie hin und ziehen Sie eine immunologische Untersuchung in Betracht.

Weisen Sie den Patienten an, medizinisches und Notfallpersonal vor medizinischen Behandlungen über eine bekannte Latexallergie zu informieren.

Empfehlen Sie Patienten mit schwerer Latexallergie ggf. das Tragen eines Erkennungsarmbandes.

Die FDA bittet medizinisches Personal um die Meldung jeglicher Art von unerwünschten Reaktionen auf Latex oder andere in Medizinprodukten enthaltene Materialien. (Siehe Drug Bulletin der FDA, Ausgabe Oktober 1990).

Melden Sie etwaige Vorfälle bitte dem Problem Reporting Program der FDA unter der gebührenfreien Nummer (USA): 800-638-6725.

Bei Fragen zu den Tätigkeiten der FDA in Zusammenhang mit Latexallergie und Anästhesiologie wenden Sie sich bitte an das Office of Health Affairs, Center for Devices and Radiological Health Rockville MD.

Für eine Referenzliste zu Latexallergie schreiben Sie bitte an: LATEX, FDA, HFZ-220, Rockville, MD 20857.

Reinigungsmittel

Unter **Kapitel 9, Systempflege und Instandhaltung** finden Sie nähere Informationen zur Desinfektion und Reinigung sowie zu entsprechenden Produkten.

Druckerpapier und Toner

Unter **Kapitel 9, Systempflege und Instandhaltung** finden Sie nähere Informationen zum Auswechseln von Druckerpapier und Toner sowie zu entsprechenden Produkten.



ACHTUNG

Etwaige Zusatzgeräte, die an medizinische elektrische Geräte angeschlossen werden, müssen die entsprechenden IEC- bzw. ISO-Normen (z.B. IEC 60950 für Datenverarbeitungsgeräte) erfüllen.

Zudem müssen sämtliche Konfigurationen die Anforderungen für medizinische elektrische Geräte erfüllen (siehe IEC 60601-1).

Jede Person, die Zusatzgeräte an medizinische elektrische Geräte anschließt, nimmt Konfigurationen an einem medizinischen Gerät vor und ist infolgedessen dafür verantwortlich, dass dieses/diese Gerät/e die Anforderungen für medizinische elektrische Geräte erfüllt/erfüllen.

Beachten Sie, dass örtliche Bestimmungen vor o.g. Anforderungen Vorrang haben.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Vertretung oder den Kundendienst.

Biopsie-Nadelführungen

Biopsie-Nadelführungen werden zu einer ultraschallgeführten Biopsie eingesetzt. Die Biopsie erfolgt, um eine Gewebeprobe oder Flüssigkeit aus einer Läsion zu entnehmen.

Folgende Biopsie-Kits können verwendet werden:

Schallkopf	Hersteller	Beschreibung	Produktnummer
SL15-4	CIVCO	Infiniti plus Führungssystem auf der Ebene	672-001
SC6-1 XC6-1	CIVCO	Ultra-Pro II. Nadelführungssystem	672-002
SE12-3	CIVCO	Endokavitäre Einweg-Nadelführung	657-014
SE12-3 SEV12-3	CIVCO	Endokavitäre Mehrweg-Nadelführung	610-666

Schallkopf	Hersteller	Beschreibung	Produktnummer
SE12-3 SEV12-3	CIVCO	Sterile endokavitäre Einweg- Nadelführung	610-1275
SE12-3 SEV12-3	PROTEK	Sterile endokavitäre Einweg- Nadelführung	Aquamarine Nr. 9000

Eine vollständige Liste finden Sie in der aktuellen Version des Lieferantenkatalogs für mit SuperSonic Imagine-kompatiblen Zubehör.

Kapitel 5. Verwendung des Systems

Konventionen

In dieser Bedienungsanleitung verwendete Konventionen

Diese Bedienungsanleitung ist folgendermaßen aufgebaut:

Alle Schritte sind nummeriert. Sie müssen in der angegebenen Reihenfolge durchgeführt werden, um ein richtiges Ergebnis sicherzustellen.

Listen mit Aufzählungszeichen enthalten allgemeine Informationen zu einer bestimmten Funktion oder einem bestimmten Vorgang. Sie geben keine Reihenfolge vor.

Bedienelemente, Menüpunkte bzw. -titel sind so geschrieben, wie sie auf dem System angezeigt werden.

Symbole werden so angezeigt, wie sie auf dem System angezeigt werden.

Die linke Seite des Systems befindet sich zu Ihrer Linken, wenn Sie vor dem System stehen.

Berühren bedeutet, eine Schaltfläche auf dem Touchscreen zu drücken.

Im System verwendete Konventionen

Im System werden diese Konventionen verwendet:

Die Software des Systems benutzt grafische Darstellungen, die ähnlich auch auf vielen PCs zu finden sind.

In einem Menü oder einer anderen Anzeige weist ein Markierungsbalken darauf hin, dass das im Markierungsbalken enthaltene Element gerade ausgewählt wird.

Durch Drücken auf **Auswählen** wird das Element ausgewählt, einem Systemparameter ein Wert zugeordnet oder die dem Element entsprechende Aktion gestartet



Zur Eingabe von Text in ein Textfeld setzen Sie den Cursor in das Feld und verwenden Sie die Touchscreen-Tastatur.

Zum Anzeigen einer Liste, klicken Sie auf den Abwärtspfeil.

Achten Sie beim Scrollen durch eine Liste darauf, dass sich der Zeiger auf der Liste befindet. Verwenden Sie dann den **TouchRing™** zum Scrollen. Wenn Sie Ihren Finger im Uhrzeigersinn bewegen, scrollen Sie abwärts, wenn Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn bewegen, scrollen Sie aufwärts.



Knopftechnik

Bedienpult

Die Bedienelemente auf dem Bedienpult bestehen aus Tasten, Knöpfen und Drehknopftasten.

Drücken Sie auf eine Taste, um ihre Funktion ein- oder auszuschalten.


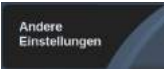





Drehen Sie einen Knopf, um die ausgewählte Einstellung zu ändern.


Drücken Sie auf eine Drehknopftaste, um ihre Funktion einzuschalten und drehen Sie diese, um die ausgewählte Einstellung zu ändern.



Touchscreen

Der Touchscreen verfügt je nach auszuführender Funktion über verschiedene Bedienelemente:

Wenn Sie dieses Bedienelement berühren...	... wird Folgendes ausgelöst
	<p>Berühren Sie einen Teil des Rades, um sich das Menü eines anderen Modus anzeigen zu lassen. Berühren Sie z. B. B, wird ein Menü mit Bedienelementen des B-Modus angezeigt, das System wechselt jedoch nicht in den B-Modus.</p>
	<p>Berühren Sie „Andere Einstellungen“, um sich eine andere Seite mit Bedienelementen des aktuellen Modus anzeigen zu lassen. Für die meisten Bildgebungsmodi sind zwei Seiten mit Einstellungen vorhanden.</p>
	<p>Berühren Sie dieses Bedienelement, um eine bestimmte Seite oder Funktion zu öffnen. Berühren Sie z.B. „Tastatur“, wird diese angezeigt.</p>
	<p>Berühren Sie dieses Bedienelement, um eine Funktion ein- bzw. auszuschalten. LED-Knopf eingeschaltet: orange, ausgeschaltet: dunkelblau.</p>
	<p>Berühren Sie dieses Bedienelement, um den angezeigten Wert zu ändern. Wenn Sie diese Taste mehrmals hintereinander berühren, werden alle Werte durchlaufen. Der angezeigte Wert wird durch die Position der orangefarbenen Markierung angegeben.</p>
	<p>Drehen Sie den Knopf unter der Touchscreen-Aufschrift, um den Wert zu ändern.</p>
	<p>Berühren Sie dieses Bedienelement, um den angezeigten Wert zu ändern. Der angezeigte Wert ist im Kästchen angegeben.</p>

Wenn Sie dieses Bedienelement berühren...	... wird Folgendes ausgelöst
	Berühren Sie den entsprechenden Teil der Taste, um den zugehörigen Wert zu ändern.

Erste Schritte

System ein- und ausschalten

Das System kann in zwei verschiedene Energiemodi versetzt werden: Ein und Aus.

Einschalten des Systems

1. Drücken Sie **I** auf dem Schalter an der Rückseite des Wagens.

Warten Sie, bis die **GRÜNE** LED-Anzeige der Stromversorgung leuchtet und nicht blinkt, bevor Sie das Bedienpult anschalten.



Hochfahren des Systems




1. Drücken Sie auf die Schaltfläche **Ein/Aus** auf dem Bedienpult neben dem linken Lautsprecher.

Das System überprüft automatisch eine bestimmte Anzahl von Komponenten und Peripheriegeräten und fährt hoch.

Herunterfahren des Systems

1. Drücken Sie auf die Schaltfläche **Ein/Aus** auf dem Bedienpult neben dem linken Lautsprecher.
2. Das Abschaltmenü wird angezeigt.

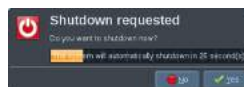


3. Auswählen **Ja**.

Ausschalten des Systems

1. Drücken Sie **0** auf den Schalter an der Rückseite des Systems, um das System vollständig auszuschalten.

Sollten sich noch Elemente in der Warteschlange zum Exportieren befinden, wird folgendes Abschaltmenü angezeigt:

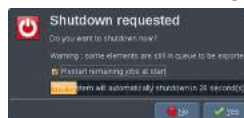

Die verbleibenden Aufträge werden standardmäßig beim nächsten Systemstart neu gestartet. Möchten Sie die verbleibenden Aufträge löschen, so entfernen Sie das Häkchen, bevor Sie das System herunterfahren.

Wenn das System auf Off gestellt ist, verbraucht es keinen Strom. Halten Sie sich für eine optimale Balance zwischen Anwenderkomfort und Energieeffizienz an folgende Empfehlungen:

- Schalten Sie das System am Ende des Tages aus, wenn es über Nacht nicht benutzt wird. Drücken Sie zum Ausschalten des Systems auf den On/Off-Schalter über dem Bedienpult.
- Wird das System länger nicht benutzt, so fahren Sie es herunter. Drücken Sie zum Herunterfahren des Systems auf den On/Off-Schalter des Bedienpultes.

Halten Sie sich beim Ausschalten des Systems nach Möglichkeit stets an dieses Verfahren.

Wenn Sie beim Ausschalten anders vorgehen, führt dies zu einer längeren Initialisierungsdauer beim nächsten Einschalten des Systems und möglicherweise zu anderen Problemen.



ACHTUNG

Schalten Sie das System erst ein, nachdem es mindestens 15 Sekunden lang ausgeschaltet war. Wird das System unmittelbar nach dem Ausschalten wieder eingeschaltet, so kann es zu einer Betriebsstörung kommen.

Lässt sich das System nicht über den normalen Vorgang ausschalten, so halten Sie den On/Off-Schalter mindestens 5 Sekunden lang gedrückt. Lässt es sich auch so nicht ausschalten, so schalten Sie den Schalter des Bedienpultes für die Stromversorgung auf der Rückseite des Systems aus.

Wenden Sie diese Ausschaltverfahren im Normalfall nicht an. Sie können das System beschädigen.

Wird das System nicht im Normalverfahren ausgeschaltet, so werden B-Modus-Bilder beim erneuten Einschalten möglicherweise nicht dargestellt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine Betriebsstörung vorliegt. Schalten Sie den Schalter des Bedienpultes für die Stromversorgung auf der Rückseite des Systems aus, warten Sie mindestens 15 Sekunden, und schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.

Fahren Sie das System niemals während einer Dateiübertragung herunter. Dies kann zu Datenkorruption oder Datenverlust führen.



WARNUNG

In einer Gefahrensituation benutzen Sie den Schalter auf der unteren Rückseite des Aixplorer®

Einstellen von Uhrzeit und Datum

Das System ist mit einer Uhr/Kalenderfunktion ausgestattet, welche die Uhrzeit- und Datumseinstellungen auch beim Ausschalten und Trennen des Systems vom Netz beibehält.

Die Anleitung zum Einstellen von Uhrzeit und Datum finden Sie in Kapitel **Kapitel 8, Individuelle Systemeinstellungen [381]**.

Einstellen der Sprache

Sie können die Sprache der Systembenutzeroberfläche und die regionalen Parameter in der Systemkonfiguration festlegen.

Die Anleitung zum Einstellen der Sprache finden Sie in Kapitel **Kapitel 8, Individuelle Systemeinstellungen [381]**.

Herstellung einer Netzwerkverbindung

Das System unterstützt Standard-Netzwerkfunktionen, unter anderem Drucken auf DICOM-Druckern, lokalen Druckern und Report-Druckern (optional).

Siehe **Kapitel 8, Individuelle Systemeinstellungen [381]** für Anweisungen zur Netzwerkkonfiguration.



Auswahl eines Schallkopfs

Das System verfügt über vier Ports für den Anschluss von Schallköpfen, die gleichzeitig besetzt werden können; es kann jedoch nur jeweils ein Schallkopf betrieben werden.

Bewahren Sie den Schallkopf, der sich nicht in Verwendung befindet, in einem der Schallkopfhalter auf.

Verwenden Sie stets das Kabelführungssystem, um ein Treten auf die Kabel bzw. ein Darüberfahren mit den Lenkrollen zu vermeiden.

Anschließen eines Schallkopfs

Siehe „[Anschließen Schallkopf](#)“ [123].

Auswählen eines Schallkopfs für eine Untersuchung

Das System erkennt nach dem Einschalten den zuletzt benutzten Schallkopf, die letzte Anwendung und die letzte Preset-Einstellung.

Während des Betriebs kann zwischen den vier angeschlossenen Schallköpfen gewählt werden.

1. Drücken Sie **Schallkopf** auf dem Bedienpult.
Auf dem Touchscreen werden die mit den angeschlossenen Schallköpfen kompatiblen Anwendungen angezeigt.





2. Berühren Sie das **Register** der gewünschten Anwendung.

Beispiel: Vaskulär

Auf dem Touchscreen werden die Schallköpfe und die entsprechenden Voreinstellungen gezeigt, die Sie für die ausgewählte Anwendung benutzen können.

3. Drücken Sie auf die gewünschte **Voreinstellung**.

Beispiel: Karotis

Der Schallkopf-Bildschirm schließt sich und das System befindet sich im Echtzeit-B-Modus.

Die Werksvoreinstellungen werden in einem dunkleren Blau und die benutzerdefinierten Einstellungen in einem helleren Blau angezeigt.



ANMERKUNG

Die angezeigte Liste der Voreinstellungen kann in der Systemkonfiguration angepasst werden. Siehe [Kapitel 8, Individuelle Systemeinstellungen \[381\]](#)

Der ausgewählte Schallkopf, die Anwendung und die Voreinstellung werden in der Kopfzeile der Hauptanzeige des Bildarstellungsmodus angezeigt.



WARNUNG

Benutzen Sie nur empfohlene Gele (Kontaktmittel). Andere Produkte können den Schallkopf beschädigen und die Garantie ungültig machen.

Beginn einer Untersuchung

Bereit machen

Vor dem eigentlichen Schallen können Sie neue Patientendaten eingeben oder Daten von Patienten aufrufen, deren Akte bereits angelegt wurde.

Bevor Sie einen neuen Patienten schallen, vergewissern Sie sich, dass die vorherige Untersuchung beendet wurde, indem Sie folgendes tun:

- Drücken Sie **Untersuchung beenden** auf dem Bedienpult.
- Drücken Sie **Neuer Patient** auf dem Touchscreen.


Eingeben neuer Patientendaten

PATIENTENDATENEINGABE

1. Drücken Sie **Patient** auf dem Bedienpult.

Auf dem Hauptmonitor wird die vorausgefüllte Seite zu den Patientendaten angezeigt.



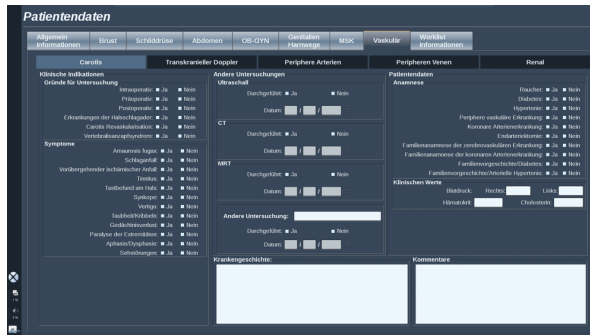

Die Registerkarte **Allgemeine Informationen** der Patienteneingabe enthält die Felder für die personenbezogenen Daten des Patienten.

Die Registerkarte **Arbeitslisteninformationen** der Patientendateneingabe zeigt Informationen der Modality Worklist an (falls zugewiesen und konfiguriert).

Sieben weitere **Registerkarten** mit spezifischen klinischen Informationen sind verfügbar:

- Brust
- Schilddrüse
- Abdomen
- OB-GYN
- Urogenital
- MSK
- Vaskulär



Zum Navigieren durch die Registerkarten bewegen Sie den Cursor auf die gewünschte Registerkarte und drücken dann **Auswählen** auf dem Bedienpult.

Zur Eingabe neuer Daten positionieren Sie den Cursor im auszufüllenden Feld. Das aktive Feld ist automatisch orange unterlegt. Geben Sie den gewünschten Text über die Tastatur ein.



Sie können den Text, den Sie gerade schreiben, direkt auf dem Touchscreen im Voransichtsbereich ansehen.



ANMERKUNG

Patienten-ID: Das System identifiziert jeden Patienten über eine eigene ID. Sie können eine eigene ID eingeben oder diese automatisch vom System erstellen lassen. Bilder und Berichte werden auf Basis der Patienten-ID gespeichert.

Name und ID werden oben auf allen Bildanzeigen angezeigt.



ACHTUNG

Überprüfen Sie den Patientennamen und die ID, bevor Sie eine Untersuchung für eine neue Patientin beginnen.

Überprüfen Sie das Datumsformat, bevor Sie das Geburtsdatum, das Datum der letzten Periode (Last Menstrual Period, LMP), den geschätzten Geburtstermin (Estimated Date of Delivery, EDD), den Zeugungszeitpunkt (Date Of Conception, DOC) und den Zeitpunkt des Eisprungs eingeben. Eine falsche Eingabe dieser Parameter führt zu einer falschen Berechnung des Gestationsalters (GA).

Tragen Sie den EDD und das GA zur Sicherung in die Patientenakte ein.

Betätigen Sie die Schaltfläche „Activate OB calcs“ (OB-Berechnungen aktivieren) auf der Seite für die Patientendateneingabe (PDE), um Obstetrik-Berechnungen durchzuführen.

Es muss angegeben werden, welcher OB-Autor für jede einzelne Messung verwendet wird, um das GA und ein geschätztes Fetalgewicht (Estimated Fetal Weight, GFG) zu berechnen.

Eine Diagnose darf nicht nur auf einer Messung oder Einzeldaten basieren. Berücksichtigen Sie immer die gesamte klinische Bewertung der Patientin, einschließlich der Patientenakte.

Je nach der Position des Fötus können einige Messwerte falsch sein. Berücksichtigen Sie immer die gesamte klinische Bewertung der Patientin, einschließlich der Patientenakte.

Das System ermöglicht fetale Messwerte für bis zu fünf Feten. Achten Sie darauf, die Feten während der Messungen nicht zu verwechseln.

Für jede durchgeführte Messung können Sie über die Auswahlfunktion auf der Registerkarte „Measurements“ (Messungen) im Bericht entweder den ersten, letzten, den durchschnittlichen, minimalen, maximalen oder einen der fünf Messwerte wählen, die angezeigt werden können.

Seien Sie beim Löschen von Messwerten vorsichtig, da dies die Auswahlergebnisse beeinflusst.

Abweichungen von den normalen Messwerten müssen anhand von Grafiken und Literatur beurteilt werden.

AUSWÄHLEN EINES WERTS IN EINER LISTE:

1. Bewegen Sie den Cursor zum Pfeil auf der rechten Seite der Drop-down-Liste.
2. Drücken Sie **Auswählen** , um die Liste anzuzeigen.
3. Bewegen Sie den Cursor nach unten auf den ausgewählten Wert und drücken Sie **Auswählen** , um Ihre Auswahl zu bestätigen.





Sie können die Patientendateneingabe als ein Bild der Untersuchung speichern.

Dafür drücken Sie **Bild speichern** , während Sie sich in der Patientendateneingabe-Maske befinden.

Dadurch wird die aktive Registerkarte als Screenshot gespeichert.

Laden einer Patientendatei aus der Modality Worklist

DURCHSUCHEN DER ARBEITSLISTE NACH UNTERSUCHUNGEN

Diese Funktion ist verfügbar, wenn das System mit dem Netzwerk verbunden ist und DICOM aktiviert wurde.

1. Drücken Sie **Patient** auf dem Bedienpult.

Auf dem Hauptmonitor wird die vorausgefüllte Seite zu den Patientendaten angezeigt.

Die Tastatur wird auf dem Touchscreen angezeigt.



ANMERKUNG

Falls eine „Modality Worklist“ (Modalitätsarbeitsliste) konfiguriert und zugewiesen wurde, wird durch Drücken auf **Untersuchung beenden** automatisch die „Modality Worklist“ (Modalitätsarbeitsliste) angezeigt (falls konfiguriert).

2. Berühren Sie **M. Worklist** auf dem Touchscreen.

Die Modality Worklist wird auf dem Hauptbildschirm angezeigt.



ANMERKUNG

Zum Filtern der Liste nutzen Sie die Schaltflächen über der Liste.

Platzieren Sie den **Zeiger** auf einer Spaltenüberschrift und drücken Sie anschließend auf **Auswählen**, um die Liste der ausgewählten Spalte zu sortieren.

Benutzen Sie die Suchfunktion, um einen bestimmten Patienten zu finden.

3. Bewegen Sie den Cursor zu der Patientendatei, die Sie öffnen möchten.
4. Drücken Sie **Auswählen** auf dem Bedienpult.

Auf dem Hauptbildschirm wird die vorausgefüllte Seite zur Patientendateneingabe angezeigt.

Sie können bestimmte Informationen für diesen Patienten bearbeiten.

Nähere Informationen zum Konfigurieren der „Modality Worklist“ (Modalitätsarbeitsliste) finden Sie unter **Kapitel 8, Individuelle Systemeinstellungen [381]**.

BROAD QUERY (UMFASSENDE QUERY), PATIENT QUERY (PATIENTENABFRAGE)

Aixplorer® bietet zwei durch das IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) definierte Abfragetypen an: umfassende Abfragen und Patientenabfragen.


Die Arbeitsliste führt standardmäßig umfassende Abfragen durch.

PatientenQuery beschränkt die Anzahl der eingehenden Antworten und erhöht somit die Vertraulichkeit, begrenzt das Risiko der versehentlichen Auswahl des falschen Patienten in der Arbeitsliste und begrenzt die Menge der an das System übertragenen Daten.

Verwendung der PatientenQuery (Patientenabfrage):

1. Drücken Sie auf **PatientenQuery** (Patientenabfrage) auf dem Touchscreen, um eine Abfrage nur für einen spezifischen Patienten durchzuführen. Verwenden Sie diesen Modus insbesondere dann, wenn Ihr Netzwerk langsam ist.

Ein Fenster wird eingeblendet.

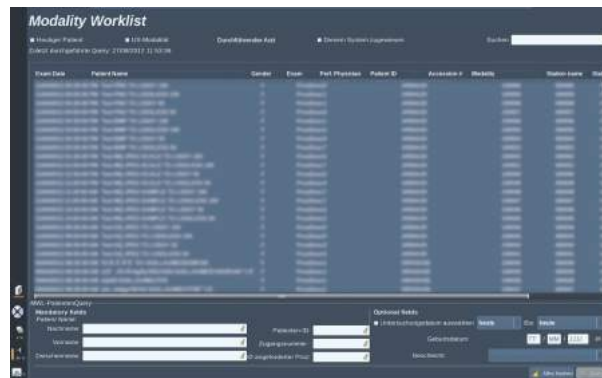

2. Geben Sie die Daten für den spezifischen Patienten ein, den Sie auf der Arbeitsliste abrufen möchten.
Zur Durchführung der Abfrage muss mindestens ein Pflichtfeld ausgefüllt werden.
3. Klicken Sie auf **Query** (Abfrage), um die Abfrage für den spezifischen Patienten durchzuführen.



Drücken Sie auf **Broad Query** (Umfassende Abfrage) auf dem Touchscreen, um zum Abfragemodus „Broad Worklist“ (Umfassende Abfrage) zu wechseln.

Die „Modality Worklist“ (Modalitätsarbeitsliste) kann verwendet werden, wenn das System vom Netzwerk getrennt ist. Weitere Details finden Sie unter **Kapitel 8, Individuelle Systemeinstellungen [381]**.

Patientendaten editieren

BEARBEITBARE DATEN

Die Daten des aktuellen Patienten können bearbeitet werden. Einige Informationen können jederzeit während einer Untersuchung bearbeitet werden, falls sie nicht von der Modality Worklist importiert wurden.

BEARBEITEN VON PATIENTENDATEN

1. Platzieren Sie den Textcursor in dem Feld, das Sie bearbeiten möchten.

Das aktive Feld ist orange unterlegt.

2. Geben Sie den neuen Text über die Tastatur ein.

Bearbeiten Sie eines der Identifikations-Felder, wird ein Dialogfenster mit einer Meldung angezeigt. Drücken Sie **Ja** , um zu bestätigen, oder **Nein** , um den Vorgang abzubrechen

Es gibt folgende Identifikationsfelder:

- Nachname des Patienten
- Vorname des Patienten
- Zweiter Vorname des Patienten
- Patienten-ID
- Auftragsnummer
- Alle Felder des DICOM-Registers der Patientendaten-Eingabe



ANMERKUNG

Wenn Sie eines der o.g. Felder NACH dem Versenden der Untersuchung an einen Server bearbeiten, startet der DICOM Store möglicherweise eine neue Untersuchung mit den neuen Patientendaten.

Durch die Eingabe von Körpergröße und -gewicht des Patienten wird automatisch der Body Mass Index (BMI) berechnet.

Untersuchung beenden

Vergewissern Sie sich, dass alle von Ihnen benötigten Bilder gespeichert wurden.

Nach dem Ende der Untersuchung beenden Sie diese folgendermaßen:

Drücken Sie **Untersuchung beenden** auf dem Bedienpult.



Bildgebungs-Modi

Allgemeine Informationen zu den Bildgebungs-Modi

Aufrufen/Verlassen eines Modus

Das Aixplorer® Ultraschallsystem bietet eine Reihe von Bildgebungsmodi über die Modusauswahltasten.

Die Modustasten (orange) befinden sich auf dem Bedienpult unter dem Touchscreen.



- Drücken Sie **B** , um im Graustufen-B-Modus zu schallen.
- Drücken Sie **SWE™** , um im Graustufen-B-Modus mit überlagertem Echtzeit-Farbelastogramm zu schallen.
- Drücken Sie **COL** , um in farbkodierter Flussdarstellung (CFI), Color-Power-Darstellung (CPI) oder Direktionale Color-Power-Darstellung (DCPI) zu schallen.
- Drücken Sie **PW** für den Pulsed Wave Doppler.
- Drücken Sie **CEUS** , um die Kontrastmittel-Bildgebung (Contrast Enhanced Ultrasound imaging) zu aktivieren.



ANMERKUNG

Der Zugang zum 3D-Modus und M-Modus erfolgt über den Touchscreen.

Wird die **B** -Taste gedrückt während ein anderer Modus läuft, so wird der aktuelle Modus abgebrochen und der B-Modus angezeigt.

Die vorhergehenden Einstellungen werden wieder hergestellt.

Hauptanzeige für die Bildgebung


Auf der Hauptanzeige für die Bildgebung sind ein Ultraschallbild, Untersuchungs- und Bilddaten sowie eine Reihe von Indikatoren zu sehen.

Der Bildbereich befindet sich ungefähr in der Mitte der Bildgebungsanzeige.

Rechts vom Bild befinden sich eine Tiefenskala sowie ein Graustufenbalken und/oder Farbbalken.

Die Patienten- und Untersuchungsdaten werden direkt über dem Ultraschallbild angezeigt. Dort werden auch die aktuelle Uhrzeit und das Datum, der Name der Einrichtung, der ausgewählte Schallkopf und die ausgewählte Anwendung, sowie die Werte des Thermischen Index (TI) und des Mechanischen Index (MI) angezeigt.

Die Bildparameter werden links vom Bild angezeigt.

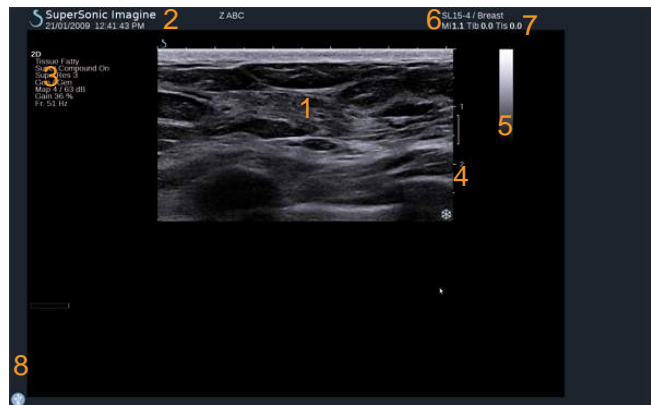






























- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Ultraschallbild | 2. Patient/Unters.daten |
| 3. Bildparameter | 4. Tiefenskala |
| 5. Graustufenbalken | 6. Schallkopf/Voreinstellung |
| 7. MI und TI | 8. Hinweissymbole |

Siehe einzelne Bildgebungsmodi für eine genaue Beschreibung der jeweiligen Hauptanzeige.

Hinweissymbole

Im unteren linken Bereich der Hauptanzeige wird eine Reihe von Symbolen angezeigt, die Sie über den Status des Systems informieren.

Symbol	Bedeutung
	CD im CD/DVD-Laufwerk eingelegt
	CD wird gebrannt
	Fehler während des CD-Brennvorgangs
	DVD im CD/DVD-Laufwerk eingelegt
	DVD wird gebrannt
	Fehler während des DVD-Brennvorgangs
	Keine CD oder DVD im CD/DVD-Laufwerk
	USB-Gerät ist eingesteckt
	System exportiert Daten auf USB-Gerät
	Fehler während des USB-Exports
	Das System ist mit Netzwerk verbunden
	Netzwerkfehler
	Das System exportiert Daten auf DICOM Store SCP
	Fehler DICOM Modality Worklist SCP


Symbol	Bedeutung
	Fehler DICOM Store SCP
	Das System druckt auf DICOM Drucker
	Fehler DICOM-Drucker
	Fehler DICOM commit server
	System druckt auf lokalem Drucker
	Fehler lokaler Drucker
	Modality Performed Procedure Step (MPPS) ist belegt
	Fehler MPPS
	DICOM Modality Worklist wird aktualisiert
	Fehler DICOM Modality Worklist
	DICOM Modality Worklist: Offline-Modus
	DICOM Modality Worklist gefiltert
	Luftfilter überprüfen
	Verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte
	Query and Retrieve

Über den interaktiven Bildschirm - Touchscreen

Der Bildgebungs-Touchscreen ist je nach Abtastmodus unterschiedlich.

Er verfügt über:

- allgemeine Bedienelemente, die in allen Bildgebungsmodi vorhanden sind
- Bildgebungsparameter, die sich auf den/die aktiven Modus/Modi beziehen
- Drehregler, die über ihre entsprechenden Knöpfe bedient werden, die sich unter dem Touchscreen befinden
- ein Navigationsrad, mit dem die Parameter aller aktiven Modi geändert werden können

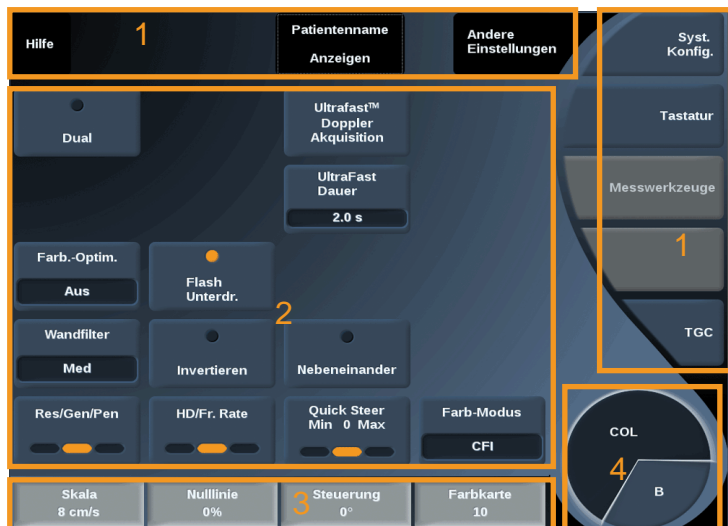

1. Allgemeine Bedienelemente
2. Bildgebungsparameter
3. Drehregler
4. Navigationsrad

Rufen Sie jeden Bildgebungsmodus auf, um eine genaue Übersicht der jeweiligen Parameter zu erhalten.

Allgemeine Bedienelemente

Einige Bedienelemente sind in allen Bildgebungsmodi vorhanden. Sie sind nachstehend aufgeführt.

Eine Beschreibung der modusspezifischen Bedienelemente finden Sie in den jeweiligen Kapiteln über die einzelnen Bildgebungsmodi.

Einfrieren



Im Live-Modus drücken Sie **Einfrieren** auf dem Bedienpult, um das Bild zu fixieren. Ein Schneeflockensymbol wird auf dem Bild eingeblendet und zeigt an, dass das Bild fixiert wurde.

Nach Fixieren des Bildes drücken Sie erneut auf **Einfrieren**, um die Fixierung aufzuheben und in den Live-Bildgebungsmodus zurückzukehren.

Tiefe



Tiefe regelt die Tiefenzonen, innerhalb derer die Anatomie im B-Modus dargestellt wird.

Je größer die Abbildungstiefe, umso tiefer im Körper erfolgt die Echoerfassung. Daher dauert es länger, bis der Schallkopf das Signal empfängt. Es erhöht sich also die Empfangszeit, und es müssen mehr Informationen verarbeitet werden. Die Zeit zwischen zwei Ultraschallstrahlen wird erhöht.

Infolgedessen wird die Bildrate verringert.

Tiefe befindet sich auf dem Bedienpult und lässt sich nur in der Live-Bildgebung anpassen.

Drehen Sie **Tiefe**:

- im Uhrzeigersinn, um die Tiefe zu vergrößern und tiefere Strukturen darzustellen
- gegen den Uhrzeigersinn, um die Tiefe zu verringern und oberflächennahe Strukturen zu schallen.

Die Tiefeneinstellung ist je nach Anwendung und Modus verschieden. Die Tiefe wird auf dem Bildschirm in cm dargestellt.

Gain

Die Gesamtverstärkung erhöht bzw. verringert die Menge der auf einem Bild angezeigten Echoinformationen.

Sie kann das Bild aufhellen oder verdunkeln, wenn genügend Echoinformationen erzeugt werden.

Gain lässt sich im Live-Modus und bei fixierten Bildern verstellen.

Die Verstärkung lässt sich in jedem Modus über den Modus-Knopf einstellen.

Drehen Sie **B**, **SWE™**, **COL** oder **PW**, je nachdem welcher Modus aktiviert ist:

- im Uhrzeigersinn, um die Gesamtverstärkung zu erhöhen und ein helleres Bild zu erhalten
- gegen den Uhrzeigersinn, um die Gesamtverstärkung zu senken und ein dunkleres Bild zu erhalten.

Time Gain Compensation (TGC)

AUTOTGC

AutoTGC regelt die Verstärkung im B-Modus an verschiedenen Tiefen und für verschiedene Gewebedämpfungen automatisch ein.

Die Gesamthelligkeit wird automatisch je nach der Einstellung von **AutoTGC-Offset** geregelt (siehe „**AutoTGC-Offset**“ [190]).

AutoTGC befindet sich auf dem Bedienpult.

Drücken Sie **AutoTGC**. Falls erforderlich, können Sie die Verstärkung auch unabhängig regeln (siehe „**Gain**“ [178] oben).



ANMERKUNG

Drücken Sie im PW-Modus auf **AutoTGC** zum automatischen Anpassen der **Skala** und **Nulllinie**. Siehe „**Einrichten des PW-Modus**“ [239]

ADAPTIVER TGC-MODUS

Das Schalten dieses Modus auf **Ein** aktiviert die automatischen TGC-Anpassungen beim Ändern der Bildgebungs-Bedienelemente. Siehe „System“ [384] zum Aktivieren oder Deaktivieren

MANUALTOUCHTGC™

Die gleichmäßige Helligkeit des Bildes lässt sich selektiv regeln.

Drücken Sie **TGC** auf dem Touchscreen.

Das B-Modus-Bild wird gleichzeitig hinter den Schiebereglern dargestellt.

Zeichnen Sie nach Bedarf die TGC-Kurve mit einem Stift oder dem Finger.

Sie können auch die Position jeder virtuellen Eingabe auf ihrer Linie ändern, indem Sie eine andere Stelle auf derselben Linie berühren.



Management des Fokusbereichs

Der Fokusbereich ist jene Tiefe, bei der die laterale Auflösung auf dem Bild am besten ist.

Die Fokusposition ist jene Tiefe, bei der die übertragene Ultraschallenergie fokussiert wird.

Sie können wählen, ob das Management des Fokusbereichs manuell oder automatisch erfolgen soll.

Sie können diese Einstellung im Unterregister-System „System/Anzeige“ steuern. Siehe „System“ [384]

MANUELLES MANAGEMENT DES FOKUSBEREICHS

Durch Auswählen von „Manuell“ lassen sich Fokusbereich und Position definieren und kontrollieren.

Fokus ist nur im Live-Bildgebungsmodus einstellbar.

Fokus befindet sich auf dem Bedienpult.

Drehen **Fokus**:

- im Uhrzeigersinn, um den Fokusbereich tiefer zu platzieren
- gegen den Uhrzeigersinn, um den Fokusbereich oberflächennäher zu platzieren.

Drücken Sie **Fokus** und drehen Sie anschließend den Knopf:

- im Uhrzeigersinn, um den Fokusbereich zu vergrößern
- gegen den Uhrzeigersinn, um die Fokusgröße zu verkleinern

Drücken Sie **Fokus** erneut, um den Fokusbereich zu verlegen.

Eine Änderung der Größe des Fokusbereiches wirkt sich auf die Bildrate aus.

Je größer der Fokusbereich, desto langsamer die Bildrate.

AUTOMATISCHER FOKUSBEREICH

Durch Verwendung der Option „Automatisch“ wird der Fokusbereich automatisch gesteuert, um die am besten geeignete Größe und Position des Fokusbereichs einzustellen. Das Verhältnis zwischen der Größe und der Tiefe des Fokusbereichs wird beibehalten und die Position des Fokusbereichs wird an jede Tiefenänderung angepasst.

Zoom

Zur genaueren Untersuchung kann ein Auswahlbereich in den Bildgebungs-Modi vergrößert werden. Zwei Zoom-Typen sind auf dem Aixplorer®: der HD-Zoom und der digitale Zoom.



HD ZOOM

Der HD-Zoom konzentriert die Systemverarbeitungskapazität auf einen bestimmten Zielbereich des Echtzeit-Bildes.

Das Ergebnis ist eine verkleinerte Gesamtansicht, die jedoch eine bessere Detailschärfe und höhere Bildrate aufweist, wodurch für den Zielbereich eine bessere Bildqualität erzielt wird.

HD Zoom ist nur im Live-Bildgebungsmodus einstellbar.

Zur Nutzung der **HD Zoom** -Funktion:

1. Drücken Sie **Zoom** auf dem Bedienpult

Auf dem Bild wird ein Feld eingeblendet.

2. Verwenden Sie den **Trackball** , um die die Zoom-Box zu bewegen
3. Drücken Sie auf **Auswählen** , um den Trackball auf die Boxgröße einzustellen.
4. Verwenden Sie den **Trackball** , um die Größe der Zoom-Box anzupassen
5. Drücken Sie **Zoom** erneut, um das Bild zu vergrößern
6. Drücken Sie **Zoom** erneut, um das Bild zu verlassen.

DIGITALER ZOOM

Digitaler Zoom ist eine vergrößernde Post-processing-Funktion. Aus diesem Grund hat sie keine Auswirkung auf die Bildrate.

Digitaler Zoom lässt sich im Live-Modus und bei fixierten Bildern verstellen.

Drehen **Zoom**:

- im Uhrzeigersinn, um den Zoom-Faktor zu erhöhen
- gegen den Uhrzeigersinn, um den Zoom-Faktor zu verringern.



ANMERKUNG

Im Live-Modus können HD Zoom und Digital Zoom gleichzeitig genutzt werden.

Links / Rechts

Links / Rechts dient dazu, das Bild entlang der Links-Rechts-Achse umzudrehen.

Berühren Sie **Links / Rechts** , um das Bild umzudrehen.



Oben/unten

Oben/unten dient dazu, das Bild entlang der Oben-Unten-Achse umzudrehen.

Berühren Sie **Oben/unten** , um das Bild umzudrehen.



Dual

Berühren Sie **Dual** , um den Dual-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Das linke Bild ist aktiv.

Drücken Sie **Auswählen** , um die linke Seite zu fixieren und die rechte Seite zu aktivieren.



Drücken Sie **Einfrieren** , um beide Seiten zu fixieren.

- das aktive Bild weist ein orangefarbenes S als Orientierungsmarkierung auf
- das inaktive Bild weist ein weißes S als Orientierungsmarkierung auf.



Sie können den aktiven Status zwischen den Dual-Bildern wechseln, durch Drücken auf **Auswählen**.

Die Bildeinstellungen gelten stets für das aktive Bild im Dualmodus.

Die Bildeinstellungen für die Dualbilder sind voneinander unabhängig.

Wenn Sie **Einfrieren** vor **Auswählen** drücken, können Sie die Bildeinstellungen und Modi der aktiven Seite ändern.

Abspielen

Wenn das Bild fixiert wird, wird in allen Modi eine Schaltfläche **Abspielen** auf dem Touchscreen angezeigt.

Abspielen ermöglicht das Anzeigen von Clips. Unter [Kapitel 7, Bild- und Datenmanagement \[351\]](#) finden Sie weitere Informationen zum Anzeigen von Clips.



Dual oben/unten

Dual oben/unten hat die gleiche Funktion wie **Dual**, teilt das Bild jedoch in ein oberes und ein unteres Bild auf.

1. Drücken Sie **Dual** zum Aktivieren von **Dual oben/unten**.
2. Drücken Sie **Dual oben/unten**, um das Anzeigeformat **Dual oben/unten** zu aktivieren oder zu deaktivieren.



Patientennamen ausblenden

Patientennamen ausblenden ermöglicht das temporäre Ausblenden der Patienteninformationen auf dem Bildschirm. Die ausgeblendeten Informationen bleiben jedoch in der Datenbank.



Trackball-Funktionswechsel

Wenn mehrere Funktionen mit dem Trackball verfügbar sind, so werden diese unten am Bild angezeigt. Die aktive Funktion wird orange angezeigt.

Drücken Sie auf den **Zeiger** , um die aktive Trackball-Funktion zu ändern.



Drücken Sie auf **Auswählen** , um zwischen **Box move** (Position der Box) und **Box size** (Boxgröße anpassen) zu wechseln.

Drücken Sie auf **Auswählen** , um zwischen **Img1** und **Img2** in Doppelanzeige zu wechseln.

B-Modus Bildgebung


Der B-Modus ist ein zweidimensionaler Ultraschall-Bildgebungsmodus, der die Darstellung der aus Gewebe mit unterschiedlicher Dichte zurückgesendeten Echos in verschiedenen Graustufen ermöglicht.

Zugang zum B-Modus

Drücken Sie von jedem beliebigen Modus aus auf **B** auf dem Bedienpult.



Hauptanzeige des B-Bildes

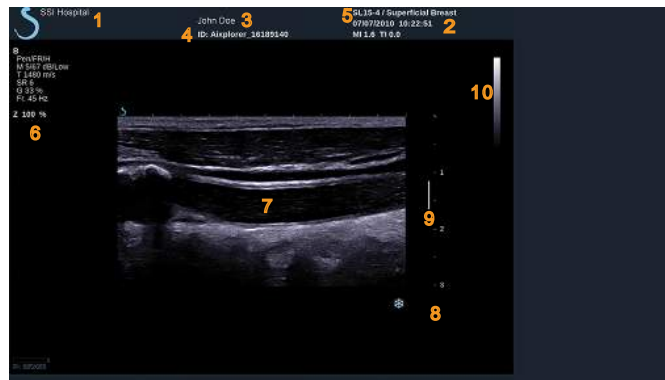

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Name des Krankenhauses/der Klinik | 2. Datum und Uhrzeit |
| 3. Patientenname | 4. Patienten-ID |
| 5. Schallkopf/Voreinstellung/ MI/TI | 6. Bildgebungsparameter |
| 7. Ultraschallbild | 8. Tiefenskala |
| 9. Fokusbereich | 10. Graustufenanzeige |

B-Modus Touchscreen

Im B-Modus werden auf dem Touchscreen verschiedene Bedienelemente angezeigt, die eine Optimierung des B-Bildes ermöglichen.

Es gibt 2 Seiten mit B-Modus-Parametern. Diese Einstellungen lassen sich durch Berühren des jeweiligen Bedienelements auf dem Touchscreen oder durch Drehen des Drehknopfes direkt unter dem Touchscreen regeln.



Sie können durch die Seiten blättern, indem Sie **Andere Einstellungen berühren**.

B-Modus-Parameter

HARMONIC IMAGING



Der Modus „Harmonische Bildgebung“ dient der Verringerung von Störecho und Halleffekten sowie der Verstärkung von Gewebegrenzen. Die Harmonische Bildgebung ist nur im Live-Bildgebungsmodus verfügbar.

Drücken Sie **Harmonic Imaging** , um die harmonische Bildgebung zu aktivieren/deaktivieren.

RES/PEN



Res/Pen ermöglicht die Änderung der Mittenfrequenz für eine erhöhte Auflösung oder erhöhte Eindringtiefe. **Res/Pen** ist nur im Live-Bildgebungsmodus verfügbar. Drücken Sie **Res/Pen** , um den Wert zu ändern.

Die orangefarbene LED-Anzeige weist auf den aktiven Wert hin:

- LED links: Res (Auflösung)
- LED Mitte: Gen (Allgemein)
- LED rechts: Pen (Eindringtiefe)

HD/FR. RATE



HD/Fr. Rate ermöglicht die Einstellung der Bildrate und Liniendichte für eine erhöhte räumliche oder zeitliche Auflösung.

Berühren Sie **HD/Fr. Rate** , um den Wert zu ändern.

Drei Optionen stehen zur Auswahl:

- HD (Hochauflösend): LED links
- Ausgeglichen: LED Mitte
- Fr. Rate (Bildrate): LED rechts

TISSUETUNER™



TissueTuner™ ermöglicht die Einstellung der Empfangsparameter in Zusammenhang mit der angenommenen Schallgeschwindigkeit des Ultraschalls im Körper. Die Abstimmung der Schallgeschwindigkeitsparameter auf den untersuchten Gewebetyp erzielt eine höhere räumliche und laterale Auflösung.

TissueTuner™ ist nur im Live-Bildgebungsmodus verfügbar.

Drehen Sie den Knopf unter **TissueTuner™**:

- im Uhrzeigersinn für ein dichteres Gewebe (höhere Geschwindigkeit der Schallwerte)
- gegen den Uhrzeigersinn für ein weniger dichtes Gewebe (geringere Geschwindigkeit der Schallwerte)

TissueTuner™ Werte sind von der gewählten Anwendung abhängig.

DYNAM. BEREICH



Dynam. Bereich ermöglicht die Änderung des Bereichs, in dem die Amplituden der Echosignale dargestellt werden, ähnlich wie bei der Nulllinie.

Dynam. Bereich ist im Live-Bildgebungsmodus und bei fixiertem Bild verfügbar.

Drehen Sie den Drehknopf unter **Dynam. Bereich**:

- im Uhrzeigersinn, um die Graustufenwerte zu komprimieren
- gegen den Uhrzeigersinn, um DR zu verringern.

Dynam. Bereich -Werte sind von der gewählten Anwendung abhängig.

2D-MAP



2D-Map weist die Darstellung der Echoamplituden einem Graustufen- oder Farbbereich zu.

2D-Map ist im Live-Bildgebungsmodus und bei fixiertem Bild verfügbar.

Drehen Sie den Drehknopf unter **2D-Map**:

- im Uhrzeigersinn, um zur Ansicht der nächsten Karte zu gehen
- gegen den Uhrzeigersinn, um zur Ansicht der vorhergehenden Karte zu gehen

SUPERCOMPOUND™



SuperCompound kombiniert den zurückgesendeten Ultraschall aus einer großen Auswahl gesteuerter Echolinien, um ein Bild mit hervorragender Struktur, verstärkter Abgrenzung und verringerter Abschattung zu erzeugen. SuperCompound ist nur im Live-Bildgebungsmodus verfügbar.

Drücken Sie auf **SuperCompound**, um den Modus SuperCompound zu aktivieren.

SCHALLLEISTUNG

Schallleistung regelt die Ausgangsleistung des Systems.

Schallleistung ist nur im Live-Bildgebungsmodus verfügbar.

Drehen Sie den Knopf unter **Schallleistung**:

- im Uhrzeigersinn, um die Schallleistung zu erhöhen
- gegen den Uhrzeigersinn, um die Schallleistung zu verringern.

Die maximale akustische Ausgangsleistung beträgt 0dB und die minimale Leistung liegt bei -30dB.

Siehe [Kapitel 3, Sicherheit \[29\]](#) für Informationen über die akustischen Ausgangsleistungen.



PRF



PRF ermöglicht die Änderung der Impulswiederholungsfrequenz für das B-Bild.

Durch das Verringern der PRF lassen sich Wiederholungsartefakte korrigieren.

Drehen Sie den Knopf unter **PRF**, um den Wert zu ändern.

AUTOTGC-OFFSET



AutoTGC-Offset ermöglicht die Programmierung der automatischen Gesamtverstärkung bei der Verwendung von **AutoTGC**.

AutoTGC-Offset befindet sich auf der zweiten Seite der Parameter-Einstellungen.

Drehen Sie den Knopf unter **AutoTGC-Offset**:

- im Uhrzeigersinn, wenn Sie ein helleres Bild wünschen
- gegen den Uhrzeigersinn, wenn Sie ein dunkleres Bild wünschen.

PERSISTENZ

Dieses Bildmittelungsverfahren verringert Bildrauschen.

Persistenz ist im Live-Bildgebungsmodus und bei einem fixierten Bild (zur Ansicht von Clips) verfügbar.

Drehen Sie den Drehknopf unter **Persistenz**:

- im Uhrzeigersinn, um die Persistenz zu erhöhen
- gegen den Uhrzeigersinn, um die Persistenz zu verringern.



SUPERRES™

SuperRes™ ist eine Bildverarbeitungsfunktion, die verringerte Körnigkeit, bessere Bildstruktur und Kantenhebung ohne Auswirkung auf die Bildrate ermöglicht.

SuperRes ist im Live-Bildgebungsmodus und bei fixiertem Bild verfügbar.

Drehen Sie den Drehknopf unter **SuperRes**:

- im Uhrzeigersinn zum Erhöhen **SuperRes**
- gegen den Uhrzeigersinn zum Verringern **SuperRes**

SuperRes hängen davon ab, ob **SuperCompound** ein- oder ausgeschaltet ist.



SEKTORGRÖßE

Sektorgröße erweitert oder verringert die Größe des Sektorwinkels, um den Auswahlbereich des Bildes zu maximieren. Die Änderung der Sektorgröße beeinflusst die Bildrate. Je kleiner die Sektorgröße, je schneller die Bildrate.



BREITES BILD

Breites Bild ermöglicht die Vergrößerung des Sichtfeldes.

Drücken Sie **Breites Bild**, um den breiten Bildgebungsmodus zu aktivieren/deaktivieren.



Biopsie

Biopsie-Nadelführungen werden während einer ultraschallgeführten Biopsie eingesetzt. Das System zeigt eine Führungslinie, die den voraussichtlichen Weg des Biopsie-Werkzeugs darstellt.

Eine Liste von kompatiblen Biopsie-Kits finden Sie unter „[Kompatibles Zubehör](#)“ [133].

ANBRINGEN UND ENTFERNEN EINER BIOPSIE-NADELFÜHRUNG



WARNUNG

Überprüfen Sie alle Komponenten und den Schallkopf.

Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen benutzte Nadelführung für den Schallkopf, das System und die System-Software geeignet ist.

Einige Nadelführungen müssen über einer sterilen Schallkopf-Schutzhülle angebracht werden. Lesen Sie die zur Biopsie-Nadelführung gehörende Anleitung.

Nach jedem Gebrauch müssen Biopsie-Nadelführungen je nach Typ entweder sterilisiert oder entsorgt werden. Lesen Sie die zur Biopsie-Nadelführung gehörende Anleitung.

Wie die Biopsie-Nadelführung auf dem Schallkopf angebracht wird, entnehmen Sie der mit dem Kit gelieferten Anleitung.

ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG DER BIOPSIE-FÜHRUNGSLINIE

Der Aixplorer® generiert zwei Biopsie-Führungslinien, dies sind die „Linien“ auf dem Ultraschallbild.

Diese Führungslinien zeigen den voraussichtlichen Weg der Nadel an und sollten nicht als Standard verwendet werden, bei dem sich die Nadel zwischen den beiden Führungslinien befinden muss.

Bitte beachten Sie, dass die angezeigten Biopsie-Führungslinien nicht die exakte Nadelposition während der Biopsie angeben.



WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass Sie den TissueTuner vor einer Biopsie richtig eingestellt haben. Mit der optimalen TissueTuner-Einstellung erzielen Sie ein Bild in hoher Auflösung, was für eine bessere Nadelführung sorgt.



ACHTUNG

Bei aktivierter Biopsie-Funktion ist die Zeit zum automatischen Fixieren im B-Modus deaktiviert.

Achten Sie darauf, die Biopsie-Funktion nach dem Verfahren auszuschalten, um eine Beschädigung des Schallkopfs zu verhindern.



Die Verfügbarkeit der Biopsie-Führungslinie hängt vom Schallkopf ab.

1. Schalten Sie im B-Modus und optimieren Sie das Bild.
2. Lokalisieren Sie den Biopsie-Bereich.
3. Drücken Sie **Biopsie** auf dem Touchscreen

Biopsiewinkel und **Biopsie ausblenden** sind aktiviert (nicht grau). Die Biopsie-Führungslinien werden auf dem Bildschirm angezeigt.

1. Drücken Sie **Biopsiewinkel** , bis der gewünschte Biopsiewinkel auf der Schaltfläche angezeigt wird.
2. Verwenden Sie den **Trackball** , um das Biopsie-Ziel entlang der Führungslinien zu bewegen.
3. Machen Sie die Biopsie.

Biopsiesteuerung ermöglicht das Steuern des Ultraschallbilds, um die Nadeldarstellung während einer Biopsie zu verbessern.

Wenn die Nadel von der rechten Seite des Schallkopfs eingeführt wird, drücken Sie **Biopsiesteuerung** bis **Rechts** ausgewählt ist.

Wenn die Nadel von der linken Seite des Schallkopfs eingeführt wird, drücken Sie **Biopsiesteuerung** bis **Links** ausgewählt ist.

Panoramabild

Zur Panorama-Bildgebung werden beim Bewegen des Ultraschallkopfs über die ausgewählte Struktur (Structure of Interest) Einzelbilder aufgenommen. Durch Überlagerung dieser Einzelbilder wird dann ein zusammengesetztes Bild generiert. Ausgewählte Strukturen, die so groß sind, dass sie über das Sichtfeld des Ultraschallkopfes hinausgehen, lassen sich so visualisieren und messen.



TIPP

Tragen Sie eine ausreichende Menge Ultraschallgel auf dem zum Scan ausgewählten Segment auf, um eine gleichmäßige Bewegung während der Panoramaaufnahme sicherzustellen.

START DER PANORAMA-BILDGEBUNG

Die Funktion zur Panorama-Bildgebung steht für die Ultraschallsonden SL15-4, SLH20-6 und SL10-2 zur Verfügung.



Drücken Sie **Panoramabild** auf dem Touchscreen.

Im System wird der Standby-Modus für die Panorama-Bildgebung aufgerufen.



AUFNAHME VON PANORAMABILDERN

1. Passen Sie die verfügbaren Aufnahmeparameter an, um Bildqualität und Einzelbildrate zu optimieren.
2. Drücken Sie **Auswählen**, um mit der Aufnahme zu beginnen.



ANMERKUNG

Sie können die Taste **S** zum Starten der Panoramaaufnahme in der Systemkonfiguration einrichten.

3. Bewegen Sie den Schallkopf gleichmäßig und kontinuierlich über die ausgewählte Struktur. Achten Sie darauf, die Scanbewegung möglichst parallel zur Scanebene auszuführen.
Das System erkennt die Richtung der Schallkopfbewegung automatisch, und das zusammengesetzte Bild wird dementsprechend erstellt.
4. Scannen Sie ggf. in einer Rückwärtsbewegung, um unerwünschte Teile des zusammengesetzten Panoramabilds zu löschen. Fahren Sie dann mit dem Scanvorgang in der ursprünglichen Bewegungsrichtung fort.
5. Drücken Sie **Einfrieren**.
Auf dem System wird das vollständig zusammengesetzte Bild angezeigt.



EMPFEHLUNGEN ZUM SCHALLEN

- Stellen Sie sicher, dass die zu schallende Fläche flach oder leicht kurvig ist, um zu verhindern, dass Gewebeflächen durch Rauschen oder fehlende Strukturdetails beherrscht werden.

- Tragen Sie großzügig Gel auf und wenden Sie ausreichenden (aber keinen übermäßigen) Druck auf den Schallkopf aus, um während der Panoramaaufnahme für guten Hautkontakt zu sorgen.
- Achten Sie beim Schallen auf eine langsame und gleichmäßige Bewegung ohne Wackeln, Verdrehen oder plötzliche Richtungsänderungen, und bleiben Sie möglichst auf derselben Schallebene.



WARNUNG

- Fehler bei der Aufnahme von Panoramabildern zeigen sich durch das Vorhandensein von Artefakten wie Bildlücken, unregelmäßiger Kontur von Hautlinien sowie gezackten Kanten, deutlich sichtbaren „Nähten“ zwischen aufeinanderfolgenden Einzelbildern und verschwommenen oder schlecht definierten Bereichen. Sollten derartige Artefakte auftreten, wird ausdrücklich empfohlen, das aktuelle zusammengesetzte Panoramabild zu verwerfen und die Panoramaaufnahme zu wiederholen.



ANMERKUNG

- Alle vom zusammengesetzten Panoramabild abgeleiteten Messungen werden mit einem Sternchen gekennzeichnet, um anzuzeigen, dass es sich um geschätzte Messergebnisse und möglicherweise fehlerhafte Aufnahmen der Panoramabilder handelt.
- Wenn die zu vermessende Struktur in das Sichtfeld des Schallkopfs passt, wird dringend empfohlen, einen standardmäßigen B-Modus-Bildrahmen und nicht das zusammengesetzte Panoramabild zu verwenden.

BEARBEITEN VON PANORAMABILDERN

Anzeige



Verwenden Sie die Funktionalität **Zoom** wie im regulären B-Modus.

Verwenden Sie die Funktionalität **Pan** wie im regulären B-Modus.

Verwenden Sie die Taste **Drehen** oder den **TouchRing™**, um das zusammengesetzte Panoramabild zu drehen.

Verwenden Sie den Knopf **Glättung**, um abrupte Übergänge zwischen den Einzelbildern im zusammengesetzten Panoramabild zu glätten.

Zuschneiden



Zuschneiden ermöglicht das Verwerfen von Einzelbildern zu Beginn oder am Ende der Panoramaaufnahme, so dass diese nicht Teil des zusammengesetzten Panoramabilds werden.

1. Drücken Sie auf „Zuschneiden“ auf dem Touchscreen, um den Vorgang zu starten

Der Trackball wird eingestellt auf **Zuschneiden – Start**.

2. Verschieben Sie den Trackball zum Ende der Panoramaaufnahme, um die ausgewählten Einzelbilder vom Anfang der Aufnahme zu verwerfen.

3. Drücken Sie **Auswählen**, um den Trackball auf „Zuschneiden - Ende“ einzustellen.

4. Verschieben Sie den Trackball an den Anfang der Panoramaaufnahme, um die ausgewählten Einzelbilder vom Ende der Aufnahme zu verwerfen.

5. Deaktivieren Sie **Zuschneiden**, um die zugeschnittenen Einzelbilder auszuschneiden.

Das verbliebene zusammengesetzte Panoramabild wird automatisch auf die Bildschirmmaße vergrößert.

Drücken Sie **Zuschneiden zurücksetzen**, um die Einzelbilder von „Zuschneiden – Start“ und „Zuschneiden – Ende“ wieder am Start bzw. am Ende der Panoramaaufnahme anzufügen.

Hautlinien-Teilstriche



Hautlinien-Teilstriche ermöglicht das Anzeigen oder Ausblenden von Teilstrichen entlang der Hautlinie.

Drücken Sie auf **Hautlinien-Teilstriche** , um die Hautlinien-Teilstriche zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Glättung



Glättung ist ein Raumfilter, das zur Glättung der Panoramaaufnahme für ein homogeneres Erscheinungsbild verwendet wird.

Drehen Sie den Knopf unter **Glättung**:

- im Uhrzeigersinn, um die Glättung zu erhöhen
- gegen den Uhrzeigersinn, um die Glättung zu verringern.

DURCHFÜHREN VON MESSUNGEN AUF PANORAMABILDERN



Drücken Sie **Mess.** auf dem Bedienpult, um auf die für die Panoramaaufnahme verfügbaren Messungen zuzugreifen.



WARNUNG

- Führen Sie keine Messungen bei zusammengesetzten Panoramabildern durch, die mit erheblichen Ebenenabweichungen aufgenommen wurden (etwa beim Folgen einer gewundenen Struktur).
- Führen Sie keine Messungen auf Strukturen durch, die im zusammengesetzten Panoramabild äußerst echoarm und rauschstark angezeigt werden.

- Führen Sie keine Messungen bei zusammengesetzten Panoramabildern von sehr kurvigen Objekten wie transversalen Abschnitten durch Arm oder Bein durch.

Basismessungen (Distanz, Ellipse, Umfahren, ...) auf einem zusammengesetzten Panoramabild werden wie beim standardmäßigen B-Modus durchgeführt. Eine Beschreibung dieser Messungen finden Sie unter „**Basismessungen**“ [285].

Kurven Distanz Messungen

Sie können den Abstand einer Kurve auf der Panoramaaufnahme messen. Das Messwerkzeug „Kurven Distanz“ ist ähnlich dem Messwerkzeug „Umfahren“, jedoch ist die Kurven-Distanzspur nicht geschlossen. Die Kurven-Distanz-Messung erzeugt ein Abstandsmaß.

Durchführen einer Kurven-Distanzmessung:

1. Erstellen Sie die Panoramaaufnahme.
2. Drücken Sie **Mess.** auf dem Bedienpult
3. Drücken Sie **Kurven Distanz** auf dem Touchscreen
Ein erster Caliper wird angezeigt.
4. Verschieben Sie den ersten Caliper an die gewünschte Position.
5. Drücken Sie **Auswählen** zum Verankern des ersten Calipers.
6. Verschieben Sie den **Trackball** , um das Abfahren der Kurve zu starten.
7. Verwenden Sie den Knopf „Umfahren“, um die Spur bei Bedarf zu löschen.
8. Drücken Sie **Auswählen** , um die Messung abzuschließen.
Das System zeigt das Ergebnis der Kurven-Distanzmessung im Messergebnis-Bereich an.



SPEICHERN VON PANORAMABILDERN


Drücken Sie **Bild speichern** , um das aktuelle, zusammengesetzte Panoramabild zu speichern, damit es zu einem späteren Zeitpunkt überprüft, bearbeitet, zugeschnitten und vermessen werden kann.

BEENDEN DER PANORAMAAUFNAHME

Drücken Sie auf die Schaltfläche **Panoramabild** auf dem Touchscreen, um die Panoramafunktion auszuschalten und zu beenden.

Pulswellengeschwindigkeit (PWV)

PWV ermöglicht das Messen der Pulswellengeschwindigkeit (PWV) auf der Karotis.

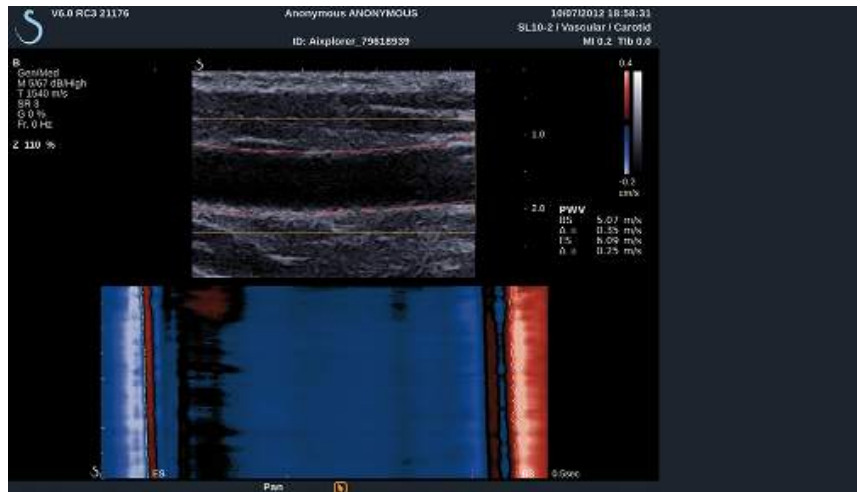

Die Pulswellengeschwindigkeit ist verknüpft mit der Arterienverhärtung, die als Indikator für mögliche zukünftige kardiovaskuläre Ereignisse herangezogen wird. Der bei jedem Herzschlag während der Systole erzeugte Blutdruck breitet sich im gesamten Arterienbaum in Form der so genannten „Pulswelle“ aus. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser „Pulswelle“ (die „Pulswellengeschwindigkeit“ oder „PWV“) hängt stark von der Steifigkeit der Arterienwand ab. Je steifer die Arterienwand ist, desto schneller ist die Pulswelle.



TIPP

Um einen stabilen arteriellen Druck sicherzustellen, muss sich der Patient in Ruhe befinden.

Erstellen Sie eine Längsansicht der Karotis, und zwar so weit wie möglich von der Karotidbifurkation entfernt.

Richten Sie die Arterienwände sorgfältig mit der Hautlinie des Schallkopfs aus. Um eine korrekte Ausrichtung mit dem Schallkopf in der Höhenebene sicherzustellen, ist darauf zu achten, dass der Intima-Media-Komplex auf dem Bild sichtbar ist.

SO WIRD DIE PWV-FUNKTION VERWENDET

Akquisition



1. Wählen Sie die **Karotis-Voreinstellung** in der vaskulären Anwendung
2. Führen Sie einen Scan im B-Modus durch, um die Karotis zu lokalisieren und eine Längsansicht der Karotis zu erhalten.
3. Wenn der Schallkopf ausgerichtet und die Bildgebungsebene stabil ist, drücken Sie auf **PWV** auf dem Touchscreen, um die Erfassung durchzuführen



ANMERKUNG

Sie können die Taste **S** zum Starten der PWV-Erfassung in der Systemkonfiguration einrichten.

4. Nicht bewegen, bis die Erfassung abgeschlossen ist.


Nachbearbeitung



1. Nach Abschluss der Erfassung wird ein Fenster auf dem Bild eingeblendet.
2. Verwenden Sie den **Trackball** , um das Fenster auf der Karotis zu positionieren
Das System erkennt automatisch die Arterienwände innerhalb des Fensters.
In einigen Fällen müssen Sie die Größe des Fensters evtl. ändern:
 - a. Drücken Sie auf **Zeiger** , um den Trackball auf **Größe ändern** einzustellen, und verwenden Sie den **Trackball** , um die Feldgröße zu ändern.
3. Drücken Sie auf **Auswählen** , um die Segmentierung zu validieren

Das System erkennt und verfolgt automatisch die Pulswelle und zeigt unten das B-Modus-Bild an:

- eine farbcodierte Karte der Durchmesserabweichungen (in cm/s) im Zeitablauf (Sekunden) und entlang des arteriellen Segments (in mm) bzw. der horizontalen und vertikalen Achse
- die erkannten Wellenfronten zu Beginn und zum Ende der Systole werden überlagernd auf der farbcodierten Karte der Durchmesserabweichungen angezeigt, ebenso wie ihre lineare Passform zur Ableitung der PWV
- die gemessene Pulswellengeschwindigkeit zu Beginn der Systole (BS) und zum Ende der Systole (ES) in m/s sowie die Varianz (Δ) in m/s.

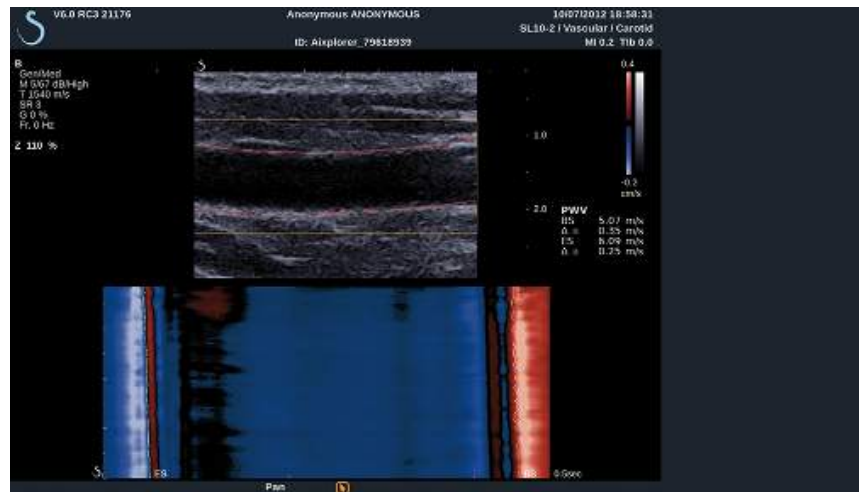

Tipps zum Schallen mit B-Modus



SCHALLEN MIT B-MODUS

Verwenden Sie für jedes Zielorgan geeignete Voreinstellungen.

Stellen Sie die Tiefe je nach gewünschtem Sichtfeld ein.

Positionieren Sie den Fokusbereich auf Tiefe des Zielbereichs oder leicht darunter.

Drücken Sie auf AutoTGC, um ein einheitliches Bild zu erhalten.

Stellen Sie die Gesamtverstärkung ein, um die richtige Helligkeit zu erzielen.

Stellen Sie TissueTuner™ ein, um eine optimale Auflösung zu erzielen.

Vergrößern Sie das Fokusfeld für einen größeren Fokusbereich und höhere Auflösung.

Verwenden Sie die Harmonische Bildgebung zur klaren Abgrenzung flüssigkeitsgefüllter Strukturen

Verwenden Sie die Res-Einstellung des Bedienelements Res/Fr.Rate für eine höhere Auflösung.

Verwenden Sie die Bildraten-Einstellung des Bedienelements Res/Fr.Rate für eine höhere zeitliche Auflösung.



ShearWave™-Elastographie

Die ShearWave™-Elastographie (SWE™) zeigt Informationen über die Gewebeelastizität in Form eines leicht auswertbaren farbkodierten Bildes an.


Die Elastizitätsdaten sind zudem quantitativ. Eine lokale Beurteilung der Gewebesteifigkeit wird pro Pixel dargestellt und kann in kPa innerhalb eines breiten Wertbereiches ausgedrückt werden.

Aufrufen von ShearWave™-Elastographie

Drücken Sie von jedem beliebigen Modus aus auf **SWE™** auf dem Bedienpult.



Hauptanzeige des SWE™-Modus

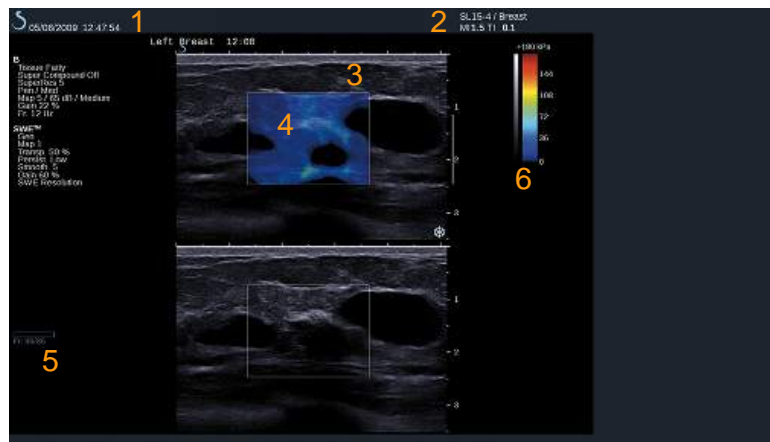

- 1. Untersuchungs- und Patientendaten
- 2. Schallkopf/Voreinstellung/ MI/TI
- 3. Ultraschallbild
- 4. Elastogramm


5. Clip-Speicher

6. Graustufen- und Elastizitätsbalken

SWE™-Modus-Touchscreen

Im SWE™-Modus werden auf dem Touchscreen verschiedene Bildeinstellungen angezeigt, die eine Optimierung des Elastizitätsbildes ermöglichen.

Es gibt 2 Seiten mit SWE™-Modus-Parametern. Diese Einstellungen lassen sich durch Berühren des Bedienelements auf dem Touchscreen oder durch Drehen des Drehknopfes direkt darunter regeln.

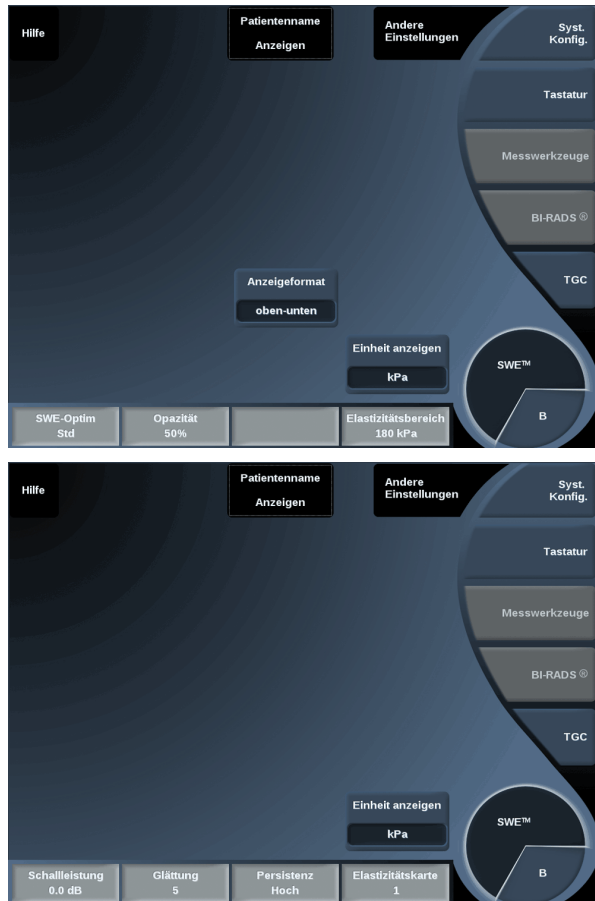

Sie können durch die Seiten blättern, indem Sie **Andere Einstellungen berühren**.

Beschreibung von SWE™-Parametern

SWE™-OPTIMIERUNG



SWE-Optim ermöglicht die Optimierung der Elastographie-Auflösung und Eindringtiefe für Ihren Schallbereich.

SWE-Optim ist nur im Live-Bildgebungsmodus verfügbar.

Drehen Sie den Knopf unter **SWE-Optim**:

- im Uhrzeigersinn, um den nächsten Wert einzustellen
- gegen den Uhrzeigersinn, um den vorherigen Wert einzustellen.

Sie können zwischen drei Einstellungen wählen:

- **Auflösung**

Verwenden Sie diese Einstellung bei der Bilddarstellung kleiner oberflächennaher Zielbereiche.

Mit dieser Einstellung werden zudem verfälschte Elastographiesignale aus Bereichen entfernt, in denen Flüssigkeit vermutet wird.

- **Standard**

Diese Einstellung wird zwischen Auflösung und Eindringtiefe abgestimmt.

Verwenden Sie diese Einstellung als Standard-Ausgangspunkt zur Beurteilung der Steifigkeit eines Zielobjekts.

- **Eindringtiefe**

Verwenden Sie diese Einstellung bei der Bilddarstellung tiefer gelegener oder größerer Bereiche (echofrei bzw. hypoechoisch), die auf dem Echobild möglicherweise Ausfälle aufweisen können.

In diesen Bereichen wird Steifigkeit vermutet und sie erfordern einen für Hochgeschwindigkeits-Transversalwellen optimierten Eindringmodus.

ANZEIGEEINHEIT



Dieses Steuerelement ermöglicht die Änderung der Farbbalkenskala für SWE™ von kPa auf m/s.

Einheit anzeigen ist im Live-Modus und bei fixiertem Bild verfügbar.

Berühren Sie **Einheit anzeigen**, um den Wert zu ändern.

ELASTIZITÄTSBEREICH



Der **Elastizitätsbereich** im SWE™-Modus sieht in etwa wie der dynamische Bereich im B-Modus aus. Er ändert den angezeigten elastischen Höchstwert.

Der Geschwindigkeitsbereich dient zur Komprimierung des Farbbildes für eine bessere Ansicht von Gewebe mit unterschiedlicher Steifigkeit. Er wirkt sich nicht auf die tatsächlichen Elastizitätswerte aus, sofern diese innerhalb des Elastizitätsbereichs liegen.

Elastizitätsbereich ist im Live-Bildgebungsmodus oder bei fixiertem Bild verfügbar.

Drehen Sie den Knopf unter **Elastizitätsbereich**:

- im Uhrzeigersinn, um den Elastizitätsbereich zu vergrößern
- gegen den Uhrzeigersinn, um den Elastizitätsbereich zu verringern.

Elastizitätsbereich wird in kPa angezeigt. Die dargestellten Werte sind abhängig von der gewählten Anwendung.

Steifes Gewebe sollte gelb, orange oder rot angezeigt werden.

Erhöhen Sie den **Elastizitätsbereich**, wenn Sie vorwiegend dunkelrot in der Farbbox sehen.

GESCHWINDIGKEITSBEREICH

Der **Geschwindigkeitsbereich** funktioniert genauso wie der **Elastizitätsbereich**.

Geschwindigkeitsbereich wird angezeigt und ersetzt den **Elastizitätsbereich**, wenn die **Anzeigeeinheit** auf **m/s** eingestellt ist.

Er ändert den angezeigten Geschwindigkeitshöchstwert.

Der Geschwindigkeitsbereich dient zur Komprimierung des Farbbildes für eine bessere Ansicht von Gewebe mit unterschiedlicher Steifigkeit.

Er wirkt sich nicht auf die tatsächlichen Geschwindigkeitswerte aus, sofern diese innerhalb des Geschwindigkeitsbereichs liegen.

ANZEIGEFORMAT

Dieses Steuerelement ändert das Format, in dem B-Modus- und SWE™-Bilder auf der Hauptanzeige dargestellt werden.

Anzeigeformat ist im Live-Bildgebungsmodus und bei fixiertem Bild verfügbar.

Drücken Sie **Anzeigeformat**, bis das gewünschte Format angezeigt wird. Das Oben/Unten-Format ist die Standardeinstellung.

Drei Formate stehen zur Verfügung:

- Oben/Unten
- Nebeneinander
- Einzeln



OPAZITÄT

Opazität erlaubt das Ändern der Transparenz der Elastizitätskarte über dem B-Bild.

Opazität ist im Live-Bildgebungsmodus und bei fixiertem Bild verfügbar.

Drehen Sie den Knopf unter **Opazität**:

- im Uhrzeigersinn, um das Farbbild über dem B-Bild stärker hervorzuheben
- gegen den Uhrzeigersinn, um das Farbbild über dem B-Bild weniger hervorzuheben.



Opazität reicht von 0 bis 100 %.
Die Standardeinstellung ist 50%.

ELASTOGRAMM KARTE

Elastizitätskarte legt fest, wie die Elastizitätsbalken in Farbabstufungen dargestellt werden

Elastizitätskarte ist im Live-Bildgebungsmodus und bei fixiertem Bild verfügbar.

Drehen Sie den Knopf unter **Elastizitätskarte**:

- im Uhrzeigersinn, um die nächste Karte anzuzeigen
- gegen den Uhrzeigersinn, um die vorherige Farbkarte anzuzeigen.



SCHALLEISTUNG

Schalleistung zeigt die akustische Ausgangsleistung an.

Schalleistung ist nur im Live-Modus verfügbar.

Drehen Sie den Knopf unter **Schalleistung**:

- im Uhrzeigersinn, um die Schalleistung zu erhöhen
- gegen den Uhrzeigersinn, um die Schalleistung zu senken.



Schalleistung liegt zwischen 0 dB und -30 dB.

GLÄTTUNG

Glättung ist ein Raumfilter, der zur Glättung der Elastizitätsbalken für ein homogeneres Erscheinungsbild verwendet wird.

Glättung ist nur im Live-Bildgebungsmodus verfügbar.

Drehen Sie den Knopf unter **Glättung**:

- im Uhrzeigersinn, um die Glättung zu erhöhen
- gegen den Uhrzeigersinn, um die Glättung zu verringern.





PERSISTENZ

Dieses Bildmittelungsverfahren verringert Bildrauschen.

Persistenz ist nur im Live-Bildgebungsmodus verfügbar.

Drehen Sie den Drehknopf unter **Persistenz**:

- im Uhrzeigersinn, um die Persistenz zu erhöhen
- gegen den Uhrzeigersinn, um die Persistenz zu verringern.

Q-BOX™

Siehe „Q-Box™“ [301].

Q-BOX™ RATIO

Siehe „Q-Box™ Ratio“ [302].

Tipps zum Schallen mit SWE™



SCHALLEN MIT SWE™

Denken Sie stets an die 3 S:

Softly, Smoothly, Slowly


Scan **Softly**: Es ist kein manueller Druck erforderlich (mit Ausnahme der interkostalen Leberszintigraphie), lediglich ein sanfter Kontakt und viel Gel zwischen der Haut und dem Schallkopf

Scan **Smoothly**: Der Schallkopf leitet die Schwingungen automatisch in das Gewebe; lassen Sie ihn einfach über die Haut gleiten, er muss weder geschüttelt noch angedrückt werden

Scan **Slowly**: Passen Sie die Abtastgeschwindigkeit an die Bildrate an. Vermeiden Sie bei der Bilddarstellung des Zielbereiches jegliche Bewegung und warten Sie, bis das Bild stabilisiert ist.

Beginnen Sie stets mit der Voreinstellung Standard für SWE Opt und gehen Sie dann auf Auflösung oder Eindringtiefe, um die Feineinstellung des Bildes vorzunehmen.

Bedienelemente, die im Live- oder Fixier-Modus verwendet werden können, wie Elastogramm Anzeigeformat usw., sollten der Einfachheit halber nach der Fixierung eingesetzt werden, da während der Elastographie die Hand unbedingt stillgehalten werden muss.

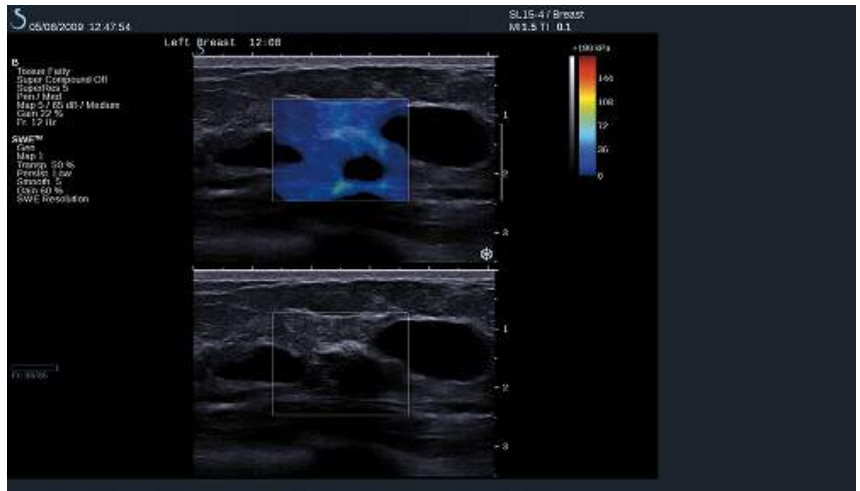

Farb-Modus Bildgebung

Farbbildgebungsmodi arbeiten nach dem Doppler-Prinzip, um ein Farbbild der mittleren Flussgeschwindigkeit oder Flussleistung zu erzeugen.

Das Aixplorer® Ultraschallsystem verfügt über drei Farbmodi: Farbkodierte Flussdarstellung (CFI), Color-Power-Darstellung (CPI) und Direktionale Color-Power-Darstellung (DCPI).


Die verschiedenen Farb-Modi

Farbbildgebungsmodi arbeiten nach dem Doppler-Prinzip, um ein Farbbild der mittleren Flussgeschwindigkeit oder Flussleistung zu erzeugen.

Im Bildschirm Aixplorer® Ultraschallsystem verfügt über drei Farbmodi: Farbkodierte Flussdarstellung (CFI), Color-Power-Darstellung (CPI) und Direktionale Color-Power-Darstellung (DCPI).


COLOR FLOW IMAGING (CFI)

Die farbkodierte Flussdarstellung ist ein Doppler-Modus, der zur Lieferung farbkodierter quantitativer Informationen zur relativen Flussgeschwindigkeit und Richtung des Blutflusses im B-Modus Bild dient.

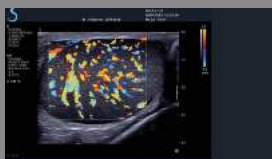


COLOR POWER IMAGING (CPI)

Color-Power Imaging ist ein Farb-Doppler-Verfahren zur Abbildung der Stärke des Doppler-Signals aus dem Blutfluss und nicht aus der Frequenzverschiebung des Signals. Anhand dieses Verfahrens stellt das Ultraschallsystem die Stärke des Blutstroms dar, wobei von der Anzahl der Reflektoren in Bewegung und nicht von ihrer Geschwindigkeit ausgegangen wird. Die Strömungsgeschwindigkeit wird in CPI nicht abgebildet.

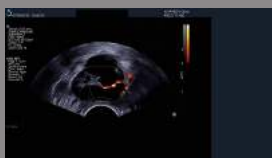

DIRECTIONAL COLOR POWER IMAGING (DCPI)

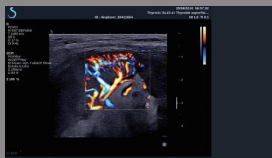

Directional Color Power Imaging (DCPI) ist ein neuer Flussdarstellungsmodus, der die beiden bestehenden Flussdarstellungsmodi, Color Flow Imaging (CFI) und Color Power Imaging (CPI), ergänzt. Die DCPI zeigt die mittlere Doppler-Frequenz jedes Pixels in der Farbbox an, inklusive der relativ zum Schallkopf verlaufenden Flussrichtung.


Die im DCPI benutzten Farbskalen sind zweigeteilt. Im Allgemeinen enthalten sie rote und blaue Farbabstufungen, wobei positive Doppler-Frequenzen (Blutflussrichtung zum Schallkopf) auf dem oberen Teil der DCPI-Farbskala und negative Doppler-Frequenzen (Blutflussrichtung vom Schallkopf weg) im unteren Teil der Farbskala dargestellt werden. Der Vorteil des DCPI liegt darin begründet, dass die Flussrichtung in den Zielgefäßen sowie Regionen mit hoher Flussgeschwindigkeit (Aliasing), Flussumkehrungen usw. dargestellt werden.

Aufrufen der Farbmodi

Drücken Sie von jedem beliebigen Modus aus auf **COL** auf dem Bedienpult.



Hauptanzeige der Farbmodi

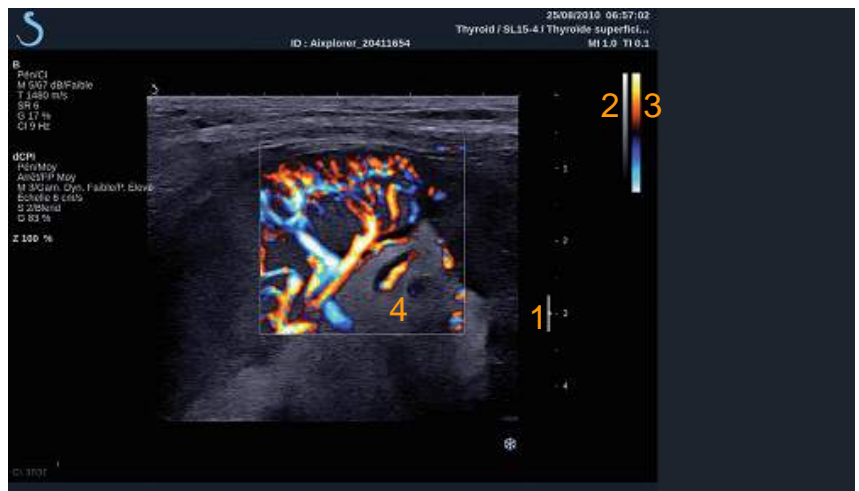

1. Fokusbereich
3. Farbbalken

2. Graustufenanzeige
4. Farbbox

Farbmodi-Touchscreen

Im Farbmodus werden auf dem Touchscreen verschiedene Bildeinstellungen angezeigt, die eine Optimierung des Farbbildes ermöglichen.

Es gibt zwei Seiten mit Farbparametern. Diese Einstellungen lassen sich durch Berühren des Bedienelements auf dem Touchscreen oder durch Drehen des Drehknopfes direkt darunter regeln.



Sie können durch die Seiten blättern, indem Sie **Andere Einstellungen berühren**.

Beschreibung der Farbbild-Parameter

FARB-MODUS

Farb-Modus ermöglicht das Wechseln zwischen CFI, DCPI und CPI. **Farb-Modus** ist nur im Live-Bildgebungsmodus verfügbar. Berühren Sie **Farb-Modus**, um den gewünschten Modus auszuwählen.



DUAL

Siehe „Dual“ [182].

RES/PEN

Res/Pen ermöglicht die Änderung der Mittenfrequenz für eine erhöhte Auflösung oder erhöhte Eindringtiefe.

Res/Pen ist nur im Live-Bildgebungsmodus verfügbar.

Drücken Sie **Res/Pen**, um die Werte zu ändern.

Die orangefarbene LED-Anzeige weist auf den aktiven Wert hin:

- LED links: Res (Auflösung)
- LED Mitte: Gen (Allgemein)
- LED rechts: Pen (Eindringtiefe)



HD/FR. RATE

HD/Fr. Rate ermöglicht die Einstellung der Bildrate und Liniendichte für eine erhöhte räumliche oder zeitliche Auflösung.

Drei Optionen stehen zur Auswahl:

- HD (Hochauflösend): LED links
- Mittel: LED Mitte



- Fr. Rate (Bildrate): LED rechts

Berühren Sie **HD/Fr. Rate** , um den Wert zu ändern.

INVERTIEREN

Invertieren ermöglicht, die Farbdarstellung des Blutflusses umzukehren, d.h. rot weg vom Schallkopf (negative Geschwindigkeit) und blau zum Schallkopf hin (positive Geschwindigkeit).

Invertieren ist im Live-Bildgebungsmodus und bei fixiertem Bild verfügbar.

Invertieren ist nur im CFI-Modus verfügbar.

Berühren Sie **Invertieren** , um diese Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.



SKALA

Skala ermöglicht die Einstellung der angezeigten maximalen Geschwindigkeit.

Skala ist nur im Live-Bildgebungsmodus verfügbar.

Drehen Sie den Knopf unter **Skala**:

- im Uhrzeigersinn, um die Skalaeinstellung zu erhöhen
- gegen den Uhrzeigersinn, um die Skalaeinstellung zu verringern.



FARBE AUSBLENDEN

Farbe ausblenden blendet die Farbinformationen über dem B-Modus-Bild aus.

Farbe ausblenden ist im Live-Bildgebungsmodus und bei fixiertem Bild verfügbar.

Berühren Sie **Farbe ausblenden** , um diese Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.



WANDFILTER



Dieser Parameter filtert langsame Signale heraus.

Er hilft, durch Bewegungen des Patienten oder Schallkopfes verursachte Bewegungsartefakte zu verringern. **Wandfilter** ist nur im Live-Bildgebungsmodus verfügbar.

Berühren Sie **Wandfilter** , bis Sie die gewünschte Einstellung ausgewählt haben.

GESCHWINDIGKEITS-OPTIMIERUNG



FlussOpt. die schnelle Optimierung mehrerer Parameter mit nur einem Bedienelement, um die gewünschte Flussoptimierung zu erzielen.

FlussOpt. ändert die folgenden Parameter:

- Skala
- Wandfilter
- Auflösung/Bildrate
- Persistenz

FlussOpt. ist nur im Live-Bildgebungsmodus verfügbar.

Berühren Sie **FlussOpt.** , bis Sie die gewünschte Einstellung ausgewählt haben.

NEBENEINANDER



Nebeneinander ermöglicht das Aufteilen des Bildschirms in zwei Live-Bereiche:

- Die linke Seite zeigt nur den B-Modus an, als Referenz.
- Die rechte Seite zeigt den B-Modus und das Farbbild an.

NULLLINIE



Nulllinie ist eine horizontale grafische Linie auf der Farbkarte, die die Nulllinie der Schallgeschwindigkeit darstellt.

Die Nulllinienposition dient zur Festlegung der maximalen positiven und negativen Geschwindigkeiten.

Durch Ändern der Nulllinienposition wird die maximale positive Geschwindigkeit erhöht und die maximale negative Geschwindigkeit verringert, oder umgekehrt.

Nulllinie ist nur im Live-Bildgebungsmodus und bei einem fixierten Bild verfügbar.

Drehen Sie den Knopf unter **Nulllinie**:

- im Uhrzeigersinn, um die maximalen positiven Geschwindigkeiten zu erhöhen
- gegen den Uhrzeigersinn, um die maximalen negativen Geschwindigkeiten zu erhöhen.

Hinweis: Die **Nulllinie** ist nur im CFI-Modus verfügbar. Im CPI-Modus wird die Funktion ersetzt durch **Dynam. Bereich**.

Dynam. Bereich ermöglicht die Änderung des Bereichs, in dem die Amplituden der Echosignale dargestellt werden. Er zeigt das gleiche Verhalten wie die **Nulllinie**.

QUICK STEER (SCHNELLE STEUERUNG)



Quick Steer (Schnelle Steuerung) ermöglicht die schnelle Steuerung des Schallstrahls.

Drücken Sie **Quick Steer (Schnelle Steuerung)**, um den Wert zu ändern.

Verwenden Sie den Knopf **Steuerung** für Feineinstellungen.

STEUERUNG



Für eine maximale Sensitivität und Genauigkeit der Farb-Doppler-Modi wird in der Regel empfohlen, die Doppler-Untersuchungen bei einem Dopplerwinkel von max. 60 Grad zwischen Ultraschallstrahl und Gefäßrichtung durchzuführen.

Steuerung ist nur im Live-Bildgebungsmodus verfügbar.

Drehen Sie den Knopf unter **Steuerung**, um die Farbbox zu steuern.

SCHALLLEISTUNG



Schallleistung zeigt die akustische Ausgangsleistung an.

Schallleistung ist nur im Live-Modus verfügbar.

Drehen Sie den Knopf unter **Schallleistung**:

- im Uhrzeigersinn, um die Schallleistung zu erhöhen
- gegen den Uhrzeigersinn, um die Schallleistung zu senken.

Schallleistung liegt zwischen 0 dB (max.) und -20 dB (min.).

GLÄTTUNG



Glättung ist ein Raumfilter, der zur Glättung des Farbbildes für ein homogeneres Erscheinungsbild verwendet wird.

Glättung ist nur im Live-Bildgebungsmodus verfügbar.

Drehen Sie den Knopf unter **Glättung**:

- im Uhrzeigersinn, um die Glättung zu erhöhen
- gegen den Uhrzeigersinn, um die Glättung zu verringern.

PERSISTENZ

Dieses Bildmittelungsverfahren verringert Bildrauschen.

Persistenz ist im Live-Bildgebungsmodus und bei einem fixierten Bild (zur Ansicht von Clips) verfügbar.

Drehen Sie den Drehknopf unter **Persistenz**:

- im Uhrzeigersinn, um die Persistenz zu erhöhen
- gegen den Uhrzeigersinn, um die Persistenz zu verringern.



FARBPRIORITÄT

Farbpriorität ermöglicht die Auswahl eines Grenzwertes, jenseits dessen Flussgeschwindigkeiten farbig dargestellt werden.

Farbpriorität ist im Live-Bildgebungsmodus und bei fixiertem Bild verfügbar.

Drehen Sie den Knopf unter **Farbpriorität**:

- im Uhrzeigersinn, um die Farbpriorität zu erhöhen
- gegen den Uhrzeigersinn, um die Farbpriorität zu verringern

Bereich und Standard-Wert sind von der Anwendung abhängig.



COLOR MAP

Color Map legt fest, wie die Blutflusswerte in Farbabstufungen dargestellt werden.

Color Map ist im Live-Bildgebungsmodus und bei fixiertem Bild verfügbar.

Drehen Sie den Knopf unter **Color Map**:

- im Uhrzeigersinn, um zur nächsten Color Map zu gehen
- gegen den Uhrzeigersinn, um zur vorhergehenden Color Map zu gehen



ABMISCHUNG



Mit dieser Taste wird der Transparenzgrad des Farbbildes über dem B-Modus-Bild eingestellt.

Wenn **Abmischung** aktiviert ist, wird das Graustufenbild nahtlos vom Farbbild überlagert.

Wenn **Abmischung** deaktiviert ist, ist der Übergang zwischen B-Modus und Farbe deutlicher.

Abmischung ist im Live-Bildgebungsmodus und bei fixiertem Bild verfügbar.

Drücken Sie **Abmischung**, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

FLASH-UNTERDRÜCKUNG



Flash-Unterdrückung nutzt eine anpassbare Wandfilter-Funktion, um damit die durch Gewebewegung entstehenden Flash-Artefakte zu unterdrücken.

Bei eingeschalteter **Flash-Unterdrückung** reduziert sich die Bildrate.

Flash-Unterdrückung ist nur im Live-Bildgebungsmodus verfügbar.

Drücken Sie **Flash-Unterdrückung**, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

ULTRAFASTM DOPPLER DAUER

UltraFastTM Doppler-Dauer erlaubt die Auswahl der Dauer von **UltraFastTM-Doppler-Akquisition**.

Berühren Sie **UltraFastTM Doppler-Dauer**, bis Sie die gewünschte Einstellung ausgewählt haben.

ULTRAFAST™ DOPPLER AKQUISITION



UltraFast™-Doppler-Akquisition macht eine prospektive Aufnahme der CFI, CPI oder dCPI bei hoher Bildrate.

UltraFast™-Doppler-Akquisition ist nur verfügbar mit den Schallköpfen SL10-2 und SC6-1.

Nach Auswahl der Bildgebungsebene drücken Sie auf **UltraFast™-Doppler-Akquisition**, um die Akquisition durchzuführen.

Bewegen Sie den Schallkopf nicht, solange die Meldung „Aufnahme...“ auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Nach der Aufnahme haben Sie Zugang zu den folgenden Steuerelementen:

Farbverstärkung

Drehen Sie den **COL** -Knopf, um die Verstärkung im Review-Modus zu ändern:

- im Uhrzeigersinn, um die Verstärkung zu erhöhen
- gegen den Uhrzeigersinn, um die Verstärkung zu verringern



Anzeigeformat

Anzeigeformat ermöglicht das Ändern des Ansichtsmodus wie folgt:

- **Vollbild** zeigt nur das Bild an
- **Quad** gliedert den Bildschirm in 4 Teile auf: Clip, Mean Velocities (Mittlere Geschwindigkeiten), Peak Systolic Frame (Systolische Höchstgeschwindigkeit) und Max Velocities (Max. Geschw.)





- **Spektrogram** zeigt oben das Bild und darunter die Spektrogramme an.

Drücken Sie auf **Anzeigeformat** , bis das gewünschte Format angezeigt wird.



Die Schaltfläche neben **Anzeigeformat** ermöglicht die Bildsteuerung:

Clip ermöglicht das Scrollen durch den UltraFast™ Doppler-Clip.

- **PS** zeigt das Bild des UltraFast™ Doppler-Clips mit der systolischen Höchstgeschwindigkeit an.
- **Max.** zeigt ein berechnetes Bild an, das der Höchstgeschwindigkeit eines jeden Pixels im UltraFast™ Doppler-Clip entspricht.
- **Mittelwert** zeigt ein berechnetes Bild an, das der mittleren Geschwindigkeit eines jeden Pixels im UltraFast™ Doppler-Clip entspricht.

Drücken Sie den gewünschten Teil der Schaltfläche, um den Ansichtsmodus zu ändern.



Bild systolische Spitze anzeigen

Dieses Steuerelement ermittelt automatisch das Einzelbild mit der Höchstgeschwindigkeit im UltraFast™ Doppler CFI Clip-Speicher.

Color Map

Siehe „[Color Map](#)“ [226].

Abmischung

Siehe „[Abmischung](#)“ [227].

Farbe ausblenden

Siehe „[Farbe ausblenden](#)“ [222].


Persistenz

Siehe „[Persistenz](#)“ [226].

Farbpriorität

Siehe „[Farbpriorität](#)“ [226].

Spektrogramm hinzufügen

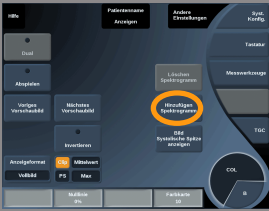

Im UltraFast™ Doppler-Modus haben Sie die Möglichkeit, bis zu 3 Abtastvolumina auf dem ausgewählten Bild hinzuzufügen, um simultane Spektrogramme zu berechnen.

1. Drücken Sie **Spektrogramm hinzufügen** um ein Spektrogramm hinzuzufügen.
2. Verwenden Sie den **TouchRing™**, um die Größe des Abtastvolumens zu verändern.
3. Bewegen Sie den **Trackball**, um das Abtastvolumen auf dem Bild zu orten und das Spektrogramm zu aktualisieren

Das aktive Spektrogramm wird orange umrandet angezeigt.

Drücken Sie auf dem Bedienpult auf **Auswählen**, um das aktive Spektrogramm zu ändern.

Sie können Messungen zum aktiven Programm hinzufügen. Siehe [„Messungen durchführen“ \[285\]](#).

Nach dem Hinzufügen eines Spektrogramms haben Sie Zugriff auf verschiedene PW-Parameter und Tools.

Spektrogramm löschen



Mit dieser Option werden das aktive Spektrogramm und das zugehörige Abtastvolumen aus dem Bild gelöscht.

Wandfilter

Siehe [„Wandfilter“ \[223\]](#).

Diese Option ist im Review-Modus im UltraFast™ Doppler-Modus verfügbar.

Ablenkgeschwindigkeit

Siehe „[Ablenkgeschwindigkeit](#)“ [244].

Die folgenden Parameter können Sie für die einzelnen aktiven Spektrogramme ändern:

Dynam. Bereich

Siehe „[Dynam. Bereich](#)“ [241].

Skala

Siehe „[Skala](#)“ [243].

Glättung

Siehe „[Glättung](#)“ [225]

Grobe Winkelkorrektur

Siehe „[PW Winkel Grob](#)“ [240].

PW Winkel fein

Siehe „[PW Winkel fein](#)“ [241].

PW-Map

Siehe „[PW-Map](#)“ [242].

Invertieren


Siehe „[Invertieren](#)“ [242].

PW-Verstärkung




Drehen Sie den **PW** -Knopf, um die Verstärkung im Review-Modus zu ändern:

- im Uhrzeigersinn, um die Verstärkung zu erhöhen
- gegen den Uhrzeigersinn, um die Verstärkung zu verringern

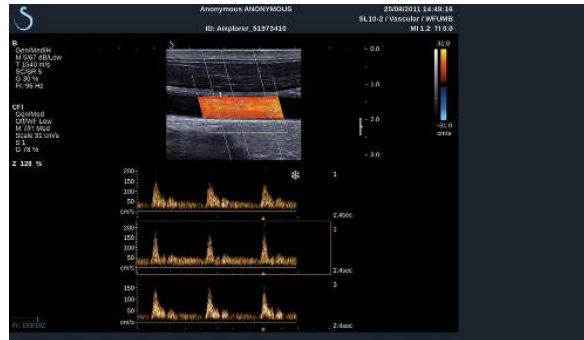

ANGIOPLUS

AngioPLUS ist eine Optimierung des Farb-Modus, zur besseren Darstellung von langsamen Durchflüssen. Es kann bei den Anwendungen Brust, MSK, Abdomen und Schilddrüse auf den Schallköpfen SL10-2 und SL15-4 verwendet werden.

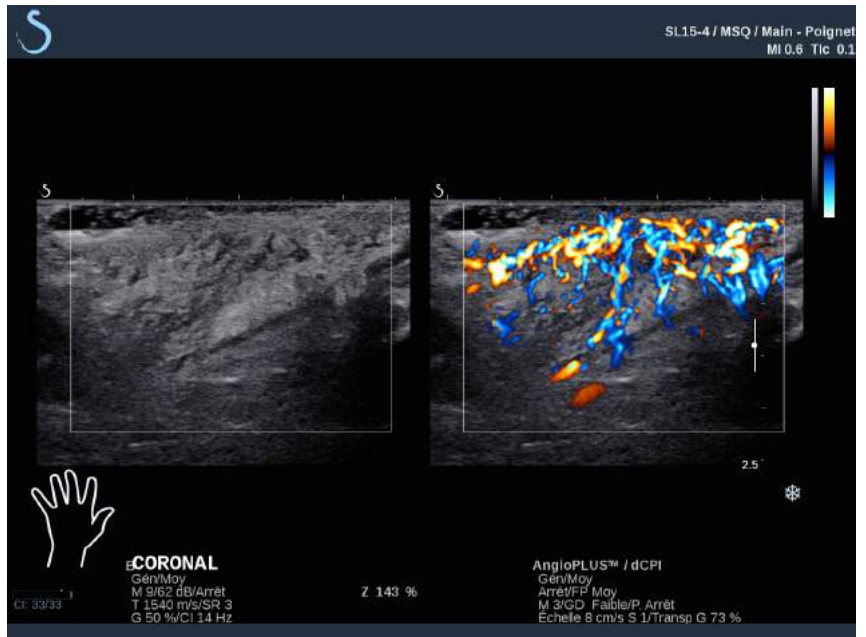

1. Drücken Sie auf **Schallkopf**
2. Wählen Sie die entsprechende Anwendung und Voreinstellung aus.
3. Optimieren Sie das B-Modus-Bild
4. Drücken Sie **Farbe**
5. Drücken Sie **AngioPLUS RT** auf dem Touchscreen
6. AngioPLUS ist im Live-Modus
7. Wählen Sie die betreffende Ebene
8. Drücken Sie **AngioPLUS HD-Akquisition** für eine verbesserte Leistung
9. Ein prospektiver Clip wird aufgenommen.
10. Das System fixiert die Aufnahme
11. Überprüfen Sie den Clip

Tipps zum Schallen in FARBE



SCHALLEN IN FARBE

Versuchen Sie beim Schallen den optimalen Winkel für maximale Flusssensitivität zu erzielen.

Verwenden Sie den TouchRing™, um ggf. die Größe der Farbbox zu ändern. Eine größere Box führt zu einer verringerten zeitlichen Auflösung (Bildrate).

Erhöhen Sie die Farbverstärkung, bis Sie Rauschen sehen und verringern Sie dann die Verstärkung bis zur Eliminierung des Rauschens. So stellen Sie sicher, die bestmögliche Farb-Doppler-Sensitivität zu erzielen.

Beim Schallen kleinerer Gefäße (d. h. Brust, Schilddrüse) ist Mittensteuerung in der Regel die beste Wahl. Bei größeren Gefäßen (d. h. Karotis, Arteria axillaris) steuern Sie die Farbbox, um den optimalen (kleinsten) Winkel zum Fluss zu erzielen. Haben Sie den besten Steuerwinkel ausgewählt, so werden Sie eine Veränderung der Sensitivität bemerken.

Wählen Sie den geeigneten Wert zur Geschwindigkeitsoptimierung je nach Art der zu schallenden Gefäße.

Niedrig wird normalerweise für kleinere Gefäße mit niedrigeren Geschwindigkeiten und Venen verwendet.

Hoch wird normalerweise für größere Gefäße mit höheren Geschwindigkeiten und Arterien verwendet.

Zur Erhöhung der Flusssensitivität können Sie die Einstellungen von Skala oder Wandfilter verringern.

Zur Beseitigung von Aliasing (nur CFI) erhöhen Sie Skala.

Bewegen Sie den Schallkopf während der Aufnahme eines UltraFast™ Doppler CFI-Clips nicht.

Pulsed Wave Doppler Modus

Pulsed Wave Doppler (PW) ist ein Doppler-Modus, der die Geschwindigkeit des Blutflusses innerhalb eines kleinen Bereichs, des sogenannten Doppler-Abtastvolumens, misst.

Diese Informationen werden als umfassende Anzeige der Geschwindigkeit (oder Doppler-Frequenz) im Zeitablauf dargestellt. Diese Darstellung wird auch Spektral-Doppler-Kurve oder nur Doppler-Kurve (Doppler Trace) genannt. Die Informationen können auch als Stereoton gehört werden.


Zusätzlich zur Doppler-Geschwindigkeitsanzeige wird auch ein Ultraschallbild (nur Graustufe oder Graustufe und Farbe) als Leitfaden zur richtigen Positionierung des Doppler-Abtastvolumens angezeigt.

Aufrufen des PW-Modus

Drücken Sie **PW** auf dem Bedienpult von jedem beliebigen Modus aus.



Hauptanzeige des PW-Modus

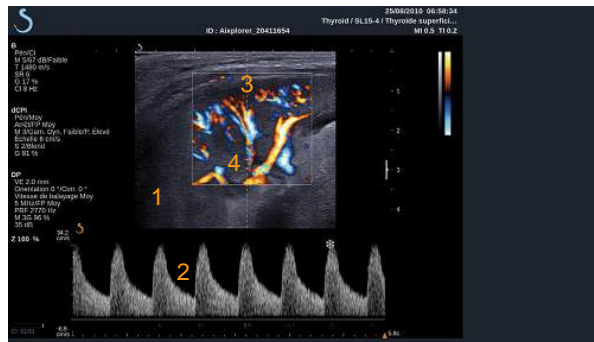

1. Graustufenbild

2. Spektralanzeige

3. Doppler-Linie

4. Abtastvolumen

PW-Modus Touch Screen

Im PW-Modus werden auf dem Touchscreen verschiedene Bildeinstellungen angezeigt, die eine Optimierung des PW-Bildes und der Kurve ermöglichen.

Es gibt 2 Seiten mit PW-Parametern. Diese Einstellungen lassen sich durch Berühren des Bedienelements auf dem Touchscreen oder durch Drehen des Drehknopfes direkt darunter regeln.



Sie können durch die Seiten blättern, indem Sie **Andere Einstellungen berühren**.

Einrichten des PW-Modus

DOPPLER-LINIE



Bewegen Sie den **Trackball** nach links und rechts, um die Doppler-Linie im 2-D-Bild zu bewegen.

POSITION DES ABTASTVOLUMENS

Bewegen Sie den **Trackball** nach oben und nach unten, um das Abtastvolumen auf der Doppler-Linie zu bewegen.

GRÖÖE DES ABTASTVOLUMENS



Gleiten Sie mit dem Finger über den **TouchRing™**, um die Größe des Abtastvolumens zu verändern.

Beschreibung der PW-Parameter

QUICK STEER (SCHNELLE STEUERUNG)



Quick Steer (Schnelle Steuerung) ermöglicht die schnelle Steuerung des Schallstrahls.

Drücken Sie **Quick Steer (Schnelle Steuerung)**, um den Wert zu ändern.

Verwenden Sie den Knopf **Steuerung** für Feineinstellungen.

STEUERUNG



Der Schallstrahl kann innerhalb bestimmter durch den Schallkopf und die Bildebenegeometrie vorgegebener Grenzen so nahe wie möglich in die erwartete Bewegungsrichtung gelenkt werden.

Steuerung ist nur im Live-Bildgebungsmodus verfügbar.

Drehen Sie den Knopf unter **Steuerung** um die Doppler-Linie zu steuern.

PW WINKEL GROB



PW Winkel Grob ist im Live-Bildgebungsmodus und bei fixiertem Bild verfügbar.

Berühren Sie **PW Winkel Grob**, bis Sie die gewünschte Einstellung ausgewählt haben.

PW WINKEL FEIN



PW Winkel fein ist im Live-Bildgebungsmodus und bei fixiertem Bild verfügbar.

Drehen Sie den Knopf unter **PW Winkel fein**.

SCHALLLEISTUNG



Schalleistung zeigt die akustische Ausgangsleistung an.

Schalleistung ist nur im Live-Modus verfügbar.

Drehen Sie den Knopf unter **Schalleistung**:

- im Uhrzeigersinn, um die Schalleistung zu erhöhen
- gegen den Uhrzeigersinn, um die Schalleistung zu senken.

Schalleistung liegt zwischen 0 dB (max.) und -20 dB (min.).

DYNAM. BEREICH



Sie können den dynamischen Bereich des PW-Modus unabhängig vom dynamischen Bereich des B-Modus optimieren.

Drehen Sie den Drehknopf unter **Dynam. Bereich**:

- im Uhrzeigersinn, um den dynamischen Bereich zu vergrößern
- gegen den Uhrzeigersinn, um DR zu verringern.

ANZEIGEFORMAT



Anzeigeformat ist im Live-Bildgebungsmodus und bei fixiertem Bild verfügbar.

Drücken Sie **Anzeigeformat**, um den Wert zu ändern.

Fünf Anzeigeformate stehen zur Verfügung:

- nur 2D
- ½ B-Bild- und ½ Spektral-Darstellung nebeneinander
- nur Spektral
- 2/3 B-Bild- und 1/3 Spektraldarstellung
- 1/3 B-Bild- und 2/3 Spektraldarstellung

PW-MAP



PW-Map ist im Live-Bildgebungsmodus und bei fixiertem Bild verfügbar.

Drehen Sie den Knopf unter **PW-Map**:

- im Uhrzeigersinn, um zur vorhergehenden Karte zu gelangen
- gegen den Uhrzeigersinn, um zur nächsten Karte zu gelangen

INVERTIEREN



Invertieren dreht die Spektraldarstellung vertikal um, ohne die Nulllinienposition zu ändern.

Normalerweise werden positive Geschwindigkeiten (Geschwindigkeiten zum Schallkopf hin) über der Nulllinie angezeigt und negative Geschwindigkeiten (Geschwindigkeiten vom Schallkopf weg) unter der Nulllinie angezeigt.

Invertieren dreht die Position der positiven und negativen Geschwindigkeiten in Relation zur Nulllinie um.

Invertieren ist im Live-Bildgebungsmodus und bei fixiertem Bild verfügbar.

Berühren Sie **Invertieren**, um diese Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

WANDFILTER



Dieser Parameter filtert langsame Signale heraus.

Er hilft, durch Bewegungen des Patienten oder Schallkopfes verursachte Bewegungsartefakte zu verringern.

Wandfilter ist nur im Live-Bildgebungsmodus verfügbar.

Berühren Sie **Wandfilter** , bis Sie die gewünschte Einstellung ausgewählt haben.

SKALA



Skala ermöglicht die Änderung der auf dem Doppler-Spektrum angezeigten maximalen Geschwindigkeiten.

Skala ist nur im Live-Bildgebungsmodus verfügbar.

Drehen Sie den Knopf unter **Skala**:

- im Uhrzeigersinn, um die Skalaeinstellung zu erhöhen
- gegen den Uhrzeigersinn, um die Skalaeinstellung zu verringern.

NULLLINIE



Nulllinie ist eine horizontale grafische Linie, die die Nulllinie der Geschwindigkeit darstellt.

Die Nulllinienposition dient zur Festlegung der maximalen positiven und negativen Geschwindigkeiten.

Durch Ändern der Nulllinienposition wird die maximale positive Geschwindigkeit erhöht und die maximale negative Geschwindigkeit verringert, oder umgekehrt.

Nulllinie ist nur im Live-Bildgebungsmodus und bei einem fixierten Bild verfügbar.

Drehen Sie den Knopf unter **Nulllinie**:

- im Uhrzeigersinn, um die maximalen positiven Geschwindigkeiten zu erhöhen
- gegen den Uhrzeigersinn, um die maximalen negativen Geschwindigkeiten zu erhöhen.

ABLENKGESCHWINDIGKEIT



Ablenkgeschwindigkeit ermöglicht die Änderung der Geschwindigkeit, mit der die Darstellung der Spektralsäulen aktualisiert wird.

Ablenkgeschwindigkeit ist im Live-Bildgebungsmodus und bei fixiertem Bild verfügbar.

Berühren Sie **Ablenkgeschwindigkeit**, bis Sie den gewünschten Wert erreicht haben.

SIMULTANE DUPLEX- UND TRIPLE-MODI



Simultan ermöglicht die Echtzeit-Evaluierung der Vaskularität, wenn durch Atmung und Bewegung eine alleinige Untersuchung mit dem PW-Doppler zu schwierig ist.

Simultan ist nur im Live-Bildgebungsmodus verfügbar.

Berühren Sie **Simultan**, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

Im B-Modus wird **Simultan** angezeigt und die PW-Spektralkurve und das B-Bild werden aktualisiert.

Im Farb-Modus wird **Simultan** angezeigt und die PW-Spektralkurve und das Farbbild werden aktualisiert.

HIGH PRF



High PRF ermöglicht das Messen höherer Flussgeschwindigkeiten als diejenigen, die mit der konventionellen maximalen Impulswiederholungsfrequenz (PRF) gemessen werden können, indem die PRF über die Nyquist-Grenze erhöht und Aliasing verhindert wird.

Funktionsweise:

High PRF erweitert die Skala der PW Doppler-Geschwindigkeit über die für ein gegebenes Abtastvolumen eindeutig messbare

Höchstgeschwindigkeitsgrenze hinaus. Jenseits dieser Grenze entspricht die Impulswiederholungsfrequenz (PRF) der übertragenen PW Doppler-Impulse einem Impulswiederholungsintervall (PRI), das kürzer ist als die Ausbreitungszeit vom Schallkopf zur aktuellen Abtastvolumentiefe und zurück, was zu einer Doppeldeutigkeit des Bereichs führt (die analysierten Doppler-Signale stammen nicht nur vom ausgewählten primären Abtastvolumen, sondern auch von einem oder zwei sekundären Abtastvolumina entlang des Doppler-Strahls.

Wie wird die Funktion verwendet:

Berühren Sie **High PRF** , um die Funktion einzuschalten.

Die verfügbare Höchstsкала wird als eine Funktion der Tiefe erhöht.

High PRF ist für alle Voreinstellungen auf allen Schallköpfen im PW-Live-Modus verfügbar.



EMPFEHLUNGEN ZUM SCHALLEN

- Positionieren Sie das primäre SV in den Zielbereich wie bei einem konventionellen PW-Doppler.
- Vermeiden Sie es, soweit möglich, sekundäre SV in von Rauschartefakten, Schatten oder Flussbereichen beherrschte Abschnitte zu platzieren.
- Diese Tipps helfen Ihnen ggf. bei der Positionierung sekundärer SV mit hoher Impulswiederholungsfrequenz (PRF) zur Signaloptimierung und Vermeidung von Störungen mit dem primären SV:
 - Variieren Sie den Geschwindigkeitsbereich, um die Position des sekundären Abtastvolumens zu ändern.
 - Variieren Sie die Tiefe des Bilds, um die Position des sekundären Abtastvolumens zu ändern.
 - Reduzieren Sie den Geschwindigkeitsbereich, um das sekundäre Abtastvolumen zu entfernen.
 - Reduzieren Sie die Verstärkung.
 - Variieren Sie die 2D-Bildorientierung.
 - Ändern Sie das Schallfenster.

PW AUTOTRACE



Mit diesem Steuerelement können Sie automatische PW-Messungen durchführen.

Sie können in der Systemkonfiguration individuell definieren, welche Messungen bei PW-Autotrace angezeigt werden.

PW Autotrace ist im Live-Bildgebungsmodus und bei fixiertem Bild verfügbar.

Drücken Sie auf **PW Autotrace**, um die Hüllkurve der Höchstgeschwindigkeit des Flusses je nach Zeit anzuzeigen.

Wenn **PW Autotrace** aktiviert ist, haben Sie Zugang zu den folgenden Einstellungen:

Mittlere Spur

Drücken Sie auf **Mittlere Spur**, um die mittlere Flussgeschwindigkeit je nach Zeit anzuzeigen.

Velocity Points

Drücken Sie auf **Velocity Points**, um die PSV und EDV auf dem Spektrum anzuzeigen.



Spurerkennung

Spurerkennung ermöglicht Ihnen, zwischen verschiedenen Anzeigen hin- und herzuwechseln:

- positive Höchstgeschwindigkeit
- negative Höchstgeschwindigkeit
- positive und negative Höchstgeschwindigkeit



Drücken Sie **Spurenerkennung** , um den Wert zu ändern.

Empfindlichkeit

Dieses Steuerelement definiert die Nachweisgrenze für PW-Autotracer.
Drücken Sie **Empfindlichkeit** , um den Wert zu ändern.



Zyklen auswählen

Mit diesem Steuerelement können Sie die Herzzyklen ändern, von denen ausgehend die berechneten Werte bei der Aktivierung von PW-Autotracer gemittelt werden.

Drehen Sie den Knopf unter **Zyklen auswählen**:

- im Uhrzeigersinn, um den/die nächsten Zyklus/en auszuwählen
- gegen den Uhrzeigersinn, um den/die vorhergehenden Zyklus/en auszuwählen



Anz. Zyklen

Bei Aktivierung von PW-Autotracer werden die berechneten Werte standardmäßig ausgehend von 3 Herzzyklen am Ende des PW-Spektrums gemittelt.

Drücken Sie **Anz. Zyklen** , um den Wert zu ändern.



Tipps zum Schallen mit PW



SCHALLEN MIT PW

Wie beim Farbdoppler gilt auch hier: Optimieren Sie die Schallebene für den besten Winkel zur Blutflussdarstellung.


Aktivieren Sie den PW-Cursor, indem Sie auf PW drücken. Optimieren Sie den Steuerwinkel und die Größe des Abtastvolumens (Trackballring), bevor Sie mit der PW-Spektralkurve beginnen. Wird Farbe vor PW aktiviert, so befindet sich der Cursor beim selben Steuerwinkel wie die Farbbox.

Optimieren Sie die Doppler-Verstärkung. Verringern Sie die Verstärkung zur Beseitigung von Hintergrundrauschen.

Erhöhen Sie die Skalaeinstellung oder verändern Sie die Nulllinie, um Aliasing zu beseitigen.

Sie können nach der Fixierung stets die Nulllinie, das Anzeigeformat, die PW-Map sowie die Ablenkgeschwindigkeit ändern.

Setzen Sie den Simultan-Modus ein, wenn Gefäße aufgrund von Atmung, Bewegung oder der Größe kleiner Gefäße schwer zu schallen sind.

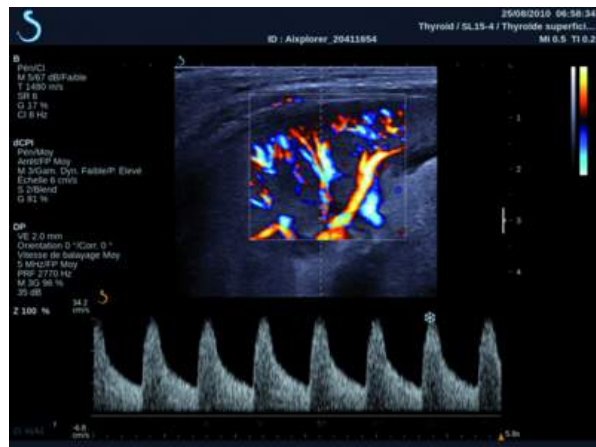

3D-Bildgebung

Zugang zur 3D-Bildgebung

Das 3D-Paket wird mit dem SLV16-5 Schallkopf für Brustuntersuchungen und Allgemeine Anwendungen sowie dem SEV12-3 Schallkopf für die Anwendungen Urogenital und OB-Gyn angeboten.

Der Modus 3D ist je nach Kombination aus Schallkopf und Anwendung/Voreinstellung mit dem B-, Farb- und SWE-Modus verfügbar.

Vor Beginn einer 3D-Akquisition:

1. Vergewissern Sie sich, dass der 3D-Schallkopf eingesteckt wurde
2. Drücken Sie **Schallkopf** auf dem Bedienpult
3. Wählen Sie eine **Anwendungs-** Registerkarte auf dem Touchscreen
4. Wählen Sie die gewünschte **Voreinstellung**
5. Schallen Sie zur Lokalisierung des Auswahlbereichs und zur Optimierung des B-Modus-, Farb- oder SWE-Bilds

Akquisition

1. Drücken Sie **Volumengröße** und wählen Sie die Größe des Volumens, das Sie benötigen:
 - M
 - L
 - XL
2. Drücken Sie auf die Schaltfläche **3D-Akquisition**, um die 3D-Akquisition zu starten.



Über die Fortschrittsanzeige können Sie den Status der Bildakquisition erkennen.

Um die laufende 3D-Akquisition abubrechen, drücken Sie **3D-Akquisition** erneut.

Multi-Planare Rekonstruktion (MPR)

MPR - AKTIVE ANSICHT


Drücken Sie **A** (Axial), **C** (Koronal), **T** (Transversal) oder **3D**, um die aktive Ansicht auszuwählen.

MPR-ANSICHT

Nach abgeschlossener 3D-Akquisition zeigt das System die Standard Multi Plane-Ansicht.

Drehen Sie den Knopf unter **Ansichtsmodus**, um den Ansichtsmodus „Multi Plane“ zu ändern.

Die aktive Ansicht bestimmt die Referenzansicht der folgenden Ansicht-Modi.

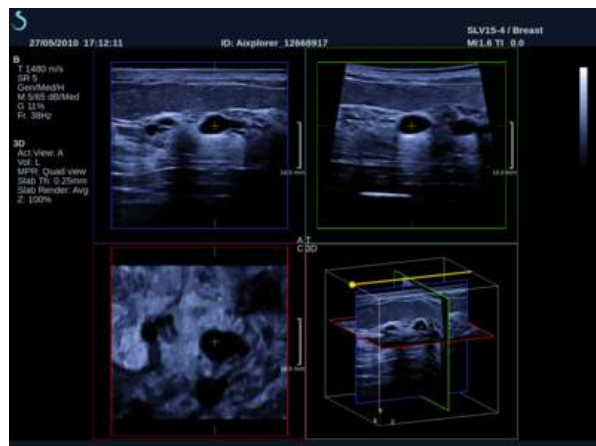

MPR-NAVIGATION



Wenn der **Zeiger** eingeschaltet ist:

1. Drücken Sie **Navigation** auf dem Touchscreen, bis Translate angewählt ist
2. Wählen Sie die Navigationsansicht mit der Schaltfläche **Auswählen** aus.
3. Verwenden Sie den **TouchRing™** und den **Trackball**, um in der gewählten Ansicht zu navigieren



Wenn der **Zeiger** ausgeschaltet ist:

1. Drücken Sie **Navigation** auf dem Touchscreen, bis Translate angewählt ist
2. Verwenden Sie den **TouchRing™** und den **Trackball**, um in der gewählten Ansicht zu navigieren

ROTATION



Wenn der **Zeiger** eingeschaltet ist:

1. Drücken Sie **Navigation** auf dem Touchscreen, bis Rotation angewählt ist
2. Bewegen Sie den **Zeiger** auf die Ansicht, die Sie drehen möchten
3. Verwenden Sie den **TouchRing™**, um die gewählte Ansicht zu drehen
4. Drücken Sie **Auswählen**, um die Schnittebenen zu zentrieren, die senkrecht zur ausgewählten Ansicht stehen

Wenn der **Zeiger** ausgeschaltet ist

1. Drücken Sie **Navigation** auf dem Touchscreen, bis Rotation angewählt ist
2. Verwenden Sie den **TouchRing™** und den **Trackball**, um die gewählte Ansicht zu drehen

ANDERE EINSTELLUNGEN

Schichtdicke

Drehen Sie den Knopf unter **Schichtdicke** , um die Werte zu ändern



Slab Render

Drehen Sie den Knopf unter **Slab Render** , um die Werte zu ändern.

- Verwenden Sie **Min.** , um hypoechoische Strukturen zu verstärken
- Verwenden Sie **Max.** , um hyperechoische Strukturen zu verstärken
- Verwenden Sie **Avg** oder **Median** , um Kontrast/Auflösung auszuloten



Zoom

Drehen Sie **Zoom** , um ausgehend vom Kreuzungspunkt A, C und T zu vergrößern.



Multi Slice (MS)

Drücken Sie **Multi Slice** auf dem Touchscreen, um in den Multi Slice-Modus zu gelangen



AKTIVE ANSICHT

Drücken Sie **A**, **C** oder **T**, um die aktive Ansicht auszuwählen.



ANZEIGE

Drücken Sie **Schnittnummer**, um die Zahl der auf dem Bildschirm gezeigten Schnittbilder zu ändern.



NAVIGATION

Verwenden Sie den **TouchRing™** , um die Mittelebene aus der MultiSlice-Anzeige zu übertragen.

ANDERE EINSTELLUNGEN

Schichtabstand

Drehen Sie den Knopf unter **Schichtabstand** , um die Werte zu ändern.

Schichtdicke

Drehen Sie den Knopf unter **Schichtdicke** , um die Werte zu ändern.

Slab Render

Drehen Sie den Knopf unter **Slab Render** , um die Werte zu ändern.

3D History Loop

Sie können sich einen Clip der während der 3D-Akquisition aufgenommenen 2D-Bilder ansehen.

Deaktivieren Sie **Multiplane** und **Multislice** auf dem Touchscreen. Das System befindet sich im 3D History Loop.

Verwenden Sie den **Trackball** , um im 3D History Loop zu scrollen.



3D und SWE™

SWE 3D-FILTER


3D-Filter ist ein glättender räumlicher Filter, der Ihnen die Möglichkeit gibt, die Elastizitäts- karte zu glätten.

Drehen Sie den Knopf unter **3D-Filter** , um die Glättung zu verstärken oder zu verringern.

3D Messungen

Neben den 2D-Messwerkzeugen bietet Aixplorer® verschiedene Messfunktionen zur Beurteilung des Volumens in den Anzeigen Multiplanar und MultiSlice:

- 3D-Volumen errechnet aus Ellipse und Abstand (MPR)
- 3D-Volumen errechnet aus drei Abständen (MPR)
- 3D-Volume errechnet aus mehreren Umfahrungen eines Volumens (MS).

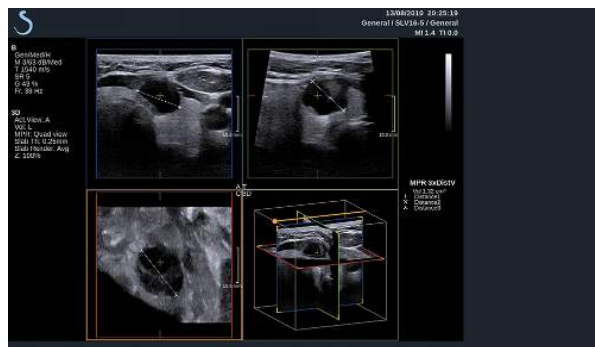

BASISMESSUNGEN

Siehe 2D „**Basismessungen**“ [\[285\]](#) für eine schrittweise Beschreibung der Distanz-, Ellipsen-, Umfahrungs-, Q-Box™- und Q-Box Ratio™- Messungen.

MESSUNGEN ÜBER MODULE

Siehe 2D „[Messungen über Module](#)“ [307].

SPEZIELLE 3D-MESSUNGEN

Ellipse-Distanz-Volumen

Das Messwerkzeug 3D-Ellipse-Distanz-Volumen ist nur in der MPR-Ansicht verfügbar.



1. Drücken Sie **Messwerkzeuge** auf dem Touchscreen
2. Drücken Sie **Volumen (Ellipse + Distanz)**
3. Verwenden Sie Ihre bevorzugte Methode, um eine Ellipse auf der betreffenden Ebene zu zeichnen (siehe 2D „[Basismessungen](#)“ [285]).

Nach Zeichnung der Ellipse zeigt das System die erste Messmarke für die Abstandsmessung an.

4. Wählen Sie eine orthogonale Ebene, um den Abstand zu zeichnen
Nach Zeichnung des Abstands zeigt das System die Volumen-Werte im Messergebnis-Bereich.

3-Distanz-Volumen

Das 3D-Volumen-Messwerkzeug für drei Distanzen ist nur in der MPR-Ansicht verfügbar.

1. Drücken Sie **Messwerkzeuge** auf dem Touchscreen
2. Drücken Sie **Volumen (3 Distanz)**
3. Verwenden Sie Ihre bevorzugte Methode, um 2 Abstände (siehe 2D „[Basismessungen](#)“ [285]) auf der betreffenden Ebene zu zeichnen.

Nach Zeichnung des ersten Abstands zeigt das System die erste Messmarke der zweiten Abstandsmessung.

1. Wählen Sie nach der Zeichnung des zweiten Abstands eine orthogonale Schnittebene, um den letzten Abstand zu zeichnen.

Nach Zeichnung des letzten Abstands zeigt das System die Volumen-Werte im Messergebnis-Bereich.

Trace Collection Volume

Das Trace Collection 3D-Volumen-Messwerkzeug ist nur in der MS-Ansicht verfügbar.

1. Drücken Sie **Mess- werkzeuge** auf dem Touchscreen
2. Drücken Sie **Volumen (Umfahrungsmethode)**
3. Verwenden Sie Ihre bevorzugte Methode, um eine erste Umfahrung auf einem bestimmten Schnittbild zu zeichnen (siehe 2D „Basismessungen“ [285]).

Nach der Zeichnung der ersten Umfahrung zeigt das System die erste Messmarke auf der nächsten benachbarten Schnittbildscheibe.

1. Zeichnen Sie so viele Umfahrungs-Messlinien, wie Sie benötigen (mindestens 2 sind für die Volumenberechnung erforderlich).
2. Drücken Sie **Ende** , um die Messung zu beenden

Das System zeigt die Volumen-Werte im Messergebnis-Bereich.

Prostatavolumenmessung aus 3D-Datensatz

1. Drücken Sie auf Schallkopf
2. Wählen Sie die Anwendung Urogenital und die Voreinstellung Prostata des SEV12-3
3. Optimieren Sie das B-Modus-Bild der Prostata
4. Drücken Sie auf 3D-Akquisition
5. Das System befindet sich im Bildgebungsmodus Multiplanar (siehe das 3D-Kapitel dieser Bedienungsanleitung)
6. Drücken Sie „Volumenmessung“ auf dem Touchscreen
7. Führen Sie 2 Abstandsmessungen auf einer Ebene durch
8. Führen Sie 1 Abstandsmessung auf einer anderen Ebene durch
9. Das System zeigt die 3 Abstandsergebnisse zusammen mit einem berechneten Volumen an



ACHTUNG

Stellen Sie sicher, dass die Bildqualität der 3D-Akquisition ausreicht, um eine 3D-Volumenmessung durchzuführen.

Integriertes 3D-Review-Paket

Das integrierte 3D-Review-Paket ermöglicht Ihnen, eine schon beendete Untersuchung hinzuzufügen, um zusätzliche Informationen von 3-D-Volumen aus einer früheren Untersuchung zu speichern.

Contrast Enhanced Ultrasound Imaging (CEUS)

Kontrastmittel-Ultraschall (CEUS) ist ein Bildgebungsmodus, mit dem es möglich ist, mikro- und makro-vaskuläre Flussinformationen in einem Ultraschallbild zu beurteilen.

Die CEUS-Anwendung erfordert, dass die Ultraschalluntersuchung in Verbindung mit der Injektion eines auf Mikroblasen basierenden Kontrastmittels durchgeführt wird.

Im Ultraschallbild erfüllen diese Mikroblasen die Funktion von intravaskulären Tracern und ermöglichen die Differenzierung von vaskulären Strukturen.

Hinweis: SuperSonic Imagine verkauft keine Kontrastmittel-Produkte.



WARNUNG

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Anleitung erlaubt die United States Food and Drug Administration den Einsatz von Kontrastmitteln in den Vereinigten Staaten nur mit Zustimmung des Institutional Review Board (IRB).

Befolgen Sie beim Verabreichen der Ultraschall-Kontrastmittel die Gebrauchsanweisungen des Herstellers sorgfältig und beachten Sie Indikationen und Kontraindikationen.


Zugang zum CEUS-Modus



Drücken Sie von jedem beliebigen Modus aus auf **CEUS** auf dem Bedienpult.

Damit werden CEUS und B-Bild nebeneinander auf dem Bildschirm dargestellt.

Hauptanzeige des CEUS-Bildes

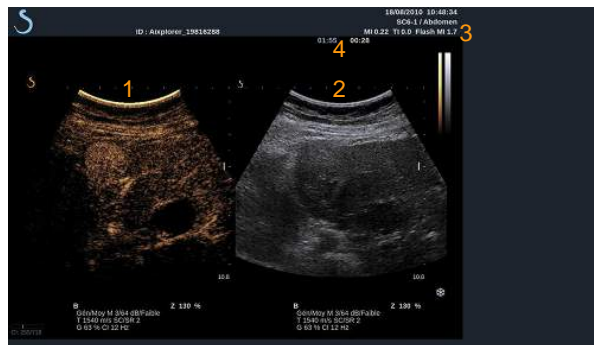

1. Kontrastmittelbild
2. Graustufenbild
3. MI- und TI-Information
4. Timer

Die CEUS-Ansicht auf der linken Bildschirmseite ist das Standard-Bild und die CEUS-Einstellungen sind standardmäßig aktiv.

Einige Knöpfe auf dem Bedienpult wie **Gain** und **AutoTGC** werden sowohl von CEUS als auch vom B-Modus genutzt. Letztendlich wird durch den aktiven Modus bestimmt, welches Bild die Einstellungen bedienen.

Der CEUS-Touchscreen

Im CEUS-Modus bietet der Touchscreen zahlreiche Bedienelemente, die dazu beitragen, das CEUS-Bild zu optimieren.

Es gibt zwei Seiten mit CEUS-Parametern und zwei Seiten mit Low-MI B-Modus Parametern. Diese Einstellungen lassen sich durch Berühren des jeweiligen Bedienelements auf dem Touchscreen oder durch Drehen des Drehknopfes direkt unter dem Touchscreen regeln.



CEUS Touchscreen Parameter



Low-MI B-Modus Touchscreen Parameter

Sie können durch die Seiten blättern, indem Sie **Andere Einstellungen berühren**.

Beschreibung der CEUS-Parameter

KONTRASTMITTEL



Kontrastmittel dient der Optimierung verschiedener CEUS-Bildparameter zur besseren Sichtbarmachung spezieller auf dem Markt erhältlicher Mikroblasen-Kontrastmittel.

Drücken Sie auf **Kontrastmittel**, um eines dieser Mikroblasen-Kontrastmittel auszuwählen.

CEUS RES/PEN



CEUS Res/Pen ermöglicht im CEUS-Bild die Änderung der Mittenfrequenz für eine erhöhte Kontrastauflösung oder erhöhte Eindringtiefe.

CEUS Res/Pen ist nur im Live-Bildgebungsmodus verfügbar.

Drücken Sie **CEUS Res/Pen**, um den Wert zu ändern.

Die orangefarbene LED-Anzeige weist auf den aktiven Wert hin:

- LED links: Res (Auflösung)
- LED Mitte: Gen (Allgemein)
- LED rechts: Pen (Eindringtiefe)

CEUS HD/FR. RATE



CEUS HD/Fr. Rate ermöglicht die Einstellung der CEUS-Bildrate und Liniendichte für eine erhöhte räumliche oder zeitliche Auflösung.

Berühren Sie **CEUS HD/Fr. Rate**, um den Wert zu ändern.

Drei Optionen stehen zur Auswahl:


- HD (Hochauflösend): LED links
- Ausgeglichen: LED Mitte
- Fr. Rate (Bildrate): LED rechts

MVI

MVI ermöglicht die Sichtbarmachung der Gefäßarchitektur durch die Verfolgung der Mikroblasen-Bewegung.

Drücken Sie auf die Schaltfläche **MVI** zum Aktivieren.

Drücken Sie auf die Schaltfläche **MVI**, um die Funktion zu deaktivieren und die Bildansicht zu bereinigen.

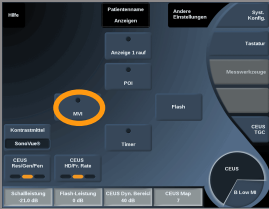

POI

POI markiert die Zielstelle, den sogenannten Point of Interest, sowohl in CEUS- als auch in Low-MI B-Modus-Bildern.

Verwenden Sie den **Trackball**, um den POI im Bild zu bewegen.



ANZEIGE 1 MEHR

Anzeige 1 Mehr ermöglicht die vergrößerte Darstellung des CEUS-Bilds und das Ausblenden des B-Bilds.

Drücken Sie auf die Schaltfläche **Anzeige 1 Mehr**, um die Funktion zu aktivieren.

Drücken Sie erneut die Schaltfläche **Anzeige 1 Mehr**, um die Funktion zu deaktivieren und kehren Sie zur der Ansicht zurück, in der CEUS und B-Bild nebeneinander gezeigt werden.



CEUS TGC

CEUS TGC ermöglicht die Änderung der TGC in der CEUS-Ansicht. Siehe Informationen zur Änderung der TCG-Einstellungen weiter oben.



CEUS-VERSTÄRKUNG



CEUS Gain ermöglicht die Anpassung der Gesamtverstärkung an das CEUS-Bild.

Der CEUS-Drehknopf ist derselbe Knopf wie im B-Modus, während sich der Anwender im CEUS-Modus befindet.

Zur Änderung der Verstärkung im CEUS-Modus:

Drehen Sie den Knopf **B**-Modus auf dem Bedienpult, wenn die Modus-Anzeige auf CEUS eingestellt ist.

TIMER

A screenshot of the ultrasound control panel's software interface. The interface is dark blue with various buttons and text labels. A button labeled "Timer" is highlighted with a bright orange circle. Other visible buttons include "Flash", "CEUS TOC", and "CEUS".

Timer ermöglicht das Starten einer Uhr, mit der Sie die Zeitphasen der Mikroblasen-Wirkung kontrollieren.

Timer ist nur im Live-Bildgebungsmodus verfügbar.

Drücken Sie auf die Schaltfläche **Timer**, um die Funktion zu aktivieren. Die LED-Anzeige leuchtet auf.

Drücken Sie erneut auf die Schaltfläche **Timer**, um die Uhr anzuhalten.

FLASH

A screenshot of the ultrasound control panel's software interface, similar to the one above. A button labeled "Flash" is highlighted with a bright orange circle. Other visible buttons include "Timer", "CEUS TOC", and "CEUS".

Flash sendet eine begrenzte Zahl von Bildern mit hoher Schallleistung in die Ultraschall-Bildsequenz.

Diese Flash-Bilder sollen die aktuellen Bilder von den Mikroblasen säubern, damit Sie die dynamische Wiederauffüllung mit Mikroblasen beobachten können.

Flash ist nur im Live-Bildgebungsmodus verfügbar. Drücken Sie auf die Schaltfläche **Flash**, um die Flash-Sequenz auszulösen.

266

Aixplorer® Bedienungsanleitung

CEUS-SCHALLLEISTUNG



CEUS-Schallleistung regelt die Ausgangsleistung des Systems für das CEUS-Bild.

Im Allgemeinen werden sehr niedrige akustische Ausgangsleistungen verwendet, um die ungewollte Zerstörung der fragilen Mikroblasen zu vermeiden.

CEUS-Schallleistung ist nur im Live-Bildgebungsmodus verfügbar.

Drehen Sie den Knopf unter **Schallleistung**:

- im Uhrzeigersinn, um die Schallleistung zu erhöhen
- gegen den Uhrzeigersinn, um die Schallleistung zu verringern.

Die maximale akustische Ausgangsleistung beträgt 0dB und die minimale Leistung liegt bei -30dB.

Siehe [Kapitel 3, Sicherheit \[29\]](#) für Informationen über die akustischen Ausgangsleistungen.

FLASH-LEISTUNG



Flash-Leistung reguliert die Ausgangsleistung das System für das CEUS-Bild, wenn das Bedienelement „Flash“ gedrückt wird.

Im Allgemeinen ist Flash-Leistung auf eine hohe Schallleistung eingestellt und wird mit wenigen Bildern aktiviert. Die hohe Flash-Schallleistung zerstört Mikroblasen im CEUS Bild, um die dynamische Wiederauffüllung mit Mikroblasen beobachten zu können.

Flash-Leistung ist nur im Live-Bildgebungsmodus verfügbar.

Drehen Sie den Knopf unter **Flash-Leistung**:

- im Uhrzeigersinn, um die Schallleistung zu erhöhen
- gegen den Uhrzeigersinn, um die Schallleistung zu verringern.

Siehe [Kapitel 3, Sicherheit \[29\]](#) für Informationen über die akustischen Ausgangsleistungen.

CEUS DYNAM. BEREICH



CEUS Dyn. Bereich ermöglicht die Änderung des Bereichs, in dem die Amplituden der Echosignale im CEUS-Bild angezeigt werden.

CEUS Dyn. Bereich ist im Live-CEUS-Bildgebungsmodus und im fixierten CEUS-Bild verfügbar.

Drehen Sie den Drehknopf unter **CEUS Dyn. Bereich**:

- im Uhrzeigersinn, um die Graustufenwerte zu komprimieren
- gegen den Uhrzeigersinn, um DR zu verringern.

CEUS MAP



CEUS Map weist die Darstellung der CEUS-Echoamplituden Graustufen- oder Farbskalen zu.

CEUS Map ist im Live-CEUS-Bildgebungsmodus und im fixierten CEUS-Bild verfügbar.

Drehen Sie den Drehknopf unter **CEUS Map**:

- im Uhrzeigersinn, um zur Ansicht der nächsten Karte zu gehen
- gegen den Uhrzeigersinn, um zur Ansicht der vorhergehenden Karte zu gehen

FLASH-DAUER



Flash-Dauer legt die Dauer der Flash-Sequenz fest.

Drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Zeit einzustellen.

Tipps zum Schallen mit CEUS



SCHALLEN MIT CEUS

Optimieren Sie wie üblich das B-Modus-Bild. Dann drücken Sie CEUS.

Wählen Sie die Kontrastmitteleinstellung, die sich für das ausgewählte Kontrastmittel am besten eignet.

Verabreichen Sie für die geplante Anwendung die vom Kontrastmittelhersteller empfohlene Dosis.

Drücken Sie Save Clip, wenn das Kontrastmittel voraussichtlich den höchsten Bolus erreicht hat.


Verwenden Sie eine niedrige CEUS-Ausgangsleistung, um die Zerstörung der Mikroblasen so gering wie möglich zu halten.

Optimieren Sie das Bild über die Res/Pen-Einstellung.

Optimieren Sie das Bild über die HD/Fr. Rate-Einstellung.

Vor der Kontrastmittelinjektion mit der erforderlichen diagnostischen Dosis muss alles Kontrastmittel aufgelöst sein.

Denken Sie daran, den Timer einzustellen, wenn Sie das Kontrastmittel injizieren!

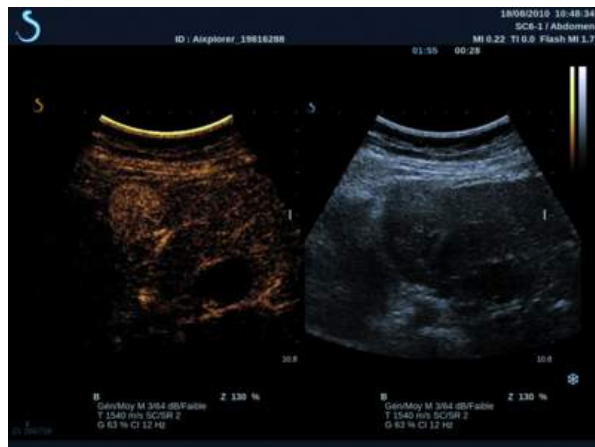


M-Modus Bildgebung

Zugang zum M-Modus

Berühren Sie **M-Modus** auf dem B-Modus Touchscreen. Auf den M-Modus kann nur dann zugegriffen werden, wenn eine dieser Voreinstellungen ausgewählt wurde: GYN, Frühe OB oder Allg OB.



Hauptanzeige des M-Modus

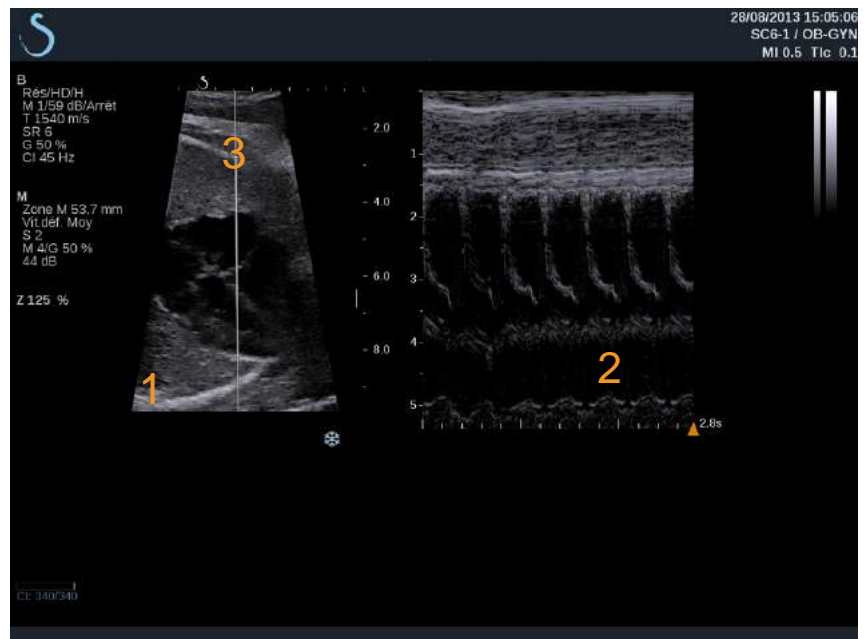

1. Graustufenbild
3. M-Linie

2. M-Modus

M-Modus Touchscreen

Im M-Modus werden auf dem Touchscreen verschiedene Bildeinstellungen angezeigt, die eine Optimierung des Bildes im M-Modus ermöglichen.

Breite der Schallkopfauflagefläche 5,92 cm; Kabellänge 2,1 m Diese Einstellungen lassen sich durch Berühren des Bedienelements auf dem Touchscreen oder durch Drehen des Drehknopfes direkt darunter regeln.





Sie können durch die Seiten blättern, indem Sie **Andere Einstellungen berühren.**

Einstellen des M-Modus

M-LINIE



Bewegen Sie den **Trackball** nach links und rechts, um die M-Linie im 2-D-Bild zu bewegen.

LAGE DER M-ZONE

Bewegen Sie den **Trackball** nach oben und nach unten, um die M-Zone auf der M-Linie zu bewegen.

GRÖÖE DER M-ZONE



Gleiten Sie mit dem Finger über den **TouchRing™**, um die Größe der M-Zone zu verändern.

Beschreibung der M-Modus-Parameter

RES/PEN



Res/Pen ermöglicht die Änderung der Mittenfrequenz für eine erhöhte Auflösung oder erhöhte Eindringtiefe. **Res/Pen** ist nur im Live-Bildgebungsmodus verfügbar. Drücken Sie **Res/Pen**, um den Wert zu ändern.

Die orangefarbene LED-Anzeige weist auf den aktiven Wert hin:

- LED links: Res (Auflösung)
- LED Mitte: Gen (Allgemein)
- LED rechts: Pen (Eindringtiefe)

SCHALLLEISTUNG



Schalleistung zeigt die akustische Ausgangsleistung an.

Schalleistung ist nur im Live-Modus verfügbar.

Drehen Sie den Knopf unter **Schalleistung**:

- im Uhrzeigersinn, um die Schalleistung zu erhöhen
- gegen den Uhrzeigersinn, um die Schalleistung zu senken.

Schalleistung liegt zwischen 0 dB (max.) und -20 dB (min.).

DYNAM. BEREICH DES M-MODUS

So optimieren Sie den Dynam. Bereich des M-Modus:

Drehen Sie den Knopf unter **Dynam. Bereich des M-Modus**:

- im Uhrzeigersinn, um den dynamischen Bereich zu vergrößern
- gegen den Uhrzeigersinn, um DR zu verringern.



KONTRAST

Kontrast ist ein Anzeigeschwellenwert des M-Modus.

Drehen Sie den Knopf unter **Kontrast**:

- im Uhrzeigersinn, um die anechoischen Bereiche abzdunkeln
- gegen den Uhrzeigersinn, um die anechoischen Bereiche aufzuhellen



ANZEIGEFORMAT

Anzeigeformat ist im Live-Bildgebungsmodus und bei fixiertem Bild verfügbar.

Drücken Sie **Anzeigeformat**, um den Wert zu ändern.

Drei Anzeigeformate stehen zur Verfügung:

- $\frac{1}{2}$ B-Modus- und $\frac{1}{2}$ M-Modusdarstellung
- $\frac{2}{3}$ B-Modus- und $\frac{1}{3}$ M-Modusdarstellung
- Anzeige nebeneinander



M-KARTE

M-Karte ist im Live-Bildgebungsmodus und bei fixiertem Bild verfügbar.

Drehen Sie den Knopf unter **M-Karte**:

- im Uhrzeigersinn, um zur vorhergehenden Karte zu gelangen
- gegen den Uhrzeigersinn, um zur nächsten Karte zu gelangen



ABLENKGESCHWINDIGKEIT

Ablenkgeschwindigkeit ermöglicht die Änderung der Geschwindigkeit, mit der die Darstellung der M-Modus-Spalten aktualisiert wird.

Ablenkgeschwindigkeit ist im Live-Bildgebungsmodus und bei fixiertem Bild verfügbar.



Berühren Sie **Ablenkgeschwindigkeit** , bis Sie den gewünschten Wert erreicht haben.

GLÄTTUNG



Glättung ist ein Raumfilter, der zur Glättung des M-Modus für ein homogeneres Erscheinungsbild verwendet wird.

Glättung ist nur im Live-Bildgebungsmodus verfügbar.

Drehen Sie den Knopf unter **Glättung**:

- im Uhrzeigersinn, um die Glättung zu erhöhen
- gegen den Uhrzeigersinn, um die Glättung zu verringern.

Tipps zum Schallen im M-Modus



SCHALLEN IM M-MODUS

Der M-Modus stellt die Bewegungen von Strukturen entlang einer Linie im zeitlichen Verlauf dar.

Zu Beginn erfolgt die Aufnahme eines Bildes im B-Modus.

Optimieren Sie das Graustufenbild durch Anpassen der Bildtiefe und des Zoom-Faktors und durch Einstellen der entsprechenden Fokuszone (Position und Bereich).

Bei Bedarf werden andere Optimierungswerkzeuge wie AutoTGC, die B-Moduskarte, die Gesamtverstärkung und der dynamische Bereich verwendet.

Aktivieren Sie den M-Modus mit der vorgesehenen Schaltfläche auf dem Touchscreen.

Stellen Sie die ordnungsgemäße Größe und Position der M-Zone ein.

Verringern Sie die Verstärkung zur Beseitigung von Hintergrundrauschen.

Der M-Modus hat eine gute zeitliche Auflösung und seine Ablenkgeschwindigkeit lässt sich bei Bedarf an die Geschwindigkeit der beobachteten Bewegungen anpassen.

Das Anzeigeformat lässt sich an die Arbeitsbedingungen des Benutzers anpassen.

Analysieren eines Bilds

Verwendung der Schnittbildmarkierungen

Verwenden der Schnittbildmarkierungen



Body Mark. ist im Live-Bildgebungsmodus und bei fixiertem Bild verfügbar.

Body Mark. befindet sich auf dem Bedienpult.

Drücken Sie **Body Mark.** , um einem Bild eine Schnittbildmarkierung hinzuzufügen.

Die Standard-Schnittbildmarkierung wird auf dem Touchscreen und dem Hauptbildschirm rechts unten im Bild angezeigt.

Berühren Sie **PICTO** , um das Schnittbildmarkierungs-Piktogramm zu ändern.

Eine Auswahl an Schnittbildmarkierungen wird auf dem Touchscreen angezeigt.

Berühren Sie die gewünschte Schnittbildmarkierung, um Sie auszuwählen.

Die Schallkopfausrichtung kann direkt auf dem Piktogramm angezeigt werden.

Zum Hinzufügen einer Schallkopfausrichtung zum Piktogramm berühren Sie das Piktogramm, um die Kante des Schallkopfes anzugeben, die der Ausrichtungsmarkierung auf dem Schallkopf entspricht.

Berühren Sie dann das Piktogramm nochmals, um die Orientierungsmarke am Schallkopf gegenüber der Ausrichtungsmarkierung anzugeben. Die Schallkopfausrichtung wird angezeigt.



Verwenden Sie den Knopf **Drehen** , um die Schallkopfausrichtung auf der Schnittbildmarkierung zu drehen.

Drücken Sie **Beenden** auf dem Touchscreen, um die Seite mit den Schnittbildmarkierungen zu verlassen.

Berühren Sie **HIDE** , um das Piktogramm auf dem Bild auszublenden. Zur Wiederherstellung einer Schnittbildmarkierung auf dem Hauptbildschirm berühren Sie **Anzeigen**.

Benutzerspezifische Anpassung

Sie können die Schnittbildmarkierungsbibliotheken in der Systemkonfiguration anpassen.

Sie können wählen, ob immer der Touchscreen „Schnittbildmarkierung“ angezeigt werden soll, sobald Sie auf **Einfrieren drücken**.

Weitere Informationen finden Sie in **Kapitel 8, Individuelle Systemeinstellungen [381]**.

Annotationen hinzufügen



Sie können Annotationen und Pfeile auf einem Bild hinzufügen, um anatomische Strukturen und Positionen zu kennzeichnen.

Annot. befindet sich auf dem Bedienpult.

Die Annotationsfunktion ist im Live-Bildgebungsmodus und bei einem fixierten Bild verfügbar.

Um einem Bild Anmerkungen hinzuzufügen, drücken Sie auf **Annot.** auf dem Bedienpult.



Eine Liste mit Annotationen wird auf dem Touchscreen und ein Annotationscursor wird auf dem Hauptbildschirm angezeigt.

Drehen Sie den Knopf **Seite**, um verschiedene Annotationsseiten aufzurufen.

Zum Hinzufügen einer Annotation stehen folgende Optionen zur Auswahl:

- Wählen Sie eine der vorprogrammierten Anmerkungen aus der Bibliothek der Annotationen. Berühren Sie die gewünschte Annotation und fügen Sie diese auf dem Hauptbildschirm hinzu.
- Berühren Sie **Tastatur**, um sich eine Tastatur anzeigen zu lassen und eine Annotation manuell einzugeben.
- Berühren Sie **Pfeil** auf dem Touchscreen, um einen Pfeil auf dem Hauptbildschirm hinzuzufügen.

Verwenden Sie den **Trackball**, um den Pfeil zu positionieren.

Zur Entfernung von Annotationen vom Hauptbildschirm benutzen Sie die folgenden Optionen:

- **Alles löschen** entfernt alle Annotationen und Pfeile vom Hauptbildschirm.
- **Annot. lösch.** entfernt die Annotation, über der der Textcursor mithilfe des Trackballs positioniert wurde.
- **Letzt. Pfeil löschen** entfernt den Pfeil, der zuletzt in das Bild gesetzt wurde.

Die Annotationsfunktion verfügt über spezielle Bedienelemente zur einfacheren Vorgehensweise.

Annotationsmodus



Fügen Sie eine Annotation als Titel hinzu, bleibt dieser erhalten, wenn Sie die FREEZE-Einstellung aufheben.

Fügen Sie eine freie Annotation hinzu, wird diese bei Aufhebung der FREEZE-Einstellung entfernt.

Drücken Sie **Modus**, um den Annotationsmodus zu ändern.

Annotationsgruppen

Annotationsen können nach Farben gruppiert werden. Annotationsen derselben Farbe gehören zur selben Gruppe. Wenn Sie eine erste Annotation aus einer Gruppe wählen, wird diese auf dem Bildschirm hinzugefügt. Wählen Sie danach eine Annotation aus derselben Gruppe, wird die vorherige Annotation durch die neue ersetzt.

Annotationsen auf transparenten (blauen) Tasten gehören zu keiner speziellen Gruppe. Deshalb werden diese nicht ersetzt.

Alle Annotationsen werden in weiß angezeigt, wenn das Bild gespeichert oder gedruckt wird.

Annotationsen neu platzieren

Sie können die Platzierung von Annotationsen, die Sie auf dem Bildschirm hinzugefügt haben, ändern:

1. Wählen Sie eine **Anmerkung** auf dem Touchscreen und fügen Sie diese hinzu.
2. Bewegen Sie den **Cursor** über die neu hinzugefügte Annotation.
3. Drücken Sie **Auswählen**
Die Annotation ist ausgewählt.
4. Bewegen Sie den **Cursor** an die Stelle, an der Sie die Annotation platzieren möchten.
5. Drücken Sie **Auswählen** zur Freigabe der Annotation





ANMERKUNG

Schieben Sie eine Annotation über eine vorhandene Annotation, wird die vorherige Annotation ersetzt.

Bibliothek der Annotations

Sie können das Verzeichnis der voreingestellten Annotations bearbeiten, indem Sie Ihre eigenen manuell eingeben. Berühren Sie **BIBL. BEARBEITEN**, um das Verzeichnis der Annotations aufzurufen.

Die Seite „Systemkonfiguration“, das Register „System/Anzeige“ und das Unterregister „Annotation“ öffnen sich.

Hier können Sie die Annotations für die gewünschte klinische Anwendung bearbeiten.

Weitere Details finden Sie unter [Kapitel 8, Individuelle Systemeinstellungen \[381\]](#).



Set Home

Berühren Sie **Set Home**, um die aktuelle Position als Startposition für das aktuelle Anzeigeformat festzulegen.



Home

Berühren Sie **Home**, um den Anmerkungs-cursor in seine Startposition zu setzen.

Berühren Sie **BEENDEN**, um die Annotations zu beenden.





ANMERKUNG

Bei Annotationen im dualen Bildschirm verlassen Sie das Register Annotationen auf dem Touchscreen, bevor Sie das Bild über die Taste **Auswählen** aktualisieren.

Benutzerspezifische Anpassung

Sie können wählen, ob immer der Touchscreen „Annotation“ angezeigt werden soll, durch Drücken auf **Einfrieren**.

Weitere Informationen finden Sie in **Kapitel 8, Individuelle Systemeinstellungen** [381].

Messungen durchführen

Zugang zu Messungen

Verwenden Sie Messungen zur Definition von Dimension, Bereich, Umfang und Volumen anatomischer Merkmale.

Zwei Messarten sind verfügbar auf dem Aixplorer®:

- Basismessungen mit verschiedenen Messwerkzeugen
- Messungen über Module, die auf die Anatomie des Körpers Bezug nehmen. Messungen über Module sind nicht an ein Bild gebunden. Sie werden selbst dann im Bericht angezeigt, wenn das dazugehörige Bild gelöscht wurde.



Drücken Sie **Mess** auf dem Bedienpult, um den Messmodus zu öffnen. Auf der Hauptanzeige wird ein Standard-Caliper angezeigt.

Beachten Sie, dass der Bildbereich auch auf dem Touchscreen sichtbar ist, um Messungen mit dem Stift (Stylus) zu erleichtern.

Bei mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Messungen handelt es sich um Schätzwerte.

Basismessungen

Berühren Sie **Messwerkzeuge** auf dem Touchscreen.

Das System zeigt die Messwerkzeuge für den aktiven Modus an.

Die Messergebnisse sind im „Messergebnisfeld“ dargestellt, das sich auf der Hauptanzeige unterhalb der Graustufenskala in der unteren rechten Seite des Bildes befindet. Dieses Ergebnisfeld kann auf dem gesamten Bild verschoben und abgelegt werden.

In **Messwerkzeuge** können Sie auf die Schaltfläche **Position des Ergebnisfeldes zurücksetzen** drücken, um das Ergebnisfeld automatisch an seine ursprüngliche Position zu setzen.

Berühren Sie das gewünschte Messwerkzeug:



DISTANZ



Distanz steht in jedem Modus zur Verfügung.

Methode 1: mit dem Trackball und Select

1. Berühren Sie **Distanz**.
2. Verwenden Sie den **Trackball** um den aktiven Cursor zum ersten Messpunkt zu bewegen.
3. Drücken Sie **Auswählen** um den ersten Punkt zu verankern.
Das System verankert den ersten Messpunkt und zeigt einen zweiten aktiven Cursor an.
Das System zeigt den Abstandswert im Messergebnisbereich rechts vom Bild auf der Hauptanzeige an.
4. Durch das Berühren von **Ende** wird die Messung beendet.

Methode 2: mit dem Touchscreen

1. **Berühren Sie „Distanz“.**

Der aktive Cursor wird angezeigt.

2. Berühren Sie das Bild auf dem Touchscreen an der Stelle, wo Sie den ersten Cursor platzieren möchten.

Das System bewegt den Cursor an diese Stelle, verankert den ersten Cursor und zeigt einen zweiten aktiven Cursor an.

3. Berühren Sie das Bild auf dem Touchscreen an der Stelle, wo Sie den zweiten Cursor positionieren möchten.
4. Berühren Sie **Ende** , um den zweiten Cursor zu verankern.

Für einen optimalen Messablauf kann auch eine Kombination aus Methode 1 und Methode 2 verwendet werden.

ELLIPSE



Ellipse steht in jedem Modus zur Verfügung.

Methode 1: mit dem Trackball und Select

1. Drücken Sie **Auswählen** um den ersten Punkt zu verankern.
Das System verankert den ersten Messpunkt und zeigt einen zweiten aktiven Cursor an.
2. Verwenden Sie den **Trackball**, um den aktiven Cursor zum zweiten Messpunkt zu bewegen.
3. Drücken Sie **Auswählen**, um den zweiten Cursor zu verankern.
Das System zeigt ein Ellipsoid zwischen den beiden Punkten an.
4. Verwenden Sie den **Trackball**, um die Form der Ellipse zu verändern.
5. Durch wiederholtes Drücken von **Auswählen** werden schrittweise der erste Messpunkt, der zweite Messpunkt und das Ellipsoid aktiviert.
6. Berühren Sie **Ende**, um die Messung abzuschließen.

Methode 2: mit dem Touchscreen

1. Berühren Sie **Ellipse**.

Der aktive Cursor wird angezeigt.

2. Berühren Sie das Bild auf dem Touchscreen an der Stelle, wo Sie den ersten Cursor platzieren möchten.

Ein zweiter Cursor wird automatisch angezeigt.

3. Ziehen Sie den zweiten aktiven Cursor entlang der Ellipsenachse, ohne den Finger oder Stift abzusetzen.

Das System zeigt ein Ellipsoid zwischen den beiden Punkten an.

Setzen Sie den Finger oder Stift ab, wird der zweite Messpunkt verankert.

4. Berühren Sie das Bild in der Nähe der gegenüberliegenden Achse der Ellipse.
5. Ohne den Finger oder Stift abzusetzen, ziehen Sie das Ellipsoid in die gewünschte Position.

6. Berühren Sie **Ende** , um die Messung abzuschließen.

Für einen optimalen Messablauf kann auch eine Kombination aus Methode 1 und Methode 2 verwendet werden.

UMFAHREN

Umfahren steht in jedem Modus zur Verfügung.

Methode 1: mit dem Trackball und Select

1. Berühren Sie **Umfahren**.
2. Verwenden Sie den **Trackball** , um den aktiven Cursor zum ersten Messpunkt zu bewegen.
3. Drücken Sie **Auswählen** um den ersten Punkt zu verankern.
Das System verankert den ersten Cursor und zeigt einen zweiten aktiven Cursor direkt über dem ersten an.
4. Verwenden Sie den Trackball, um den aktiven Cursor zum zweiten Messpunkt zu bewegen.
Diese Bewegung wird durch eine Linie angezeigt.
5. Drücken Sie **Auswählen** , um den zweiten Cursor zu verankern.
Das System verbindet die Endpunkte automatisch.
6. Sie können jedoch auch **Ende** berühren, um die Messung abzuschließen.

Liegen Start- und Endpunkt der Linie sehr nahe beieinander, schließt das System die Umfahrung automatisch.

Der Knopf unter **Umfahren** kann bei einer aktiven Umfahrung verwendet werden, um die Linie schrittweise vom Ende her zu löschen und durch eine neue Messung zu ersetzen.

Methode 2: mit dem Touchscreen

1. Berühren Sie „Umfahren“

Der aktive Cursor wird angezeigt.

2. Berühren Sie das Bild auf dem Touchscreen an der Stelle, wo Sie den ersten Cursor platzieren möchten.

Ein zweiter Cursor wird automatisch über dem ersten angezeigt.



3. Ziehen Sie den zweiten aktiven Cursor an der gewünschten Verbindung entlang, ohne den Stift oder Finger abzusetzen.

Diese Bewegung wird durch eine Linie angezeigt.

Ein Absetzen des Fingers verankert die Umfahrung.

Ein Berühren des Cursors reaktiviert die Umfahrung .

4. Berühren Sie **Ende** , um die Messung abzuschließen.

Liegen Start- und Endpunkt der Linie sehr nahe beieinander, schließt das System die Umfahrung automatisch.

TIEFE

Mit diesem Werkzeug können Sie an einem bestimmten Point of Interest die Tiefe auf dem Bild definieren.

Zur Durchführung einer Tiefenberechnung drücken Sie auf **Messwerkzeuge**.

1. Drücken Sie **Tiefe**
2. Verankern Sie sie am gewünschten Punkt.
3. Der Tiefenwert wird angezeigt.



VOLUMEN

Ein Volumen mit drei Abständen ermöglicht die Verwendung dreier unabhängiger Abstände in denselben oder orthogonalen Bildern zur Durchführung einer Volumenberechnung.

Zur Durchführung einer Volumenberechnung drücken Sie auf **Messwerkzeuge**.



1. Drücken Sie **Volumen**
2. Verwenden Sie Ihre bevorzugte Messung (siehe oben „Abstandsmessungen“), um drei Abstände zu zeichnen.
3. Das System berechnet ein Volumen aus drei Abständen.

Sie können ein Volumen auch mit Messungen über Module berechnen. Siehe „**Messungen über Module**“ [307].

HÜFTWINKEL

Hüftwinkel ermöglicht die Berechnung der Winkel zwischen der Dachlinie und der Nulllinie (α) sowie zwischen der Neigungslinie und der Nulllinie (β).

Zur Durchführung einer Hüftwinkel-Berechnung drücken Sie auf **Mess- werkzeuge**.



1. Drücken Sie **Hüftwinkel**
2. Ziehen Sie die Nulllinie als gleichmäßige Distanz.
3. Ziehen Sie die Dachlinie als gleichmäßige Distanz.
 α wird berechnet.
4. Ziehen Sie die Neigungslinie als gleichmäßige Distanz.
 β wird berechnet.

D:D

d:D ermöglicht die Berechnung des Umfangs des Hüftgelenkkopfs über das Acetabulum.



Zur Durchführung des Hüftkopfumfangs drücken Sie auf **Messwerkzeuge**.

1. Verwenden Sie den **Trackball** , um den Kreis in der Mitte des Hüftgelenkkopfs zu positionieren.
2. Drücken Sie **Auswählen**
3. Verwenden Sie den **Trackball** , um die Größe des Kreises an den Hüftgelenkkopf anzupassen.
D wird berechnet.
4. Ziehen Sie die Nulllinie als gleichmäßige Distanz.
d wird berechnet.
Das Verhältnis $d:D$ wird berechnet.

IMT

IMT berechnet die Intima-Media-Dicke einer bestimmten Region.

Drücken Sie **IMT** , um die Messung zu starten.

Eine Box wird auf dem Bild angezeigt; die Intima und Media werden automatisch innerhalb der Box geortet und die IMT-Messung wird im Messergebnisbereich angezeigt.



- **IMT** zeigt die Intima-Media-Dicke an.
- **B** zeigt die Boxbreite an.
- **Anpassen** zeigt den Prozentsatz der Box an, für den die IMT berechnet wird.

Verwenden Sie den **Trackball** , um die Box zu verschieben.

Drücken Sie **Auswählen** auf dem Bedienfeld, um die Boxgröße anzupassen und die Box zu drehen. Die Box wird mit gestrichelter Umrandung angezeigt.

Verwenden Sie den **Trackball** , um die Boxgröße anzupassen.

Verwenden Sie den **TouchRing™** , um die Box zu drehen.

Drücken Sie nochmals auf **Auswählen** , um den Größenanpassungs-/Drehmodus zu verlassen.

Sie haben Zugriff auf verschiedene Parameter, um die IMT-Berechnung zu optimieren:



IMT Optim.

Ermöglicht Ihnen die Auswahl zwischen verschiedenen Nachweisalgorithmen je nach der visuell geschätzten IMT.

Drehen Sie den Knopf unter **IMT Optim.** , um den Wert zu ändern.

IMT-Anzeige

Drehen Sie den Knopf unter **IMT-Anzeige** , um die IMT-Umfahrung auf dem Bild aus- oder einzublenden.

Zoom

Drehen Sie den Knopf unter Zoom, um das Bild zu zoomen und es in doppelter Größe auf dem Touchscreen anzuzeigen.

IMT-Umfahrung bearbeiten

Auf Wunsch können Sie die IMT-Umfahrung geringfügig verändern.

1. Drücken Sie **Intima editieren** oder **Media editieren** nach Bedarf
2. Bewegen Sie den Cursor, um die Umfahrung zu ändern
3. Deaktivieren Sie **Intima editieren** oder **Media editieren** , um den Bearbeitungsmodus für die IMT-Umfahrung zu verlassen

Manuell neu definieren

Auf Wunsch können Sie die IMT-Umfahrung manuell zeichnen.

1. Drücken Sie **Manuell neu definieren**
2. Drücken Sie **Neuzeichnen Intima** oder **Neuzeichnen Media** nach Bedarf
3. Die Intima- bzw. Media-Umfahrung wird gelöscht und ein Cursor wird angezeigt.

4. Bewegen Sie den Cursor, um die Intima bzw. Media manuell zu zeichnen
5. Drücken Sie **Manuell neu definieren beenden** , um den Modus „Manuell neu definieren“ zu verlassen

Zum Löschen fahren Sie die Linie rückwärts entlang.

Drücken Sie **IMT beenden** , um IMT zu verlassen.

B-MODUS RATIO

Das B-Modus Ratio ermöglicht einen Vergleich der Helligkeit von zwei Auswahlbereichen (ROI) auf demselben Bild.

Das Q-Modus Ratio ist nur im B-Modus bei fixiertem Bild verfügbar.



1. Berühren Sie **B-Modus Ratio**
2. Ein Kreis wird angezeigt, dessen Größe angepasst werden kann mit dem **TouchRing** und der sich verschieben lässt mit dem **Trackball**
3. Positionieren Sie den Kreis im festgelegten Auswahlbereich
4. Drücken Sie **Auswählen** , um ihn zu verankern.
5. Ein anderer Kreis wird angezeigt, dessen Größe angepasst werden kann mit dem **TouchRing** und der sich verschieben lässt mit dem **Trackball**
6. Positionieren Sie ihn im zweiten Auswahlbereich
7. Drücken Sie **Auswählen** , um ihn zu verankern.
8. Der Wert der einzelnen ROIs, ihre Tiefe, ihr Durchmesser und das Verhältnis zwischen den beiden Regionen wird angezeigt.

% DURCHMESSERREDUKTION

Dieses Tool ermöglicht Ihnen den Vergleich des Durchmessers des unverkleinerten Gefäßes mit dem Durchmesser des stenosierten bzw. verkleinerten Lumens.



1. Drücken Sie **% Durchmesser-reduktion**
2. Bewegen Sie den Cursor zum ersten Punkt des Restdurchmessers.
3. Drücken Sie **Auswählen** , um ihn zu verankern.
4. Bewegen Sie den nächsten Cursor zum zweiten Punkt des Restdurchmessers
5. Drücken Sie **Auswählen** , um ihn zu verankern.
6. Bewegen Sie den nächsten Cursor zum ersten Punkt des Gefäßdurchmessers
7. Drücken Sie **Auswählen** , um ihn zu verankern.
8. Bewegen Sie den nächsten Cursor zum zweiten Punkt des Gefäßdurchmessers
9. Drücken Sie **Auswählen** , um die Messung abzuschließen.

Das System berechnet den Gefäßdurchmesser, den Restdurchmesser sowie die Verkleinerung zwischen den beiden.

% FLÄCHENINHALTREDUKTION

Dieses Tool ermöglicht Ihnen den Vergleich einer Querschnittsdarstellung des unverkleinerten Gefäßes mit einer Umfahrung des stenosierten bzw. verkleinerten Lumens.



1. Drücken Sie **% Flächeninhaltsreduktion**
2. Bewegen Sie den Cursor zum ersten Punkt des Restbereichs.
3. Drücken Sie **Auswählen** , um die Umfahrung zu starten
4. Bewegen Sie den Trackball, um den Restbereich zu zeichnen
5. Drücken Sie **Auswählen** , um zu bestätigen
6. Bewegen Sie den nächsten Cursor zum ersten Punkt des Gefäßbereichs
7. Drücken Sie **Auswählen** , um die Umfahrung zu starten
8. Drücken Sie **Auswählen** , um die Messung abzuschließen.

Das System berechnet den Gefäßbereich, den Restbereich sowie die Verkleinerung zwischen den beiden.



DISTANCE RATIO (DISTANZVERHÄLTNIS)

1. Drücken Sie **Distance Ratio (Distanzverhältnis)**

2. Führen eine erste Distanzmessung durch.

3. Führen eine zweite Distanzmessung durch.

Das System berechnet das Verhältnis zwischen den beiden Distanzmessungen.

FOLLIKELZÄHLUNG

Die Follikelzählung ermöglicht das Zählen und Messen der in jedem Ovar befindlichen Follikel.

1. Schalten Sie im B-Modus

2. Stellen Sie sicher, dass die Bildqualität ausreicht, um die Follikel innerhalb des Ovars zu erkennen

3. **Frieren Sie** das Bild ein

4. Wählen Sie das Einzelbild, das die größte Anzahl an Follikeln enthält.



ANMERKUNG

Im gleichen Einzelbild sind ggf. nicht alle Follikel sichtbar. Wiederholen Sie bei Bedarf den gesamten Vorgang mit verschiedenen Einzelbildern.

• Follikelmessungen

1. Drücken Sie **1-Distanz**, **2-Distanz** oder **3-Distanz** (bei 3D) **Follikel** auf dem Touchscreen, um einen ersten Follikel zu messen

2. Ein Cursor wird angezeigt

3. Klicken Sie zum Starten des Messvorgangs

4. Wenn die Messung eines Follikels abgeschlossen ist, wird es in der Follikelliste angezeigt

#Folikelliste					
Rechte Ovarie:			Linke Ovarie:		
					GESAMT 4
	ID	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	Vol (cm3)
+	F1	2.7	-	-	0.01
×	F2	3.7	-	-	0.03
∩	F3	4.9	-	-	0.06
∩	F4	2.3	-	-	0.01

Auswahl entfernen Fenster ausblenden

5. Wiederholen Sie den Vorgang, um mehrere Follikel zu messen
6. Die Gesamtzahl der Follikel wird oben in der Follikelliste angezeigt



ANMERKUNG

Klicken Sie auf **Rechtes Ovar** oder **Linkes Ovar** bevor die Follikelmessung durchgeführt wird.

Die Daten der Follikelmessungen und -zählung fließen in den Bericht ein.

Klicken Sie im 3D-Modus auf den in jeder Ebene zu messenden Follikel, um diesen so zu zentrieren, dass er in jeder Ebene sichtbar ist.

DOPPLER ZEIT

Dieses Tool ist im UltraFast™ Doppler-Modus verfügbar.

Es ermöglicht Ihnen die Berechnung von Zeitverschiebungen zwischen 2 Zeitachsen und den Vergleich des Zeitverhaltens mehrerer Spektrogramme.



1. Fügen Sie Spektrogramme hinzu (Siehe „[Spektrogramm hinzufügen](#)“ [231])
2. Drücken Sie **Messwerkzeuge** auf dem Touchscreen
3. Drücken Sie **Doppler Zeit**
4. Positionieren Sie die erste Timeline
5. Drücken Sie **Auswählen** , um zu bestätigen
6. Positionieren Sie die zweite Timeline
7. Drücken Sie **Auswählen** , um zu bestätigen

Die Doppler-Zeitverschiebung wird im Messerergebnisbereich in Millisekunden angezeigt.

PW AUTOTRACE

Siehe „[PW Autotrace](#)“ [246].

VELOCITY-MAP

Velocity-Map steht nur im PW-Modus zur Verfügung.

1. Berühren Sie **Velocity-Map**.
Ein Vel Caliper wird auf dem PW-Spektrum, zusammen mit einer vertikalen und einer horizontalen Achse angezeigt.
2. Drücken Sie **Velocity-Map** , um den Caliper zu verankern.



Das **Velocity** -Tool ermöglicht Doppler-Geschwindigkeitsmessungen (Vel) in cm/s und Druckgradientenberechnungen (PG) in mmHg.

PSV / EDV

PSV / EDV steht nur im PW-Modus zur Verfügung.



1. Berühren Sie **PSV / EDV**.
Ein erster PSV-Caliper wird auf dem PW-Spektrum, zusammen mit einer vertikalen und einer horizontalen Achse angezeigt.
2. Drücken Sie **Auswählen**, um ihn zu verankern.
Ein zweiter Caliper mit folgender Meldung wird angezeigt:
 - EDV falls sich der Caliper oberhalb der Nulllinie befindet
 - MDV falls sich der Caliper unterhalb der Nulllinie befindet
3. Drücken Sie **Auswählen**, um sie zu verankern.

Das **PSV / EDV** Werkzeug ermöglicht folgende Messungen:

- Peak Systolic Velocity (PSV)
- End Diastolic Velocity (EDV)
- Resistive Index (RI)
- Ratio von Systole und Diastole
- Peak Pressure Gradient (PG)

GEFÄßDURCHMESSER

Gefäßdurchm. ermöglicht das Messen des Durchmessers eines Gefäßes.

Gefäßdurchm. steht nur im PW-Modus zur Verfügung.



1. Berühren Sie **Gefäßdurchm.**.
Ein erster Caliper wird im Abtastvolumen angezeigt.
2. Verwenden Sie den **Trackball**, um den ersten Teil des Calipers anzupassen.
3. Drücken Sie **Auswählen**, um ihn zu verankern.
Ein zweiter Caliper wird im Abtastvolumen angezeigt.
4. Verwenden Sie den **Trackball**, um den zweiten Teil des Calipers anzupassen.
5. Drücken Sie **Auswählen**, um ihn zu verankern.

DOPPLER-GEFÄLLE

Doppler-Gefälle ermöglicht die Messung der Beschleunigung oder Verlangsamung der Doppler-Kurve.

Doppler-Gefälle steht nur im PW-Modus zur Verfügung.



1. Berühren Sie **Doppler-Gefälle**.
Ein erster Caliper wird angezeigt.
2. Drücken Sie **Auswählen**, um den ersten Caliper zu verankern.
Das System verankert den ersten Messpunkt und zeigt einen zweiten aktiven Cursor.
3. Verwenden Sie den **Trackball**, um den aktiven Cursor zu bewegen.
4. Drücken Sie **Auswählen**, um den zweiten Caliper zu verankern.

DOPPLER-KURVE

Doppler-Kurve ermöglicht die Messung eines einzigen Herzzyklus im Doppler-Spektrum.

Doppler-Kurve steht nur im PW-Modus zur Verfügung.



1. Berühren Sie **Doppler-Kurve**.
2. Verwenden Sie den **Trackball**, um den aktiven Caliper zum ersten Messpunkt zu bewegen.
3. Drücken Sie **Auswählen**, um den ersten Punkt zu verankern.
Das System verankert den ersten Messpunkt und generiert einen zweiten aktiven Cursor.
4. Verwenden Sie den **Trackball**, um den aktiven Caliper auf dem vorgegebenen Pfad zu bewegen.
Diese Bewegung wird durch eine Linie angezeigt.
5. Drücken Sie **Auswählen**, um den zweiten Caliper zu verankern.

CONGESTION INDEX (STAUUNGSINDEX)

Der Congestion Index ermöglicht die Berechnung des Verhältnisses zwischen der Querschnittsfläche (cm²) und der Blutflussgeschwindigkeit (cm/s) der Pfortader.



1. Stellen Sie die **Winkelkorrektur** parallel zur Pfortader ein.
2. Drücken Sie **Auswählen** , um das PW-Spektrum zu aktualisieren
3. **Frieren Sie** das Bild ein
4. Berühren Sie **Congestion Index (Stauungsindex)**
5. Passen Sie den Pfortaderdurchmesser an, indem Sie den ersten und zweiten Caliper mit dem **Trackball** und der **Auswählen** - Schaltfläche positionieren
6. Zeichnen Sie die Doppler-Kurve während eines Herzzyklus.
7. Drücken Sie **Auswählen** , um die Messung zu beenden

SPM

Dieses Werkzeug ermöglicht die Messung einer Herzfrequenz vom M-Modus.



1. Berühren Sie bei der M-Modus-Messung **SPM**.
Es wird eine erste vertikale Linie angezeigt.
2. Verwenden Sie den **Trackball** , um die vertikale Linie entlang der Timeline zu bewegen.
3. Drücken Sie **Auswählen** , um zu bestätigen.
Es wird eine zweite vertikale Linie angezeigt.
4. Verwenden Sie den **Trackball** , um die zweite vertikale Linie entlang der Timeline zu bewegen.
5. Drücken Sie **Auswählen** , um zu bestätigen.

VOLUME FLOW

Im PW-Modus haben Sie die Möglichkeit, die Volumenflussrate in einem Gefäß zu messen.



1. Passen Sie die Größe des Abtastvolumens so an, dass es den gesamten Gefäßdurchmesser abdeckt.
2. Stellen Sie die **Winkelkorrektur** parallel zum Gefäß ein
3. Drücken Sie **Auswählen** , um das PW-Spektrum zu aktualisieren.
4. **Frieren Sie** das Bild ein

5. Drücken Sie **Mess.** auf dem Bedienpult
6. Drücken Sie **Volume Flow** auf dem Touchscreen
7. Passen Sie den Gefäßdurchmesser an, indem Sie den ersten und zweiten Caliper mit dem **Trackball** und der Schaltfläche **Auswählen** positionieren.
8. Zeichnen Sie die Doppler-Kurve während eines Herzzyklus.
9. Drücken Sie **Auswählen** , um die Messung zu beenden
Das System zeigt die Flußvolumenrate an.

Wenn **Autotrace** eingeschaltet ist:

1. Drücken Sie **Volume Flow**
2. Passen Sie den Gefäßdurchmesser an, indem Sie den ersten und zweiten Caliper mit dem **Trackball** und der Schaltfläche **Auswählen** positionieren

Das System zeigt die Flußvolumenrate an.

M DISTANZ

Dieses Werkzeug ermöglicht die Messung einer vertikalen Distanz zwischen zwei Messmarken (Caliper). Dieser Vorgang ist ähnlich einer Distanzmessung im B-Modus.

1. Berühren Sie bei der M-Modus-Messung **M Distanz**.
Ein erster Caliper wird angezeigt.
2. Verwenden Sie den **Trackball** , um den ersten Caliper zu bewegen.
3. Drücken Sie **Auswählen** , um zu bestätigen.
Ein zweiter Caliper wird angezeigt.
4. Verwenden Sie den **Trackball** , um den zweiten Caliper zu bewegen.
5. Drücken Sie **Auswählen** , um zu bestätigen.



Q-BOX™

Die Quantifizierungs-Box (Q-Box™) ermöglicht eine genaue Quantifizierung der Steifigkeit einer Region.



Q-Box™ ist nur im SWE™-Modus bei fixiertem Bild verfügbar.

1. Berühren Sie **Q-Box™**

Q-Box™ zeigt einen Kreis an, dessen Größe und Zielort geändert werden können, und der zur Referenz auf dem B-Bild dupliziert wird (Oben/Unten-Darstellung oder nebeneinander).

2. Drücken Sie zum Verankern „Select“ (Auswählen).

Q-BOX™ RATIO

Q-Box™ Ratio ermöglicht einen Vergleich der Steifigkeit von zwei Bereichen auf dem gleichen Bild.

Q-Box™ Ratio ist nur im SWE™-Modus bei fixiertem Bild verfügbar.

1. Berühren Sie **Q-Box™ Ratio**.

Q-Box™ Ratio zeigt einen Kreis an, dessen Größe und Zielort geändert werden können, und der zur Referenz auf dem B-Bild dupliziert wird (Oben/Unten-Darstellung oder nebeneinander).

2. Platzieren Sie die **Q-Box™** in dem Bereich mit der größten Steifigkeit

3. Drücken Sie **Auswählen**, um sie zu verankern.

4. Eine weitere **Q-Box™** wird angezeigt.

5. Platzieren Sie diese auf Weichgewebe.

6. Drücken Sie **Auswählen**, um sie zu verankern.



Q-BOX™ UMFAHREN

Q-Box™ Umfahren ermöglicht das manuelle Umfahren einer Q-Box im SWE-Bildgebungsmodus, um einige Elastizitätswerte innerhalb der umfahrenen Fläche zu erhalten.

Q-Box™ Umfahren ist nur im SWE™-Modus bei fixiertem Bild verfügbar.



1. Berühren Sie **Q-Box™ Umfahren**
2. Zeichnen Sie mit Ihrer bevorzugten Methode (mit dem Trackball oder mit dem Touchscreen, siehe „Umfahren“ [288]) eine Umfahrung
3. Drücken Sie **Auswählen** , um die Messung zu beenden

MULTI Q-BOX™

Multi Q-Box™ ermöglicht die automatische Berechnung des Durchschnitts mehrerer Q-Box-Messungen.

Multi Q-Box™ ist nur im SWE™-Modus bei fixiertem Bild verfügbar.



1. Berühren Sie **Multi Q-Box™**
2. Passen Sie die Größe der Q-Box an und verschieben Sie sie je nach Bedarf
3. Drücken Sie **Auswählen** , um zu bestätigen
4. Wenn Sie eine andere Q-Box hinzufügen möchten, wiederholen Sie den Vorgang.

Das System berechnet den Durchschnitt aller Q-Box-Ergebnisse.

Sie können den Multi Q-Box-Messzyklus auf mehreren Bildern fortsetzen.

5. Drücken Sie **Ende** , um den Multi Q-Box-Messzyklus zu beenden

SWE-STABILITÄTSINDEX

Das SWE-Stabilitätsindex-Werkzeug (mit **SI** in den Q-Box-Ergebnissen gekennzeichnet) ermöglicht den schnellen Ausschluss ungenauer Messungen bei der Befundung der Leberfibrose. Er ist in den Voreinstellungen Abdomen, Leber und Vaskulär Abdominal des Schallkopfs XC6-1 verfügbar.

1. Drücken Sie **Schallkopf**
2. Wählen Sie die Voreinstellung **Leber** in der Anwendung Abdominal am Schallkopf XC6-1
3. Optimieren Sie das B-Modus-Bild am rechten Leberlappen

4. Stellen Sie sicher, dass der Patient den Atem anhält
5. Drücken Sie **SWE** und optimieren Sie nach Bedarf
6. **Frieren Sie** das Bild ein
7. Führen Sie eine Q-Box-Messung des abgebildeten Gewebes durch
8. Wenn der angezeigte Stabilitätsindex <90 % beträgt, müssen Sie ggf. die Q-Box auf eine andere Position innerhalb der SWE-Box einstellen oder die Akquisition neu starten.



ACHTUNG

Ein Stabilitätsindex von >90 % validiert nicht die Genauigkeit der Elastizität.

Der Stabilitätsindex darf nur im Rahmen der Befundung der Leberfibrose analysiert werden.

Bei Bedarf kann das Stabilitätsindex-Werkzeug in der Systemkonfiguration deaktiviert werden.

Weitere Touchscreen-Messfunktionen

Die nachstehenden Funktionen erleichtern den Arbeitsablauf bei Messungen:

ALLES LÖSCHEN

Alles löschen ermöglicht Ihnen, alle auf dem fixierten Bild angezeigten Messungen zu löschen.

LETZTES LÖSCHEN

Letztes löschen ermöglicht Ihnen, nur den jeweils zuletzt verankerten Caliper zu löschen.

ENDE

Ende beendet die aktive Messung.

RÜCKGÄNGIG MACHEN/WIEDERHOLEN

Der Knopf unter **Rückgängig machen/Wiederholen** kann bei einer aktiven Umfahrung verwendet werden, um die Linie schrittweise vom Ende her zu löschen und durch eine neue Messung zu ersetzen.

ZOOM

Zoom ermöglicht Ihnen, den auf dem Touchscreen dargestellten Bildbereich zu vergrößern.

Drehen Sie den Knopf unter **Zoom**:

- im Uhrzeigersinn, um den Zoom-Faktor zu erhöhen
- gegen den Uhrzeigersinn, um den Zoom-Faktor zu verringern.

Verwenden Sie „Anpassen“, um das Bild in den Messbereich des Touchscreens einzupassen.

LETZTE ZUWEISEN

Letzte zuweisen ermöglicht Ihnen, die zuletzt ausgeführte Messung zu einem Label zuzuweisen.

1. Führen Sie eine Messung aus.
2. Berühren Sie „Letzte zuweisen“ auf dem Touchscreen.
Das System zeigt die Liste der für Ihre Messung verfügbaren Messmodule an
3. Klicken Sie auf die gewünschte Messung

Weitere Informationen zu Messungen über Module finden Sie unter [„Messungen über Module“ \[307\]](#)

BEENDEN

Beenden beendet aktive Messungen, schließt die Touchscreen-Messungen und kehrt zurück zum fixierten Bild.

Messungen über Module



Drücken Sie **Mess.** auf dem Bedienpult.

Auf der rechten Seite des Bildschirms wird eine Liste mit vorformulierten Messungen angezeigt.

Das verfügbare Modul richtet sich nach der gewählten Anwendung und dem aktivierten Modus.

Die Module können in der Systemkonfiguration festgelegt werden. Siehe „**Packages**“ [422].



Drücken Sie **Zeiger.**

Um die Liste zu scrollen, platzieren Sie den **Zeiger** auf der Liste und verwenden Sie den **TouchRing™**.

Wählen Sie das in Frage kommende Modul mit **Auswählen.**

Das entsprechende Messwerkzeug ist aktiviert (Abstand...).

Verfahren Sie bei der Messung wie bei den Basismessungen.

Sie können bis zu 5 Messungen über dasselbe Modul vornehmen. Sie werden mit dem entsprechenden Cursor in der Liste angezeigt.

Hinweis: Modul-Messungen können ausgeblendet sein. Dies hängt von der unter Systemkonfiguration gewählten Option ab.

Anpassung der Messung

Sie können die Messungen in der Systemkonfiguration anpassen.

Sie können wählen, ob immer der Touchscreen „Messung“ angezeigt werden soll beim Drücken auf **Einfrieren.**

Weitere Informationen finden Sie in **Kapitel 8, Individuelle Systemeinstellungen** [381].

Messgenauigkeit

2D-MESSUNGEN

Folgende Tabelle zeigt die Messgenauigkeit und den Messbereich für die auf dem Ultraschallsystem verfügbaren 2D-Messungen.

Messart	Genauigkeit	Bereich	Anmerkungen
Axiale Distanz	±10% oder 1 mm	0,01 bis 25 cm	Je nachdem was größer ist
Laterale Distanz	±10% oder 2 mm	0,01 bis 20 cm	Je nachdem was größer ist
Diagonale Distanz	±10% oder 2 mm	0,01 bis 25 cm	Je nachdem was größer ist
Gebiet	±10% oder 25 mm ²	0,01 bis 1000 cm ²	Je nachdem was größer ist *Konstante Umfahrungsgenauigkeit hängt vom Anwender ab.
Umfang	±10% oder 5 mm	0,03 bis 10.000 cm	Je nachdem was größer ist *Konstante Umfahrungsgenauigkeit hängt vom Anwender ab.
Ellipsoid-Volumen	±10%	0,01 bis 2000 cm ³	Je nachdem was größer ist

**Die angegebenen Toleranzen gelten nur für Messungen in einem homogenen Medium mit einer Schallgeschwindigkeit von 1540 m/s und mit einer nicht brechenden Oberfläche sowie einem Beschallungswinkel von 90 Grad zur Schallkopffläche.*

PANORAMA-ABSTANDSMAB

Metrisch	Spezifikation	Test	Anmerkungen
Schallkopf/ Voreinstellung	SL15-4/ Allgemein	I	1

Metrisch	Spezifikation	Test	Anmerkungen
Geometrie	Linear	I	1
Nominale Mittenfrequenz	8,5 MHz	I	1,2
Bildgebungs-frequenzbereich	4,0 – 15,0 MHz	I	1,2
Genauigkeit des Panorama-Abstandsmaßes	± 10%	M	3

Metrisch	Spezifikation	Test	Anmerkungen
Schallkopf/Voreinstellung	SL10-2/Allgemein	I	1
Geometrie	Linear	I	1
Nominale Mittenfrequenz	6,0 MHz	I	1,2
Bildgebungs-frequenzbereich	2,0 – 10,0 MHz	I	1,2
Genauigkeit des Panorama-Abstandsmaßes	± 10%	M	3

Erläuterung von Symbolen, die in den Tabellen zur Messgenauigkeit der Panorama-Bildgebung verwendet werden

Testbereich I: durch Inspektion oder qualitative Analyse überprüft.

Testbereich M: durch Messung überprüft.

Hinweis 1: Spezifikation dient ausschließlich zu Informationszwecken und ist keine prüfbare Anforderung auf Systemebene.

Hinweis 2: Spezifikation bezieht sich auf die Ultraschallimpulse, die im Bildgebungsteil der B-Modus-Sequenz verwendet werden.

Hinweis 3: Der Messgenauigkeitstest zur Panorama-Bildgebung wird mithilfe eines ATS 551 Small Parts-Phantoms durchgeführt und deckt eine maximale Distanz von ca. 20 cm ab.

MESSUNGEN IM M-MODUS

Metrisch	Spezifikation	Test	Anmerkungen
Schallkopf/ Voreinstellung	SC6-1/OB	I	1
Geometrie	Curved	I	1
Nominale Mittenfrequenz	3,5 MHz	I	1,2
M-Modus TX/ RX-Frequenz	2,5 / 4,5 MHz	I	1,2
Messgenauigkeit der axialen Distanz	$\pm 10\%$ oder 1mm	M	3, je nachdem was größer ist
Messgenauigkeit der Herzfrequenz	$\pm 10\%$	M	4

Metrisch	Spezifikation	Test	Anmerkungen
Schallkopf/ Voreinstellung	XC6-1 / OB	I	1
Geometrie	Curved	I	1
Nominale Mittenfrequenz	3,5 MHz	I	1,2
M-Modus TX/ RX-Frequenz	2,5 / 4,5 MHz	I	1,2
Messgenauigkeit der axialen Distanz	$\pm 10\%$ oder 1mm	M	3, je nachdem was größer ist
Messgenauigkeit der Herzfrequenz	$\pm 10\%$	M	4

Metrisch	Spezifikation	Test	Anmerkungen
Schallkopf/ Voreinstellung	SE12-3/OB	I	1
Geometrie	Curved	I	1
Nominale Mittenfrequenz	7 MHz	I	1,2
M-Modus TX/ RX-Frequenz	3,75 / 7,5 MHz	I	1,2
Messgenauigkeit der axialen Distanz	$\pm 10\%$ oder 1mm	M	3, je nachdem was größer ist

Metrisch	Spezifikation	Test	Anmerkungen
Messgenauigkeit der Herzfrequenz	$\pm 10\%$	M	4

Metrisch	Spezifikation	Test	Anmerkungen
Schallkopf/ Voreinstellung	SEV12-3 / OB	I	1
Geometrie	Curved	I	1
Nominale Mittelfrequenz	7 MHz	I	1,2
M-Modus TX/ RX-Frequenz	3,75 / 7,5 MHz	I	1,2
Messgenauigkeit der axialen Distanz	$\pm 10\%$ oder 1mm	M	3, je nachdem was größer ist
Messgenauigkeit der Herzfrequenz	$\pm 10\%$	M	4

Erläuterung von Symbolen, die in den Tabellen zur Messgenauigkeit des M-Modus verwendet werden

Testbereich I: durch Inspektion oder qualitative Analyse überprüft.

Testbereich M: durch Messung überprüft.

Hinweis 1: Spezifikation dient ausschließlich zu Informationszwecken und ist keine prüfbare Anforderung auf Systemebene.

Hinweis 2: Spezifikation bezieht sich auf die Ultraschallimpulse, die in der M-Modus-Sequenz verwendet werden.

Hinweis 3: Die Messgenauigkeitsüberprüfung der M-Modus-Distanz erfolgt mithilfe des CIRS- Phantoms Modell 040GSE.

Hinweis 4: Die Genauigkeit des Timings der fetalen Herzfrequenz wird mithilfe der nachfolgenden Geräte gemessen: AWG Agilent 33220A Oszilloskop Tektronix DPO4034 Ultrasound Gel Pad Aquaflex Ref. 04-02 HI-FI-Lautsprecher Monacor SP60/4.

Genauigkeit der axialen Distanz

Table 5.1. Messgenauigkeit der axialen Distanz - Abnahmekriterien und Messergebnisse

Schallkopf	Abnahmekriterien	Messergebnisse							
	Maximale Abweichung der axialen Distanz	Voreinstellung	Einstellung	TX/RX-Frequenz (MHz)	Bereich	Kalibrierter Abstand (mm)	Gemessener Abstand (mm)	Fehler	Prüfergebnis
SC6-1	10%	Frühe OB	THI	2,5 / 4,5 MHz	0,01 bis 20cm	10	10.0	0%	Bestanden
SE12-3	10%	Frühe OB	Fund	9 / 7,5 MHz	0,01 bis 8,5cm	10	9.5	5%	Bestanden
SEV12-3	10%	Frühe OB	Fund	9 / 7,5 MHz	0,01 bis 8,5cm	10	9.5	5%	Bestanden

Genauigkeit des Timings

Table 5.2. Genauigkeit des Timings - Abnahmekriterien und Messergebnisse

Schallkopf	Abnahmekriterien	Messergebnisse							
	SPM-Fehler	Voreinstellung	Einstellung	TX/RX-Frequenz (MHz)	Bereich	Periode pro Minute (Umfang)	Gemessene SPM	Fehler	Prüfergebnis
SC6-1	10%	Frühe OB	THI	2,5 / 4,5 MHz	6-1000 SPM	180	180	0%	Bestanden
SE12-3	10%	Frühe OB	Fund	6,42 / 6,42 MHz	6-1000 SPM	180	180	0%	Bestanden
SEV12-3	10%	Frühe OB	Fund	6,42 / 6,42 MHz	6-1000 SPM	180	180	0%	Bestanden

DOPPLER-MESSUNGEN

Das Doppler-Messkreuz wird auf einem einzigen Pixel an der gewünschten Stelle positioniert.

Geschwindigkeitsmessungen werden in cm/s bzw. m/s mit mindestens einer Dezimalkommastelle angezeigt.

Folgende Tabelle zeigt die Messgenauigkeit, den Bereich und die Toleranz für die auf dem Ultraschallsystem verfügbaren Doppler-Messungen.

Doppler-Messung	Systemtoleranz (je nachdem was größer ist)	Genauigkeit basierend auf dem	Bereich[r]
Geschwindigkeits- messung	<15 % relativer Fehler	Akquisition	PW: 6,2 cm/ s - 370 cm/s

Die angegebenen Toleranzen gelten nur für Messungen in einem homogenen Medium mit einer Schallgeschwindigkeit von 1540 m/s und mit einer nicht brechenden Oberfläche sowie einem Doppler-Winkel von 0°. Diese Genauigkeiten ergeben sich aus der Positionierung des Cursors auf der Doppler-Anzeige und den nachfolgenden Messungen.

Übersicht über Doppler-Messgenauigkeit und -sensitivität der Schallköpfe

Mit einem Kreuz (†) gekennzeichnete Elemente weisen darauf hin, dass der angegebene Wert nur der Information dient und keine prüfbare Anforderung auf Systemebene ist.

Testbereich I: durch Inspektion oder Analyse überprüft

Testbereich M: durch Messung überprüft

† : nur als Referenz

- (1) Mittenfrequenzen des Senders zur Graustufendarstellung
- (2) Mit CIRS 043 Doppler String-Phantom.

Messungen der Doppler-Geschwindigkeitsgenauigkeit mit dem Aixplorer® für den SL15-4 Schallkopf.

Metrik (Anmerkungen)	Spezifikation	Test
Schallkopf/Voreinstellung	SL15-4/ Brust	I
Geometrie †	Linear	
Nominale Mittenfrequenz	8,5 MHz	
PW-Doppler-Mittenfrequenz	5MHz	I
PW-Doppler, spektrale Geschwindigkeitsgenauigkeit (2)	=12,5% Fehler	M

Messungen der Doppler-Geschwindigkeitsgenauigkeit mit dem Aixplorer® für den SC6-1 Schallkopf.

Metrik (Anmerkungen)	Spezifikation	Test
Schallkopf/Voreinstellung	SC6-1/Abdomen	I
Geometrie †	Curved	
Nominale Mittenfrequenz	3,5 MHz	
Bildgebungsfrequenzbereich (1)	1,0 – 6,0 MHz	I
PW-Doppler-Mittenfrequenz	2,25 MHz	M
PW-Doppler, spektrale Geschwindigkeitsgenauigkeit (2)	=13% Fehler	M

Messungen der Doppler-Geschwindigkeitsgenauigkeit mit dem Aixplorer® für den XC6-1 Schallkopf.

Metrik (Anmerkungen)	Spezifikation	Test
Schallkopf/Voreinstellung	SC6-1/Abdomen	I
Geometrie †	Curved	
Nominale Mittenfrequenz	3,5 MHz	
Bildgebungsfrequenzbereich (1)	1,0 – 6,0 MHz	I

Metrik (Anmerkungen)	Spezifikation	Test
PW-Doppler-Mittenfrequenz	2,25 MHz	M
PW-Doppler, spektrale Geschwindigkeitsgenauigkeit (2)	=13% Fehler	M

Messungen der Doppler-Geschwindigkeitsgenauigkeit mit dem Aixplorer® für den SE12-3 Schallkopf.

Metrik (Anmerkungen)	Spezifikation	Test
Schallkopf/Voreinstellung	SE12-3/Prostata	I
Geometrie †	Micro-convex	
Nominale Mittenfrequenz	7 MHz	
Bildgebungsfrequenzbereich (1)	3 - 12 MHz	I
PW-Doppler-Mittenfrequenz	4,5 MHz	M
PW-Doppler, spektrale Geschwindigkeitsgenauigkeit (2)	=15% Fehler	M

Messungen der Doppler-Geschwindigkeitsgenauigkeit mit dem Aixplorer® für den SEV12-3 Schallkopf.

Metrik (Anmerkungen)	Spezifikation	Test
Schallkopf/Voreinstellung	SEV12-3/Prostata	I
Geometrie †	Micro-convex	
Nominale Mittenfrequenz	7 MHz	
Bildgebungsfrequenzbereich (1)	3 - 12 MHz	I
PW-Doppler-Mittenfrequenz	4,5 MHz	M
PW-Doppler, spektrale Geschwindigkeitsgenauigkeit (2)	=15% Fehler	M

Messungen der Doppler-Geschwindigkeitsgenauigkeit mit dem Aixplorer® für den SLV16-5 Schallkopf.

Metrik (Anmerkungen)	Spezifikation	Test
Schallkopf/Voreinstellung	SLV16-5/Brust	I
Geometrie †	motorbetrieben	
Nominale Mittenfrequenz	8,5 MHz	
Bildgebungsfrequenzbereich (1)	5 - 16 MHz	I
PW-Doppler-Mittenfrequenz	5 MHz	M
PW-Doppler, spektrale Geschwindigkeitsgenauigkeit (2)	±5% Fehler	M

Messungen der Doppler-Geschwindigkeitsgenauigkeit mit dem Aixplorer® für den SL10-2 Schallkopf.

Metrik (Anmerkungen)	Spezifikation	Test
Schallkopf/Voreinstellung	SL10-2/Vaskulär – Karotis	I
Geometrie †	Linear	
Nominale Mittenfrequenz	6 MHz	
Bildgebungsfrequenzbereich (1)	4,5 - 15 MHz	I
PW-Doppler-Mittenfrequenz	3,75 MHz	M
PW-Doppler, spektrale Geschwindigkeitsgenauigkeit (2)	±3% Fehler	M

Messungen der Doppler-Geschwindigkeitsgenauigkeit mit dem Aixplorer® für den SMC12-3 Schallkopf.

Metrik (Anmerkungen)	Spezifikation	Test
Schallkopf/Voreinstellung	SMC12-3/ Allgemein – Vaskulär	I
Geometrie †	Micro-convex	
Nominale Mittenfrequenz	7,5 MHz	
Bildgebungsfrequenzbereich (1)	3-12 MHz	I

Metrik (Anmerkungen)	Spezifikation	Test
PW-Doppler-Mittelfrequenz	4,5 MHz	M
PW-Doppler, spektrale Geschwindigkeitsgenauigkeit (2)	=14,5% Fehler	M

Messungen der Doppler-Geschwindigkeitsgenauigkeit mit dem Aixplorer® für den SLH20-6 Schallkopf.

Metrik (Anmerkungen)	Spezifikation	Test
Schallkopf/Voreinstellung	SLH20-6/MSK	I
Geometrie †	Linear	
Nominale Mittelfrequenz	11 MHz	
Bildgebungsfrequenzbereich (1)	6-20 MHz	I
PW-Doppler-Mittelfrequenz	7,5 MHz	M
PW-Doppler, spektrale Geschwindigkeitsgenauigkeit	=15% Fehler	M

Messungen der Doppler-Geschwindigkeitsgenauigkeit mit dem Aixplorer® für den XP5-1 Schallkopf.

Metrik (Anmerkungen)	Spezifikation	Test
Schallkopf/Voreinstellung	XP5-1/Vaskulär – TCD	I
Geometrie †	In Phasen	
Nominale Mittelfrequenz	2,9 MHz	
Bildgebungsfrequenzbereich (1)	1-5 MHz	I
PW-Doppler-Mittelfrequenz	1,875 MHz	M
PW-Doppler, spektrale Geschwindigkeitsgenauigkeit	=15% Fehler	M

FARB-DOPPLERSENSITIVITÄT:

Zweck dieser Prüfung ist die Messung der Eindringtiefe der farbkodierten Flussdarstellung.

Jeder Schallkopf wird für die Farb-Doppler-Funktion positioniert.

Das mit einem geneigten zylinderförmigen Gefäß von 4 mm Durchmesser ausgestattete Farb-Doppler-Phantom wird geschallt, um die Farb-Doppler-Sensitivität in Zentimetern zu messen.

Der Neigungswinkel beträgt 30°.

Die maximale Eindringtiefe bei der das Doppler-Signal auf der Anzeige nachgewiesen werden kann, wird anhand der Messschieber gemessen, wobei ein Schieber an der Hautlinie positioniert wird und der andere an der Stelle, an der das Farb-Doppler-Signal Ausfälle zu zeigen beginnt.

Der Abstand zwischen den beiden wird als Eindringtiefe definiert.

Die Signale, die unter dieser Schwelle liegen, gelten als Rauschen und sind keine gültigen Farb-Doppler-Signale.

Das Farb-Doppler-Phantom wird mit einer Wellenform konstanter Strömung verwendet.

(1) Mittenfrequenzen des Senders zur Graustufendarstellung

(2) AccuFlow-Q-Pumpe von Shelley mit Modell QATP-100/Z (Zerdine™-Gewebeimitationsmaterial, Schallgeschwindigkeit 1540 m/s ± 6 m/s bei 22°C, Dämpfungskoeffizient 0,5 dB/cm/MHz), Blutfluss-Phantom bei minimaler, maximaler und mittlerer durchschnittlicher Doppler-Geschwindigkeitsleistung.

Metrik (Anmerkungen)	Spezifikation	Test
Schallkopf/Voreinstellung	SL15-4/ Brust	I
Geometrie †	Linear	
Nominale Mittenfrequenz	8,5 MHz	
Bildgebungsfrequenzbereich (1)	4,0 – 15 MHz	I
CF-Frequenzbereich	5-9 MHz	M

Metrik (Anmerkungen)	Spezifikation	Test
Farbeindringtiefe (2)	4,0 cm	M

Metrik (Anmerkungen)	Spezifikation	Test
Schallkopf/Voreinstellung	SC6-1/Abdominal	I
Geometrie †	Curved	
Nominale Mittenfrequenz	3,5 MHz	
Bildgebungsfrequenzbereich (1)	1,0 – 6,0 MHz	I
CF-Frequenzbereich	1,9 - 3,8 MHz	M
Farbeindringtiefe (2)	12,5 cm	M

Metrik (Anmerkungen)	Spezifikation	Test
Schallkopf/Voreinstellung	XC6-1/Abdominal	I
Geometrie †	Curved	
Nominale Mittenfrequenz	3,5 MHz	
Bildgebungsfrequenzbereich (1)	1,0 – 6,0 MHz	I
CF-Frequenzbereich	2 - 2,5 MHz	M
Farbeindringtiefe (2)	12,5 cm	M

Metrik (Anmerkungen)	Spezifikation	Test
Schallkopf/Voreinstellung	SE12-3/Prostata	I
Geometrie †	Micro-convex	
Nominale Mittenfrequenz	7,5 MHz	
Bildgebungsfrequenzbereich (1)	3 - 12 MHz	I
CF-Frequenzbereich	4,5 - 7,5 MHz	M
Farbeindringtiefe (2)	5,0 cm	M

Metrik (Anmerkungen)	Spezifikation	Test
Schallkopf/Voreinstellung	SEV12-3/Prostata	I
Geometrie †	Micro-convex	
Nominale Mittenfrequenz	7,5 MHz	
Bildgebungsfrequenzbereich (1)	3 - 12 MHz	I

Metrik (Anmerkungen)	Spezifikation	Test
CF-Frequenzbereich	4,5 - 7,5 MHz	M
Farbeindringtiefe (2)	5,0 cm	M

Metrik (Anmerkungen)	Spezifikation	Test
Schallkopf/Voreinstellung	SLV16-5/	I
Geometrie †	motorbetrieben	
Nominale Mittenfrequenz	8,75 MHz	
Bildgebungsfrequenzbereich (1)	5 - 16 MHz	I
CF-Frequenzbereich	5 - 9 MHz	M
Farbeindringtiefe (2)	4,0 cm	M

Metrik (Anmerkungen)	Spezifikation	Test
Schallkopf/Voreinstellung	SL10-2/UntExtVenös	I
Geometrie †	Linear	
Nominale Mittenfrequenz	6 MHz	
Bildgebungsfrequenzbereich (1)	4,5 bis 15 MHz	I
CF-Frequenzbereich	3,7 bis 6,4 MHz	M
Farbeindringtiefe (2)	84 mm	M

Metrik (Anmerkungen)	Spezifikation	Test
Schallkopf/Voreinstellung	SMC12-3/Vaskulär	I
Geometrie †	Micro-convex	
Nominale Mittenfrequenz	7,5 MHz	
Bildgebungsfrequenzbereich (1)	3 - 12 MHz	I
CF-Frequenzbereich	4,5 - 7,5 MHz	M
Farbeindringtiefe (2)	5,0 cm	M

Metrik (Anmerkungen)	Spezifikation	Test
Schallkopf/Voreinstellung	SLH20-6/MSK	I
Geometrie †	Linear	
Nominale Mittenfrequenz	11 MHz	

Metrik (Anmerkungen)	Spezifikation	Test
Bildgebungsfrequenzbereich (1)	6 - 20 MHz	I
CF-Frequenzbereich	6,4 - 9 MHz	M
Farbeindringtiefe (2)	3,5 cm	M

Metrik (Anmerkungen)	Spezifikation	Test
Schallkopf/Voreinstellung	XP5-1/TCD	I
Geometrie †	In Phasen	
Nominale Mittenfrequenz	2,9 MHz	
Bildgebungsfrequenzbereich (1)	1 - 5 MHz	I
CF-Frequenzbereich	2,2 - 2,5 MHz	M
Farbeindringtiefe (2)	12,5 cm	M

ELASTOGRAPHIE-MESSUNGEN

SWE-Eindringtiefe und räumliche Auflösung

Die nachfolgenden Tabellen dokumentieren die Spezifikationen der Eindringtiefe und der räumlichen Auflösung der SWE für alle Schallköpfe, bei denen der SWE-Modus verfügbar ist.

Metrisch	Spezifikation	Test	Anmerkungen
Schallkopf/ Voreinstellung	SLV16-5/ Allgemein	I	1
Geometrie	Linear	I	1
Nominale Mittelfrequenz	8,8 MHz	I	1, 2
Bildgebungs- frequenzbereich	5,0 – 16,0 MHz	I	1, 2
SWE-Eindringtiefe Bereich	2.5 - 28 mm	M	4
SWE räumliche Auflösung	2,0 mm	M	5

Metrisch	Spezifikation	Test	Anmerkungen
Schallkopf/ Voreinstellung	SL15-4/ Allgemein	I	1
Geometrie	Linear	I	1
Nominale Mittelfrequenz	8,5 MHz	I	1, 2
Bildgebungs- frequenzbereich	4,0 – 15,0 MHz	I	1, 2
SWE-Eindringtiefe Bereich	2.5 - 30 mm	M	4
SWE räumliche Auflösung	2,0 mm	M	5

Metrisch	Spezifikation	Test	Anmerkungen
Schallkopf/ Voreinstellung	SL10-2/Allgemein	I	1
Geometrie	Linear	I	1

Metrisch	Spezifikation	Test	Anmerkungen
Nominale Mittenfrequenz	6,0 MHz	I	1, 2
Bildgebungs-frequenzbereich	2,0 – 10,0 MHz	I	1, 2
SWE-Eindringtiefe Bereich	2.5 - 45 mm	M	4
SWE räumliche Auflösung	2,0 mm	M	5

Metrisch	Spezifikation	Test	Anmerkungen
Schallkopf/ Voreinstellung	SLH20-6/ Allgemein	I	1
Geometrie	Linear	I	1
Nominale Mittenfrequenz	11,0 MHz	I	1, 2
Bildgebungs-frequenzbereich	6,0 – 20,0 MHz	I	1, 2
SWE-Eindringtiefe Bereich	1 - 20 mm	M	4
SWE räumliche Auflösung	2,0 mm	M	5

Metrisch	Spezifikation	Test	Anmerkungen
Schallkopf/ Voreinstellung	SE12-3/ Allgemein	I	1
Geometrie	Micro- curved Linear	I	1
Nominale Mittenfrequenz	7,5 MHz	I	1, 2
Bildgebungs-frequenzbereich	3,0 – 12,0 MHz	I	1, 2
SWE-Eindringtiefe Bereich	2.5 - 30 mm	M	4
SWE räumliche Auflösung	2,0 mm	M	5

Metrisch	Spezifikation	Test	Anmerkungen
Schallkopf/ Voreinstellung	SEV12-3/ Allgemein	I	1

Metrisch	Spezifikation	Test	Anmerkungen
Geometrie	Micro-curved Linear	I	1
Nominale Mittenfrequenz	7,5 MHz	I	1, 2
Bildgebungs-frequenzbereich	3,0 – 12,0 MHz	I	1, 2
SWE-Eindringtiefe Bereich	2.5 - 30 mm	M	4
SWE räumliche Auflösung	2,0 mm	M	5

Metrisch	Spezifikation	Test	Anmerkungen
Schallkopf/ Voreinstellung	SMC12-3/ Allgemein	I	1
Geometrie	Micro-curved Linear	I	1
Nominale Mittenfrequenz	7,5 MHz	I	1, 2
Bildgebungs-frequenzbereich	3,0 – 12,0 MHz	I	1, 2
SWE-Eindringtiefe Bereich	2.5 - 30 mm	M	4
SWE räumliche Auflösung	3,0 mm	M	5

Metrisch	Spezifikation	Test	Anmerkungen
Schallkopf/ Voreinstellung	SC6-1/General	I	1
Geometrie	Curved linear	I	1
Nominale Mittenfrequenz	3,5 MHz	I	1, 2
Bildgebungs-frequenzbereich	1,0 – 6,0 MHz	I	1, 2
SWE-Eindringtiefe Bereich	25 - 75 mm	M	4
SWE räumliche Auflösung	3,0 mm	M	5

Metrisch	Spezifikation	Test	Anmerkungen
Schallkopf/ Voreinstellung	XC6-1/Allgemein	I	1
Geometrie	Curved linear	I	1
Nominale Mittelfrequenz	3,5 MHz	I	1, 2
Bildgebungs- frequenzbereich	1,0 – 6,0 MHz	I	1, 2
SWE-Eindringtiefe Bereich	25 - 70 mm	M	4
SWE räumliche Auflösung	2,0 mm	M	5

Erläuterung von Symbolen, die in den Tabellen zur SWE-Eindringtiefe und zur räumlichen Auflösung verwendet werden

Testbereich I: durch Inspektion oder qualitative Analyse überprüft.

Testbereich M: durch Messung überprüft.

Hinweis 1: Spezifikation dient ausschließlich zu Informationszwecken und ist keine prüfbare Anforderung auf Systemebene.

Hinweis 2: Spezifikation bezieht sich auf die Ultraschallimpulse, die im Bildgebungsteil der SWE-Sequenz verwendet werden.

Hinweis 3: Die maximale SWE-Eindringtiefe ist als größte Tiefe definiert, für die das SWE-Bild eine gute Farbfüllung und minimales Rauschen aufweist. Die SWE-Eindringtiefenbereiche SLV16-5, SL15-4, SL10-2, SLH20-6, SE12-3, SEV12-3, SMC12-3, XC6-1 und SC6-1 wurden abgeleitet, indem die Regionen mit Hintergrundmaterial gleicher Elastizität des CIRS 049A QA Elasticity-Phantoms geschallt wurden.

Hinweis 4: Die räumliche Auflösung der SWE erhält man mithilfe eines spezialangefertigten Phantoms, das rechteckige Gewebeimitationsblöcke mit einem unterschiedlichen Elastizitätskontrast enthält, und durch das Messen der durchschnittlichen Breite der Scherwellengeschwindigkeit im Vergleich zum Abstand der Kurven im Bereich der Block-Interfaces in lateraler und axialer Richtung.

3D MESSUNGEN

Schallkopf	ModusTX/RX-Frequenzen	Tiefe (mm)	Transversale Auflösung (mm)
SLV16-5	THI	20	1.3

3D-Messung der transversalen räumlichen Auflösung für B-Modus-Bildgebung für den SLV16-5

Schallkopf	ModusTX/RX-Frequenzen	Tiefe (mm)	Transversale Auflösung (mm)
SEV16-5	Fundamental	35	2

3D-Messung der transversalen räumlichen Auflösung für B-Modus-Bildgebung für den SEV12-3

Die Volumenmessgenauigkeit ist definiert als $\pm 10\%$ im Bereich 0,01 bis 2000 cm³.

BI-RADS®-Analyse

Das Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS®) ist eine standardisierte Klassifikation des American College of Radiology für Ultraschalluntersuchungen der Brust.

Es setzt sich aus verschiedenen Deskriptoren zusammen, nach denen der Arzt einen Befund erstellen kann, der auf eine Kategorie verweist.

BI-RADS® Befundkategorien

BI-RADS® score	Assessment (Befund)
0	Assessment incomplete: Weitere Untersuchung erforderlich
1	Negative (Negativ)
2	Benign finding (Gutartiger Befund)
3	Probably benign finding (Vermutlich gutartiger Befund)
4	Suspicious Malignancy (Verdacht auf Malignität)
	4a <i>Low suspicion for malignancy</i> (Geringer Verdacht auf Malignität)
	4b <i>Moderate suspicion for malignancy</i> (Angemessener Verdacht auf Malignität)
	4c <i>High suspicion for malignancy</i> (Dringender Verdacht auf Malignität)
5	Highly suggestive of malignancy (Stark auf eine Malignität hindeutend)
6	Known biopsy-proven malignancy (Biopsie durchgeführt, Malignität nachgewiesen)

BI-RADS® Befundkategorien für Ultraschall des American College of Radiology.



ANMERKUNG

Unabhängig von der gewählten Sprache werden die BI-RADS Kriterien nur in Englisch angezeigt.


Mit dem integrierten BI-RADS® -Klassifikationsformular lassen sich Klassifizierungen nach dem BI-RADS®-Lexikon leicht und einfach durchführen.

Bis zu zwölf Läsionen können in einer einzigen Untersuchung klassifiziert werden.

Durchführung von Klassifizierungen nach dem BI-RADS®-Lexikon



1. Fixieren Sie das Bild im Modus, **in dem Sie sich befinden**, mit Freeze.
2. Berühren Sie **Neue Läsion hinzufügen**.
Auf dem Touchscreen wird eine Schaltfläche für eine neue Läsion (z.B. Läsion A) angezeigt.
3. Verwenden Sie **den Trackball** zum Positionieren des Läsionspfeilmarkers, um die Zielläsion auf dem Hauptbildschirm anzuzeigen.
4. Drücken Sie **Auswählen**, um die Pfeilmarkierung zu verankern.
Das BI-RADS®-Menü wird links vom Bild auf dem Hauptbildschirm angezeigt.

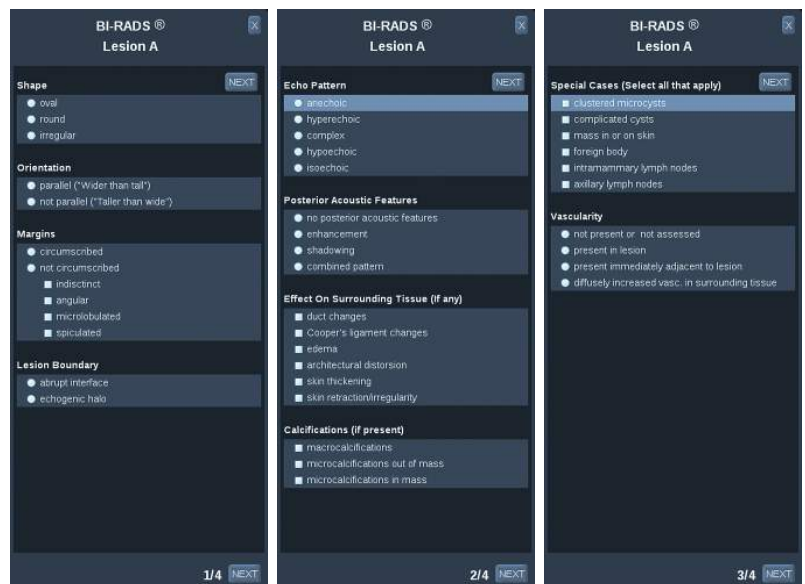

5. Wählen Sie die Ergebnisse im BI-RADS®-Klassifikationsformular mit dem **Zeiger** und der Schaltfläche **Auswählen** aus
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **WEITER** im Menü oder auf die Einstellung **Läsionsseite** auf dem Touchscreen, um auf die nächste Seite des BI-RADS®-Menüs zu gelangen.
7. Drücken Sie **Bild speichern**.
8. Berühren Sie **Beenden** zum Schließen des BI-RADS®-Menüs.



WICHTIGER HINWEIS

Nach dem Ausfüllen des BI-RADS®-Klassifikationsformulars und dem Verlassen des Menüs müssen Sie auf **Bild speichern** drücken, damit die Daten gespeichert werden.

Das BI-RADS®-Menü kann so oft aufgerufen werden wie nötig, um den Befund für eine bestimmte Läsion zu vervollständigen.

Messungen, die durchgeführt werden, während das BI-RADS®-Menü offen ist, werden direkt mit der ausgewählten Läsion (z.B. Läsion A) im Endbericht verbunden.

Messungen, die im BI-RADS®-Menü durchgeführt werden, werden auf Seite 4 angezeigt.

Bilddokumentationen von Klassifizierungen nach dem BI-RADS®-Lexikon

Es ist unmöglich, alle Merkmale des BI-RADS®-Klassifikationsformulars mit einem einzigen Bild zu dokumentieren.

Bei der Dokumentation von Läsionsmerkmalen bietet das integrierte BI-RADS®-Menü deshalb die Möglichkeit, ein oder mehrere BI-RADS®-Merkmale mit einem entsprechenden Bild zu dokumentieren.

1. Legen Sie eine neue Läsion fest und rufen Sie das BI-RADS® Menü auf.

2. Wählen Sie mit dem Zeiger und der Schaltfläche **Auswählen** die Ergebnisse aus dem BI-RADS® Klassifikationsformular aus.
3. Drücken Sie **Bild speichern**.

Die Bildnummer wird rechts von der ausgewählten Antwort auf dem BI-RADS®-Klassifikationsformular angezeigt.

4. Sie können BI-RADS® nach jedem **Bild speichern** -Vorgang verlassen und zur selben Läsion zurückkehren, um zusätzliche Daten mit neuen Bildern einzugeben.
5. Werden divergierende Ergebnisse für eine Läsion eingegeben, so kann eine Ergebnisberichtigung im Bericht durchgeführt werden (siehe **Kapitel 6, Berichte [335]**).

Thy-RADS™ -Analyse

Das von SuperSonic Imagine entwickelte Schilddrüsen Berichts- und Datensystem (Thy-RADS™) bietet eine Reihe von klinischen Beurteilungskriterien für Ultraschalluntersuchungen der Schilddrüse.


Mit dem integrierten Thy-RADS™-Formblatt können Sie eine Analyse leicht durchführen.

In einer einzigen Untersuchung können bis zu 8 Knoten beurteilt werden.

Durchführung von Klassifizierungen nach dem Thy-RADS™ -Lexikon



1. Fixieren Sie das Bild in der Schilddrüsen-Applikation mit FREEZE.
2. Berühren Sie **Thy-RADS**.
3. Berühren Sie **Neuen Knoten hinzufügen**.
Ein Touchscreen-Button für einen neuen Knoten (z.B. Knoten A) wird angezeigt.
4. Positionieren Sie den Pfeilmarker mit dem **Trackball**, um den Zielknoten auf dem Hauptbildschirm anzuzeigen.
5. Drücken Sie **Auswählen**, um die Pfeilmarkierung zu verankern.
Links auf dem Hauptbildschirm wird das Thy-RADS™-Menü angezeigt.

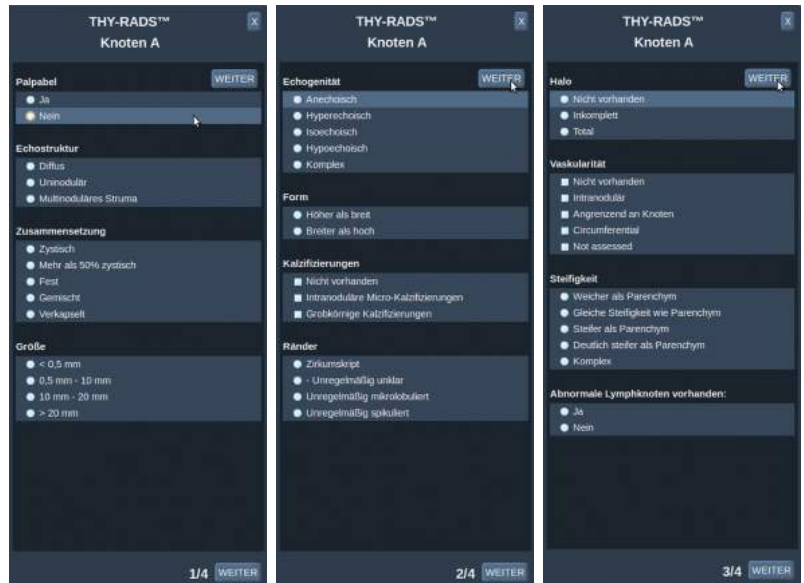

6. Wählen Sie mit **Zeiger** und **Auswählen** die Ergebnisse aus dem Thy-RADS™-Klassifizierungsformular aus.
7. Klicken Sie auf **WEITER** im Menü oder die Einstellung **Knoten** auf dem Touchscreen, um auf die nächste Seite des Thy-RADS™-Menüs zu gelangen.
8. Drücken Sie **Bild speichern**.
9. Berühren Sie **Beenden**, um das Thy-RADS™-Menü zu schließen.



WICHTIGER HINWEIS

Nach dem Ausfüllen des Thy-RADS™-Formulars und dem Verlassen des Menüs müssen Sie auf **Bild speichern** drücken, damit die Daten gespeichert werden.

Das Thy-RADS™-Menü kann so oft aufgerufen werden wie nötig, um den Befund für einen bestimmten Knoten zu vervollständigen.

Messungen, die durchgeführt werden, während das Thy-RADS™-Menü offen ist, werden im Endbericht direkt dem ausgewählten Knoten (zum Beispiel Knoten A) zugeordnet.

Messungen, die im Thy-RADS™-Menü durchgeführt wurden, werden auf Seite 4 angezeigt.

Bilddokumentationen von Klassifizierungen nach dem Thy-RADS™-Lexikon

Es ist nicht möglich, alle Merkmale des Thy-RADS™-Klassifikationsformulars mit einem einzigen Bild zu dokumentieren.

Bei der Dokumentation von Knotenmerkmalen bietet das integriert Thy-RADS™-Menü deshalb die Möglichkeit, mehrere Thy-RADS™-Merkmale mit einem entsprechenden Bild zu dokumentieren.

1. Legen Sie einen neuen Knoten fest und rufen Sie das Thy-RADS™-Menü auf.
2. Wählen Sie mit **Zeiger** und **Auswählen** die Ergebnisse aus dem Thy-RADS™-Klassifikationsformular aus.
3. Drücken Sie **Bild speichern**.

Die Bildnummer wird rechts von der ausgewählten Antwort auf dem Thy-RADS™-Klassifikationsformular angezeigt.

4. Sie können Thy-RADS™ nach jedem **Bild speichern** verlassen und zum selben Knoten zurückkehren, um zusätzliche Daten mit neuen Bildern einzugeben.
5. Werden divergierende Ergebnisse für eine Läsion eingegeben, so kann eine Ergebnisberichtigung im Bericht durchgeführt werden (siehe [Kapitel 6, Berichte \[335\]](#)).

Kapitel 6. Berichte

Beschreibung der Berichtfunktion

Das Aixplorer® Ultraschallsystem ermöglicht die Verwaltung aller während der Untersuchung gesammelten Daten und die anschließende Erstellung eines Berichtes.

Die Berichtfunktion besteht aus zwei verschiedenen Ansichtsmodi:

- dem Berichtaufbau, mit dem Sie den Bericht erstellen und individuell anpassen können
- der Berichtsvorschau, die Ihnen eine Druckansicht des Berichts oder der generierten PDF-Datei zeigt.

Drücken Sie **Bericht** , um die Berichtfunktion aufzurufen.
Das Fenster Berichtaufbau wird geöffnet.



Berichtaufbau

Beschreibung des Berichtaufbaus

Mit Berichtaufbau können Sie bestimmen, welche Daten aus der Untersuchung in den Endbericht übernommen werden sollen.

Der Berichtaufbau setzt sich aus fünf Registerkarten zusammen:

- **Patienteninfo**: hier können Sie Patienteninformationen abrufen/bearbeiten
- **Bilder**: hier werden die während der Untersuchung aufgenommenen Bilder, Messungen, BI-RADS®/Thy-RADS™ und Anmerkungen gespeichert
- **Messungen**: hier können Sie alle Messungen mit Messmodulen und Untersuchungsberechnungen abrufen

- **Worksheet:** hier können Sie die konstitutiven Elemente des Abschlussberichts anzeigen, die Patientendaten und Patientendateneingabe ändern, Diagramm- oder anatomische Daten verwenden, um die durchgeführten, markierten Messungen über Module zu lokalisieren oder zu präzisieren.
- **Fazit:** hier können Sie Ihre Schlussfolgerung der Untersuchung eingeben.

Patienteninformationen

Das Register Patienteninfo zeigt Informationen zum Patienten an; hier finden Sie dieselben Infos wie auf dem Patientendaten-Bildschirm.

Wie der Bildschirm „Patientendaten“ zeigt das Register **Patienteninformationen** allgemeine Informationen sowie spezifische Informationen zu jeder klinischen Anwendung.

Sie können alle Informationen des Patienteninfo-Registers bearbeiten.

Sie können Daten in mehr als ein Register eingeben, wenn mehrere Anwendungen verwendet wurden.

Drücken Sie auf **Patient** , um zur Patientendateneingabe zurückzukehren, alle Ihre Änderungen aus dem Berichtaufbau werden gespeichert und aktualisiert.

Anhand der Symbole Info zeigen/Info ausblenden können Sie auswählen, welche Informationen im Endbericht angezeigt werden sollen:

- Bei Auswahl des **Info zeigen**  werden diese Informationen in den Endbericht aufgenommen.
- Bei Auswahl des **Info ausblenden**  werden diese Informationen nicht in den Endbericht aufgenommen.

Im Endbericht ausgeblendete Informationen bleiben weiterhin als Teil der Untersuchung im Ultraschallsystem gespeichert.

Bilder

Die Registerkarte **Bilder** im Berichtaufbau zeigt alle im Rahmen der Untersuchung aufgenommenen Bilder an.

Die Bilder werden in klinischen Anwendungsregistern organisiert.

Vertikale Registerkarten beziehen sich auf mit der BI-RADS®- und Thy-RADS™-Tabelle verknüpfte Bilder.

Durch Auswählen der Bilder legen Sie fest, welche im Endbericht angezeigt werden.

Klicken Sie auf das Symbol über dem Bild, um dieses in den Bericht aufzunehmen oder daraus auszuschließen.

Bilder, die nicht im Endbericht angezeigt werden, bleiben weiterhin als Teil der Untersuchung im Ultraschallsystem gespeichert.

Neben jedem Bild befindet sich ein für Anmerkungen vorgesehenes Textfeld.

Wählen Sie das weiße Textfeld neben dem Bild, für das Anmerkungen hinzugefügt werden sollen.

Die Eingabe von Anmerkungen erfolgt über die **Tastatur**.

Messungen zu den einzelnen Bildern werden im Bereich rechts angezeigt.

Anhand der Symbole Info zeigen/Info ausblenden können Sie auswählen, welche Messungen im Endbericht angezeigt werden sollen:

- Bei Auswahl von **Info zeigen** werden die Messungen in den Endbericht aufgenommen.
- Bei Auswahl des **Info ausblenden** werden die Messungen nicht in den Endbericht aufgenommen.

Wurden keine Messungen zu den ausgewählten Bildern durchgeführt, so ist dieser Bereich leer.





ANMERKUNG

Klicken Sie für OB-Bilder, bei denen Messungen über Module durchgeführt wurden, auf **DIAGRAMM** , um die Messungen auf der OB-Referenztafel anzuzeigen.

Messungen

Die Registerkarte **Messung** zeigt Ihnen die zur Untersuchung gehörenden Messergebnisse mit Modulen und Berechnungen.

In dieser Registerkarte können Sie jedes Ergebnis aus den Messungen mit Modulen für den Endbericht ein- oder ausblenden.

1. Wählen Sie die gewünschte Unterregisterkarte (nur für Anwendungen verfügbar, in denen während der Untersuchung Messungen mit Modulen vorgenommen wurden).

Selbst wenn ein Bild mit Messungen über Module gelöscht wurde, bleiben die dazugehörigen Messungen in der Datei.

2. Sie können jedes Ergebnis der Textmodul-Messung einzeln über die Kontrollkästchen neben jeder Messung ein- oder ausblenden.

Ausgeblendete Modul-Messungen werden im Endbericht nicht angezeigt.

Kommt eine Messung mehrmals vor, können Sie auswählen, welche Messung im Bericht angezeigt wird.

Das Hauptergebnis jeder Messung kann bearbeitet werden. Bearbeitete Werte sind gekennzeichnet durch [] .

Klicken Sie auf + , um alle Unterergebnisse der durchgeführten Messungen anzuzeigen.

Worksheet

Die Registerkarte **Worksheet** ist in Unterregisterkarten unterteilt, die den Anwendungen Einstellungen entsprechen, die zur Durchführung der Untersuchung verwendet werden.

Bei allen Anwendungen zeigt „Worksheet“ die auf der Registerkarte „Patientendateneingabe“ und „Patienteninformationen“ enthaltenen Informationen an. Es enthält Diagramme und klinische Informationen für Brust, Urogenital und Schilddrüse sowie Schmerzbereich für MSK. Die Messungen werden ebenfalls angezeigt sowie BI-RADS oder THY-RADS, falls durchgeführt.

Bei den Anwendungen „Vaskulär“ und „OB-GYN“ zeigt die Registerkarte „Worksheet“ die durchgeführten Messungen über Module in einem interaktiven Bericht oder unter „Anatomische Daten“ an.

OB-GYN Worksheet

Das OB-GYN **Worksheet** zeigt die Untersuchungsdaten, die Angaben über die Verfassung des Fötus und die in der OB-GYN-Anwendung durchgeführten Messungen über Module in einem interaktiven Bericht an.

OB-PERZENTILE UND Z-SCORES

OB-Perzentildaten zum geschätzten Fötalgewicht und zum Wachstum werden verwendet, um das fetale Wachstum zu interpretieren und zu überwachen. GFG-Perzentildaten werden zusammen mit dem GFG angegeben, das anhand von Daten aus Fachartikeln und dem Gestationsalter bestimmt wird. Wachstum-Perzentildaten werden zusammen mit fötalen Messwerten angegeben, die anhand von Daten aus Fachartikeln und dem Gestationsalter bestimmt werden. Anhand dieser Daten kann der Arzt das fetale Wachstum einschätzen und die Schwangerschaft betreuen.



ACHTUNG

Überprüfen Sie den Patientennamen und die ID, bevor Sie eine Untersuchung für eine neue Patientin beginnen.

Überprüfen Sie das Datumsformat, bevor Sie das Geburtsdatum, das Datum der letzten Periode (Last Menstrual Period, LMP), den geschätzten Geburtstermin (Estimated Date of Delivery, EDD), den Zeugungszeitpunkt (Date Of Conception, DOC) und den Zeitpunkt des Eisprungs eingeben. Eine falsche Eingabe dieser Parameter führt zur einer falschen Berechnung des Gestationsalters (GA).

Tragen Sie den EDD und das GA zur Sicherung in die Patientenakte ein.

Betätigen Sie die Schaltfläche „Activate OB calcs“ (OB-Berechnungen aktivieren) auf der Seite für die Patientendateneingabe (PDE), um Obstretik-Berechnungen durchzuführen.

Es muss angegeben werden, welcher OB-Autor für jede einzelne Messung verwendet wird, um das GA und ein geschätztes Fetalgewicht (Estimated Fetal Weight, GFG) zu berechnen.

Eine Diagnose darf nicht nur auf einer Messung oder Einzeldaten basieren. Berücksichtigen Sie immer die gesamte klinische Bewertung der Patientin, einschließlich der Patientenakte.

Je nach der Position des Fötus können einige Messwerte falsch sein. Berücksichtigen Sie immer die gesamte klinische Bewertung der Patientin, einschließlich der Patientenakte.


Das System ermöglicht fetale Messwerte für bis zu fünf Feten. Achten Sie darauf, die Feten während der Messungen nicht zu verwechseln.

Für jede durchgeführte Messung können Sie über die Auswahlfunktion auf der Registerkarte „Measurements“ (Messungen) im Bericht entweder den ersten, letzten, den durchschnittlichen, minimalen, maximalen oder einen der fünf Messwerte wählen, die angezeigt werden können.

Seien Sie beim Löschen von Messwerten vorsichtig, da dies die Auswahlergebnisse beeinflusst.

Abweichungen von den normalen Messwerten müssen anhand von Grafiken und Literatur beurteilt werden.

1. Obstetrik-Messungen über Module durchführen
2. Die Messungen werden im Befund zusammen mit der Angabe zum Perzentil und zum Z-Score angegeben (basierend auf der gewählten Referenztabelle, dem Autor und dem Datum).

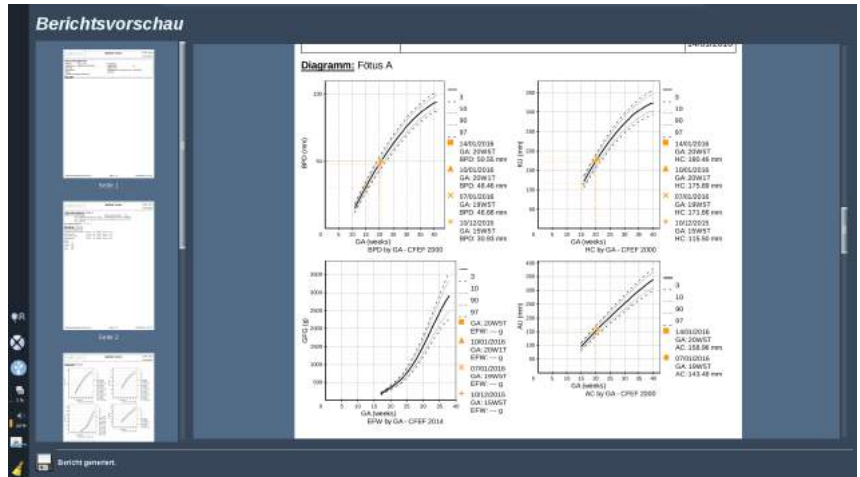

OB-TRENDDATEN

Anhand der OB-Trenddaten können Sie die Entwicklung des Fötus für Untersuchungen, die im System gespeichert werden, in Abhängigkeit von der Zeit beurteilen.



ACHTUNG

Stellen Sie sicher, dass die Option „OB-Berechnungen aktivieren“ bei der Patientendateneingabe aktiviert ist, um Perzentile und Z-Scores verwenden zu können.

1. Geben Sie die Patientendaten in das Patientenformular ein.




ACHTUNG

Stellen Sie sicher, dass die Patienten-ID, der Name (Vorname, Zweitname, Nachname), das Geschlecht und das Geburtsdatum mit

den Angaben aus früheren Untersuchungen übereinstimmt, sodass das System den Patienten wiedererkennt.

2. Im unteren Bereich des Patientenformulars werden in einem Feld die vorherigen Untersuchungen desselben Patienten angezeigt.

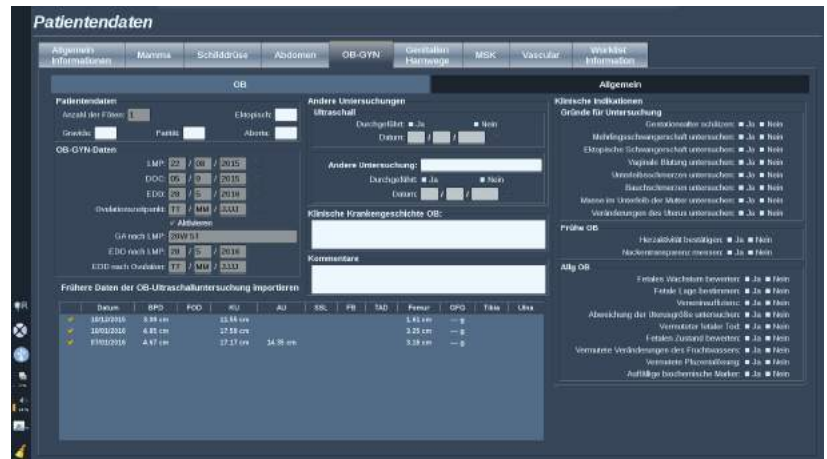

3. Wählen Sie die vorherigen Daten für den aktuellen Patienten.
4. Die vorherigen Daten für den aktuellen Patienten werden in das System importiert.
5. Beginnen Sie mit der Untersuchung und führen Sie die aktuellen Messungen durch.
6. Bei Bedarf können Sie Bilder speichern.
7. Drücken Sie **Bericht**
8. Für jede Messung werden die Daten aus vorherigen Untersuchungen die die aktuelle Untersuchung im selben Diagramm angezeigt.

Worksheet „Vaskulär“

BESCHREIBUNG

Das **Worksheet** „Vaskulär“ zeigt die in der vaskulären Anwendung durchgeführten Messungen über Module und die Voreinstellungen unter „Anatomische Daten“ an.

HINZUFÜGEN VON INFORMATIONEN ZUM ARBEITSBLATT

Es ist möglich, jedem Arbeitsblatt Informationen hinzuzufügen, z. B. zur Scan-Qualität oder zu klinischen Befunden.

1. Klicken Sie auf das Textfeld neben der entsprechenden Messung.

Die Tastatur wird automatisch geöffnet.

2. Geben Sie Text ein, um weitere Informationen anzugeben.

Sie können jedem Arbeitsblatt Messergebnisse, Anmerkungen, Plaque-Formen und Pfeile hinzufügen.

1. Drücken Sie **Toolbox** auf dem Touchscreen
In der Hauptanzeige wird ein Fenster geöffnet.
2. Klicken Sie auf die Informationen, die Sie hinzufügen möchten.

Annotation

1. Drücken Sie **Annotation** in der Toolbox

Ein Anmerkungsfeld wird im Arbeitsblatt angezeigt.

2. Bearbeiten Sie es mithilfe der Tastatur.
3. Klicken Sie auf die Anmerkung und verwenden Sie den **Trackball**, um das Anmerkungsfeld ggf. zu verschieben.
4. Doppelklicken Sie auf das Anmerkungsfeld, um es bei Bedarf zu drehen.

Pfeile werden um das Anmerkungsfeld herum angezeigt.

5. Verwenden Sie den **TouchRing**, um das Anmerkungsfeld zu drehen.
6. Drücken Sie **Auswählen**, um zu bestätigen.



Plaque-Form

1. Klicken Sie in der Toolbox auf die hinzuzufügende Plaque-Form.
2. Klicken Sie auf die Plaque-Form und verwenden Sie den **Trackball**, um sie ggf. zu verschieben.
3. Drücken Sie **Auswählen**, um zu bestätigen.
4. Doppelklicken Sie auf die Plaque-Form, um sie bei Bedarf zu drehen. Pfeile werden um die Plaque-Form herum angezeigt.
5. Verwenden Sie den **TouchRing**, um die Plaque-Form zu drehen.
6. Drücken Sie **Auswählen**, um zu bestätigen.

Pfeil hinzufügen

1. Klicken Sie auf ein Element im Arbeitsblatt, um es über einen Pfeil mit den anatomischen Daten zu verknüpfen.
2. Drücken Sie **Pfeil hinzufügen** in der Toolbox
3. Klicken Sie auf den hinzugefügten Pfeil.
4. Verwenden Sie den **Trackball**, um die Spitze des Pfeils auf die gewünschte Stelle in den anatomischen Daten zu verschieben.
5. Drücken Sie **Auswählen**, um zu bestätigen.

ENTFERNEN VON INFORMATIONEN AUS DEM WORKSHEET

1. Klicken Sie auf das zu entfernende Element.
2. Drücken Sie **Toolbox** auf dem Touchscreen
3. Klicken Sie auf **Entfernen** in der Toolbox

WEITERE ARBEITSBLATT-SPEZIFISCHE INFORMATIONEN ZUR CAROTIS

Unten auf dem Karotis-Arbeitsblatt sind die SRU¹ und NASCET² - Kriterien aufgeführt.

¹Society of Radiologists in Ultrasound

²North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial

Klicken Sie auf die für die Befunde geltenden Elemente, um sie dem Arbeitsblatt hinzuzufügen.

Worksheet „Leber“

Das Worksheet „Leber“ enthält eine Zusammenfassung aller mit Q-Box Leber gekennzeichneten Messungen, die an der Leber durchgeführt wurden und detaillierte Informationen zu jeder Q-Box Messung.

Q-Box Liver

	Depth	Diam	Stability Index	Elasticity				Velocity			
				Min	Max	Mean	SD	Min	Max	Mean	SD
Q-Box 1	4.6 cm	8.00 mm	67 %	3.3 kPa	16.7 kPa	14.9 kPa	2.7 kPa	1.0 m/s	2.4 m/s	2.2 m/s	0.2 m/s
Q-Box 2	4.4 cm	10.00 mm	68 %	7.6 kPa	17.1 kPa	15.3 kPa	2.0 kPa	1.6 m/s	2.4 m/s	2.3 m/s	0.2 m/s
Q-Box 3	4.4 cm	10.00 mm	60 %	3.0 kPa	17.1 kPa	15.6 kPa	2.0 kPa	1.0 m/s	2.4 m/s	2.3 m/s	0.2 m/s
Q-Box 4	4.8 cm	9.00 mm	54 %	10.6 kPa	19.1 kPa	16.9 kPa	1.2 kPa	1.9 m/s	2.5 m/s	2.4 m/s	0.1 m/s
Q-Box 5	4.4 cm	9.00 mm	63 %	15.3 kPa	20.2 kPa	17.3 kPa	0.8 kPa	2.3 m/s	2.6 m/s	2.4 m/s	0.1 m/s
Q-Box 6	4.6 cm	9.00 mm	63 %	13.0 kPa	19.3 kPa	17.2 kPa	0.9 kPa	2.1 m/s	2.5 m/s	2.4 m/s	0.1 m/s
Q-Box 7	4.2 cm	12.00 mm	60 %	15.0 kPa	27.0 kPa	19.7 kPa	2.4 kPa	2.2 m/s	3.0 m/s	2.6 m/s	0.2 m/s
Q-Box 8	4.6 cm	8.00 mm	77 %	16.6 kPa	21.5 kPa	19.2 kPa	1.4 kPa	2.4 m/s	2.7 m/s	2.5 m/s	0.1 m/s
Q-Box 9	4.4 cm	13.00 mm	84 %	13.3 kPa	26.2 kPa	19.4 kPa	2.4 kPa	2.1 m/s	3.0 m/s	2.5 m/s	0.2 m/s
Q-Box 10	4.4 cm	15.00 mm	90 %	8.1 kPa	24.8 kPa	18.8 kPa	2.6 kPa	1.6 m/s	2.9 m/s	2.5 m/s	0.2 m/s
Mean	4.5 cm	10.3 mm		10.6 kPa	20.9 kPa	17.4 kPa	1.8 kPa	1.8 m/s	2.6 m/s	2.4 m/s	0.1 m/s

Mean	17.4 kPa	2.4 m/s
Median	17.3 kPa	2.4 m/s
IQR	3.6 kPa	0.3 m/s
SD	1.7 kPa	0.1 m/s

So rufen Sie das Worksheet „Q-Box Leber“ ab:

1. Drücken Sie nach einer SWE-Akquisition auf **Mess.** auf dem Bedienpult
2. Wählen Sie das **Leber SWE** Messpaket auf dem Touchscreen
3. Die Liste der verfügbaren Q-Box Leber SWE-Messungen über Module wird auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.
4. Verwenden Sie eine der Messungen über Module
5. Drücken Sie **Bild speichern**
6. Drücken Sie **Bericht**
7. Klicken Sie auf die **Worksheet** Registerkarte

Fazit

Die Registerkarte **Fazit** im Berichtaufbau ist ein Bildschirm mit freier Texteingabe.

Geben Sie hier abschließende Informationen bzw. Schlussfolgerungen zur Untersuchung ein.

Anhand der Symbole **Info zeigen**/**Info ausblenden** können Sie auswählen, ob die Schlussfolgerung im Schlussbericht angezeigt werden:

- Bei Auswahl des Symbols **Info zeigen** wird dieses Fazit in den Endbericht aufgenommen
- Bei Auswahl des Symbols **Info ausblenden** wird dieses Fazit nicht in den Endbericht aufgenommen

Generieren von Berichten

Drücken Sie auf **Bericht erstellen** , um den gewünschten Bericht als PDF zu erstellen



Mit dem **Zeiger** und dem **TouchRing™** können Sie zwischen den Seiten navigieren.

Drucken von Berichten

Sind Sie mit der Berichtsvorschau zufrieden, können Sie den Bericht ausdrucken.

Berühren Sie die Schaltfläche **Bericht drucken** auf dem Touchscreen, um den Bericht auf einem konfigurierten Drucker auszudrucken.

Wenn kein Drucker verfügbar ist, wird der Bericht nicht gesendet.



Kapitel 7. Bild- und Datenmanagement

Daten speichern

Bilder und Clips aufnehmen

Sie können Einzelbilder oder Clip-Sequenzen aufnehmen und speichern.

Clips lassen sich retrospektiv und prospektiv aufnehmen.

Die aufgenommenen Bilder und die Clip-Sequenzen werden in der Patientenuntersuchung gespeichert. Eine Miniaturansicht ist in der Live-Bild-Darstellung und der Review-Darstellung verfügbar.

Während der Aufnahme wird ein entsprechendes Symbol unten auf dem Bildschirm angezeigt.

Nach der Aufnahme wird eine Miniaturbild-Anzeige des Bildes angezeigt.

Aufnahme eines Einzelbildes

1. Drücken Sie **Einfrieren**
2. Drücken Sie **Bild speichern**

Das Bild wird auf der Miniaturansichtsleiste auf der rechten Bildschirmseite angezeigt.



Aufnahmen eines retrospektiven Clips Sequenz

Der Aixplorer® ermöglicht die Aufnahme retrospektiver Clips.



1. Drücken Sie **Einfrieren**.
2. Drücken Sie **Clip speichern** , um die Bilder der gerade aufgenommenen Clip-Sequenz zu speichern.
Nach Fertigstellung des Clips ertönt ein Signal, das Ihnen seine Speicherung bestätigt.
Der Clip wird in der Miniaturbild-Anzeige auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.

Warten Sie erst den Signalton ab, bevor Sie **Überprüfen** drücken.

Aufnahmen eines prospektiven Clips Sequenz

Im Live-Bildgebungsmodus ermöglicht der Aixplorer® die Aufnahme prospektiver Clips.

1. Drücken Sie **Clip speichern** im Live-Modus, um prospektive Clips aufzunehmen.

Die prospektive Clip-Aufnahme wird automatisch nach der in der Systemkonfiguration angegebenen Zeit beendet.

Nach Fertigstellung des Clips ertönt ein Signal, das Ihnen seine Speicherung bestätigt.

2. Drücken Sie nochmals auf **Clip speichern** oder **Einfrieren** , um die Aufnahme zu stoppen.

Nehmen Sie keine Änderung der Bildskalierung während der prospektiven Clip-Aufnahme vor, v.a. nicht der folgenden Einstellungen:

- **Digitaler Zoom**
- **Anzeigeformat**
- **Dual oben/unten**
- **Modus „Breites Bild“**

Auf einer DICOM-Bildaufwurf-Workstation kann die Änderung der Bildskalierung möglicherweise zu ungenauen Messungen danach auf prospektiven DICOM-Clips führen.

3. Der Clip wird in der Miniaturbild-Anzeige auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.

Warten Sie erst den Signalton ab, bevor Sie **Überprüfen** drücken.



ANMERKUNG

Wenn **Bild speichern** während der Aufnahme eines prospektiven Clips gedrückt wird, wird dieser Prozess hierdurch nicht gestoppt.

Zeiteinstellung für prospektive Clip-Aufnahmen

Siehe [Kapitel 8, Individuelle Systemeinstellungen \[381\]](#).

Zeiteinstellung für prospektive Clip-Aufnahmen:

Zur Festlegung der Dauer einer prospektiven Clip-Aufnahme wählen Sie aus folgenden Möglichkeiten:

2 Sek, 5 Sek, 10 Sek, 15 Sek, 30 Sek, 1, 2, 3, 4, 5 Min.

Hinweis: Im Kontrastmittel-Modus kann eine spezifische Zeiteinstellung vorgenommen werden.

Zuschneiden von Clips

Durch das Zuschneiden können Einzelbilder vom Anfang oder Ende eines prospektiven oder retrospektiven Clips verworfen werden.

1. Drücken Sie **Trim** auf dem Touchscreen.

Der Trackball wird eingestellt auf **Trim End**.

2. Verschieben Sie den **Trackball** zum Anfang des Clips, um die ausgewählten Einzelbilder vom Ende des Clips zu verwerfen.

Der Trackball wird eingestellt auf **Trim Start**

3. Verschieben Sie den **Trackball** zum Ende des Clips, um die erforderlichen Einzelbilder vom Anfang des Clips zu verwerfen.
4. Deaktivieren Sie **Trim** (Zuschneiden), um die zugeschnittenen Einzelbilder auszuschneiden.
5. Drücken Sie auf **Clip speichern** , um einen neuen Clip ohne die ausgeschnittenen Einzelbilder zu speichern.

Drücken Sie bei Bedarf auf **Trim Reset** (Zuschneiden zurücksetzen), um die Einzelbilder von Trim Start und Trim End wieder am Start bzw. am Ende der Aufnahme anzufügen.

Untersuchung überarbeiten

Anhand von Review können Sie aufgenommene Bilder während oder nach einer Untersuchung prüfen und vergleichen. Es können auch mehrere Untersuchungen für einen Patienten überarbeitet werden. Von Review aus können Sie die gespeicherten Bilder oder Clip-Sequenzen ansehen.

Gespeicherte Bilder können angesehen, gedruckt, gesucht und gesichert werden.

Bildanalysen können ebenso von Review aus durchgeführt werden.

Bilder, die auf der Festplatte des Ultraschallsystems gespeichert wurden, können an DVD-, USB-Datenträger oder DICOM-kompatible Geräte in einem Netzwerk gesendet werden.

Allgemeines über Review

Der Review-Modus bietet verschiedene Funktionen, unter anderem die Durchführung von Messungen und das Abspielen von Clip-Sequenzen.

MESSUNGEN IM REVIEW-MODUS

Im Review-Modus können Messungen auf Bildern der laufenden Untersuchung durchgeführt werden.

Das Bild muss zuerst in voller Größe angezeigt werden.

Messungen, die im Review-Modus bei der laufenden Untersuchung durchgeführt werden, können im Bericht gespeichert werden.

Messungen, die im Review-Modus bei früheren Untersuchungen durchgeführt wurden, können nicht gespeichert werden.

Zur Anzeige der Bedienelemente für die Messung auf dem Review-Touchscreen drücken Sie **Mess**. Zum Löschen aller Messungen aus einem Bild berühren Sie **Alle löschen** auf dem Review-Touchscreen.



Überarbeitung starten

Drücken Sie **Überprüfen** , um den Review-Modus zu aktivieren.

Je nachdem, ob gerade eine Untersuchung stattfindet oder nicht, wird eine entsprechende Anzeige dargestellt.

Bei einer laufenden Untersuchung öffnet sich beim Drücken auf **Überprüfen** der Review-Bildschirm.

Wird gerade keine Untersuchung durchgeführt, so öffnet sich beim Drücken auf **Überprüfen** das Patientenverzeichnis.

Wurde in der Systemkonfiguration eine automatische Löschung eingestellt, können Sie einige Untersuchungen blockieren, damit diese nicht automatisch gelöscht werden.

Drücken Sie erneut auf **Überprüfen** um in den Live-Bildgebungsmodus zurückzukehren.

Patientenverzeichnis

Das Patientenverzeichnis ist eine Liste von Untersuchungen, die auf dem ausgewählten Laufwerk gespeichert sind.

Das Patientenverzeichnis ermöglicht dem Anwender die Sortierung, Ansicht und Übertragung von Untersuchungen.

Wird gerade keine Untersuchung durchgeführt, so öffnet sich beim Aufrufen von Review das Patientenverzeichnis.

SPALTENÜBERSCHRIFTEN IM PATIENTENVERZEICHNIS

Im Patientenverzeichnis sind Untersuchungen in einer Tabelle mit mehreren Spalten aufgeführt.

Die Überschrift jeder Spalte beschreibt den Inhalt der Spalte mit Text oder Symbol.

Klicken Sie auf die Überschrift der Spalte, um die Liste nach dieser Spalte zu sortieren.

Die Miniaturansichten befinden sich auf der rechten Seite des Review-Bildschirms.



Berühren Sie **Vorheriges Miniaturbild** und **Nächstes Miniaturbild** auf dem Touchscreen, um sich durch die Miniaturansichten zu bewegen. Mit dieser Funktion wird das vorhergehende oder nächste Bild als Vollbild angezeigt.

Wenn Sie den Zeiger auf eine Miniaturansicht setzen, so wird diese vergrößert.

Wenn Sie auf das Miniaturansichtsbild klicken, wird es in seiner vollen Größe dargestellt.

Klicken Sie auf das Mülleimer-Symbol über einem Miniaturbild, so wird das Bild gelöscht.

VERGLEICHEN VON BILDERN

Im Review-Modus können zwei Bilder eines Patienten aus verschiedenen Untersuchungen verglichen werden.



1. Wählen Sie die beiden Untersuchungen im Patientenverzeichnis aus
2. Klicken Sie auf **Auswahl anzeigen**.
3. Klicken Sie auf den Patientennamen auf der linken Seite.

Es werden Miniaturansichten der beiden Untersuchungen angezeigt.

4. Wählen Sie die beiden Bilder, die Sie betrachten möchten, und berühren Sie **Vergleichen**.

Die beiden Bilder werden nebeneinander angezeigt. Sie können gleichzeitig überarbeitet werden, und es können Messungen durchgeführt sowie Annotationen hinzugefügt werden.

Bilder drucken

Drucken Sie aus Umweltschutzgründen nur, wenn dies wirklich erforderlich ist.

Verwenden Sie zum Speichern eher digitale Medien.

Bilder können auf einem integrierten Drucker (optional) oder auf Druckern in einem Netzwerk ausgedruckt werden.

Das System ermöglicht die Konfigurierung von Drucksteuerungen und Druckern.

Drucken im Live-Bildgebungsmodus

Während einer Untersuchung können Live-Bilder oder fixierte Bilder gedruckt werden.

1. Erstellen Sie eine Aufnahme des gewünschten Bildes.
2. Drücken Sie **Bild speichern** auf dem Bedienpult

Die Bilder werden je nach Druckerkonfigurationen (siehe [Kapitel 8, Individuelle Systemeinstellungen \[381\]](#)) ausgedruckt.



ANMERKUNG

Sie können die Taste **S** zum Speichern und Drucken in der Systemkonfiguration einrichten.

DRUCKEN VON GESPEICHERTEN BILDERN AUF EINEM LOKALEN DRUCKER

Vom Review-Bildschirm aus können gespeicherte Einzel- und Mehrfachbilder nacheinander, 1 bis 15 Bilder pro Seite, gedruckt werden.



1. Drücken Sie **Überprüfen**
2. Wählen Sie eine Untersuchung aus.
3. Drücken Sie **Auswahl anzeigen**
4. Wählen Sie die Bilder auf der Review-Anzeige, die Sie drucken möchten.
5. Wählen Sie den Drucker, auf dem Sie drucken möchten, mit der entsprechenden Taste auf dem Touchscreen.
6. Wählen Sie das gewünschte Layout mit dem entsprechenden Knopf aus.
7. Berühren Sie **Drucken**.

WICHTIG

Zum Konfigurieren des Netzwerkes müssen Sie das Netzwerkkabel auf der Rückseite des Aixplorer® zuerst an ein lokales Netzwerk anschließen.

DRUCKEN VON GESPEICHERTEN BILDERN AUF EINEM DICOM-DRUCKER (OPTIONAL)

Vom Review-Bildschirm aus können Einzelbilder an einen DICOM-Drucker gesendet werden.



1. Drücken Sie **Überprüfen**
2. Wählen Sie eine Untersuchung aus.
3. Berühren Sie **Auswahl anzeigen**
4. Wählen Sie auf dem Review-Bildschirm ein oder mehrere Bilder aus.
5. Berühren Sie **DICOM-Export**
6. Wählen Sie im Dialogfenster "Senden an" einen DICOM-Drucker aus.
7. Klicken Sie auf **OK** , um die ausgewählten Bilder zu drucken.

Zum Konfigurieren Ihres DICOM-Druckers siehe, „Geräte“ [396]

Untersuchung senden

Formate exportieren

Im Review-Modus können Bilder an DICOM-Drucker (optional) und Server in einem Netzwerk, an eine CD/DVD oder USB-Datenträger gesendet werden.



ANMERKUNG

Das Format kann vor dem Senden von Bildern oder Clips ausgewählt werden.

Informationen zum Senden von vergrößerten Bildern an einen Drucker oder an ein USB-Gerät finden Sie unter [Kapitel 8, Individuelle Systemeinstellungen \[381\]](#).

Bilder senden

Vom Review-Bildschirm aus können Bilder vom System an DICOM-kompatible Drucker und Server in einem Netzwerk gesendet werden. Die Bilder können auch zum DVD-Laufwerk des Systems gesendet werden.

1. Wählen Sie auf dem Review-Bildschirm ein oder mehrere Bilder aus.
2. Berühren Sie **Senden an DICOM** oder **Exportieren als JPEG/H264**
3. Wählen Sie im Dialogfenster "Senden an" einen Zielort aus.

Im Dialogfenster "Senden an" sind sowohl die gesamte Speicherkapazität als auch der noch verfügbare Platz auf dem Datenträger für einen USB-Datenträger angezeigt.





ANMERKUNG

Kreuzen Sie das Kästchen Bild-Anonymisierung im Senden An-Fenster an, um die Identifikation auf Bildern und in der Datenbank zu löschen.

4. Klicken Sie auf **OK** , um die ausgewählten Bilder zu senden
Die Untersuchungen werden in mit Patientennamen versehene Ordner exportiert.



Auswerfen einer CD/DVD

1. Klicken Sie auf das entsprechende Symbol (CD or DVD)
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm

Zum manuellen Entfernen der CD/DVD führen Sie das Ende einer Büroklammer in die neben dem CD/DVD-Player befindliche Öffnung ein.



Trennen einer USB-Verbindung


1. Warten Sie, bis das Symbol  (System exportiert Daten auf USB) durch das Symbol  im Hinweissymbole-Bereich ersetzt wurde.
2. Trennen Sie die USB-Verbindung.



WARNUNG

Achten Sie darauf, dass weder der Anwender noch der Patient den USB-Port mit den Händen oder anderen Körperteilen außen bzw. innen berührt.

Sie können den Export-Status jederzeit überprüfen, indem Sie auf der linken Bildschirmseite das entsprechende Symbol (Icon) anklicken.

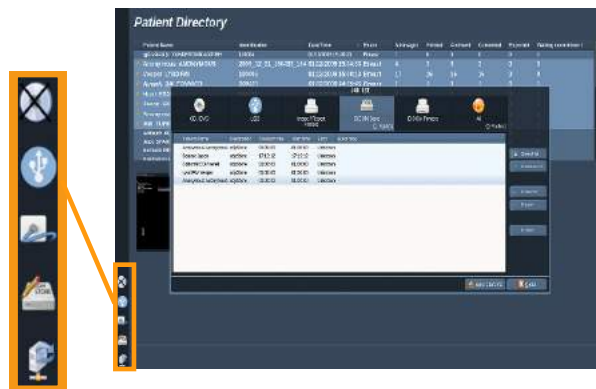


Weitere Informationen über Symbole finden Sie in „Hinweissymbole“ [174].

Clinical Data Export (optional)

Der Aixplorer® ermöglicht die Verwaltung eigener klinischer Studien durch den Export von Daten in zwei unterschiedlichen Formaten.

Mit dem **User's Club** -Format lassen sich anonymisierte Bilder und Messungen zusammen exportieren, um diese in klinischen Studien bereitzustellen (User's Club-Tool).

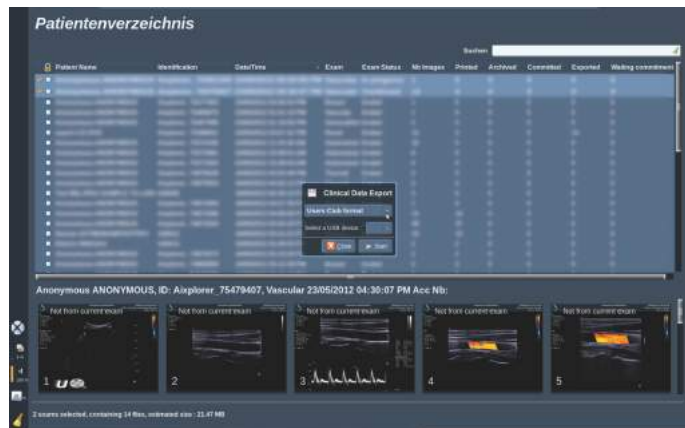

Mit dem **Excel** -Format lassen sich nicht anonymisierte Messungen exportieren, um diese Daten in einem Arbeitsblatt zu verwenden.

Die **Excel** -Datei enthält alle während der Untersuchungen durchgeführten Messungen.

Bei einigen, mit dem gleichen Messwerkzeug durchgeführten Messungen werden die Durchschnitts- und Mittelwerte automatisch berechnet und angezeigt.

Exportieren von Daten:

1. Stecken Sie ein USB-Gerät ein.
2. Drücken Sie auf **Überprüfen** , um auf das Patientenverzeichnis zuzugreifen.
3. Wählen Sie die zu exportierende(n) Untersuchung(en) aus.
4. Berühren Sie **Clinical Data Export** auf dem Touchscreen
5. Wählen Sie ein Exportformat aus.
6. Wählen Sie Ihr Gerät aus.
7. Drücken Sie **Start**



Das System exportiert Ihre Daten im ausgewählten Format auf das USB-Gerät.

Weitere Informationen finden Sie im User's Club:
www.aixplorerclub.com [http://www.aixplorerclub.com]

DICOM Strukturierte Berichterstellung (DICOM SB)

ist eine Dokumentarchitektur zum Verschlüsseln und Austauschen klinischer Informationen und Befunde in Zusammenhang mit der radiologischen Bildgebung. Der DICOM SB wird unterstützt für die klinischen Anwendungen OB-GYN und Vaskulär auf dem Aixplorer®.

Für die OB-GYN-Anwendung wird der NEMA Template ID 5000 OB-GYN Ultrasound Procedure Report verwendet.

Für die Vaskulär-Anwendung wird der NEMA Template ID 5100 Vascular Ultrasound Procedure Report verwendet.

Ein Bild/Clip, das/der mit der klinischen Anwendung OB-GYN oder Vaskulär aufgenommen wurde, löst das Erstellen eines DICOM SB aus.

KONFIGURATION

DICOM-Speicher

1. Klicken Sie in der Systemkonfiguration auf das Unterregister **Geräte** der Registerkarte „Verwaltung“.
2. Klicken Sie auf **Erweiterte Optionen** Ihres DICOM-Speichergeräts
3. Klicken Sie auf **Auswahl bearbeiten**
4. Wählen Sie das Kontrollkästchen **SR-Export aktivieren** Ihrer Wahl

DICOM-Wechselmedien

1. Klicken Sie in der Systemkonfiguration auf das Unterregister **Geräte** der Registerkarte „Verwaltung“.
2. Klicken Sie auf die **DICOM-Wechselmedien**
3. Klicken Sie auf **Auswahl bearbeiten**
4. Wählen Sie das Kontrollkästchen **SR-Export aktivieren** Ihrer Wahl

SENDEMETHODEN

Automatisches Senden von DICOM SB

Wenn der Export des SB für ein oder mehrere DICOM-Speichergeräte aktiviert ist, wird am Schluss der Untersuchung automatisch eine DICOM SB-Datei an diese/s konfigurierte/n DICOM-Speichergerät/e gesendet.

Senden von DICOM SB auf Anfrage

Während einer Live-Untersuchung und bei aktiviertem Export des SB für ein oder mehrere DICOM-Speichergeräte, können Sie auf Anfrage aktualisierte Versionen des DICOM SB an diese/s konfigurierte/n DICOM-Speichergerät/e senden.

1. Drücken Sie **Überprüfen** oder **Bericht** auf dem Bedienpult
2. Drücken Sie **SB senden** auf dem Touchscreen

Manuelles Senden von DICOM SB

1. Wenn eine Untersuchung beendet ist, klicken Sie auf **Überprüfen**
2. Wählen Sie die Untersuchung aus, deren SB Sie senden möchten, und drücken Sie auf **Auswahl anzeigen**
3. Klicken Sie in der Liste „Bilder nachbetrachten“ auf das **DICOM SB-Symbol**
4. Drücken Sie **DICOM-Export** auf dem Touchscreen
5. Wählen Sie das Gerät aus und klicken Sie auf **OK**



ANMERKUNG

Sie können all Ihre DICOM Exporteinstellungen konfigurieren. Siehe [„Geräte“ \[396\]](#)

Untersuchungen und Bilder löschen

Es besteht die Möglichkeit, über das Patientenverzeichnis Untersuchungen aus dem System zu löschen.

Wird eine auf DVD archivierte Untersuchung versehentlich gelöscht, so kann die archivierte Untersuchung neu geladen werden.

Auf dem Review-Bildschirm können gespeicherte Bilder einer Untersuchung gelöscht werden.

Dies ist jedoch nur möglich, wenn „Bilder/Clips Senden“ in den „Druck-/Netzwerkeinstellungen“ auf „Am Ende der Untersuchung“ eingestellt ist.

Nach dem Löschen eines Bildes wird es mit einem X gekennzeichnet und verbleibt vorübergehend auf dem Review-Bildschirm.

Löschen eines oder mehrerer Bilder

1. Wählen Sie die zu löschenden Bilder aus
2. Berühren Sie **Auswahl löschen** auf dem Touchscreen
3. Klicken Sie auf **Löschen** im Bestätigungsfeld

Löschen von Untersuchungen

1. Wählen Sie eine oder mehrere Untersuchungen im Patientenverzeichnis aus. Um alle Untersuchungen auszuwählen, berühren Sie **Alles auswählen**
2. Klicken Sie auf **Auswahl löschen**
3. Klicken Sie auf **Löschen** im Bestätigungsfeld

Bildersuche mit Query and Retrieve

Vor oder während einer Untersuchung kann eine Abfrage (Query) gestartet werden, um Bilder von früheren Patienten-Untersuchungen zu suchen, die auf einer Remote-Workstation gespeichert wurden.

Nach dem Auffinden der Bilder können qualifizierte Bilder für eine Überarbeitung abgerufen werden durch den Aixplorer®.

Nach dem Abruf können die Bilder durchsucht werden, und ein geeignetes Bild kann zur Überprüfung ausgewählt werden.

Ein so gefundenes Bild kann in einer Side-by-side-Ansicht neben ein Realtime-Bild der laufenden Untersuchung gestellt werden.

Wichtig: Die Query-Retrieve-Funktion erfordert eine Netzwerkverbindung des Aixplorer® Systems mit einer DICOM-kompatiblen Archivierungs-Workstation.

Allgemeine Informationen zu Query-Retrieve - Abfrageabruf

Ohne laufende Untersuchung kann eine Suche für eine beliebige Zahl von früheren Untersuchungen auf der Workstation durchgeführt werden.

Diese Untersuchungen können vom Aixplorer® in Vorbereitung einer neuen Untersuchung abgerufen werden.

Bei laufender Untersuchung wird das System versuchen, frühere Untersuchungen des untersuchten Patienten zu finden (falls die automatische Q/R so konfiguriert wurde).

Folgende Bildtypen können mit der Q/R-Funktion gesucht werden:

- DICOM-Ultraschallbilder
- aus Ultraschall-Clips extrahierte DICOM-Ultraschallbilder
- DICOM-Bilder von verschiedenen Modalitäten: Computergestützte Radiographie (CR), Computergestützte Tomographie (CT), Magnetresonanz bzw. Kernspin (MR), Nuklearmedizin (NM),

Secondary Capture (wiederholte Aufnahme, SC), Angiografie (XA), Röntgenfluoroskopie (RF), Mammografie (MG)

Zum Thema „secondary capture“ bitten wir Sie, die Bedienungsanleitung für Ihre Workstation, die Workstation DICOM-Konformitätserklärung oder Ihren Workstation/PACS-Beauftragten zu Rate zu ziehen.

Jede frühere Untersuchung kann neben einem Echtzeitbild der laufenden Untersuchung angezeigt werden.

Sollte es zwischen laufender und früherer Untersuchung Unstimmigkeiten mit der Patientenidentifikation geben, wird ein Warnhinweis angezeigt.



WEITERE INFORMATIONEN ZU DICOM

Weitere Informationen zu DICOM entnehmen Sie bitte unserer DICOM-Konformitätserklärung und IHE-Erklärung auf unserer Website:

<http://www.supersonicimagine.com/dicom>

<http://www.supersonicimagine.com/ihe>

Unter „**Hinweissymbole**“ [174] finden Sie das Query-Retrieve-Symbol (Abfrage-Abruf).



WARNUNG

Einen Patienten mit einer anderen Patientenidentifikations-Kennung zu zeigen, muss mit äußerster Vorsicht erfolgen.

Die Funktion wird für den Fall bereitgestellt, dass der Name eines Patienten oder Krankenhauses geändert wird.

Der Anwender trägt das Risiko für die Nutzung der Query-Retrieve Funktion auf dem Aixplorer®.

Frühere mit Q/R gefundene Bilder können hilfreich sein, wenn sie als Vergleichsbilder zum Echtzeit-Ultraschallbild dienen, sofern sie dieselbe medizinische Fragestellung betreffen.

Verwenden Sie die auf dem Aixplorer® gefundenen Bilder mit Vorsicht, da diese eventuell gestaucht sind oder eine im Vergleich zur PACS-Workstation geringere Bildqualität aufweisen könnten.

Bilder, die auf dem Aixplorer® aufgerufen werden, sollten nicht als alleinige Grundlage für eine Diagnose dienen.

Suche mit der Query-Funktion

Automatische Query



Sofern konfiguriert, kann das System eine automatische Query (Abfrage) von verschiedenen Untersuchungstypen für einen bestimmten Patienten durchführen.

Drücken Sie bei Untersuchungsbeginn für einen bestimmten Patienten auf **Bild speichern**, um für diesen Patienten ein erstes Bild zu speichern

Das System führt automatisch eine Abfrage für den ausgewählten Patienten durch.

Drücken Sie auf die Taste **Q/R** auf dem Bedienpult, um die abgefragten Untersuchungen anzuzeigen.

Weitere Details finden Sie unter **Kapitel 8, Individuelle Systemeinstellungen [381]**.

Manuelle Query

Drücken Sie auf die Taste **Q/R**, um eine Untersuchungsabfrage zu starten.

Das Query-Dialogfenster öffnet sich.



Klicken Sie das Register an, in dem Sie suchen möchten:

- Patient Name (Patientenname)
- Patient ID (Patienten-ID)
- Accession Number (Zugangsnummer)

Verwenden Sie für diese Suche die entsprechenden Filter und drücken Sie anschließend auf **Query (Abfrage)**.

Das System zeigt eine Liste der infrage kommenden Untersuchungen.

Retrieve - Abruf

Automatischer Retrieve

Sofern konfiguriert, führt das System einen automatischen Retrieve (Abruf) der letzten aufgenommenen Serie für jede der ausgewählten Modalitäten durch.

Manueller Retrieve

Nach einer Abfrage gibt das System eine Liste mit passenden Untersuchungen zurück.



The screenshot shows a window titled "Queried Exams" with a table of exam data. The table has columns for Name, ID, Date Of Birth, Modality, #, and DateTime. The data is filtered for patient Robin DESBOIS. The table is expanded to show multiple rows for the same patient, with the second row selected. Below the table are buttons for "Show all", "Select All", "Unselect All", and "Delete". At the bottom right, there are buttons for "New Query" and "Retrieve".

Name	ID	Date Of Birth	Modality	#	DateTime
Robin DESBOIS	100017	02/12/1948	US		23/08/2010 12:28:22
Robin DESBOIS	100017	02/12/1948	US		09/08/2010 12:03:04
Robin DESBOIS	100017	02/12/1948	US		05/08/2010 10:23:32
Robin DESBOIS	100017	02/12/1948	US	7	05/08/2010 10:23:32
Robin DESBOIS	100017	02/12/1948	US	1	05/08/2010 10:23:32
Robin DESBOIS	100017	02/12/1948	US	1	05/08/2010 10:23:32
Robin DESBOIS	100017	02/12/1948	US		28/07/2010 14:43:39
Robin DESBOIS	100017	02/12/1948	US		15/07/2010 08:46:34
Robin DESBOIS	100017	02/12/1948	US		08/07/2010 17:11:19
Robin DESBOIS	100017	02/12/1948	US		07/07/2010 14:59:06
Robin DESBOIS	100017	02/12/1948	US		06/07/2010 09:09:20
Robin DESBOIS	100017	02/12/1948	US		05/07/2010 12:34:47

Die Untersuchungen werden in einer Tabelle mit den folgenden Attributen angezeigt:

- Patientenname
- Patienten-ID
- Date of Birth (Geburtsdatum)
- Modalität
- Number of Images (Zahl der Bilder)
- Datum/Uhrzeit

Wünschen Sie weitere Informationen zu einer bestimmten Untersuchung, positionieren Sie den Pfeil auf dieser Untersuchung. Die ToOLTIP-

Box (Schnellhilfefenster) wird eingeblendet und liefert die verlangte Information.

Verwenden Sie **Auswählen** , um Untersuchungen aus der Query-Liste auszuwählen.

Neben den ausgewählten Untersuchungen wird eine Kennzeichnung angezeigt.

Benötigen Sie die Query-Funktion ein weiteres Mal, wählen Sie **New Query** (Neue Abfrage) auf der unteren Menüleiste.

Drücken Sie **Abrufen** , um die ausgewählten Untersuchungen anzuzeigen.

Diese Untersuchungen werden auf das Aixplorer® System übertragen.



ANMERKUNG


Die Übertragung von Untersuchungen mit vielen Bildern oder von langen Ultraschall-Bildschleifen kann länger dauern. Es ist deshalb ratsam, die Q/R-Funktion vor Beginn der neuen Untersuchung einzusetzen.

Nach Abruf der ausgewählten Untersuchungen werden alle entsprechenden Zeilen mit dem Hinweis **RETRIEVED** (Abgerufen) gekennzeichnet.

Query-Bilder anzeigen und navigieren

Drücken Sie zweimal **Auswählen** auf einem Bild, um es auf dem Vollbildschirm anzuzeigen.



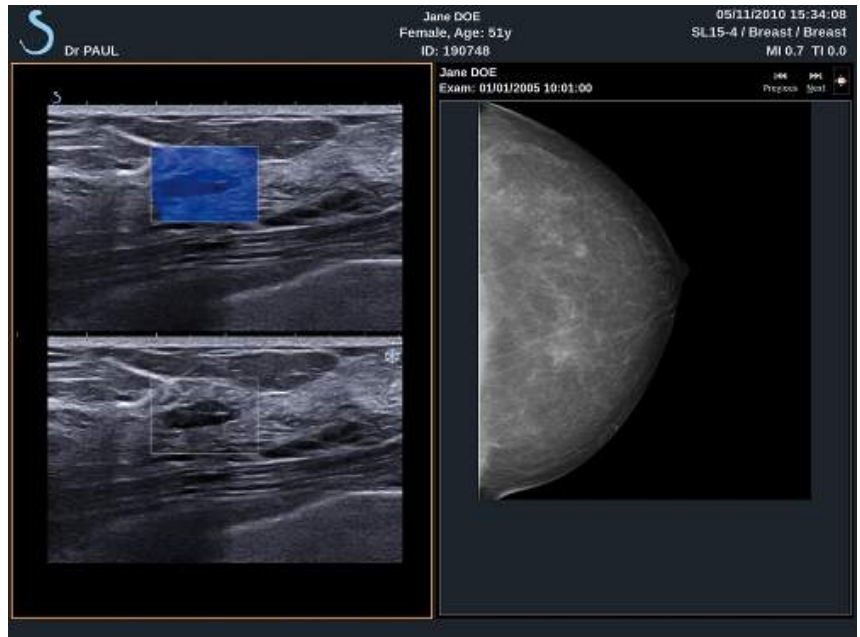

Die mit Q/R gefundenen Bilder werden auf der rechten Bildschirmseite angezeigt.

Sie können durch diese Bilder navigieren, indem Sie die Felder oberhalb des Bildschirms nutzen:

- **Vorherige** zeigt das vorhergehende Bild,
- **Weiter** zeigt das nächste Bild an.

Mit dem **TouchRing** kann ebenfalls durch die abgerufenen Bilder navigiert werden.

Das **Vollbild-Symbol** zeigt das abgerufene Bild in voller Bildschirmgröße. Dabei wird das Echtzeit- oder fixierte Bild der laufenden Untersuchung zeitweise überdeckt.

Alle Bedienelemente des Systems funktionieren für das aktuelle Live- oder fixierte Bild wie üblich.

Die Bedienelemente des Systems wirken sich nicht auf das abgerufene Bild aus.

Beenden von Query and Retrieve

Um die Ansicht der Q/R-Bilder zu beenden, drücken Sie **Q/R** auf dem Bedienpult.



Untersuchung beenden

Vergewissern Sie sich, dass alle von Ihnen benötigten Bilder gespeichert wurden.

Nach dem Ende der Untersuchung beenden Sie diese folgendermaßen:
Drücken Sie **Untersuchung beenden** auf dem Bedienpult.



Untersuchung fortsetzen

Sie haben die Möglichkeit, eine beendete Untersuchung fortzusetzen.

1. Drücken Sie **Untersuchung beenden**, um sicherzustellen, dass keine Untersuchung läuft.
2. Drücken Sie **Überprüfen**
3. Wählen Sie die Untersuchung, die Sie fortsetzen möchten, aus dem Patientenverzeichnis aus.
4. Drücken Sie **Fortsetzung** auf dem Touchscreen

Das System hat die beendete Untersuchung wieder geöffnet und befindet sich im B-Modus. Die Miniaturansichten der vorhergehenden Sitzung(en) dieser Untersuchung werden rechts angezeigt.

Das Zeitlimit zur erneuten Öffnung einer Untersuchung kann in der Registerkarte **System/Anzeige** der Systemkonfiguration festgesetzt werden.

Drücken Sie **Untersuchung beenden** , um die Untersuchung zu beenden.

Kapitel 8. Individuelle Systemeinstellungen

Beschreibung der Systemkonfiguration



Sie können am System speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Einstellungen vornehmen.

Sie können beispielsweise auf Ihre Untersuchungen zugeschnittene Voreinstellungen definieren und die Systemeinstellungen zur Optimierung Ihres Arbeitsablaufs ändern.

Für den Zugang zur Systemkonfiguration klicken Sie von einem aktiven Bildgebungsmodus aus auf Syst.Konfig. auf dem Touchscreen.

Um auf die Systemkonfiguration zuzugreifen, berühren Sie **Syst.Konfig.** auf dem Touchscreen, während Sie sich in einem beliebigen aktiven Bildgebungsmodus befinden.

Alle an den Systemkonfigurationen vorgenommenen Änderungen werden automatisch gespeichert. Ausnahmen werden angezeigt.

Berühren Sie **Beenden** auf dem Touchscreen, um die Systemkonfiguration zu verlassen.

Systemkonfiguration ist in 7 Register unterteilt:

- System/Anzeige
- Geräteeinstellungen
- Administration
- Voreinstellungen
- Messungen
- Research (optional)
- Systemdiagnose

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Beschreibungen zu jedem Register.


System/Anzeige

Beschreibung des Registers System/Anzeige

System/Anzeige ist in 3 Register gegliedert:

- System
- Regionale Parameter
- Untersuchung

System

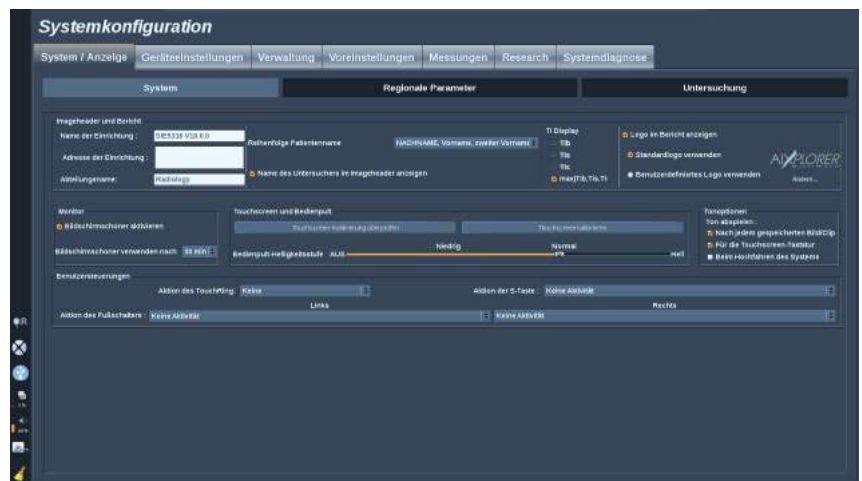

Hier können Sie:

- den Namen und die Adresse des Krankenhauses oder der Klinik eingeben
- die Reihenfolge der Patientennamen wählen
- den Namen des Untersuchers im Imageheader anzeigen/ausblenden
- den auf dem Bildschirm anzuzeigenden thermischen Index (TI) auswählen

- Daten von einem USB-Speichermedium hochladen und ein Logo einfügen, das in der Kopfzeile des Berichts angezeigt wird, oder das in der Kopfzeile des Berichts anzuzeigende Standardlogo auswählen



ANMERKUNG

Änderung des im Bericht gedruckten Logos

1. Überprüfen Sie, ob das Kästchen “Logo im Bericht abdrucken” angekreuzt wurde.
2. Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:
 - Wählen Sie „Standard-Logo benutzen“, wenn Sie das Aixplorer® Logo benutzen möchten
 - Wählen Sie „Anwender-Logo“ wenn Sie Ihr eigenes Logo benutzen möchten.
 - Dann stecken Sie den USB-Datenträger mit dem von Ihnen gewählten Logo in das System.
 - Anschließend klicken Sie auf das Logo, um Ihr eigenes Logo aufzurufen.

- den Bildschirmschoner aktivieren/deaktivieren und konfigurieren
- den Touchscreen kalibrieren



ANMERKUNG

Zur Kalibrierung des Touchscreens:


1. Drücken Sie “Touchscreen-Kalibrierung - jetzt kalibrieren”
2. Drücken Sie jeden Kalibrierungspunkt, der auf dem Touchscreen wird angezeigt, so lange, bis er verschwindet.

- die Helligkeit des Bedienpults einstellen
- einen Ton für folgende Funktionen aktivieren:
 - Nach jedem gespeicherten Bild/Clip
 - Für die Touchscreen-Tastatur
 - Beim Hochfahren des Systems
- im B-Modus die Einstellung der TouchRing™-Funktion vornehmen
- Einer programmierbaren Taste (S-Knopf auf dem Bedienpult) eine Funktion zuweisen

- jeder Seite des Fußschalters eine Funktion zuweisen (als Option verfügbar).

Regionale Parameter

Dieser Abschnitt beschreibt die regionalen Einstellungen und Sprach-einstellungen des Systems.

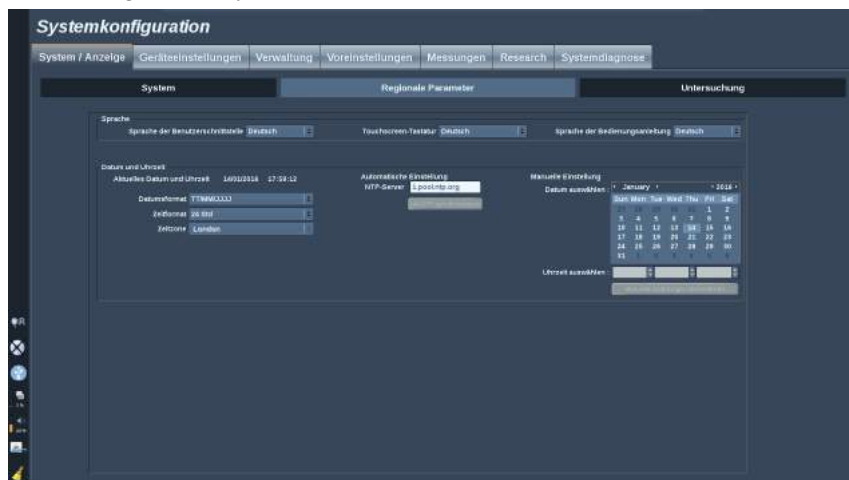

Hier können Sie:

- die Sprache der Benutzeroberfläche ändern
- die Sprache der Tastatur einstellen
- die Sprache der Bedienungsanleitung für die Schaltfläche **Hilfe** auswählen
- das Format von Uhrzeit und Datum ändern
- die Zeit- und Datumseinstellung des Systems vornehmen




ANMERKUNG

Datum und Zeit einstellen:

1. Wählen Sie eine Zeitzone aus der Drop-down-Liste.
2. Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:
 - Geben Sie einen Server für das Network Time Protocol (NTP) ein (als Standard können Sie `ntp.ubuntu.com` eingeben) und klicken Sie auf „Mit NTP synchronisieren“ im Feld „Automatische Einstellung“.

- Wählen Sie ein Datum und geben Sie die aktuelle Uhrzeit über die Box Manuelle Einstellungen ein. Danach klicken Sie auf “Manuelle Änderungen anwenden”.

Untersuchung

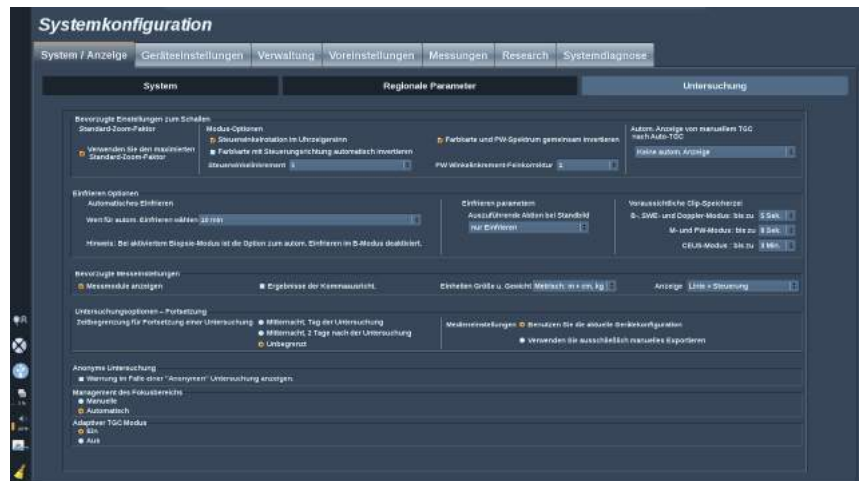

Hier können Sie:

- Ihre Voreinstellungen zum Schallen anpassen:
 - Die standardmäßige Verwendung eines maximierten Zoom-Faktors auswählen



ANMERKUNG

Wenn Sie diese Option während einer Untersuchung ändern, müssen Sie Ihre Voreinstellung erneut auswählen, um die Änderung zu übernehmen.

- bevorzugte Einstellungen für Farb- und PW-Modus vornehmen
 - Auto-Invert Color/PW: verknüpft die Farbskala mit dem PW-Spektrum. Wählen Sie diese Option, um die Farbskala bei der Umdrehung des PW-Spektrums automatisch umzudrehen.
 - Steering Angle Step definiert die schrittweise Steuerung für die Farbbox

- PW Fine Angle Step definiert die schrittweise Steuerung für die präzise Winkelkorrektur im PW
- Legen Sie fest, dass die Color Flow Map bei negativem Steuerwinkel automatisch umgekehrt wird.
- Passen Sie die Drehrichtung des Knopfs für den Steuerwinkel an.
- Konfigurieren Sie die Dauer der automatischen Anzeige von Manuelle TGC auf dem Touchscreen nach dem Aktivieren von Auto-TGC. Die automatische Anzeige ist standardmäßig ausgeschaltet.
- Einige Optionen für das Einfrieren anpassen:
 - die Zeiteinstellung für AutoFREEZE im Live-Bildgebungsmodus vornehmen
 - Wählen Sie die nach dem Fixieren des Bilds durchzuführende Aktion:
 - nur Fixierung
 - Schnittbildmarkierungen anzeigen
 - Anmerkungen anzeigen
 - Messungen anzeigen
 - Legen Sie Aufnahmedauer des nächsten Clips für Kontrastmittel-Untersuchungen und für andere Modi fest.
- die Anzeigeweise der Messungen anpassen
- den Modus „Untersuchung fortsetzen“ personalisieren (siehe [„Untersuchung fortsetzen“ \[379\]](#))
- das Anzeigen einer Warnung beim Speichern eines Bildes für einen anonymen Patienten auswählen
- Wählen, ob das manuelle oder automatische Management des Fokusbereichs ausgeführt werden soll.
- Wählen, ob der adaptive TGC-Modus aktiviert oder deaktiviert werden soll.

Geräteeinstellungen


Beschreibung des Registers Geräteeinstellungen

Das Register Geräteeinstellungen ist in 3 Unterregister gegliedert:

- Medieneinstellungen
- Medienzuordnung
- System-DICOM-Optionen

Medieneinstellungen

In diesem Abschnitt können alle bereits hinzugefügten und zugeordneten Medien konfiguriert werden.

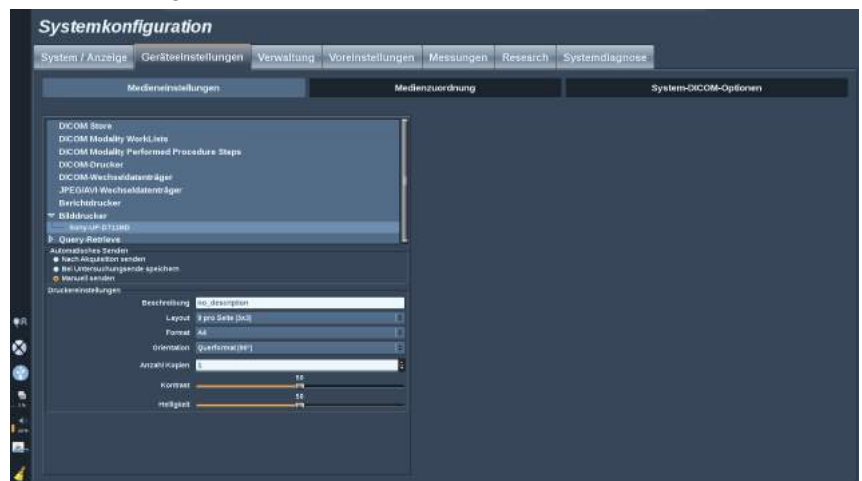

Zur Ansicht einer Liste der aktivierten Medien klicken Sie auf Medieneinstellungen.

Für jedes verfügbare Medium können Sie anhand des Menüs die Art der Datensendung festlegen:

- Nach Akquisition senden

- Bei Untersuchungsende speichern
- Manuell senden

Überdies können Sie Druck- und DICOM-Bildparameter, Drucklayout, Bildkompressionsgrad usw. einstellen.

Einzelbilddarstellungen können als vergrößerte Bilder gedruckt oder exportiert werden. Diese Funktion ist nur in der Einzelbildanzeige verfügbar.

Möchten Sie diese Möglichkeit nutzen, markieren Sie das entsprechende Kästchen.




ANMERKUNG

Weitere Information zu DICOM entnehmen Sie bitte unserer DICOM-Konformitätserklärung auf unserer Website:

<http://www.supersonicimagine.com/dicom>

Medienzuordnung

In diesem Abschnitt können die auf der Registerkarte „Verwaltung“ hinzugefügten Medien zugewiesen werden.

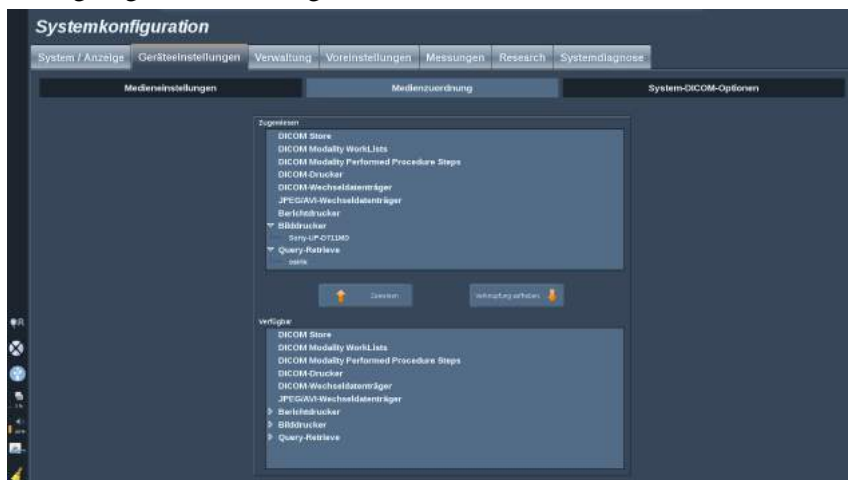

Hier können Sie der Arbeitskonfiguration ein aktives Medium hinzufügen.

Sie können aus der Medienliste wählen, die im Administrationsbereich der Systemkonfiguration vorkonfiguriert wurde.

Zuweisen eines Mediums:

1. Gehen Sie zum unteren Bildschirmteil, wo sich die Liste „Verfügbare Medien“ befindet.
2. Klicken Sie auf den Medientyp, eine Liste wird angezeigt.
3. Wählen Sie das Medium aus, das Sie zuweisen möchten.
4. Klicken Sie auf „zuweisen“. Das Medium wird oben in der Liste der zugewiesenen Medien angezeigt.




ANMERKUNG

Sie können ein Medium von der Liste der hinzugefügten Medien dadurch entfernen, dass Sie es anklicken und dann mit einem Klick auf die Schaltfläche „Verknüpfung aufheben“ wieder entfernen.

System-DICOM-Optionen

In diesem Abschnitt können Sie die DICOM-Parameter anpassen.

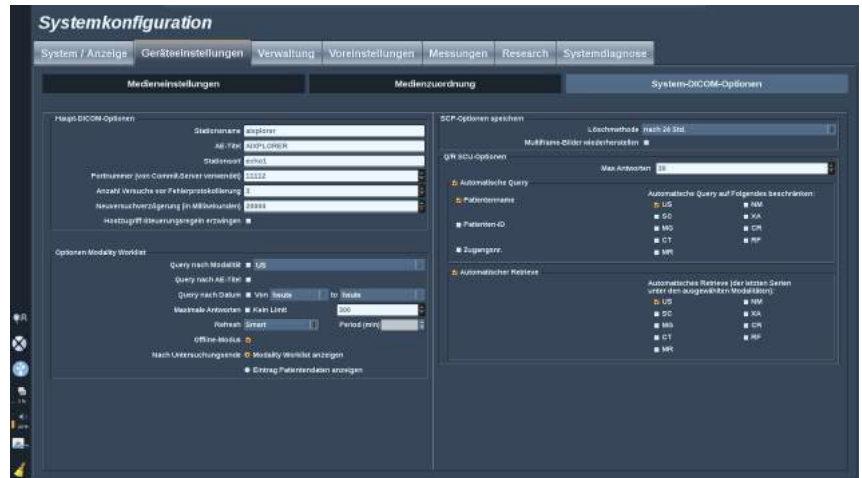

Unter Haupt-DICOM-Optionen können Sie alle DICOM-Parameter zur Identifizierung des Ultraschallsystems in einem DICOM-Netzwerk eingeben.

Sie können das System auch so konfigurieren, dass keine Kommunikation mit unbekannt Hosts möglich ist.

Unter Optionen der Modality Worklist können Sie die Art der Abfrage der Modality Worklist SCP sowie die automatische Aktualisierungszeit der Worklist festlegen, wenn dieses System im Register Verwaltung verfügbar und konfiguriert ist.

Mithilfe der Abrufoption können Sie ebenfalls konfigurieren, wie die „Modality Worklist“ (Modalitätsarbeitsliste) aktualisiert wird:

- Wählen Sie „Manual“ (Manuell), um die Arbeitsliste ausschließlich manuell zu aktualisieren.
- Wählen Sie „Automatic“ (Automatisch), um einen Zeitpunkt für die automatische Aktualisierung der Arbeitsliste festzulegen.
- Wählen Sie „Smart“, um die Arbeitsliste jedes Mal automatisch aktualisieren zu lassen, wenn im Bedienpult auf „End Exam“ (Untersuchung beenden) gedrückt wird.

Sie können auch den Offline-Modus wählen, damit nach Trennen des Netzwerks nach wie vor ein Zugriff auf die neueste Aktualisierung der Arbeitsliste möglich ist. Standardmäßig ist dieser Modus aktiviert.

Es ist auch möglich, Ihren bevorzugten Arbeitsablauf für das Ende einer Untersuchung festzulegen:

- Modality Worklist anzeigen
- Patientendateneingabe anzeigen

Im Teil „SCP-Optionen speichern“ können Sie die Löschmethode wählen und wählen, ob die Multiframe-Bilder abgerufen werden sollen.

Unter Optionen von Q/R SCU können Sie die Query/Retrieve Parameter konfigurieren.

Sie können auch die automatische Query-(Abfrage-) und die automatische Retrieve-Funktion (Abruf-Funktion) konfigurieren, indem Sie die abgerufenen Felder und Modalitäten auswählen.

Administration

Beschreibung des Registers Administration

Dieses Register ist in 5 Unterregister gegliedert:

- Geräte
- Netzwerkkonfiguration
- Netzwerk-Tools
- Diskpflege
- Medizinisches Personal



ACHTUNG


Bildkomprimierung kann zu einem Verlust an Bildinformationen führen.

Während eine geringe Bildkomprimierung im Allgemeinen in der medizinischen Bildgebung toleriert wird, kann eine starke Bildkomprimierung zu einer Bildverschlechterung führen.

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, den Grad der Bildkomprimierung einzustellen, die für exportierte Bilder diagnostisch vertretbar ist.

Falls Sie nicht sicher sind, welcher Komprimierungsgrad vertretbar ist, informieren Sie sich darüber in diesbezüglicher Literatur oder verlassen Sie sich auf die Standard-Bildkomprimierung des Systems.

Geräte

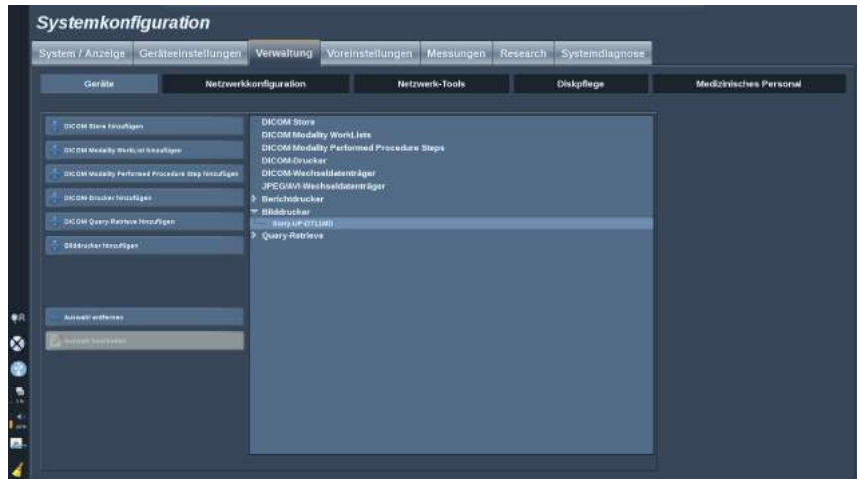

„Geräte“ bezieht sich auf die anfängliche Gerätekonfiguration.

Eine Liste der Gerätetypen, die hinzugefügt werden können, wird je nach erworbenen Optionen auf der linken Bildschirmseite angezeigt:

- DICOM Store hinzufügen¹
- DICOM Modality Worklist hinzufügen¹
- DICOM Modality Performed Procedure Step (MPPS) hinzufügen¹
- DICOM-Drucker hinzufügen¹
- DICOM Query/Retrieve hinzufügen¹
- Bilddrucker hinzufügen



ANMERKUNG

Verwenden Sie den empfohlenen Treiber für den ausgewählten Drucker.

Zum Hinzufügen eines Geräts klicken Sie auf das entsprechende Eingabefeld auf der linken Seite und konfigurieren Sie seine Parameter.

Klicken Sie auf einen in der Mitte des Bildschirms aufgelisteten Gerätetyp, um seine Parameter anzuzeigen und zu konfigurieren.

¹Nur nach Erwerb der DICOM-Option verfügbar




ANMERKUNG

Beim Hinzufügen eines DICOM-Geräts mithilfe der DICOM-Netzwerkverbindung, müssen folgende Basisoptionen erfüllt sein:

- Stationsname, IP-Adresse, Portnummer und Application Entity Title (AET)

Einen DICOM-Speicher konfigurieren

Zur Bearbeitung eines vorhandenen DICOM-Speichergeräts, wählen Sie dieses auf der Geräteliste aus und klicken anschließend auf **Auswahl bearbeiten**.

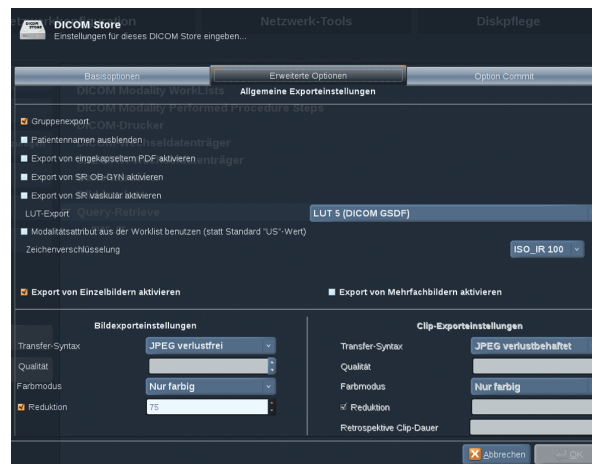

Auf der Registerkarte **Basisoptionen** können Sie Ihr DICOM-Gerät konfigurieren.

Auf der Registerkarte **Erweiterte Optionen** können Sie Ihre Exporteinstellungen festlegen.

1. In den Allgemeinen Exporteinstellungen können Sie Folgendes wählen:

- ob der Patientennamen auf den exportierten Dateien angezeigt oder ausgeblendet werden soll

- die Datentypen, die für den Export aktiviert werden sollen (Einzel- oder Mehrfachbilder, PDF-Berichte, DICOM SB)
 - die Look Up Table (LUT), die für die exportierten Bilder/ Videoclips übernommen werden sollen
 - die Art der Zeichenverschlüsselung
2. In den Bild- und Clip-Einstellungen können Sie Folgendes definieren:
- die Transfer-Syntax mit voreingestellten Bildkompressionen
 - die Kompressionsqualität der Bilder
 - die Unterstützung der Modi „Farbe“ oder „Monochrom“ beim Export
 - das Maß der Bildgrößenreduzierung
 - die Dauer des retrospektiven Clips



ANMERKUNG

All diese Optionen können auf die gleiche Weise für jeden DICOM-Wechseldatenträger konfiguriert werden.

Auf der Registerkarte **Option Commit** können Sie eine Bestätigung des Speicherdienstes abfragen.

Wenn alle gewünschten Optionen eingestellt wurden, drücken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern.



ANMERKUNG

Die neun verfügbaren LUTs sind voreingestellte Filter für bestimmte Helligkeits- und Kontrasteinstellungen der exportierten Bilder und/oder Clips.

Sie werden verwendet, um die Bilder auf dem Monitor einer DICOM-Bildaufruf-Workstation so anzuzeigen, wie sie auf dem Aixplorer® Monitor angezeigt werden.



ACHTUNG

Die Anwendung einer zu hellen oder zu kontrastreichen LUT beeinträchtigt möglicherweise die Qualität der Bildinformationen.

Der Benutzer muss alle Bildgebungsparameter sorgfältig anpassen, um eine Bildsättigung zu vermeiden und optimale quantitative Zeit-Intensitäts-Daten zu erhalten.

Einen DICOM-Drucker konfigurieren

Zur Bearbeitung eines vorhandenen DICOM-Druckers, wählen Sie dieses auf der Geräteliste aus und klicken anschließend auf **Auswahl bearbeiten**.



Auf der Registerkarte **Basisoptionen** können Sie Ihren DICOM-Drucker konfigurieren.

Auf der Registerkarte **Erweiterte Optionen** können Sie Ihre Druckeinstellungen festlegen:

- Helligkeit und Kontrast einstellen
- den zu bedruckenden Medientyp wählen
- Priorität, Pfad und Vergrößerungstyp definieren
- Farbe und Dichte der Kanten und freie Flächen des Dokuments definieren
- Sitzungsetikett, Konfigurationsinformationen und Glättungstyp präzisieren
- Prozentsatz der Verkleinerung des Dokuments definieren

Wenn alle gewünschten Optionen eingestellt wurden, drücken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern.

Netzwerkconfiguration

Hier erfolgt die Netzwerkconfiguration des Aixplorer®. Das System wird über ein Ethernetkabel mit dem Netzwerk verbunden.

Das System kann mit einer spezifischen IP-Adresse und Netzwerkeinstellungen, mit Kabelanschluss oder automatisch im DHCP-Modus konfiguriert werden.

Bei jeder Netzwerkconfiguration wird die MAC-Adresse angezeigt. Sobald eine Verbindung besteht, wird auch der Netzwerkstatus angezeigt (besonders wichtig für die DHCP-Konfiguration).



ANMERKUNG

Die Aixplorer® Netzwerkverbindung ist nur offen für DICOM- und Netzwerkdruckerdienste.

Das System erfordert keine Mindestdatenrate, um im Netzwerk zu funktionieren.


Im Falle eines Netzwerkverbindungsfehlers, können die Daten mit einem DICOM-Wechseldatenträger oder einem eingebetteten Drucker exportiert werden.



ACHTUNG

Die Integration des Aixplorer® in ein Netzwerk mit anderen Geräten kann unvorhergesehene Risiken bergen. Dennoch wird durch den eingeschränkten Zugriff auf das System vermieden, dass der Benutzer eine Antiviren-Lösung verwendet.

Netzwerk-Tools

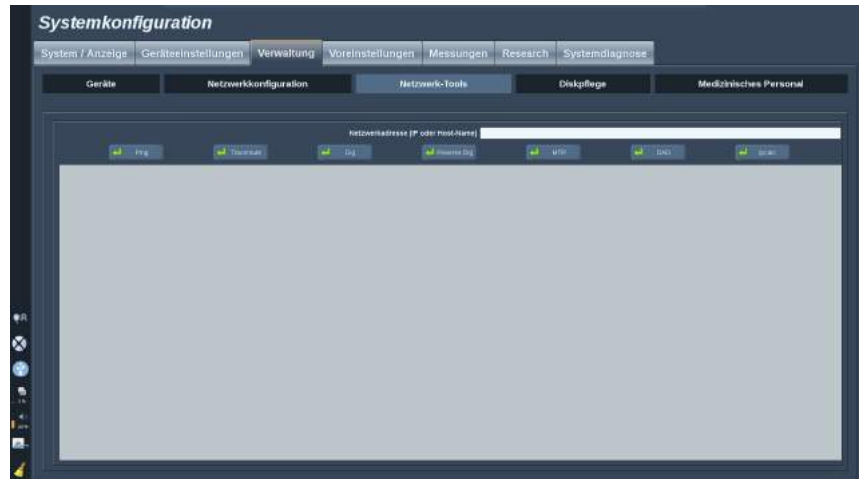


Nach der Netzwerkkonfiguration (siehe ???) stehen Ihnen folgende Netzwerk-Tools zur Verfügung:

- Ping
- Traceroute
- Dig und Reverse Dig
- MTR
- DAD (Duplicate Address Detection)
- IPcalc

Weitere Informationen zum Einsatz dieser Tools erhalten Sie von Ihrem örtlichen SuperSonic Imagine Service-Mitarbeiter.

Diskpflege

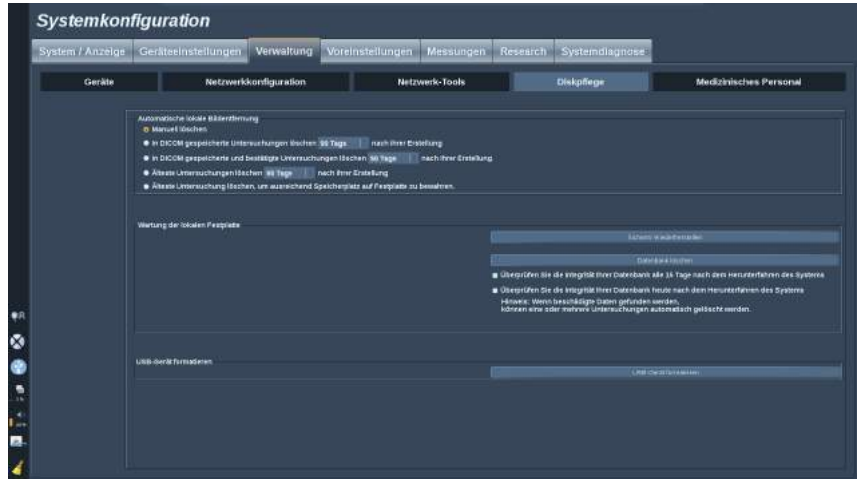


Unter Diskpflege befinden sich alle Optionen zur Verwaltung der auf der Festplatte des Systems gespeicherten Untersuchungen.

Sichern/Wiederherstellen


Es ist ebenfalls möglich, verschiedene Elemente des Systems zu sichern und wiederherzustellen.

SICHERN

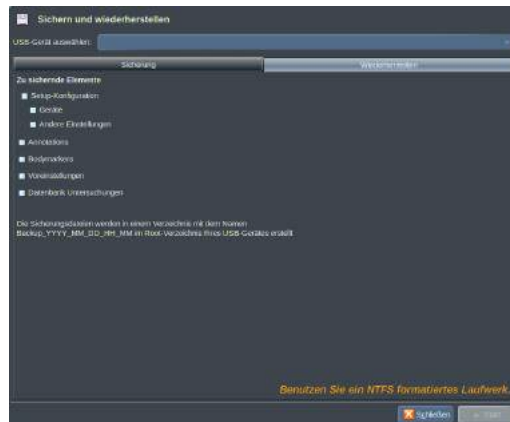

1. Stecken Sie ein USB-Gerät ein, auf dem verschiedene Elemente Ihres Systems gesichert werden sollen.
2. Drücken Sie auf die Schaltfläche **Sichern/Wiederherstellen**.
3. Geben Sie das Kennwort ein.
4. Drücken Sie **OK**
5. Wählen Sie Ihr USB-Gerät aus.
6. Wählen Sie die zu sichernden Elemente aus.
7. Drücken Sie **Start**


WIEDERHERSTELLEN

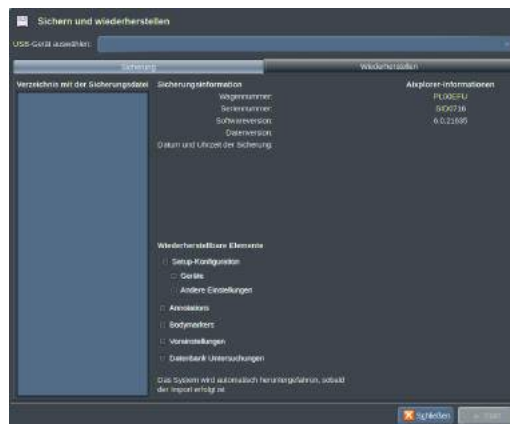

1. Stecken Sie das USB-Gerät ein, auf dem verschiedene Elemente Ihres Systems gesichert wurden.
2. Drücken Sie auf die Schaltfläche **Sichern/ Wiederherstellen**.
3. Geben Sie das Kennwort ein.
4. Drücken Sie **OK**
5. Wählen Sie das USB-Gerät aus, auf dem verschiedene Elemente Ihres Systems gesichert wurden.
6. Wählen Sie die Registerkarte **Wiederherstellen**.
7. Wählen Sie links die wiederherzustellende Sicherungsdatei aus.
8. Wählen Sie rechts die wiederherzustellenden Elemente aus.
9. Drücken Sie **Start**


USB-Gerät formatieren

Sie können ein angeschlossenes USB-Gerät direkt formatieren vom Aixplorer®.

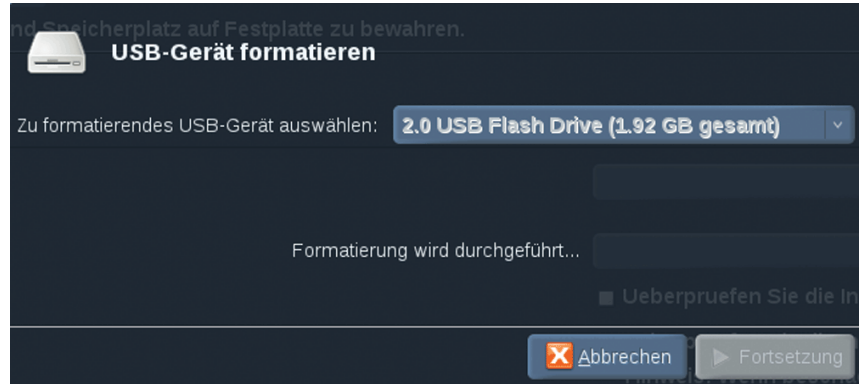

1. Schließen Sie das zu formatierende USB-Gerät an.
2. Drücken Sie auf die Schaltfläche **USB-Gerät formatieren**.
3. Geben Sie das Kennwort ein.
4. Drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie das zu formatierende USB-Gerät aus.
6. Drücken Sie **Format**.
7. Eine Warnmeldung wird angezeigt. Drücken Sie **Fortsetzung**, um das Gerät zu formatieren.
8. Nach Abschluss dieses Vorgangs wird eine Meldung angezeigt.
9. Drücken Sie **Schließen**.

Medizinisches Personal

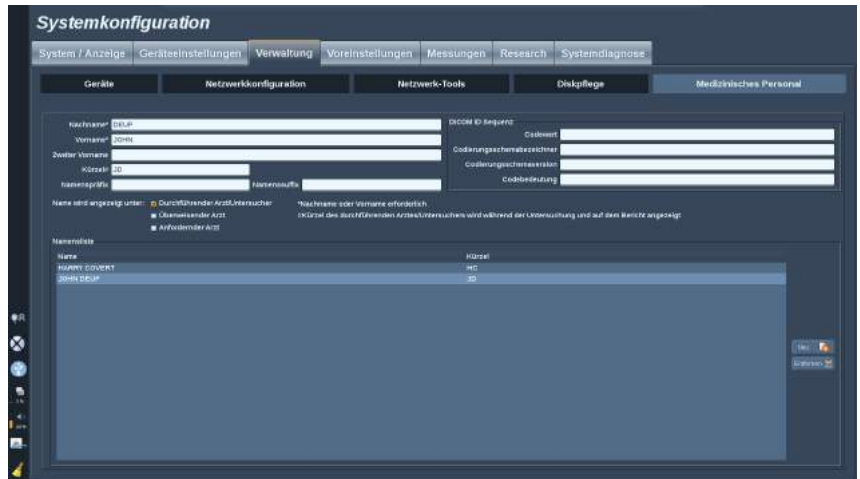

In diesem Abschnitt können Sie die Liste der Ärzte und Sonografie-Fachkräfte verwalten, die Sie von der Patientendateneingabe auswählen können.

Klicken Sie in der Liste am unteren Rand des Bildschirms auf einen Namen, um die dazugehörigen Informationen in den entsprechenden Feldern über der Liste anzuzeigen.

Hinzufügen eines Namens:

1. Klicken Sie auf **Neu** auf der rechten Seite der Liste
2. Geben Sie die entsprechenden Daten ein.

Der neue Name wird automatisch gespeichert. Sie können aus dem Patientendatenformular ausgewählt werden.

Voreinstellungen

Über Voreinstellungen können die Einstellungen eines Systems für bestimmte Untersuchungen optimiert werden. Die Voreinstellungen legen viele Grundeinstellungen wie Verstärkung, Farbkarte, Filter, TissueTuner™, Flussoptimierungen usw. fest. Beim Einschalten des Systems ist die Standard-Voreinstellung aktiv. Vor Beginn einer Untersuchung vergewissern Sie sich, dass die entsprechende Voreinstellung aktiviert wurde. Sie können aus mehreren Standard-Voreinstellungen wählen. Diese Standard-Voreinstellungen lassen sich nicht löschen. Verschiedene Voreinstellungen, bei denen Schallkopf und Anwendung kombiniert werden, können erstellt und gespeichert werden. Die Zahl der Speicherplätze richtet sich nach der Zahl der Eingabemöglichkeiten auf dem jeweiligen Schallkopf Touchscreen.

Beschreibung des Registers Voreinstellungen


Dieses Register ist in 3 Unterregister gegliedert:

- Annotations
- Bodymarkers
- Voreinstellungen

Es ermöglicht die Anpassung von Annotationen- und Schnittbildmarkierungs-Paketen, sowie von Bildgebungs-Voreinstellungen.

Annotations

Hier erfolgt die Konfigurierung der Annotationen in der ausgewählten Sprache.

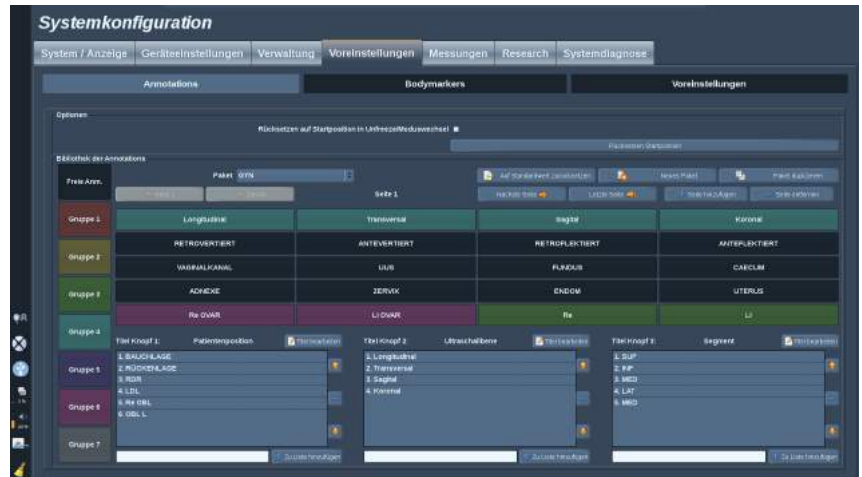

Ein Verzeichnis der Annotationen erstellen:


1. Wählen Sie ein Paket.
2. Wählen Sie die Seite, die Sie editieren möchten, indem Sie die Navigier-Schaltfläche über dem Annotations-Kennfeld verwenden:
 - Erste Seite/Letzte Seite
 - Vorherige Seite/Nächste Seite
 - Seite hinzufügen
 - Seite entfernen
3. Zum Erstellen eines neuen Pakets klicken Sie auf **Neues Paket** und geben Sie eine Bezeichnung in das Pop-up-Fenster ein.
4. Zum Duplizieren eines bestehenden Pakets klicken Sie auf **Paket duplizieren** und geben Sie im Pop-up-Fenster eine neue Bezeichnung ein. Es wird ein neues Paket mit allen Annotationen des ursprünglichen Pakets erstellt, ohne dass dieses verändert wird.
5. Möchten Sie eine Annotation ändern, klicken Sie diese an und ändern Sie den Text im Pop-up-Fenster.
6. Zum Erstellen einer neuen Annotation auf einer leeren Schaltfläche klicken Sie auf die leere Schaltfläche und geben Sie ihre Bezeichnung im Pop-up-Fenster ein
7. Möchten Sie eine Annotation aus der Gruppe entfernen, wählen Sie **Freie Annot** (die erste Farbbox auf der linken Seite) und klicken Sie

auf die Annotation, die Sie aus dieser Gruppe entfernen möchten. Das Annotation-Feld wird „durchsichtig“ (farblos) und wird durch kein anderes ersetzt.

8. Möchten Sie eine Annotation von einer Gruppe in eine andere Gruppe verschieben, klicken Sie auf die neue Gruppenfarbe und klicken Sie auf die Annotation. Die Annotation ändert ihre Farbe.
9. Um die Kennzeichnung eines Drehknopfes zu ändern oder einen neuen zu erstellen, klicken Sie auf **Titel bearbeiten** neben dem Knopf, den Sie bearbeiten möchten, und ändern Sie den Text im Pop-up-Fenster.
10. Zum Löschen eines Drehknopfwertes klicken Sie auf den Wert und anschließend auf den **-**-Knopf daneben.
11. Zum Hinzufügen eines Drehknopfwertes tippen Sie den neuen Wert in die Box und klicken auf den **+ zu Liste hinzufügen** -Knopf daneben.
12. Möchten Sie die Position eines Drehknopf-Wertes innerhalb der Liste ändern, klicken Sie diesen Wert an und anschließend auf die daneben befindlichen Pfeile.

Bodymarker

Hier können Sie die Bibliotheken der Schnittbildmarkierungen bearbeiten und einige der für Bodymarker (Schnittbildmarkierungen) zutreffenden Optionen anpassen.

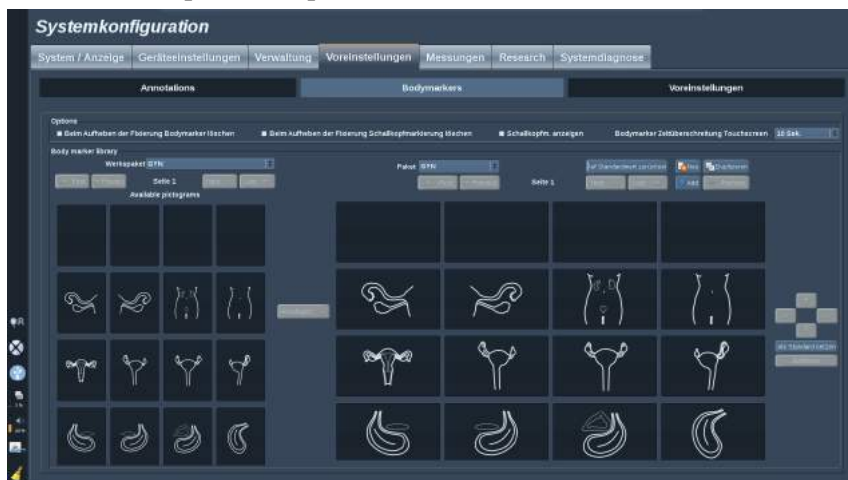

Optionen

Wenn Sie die Option „Beim Aufheben der Fixierung Bodymarker löschen“ aktivieren, wird die Schnittbildmarkierung beim Aufheben der Fixierung eines Bilds immer entfernt.

Wenn Sie die Option „Beim Aufheben der Fixierung Schallkopfmarkierung löschen“ aktivieren, wird die Schallkopfmarkierung von der Schnittbildmarkierung beim Aufheben der Fixierung eines Bilds immer entfernt.

Sie können ein Timeout (Zeitsperre) für den Touchscreen „Body Marker“ (Schnittbildmarkierung) einstellen. Am Ende dieser Zeitsperre wird der Touchscreen „Body Marker“ (Schnittbildmarkierung) automatisch geschlossen.

Bibliothek der Schnittbildmarkierungen

Hier können Sie diese Bibliothek an jede Voreinstellung anpassen.

BIBLIOTHEK DER SCHNITTBILDMARKIERUNGEN FÜR EINE BESTIMMTE VOREINSTELLUNG ANZEIGEN

1. Wählen Sie rechts das Paket aus, das geändert werden soll.

Sie können mithilfe der folgenden Schaltflächen durch die verschiedenen Seiten der Bibliothek navigieren:

- **Erste** zeigt die erste Seite der Bibliothek an
- **Vorherige** zeigt die vorherige Seite der Bibliothek an
- **Nächste** zeigt die nächste Seite der Bibliothek an
- **Letzte** zeigt die letzte Seite der Bibliothek an

Über die Schaltflächen **Hinzufügen** und **Entfernen** können Seiten aus der ausgewählten Bibliothek entfernt werden.

ENTFERNEN EINER SCHNITTBILDMARKIERUNG AUS DEM PAKET

1. Klicken Sie auf die zu entfernende Schnittbildmarkierung.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Entfernen** unterhalb des Pfeils

VERSCHIEBEN EINER SCHNITTBILDMARKIERUNG AUF DIE PAKETSEITE

1. Klicken Sie auf die zu verschiebende Schnittbildmarkierung.
2. Klicken Sie auf den entsprechenden **Pfeil**

EINSTELLEN EINER SCHNITTBILDMARKIERUNG ALS STANDARD FÜR DAS PAKET

1. Klicken Sie auf die Schnittbildmarkierung, die als standardmäßige Schnittbildmarkierung der Bibliothek festgelegt werden soll.
2. Klicken Sie auf **Als Standard setzen** unterhalb der Pfeile

Die ausgewählten Schnittbildmarkierungen werden jedes Mal standardmäßig angezeigt, wenn im Bedienpult für die ausgewählte

Voreinstellung auf „Body Marker“ (Schnittbildmarkierung) gedrückt wird.

HINZUFÜGEN EINER SCHNITTBILDMARKIERUNG ZU EINEM PAKET

Alle im System verfügbaren Bibliotheken werden auf der linken Seite angezeigt.

1. Wählen Sie das entsprechende Paket

Die verfügbaren Schnittbildmarkierungen werden darunter angezeigt.

2. Klicken Sie auf die der Bibliothek hinzuzufügende Schnittbildmarkierung.
3. Klicken Sie auf die **Hinzufügen** -Schaltfläche

Die ausgewählte Schnittbildmarkierung wird dem ersten verfügbaren Platz in der Bibliothek hinzugefügt.

Hinweis: Alle Änderungen werden automatisch gespeichert.

Sie können eine Bibliothek mit Schnittbildmarkierungen für eine bestimmte Voreinstellung auf den Standard zurückstellen, durch Klicken auf **Auf Standardwert zurücksetzen**.

ERSTELLEN EINES NEUEN SCHNITTBILDMARKIERUNGS-PAKETS

1. Klicken Sie auf **Neu** und geben Sie die Bezeichnung des Pakets im Pop-up-Fenster ein.
2. Wählen Sie Schnittbildmarkierungen in der Bibliothek aus und fügen Sie diese Ihrem Paket hinzu. Siehe **„Hinzufügen einer Schnittbildmarkierung zu einem Paket“ [412]**


DUPLIZIEREN EINES PAKETS

1. Klicken Sie auf **Duplizieren** und geben Sie im Pop-up-Fenster eine neue Bezeichnung ein.

Es wird ein neues Paket mit allen Schnittbildmarkierungen des ursprünglichen Pakets erstellt, ohne dass dieses verändert wird.

Für das Hinzufügen einer Schnittbildmarkierung von einem anderen Paket wählen Sie das entsprechende Paket aus und verfahren wie beim Hinzufügen einer Schnittbildmarkierung.

Bildgebungs-Voreinstellungen

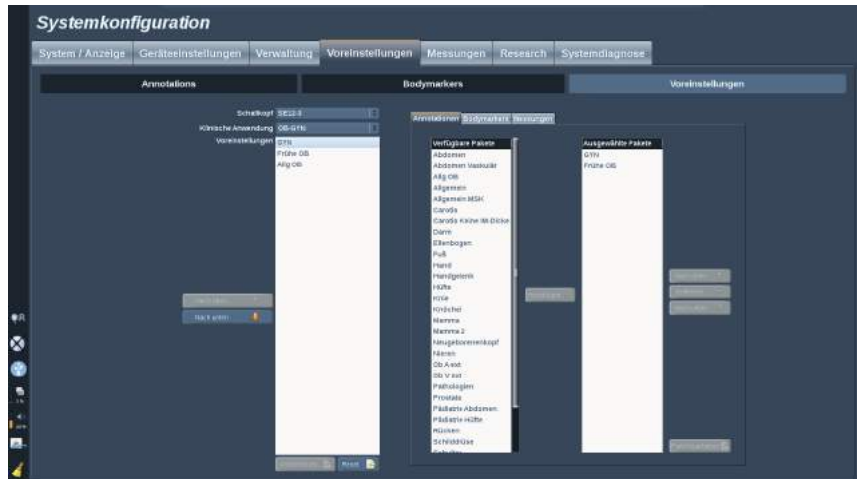

Individuelle Voreinstellungen

Nachdem Sie das System wunschgemäß konfiguriert haben, können Sie daraus eine Voreinstellung machen.



1. Drücken Sie **Schallkopf** auf dem Bedienpult
 2. Berühren Sie **Neue Voreinstellung**
- Ein Dialogfeld öffnet sich auf dem Hauptbildschirm.



3. Wählen Sie die Anwendung, in der Sie die Voreinstellung speichern möchten.
4. Wählen Sie eine Annotationsbibliothek für Ihre neue Voreinstellung.
5. Wählen Sie eine Schnittbildmarkierungsbibliothek für Ihre neue Voreinstellung.
6. Wählen Sie eine Messungsbibliothek für Ihre neue Voreinstellung.
7. Geben Sie den Namen Ihrer neuen Voreinstellung über die Tastatur ein.
8. Auswählen **OK**.
9. Drücken Sie **Schallkopf** auf dem Bedienfeld, um die Voreinstellung zu überprüfen.

Die vom Benutzer erstellten Voreinstellungen werden auf dem Touchscreen hellblau angezeigt.

Die werkseitig festgelegten Voreinstellungen werden auf dem Touchscreen dunkelblau angezeigt.

Handhaben von Voreinstellungen

Im Unterregister Voreinstellungen können Sie die Bildgebungs-Voreinstellungen verwalten.

1. Wählen Sie den entsprechenden Schallkopf und die Anwendung auf der linken Seite des Bildschirms aus.

Die verfügbaren Voreinstellungen für diesen Schallkopf und diese Anwendung werden angezeigt.

2. Wählen Sie die zu ändernde Voreinstellung aus.
3. Sie können eine Voreinstellung innerhalb der Liste mit Hilfe der Schaltflächen **Nach oben** und **Nach unten** verschieben.

Sie werden in der gleichen Reihenfolge auf der Seite „Voreinstellungen“ des Touchscreens angezeigt.

4. Zum Zurücksetzen einer Werksvoreinstellung auf die Standardkonfiguration klicken Sie auf **Zurücksetzen**.

ÄNDERN DER ANZEIGEREIHENFOLGE DER VOREINSTELLUNGEN AUF DEM TOUCHSCREEN

1. Wählen Sie den entsprechenden Schallkopf und die Anwendung auf der linken Seite des Bildschirms aus.

Die verfügbaren Voreinstellungen für diesen Schallkopf und diese Anwendung werden angezeigt.

2. Wählen Sie die zu ändernde Voreinstellung aus.
3. Sie können eine Voreinstellung innerhalb der Liste mit Hilfe der Schaltflächen **Nach oben** und **Nach unten** verschieben.

Sie werden in der gleichen Reihenfolge auf der Seite „Voreinstellungen“ des Touchscreen angezeigt.

4. Zum Zurücksetzen einer Werksvoreinstellung auf die Standardkonfiguration klicken Sie auf **Zurücksetzen**.

ÄNDERN DER ANNOTATIONSPAKETE EINER VOREINSTELLUNG

1. Wählen Sie das kleine Register **Anmerkung** auf der rechten Seite des Bildschirms aus.

Sie sehen das Feld der verfügbaren Pakete links neben der Schaltfläche „Hinzufügen“ und das Feld der ausgewählten Pakete auf der rechten Seite.

Die ausgewählten Pakete sind diejenigen, die bereits in der Voreinstellung verfügbar sind.

2. Zum Hinzufügen eines Annotationspakets wählen Sie das entsprechende Paket im Feld der verfügbaren Pakete aus und klicken auf **Hinzufügen**.

Es wird im Feld der ausgewählten Pakete angezeigt.

3. Im Feld der ausgewählten Pakete können Sie ein Paket entfernen durch Klicken auf **Entfernen**.
4. Sie können ein Paket auch innerhalb der Liste mit Hilfe der Schaltflächen **Nach oben** und **Nach unten** verschieben.

5. Zum Bearbeiten eines Annotationspakets wählen Sie ein Paket im Feld der ausgewählten Pakete aus und klicken auf **Paket bearbeiten**.

ÄNDERN DER SCHNITTBILDMARKIERUNGS-PAKETE EINER VOREINSTELLUNG

1. Wählen Sie das kleine Register **Schnittbildmarkierung** auf der rechten Seite des Bildschirms aus

Sie sehen das Feld der verfügbaren Pakete links neben der Schaltfläche „Hinzufügen“ und das Feld der ausgewählten Pakete auf der rechten Seite.

Die ausgewählten Pakete sind diejenigen, die bereits in der Voreinstellung verfügbar sind.

2. Zum Hinzufügen eines Schnittbildmarkierungs-Pakets wählen Sie das entsprechende Paket im Feld der verfügbaren Pakete aus und klicken auf **Hinzufügen**.

Es wird im Feld der ausgewählten Pakete angezeigt.

3. Im Feld der ausgewählten Pakete können Sie ein Paket entfernen durch Klicken auf **Entfernen**.
4. Sie können ein Paket auch innerhalb der Liste mit Hilfe der Schaltflächen **Nach oben** und **Nach unten** verschieben.
5. Zum Bearbeiten eines Schnittbildmarkierungs-Pakets wählen Sie das Paket im Feld der ausgewählten Pakete aus und klicken auf **Paket bearbeiten**.

ÄNDERN DER MESSPAKETE EINER VOREINSTELLUNG

1. Wählen Sie das kleine Register **Messung** auf der rechten Seite des Bildschirms aus.

Sie sehen das Feld der verfügbaren Pakete links neben der Schaltfläche „Hinzufügen“ und das Feld der ausgewählten Pakete auf der rechten Seite.

Die ausgewählten Pakete sind diejenigen, die bereits in der Voreinstellung verfügbar sind.

2. Zum Hinzufügen eines Messpakets wählen Sie das entsprechende Paket im Feld der verfügbaren Pakete aus und klicken auf **Hinzufügen**.

Es wird im Feld der ausgewählten Pakete angezeigt.

3. Im Feld der ausgewählten Pakete können Sie ein Paket entfernen durch Klicken auf **Entfernen**.
4. Sie können ein Paket auch innerhalb der Liste mit Hilfe der Schaltflächen **Nach oben** und **Nach unten** verschieben.
5. Zum Bearbeiten eines Messpakets wählen Sie ein Paket im Feld der ausgewählten Pakete aus und klicken auf **Paket bearbeiten**.

Voreinstellungen umbenennen



1. Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:
 - Drücken Sie **Schallkopf** auf dem Bedienpult und berühren Sie anschließend **Voreinstellungen verwalten** auf dem Touchscreen
 - Berühren Sie **Syst. Konfig.** auf dem Touchscreen und klicken Sie dann auf **Voreinstellungen** und **Voreinstellungen**
2. Wählen Sie den Schallkopf und die Anwendung.
Die Liste der durch den Anwender konfigurierten Presets wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf die Voreinstellung, die umbenannt werden soll, und klicken Sie auf **Umbenennen**
Ein Popup-Menü öffnet sich.
4. Geben Sie eine neue Bezeichnung ein.
5. Klicken Sie auf **OK**, um zu bestätigen

Voreinstellungen löschen

Sie können Ihre individuellen Presets löschen. Diese Werksvoreinstellungen lassen sich nicht löschen.

1. Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:
 - Drücken Sie **Schallkopf** auf dem Bedienpult und berühren Sie anschließend **Voreinstellungen verwalten** auf dem Touchscreen
 - Berühren Sie **Syst. Konfig.** auf dem Touchscreen und klicken Sie dann auf **Voreinstellungen** und **Voreinstellungen**
2. Wählen Sie den Schallkopf und die Anwendung.

Die Liste der durch den Anwender konfigurierten Presets wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf die Voreinstellung, die gelöscht werden soll, und klicken Sie auf **Entfernen**.

Ein Popup-Menü öffnet sich.

4. Klicken Sie auf **OK** , um zu bestätigen


Messungen

Beschreibung des Registers Messungen

Dieses Register ist in 4 Unterregister gegliedert:

- Messungen
- Messungen (Module) und Berechnungen
- Packages
- Obstetrik


Messungen

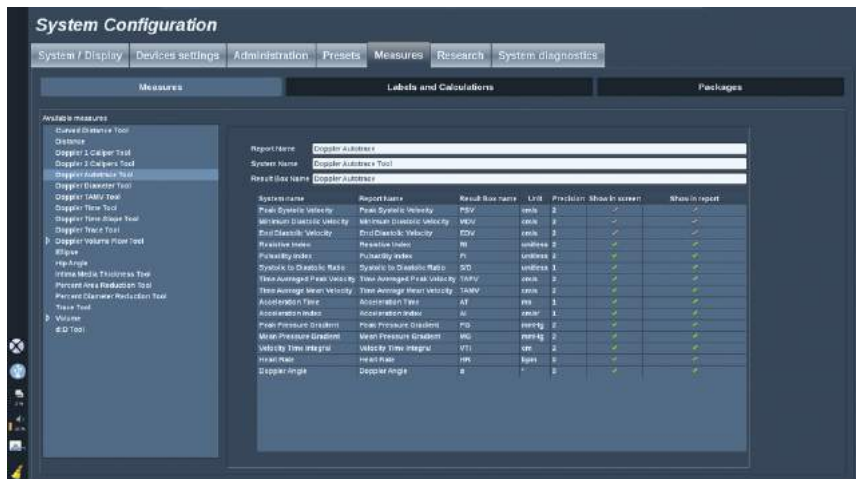

Dieser Abschnitt ermöglicht Ihnen eine Anpassung der Messwerkzeuge.

1. Wählen Sie eine Messung aus der Liste links.
2. Sie können die Einheit und die Präzision ändern. Klicken Sie auf die Einheit oder die Präzision, die Sie ändern möchten, und wählen Sie die gewünschte Einheit aus der Drop-down-Liste aus.
3. Markieren Sie die Messungen, die auf dem Bildschirm angezeigt und/oder im Bericht enthalten sein sollen.

Messungen (Module) und Berechnungen

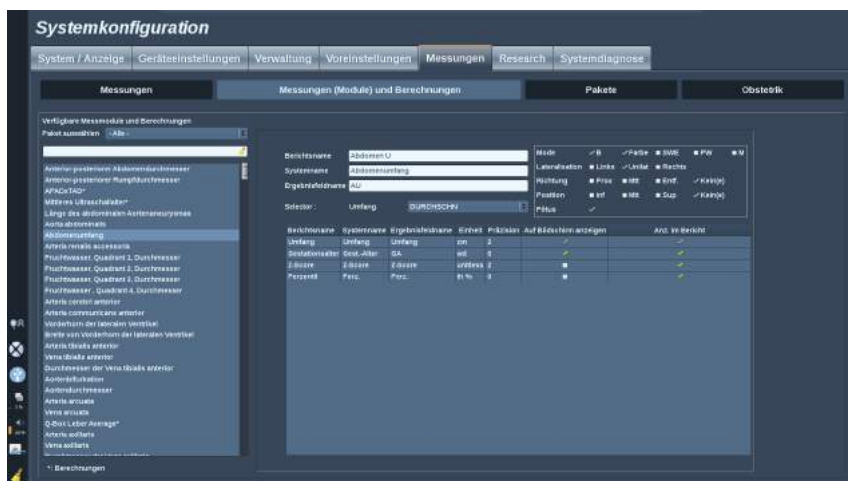

Hier können Sie jede Modulmessung individuell konfigurieren.

1. Wählen Sie das entsprechende Paket
2. Wählen Sie das Messmodul, das Sie anpassen möchten.



ANMERKUNG


Sie können den weißen Bereich als Suchfeld verwenden, um Messmodule schnell in der Liste zu finden.

Klicken Sie auf das Besen-Symbol, um den Text im Suchfeld zu löschen.

Die Informationen und Optionen zu diesem Modul werden rechts angezeigt.

3. Sie können die Einheit und die Präzision ändern. Klicken Sie auf die Einheit oder die Präzision, die Sie ändern möchten, und wählen Sie die gewünschte Einheit aus der Drop-down-Liste aus.
4. Mit der Drop-down-Funktion können Sie die Messungen auswählen, die auf dem Bildschirm angezeigt und/oder im Bericht enthalten sein sollen.

Packages

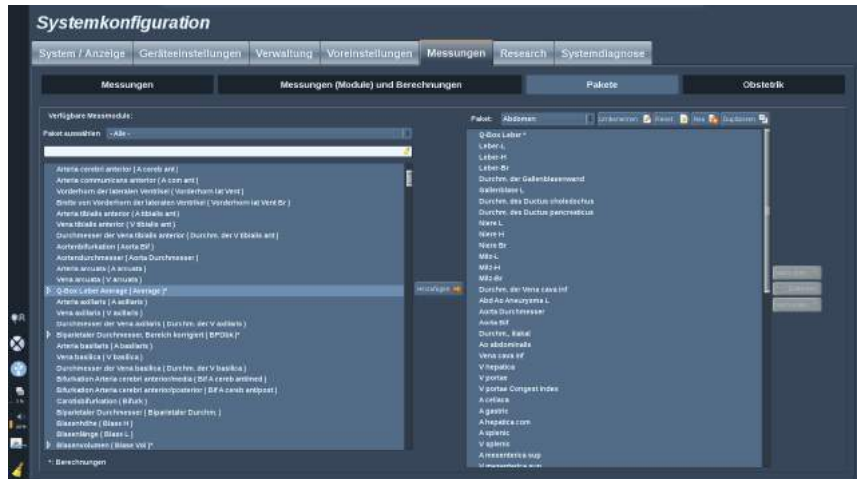

Hier können Sie Ihre eigenen Messpakete konfigurieren.

Das linke Fenster zeigt alle Messmodule, die auf dem System verfügbar sind.

Das rechte Fenster enthält nur die Messungen für Anwendungen in der Reihenfolge, in der sie auf der Hauptansicht angezeigt werden, wenn Sie **Mess.** auf dem Bedienpult drücken.

Sie können die Messmodule für eine bestimmte Anwendung selbst editieren.

Hinzufügen eines Messmoduls zu einer Anwendung:

1. Wählen Sie auf der rechten Seite des Bildschirms das Paket, das Sie ändern möchten.
2. Wählen Sie auf der linken Seite des Bildschirms das Paket, das Messmodule enthält. Sie können „Alles“ auswählen, um die im System verfügbaren Messmodule anzuzeigen.
3. Wählen Sie das Messmodul, das Sie aus der linken Seite der Liste hinzufügen möchten
4. Klicken Sie auf **Hinzufügen**

Entfernen eines Messmoduls aus einem Paket:

1. Wählen Sie das Paket auf der rechten Seite des Bildschirms.
2. Wählen Sie das Messmodul, das Sie aus der rechten Seite der Liste entfernen möchten.
3. Klicken Sie auf **Entfernen**

Verschieben eines Messmoduls innerhalb der Liste in einem Paket:

1. Wählen Sie das Paket.
2. Wählen Sie das Messmodul, das Sie auf der rechten Seite der Liste verschieben möchten.
3. Klicken Sie auf **Nach oben** oder **Nach unten** , bis es an der gewünschten Stelle ist

Umbenennen eines Pakets:

1. Wählen Sie das Paket auf der rechten Seite des Bildschirms.
2. Klicken Sie auf **Umbenennen**
3. Geben Sie im Pop-up-Fenster eine neue Bezeichnung ein.

Zurücksetzen eines Pakets auf die Standardkonfiguration:

1. Wählen Sie das Paket auf der rechten Seite des Bildschirms.
2. Klicken Sie auf **Zurücksetzen**

Erstellen eines neuen Pakets:

1. Klicken Sie auf **Neu**
2. Geben Sie einen Namen im Pop-up-Fenster ein und klicken Sie auf OK.
3. Anschließend können Sie dem Paket neue Messmodule hinzufügen. Sie sind dann in den Voreinstellungen verfügbar.

Duplizieren eines Pakets:

1. Klicken Sie auf **Duplizieren**
2. Geben Sie einen Namen im Pop-up-Fenster ein und klicken Sie auf OK.

Ein neues Paket mit allen Messmodulen wird erstellt.

Obstetrik

Der Abschnitt „Obstetrik“ ist in 3 Teile untergliedert:

- GA - GFG (Gestationsalter - Geschätztes Fetalgewicht)
- Fötales Wachstum und GFG-Perzentile
- Tabellen und Gleichungen



ACHTUNG

Überprüfen Sie den Patientennamen und die ID, bevor Sie eine Untersuchung für eine neue Patientin beginnen.

Überprüfen Sie das Datumsformat, bevor Sie das Geburtsdatum, das Datum der letzten Periode (Last Menstrual Period, LMP), den geschätzten Geburtstermin (Estimated Date of Delivery, EDD), den Zeugungszeitpunkt (Date Of Conception, DOC) und den Zeitpunkt des Eisprungs eingeben. Eine falsche Eingabe dieser Parameter führt zur einer falschen Berechnung des Gestationsalters (GA).

Tragen Sie den EDD und das GA zur Sicherung in die Patientenakte ein.

Betätigen Sie die Schaltfläche „Activate OB calcs“ (OB-Berechnungen aktivieren) auf der Seite für die Patientendateneingabe (PDE), um Obstetrik-Berechnungen durchzuführen.

Es muss angegeben werden, welcher OB-Autor für jede einzelne Messung verwendet wird, um das GA und ein geschätztes Fetalgewicht (Estimated Fetal Weight, GFG) zu berechnen.

Eine Diagnose darf nicht nur auf einer Messung oder Einzeldaten basieren. Berücksichtigen Sie immer die gesamte klinische Bewertung der Patientin, einschließlich der Patientenakte.

Je nach der Position des Fötus können einige Messwerte falsch sein. Berücksichtigen Sie immer die gesamte klinische Bewertung der Patientin, einschließlich der Patientenakte.

Das System ermöglicht fetale Messwerte für bis zu fünf Feten. Achten Sie darauf, die Feten während der Messungen nicht zu verwechseln.


Für jede durchgeführte Messung können Sie über die Auswahlfunktion auf der Registerkarte „Measurements“ (Messungen) im Bericht entweder

den ersten, letzten, den durchschnittlichen, minimalen, maximalen oder einen den fünf Messwerte wählen, die angezeigt werden können.

Seien Sie beim Löschen von Messwerten vorsichtig, da dies die Auswahlergebnisse beeinflusst.

Abweichungen von den normalen Messwerten müssen anhand von Grafiken und Literatur beurteilt werden.

GA - GFG

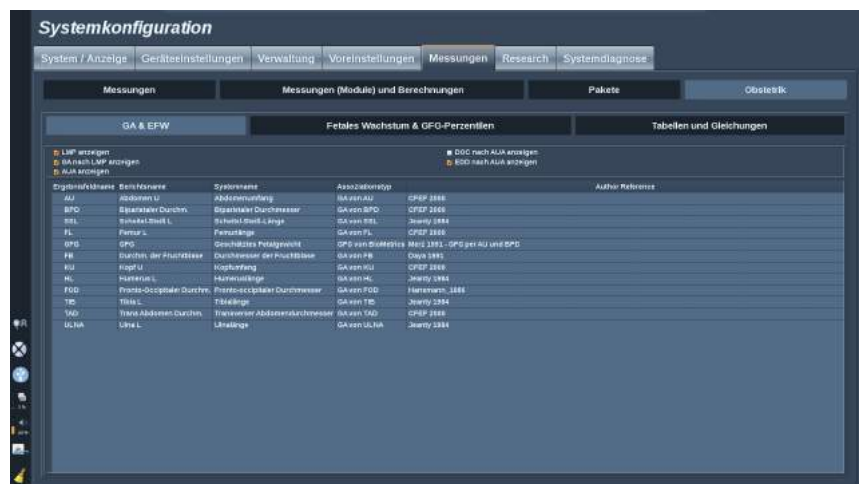

Dieser Abschnitt ermöglicht Ihnen eine Anpassung der Informationen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen:

- LMP (Datum der letzten Periode)
- Schwangerschaftsalter nach LMP
- AUA (Mittleres Ultraschallalter)
- DOC (Tag der Empfängnis) nach AUA
- EDD (Voraussichtliche Geburtstermin) nach AUA

In diesem Abschnitt können Sie auch die Tabelle festlegen, die für jede OB-Berechnung verwendet werden soll.

Für jede OB-Berechnung (deren Bezeichnung in der Spalte **Ergebnisfeldname** angezeigt wird), wird der Berechnungstyp in der Spalte **Assoziationsstyp** beschrieben.

1. Klicken Sie auf den **Autorenreferenz** -Namen, um einen anderen Autor auszuwählen.



ACHTUNG

Vorsicht

Fetales Wachstum & GFG-Perzentile

Auf dieser Registerkarte können Sie wählen, welche Tabelle für fetales Wachstum und GFG-Perzentile verwendet wird.

1. Klicken Sie zum Ändern auf Autor/Datum
2. Wählen Sie einen neuen Autor/ein neues Datum aus der Liste

Systemkonfiguration


System / Anzeige Geräteeinstellungen Verwaltung Voreinstellungen **Messungen** Research Systemdiagnose

Messungen Messungen (Module) und Berechnungen Pakete Obstetrik

GA & EFW **Fetales Wachstum & GFG-Perzentile** Tabellen und Gleichungen

Ergebnisadresse	Beschönerna	Systemname	Assoziationsg	Author/Reference for Percentile
AIJ	Abdomen U	Abdomenumfang	AIJ percentile	CRFP 1999
BPD	Biparietaler Durchm.	Biparietaler Durchmesser	BPD percentile	CRFP 1999
DDL	Bipariet-Schädel L.	Bipariet-Schädel-Länge	BPD percentile	Jeanty 1984
FL	Femur L.	Femurlänge	FL percentile	CRFP 1999
WFG	GFG	Geschätztes Fetalgewicht	GFG percentile	CRFP 1999
FB	Durchm. der Frontallinie	Durchmesser der Frontallinie	FB percentile	RSW 86
FB	Frontal	Frontallänge	FB percentile	CRFP 1999
HL	Humerus L.	Humeralumfang	HL percentile	Jeanty 1984
PCD	Frontal-Occipitaler Durchm.	Frontal-Occipitaler Durchmesser	PCD percentile	AKUM 2000
TB	Tibia L.	Tibiallänge	TB percentile	Jeanty 1984
TBD	Trans-Abdomen Durchm.	Transversaler Abdomendurchmesser	TBD percentile	CRFP 1999
ULNA	Ulna L.	Ulnalänge	ULNA percentile	Jeanty 1984


Tabellen und Gleichungen

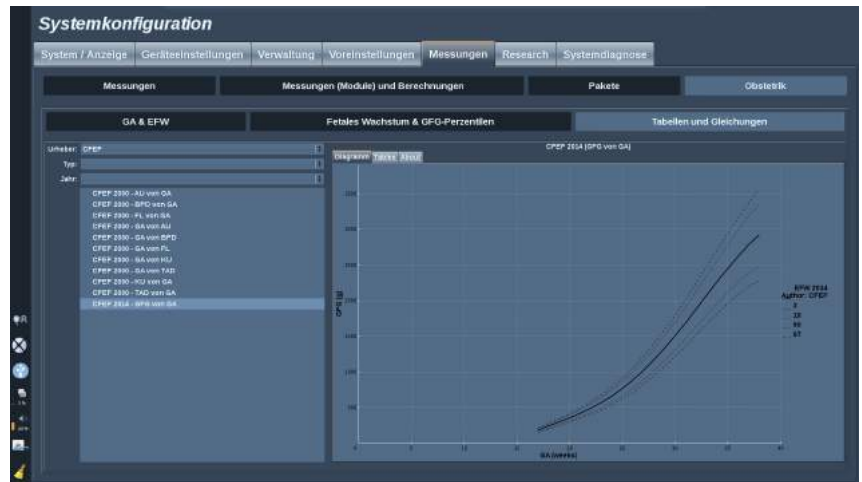

In diesem Abschnitt können Sie die Referenztabellen für die OB als Tabellen oder Diagramme darstellen.

1. Wählen Sie Autor, Typ und Jahr der Publikation aus.
2. Klicken Sie im rechten Teil auf „Diagramm“, um das Diagramm anzuzeigen, auf „Tabelle“, um die Tabelle anzuzeigen, und auf „Info“, um die Dokumentenreferenzen anzuzeigen.

Systemdiagnose

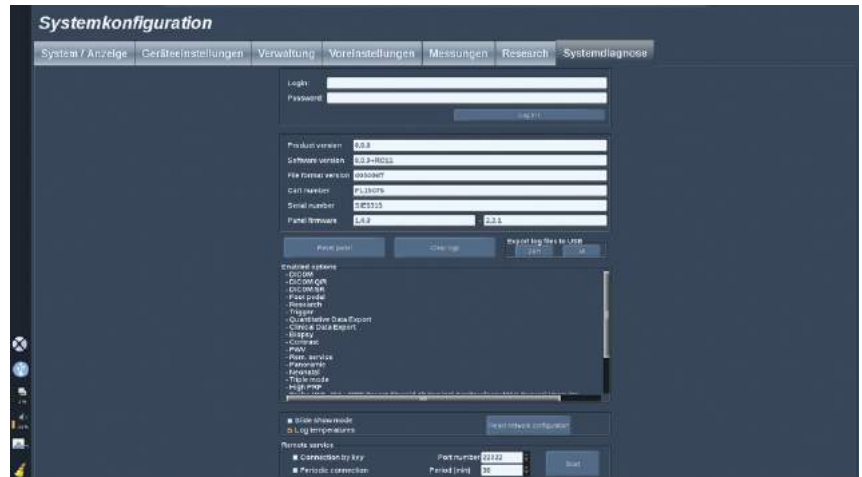

Der Zugriff auf das Diagnostik-Register ist nur dem Service-Techniker vorbehalten.

Für bestimmte Inhalte ist der Zugang über Passwort erforderlich, um Systemdiagnosetests durchzuführen.

Dieser Bereich ist ausschließlich für Service-Mitarbeiter im Außendienst vorgesehen.

Für den Zugang zu folgenden grundlegenden Systeminformationen ist kein Passwort erforderlich:

- Product version (Produktversion)
- Software version (Software-Version)
- File format version (Dateiformat-Version)
- Cart number (Nummer des Ultraschallsystems)
- Serial number (Seriennummer)
- Panel firmware (Bedienpult Firmware)
- List of enabled options (Liste aktivierter Optionen)

Zusätzlich stehen folgende drei Bedienelemente zur Verfügung:

- Reset Panel (Bedienpult rücksetzen)
- Clear logs (Protokolle löschen)
- Export logs to USB (Protokolle auf USB exportieren)

In diesem Register haben Sie auch Zugang zum Remote Service.

Die Remote Service-Lösung von Super Sonic Imagine ermöglicht die Überwachung des Aixplorer® Ultraschallsystems.

Es gibt zwei Möglichkeiten zur Kommunikation mit dem Aixplorer® :

- Der Benutzer der Web-Schnittstelle des Remote Service kommuniziert mit dem System in Echtzeit
- beide auszuführenden Aufgaben und die Ergebnisse werden vom Benutzer der Web-Schnittstelle des Remote Service und von Aixplorer® auf den Remote-Server geschoben, wenn eine Verbindung besteht.

Eine dritte Möglichkeit für die Wiederherstellung von Daten vom System besteht darin, Systemprotokolle manuell auf die Website des Remote Service hochzuladen.



ANMERKUNG

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Remote Service-Lösung.

Kapitel 9. Systempflege und Instandhaltung&

Papier und Toner auffüllen







In der Bedienungsanleitung Ihres Druckermodells finden Sie die entsprechenden Anweisungen für das richtige Nachfüllen von Druckerpapier und Toner.

Reinigung des Systems

Reinigungshäufigkeit

Die in diesem Kapitel erläuterten Wartungsarbeiten können Sie selbst vornehmen. Das Aixplorer® Ultraschallsystem muss in regelmäßigen Abständen, oder bei Bedarf auch öfter, gereinigt werden.

SuperSonic Imagine empfiehlt folgende Reinigungsintervalle als Richtlinie:

Teil		Empfohlene Reinigungsabstände
	Systembildschirm	Wöchentlich oder so oft wie nötig
	Bedienpult des Systems	Täglich oder nach jedem Patienten
	Touchscreen-Anzeige	Täglich oder nach jedem Patienten
	Gehäuse: Gestell und Griffe	Wöchentlich oder so oft wie nötig
	Luftfilter	Wöchentlich inspizieren, monatlich reinigen jährlich ersetzen
	Schallköpfe: Reinigung und Desinfektion	Nach jedem Patienten

Es empfiehlt sich, das System regelmäßig auf Wartungsbedarf zu überprüfen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren SuperSonic Imagine-Vertreter oder Servicemitarbeiter.



ACHTUNG

Bei Fragen zu grundlegenden Wartungsarbeiten oder zu einem Wartungsservice wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten SuperSonic Imagine-Servicemitarbeiter.

Betätigen Sie stets den On-/Off-Schalter, schalten Sie den Betriebsschalter auf der Rückseite des Geräts aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten am System vornehmen.

Es empfiehlt sich, bei Reinigungsarbeiten am System Handschuhe und eine Schutzbrille zu tragen.

Sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf das System. Sie könnten in das System eindringen und Schäden verursachen. In diesem Falle erlischt der Garantieanspruch.

Achten Sie darauf, dass sich keine Flüssigkeiten um die Tasten des Bedienpultes ansammeln.

Achten Sie ebenfalls darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gehäuse des Systems eintritt.

Reinigung des Gehäuses

Reinigen Sie das Gehäuse des Systems regelmäßig mit einem weichen, leicht mit Wasser angefeuchteten Lappen und einer milden Seife. Dies gilt auch für den unteren Teil des Systems, das Bedienpult und die Griffe. Achten Sie ebenso darauf, dass nach jedem Einsatz des Systems bei einer Untersuchung Gelreste von der Oberfläche des Bedienpult entfernt werden.

Die nachstehenden Produkte wurden getestet und als kompatibel befunden mit dem SuperSonic Imagine Aixplorer®.

Lösung	Hersteller	Reinigungs-/ Desinfektionsmittel	Wirkstoff
Sani-Cloth Active	PDI	Reinigungs- mittel Desinfektions- mittel	Quart. Ammonium
Sani-Cloth Af3	PDI	Reinigungs- mittel Desinfektions- mittel	Quart. Ammonium

Reinigung des Monitors

Verwenden Sie zur Reinigung des Monitors ein sauberes, weiches mit Fensterreiniger auf Ammoniakbasis befeuchtetes Baumwolltuch. Verwenden Sie keine Papiertücher, da sie Kratzer auf dem Monitor verursachen können. Sprühen Sie das Reinigungsmittel auf das Tuch, nicht direkt auf die Anzeigefläche. Achten Sie darauf, dass kein Reinigungsmittel in das Gehäuse eintritt. Dies kann das System beschädigen.

Reinigung der Touchscreen-Anzeige

Verwenden Sie zur Reinigung der Touchscreen-Anzeige ein sauberes, weiches mit Fensterreiniger auf Ammoniakbasis befeuchtetes Baumwolltuch. Verwenden Sie keine Papiertücher, da sie Kratzer auf dem Monitor verursachen können. Sprühen Sie das Reinigungsmittel auf das Tuch, nicht direkt auf die Anzeigefläche. Achten Sie darauf, dass kein Reinigungsmittel in das Gehäuse eintritt. Dies kann das System beschädigen.

Reinigung der Luftfilter

Das Aixplorer® Ultraschallsystem verfügt über Luftfilter. Überprüfen Sie diese wöchentlich und reinigen Sie sie je nach Bedarf. Beim ersten Einschalten am Monatsanfang wird auf dem Bildschirm ein Symbol angezeigt, das daran erinnert, die Luftfilter zu überprüfen. Verfahren Sie mit der Luftfilterreinigung wie nachstehend beschrieben und klicken Sie auf **OK** im Pop-up-Fenster.

Die Luftfilter befinden sich:

- in einem Einschub auf der Rückseite des Systems,
- in einem Einschub auf der Unterseite des Systems.

Um die rückseitigen Luftfilter herauszunehmen, öffnen Sie die Gehäuseabdeckung auf der Rückseite des Systems. Um die seitlichen Luftfilter herauszunehmen, öffnen Sie die seitliche Abdeckung mit einem Stift. Es empfiehlt sich, die Luftfilter monatlich oder auch öfter zu reinigen, wenn Sie starke Staub- bzw. Schmutzansammlungen bemerken.





Die herausnehmbaren Luftfilter können mit milder Seife gewaschen werden. Spülen Sie sie danach gründlich mit Wasser ab. Lassen Sie die Filter an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder in das System einsetzen. Ersatzfilter für den sofortigen Gebrauch werden mit dem System mitgeliefert. Zusätzliche Luftfilter können beim SuperSonic Kundendienst bestellt werden.

Instandhaltung der Luftfilter



1. Nehmen Sie die Luftfilterabdeckung ab, indem Sie das Unterteil der Abdeckung zu sich hinziehen.
2. Überprüfen Sie den Filter auf Schmutz und wechseln Sie ihn gegebenenfalls gegen einen Ersatzfilter aus.
3. Verwenden Sie zur Reinigung je nach Zustand des Filters einen Staubsauger oder Seife und Wasser.
4. Lassen Sie den gereinigten Filter vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.



WARNUNG

Bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten am System vornehmen, betätigen Sie stets den On-/Off-Schalter, schalten Sie den Betriebsschalter auf der Rückseite des Geräts aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Erhöhte interne Temperaturen können durch die Verschmutzung der Luftfilter verursacht werden.

Achten Sie stets darauf, dass die Filter sauber sind, da es andernfalls zu Systemausfällen während kritischer Anwendungen kommen kann.

Installieren Sie niemals einen Luftfilter, der nicht vollständig trocken ist.



ACHTUNG

Schalten Sie das System ab, bevor Sie die Luftfilter entfernen.

Schalten Sie das System niemals ohne Luftfilter ein.

Reinigung und Desinfektion von Schallköpfen

Sicherheitshinweise



WARNUNG

Vorsicht beim Umgang mit den Ultraschallköpfen und bei ihrer Reinigung.

Verwenden Sie keinesfalls beschädigte oder defekte Schallköpfe.

Tauchen Sie Schallköpfe mit defekter Kontaktfläche oder schadhaftem Kabelmantel niemals in Flüssigkeit und achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit eintritt.

Eine Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen sowie Schäden am Gerät führen.

Befolgen Sie diese Vorsichtsmaßnahmen, um Verletzungen sowie Schäden am Gerät zu vermeiden:

Untersuchen Sie den Schallkopf vor der Reinigung auf Beschädigungen oder Verschleißanzeichen an Linse, Gehäuse, Kabel und Stecker.

Tragen Sie keinesfalls Flüssigreiniger auf beschädigte oder defekte Schallköpfe auf.

Beachten Sie die maximale Eintauchtiefe für den Schallkopf und tauchen Sie ihn niemals tiefer als angegeben in Flüssigkeiten ein.

Tauchen Sie niemals den Stecker oder Adapter des Schallkopfes in Flüssigkeiten ein.

Schäden am Schallkopf können durch den Kontakt mit ungeeigneten Kopplungsgelen oder Reinigungsmitteln verursacht werden.

Verwenden Sie ausschließlich für den Schallkopf zugelassene Reinigungsmittel.

Tauchen Sie den Schallkopf nicht in Lösungen ein, die Alkohol, Bleichmittel, Ammoniumchloridverbindungen oder Wasserstoffperoxid enthalten, bzw. vermeiden Sie einen längeren Kontakt mit diesen.

Das Ausmaß der Desinfektion hängt vom untersuchten Gewebetyp ab, mit dem der Schallkopf in Kontakt tritt. Stellen Sie sicher, dass die Stärke der Lösung und die Dauer des Kontakts für die vorgesehene klinische Verwendung des Schallkopfs geeignet sind.

Verwenden Sie immer Schutzbrille und Handschuhe, wenn Sie Geräte reinigen, desinfizieren oder sterilisieren.

Beachten Sie das Verfallsdatum der Lösung.

Vermeiden Sie die Berührung des Desinfektionsmittels mit dem Stecker-Aufkleber.



ACHTUNG

Werden Schallköpfe nicht ordnungsgemäß gereinigt, desinfiziert oder sterilisiert, besteht das Risiko biologischer Gefahren.

Dies trifft besonders dann zu, wenn der Schallkopf in Berührung mit Schleimhäuten oder Körperflüssigkeiten kommt.

Sorgfältige Reinigung und Desinfektion sind zur Vermeidung von Krankheitsübertragung und Kontrolle von Infektionen notwendig.

Der Anwender des Geräts ist dafür verantwortlich, die angewandten Verfahren zur Infektionskontrolle auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen.

Wenn der Schallkopf in Kontakt mit Körperflüssigkeiten oder Schleimhäuten kommt, empfiehlt sich die Verwendung einer zugelassenen, im Handel erhältlichen sterilen und pyrogenfreien Schallkopf-Schutzhülle.

Verwenden Sie ausschließlich Einweg-Schutzhüllen. Schutzhüllen dürfen keinesfalls wiederverwendet werden.

Vorsicht beim Umgang mit Desinfektionsmitteln.

Tragen Sie Gummihandschuhe und Schutzbrille.

Befolgen Sie stets die Anweisungen des Produktherstellers.

Zu Beginn des Reinigungsvorgangs müssen sämtliche sichtbaren Rückstände entfernt werden, damit die chemischen flüssigen Desinfektionsmittel voll wirksam werden können.

Befolgen Sie die Anweisungen des Reinigungs- oder Desinfektionsmittels für eine effiziente Reinigung.

Es ist darauf zu achten, dass kein Desinfektionsmittel auf die Anschlussstelle von Kabel und Gehäuse aufgetragen wird.

Achten Sie darauf, dass keinerlei Flüssigkeiten in die Anschlussstelle von Kabel und Gehäuse eintreten.

Verwenden Sie keine Alkoholprodukte bzw. Produkte auf Alkohol-Basis auf dem Schallkopfkabel.

Brechen Sie die Verwendung bei Anzeichen von Beschädigungen am Schallkopf wie etwa Rissen, Sprüngen, Ablösungen der Kontaktfläche bzw. Kabelschäden ab und rufen Sie Ihren autorisierten SuperSonic Imagine-Service-Mitarbeiter zu Hilfe.

Reinigen und Desinfizieren von Schallköpfen Anleitung

Die Reinigung und Desinfektion erfolgt in zwei Schritten: zuerst die Reinigung und dann die Desinfektion.

Reinigung

Die Reinigung dient dazu, alle Fremdkörper (Blut, Gewebe, Protein, Ultraschallgel, usw.) vom Schallkopf zu entfernen.

DESINFEKTION

Das Ausmaß der Desinfektion hängt vom untersuchten Gewebetyp ab, mit dem der Schallkopf in Kontakt tritt. Die Untersuchungen werden in drei Klassen unterteilt: nichtkritisch, semikritisch und kritisch. Die

Einteilung basiert auf dem Grad des Infektionsrisikos der jeweiligen Anwendung.

Bei nichtkritischen Anwendungen kommt es lediglich zum Kontakt mit intakter Haut; bei semikritischen Anwendungen tritt der Schallkopf in Kontakt mit Schleimhäuten; bei kritischen Anwendungen tritt er in Kontakt mit einem in der Regel sterilen Bereich, sterilem Gewebe oder Blutgefäßen.

Bei Ultraschallköpfen, die für nichtkritische Untersuchungen verwendet werden, reicht im Allgemeinen eine Reinigung und Basisdesinfektion vor dem nächsten Patienten.

Schallköpfe, die bei semikritischen Anwendungen zum Einsatz kommen, müssen nach dem Gebrauch gesäubert und hochgradig desinfiziert werden, selbst wenn eine Schutzhülle verwendet wurde.

Schallköpfe, die bei kritischen Anwendungen zum Einsatz kommen, sind zu sterilisieren, und es wird die Verwendung einer sterilen Schutzhülle empfohlen. Schallköpfe, die bei kritischen Anwendungen zum Einsatz kommen, müssen nach dem Gebrauch gesäubert und sterilisiert werden, selbst wenn eine Schutzhülle verwendet wurde.

Allgemeines Reinigungs- und Desinfektionsverfahren für Aixplorer® Schallköpfe

Die Schallköpfe für den Aixplorer® sind für nichtkritische und semikritische Ultraschallanwendungen vorgesehen. Der Schallkopf muss nach jeder Verwendung gründlich gereinigt und desinfiziert werden. Generell ist für nichtkritische Anwendungen des SuperSonic Imagine Aixplorer® -Schallkopfes eine Basisdesinfektion ausreichend.

Für semikritische Anwendungen ist eine hochgradige Desinfektion erforderlich, für die ausschließlich eines der Desinfektionsmittel aus untenstehender Liste verwendet werden sollte.

Befolgen Sie für eine hochgradige Desinfektion bei semikritischen Anwendungen genau die Anweisungen des Herstellers zu Anwendung und Kontaktdauer. Gehen Sie vor wie auf dem Produktetikett angegeben.

Verfahren zur Vorbereitung des Schallkopfs auf die Desinfektion

1. Wischen Sie die Kontaktfläche und das Gehäuse des Ultraschallkopfes nach jeder Untersuchung gründlich ab, um sämtliche Gelreste zu entfernen.
2. Untersuchen Sie den Schallkopf auf Anzeichen von Beschädigung, wie etwa Risse, Sprünge, Ablösungen der Kontaktfläche oder Kabelschäden. Sollten Sie einen Defekt feststellen, so brechen Sie den Reinigungs- bzw. Desinfektionsvorgang ab und rufen einen autorisierten SuperSonic Imagine-Servicemitarbeiter zu Hilfe.
3. Wischen Sie die Kontaktfläche, das Gehäuse und Kabel des Schallkopfes mit einem weichen, mit Wasser befeuchteten Lappen ab. Es können auch eine milde Seife, Basisreiniger oder Enzymreiniger (aus der nachstehenden Tabelle) verwendet werden.
4. Bei hartnäckigen, eingetrockneten Resten auf der Kontaktfläche oder auf dem Gehäuse des Schallkopfes reinigen Sie den Schallkopf vorsichtig mit einem mit Wasser befeuchteten Mull, Schwamm oder einer weichborstigen Bürste ab. Wischen Sie Partikelreste mit einem mit Wasser befeuchteten Lappen ab.
5. Spülen Sie den Schallkopf gründlich mit Wasser ab. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Anschlussstelle von Kabel und Gehäuse eintritt.
6. Trocken Sie den Schallkopf an der Luft oder mit einem trockenen, weichen Tuch.

Desinfektion

1. Reinigen Sie den Schallkopf stets vor jeder Desinfektion. (Siehe oben)
2. Bei Verwendung eines FDA- bzw. CE-zertifizierten Desinfektionsmittels befolgen Sie bitte genau die Anweisungen des Herstellers.
3. Zur Basisdesinfektion können Linse und Gehäuse des Schallkopfes mit einem der in der zugehörigen Schallkopftabelle aufgelisteten **Reinigungs-/Desinfektionsmittel für die Basisdesinfektion** abgewischt werden.
4. Für die hochgradige Desinfektion kann der Schallkopf mit einem der in der zugehörigen Schallkopftabelle aufgelisteten **Desinfektionsmittel** abgewischt bzw. darin eingetaucht werden.

5. Trocken Sie den Schallkopf an der Luft oder mit einem trockenen, weichen Tuch.
6. Untersuchen Sie den Schallkopf nochmals auf Anzeichen von Beschädigung, wie etwa Risse, Sprünge, Ablösungen der Kontaktfläche bzw. Kabelschäden, bevor Sie ihn erneut verwenden.

Reinigungs- und Desinfektionsprodukte

Für den SL15-4, SL10-2, SMC12-3 und SC6-1 Schallköpfe

Lösung/System	Hersteller	Reinigungs-/ Desinfektionsmittel	Wirkstoff
Alkaspray GSA (Cidalkan)	Alkapharm	Reinigungs- mittel Desinfektions- mittel	Isopropylalkohol Alkylamin
Alkazyme	Alkapharm	Reinigungs- mittel Desinfektions- mittel	Quart. Ammonium
Anioxyde 1000	Anios	Desinfektions- mittel	Peressigsäure
Cidex OPA*	Advanced Sterilization Products	Desinfektions- mittel	Orthophtalaldehyd
Cidezime	Johnson and Johnson	Reinigungs- mittel	Proteolytische Enzyme
Gigasept FF	Schuller&Mayr	Desinfektions- mittel	Succindialdehyd, Dimethoxytetrahydrofuran
Linget' Anios	Anios	Reinigungs- mittel Desinfektions- mittel	Ethanol Chlorhexidindigluconat Alkylaminoalkylglycin
Mikrobac Tissues	Bode	Desinfektions- mittel	Benzyl-C12-18- alkyldimethylammoniumchlorid und Didecyldimethylammoniumchlorid
Sani-Cloth Active	PDI	Reinigungs- mittel	Quart. Ammonium

Lösung/System	Hersteller	Reinigungs-/ Desinfektionsmitte	Wirkstoff
		Desinfektions- mittel	
Steranios	Anios	Desinfektions- mittel	Glutaraldehyd
T-Spray	Pharmaceutical Innovations Inc.	Desinfektions- mittel	Quart. Ammonium
Tristel Duo	Tristel Solutions Limited	Desinfektions- mittel	Chlordioxid
Tristel Solo	Tristel Solutions Limited	Desinfektions- mittel	Hexamethylenbiguanid

*: DISOPA in Japan

Für den SE12-3 Schallkopf

Lösung/System	Hersteller	Reinigungs-/ Desinfektionsmitte	Wirkstoff
Anioxyde 1000	Anios	Desinfektions- mittel	Peressigsäure
Cidex OPA*	Advanced Sterilization Products	Desinfektions- mittel	Orthophtalaldehyd
Cidezime	Johnson and Johnson	Reinigungs- mittel	Proteolytische Enzyme
Gigasept FF	Schuller&Mayr	Desinfektions- mittel	Succindialdehyd, Dimethoxytetrahydrofuran
Steranios	Anios	Desinfektions- mittel	Glutaraldehyd
Tristel Duo	Tristel Solutions Limited	Desinfektions- mittel	Chlordioxid

*: DISOPA in Japan



WARNUNG

Stellen Sie bei endokavitären Schallköpfen sicher, dass das Reinigungs-/Desinfektionsmittel mit der Schleimhaut kompatibel ist.



ANMERKUNG

Einige Reinigungs-/Desinfektionsprodukte können eine Färbung oder Verfärbung des Schallkopfgehäuses verursachen. Diese Färbung/Verfärbung hat keine Auswirkung auf die Bildqualität des Schallkopfes.

Für den SEV12-3 Schallkopf

Lösung/System	Hersteller	Reinigungs-/ Desinfektionsmittel	Wirkstoff
Cidex OPA*	Advanced Sterilization Products	Desinfektionsmittel	Orthophtalaldehyd
Opaster Anios	Anios	Desinfektionsmittel	Orthophtalaldehyd
Steranios OPA	Anios	Desinfektionsmittel	Orthophtalaldehyd

*: DISOPA in Japan



WARNUNG

Stellen Sie bei endokavitären Schallköpfen sicher, dass das Reinigungs-/Desinfektionsmittel mit der Schleimhaut kompatibel ist.



ANMERKUNG

Einige Reinigungs-/Desinfektionsprodukte können eine Färbung oder Verfärbung des Schallkopfgehäuses verursachen. Diese Färbung/Verfärbung hat keine Auswirkung auf die Bildqualität des Schallkopfes.

Für den SLV16-5 Schallkopf

Lösung/System	Hersteller	Reinigungs-/ Desinfektionsmittel	Wirkstoff
Cidex OPA*	Advanced Sterilization Products	Desinfektionsmittel	Orthophtalaldehyd
Cidezime	Johnson and Johnson	Reinigungsmittel	Proteolytische Enzyme
Linget' Anios	Anios	Reinigungsmittel Desinfektionsmittel	Ethanol Chlorhexidindigluconat Alkylaminoalkylglycin
Mikrobac Tissues	Bode	Desinfektionsmittel	Benzyl-C12-18-alkyldimethylammoniumchlorid und Didecyldimethylammoniumchlorid

*: DISOPA in Japan

Für den SC6-1, XP5-1 und den SLH20-6 Schallköpfe

Lösung/ System	Hersteller	Reinigungs-/ Desinfektionsmittel	Wirkstoff
Cidex OPA (DISOPA in Japan)	Advanced Sterilization Products	Desinfektionsmittel	Orthophtalaldehyd
Cidex Plus	Advanced Sterilization Products	Desinfektionsmittel	Glutaraldehyd

Lösung/ System	Hersteller	Reinigungs-/ Desinfektionsmittel	Wirkstoff
Enzol	Advanced Sterilization Products	Reinigungsmittel	Proteolytische Enzyme
Gigasept FF	Schuller&Mayr	Desinfektionsmittel	Succindialdehyd, Dimethoxytetrahydrofuran
KlenZyme	Steris	Reinigungsmittel	Proteolytische Enzyme
Linget'Anios	Anios	Reinigungsmittel Desinfektionsmittel	Ethanol Chlorhexidindigluconat Alkylaminoalkylglycin
MetriZyme	Metrex	Reinigungsmittel	Proteolytische Enzyme
Milton	Milton	Desinfektionsmittel	Natriumhypochlorit
Sani-Cloth HB	PDI	Desinfektionsmittel	Quart. Ammonium
Sani-Cloth Plus	PDI	Desinfektionsmittel	Quart. Ammonium
Sporox	Reckitt & Colman	Desinfektionsmittel	Wasserstoffperoxid
Sporox II	Reckitt & Colman	Desinfektionsmittel	Wasserstoffperoxid
Steranios OPA	Anios	Desinfektionsmittel	Orthophtalaldehyd
Super Sani Cloth	PDI	Desinfektionsmittel	Quart. Ammonium
Transeptic Spray	Parker Laboratories	Reinigungsmittel	Chlorhexidinguconat, Isopropylalkohol
Wavicide 01	MCC	Desinfektionsmittel	Glutaraldehyd

*: DISOPA in Japan

Allgemeine Empfehlungen für alle Schallköpfe

Die oben angegebenen Reinigungsmittel und Desinfektionsprodukte wurden getestet und als ausschließlich mit dem Material der SuperSonic Imagine Aixplorer® Schallköpfe kompatibel befunden. Fragen zur Wirksamkeit, Gebrauchsanweisung und ordnungsgemäßen Handhabung sind direkt an den Hersteller zu richten. Bitte überprüfen Sie, ob die empfohlenen Produkte in Ihrem Land für die Verwendung zugelassen sind. Der Einsatz eines nicht zugelassenen Reinigungs- oder Desinfektionsmittels kann den Schallkopf beschädigen und die Garantie ungültig machen. Die Verwendung von anderen als auf dieser Liste aufgeführten Produkten erfolgt auf eigene Gefahr des Anwenders und Patienten.

Grenzen für das Eintauchen

Ist ein Eintauchen des Schallkopfes erforderlich, dürfen die SL15-4, SL10-2, SC6-1, SMC12-3 Schallköpfe nur bis 3 cm über der Kabelzugentlastungs-Anschlussstelle eingetaucht werden. Die Schallköpfe SEV12-3, SLV16-5, XP5-1, XC6-1, SLH20-6 und SE12-3 können bis 1 m über der Kabelzugentlastungs-Anschlussstelle in Flüssigkeit eingetaucht werden. Siehe nachstehende Abbildung.

Gemäß IEC 60529 sind alle Aixplorer Schallköpfe IPX7, entsprechend der nachfolgenden Abbildung.

Tauchen Sie niemals den Schallkopfstecker in Flüssigkeit. Tauchen Sie niemals die Kabelanschlussstelle in Flüssigkeit. Lassen Sie den Schallkopf niemals länger eingetaucht als für die Desinfektion nötig ist. Siehe nachstehende Abbildung.

Auflagefläche mit Patientenkontakt



Weitere Informationen zur Reinigung und Desinfektion von Ultraschallköpfen

Weitere Informationen zur Reinigung und Desinfektion von Ultraschallköpfen finden Sie hier:

Chemical Sterilization and high-level disinfection in health care facilities.
ANSI/AAMI ST58:2005 Sterilization and Disinfection of Medical

Devices: General Principles. Centers for Disease Control, Division of Healthcare Quality Promotion.

<http://www.cdc.gov/ncidod/hip/sterile/sterilgp.htm> (5-2003) [http://www.cdc.gov/ncidod/hip/sterile/sterilgp.htm%20(5-2003)]

ODE Device Evaluation Information—FDA Cleared Sterilants and High Level Disinfectants with General Claims for Processing Reusable Medical and Dental Devices.

<http://www.fda.gov/cdrh/ode/germlab.html>

Kapitel 10. Fehlersuche



In allen Bildgebungs-Modi und in vielen Datenbildschirmen wird eine Schaltfläche **Hilfe** auf dem Touchscreen angezeigt.

Drücken Sie **Hilfe** , um diese Bedienungsanleitung direkt auf dem System zu öffnen.

Treten bei der Bedienung des Systems Probleme auf, so finden Sie in diesem Kapitel Vorschläge zur Behebung des Problems.

Sollte ein bestimmtes Problem hier nicht behandelt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienstvertreter.

In der folgenden Fehlersuchetabelle sind eine Reihe von Störungen sowie die entsprechende Korrekturmaßnahme aufgelistet.

Störung	Korrekturmaßnahme
Das System lässt sich nicht einschalten	Vergewissern Sie sich, dass das System an eine intakte Steckdose angeschlossen ist und der Hauptschalter auf der Rückseite eingeschaltet ist. Schalten Sie das System ein.
Die Bildqualität ist schlecht	Achten Sie auf einfallendes Umgebungslicht Ändern Sie Verstärkung, TGC und AutoTGC. Probieren Sie einen anderen Schallkopf aus. Verändern Sie die Position des LCD-Bildschirms, um einen besseren Sichtwinkel zu erzielen. Sollte sich nichts geändert haben, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.
Fehlermeldung wird auf dem Bildschirm angezeigt	Notieren Sie sich den Fehler und wenden Sie sich an Ihren Kundendienstberater.
Der Schallkopf wird nicht vom System erkannt	Stecken Sie den Schallkopf aus, stecken Sie ihn wieder ein und wählen Sie ihn erneut. Sollte sich nichts geändert haben, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.
DVD funktioniert nicht	Nehmen Sie eine andere DVD zum Speichern der Daten. Sollte sich nichts geändert haben, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.

Störung	Korrekturmaßnahme
Das System startet nicht, die Ventilatoren drehen sich nicht	Vergewissern Sie sich, dass das System an eine intakte Steckdose angeschlossen ist und der Hauptschalter auf der Rückseite eingeschaltet ist. Schalten Sie das System ein. Sollte sich nichts geändert haben, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.
Der Monitor lässt sich nicht einschalten (Ventilatoren laufen und Bedienpult ist eingeschaltet)	Prüfen Sie die Kabel an der Rückseite des Monitors. Führen Sie einen Neustart durch. Sollte sich nichts geändert haben, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.
Die Touchscreen-Ansicht reagiert nicht, obwohl das System schallbereit ist	Führen Sie einen Neustart durch. Sollte sich nichts geändert haben, wenden Sie sich an Ihre Kundendienstvertretung.
Das Bedienpult ist ausgeschaltet	Führen Sie einen Neustart durch. Sollte sich nichts geändert haben, wenden Sie sich an Ihre Kundendienstvertretung.
Das System zeigt eine Meldung mit dem Hinweis auf ein Hardware-Problem.	Führen Sie einen Neustart durch. Verschwindet die Meldung nicht, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.
Beim Hochfahren wird „GRUB Error“ angezeigt.	Interner Festplattenfehler Inspektion erforderlich. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.
Der Startbildschirm (Splash Screen) ist zu sehen, der Balken zur Fortschrittsanzeige steht jedoch seit über 5 Minuten still.	Das Betriebssystem ist defekt. Inspektion erforderlich. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.
Ein Besen-Symbol wird im Symbolbereich des Bildschirms angezeigt.	Diese Meldung wird einmal im Monat angezeigt, um Sie daran zu erinnern, dass die Luftfilter überprüft werden müssen. Schalten Sie das System aus und überprüfen Sie die Filter. Überprüfen Sie das Symbol. Ein Pop-up-Fenster öffnet sich. Bestätigen Sie mit Yes. Das Symbol verschwindet.
Artefakt, weiße(r) Kegel im B-Modus, und/ oder farbige(r) Kegel im Color Flow Bild, von der Hautoberfläche ausgehend	Führen Sie einen Neustart durch. Sollte sich nichts geändert haben, wenden Sie sich an Ihre Kundendienstvertretung.

Kapitel 11. Akustische Leistungstabellen

Daten zur Maximaltemperatur

Die nachfolgende Tabelle enthält die Maximaltemperatur, die jeder Schallkopf erreichen kann.

Tabelle 11.1. Maximaltemperatur für jeden Schallkopf

Bezeichnung des Schallkopfs	Maximaltemperatur	Testmethode
SL15-4	21,5 °C	Ruhende Luft
SC6-1	43 °C	Ruhende Luft
XC6-1	47,5 °C	Ruhende Luft
SE12-3	Max. Erhöhung = 3,6 °C	Simulierte Benutzung
SEV12-3	Max. Erhöhung = 4,8 °C	Simulierte Benutzung
SLV16-5	39,1°	Ruhende Luft
SL10-2	25,4 °C	Ruhende Luft
SMC12-3	44,9 °C	Ruhende Luft
XP5-1	48,1 °C	Ruhende Luft
SLH20-6	40,1 °C	Ruhende Luft

In akustischen Leistungstabellen verwendete Symbole

Folgende Symbole werden in den akustischen Leistungstabellen verwendet:

Symbol	Bezeichnung
f_{awf}	Akustische Arbeitsfrequenz
$I_{pa,\alpha}$	Gedämpfte puls-gemittelte Intensität
I_{spta}	Räumlicher Spitzen- und zeitlicher Mittelwert der Intensität

Symbol	Bezeichnung
$I_{spta, \alpha}$	Gedämpfter Spitzen- und zeitlicher Mittelwert der Intensität
MI	Mechanischer Index
n_{pps}	Anzahl an Pulsen pro Ultraschall-Scanlinie
P	Ausgangsleistung
P_{1x1}	Ausgangsleistung pro Quadratcentimeter
$p_{r, \alpha}$	Gedämpfter Spitzenwert des akustischen Unterdrucks
p_r	Spitzenwert des akustischen Unterdrucks
prf	Impulswiederholungsfrequenz
srr	Scanwiederholungsrate
TI	Thermischer Index
TIB	Thermischer Index für Knochen
TIC	Thermischer Index für Schädelknochen
TIS	Thermischer Index für Weichgewebe
z_b	Tiefe für Thermischen Index für Knochen
z_{MI}	Tiefe für mechanischen Index
$z_{pii, \alpha}$	Tiefe für den Spitzenwert des gedämpften Puls-Integrals der Intensität
z_s	Tiefe für Thermischen Index für Weichgewebe

Schalleistungstabellen

Übersicht der Schalleistung Schallkopf/Modus

Das SuperSonic Imagine Aixplorer® System erfüllt die IEC-Norm 60601-2-37.

Folgende Tabelle bietet eine Übersicht über die Schallkopf/Modus-Kombinationen, für die das angezeigte globale MI- bzw. TI-Maximum über 1,0 liegt.

Tabelle 11.2. Schallkopf/Modus-Kombinationen, für die das angezeigte globale MI- bzw. TI-Maximum über 1,0 liegt

Betriebsmodus	Schallköpfe									
	SL15-4	SC6-1	SE12-3	SLV16-5	SL10-2	SMC12-3	XP5-1	SLH20-6	XC6-1	SEV12-3
B-Modus	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
PW-Doppler	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Farb-Doppler	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Amplitude-Doppler	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Direktionaler Farb-Doppler	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
SWE™-Modus	☒	☒	☒	☒	☒	☒			☒	☒
B-Modus + PW-Doppler	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Harmonic Imaging	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
CEUS		☒							☒	☒
B-Modus + 3D				☒						☒
Farbe + 3D										☒
SWE™ + 3D				☒						☒
M-Modus		☒	☒						☒	☒

Messungengenauigkeiten

Die berichtete erweiterte Unsicherheit für die Anzeige von mechanischen und thermischen Indizes basiert auf einer mit dem Erweiterungsfaktor $k=2$ multiplizierten Standardunsicherheit, woraus sich eine Überdeckungswahrscheinlichkeit von ca. 95 % ergibt.

Beim obigen Unsicherheitsgrad beträgt das Genauigkeitsergebnis für den mechanischen Index (MI) $\pm 19,3\%$ und das Genauigkeitsergebnis für den thermischen Index (TI) $\pm 53,1\%$.

Schallmenge	Messungengenauigkeit
Leistung (P)	$\pm 53,1\%$
Druck ($p_{r,\alpha}$)	$\pm 19,3\%$
Intensität ($I_{pi\alpha}$ bei max. MI)	$\pm 53,1\%$
Mittenfrequenz (f_{awf})	$\pm 1\%$

Ausführliche Schalleistungstabellen

Für jede in o.g. Tabelle angekreuzte Schallkopf/Modus-Kombination folgt eine detaillierte akustische Leistungstabelle auf den nächsten Seiten

Die Schallköpfe bei denen der TIC mit (b) markiert ist, sind nicht für transkraniale oder neonatale zephale Anwendungen geeignet.

SL15-4 Schallkopf

Betriebsmodus: B + CD Doppler

Indexname		MI	TIS		TIB		TIC
			An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert		1.7	(a)		(a)		(a)
Indexkomponentenwerte			#	-	#	-	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha} \text{ AT } z_{\text{MI}}$	(MPa)	CD: 3.55 B: 3.82				
	P	(mW)		#	#	#	#
	$P_{1 \times 1}$	(mW)		#	#		
	z_s	(cm)			-		
	z_b	(cm)				-	
	z_{MI}	(cm)	CD: 1.6 B: 1.41				
	$z_{\text{pii},\alpha}$	(cm)	-				
	f_{awf}	(MHz)	CD: 7.38 B: 5.25	#	#	#	#
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	CD: 176 B: 16				
	srr	(Hz)	14				
	η_{pps}		CD: 11 B: 1				
	$I_{\text{pa},\alpha} \text{ AT } z_{\text{pii},\alpha}$	(W/cm ²)	CD: 26 B: 310				
	$I_{\text{spta},\alpha} \text{ AT } z_{\text{pii},\alpha}$	(mW/cm ²)	CD: 123 B: 12				
	$I_{\text{spta}} \text{ AT } z_{\text{pii}}$	(mW/cm ²)	CD: 279 B: 21				

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
	$p_{rAT} z_{pii}$	(MPa)	CD: 4.41 B: 4.59					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI					
	Bedingung 2							
	Bedingung 3							
	Bedingung 4							

(a) Der maximale Indexwert ist kleiner als 1,0

Bedingung 1: UpExtVeinous, B-Modus Fundamental, Fokusbereich 22 mm, GEN, Schalleistung 0 dB

Betriebsmodus: B + SWE

Indexname		MI	TIS		TIB		TIC
			An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert		1.7	3.29		3.29		4.5*
Indexkomponentenwerte			P: 0.24 F: 2.51 B: 0.38	P: 1.62 F: 0.73 B: 0.38	P: 0.24 F: 2.51 B: 0.38	P: 1.99 F: 0.51 B: 0.38	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha}^{AT} z_{MI}$	(MPa)	P: 4.05 F: 2.93 B: 3.76				
	P	(mW)		P: 212 F: 70.3 B: 16.6	P: 212 F: 70.3 B: 16.6		P: 272 F: 131 B: 16.6
	P_{1x1}	(mW)		P: 19.1 F: 42.4 B: 7.4	P: 19.1 F: 42.4 B: 7.4		
	z_s	(cm)			P: 1.79 F: 2.4		
	z_b	(cm)				P: 1.79 F: 1.5	
	z_{MI}	(cm)	B: 1.41				
	$z_{pii,\alpha}$	(cm)	P: 1.92 F: 1.35				
	f_{awf}	(MHz)	P: 6 F: 5.63 B: 5.25	P: 5 F: 7.5 B: 7.63	P: 5 F: 7.5 B: 7.63		P: 5 F: 5.63 B: 7.63
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	P: 2 F: 84 B: 24				
	srr	(Hz)	2				
	n_{pps}		P: 1 F: 42 B: 12				
	$I_{pa,\alpha}^{AT} z_{pii,\alpha}$	(W/cm ²)	P: 452 F: 288 B: 310				

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
	$I_{spta, \alpha}$ AT $z_{pii, \alpha}$	(mW/cm ²)	P: 383 F: 27 B: 34					
	I_{spta} AT z_{pii}	(mW/cm ²)	P: 490 F: 49 B: 52					
	p_r AT z_{pii}	(MPa)	P: 5.42 F: B: 7.63					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI					
	Bedingung 2			TIS		TIB		TIC
	Bedingung 3							
	Bedingung 4							

* Die Summe des TI im Worst-Case von jedem zusammengesetzten Modus ist höher als 4,5, jedoch regelt das System die Spannung so, dass der TI auf 4,5 begrenzt wird.

Bedingung 1: Allgemein, SWE-Feldposition 20 mm, PEN, Schallleistung 0 dB

Bedingung 2: Brust, SWE-Feldposition 45 mm, RES, Schallleistung 0 dB

Betriebsmodus: PW-Doppler

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert			1.4	1.09		2.44		1.84
Indexkomponentenwerte				0.85	0.78	0.86	2.44	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha} AT z_{MI}$	(MPa)	3.2					
	P	(mW)		43.6		32.7		20.3
	P_{1x1}	(mW)		43.6		32.7		
	z_s	(cm)			0.84			
	z_b	(cm)					1.35	
	z_{MI}	(cm)	-					
	$z_{pii,\alpha}$	(cm)	1.29					
	f_{awf}	(MHz)	5.125	5.38		5.25		5
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	1064					
	sr	(Hz)	-					
	n_{pps}		1					
	$I_{pa,\alpha} AT z_{pii,\alpha}$	(W/cm ²)	243					
	$I_{spta,\alpha} AT z_{pii,\alpha}$	(mW/cm ²)	549					
	$I_{spta} AT z_{pii}$	(mW/cm ²)	881					
	$p_r AT z_{pii}$	(MPa)	3.89					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI					
	Bedingung 2			TIS				
	Bedingung 3					TIB		
	Bedingung 4							TIC

Bedingung 1: Allgemein, Fokusbereich 22 mm, SV 1,5 mm, Skala 8 cm/s, Schalleistung 0 dB

Bedingung 2: Allgemein, Fokusbereich 68 mm, SV 2 mm, Skala 65 cm/s, Schalleistung 0 dB

Bedingung 3: Allgemein, Fokusbereich 52 mm, SV 2 mm, Skala 65 cm/s, Schalleistung 0 dB

Bedingung 4: Allgemein, Fokusbereich 7 mm, SV 0,5 mm, Skala 65 cm/s, Schalleistung 0 dB

SC6-1 Schallkopf

Betriebsmodus: B + CD Doppler

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert			1.6	2.38		2.38		(b)
Indexkomponentenwerte				CD: 1.92 B: 0.46	-	CD: 1.92 B: 0.46	-	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha} AT z_{MI}$	(MPa)	CD: 2.35 B: 2.38					
	P	(mW)		CD: 277 B: 60	CD: 277 B: 60	#		
	$P_{1 \times 1}$	(mW)		CD: 218 B: 52.4	CD: 218 B: 52.4			
	z_s	(cm)			-			
	z_b	(cm)				-		
	z_{MI}	(cm)	CD: 1.23 B: 2.36					
	$z_{pii,\alpha}$	(cm)	-					
	f_{awf}	(MHz)	CD: 3.06 B: 2.19	CD: 2.44 B: 1.88	CD: 2.44 B: 1.88	#		
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	CD: 99 B: 9					
	srr	(Hz)	9					
	η_{pps}		CD: 11 B: 1					
	$I_{pa,\alpha} AT z_{pii,\alpha}$	(W/cm ²)	CD: 164 B: 118					
	$I_{spta,\alpha} AT z_{pii,\alpha}$	(mW/cm ²)	CD: 35 B: 5					
	$I_{spta} AT z_{pii}$	(mW/cm ²)	CD: 46					

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
			B: 8					
	$p_r^{AT} z_{pii}$	(MPa)	CD: 2.69 B: 3.17					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI	TIS		TIB		#
	Bedingung 2						#	
	Bedingung 3						#	
	Bedingung 4						#	

CD: Farb-Doppler-Modus; B: B-Modus

(b) Dieser Schallkopf ist nicht für transkraniale oder neonatale zephale Anwendungen geeignet.

Bedingung1: Allgemein, B-Modus Fundamental, Fokusbereich 22 mm, GEN, Schalleistung 0 dB

Betriebsmodus: B + SWE

Indexname		MI	TIS		TIB		TIC
			An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert		1.6	2.77		3.03		(b)
Indexkomponentenwerte			P: 0.62 F: 1.69 B: 0.46	P: 0.45 F: 0.27 B: 0.46	P: 0.57 F: 1.69 B: 0.46	P: 1.3 F: 1.27 B: 0.46	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha}^{AT} z_{MI}$	(MPa)	P: 2.55 F: 1.29 B: 2.38				
	P	(mW)		P: 56 F: 365 B: 60	P: 57 F: 365 B: 60		#
	P_{1x1}	(mW)		P: 52 F: 126 B: 52	P: 48 F: 126 B: 52		
	z_s	(cm)			P: 2.42 F: 3.25		
	z_b	(cm)				P: 5.25 F: 3.25	
	z_{MI}	(cm)	B: 2.36				
	$z_{pii,\alpha}$	(cm)	P: 1.2 F: 1.34				
	f_{awf}	(MHz)	P: 2.5 F: 2.81 B: 2.19	P: 2.5 F: 2.81 B: 2.31	P: 2.5 F: 2.81 B: 2.31		#
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	P: 1 F: 42 B: 6				
	srr	(Hz)	1				
	n_{pps}		P: 1 F: 42 B: 6				
	$I_{pa,\alpha}^{AT} z_{pii,\alpha}$	(W/cm ²)	P: 10 F: 55 B: 415				

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
	$I_{spta, \alpha}$ AT $z_{pii, \alpha}$	(mW/cm ²)	P: 53 F: 5.2 B: 4.7					
	I_{spta} AT z_{pii}	(mW/cm ²)	P: 50 F: 5.5 B: 7.9					
	p_r AT z_{pii}	(MPa)	P: 2.38 F: 1.09 B: 2.37					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI					#
	Bedingung 2			TIS				#
	Bedingung 3					TIB		#
	Bedingung 4							#

(b) Dieser Schallkopf ist nicht für transkraniale oder neonatale zephale Anwendungen geeignet.

P: Push-Komponente; F: Flache Komponente; B: B-Komponente

Bedingung Allgemein, SWE-Feldposition 45 mm, Std., Schalleistung 0 dB

Bedingung 2: Allgemein, SWE-Feldposition 75 mm, Std., Schalleistung 0 dB

Bedingung 3: Allgemein, SWE-Feldposition 70 mm, Std., Schalleistung 0 dB

Betriebsmodus: PW-Doppler

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert			1.0	3.74		4.5		(b)
Indexkomponentenwerte				3.74	2.1	2.42	4.5	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha} \text{ AT } z_{\text{MI}}$	(MPa)	1.52					
	P	(mW)		332		246		#
	$P_{1 \times 1}$	(mW)		349		226		
	z_s	(cm)			2.57			
	z_b	(cm)					5.8	
	z_{MI}	(cm)	-					
	$z_{\text{pii},\alpha}$	(cm)	2.91					
	f_{awf}	(MHz)	2.19	2.25		2.25		#
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	3787					
	sr	(Hz)	-					
	n_{pps}		3787					
	$I_{\text{pa},\alpha} \text{ AT } z_{\text{pii},\alpha}$	(W/cm ²)	276					
	$I_{\text{spta},\alpha} \text{ AT } z_{\text{pii},\alpha}$	(mW/cm ²)	549					
	$I_{\text{spta}} \text{ AT } z_{\text{pii}}$	(mW/cm ²)	876					
	$p_r \text{ AT } z_{\text{pii}}$	(MPa)	1.51					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI					
	Bedingung 2			TIS				
	Bedingung 3					TIB		
	Bedingung 4							

(b) Dieser Schallkopf ist nicht für transkraniale oder neonatale zephale Anwendungen geeignet.

Bedingung 1: Allgemein, Fokusbereich 48 mm, SV 1,5 mm, Skala 65 cm/s, Schalleistung 0 dB

Bedingung 2: Allgemein, Fokusbereich 180 mm, SV 3,0 mm, Skala 65 cm/s, Schalleistung 0 dB

Bedingung 3: Allgemein, Fokusbereich 180 mm, SV 10,0 mm, Skala 65
cm/s, Schalleistung 0 dB

Betriebsmodus: M-Modus

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert			1.0	(a)		4.5*		(b)
Indexkomponentenwerte				#	#	0.66	4.5	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha} \text{ AT } z_{\text{MI}}$	(MPa)	1.77					
	P	(mW)		#		68.6		#
	$P_{1 \times 1}$	(mW)		#		59		
	z_s	(cm)			#			
	z_b	(cm)					3.65	
	z_{MI}	(cm)	-					
	$z_{\text{pii},\alpha}$	(cm)	1.47					
	f_{awf}	(MHz)	3	#		2.0		#
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	1000					
	sr	(Hz)	-					
	n_{pps}		1					
	$I_{\text{pa},\alpha} \text{ AT } z_{\text{pii},\alpha}$	(W/cm ²)	141					
	$I_{\text{spta},\alpha} \text{ AT } z_{\text{pii},\alpha}$	(mW/cm ²)	145					
	$I_{\text{spta}} \text{ AT } z_{\text{pii}}$	(mW/cm ²)	231					
	$p_r \text{ AT } z_{\text{pii}}$	(MPa)	1.98					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI					
	Bedingung 2					TIB		
	Bedingung 3							
	Bedingung 4							

(a) Der maximale Indexwert ist kleiner als 1,0

(b) Dieser Schallkopf ist nicht für transkraniale oder neonatale zephale Anwendungen geeignet.

* Die Summe des TI im Worst-Case von jedem zusammengesetzten Modus ist höher als 4,5, jedoch regelt das System die Spannung so, dass der TI auf 4,5 begrenzt wird.

Bedingung 1: Gyn, Fokusbereich 18 mm, Schalleistung 0 dB

Bedingung 2: Gyn, Fokusbereich 180 mm, Schalleistung 0 dB

XC6-1 Schallkopf

Betriebsmodus: B + CD Doppler

Indexname		MI	TIS		TIB		TIC
			An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert		1.7	4.5*		4.5*		(b)
Indexkomponentenwerte			CD: 4.73 B: 0.21	-	CD: 4.73 B: 0.21	-	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha} AT z_{MI}$	(MPa)	CD: 2.74 B: 2.38				
	P	(mW)		CD: 648 B: 27	CD: 648 B: 27		#
	P_{1x1}	(mW)		CD: 473 B: 21.2	CD: 473 B: 21.2		
	z_s	(cm)			-		
	z_b	(cm)				-	
	z_{MI}	(cm)	CD: 4.05 B: 4.46				
	$z_{pii,\alpha}$	(cm)	-				
	f_{awf}	(MHz)	CD: 2.75 B: 2	CD: 2.06 B: 2.69	CD: 2.06 B: 2.69		#
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	CD: 140 B: 28				
	srr	(Hz)	14				
	η_{pps}		CD: 10 B: 2				
	$I_{pa,\alpha} AT z_{pii,\alpha}$	(W/cm ²)	CD: 258 B: 227				
	$I_{spta,\alpha} AT z_{pii,\alpha}$	(mW/cm ²)	CD: 486				

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
			B: 50					
	$I_{spta AT z_{pii}}$	(mW/cm ²)	CD: 1213 B: 97					
	$p_r AT z_{pii}$	(MPa)	CD: 2.78 B: 2.37					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI					
	Bedingung 2			TIS		TIB		
	Bedingung 3							
	Bedingung 4							

(b) Dieser Schallkopf ist nicht für transkraniale oder neonatale zephale Anwendungen geeignet.

CD: Farb-Doppler-Komponente; B: B-Komponente

* Die Summe des TI im Worst-Case von jedem zusammengesetzten Modus ist höher als 4,5, jedoch regelt das System die Spannung so, dass der TI auf 4,5 begrenzt wird.

Bedingung 1: Niere, B-Modus Oberschwingungsströme, Fokusbereich 86 mm, GEN, MED, Schalleistung 0 dB

Bedingung 2: Leber, B-Modus Fundamental, Feldposition 140 mm, RES, BR, Schalleistung 0 dB

Betriebsmodus: B + SWE

Indexname		MI	TIS		TIB		TIC
			An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert		1.7	2.96		4.5*		(b)
Indexkomponentenwerte			P: 1.13 F: 4.02 B: 0.96	P: 0.43 F: 1.56 B: 0.96	P: 1.13 F: 4.02 B: 0.96	P: 1.4 F: 3.19 B: 0.96	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha}^{AT} z_{MI}$	(MPa)	P: 2.61 F: 1.88 B: 2.38				
	P	(mW)		P: 68.6 F: 440 B: 77.7	P: 68.6 F: 440 B: 77.7		#
	P_{1x1}	(mW)		P: 68.6 F: 330 B: 75	P: 68.6 F: 330 B: 75		
	z_s	(cm)		P: 3.96 F: 4.89			
	z_b	(cm)				P: 3.96 F: 4.89	
	z_{MI}	(cm)	B: 4.46				
	$z_{pii,\alpha}$	(cm)	P: 3.02 F: 4.03				
	f_{awf}	(MHz)	P: 2.5 F: 2.75 B: 2.0	P: 2.83 F: 2.75 B: 2.1	P: 2.83 F: 2.75 B: 2.1		#
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	P: 1 F: 42 B: 6				
	srr	(Hz)	1				
	n_{pps}		P: 1 F: 42 B: 6				
	$I_{pa,\alpha}^{AT} z_{pii,\alpha}$	(W/cm ²)	P: 156 F: 126 B: 186				

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
	$I_{spta, \alpha}$ AT $z_{pii, \alpha}$	(mW/cm ²)	P: 258 F: 7.6 B: 10.9					
	I_{spta} AT z_{pii}	(mW/cm ²)	P: 465 F: 17.3 B: 1.8					
	p_r AT z_{pii}	(MPa)	P: 3.86 F: 2.76 B: 3.23					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI					
	Bedingung 2			TIS		TIB		
	Bedingung 3							
	Bedingung 4							

(b) Dieser Schallkopf ist nicht für transkraniale oder neonatale zephale Anwendungen geeignet.

P: Push-Komponente; F: Flache Komponente; B: B-Komponente

* Die Summe des TI im Worst-Case von jedem zusammengesetzten Modus ist höher als 4,5, jedoch regelt das System die Spannung so, dass der TI auf 4,5 begrenzt wird.

Bedingung 1: Nieren, SWE-Feldposition 45 mm, RES, HD, Schallleistung 0 dB

Bedingung 2: Allgemein, SWE-Feldposition 75 mm, RES, HD, Schallleistung 0 dB

Betriebsmodus: PW-Doppler

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert			1.6	2.88		4.5*		(b)
Indexkomponentenwerte				2.88	2.05	1.81	4.98	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha} z_{MI}$	(MPa)	2.37					
	P	(mW)		282		209		#
	P_{1x1}	(mW)		269		172		
	z_s	(cm)			2.57			
	z_b	(cm)					4.95	
	z_{MI}	(cm)	-					
	$z_{pii,\alpha}$	(cm)	3.47					
	f_{awf}	(MHz)	2.19	2.25		2.19		#
Sonstige Informationen	p_{rr}	(Hz)	748					
	s_{rr}	(Hz)	-					
	n_{pps}		1					
	$I_{pa,\alpha} z_{pii,\alpha}$	(W/cm ²)	229					
	$I_{spta,\alpha} z_{pii,\alpha}$	(mW/cm ²)	543					
	$I_{spta} z_{pii}$	(mW/cm ²)	658					
	$p_r z_{pii}$	(MPa)	3.08					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI					
	Bedingung 2			TIS				
	Bedingung 3					TIB		
	Bedingung 4							

(b) Dieser Schallkopf ist nicht für transkraniale oder neonatale zephale Anwendungen geeignet.

* Die Summe des TI im Worst-Case von jedem zusammengesetzten Modus ist höher als 4,5, jedoch regelt das System die Spannung so, dass der TI auf 4,5 begrenzt wird.

Bedingung 1: Allgemein, Fokusbereich 32 mm, SV 3,0 mm, Skala 13 cm/s, Schalleistung 0 dB

Bedingung 2: Allgemein, Fokusbereich 180 mm, SV 1 mm, Skala max., Schalleistung 0 dB

Bedingung 3: Allgemein, Fokusbereich 86 mm, SV 7,5 mm, Skala max., Schalleistung 0 dB

Betriebsmodus: M-Modus

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert			1.7	1.8		3.51		(b)
Indexkomponentenwerte				1.8	1.26	1.43	3.51	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha} AT z_{MI}$	(MPa)	2.38					
	P	(mW)		244		94		#
	$P_{1 \times 1}$	(mW)		187		75		
	z_s	(cm)			4.33			
	z_b	(cm)					4.37	
	z_{MI}	(cm)	-					
	$z_{pii,\alpha}$	(cm)	4.46					
	f_{awf}	(MHz)	2.0	2.0		1.81		#
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	1000					
	sr	(Hz)	-					
	n_{pps}		1					
	$I_{pa,\alpha} AT z_{pii,\alpha}$	(W/cm ²)	50					
	$I_{spta,\alpha} AT z_{pii,\alpha}$	(mW/cm ²)	299					
	$I_{spta} AT z_{pii}$	(mW/cm ²)	500					
	$p_r AT z_{pii}$	(MPa)	2.37					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI					
	Bedingung 2			TIS				
	Bedingung 3					TIB		
	Bedingung 4							

(b) Dieser Schallkopf ist nicht für transkraniale oder neonatale zephale Anwendungen geeignet.

Bedingung1: Abdomen, B-Modus Oberschwingungsströme, Fokusbereich 32 mm, RES, MED, Schallleistung 0 dB

Bedingung2: Abdomen, B-Modus Oberschwingungsströme, Fokusbereich 180 mm, GEN, MED, Schallleistung 0 dB

Bedingung3: Abdomen, B-Modus Oberschwingungsströme,
Fokusbereich 66 mm, GEN, MED, Schalleistung 0 dB

SE12-3 Schallkopf

Betriebsmodus: 2D + CD Doppler

Indexname		MI	TIS		TIB		TIC
			An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert		1.7	(a)		(a)		(b)
Indexkomponentenwerte			#	-	#	-	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha} AT z_{MI}$	(MPa)	CD: 3.27 B: 3.6				
	P	(mW)		#	#	#	
	P_{1x1}	(mW)		#	#		
	z_s	(cm)			-		
	z_b	(cm)				-	
	z_{MI}	(cm)	CD: 0.79 B: 0.74				
	$z_{pii,\alpha}$	(cm)	-				
	f_{awf}	(MHz)	CD: 6.63 B: 4.75	#	#	#	
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	CD: 275 B: 25				
	srr	(Hz)	25				
	n_{pps}		CD: 11 B: 1				
	$I_{pa,\alpha} AT z_{pii,\alpha}$	(W/cm ²)	CD: 250 B: 310				
	$I_{spta,\alpha} AT z_{pii,\alpha}$	(mW/cm ²)	CD: 31 B: 8				
	$I_{spta} AT z_{pii}$	(mW/cm ²)	CD: 67 B: 8				
	$p_r AT z_{pii}$	(MPa)	CD: 3.23				

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
			B: 3.16					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI					
	Bedingung 2							
	Bedingung 3							
	Bedingung 4							

CD: Farb-Doppler-Komponente; B: B-Komponente

(a) Der maximale Indexwert ist kleiner als 1,0

(b) Dieser Schallkopf ist nicht für transkraniale oder neonatale zephale Anwendungen geeignet.

Bedingung 1: Allgemein, B-Modus Fundamental, Fokusbereich 22 mm, PEN, BR, Farbstift MED, Schalleistung 0 dB

Betriebsmodus: B + SWE

Indexname		MI	TIS		TIB		TIC
			An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert		1.8	1.63		2.38		(b)
Indexkomponentenwerte			P: 0.46 F: 0.67 B: 0.5	P: 0.2 F: 0.5 B: 0.5	P: 0.4 F: 0.67 B: 0.5	P: 1.16 F: 0.71 B: 0.5	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha}^{AT} z_{MI}$	(MPa)	P: 3.38 F: 2.25 B: 3.36				
	P	(mW)		P: 92 F: 42.8 B: 32.1	P: 92 F: 42.8 B: 32.1		#
	P_{1x1}	(mW)		P: 77.9 F: 31.3 B: 23.2	P: 74.9 F: 31.3 B: 23.2		
	z_s	(cm)		P: 1.85 F: 1.97			
	z_b	(cm)				P: 1.95 F: 1.97	
	z_{MI}	(cm)	B: 0.74				
	$z_{pii,\alpha}$	(cm)	P: 1.75 F: 0.5				
	f_{awf}	(MHz)	P: 4.35 F: 5 B: 4.13	P: 4.1 F: 4.5 B: 4.25	P: 4.1 F: 4.5 B: 4.25		#
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	P: 1 F: 42 B: 20				
	srr	(Hz)	1				
	n_{pps}		P: 1 F: 42 B: 20				
	$I_{pa,\alpha}^{AT} z_{pii,\alpha}$	(W/cm ²)	P: 246 F: 253 B: 311				

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
	$I_{spta, \alpha}$ AT $z_{pii, \alpha}$	(mW/cm ²)	P: 142 F: 8.3 B: 17.6					
	I_{spta} AT z_{pii}	(mW/cm ²)	P: 238 F: 9.5 B: 27.5					
	p_r AT z_{pii}	(MPa)	P: 4.35 F: 2.43 B: 4.29					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI					
	Bedingung 2			TIS		TIB		
	Bedingung 3							
	Bedingung 4							

(b) Dieser Schallkopf ist nicht für transkraniale oder neonatale zepale Anwendungen geeignet.

P: Push-Komponente; F: Flache Komponente; B: B-Komponente

Bedingung 1: Allgemein, SWE-Feldposition 20 mm, Std., Schalleistung 0 dB

Bedingung 2: Allgemein, SWE-Feldposition 40 mm, Std., Schalleistung 0 dB

Bedingung 3: Allgemein, SWE-Feldposition 35 mm, Std., Schalleistung 0 dB

Betriebsmodus: PW-Doppler

Indexname		MI	TIS		TIB		TIC
			An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert		1.2	(a)		2.92		(b)
Indexkomponentenwerte			#	#	1	2.92	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha} \text{ AT } z_{\text{MI}}$	(MPa)	2.62				
	P	(mW)		#	46.6		#
	$P_{1 \times 1}$	(mW)		#	46.6		
	z_s	(cm)			#		
	z_b	(cm)				0.9	
	z_{MI}	(cm)	-				
	$z_{\text{pii},\alpha}$	(cm)	2.1				
	f_{awf}	(MHz)	4.63	#	4.5		#
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	2396				
	sr	(Hz)	-				
	n_{pps}		1				
	$I_{\text{pa},\alpha} \text{ AT } z_{\text{pii},\alpha}$	(W/cm ²)	272				
	$I_{\text{spta},\alpha} \text{ AT } z_{\text{pii},\alpha}$	(mW/cm ²)	296				
	$I_{\text{spta}} \text{ AT } z_{\text{pii}}$	(mW/cm ²)	611				
	$p_r \text{ AT } z_{\text{pii}}$	(MPa)	3.62				
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI				
	Bedingung 2				TIB		
	Bedingung 3						
	Bedingung 4						

(a) Der maximale Indexwert ist kleiner als 1,0

(b) Dieser Schallkopf ist nicht für transkraniale oder neonatale zephale Anwendungen geeignet.

Bedingung 1: Allgemein, Fokusbereich 48 mm, SV 0,5 mm, Skala 31 cm/s, Schalleistung 0 dB

Bedingung 2: Allgemein, Fokusbereich 22 mm, SV 3,0 mm, Skala 31
cm/s, Schalleistung 0 dB

Betriebsmodus: M-Modus

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert			1.6	(a)		(a)		(b)
Indexkomponentenwerte				#	#	#	#	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha} AT z_{MI}$	(MPa)	3.32					
	P	(mW)		#		#		#
	$P_{1 \times 1}$	(mW)		#		#		
	z_s	(cm)			#			
	z_b	(cm)					#	
	z_{MI}	(cm)	-					
	$z_{pii,\alpha}$	(cm)	2.1					
	f_{awf}	(MHz)	4.5	#		#		#
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	1000					
	sr	(Hz)	-					
	η_{pps}		1					
	$I_{pa,\alpha} AT z_{pii,\alpha}$	(W/cm ²)	0.37					
	$I_{spta,\alpha} AT z_{pii,\alpha}$	(mW/cm ²)	222					
	$I_{spta} AT z_{pii}$	(mW/cm ²)	425					
	$p_r AT z_{pii}$	(MPa)	1.98					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI					
	Bedingung 2							
	Bedingung 3							
	Bedingung 4							

(a) Der maximale Indexwert ist kleiner als 1,0

(b) Dieser Schallkopf ist nicht für transkraniale oder neonatale zephale Anwendungen geeignet.

Bedingung 1: Früh, Fokusbereich 22 mm, GEN, Schalleistung 0 dB

SEV12-3 Schallkopf

Betriebsmodus: B + CD Doppler

Indexname		MI	TIS		TIB		TIC
			An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert		1.85	(a)		(a)		(a)
Indexkomponentenwerte			#	-	#	-	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha} AT z_{MI}$	(MPa)	CD: 3.56 B: 4.59				
	P	(mW)		#	#	#	
	P_{1x1}	(mW)		#	#		
	z_s	(cm)			-		
	z_b	(cm)				-	
	z_{MI}	(cm)	CD: 0.54 B: 0.83				
	$z_{pii,\alpha}$	(cm)	-				
	f_{awf}	(MHz)	CD: 6.63 B: 6.38	#	#	#	
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	CD: 225 B: 15				
	srr	(Hz)	15				
	n_{pps}		CD: 11 B: 1				
	$I_{pa,\alpha} AT z_{pii,\alpha}$	(W/cm ²)	CD: 435 B: 227				
	$I_{spta,\alpha} AT z_{pii,\alpha}$	(mW/cm ²)	CD: 40 B: 16				
	$I_{spta} AT z_{pii}$	(mW/cm ²)	CD: 52 B: 23				
	$p_r AT z_{pii}$	(MPa)	CD: 3.83				

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
			B: 5.46					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI					
	Bedingung 2							
	Bedingung 3							
	Bedingung 4							

(a) Der maximale Indexwert ist kleiner als 1,0

(b) Dieser Schallkopf ist nicht für transkraniale oder neonatale zephale Anwendungen geeignet. CD Farb-Doppler-Komponente; B: B-Komponente

Bedingung 1: GYN, B-Modus Fundamental, Fokusbereich 14 mm, RES, Schalleistung 0 dB

Betriebsmodus: B + SWE

Indexname		MI	TIS		TIB		TIC
			An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert		1.85	1.51		3.09		(b)
Indexkomponentenwerte			P: 0.3 F: 1.36 B: 0.25	P: 0.19 F: 1.08 B: 0.25	P: 0.3 F: 1.36 B: 0.25	P: 1.17 F: 1.67 B: 0.25	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha}^{AT} z_{MI}$	(MPa)	P: 3.3 F: 3.4 B: 4.59				
	P	(mW)		P: 15.5 F: 86.3 B: 7.67	P: 15.5 F: 86.3 B: 7.67		#
	P_{1x1}	(mW)		P: 15.5 F: 65 B: 7.38	P: 15.5 F: 65 B: 7.38		
	z_s	(cm)		P: 1.72 F: 1.87			
	z_b	(cm)				P: 1.2 F: 1.87	
	z_{MI}	(cm)	B: 0.85				
	$z_{pii,\alpha}$	(cm)	P: 1.79 F: 0.53				
	f_{awf}	(MHz)	P: 4.1 F: 5.63 B: 6.38	P: 4.1 F: 4.5 B: 7.13	P: 4.1 F: 4.5 B: 7.13		#
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	P: 1.8 F: 77 B: 7				
	srr	(Hz)	1.8				
	n_{pps}		P: 1 F: 43 B: 4				
	$I_{pa,\alpha}^{AT} z_{pii,\alpha}$	(W/cm ²)	P: 401 F: 269 B: 658				

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
	$I_{spta, \alpha}$ AT $z_{pii, \alpha}$	(mW/cm ²)	P: 480 F: 17 B: 8					
	I_{spta} AT z_{pii}	(mW/cm ²)	P: 465 F: 21 B: 11					
	p_r AT z_{pii}	(MPa)	P: 4.38 F: 2.98 B: 5.46					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI	TIS		TIB		
	Bedingung 2							
	Bedingung 3							
	Bedingung 4							

(b) Dieser Schallkopf ist nicht für transkraniale oder neonatale zephale Anwendungen geeignet.

P: Push-Komponente; F: Flache Komponente; B: B-Komponente

Bedingung 1: Allgemein, SWE-Feldposition 40 mm, PEN, Schallleistung 0 dB

Betriebsmodus: PW-Doppler

Indexname		MI	TIS		TIB		TIC
			An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert		1.63	(a)		2.21		(b)
Indexkomponentenwerte			#	#	0.86	2.21	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha} AT z_{MI}$	(MPa)	1.95				
	P	(mW)		#	40.1		#
	P_{1x1}	(mW)		#	40.1		
	z_s	(cm)			#		
	z_b	(cm)				2.1	
	z_{MI}	(cm)	-				
	$z_{pii,\alpha}$	(cm)	1.81				
	f_{awf}	(MHz)	4.5	#	4.5		#
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	724				
	sr	(Hz)	-				
	n_{pps}		1				
	$I_{pa,\alpha} AT z_{pii,\alpha}$	(W/cm ²)	401				
	$I_{spta,\alpha} AT z_{pii,\alpha}$	(mW/cm ²)	113				
	$I_{spta} AT z_{pii}$	(mW/cm ²)	218				
	$p_r AT z_{pii}$	(MPa)	4.47				
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI				
	Bedingung 2				TIB		
	Bedingung 3						
	Bedingung 4						

(a) Der maximale Indexwert ist kleiner als 1,0

(b) Dieser Schallkopf ist nicht für transkraniale oder neonatale zephale Anwendungen geeignet.

Bedingung 1: Allgemein, Fokusbereich 30 mm, SV 1,5 mm, Skala 6 cm/s, Schalleistung 0 dB

Bedingung 2: Allgemein, Fokusbereich 60 mm, SV 2,5 mm, Skala 10
cm/s, Schalleistung 0 dB

Betriebsmodus: M-Modus

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert			1.85	(a)		(a)		(b)
Indexkomponentenwerte				#	#	#	#	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha} AT z_{MI}$	(MPa)	4.59					
	P	(mW)		#		#		#
	$P_{1 \times 1}$	(mW)		#		#		
	z_s	(cm)			#			
	z_b	(cm)					#	
	z_{MI}	(cm)	-					
	$z_{pii,\alpha}$	(cm)	0.83					
	f_{awf}	(MHz)	6.38		#		#	#
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	1000					
	sr	(Hz)	-					
	η_{pps}		1					
	$I_{pa,\alpha} AT z_{pii,\alpha}$	(W/cm ²)	658					
	$I_{spta,\alpha} AT z_{pii,\alpha}$	(mW/cm ²)	255					
	$I_{spta} AT z_{pii}$	(mW/cm ²)	360					
	$p_r AT z_{pii}$	(MPa)	5.46					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI					
	Bedingung 2							
	Bedingung 3							
	Bedingung 4							

(a) Der maximale Indexwert ist kleiner als 1,0

(b) Dieser Schallkopf ist nicht für transkraniale oder neonatale zephale Anwendungen geeignet.

Bedingung 1: GYN, B-Modus Fundamental, Fokusbereich 14 mm, GEN, Schallleistung 0 dB

SLV16-5 Schallkopf

Betriebsmodus: B + CD Doppler

Indexname		MI	TIS		TIB		TIC
			An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert		1.7	(a)		(a)		(b)
Indexkomponentenwerte			#	-	#	-	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha}^{AT} z_{MI}$	(MPa)	CD: 4.12 B: 4.6				
	P	(mW)		#	#	#	
	P_{1x1}	(mW)		#	#		
	z_s	(cm)			-		
	z_b	(cm)				-	
	z_{MI}	(cm)	CD: 1.28 B: 0.63				
	$z_{pii,\alpha}$	(cm)	-				
	f_{awf}	(MHz)	CD: 7.5 B: 7.75	#	#	#	
Sonstige Informationen	p_{rr}	(Hz)	CD: 150 B: 15				
	s_{rr}	(Hz)	15				
	n_{pps}		CD: 10 B: 15				
	$I_{pa,\alpha}^{AT} z_{pii,\alpha}$	(W/cm ²)	CD: 517 B: 896				
	$I_{spta,\alpha}^{AT} z_{pii,\alpha}$	(mW/cm ²)	CD: 123 B: 2				
	$I_{spta}^{AT} z_{pii}$	(mW/cm ²)	CD: 279 B: 2.5				

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
	$p_{r,AT} z_{pii}$	(MPa)	CD: 5.53 B: 5.61					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI					
	Bedingung 2							
	Bedingung 3							
	Bedingung 4							

(a) Der maximale Indexwert ist kleiner als 1,0

(b) Dieser Schallkopf ist nicht für transkraniale oder neonatale zephale Anwendungen geeignet.

CD: Farb-Doppler-Komponente; B: B-Komponente

Bedingung 1: Allgemein, B-Modus Oberschwingungsströme, Fokusbereich 22 mm, RES, Schallleistung 0 dB

Betriebsmodus: B + SWE

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert			1.7	3.13		3.13		(b)
Indexkomponentenwerte				P: 0.24 F: 2.51 B: 0.38	P: 1.62 F: 0.73 B: 0.38	P: 0.24 F: 2.51 B: 0.38	P: 1.99 F: 0.51 B: 0.38	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha}^{AT} z_{MI}$	(MPa)	P: 4.05 F: 3.31 B: 5.37					
	P	(mW)		P: 212 F: 70.3 B: 16.6	P: 212 F: 70.3 B: 16.6			#
	P_{1x1}	(mW)		P: 19.1 F: 42.4 B: 7.4	P: 19.1 F: 42.4 B: 7.4			
	z_s	(cm)			P: 1.79 F: 2.4			
	z_b	(cm)					P: 1.79 F: 1.52	
	z_{MI}	(cm)	B: 0.66					
	$z_{pii,\alpha}$	(cm)	P: 1.92 F: 1.24					
	f_{awf}	(MHz)	P: 6 F: 7.5 B: 7.75		P: 5 F: 7.5 B: 7.63	P: 5 F: 7.5 B: 7.63		
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	P: 2 F: 84 B: 24					
	srr	(Hz)	2					
	n_{pps}		P: 1 F: 42 B: 12					
	$I_{pa,\alpha}^{AT} z_{pii,\alpha}$	(W/cm ²)	P: 452 F: 312 B: 896					

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
	$I_{spta, \alpha}$ AT $z_{pii, \alpha}$	(mW/cm ²)	P: 392 F: 13.6 B: 9.3					
	I_{spta} AT z_{pii}	(mW/cm ²)	P: 450 F: 21 B: 11					
	p_r AT z_{pii}	(MPa)	P: 5.42 F: 4.08 B: 5.61					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI					
	Bedingung 2			TIS		TIB		#
	Bedingung 3							
	Bedingung 4							

(b) Dieser Schallkopf ist nicht für transkraniale oder neonatale zepmale Anwendungen geeignet.

P: Push-Komponente; F: Flache Komponente; B: B-Komponente

Bedingung 1: Allgemein, SWE-Feldposition 20 mm, PEN, Schallleistung 0 dB

Bedingung 2: Brust, SWE-Feldposition 45 mm, PEN, Schallleistung 0 dB

Betriebsmodus: PW-Doppler

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert			1.4	1.09		2.69		(b)
Indexkomponentenwerte				1.09	0.77	0.9	2.69	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha} \text{ AT } z_{\text{MI}}$	(MPa)	3.18					
	P	(mW)		45.9		35.9		#
	$P_{1 \times 1}$	(mW)		45.9		35.9		
	z_s	(cm)			1.1			
	z_b	(cm)					1.1	
	z_{MI}	(cm)	-					
	$z_{\text{pii},\alpha}$	(cm)	0.5					
	f_{awf}	(MHz)	5	5		5.25		#
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	837					
	sr	(Hz)	-					
	n_{pps}		1					
	$I_{\text{pa},\alpha} \text{ AT } z_{\text{pii},\alpha}$	(W/cm ²)	378					
	$I_{\text{spta},\alpha} \text{ AT } z_{\text{pii},\alpha}$	(mW/cm ²)	487					
	$I_{\text{spta}} \text{ AT } z_{\text{pii}}$	(mW/cm ²)	574					
	$p_r \text{ AT } z_{\text{pii}}$	(MPa)	3.49					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI					
	Bedingung 2			TIS				
	Bedingung 3					TIB		
	Bedingung 4							

(b) Dieser Schallkopf ist nicht für transkraniale oder neonatale zephale Anwendungen geeignet.

Bedingung 1: Allgemein, Fokusbereich 7 mm, SV 5,0 mm, Skala 6 cm/s, Schalleistung 0 dB

Bedingung 2: Allgemein, Fokusbereich 68 mm, SV 2,5 mm, Skala 54 cm/s, Schalleistung 0 dB

Bedingung 3: Allgemein, Fokusbereich 52 mm, SV 1 mm, Skala 54 cm/s, Schalleistung 0 dB

SL10-2 Schallkopf

Betriebsmodus: B + CD Doppler

Indexname		MI	TIS		TIB		TIC
			An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert		1.7	1.02		1.02		1.2
Indexkomponentenwerte			CD: 0.93 B: 0.1	-	CD: 0.93 B: 0.1	-	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha} AT z_{MI}$	(MPa)	CD: 3.28 B: 3.2				
	P	(mW)		CD: 46.6 B: 3.7	CD: 46.6 B: 3.7	CD: 46.6 B: 3.7	
	P_{1x1}	(mW)		CD: 44.4 B: 3.7	CD: 44.4 B: 3.7		
	z_s	(cm)			-		
	z_b	(cm)				-	
	z_{MI}	(cm)	CD: 2.08 B: 1.98				
	$z_{pii,\alpha}$	(cm)	-				
	f_{awf}	(MHz)	CD: 3.75 B: 3.75	CD: 4.5 B: 5.25	CD: 4.5 B: 5.25	CD: 4.5 B: 5.25	
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	CD: 330 B: 30				
	srr	(Hz)	30				
	n_{pps}		CD: 11 B: 1				
	$I_{pa,\alpha} AT z_{pii,\alpha}$	(W/cm ²)	CD: 41 B: 449				
	$I_{spta,\alpha} AT z_{pii,\alpha}$	(mW/cm ²)	CD: 274				

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
			B: 4.3					
	I_{spta} AT z_{pii}	(mW/cm ²)	CD: 487 B: 5.6					
	p_r AT z_{pii}	(MPa)	CD: 3.58 B: 3.68					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI					
	Bedingung 2			TIS		TIB		TIC
	Bedingung 3							
	Bedingung 4							

CD: Farb-Doppler-Modus; B: B-Modus

Bedingung 1: Abdomen, B-Modus Fundamental, Fokusbereich 52 mm, PEN, BR, Skala 6 cm/s, Schalleistung 0 dB

Bedingung 2: VenUntExtr, Fokusbereich 68 mm, GEN, BR, Feld max. hoch, Skala 72 cm/s, Schalleistung 0 dB

Betriebsmodus: B + SWE

Indexname		MI	TIS		TIB		TIC
			An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
			Max. Indexwert	1.8	1.71		
Indexkomponentenwerte			P: 0.61 F: 0.8 B: 0.1	P: 0.36 F: 1.25 B: 0.1	P: 0.62 F: 1.97 B: 0.1	P: 1.27 F: 1.8 B: 0.1	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha} z_{MI}$	(MPa)	P: 3.34 F: 2.54 B: 3.42				
	P	(mW)		P: 31.2 F: 109.9 B: 3.67	P: 31.2 F: 109.9 B: 3.67		P: 6.5 F: 109.9 B: 3.67
	P_{1x1}	(mW)		P: 31.2 F: 38.3 B: 3.67	P: 31.2 F: 38.3 B: 3.67		
	z_s	(cm)			P: 1.9 F: 2.1		
	z_b	(cm)				P: 1.9 F: 2.1	
	z_{MI}	(cm)	B: 1.98				
	$z_{pii,\alpha}$	(cm)	P: 1.88 F: 1.95				
	f_{awf}	(MHz)	P: 4.1 F: 4.38 B: 3.75	P: 4.1 F: 4.38 B: 5.25	P: 4.1 F: 4.38 B: 5.25		P: 4.1 F: 4.38 B: 5.25
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	P: 1 F: 48 B: 6				
	srr	(Hz)	1				
	η_{pps}		P: 1 F: 48 B: 6				
	$I_{pa,\alpha} z_{pii,\alpha}$	(W/cm ²)	P: 243 F: 196				

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
			B: 449					
	$I_{spta, \alpha}$ AT $z_{pii, \alpha}$	(mW/cm ²)	P: 288 F: 83 B: 7					
	I_{spta} AT z_{pii}	(mW/cm ²)	P: 314 F: 155 B: 11					
	p_r AT z_{pii}	(MPa)	P: 3.76 F: 3.26 B: 4.09					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI					
	Bedingung 2			TIS		TIB		TIC
	Bedingung 3							
	Bedingung 4							

(b) Dieser Schallkopf ist nicht für transkraniale oder neonatale zephale Anwendungen geeignet.

P: Push-Modus; F: Flacher Modus; B: B-Modus

Bedingung1: Allgemein, SWE-Feld bei 35 mm, Std, B-Modus
Oberschwingungsströme, Pen, Schallleistung 0 dB

Bedingung2: Allgemein, SWE-Feld bei 50 mm, Std, B-Modus
Fundamental, Pen, Schallleistung 0 dB

Betriebsmodus: PW-Doppler

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert			1.2	1.7		4.5		2.7
Indexkomponentenwerte				1.7	1.22	0.58	4.5	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha} \text{ AT } z_{\text{MI}}$	(MPa)	2.34					
	P	(mW)		93.3		33.1		29.9
	$P_{1 \times 1}$	(mW)		93.3		33.1		
	z_s	(cm)			1.31			
	z_b	(cm)					1.96	
	z_{MI}	(cm)	-					
	$z_{\text{pii},\alpha}$	(cm)	2.28					
	f_{awf}	(MHz)	3.75	3.75		4.125		3.75
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	628					
	sr	(Hz)	-					
	n_{pps}		1					
	$I_{\text{pa},\alpha} \text{ AT } z_{\text{pii},\alpha}$	(W/cm ²)	275					
	$I_{\text{spta},\alpha} \text{ AT } z_{\text{pii},\alpha}$	(mW/cm ²)	381					
	$I_{\text{spta}} \text{ AT } z_{\text{pii}}$	(mW/cm ²)	697					
	$p_r \text{ AT } z_{\text{pii}}$	(MPa)	2.99					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI					
	Bedingung 2			TIS				
	Bedingung 3					TIB		
	Bedingung 4							TIC

Bedingung 1: Allgemein, Fokusbereich 52 mm, SV 2,5 mm, Skala 6 cm/s, Schallleistung 0 dB

Bedingung 2: Allgemein, Fokusbereich 68 mm, SV 1,5 mm, Skala 80 cm/s, Schallleistung 0 dB

Bedingung 3: Allgemein, Fokusbereich 68 mm, SV 4,0 mm, Skala 80 cm/s, Schallleistung 0 dB

Bedingung 4: Allgemein, Fokusbereich 7 mm, SV 0,5 mm, Skala 80 cm/s, Schalleistung 0 dB

SMC12-3 Schallkopf

Betriebsmodus: B + CD Doppler

Indexname		MI	TIS		TIB		TIC
			An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert		1.8	(a)		(a)		(a)
Indexkomponentenwerte			#	-	#	-	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha}^{AT} z_{MI}$	(MPa)	CD: 3.67 B: 3.42				
	P	(mW)		#	#	#	
	P_{1x1}	(mW)		#	#		
	z_s	(cm)			-		
	z_b	(cm)				-	
	z_{MI}	(cm)	CD: 2.08 B: 1.98				
	$z_{pii,\alpha}$	(cm)	-				
	f_{awf}	(MHz)	CD: 5.38 B: 4.25	#	#	#	
Sonstige Informationen	p_{rr}	(Hz)	CD: 275 B: 25				
	s_{rr}	(Hz)	25				
	n_{pps}		CD: 11 B: 2				
	$I_{pa,\alpha}^{AT} z_{pii,\alpha}$	(W/cm ²)	CD: 296 B: 3.9				
	$I_{spta,\alpha}^{AT} z_{pii,\alpha}$	(mW/cm ²)	CD: 152 B: 24				
	$I_{spta}^{AT} z_{pii}$	(mW/cm ²)	CD: 222 B: 46				

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
	$p_{rAT} z_{pii}$	(MPa)	CD: 3.64 B: 5.12					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI					
	Bedingung 2							
	Bedingung 3							
	Bedingung 4							

CD: Farb-Doppler-Modus; B: B-Modus

(a) Der maximale Indexwert ist kleiner als 1

Bedingung1: Allgemein, B-Modus Fundamental, Fokusbereich 22 mm, GEN, Schalleistung 0 dB

Betriebsmodus: B + SWE

Indexname		MI	TIS		TIB		TIC
			An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert		1.8	1.46		2.25		2.31
Indexkomponentenwerte			P: 0.12 F: 1.93 B: 0.2	P: 0.08 F: 1.18 B: 0.2	P: 0.12 F: 1.93 B: 0.2	P: 0.37 F: 1.44 B: 0.2	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha} z_{MI}$	(MPa)	P: 3.34 F: 2.85 B: 3.74				
	P	(mW)		P: 6.32 F: 102.7 B: 11.49	P: 6.32 F: 102.7 B: 11.49		P: 6.32 F: 102.7 B: 10.8
	P_{1x1}	(mW)		P: 6.32 F: 80.93 B: 10.17	P: 6.32 F: 80.93 B: 10.17		
	z_s	(cm)		P: 1.72 F: 2.18			
	z_b	(cm)				P: 1.72 F: 2.18	
	z_{MI}	(cm)	B: 2.19				
	$z_{pii,\alpha}$	(cm)	P: 1.79 F: 2.36				
	f_{awf}	(MHz)	P: 4.1 F: 5 B: 4.25	P: 4.1 F: 4.88 B: 5.25	P: 4.1 F: 4.88 B: 5.25		P: 4.1 F: 4.88 B: 5.25
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	P: 1 F: 42 B: 6				
	srr	(Hz)	1				
	η_{pps}		P: 1 F: 42 B: 6				
	$I_{pa,\alpha} z_{pii,\alpha}$	(W/cm ²)	P: 63 F: 232				

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
			B: 3.9					
	$I_{spta, \alpha}$ AT $z_{pii, \alpha}$	(mW/cm ²)	P: 146 F: 11 B: 4					
	I_{spta} AT z_{pii}	(mW/cm ²)	P: 135 F: 10 B: 7					
	p_r AT z_{pii}	(MPa)	P: 3.55 F: 2.29 B: 5.12					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI					
	Bedingung 2			TIS		TIB		TIC
	Bedingung 3							
	Bedingung 4							

P: Push-Modus; F: Flacher Modus; B: B-Modus

Bedingung 1: Allgemein, SWE-Feld bei 35 mm, Std, B-Modus
Oberschwingungsströme, Pen, Schalleistung 0 dB

Bedingung 2: Allgemein, SWE-Feld bei 50 mm, Std, B-Modus
Fundamental, Pen, Schalleistung 0 dB

Betriebsmodus: PW-Doppler

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert			1.3	1.84		3.97		2.85
Indexkomponentenwerte				1.84	1.36	1.84	3.97	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha} AT z_{MI}$	(MPa)	2.75					
	P	(mW)		88.5		88.5		88.5
	$P_{1 \times 1}$	(mW)		88.5		256.7		
	z_s	(cm)			1.16			
	z_b	(cm)					2.06	
	z_{MI}	(cm)	-					
	$z_{pii,\alpha}$	(cm)	0.92					
	f_{awf}	(MHz)	4.5	4.5		4.5		4.5
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	724					
	sr	(Hz)	-					
	η_{pps}		1					
	$I_{pa,\alpha} AT z_{pii,\alpha}$	(W/cm ²)	269					
	$I_{spta,\alpha} AT z_{pii,\alpha}$	(mW/cm ²)	157					
	$I_{spta} AT z_{pii}$	(mW/cm ²)	172					
	$p_r AT z_{pii}$	(MPa)	2.43					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI					
	Bedingung 2			TIS		TIB		TIC
	Bedingung 3							
	Bedingung 4							

Bedingung 1: Allgemein, Fokusbereich 22 mm, SV 1,0 mm, Skala 6 cm/s, Schalleistung 0 dB

Bedingung 2: Allgemein, Fokusbereich 68 mm, SV 2,0 mm, Skala max., Schalleistung 0 dB

XP5-1 Schallkopf

Betriebsmodus: B + CD Doppler

Indexname		MI	TIS		TIB		TIC
			An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert		1.7	3.01		3.01		4.5*
Indexkomponentenwerte			CD: 1.21 B: 1.8	-	CD: 1.21 B: 1.8	-	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha} \text{ AT } z_{\text{MI}}$	(MPa)	CD: 1.85 B: 2.28				
	P	(mW)		CD: 149 B: 157	CD: 149 B: 157		CD: 149 B: 229
	$P_{1 \times 1}$	(mW)		CD: 105 B: 134	CD: 105 B: 134		
	z_s	(cm)			-		
	z_b	(cm)				-	
	z_{MI}	(cm)	CD: 4.84 B: 3.61				
	$z_{\text{pii},\alpha}$	(cm)	-				
	f_{awf}	(MHz)	CD: 2.4 B: 1.9	CD: 2.42 B: 2.4	CD: 2.42 B: 2.4		CD: 2.42 B: 2.4
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	CD: 275 B: 25				
	srr	(Hz)	25				
	η_{pps}		CD: 11 B: 1				
	$I_{\text{pa},\alpha} \text{ AT } z_{\text{pii},\alpha}$	(W/cm ²)	CD: 202 B: 168				
	$I_{\text{spta},\alpha} \text{ AT } z_{\text{pii},\alpha}$	(mW/cm ²)	CD: 204				

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
			B: 86					
	I_{spta} AT z_{pii}	(mW/cm ²)	CD: 466 B: 115					
	p_r AT z_{pii}	(MPa)	CD: 2.93 B: 2.24					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI					
	Bedingung 2			TIS		TIB		TIC
	Bedingung 3							
	Bedingung 4							

CD: Farb-Doppler-Komponente; B: B-Komponente

* Die Summe des TI im Worst-Case von jedem zusammengesetzten Modus ist höher als 4,5, jedoch regelt das System die Spannung so, dass der TI auf 4,5 begrenzt wird.

Bedingung 1: TCD, B-Modus Oberschwingungsströme, Fokusbereich 40 mm, GEN, Schallleistung 0 dB

Bedingung 2: Allgemein, B-Modus Fundamental, Fokusbereich 100 mm, RES, HD, Schallleistung 0 dB

Betriebsmodus: PW-Doppler

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert			1.6	2.58		4.5*		4.5*
Indexkomponentenwerte				2.58	1.68	2	4.69	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha} z_{MI}$	(MPa)	2.4					
	P	(mW)		289		276		296
	P_{1x1}	(mW)		227		187		
	z_s	(cm)			4			
	z_b	(cm)					5.8	
	z_{MI}	(cm)	-					
	$z_{pii,\alpha}$	(cm)	2.33					
	f_{awf}	(MHz)	2.25	2.33		2.25		2.25
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	748					
	srr	(Hz)	-					
	n_{pps}		1					
	$I_{pa,\alpha} z_{pii,\alpha}$	(W/cm ²)	51					
	$I_{spta,\alpha} z_{pii,\alpha}$	(mW/cm ²)	63					
	$I_{spta} z_{pii}$	(mW/cm ²)	80					
	$p_r z_{pii}$	(MPa)	2.88					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI					
	Bedingung 2			TIS				
	Bedingung 3					TIB		
	Bedingung 4							TIC

* Die Summe des TI im Worst-Case von jedem zusammengesetzten Modus ist höher als 4,5, jedoch regelt das System die Spannung so, dass der TI auf 4,5 begrenzt wird.

Bedingung 1: Allgemein, Fokusbereich 30 mm, SV 0,5 mm, Skala 13 cm/s, Schalleistung 0 dB

Bedingung 2: Allgemein, Fokusbereich 140 mm, SV 2,5 mm, Skala 65 cm/s, Schalleistung 0 dB

Bedingung 3: Allgemein, Fokusbereich 100 mm, SV 7,5 mm, Skala 65 cm/s, Schalleistung 0 dB

Bedingung 4: Allgemein, Fokusbereich 160 mm, SV 2,5 mm, Skala 65 cm/s, Schalleistung 0 dB

SLH20-6 Schallkopf

Betriebsmodus: B + CD Doppler

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert			1.7	1.33		1.33		1.4
Indexkomponentenwerte				CD: 0.87 B: 0.46	-	CD: 0.87 B: 0.46	-	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha} \text{ AT } z_{\text{MI}}$	(MPa)	CD: 4.81 B: 4.59					
	P	(mW)		CD: 11.3 B: 17.4		CD: 11.3 B: 17.4		CD: 20 B: 12.8
	$P_{1 \times 1}$	(mW)		CD: 11.3 B: 17.4		CD: 11.3 B: 17.4		
	z_s	(cm)			-			
	z_b	(cm)					-	
	z_{MI}	(cm)		CD: 0.97 B: 1.02				
	$z_{\text{pii},\alpha}$	(cm)		-				
	f_{awf}	(MHz)		CD: 8.38 B: 7.13	CD: 8.5 B: 7.38		CD: 8.5 B: 7.38	CD: 7.38 B: 7.38
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	CD: 132 B: 24					
	srr	(Hz)	12					
	η_{pps}		CD: 11 B: 2					
	$I_{\text{pa},\alpha} \text{ AT } z_{\text{pii},\alpha}$	(W/cm ²)	CD: 41 B: 449					
	$I_{\text{spta},\alpha} \text{ AT } z_{\text{pii},\alpha}$	(mW/cm ²)	CD: 509 B: 226					

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
	$I_{spta} AT z_{pii}$	(mW/cm ²)	CD: 898 B: 50					
	$p_r AT z_{pii}$	(MPa)	CD: 6.36 B: 5.76					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI					
	Bedingung 2			TIS		TIB		
	Bedingung 3							TIC
	Bedingung 4							

CD: Farb-Doppler-Modus; B: B-Modus

Bedingung 1: Allgemein, B-Modus Oberschwingungsströme, Fokusbereich 14 mm, RES, Schalleistung 0 dB

Bedingung 2: Allgemein, Fokusbereich 40 mm, PEN, BR, Skala 72 cm/s, Schalleistung 0 dB

Bedingung 3: Allgemein, Fokusbereich 30 mm, PEN, BR, Skala 72 cm/s, Schalleistung 0 dB

Betriebsmodus: B + SWE

Indexname		MI	TIS		TIB		TIC
			An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert		1.7	1.61		2.01		2.51
Indexkomponentenwerte			P: 0.11 F: 1.12 B: 0.55	P: 0.06 F: 1.01 B: 0.55	P: 0.11 F: 1.12 B: 0.55	P: 0.3 F: 1.23 B: 0.55	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha}^{AT} z_{MI}$	(MPa)	P: 3.17 F: 4.4 B: 4.59				
	P	(mW)		P: 3.3 F: 54.6 B: 25	P: 3.3 F: 54.6 B: 25		P: 3.3 F: 54.6 B: 25
	P_{1x1}	(mW)		P: 3.3 F: 31.9 B: 25	P: 3.3 F: 31.9 B: 25		
	z_s	(cm)			P: 1.59 F: 1.35		
	z_b	(cm)				P: 1.59 F: 1.35	
	z_{MI}	(cm)	B: 1.02				
	$z_{pii,\alpha}$	(cm)	P: 0.96 F: 0.93				
	f_{awf}	(MHz)	P: 6.94 F: 7.13 B: 7.13	P: 6.94 F: 7.38 B: 7.38	P: 6.94 F: 7.38 B: 7.38		P: 6.94 F: 7.38 B: 7.38
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	P: 1 F: 42 B: 20				
	srr	(Hz)	1				
	n_{pps}		P: 1 F: 42 B: 20				
	$I_{pa,\alpha}^{AT} z_{pii,\alpha}$	(W/cm ²)	P: 234 F: 358 B: 611				

Indexname		MI	TIS		TIB		TIC
			An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
	$I_{spta, \alpha}$ AT $z_{pii, \alpha}$	(mW/cm ²)	P: 94 F: 4 B: 25				
	I_{spta} AT z_{pii}	(mW/cm ²)	P: 149 F: 7 B: 50				
	p_r AT z_{pii}	(MPa)	P: 3.99 F: 5.28 B: 5.76				
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI				
	Bedingung 2			TIS	TIB		TIC
	Bedingung 3						
	Bedingung 4						

P: Push-Modus; F: Flacher Modus; B: B-Modus

Bedingung 1: Allgemein, SWE-Feldpos. 9 mm, Std, B-Modus
Oberschwingungsströme, Pen, Schalleistung 0 dB

Bedingung 2: Allgemein, SWE-Feldpos. 24 mm, Std, B-Modus
Fundamental, Gen, Schalleistung 0 dB

Betriebsmodus: PW-Doppler

Indexname			MI	TIS		TIB		TIC
				An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	An der Oberfläche	Unter der Oberfläche	
Max. Indexwert			1.7	(a)		1.75		1.2
Indexkomponentenwerte				#	#	0.74	1.75	
Akustische Parameter	$p_{r,\alpha} \text{ AT } z_{\text{MI}}$	(MPa)	1.75					
	P	(mW)		#		20.6		12.5
	$P_{1 \times 1}$	(mW)		#		20.6		
	z_s	(cm)			#			
	z_b	(cm)					0.9	
	z_{MI}	(cm)	-					
	$z_{\text{pii},\alpha}$	(cm)	0.86					
	f_{awf}	(MHz)	7.38	#		7.38		7.5
Sonstige Informationen	pr	(Hz)	1207					
	sr	(Hz)	-					
	n_{pps}		1					
	$I_{\text{pa},\alpha} \text{ AT } z_{\text{pii},\alpha}$	(W/cm ²)	675					
	$I_{\text{spta},\alpha} \text{ AT } z_{\text{pii},\alpha}$	(mW/cm ²)	260					
	$I_{\text{spta}} \text{ AT } z_{\text{pii}}$	(mW/cm ²)	416					
	$p_r \text{ AT } z_{\text{pii}}$	(MPa)	4.84					
Regelbedingungen für den Betrieb	Bedingung 1		MI					
	Bedingung 2					TIB		
	Bedingung 3							TIC
	Bedingung 4							

Bedingung 1: Allgemein, Fokusbereich 14 mm, SV 0,5 mm, Skala 8 cm/s, Schallleistung 0 dB

Bedingung 2: Allgemein, Fokusbereich 40 mm, SV 4,0 mm, Skala 80 cm/s, Schallleistung 0 dB

Bedingung 3: Allgemein, Fokusbereich 7 mm, SV 4,0 mm, Skala 80 cm/s, Schallleistung 0 dB

Kapitel 12.

Literaturverzeichnis

Allgemeines Literaturverzeichnis

Abbott, JG. Rationale and derivation of MI and TI - a review. *Ultrasound in Med. and Biol.* 20:65-72; 1994. 25:431-441; 1999.

American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM). Bioeffects and safety of diagnostic ultrasound. Laurel, MD: AIUM Publications; 1993.

American Institute of Ultrasound in Medicine/National Electrical Manufacturers Association (AIUM/NEMA). Standard for real-time display of thermal and mechanical acoustic output indices on diagnostic ultrasound equipment, Revision 1. Laurel, MD: AIUM Publications; 1.998a.

American Institute of Ultrasound in Medicine/National Electrical Manufacturers Association (AIUM/NEMA). Acoustic output measurement standard for diagnostic ultrasound equipment. Laurel, MD: AIUM Publications; 1998b.

American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM). Medical ultrasound safety. Rockville, MD: AIUM Publications; 2002.

American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM). Standard Methods for Measuring Performance of Pulse Echo Ultrasound Imaging Equipment. Rockville, MD: AIUM Publications; 1991.

American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM). Methods for Measuring Performance of Pulse-Echo Ultrasound Equipment, Part II: Digital Methods. Rockville, MD: AIUM Publications; 1995a.

American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM). AIUM Quality Assurance Manual for Gray-Scale Ultrasound Scanners. Rockville, MD: AIUM Publications; 1995b.

American Institute Of Ultrasound In Medicine. Standard For Real-Time Display Of Thermal And Mechanical Acoustic Output Indices On Diagnostic Ultrasound Equipment. Laurel, Maryland: AIUM, 1992.

American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM). Mechanical Bioeffects from Diagnostic Ultrasound: AIUM Consensus Statements. J.

Ultrasound in Medicine 19: number 2; (February 2000). (Also available from AIUM Publications.).

Apfel, R.E. and Holland, C.K. Gauging the likelihood of cavitation from short-pulse, low duty cycle diagnostic ultrasound. *Ultrasound in Med. and Biol.* 20:65-72; 1994. 17:179-185;1991.

Baggs, R., Penney, D.P., Cox, C., Child, S.Z., Raeman, C.H., Dalecki, D. and Carstensen, E.L. Thresholds for ultrasonically induced lung hemorrhage in neonatal swine. *Ultrasound in Med. and Biol.* 20:65-72; 1994. 22:119-128; 1996.

Barnett, S.B., ter Haar, G.R., Ziskin, M.C., Rott, H.D., Duck, F.A. and Maeda, K. International recommendations and guidelines for the safe use of diagnostic ultrasound in medicine. *Ultrasound in Med. and Biol.* 20:65-72; 1994. 26:355-366; 2000.

Bly, S.H.P., Vlahovich, S., Mabee, P.R. and Hussey, R.G. Computed estimates of maximum temperature elevations in fetal tissues during transabdominal pulsed Doppler examinations. *Ultrasound in Med. and Biol.* 20:65-72; 1994. 18:389-397; 1992.

Bosward, K.L., Barnett, S.B., Wood, A.K.W., Edwards, M.J. and Kossoff, G. Heating of guinea-pig fetal brain during exposure to pulsed ultrasound. *Ultrasound in Med. and Biol.* 20:65-72; 1994. 19:415-424; 1993.

Carstensen, E.L., Duck, F.A., Meltzer, R.S., Schwarz, K.Q., Keller, B. Bioeffects in echocardiography. *Echocardiography* 6:605-623; 1992.

Child, S.Z., Hartman, C.L., McHale, L.A and E.L. Carstensen. Lung damage from exposure to pulsed ultrasound. *Ultrasound in Med. and Biol.* 20:65-72; 1994. 16:817-825; 1990.

Dalecki, D., Raeman CH, Child SZ, et al, . The influence of contrast agents on hemorrhage produced by lithotripter fields. *Ultrasound in Med. and Biol.* 20:65-72; 1994. 23:1435-1439; 1997.

Dalecki, D., Child, S.Z., Raeman, C.H., Cox, C. and Carstensen, E.L. Ultrasonically induced lung hemorrhage in young swine. *Ultrasound in Med. and Biol.* 20:65-72; 1994. 23:777-781; 1997.

Dalecki, D., Child, S.Z., Raeman, C.H. and Cox, C. Hemorrhage in murine fetuses exposed to pulsed ultrasound. *Ultrasound in Med. and Biol.* 20:65-72; 1994. 25:1139-1144; 1999.

Doody, C. Porter, H., Duck, F.A. and Humphrey, V.F. In vitro heating of human fetal vertebra by pulsed diagnostic ultrasound. *Ultrasound in Med. and Biol.* 20:65-72; 1994. 25:1289-1294; 1999.

Duck, F.A., Starritt, H.C., ter Haar, G.R. and Lunt, M.J. Surface heating of diagnostic ultrasound transducers. *Br. J. Radiology* 67:1005-1013; 1989.

Duggan, P.M., Liggins, G.C. and Barnett, S.B. Ultrasonic heating of the brain of the fetal sheep in utero. *Ultrasound in Med. and Biol.* 20:65-72; 1994. 21:553-560; 1995.

Duggan, P.M. and McCowan, L.M.E. Reference Ranges and Ultrasonographic Exposure Conditions for Pulsed Doppler Sonographic Studies of the Fetal Internal Carotid Artery. *J Ultrasound in Medicine* 12:719 - 722; 1993.

European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB) Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of Ultrasound Elastography. Teil 1: Basic principles and technology; EFSUMB, *Ultraschall Med.* 2013 Apr; 34(2): 169-84.

European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB) Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of Ultrasound Elastography. Teil 2: Clinical Applications; EFSUMB, *Ultraschall Med.* 2013 Jun; 34(3): 238-53

Frizzell, L.A., Chen, E. and Lee, C. Effects of pulsed ultrasound on the mouse neonate: hind limb paralysis and lung hemorrhage. *Ultrasound in Med. and Biol.* 20:65-72; 1994. 20:53-63; 1994.

Henderson, J., Willson, K., Jago, J.R. and Whittingham, T. A survey of the acoustic outputs of diagnostic ultrasound equipment in current clinical use. *Ultrasound in Med. and Biol.* 20:65-72; 1994. 21:699-705; 1995.

Holland, C.K., Deng, C.X., Apfel, R.E., Alderman, J.L., Fernandez, L.A., and Taylor, K.J.W. Direct evidence of cavitation in vivo from diagnostic ultrasound. *Ultrasound in Med. and Biol.* 20:65-72; 1994. 22:917-925; 1996.

Lele, P.P. Local hyperthermia by ultrasound for cancer therapy. In: Nyborg, W.L.; Ziskin, M.C., eds. *Biological effects of ultrasound.*

Clinics in diagnostic ultrasound, Vol.16. New York: Churchill Livingstone:135-155; 1985.

Lopez, H. How to Interpret the Ultrasound Output Display Standard for Higher Acoustic Output Diagnostic Ultrasound Devices. J. Ultrasound in Medicine, Vol 17, pg 535 (1998).

Miller, D.L. and Gies, R.A. Gas-body-based contrast agent enhances vascular bioeffects of 1.09 Mhz ultrasound on mouse intestine. Ultrasound in Med. and Biol. 20:65-72; 1994. 24:1201-1208; 1998.

Meltzer, R.S., Adsumelli, R., Risher, W.H., et al., Lack of lung hemorrhage in humans after intraoperative transesophageal echocardiography with ultrasound exposure conditions similar to those causing lung hemorrhage in laboratory animals. J. Am. Soc. Echocardiography 11:57-60; 1998.

National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP). Exposure criteria for medical diagnostic ultrasound: I.Criteria based on thermal mechanisms. Bethesda, MD: NCRP; June 1, 1992.

National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP). Exposure criteria for medical diagnostic ultrasound: II. Criteria based on mechanical mechanisms. Bethesda, MD: NCRP; in preparation

O'Brien, W.D. and Zachary, J.F. Lung damage assessment from exposure to pulsed-wave ultrasound in the rabbit, mouse and pig. IEEE Trans Ultras Ferro, Freq Cont 44: 473-485; 1997.

O'Neill, T.P., Winkler, A.J. and Wu, J. Ultrasound heating in a tissue-bone phantom. Ultrasound in Med. and Biol. 20:65-72; 1994. 20:579-588; 1994.

Patton, C.A., Harris, G.R. and Phillips, R.A. Output Levels and Bioeffects Indices from Diagnostic Ultrasound Exposure Data Reported to the FDA. IEEE Trans Ultras Ferro, Freq Cont 41:353-359; 1994.

Ramnarine, K.V., Nassiri, D.K., Pearce, J.M., Joseph, A.E.A., Patel, R.H. and Varma, T.R. Estimation of in situ ultrasound exposure during obstetric examinations. Ultrasound in Med. and Biol. 20:65-72; 1994. 19:319-329; 1993.

Shaw, A., Preston, R.C. and Bond, A.D. Assessment of the likely thermal index values for pulsed Doppler ultrasonic equipment - Stage I:

calculation based on manufacturers' data. NPL Report CIRA(EXT) 018; 1997.

Shaw, A., Pay, N.M. and Preston, R.C. Assessment of the likely thermal index values for pulsed Doppler ultrasonic equipment - Stages II and III: experimental assessment of scanner/transducer combinations. NPL Report CMAM 12; 1998.

Siddiqi, T.A., O'Brien, W.D., Meyer, R.A., Sullivan, J.M. and Miodovnik, M. In situ human obstetrical ultrasound exposimetry: estimates of derating factors for each of three different tissue models. *Ultrasound in Med. and Biol.* 20:65-72; 1994. 21:379-391; 1995.

Tarantal, A.F. and Canfield, D.R. Ultrasound-induced lung hemorrhage in the monkey. *Ultrasound in Med. and Biol.* 20:65-72; 1994. 20:65-72; 1994.

U.S. Food and Drug Administration (FDA). Information for manufacturers seeking marketing clearance of diagnostic ultrasound systems and transducers. Rockville, MD: FDA; Sept 30, 1997.

World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB) WFUMB Symposium on Safety and Standardisation in Medical Ultrasound, Chapter 1, ed., Barnett, S.B. and Kossoff, G. *Ultrasound in Med. and Biol.* 18:739-750; 1992. 18:739-750; 1992.

World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB) WFUMB Symposium on Safety of Ultrasound in Medicine. Conclusions and recommendations on thermal and non-thermal mechanisms for biological effects of ultrasound. ed., Barnett, S.B. *Ultrasound in Med. and Biol.* 24: 24: Supplement 1, 1998.

Zachary, J.F. and O'Brien, W.D., Jr. Lung lesions induced by continuous- and pulsed-wave (diagnostic) ultrasound in mice, rabbits and pigs. *Vet Pathol* 32:43-54; 1995.

Literaturverzeichnis zur Obstetrik

Gleichungen und Tabellen zum fetalen Wachstum

Abdomenumfang (AU nach GA)

AU NACH GA - ASUM2000

Name: ASUM 2000

Autor: ASUM

Jahr: 2000

Literatur: ASUM und Campbell Westerway S , Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

Kommentare: Tabelle zum fetalen Wachstum, die aus ASUM-Gleichungen mit polynomialer Interpretation der Standardabweichungen erstellt wurde

GA (Woche)	AU (mm)	+/- 2 SD
11 Wochen	49,3231 mm	8,9715 mm
12 Wochen	61,4484 mm	9,50361 mm
13 Wochen	73,4799 mm	10,1216 mm
14 Wochen	85,4176 mm	10,8189 mm
15 Wochen	97,2615 mm	11,5889 mm
16 Wochen	109,012 mm	12,4251 mm
17 Wochen	120,668 mm	13,321 mm
18 Wochen	132,23 mm	14,2699 mm
19 Wochen	143,699 mm	15,2653 mm
20 Wochen	155,074 mm	16,3007 mm

GA (Woche)	AU (mm)	+/- 2 SD
21 Wochen	166,355 mm	17,3694 mm
22 Wochen	177,542 mm	18,465 mm
23 Wochen	188,636 mm	19,5808 mm
24 Wochen	199,636 mm	20,7104 mm
25 Wochen	210,542 mm	21,847 mm
26 Wochen	221,354 mm	22,9843 mm
27 Wochen	232,072 mm	24,1155 mm
28 Wochen	242,696 mm	25,2342 mm
29 Wochen	253,227 mm	26,3338 mm
30 Wochen	263,664 mm	27,4078 mm
31 Wochen	274,007 mm	28,4495 mm
32 Wochen	284,256 mm	29,4524 mm
33 Wochen	294,412 mm	30,41 mm
34 Wochen	304,474 mm	31,3156 mm
35 Wochen	314,442 mm	32,1628 mm
36 Wochen	324,316 mm	32,945 mm
37 Wochen	334,096 mm	33,6555 mm
38 Wochen	343,782 mm	34,2879 mm
39 Wochen	353,375 mm	34,8356 mm
40 Wochen	362,874 mm	35,292 mm
41 Wochen	372,279 mm	35,6506 mm

AU NACH GA - CFEF2000

Name: CFEF 2000

Autor: CFEF

Jahr: 2000

Literatur: Crequat J, Duyme M und Brodaty G, Fetal growth charts by the French College of fetal ultrasonography and the Inserm U 155 , Biometry 2000, 28, pp 435-455, 2000

Kommentare: <http://cfef.org/>

GA (Woche)	AU (mm)	3%	10%	90%	97%
15 Wochen	95 mm	80,7 mm	85,3 mm	104,4 mm	108,8 mm
16 Wochen	106,4 mm	91,3 mm	96,1 mm	116,8 mm	121,6 mm
17 Wochen	118 mm	101,7 mm	106,8 mm	129 mm	134 mm
18 Wochen	129,2 mm	111,8 mm	117,4 mm	141 mm	146,6 mm
19 Wochen	140,4 mm	122 mm	128 mm	153 mm	158,8 mm
20 Wochen	151,4 mm	132 mm	138 mm	164,7 mm	171 mm
21 Wochen	162,3 mm	141,6 mm	148,2 mm	176,3 mm	183 mm
22 Wochen	173 mm	151,4 mm	158,2 mm	187,8 mm	194,7 mm
23 Wochen	183,6 mm	160,9 mm	168,2 mm	199 mm	206,3 mm
24 Wochen	194 mm	170,2 mm	177,8 mm	210,3 mm	218 mm
25 Wochen	204,4 mm	179,3 mm	187,3 mm	221,3 mm	229,3 mm
26 Wochen	214,5 mm	188,4 mm	196,7 mm	232,3 mm	240,6 mm
27 Wochen	224,5 mm	197,3 mm	206 mm	243 mm	251,6 mm
28 Wochen	234,4 mm	206,2 mm	215,1 mm	253,6 mm	262,6 mm
29 Wochen	244 mm	214,7 mm	224 mm	264 mm	273,3 mm
30 Wochen	253,6 mm	223,2 mm	232,8 mm	274,2 mm	283,7 mm
31 Wochen	263 mm	231,6 mm	241,6 mm	284,2 mm	294,4 mm
32 Wochen	272,2 mm	239,7 mm	250 mm	294,3 mm	304,6 mm
33 Wochen	281,2 mm	247,8 mm	258,4 mm	304 mm	314,8 mm
34 Wochen	290,2 mm	255,6 mm	266,7 mm	313,8 mm	324,8 mm
35 Wochen	298,8 mm	263,2 mm	274,7 mm	323,3 mm	334,5 mm
36 Wochen	307,4 mm	271 mm	282,6 mm	332,5 mm	344,3 mm
37 Wochen	316 mm	278,3 mm	290,3 mm	341,7 mm	353,8 mm
38 Wochen	324,7 mm	285,6 mm	298 mm	350,7 mm	363 mm
39 Wochen	332,4 mm	292,7 mm	305,3 mm	359,6 mm	372,2 mm
40 Wochen	339 mm	298 mm	311 mm	367 mm	380 mm

AU NACH GA - HADLOCK1984

Name: Hadlock 1984

Autor: Hadlock

Jahr: 1984

Literatur: Hadlock F.P, Deter R.L, Harrist R.B. und Park S.K
Estimating fetal age: computer-assisted analysis of multiple fetal growth parameters, Radiology, 152, pp 497-501, 1984

GA (Woche)	AU (cm)	+/- 1 SD
12 Wochen	4,58288 cm	1,34 cm
12,5 Wochen	5,26562 cm	1,34 cm
13 Wochen	5,94338 cm	1,34 cm
13,5 Wochen	6,61615 cm	1,34 cm
14 Wochen	7,28392 cm	1,34 cm
14,5 Wochen	7,9467 cm	1,34 cm
15 Wochen	8,6045 cm	1,34 cm
15,5 Wochen	9,25731 cm	1,34 cm
16 Wochen	9,90512 cm	1,34 cm
16,5 Wochen	10,5479 cm	1,34 cm
17 Wochen	11,1858 cm	1,34 cm
17,5 Wochen	11,8186 cm	1,34 cm
18 Wochen	12,4465 cm	1,34 cm
18,5 Wochen	13,0693 cm	1,34 cm
19 Wochen	13,6872 cm	1,34 cm
19,5 Wochen	14,3001 cm	1,34 cm
20 Wochen	14,908 cm	1,34 cm
20,5 Wochen	15,5109 cm	1,34 cm
21 Wochen	16,1088 cm	1,34 cm
21,5 Wochen	16,7017 cm	1,34 cm
22 Wochen	17,2897 cm	1,34 cm
22,5 Wochen	17,8726 cm	1,34 cm
23 Wochen	18,4506 cm	1,34 cm
23,5 Wochen	19,0235 cm	1,34 cm
24 Wochen	19,5915 cm	1,34 cm
24,5 Wochen	20,1545 cm	1,34 cm
25 Wochen	20,7125 cm	1,34 cm
25,5 Wochen	21,2655 cm	1,34 cm

GA (Woche)	AU (cm)	+/- 1 SD
26 Wochen	21,8135 cm	1,34 cm
26,5 Wochen	22,3565 cm	1,34 cm
27 Wochen	22,8946 cm	1,34 cm
27,5 Wochen	23,4276 cm	1,34 cm
28 Wochen	23,9557 cm	1,34 cm
28,5 Wochen	24,4787 cm	1,34 cm
29 Wochen	24,9968 cm	1,34 cm
29,5 Wochen	25,5099 cm	1,34 cm
30 Wochen	26,018 cm	1,34 cm
30,5 Wochen	26,5211 cm	1,34 cm
31 Wochen	27,0192 cm	1,34 cm
31,5 Wochen	27,5123 cm	1,34 cm
32 Wochen	28,0005 cm	1,34 cm
32,5 Wochen	28,4836 cm	1,34 cm
33 Wochen	28,9618 cm	1,34 cm
33,5 Wochen	29,4349 cm	1,34 cm
34 Wochen	29,9031 cm	1,34 cm
34,5 Wochen	30,3663 cm	1,34 cm
35 Wochen	30,8245 cm	1,34 cm
35,5 Wochen	31,2777 cm	1,34 cm
36 Wochen	31,7259 cm	1,34 cm
36,5 Wochen	32,1691 cm	1,34 cm
37 Wochen	32,6074 cm	1,34 cm
37,5 Wochen	33,0406 cm	1,34 cm
38 Wochen	33,4689 cm	1,34 cm
38,5 Wochen	33,8921 cm	1,34 cm
39 Wochen	34,3104 cm	1,34 cm
39,5 Wochen	34,7237 cm	1,34 cm
40 Wochen	35,132 cm	1,34 cm

AU NACH GA - MERZ1988

Name: Merz 1988

Autor: Merz

Jahr: 1988

Literatur: Merz E, Goldhofer W und Timor-Tritsch E , Ultrasound in Gynecology and Obstetrics, Textbook and Atlas, Georg Thieme Verlag , 1991

Kommentare: Von Merz, E., Habilitationsschrift, Universitäts-Frauenklinik Mainz, 1988

GA (Woche)	AU (mm)	5%	95%
12 Wochen	58 mm	40 mm	76 mm
13 Wochen	68 mm	50 mm	87 mm
14 Wochen	79 mm	60 mm	98 mm
15 Wochen	89 mm	69 mm	109 mm
16 Wochen	99 mm	79 mm	119 mm
17 Wochen	110 mm	89 mm	130 mm
18 Wochen	120 mm	99 mm	141 mm
19 Wochen	130 mm	108 mm	152 mm
20 Wochen	140 mm	118 mm	162 mm
21 Wochen	151 mm	128 mm	173 mm
22 Wochen	161 mm	138 mm	184 mm
23 Wochen	171 mm	148 mm	195 mm
24 Wochen	182 mm	158 mm	205 mm
25 Wochen	192 mm	167 mm	216 mm
26 Wochen	202 mm	177 mm	227 mm
27 Wochen	212 mm	187 mm	238 mm
28 Wochen	223 mm	197 mm	248 mm
29 Wochen	233 mm	207 mm	259 mm
30 Wochen	243 mm	217 mm	270 mm
31 Wochen	253 mm	227 mm	280 mm
32 Wochen	264 mm	237 mm	291 mm
33 Wochen	274 mm	246 mm	302 mm
34 Wochen	284 mm	256 mm	312 mm

GA (Woche)	AU (mm)	5%	95%
35 Wochen	295 mm	266 mm	323 mm
36 Wochen	305 mm	276 mm	334 mm
37 Wochen	315 mm	286 mm	344 mm
38 Wochen	325 mm	296 mm	355 mm
39 Wochen	336 mm	306 mm	365 mm
40 Wochen	346 mm	316 mm	376 mm

Biparietaler Durchmesser (BPD nach GA)

BPD NACH GA - ASUM2003

Name: ASUM 2003

Autor: ASUM

Jahr: 2003

Literatur: ASUM und Campbell Westerway S , Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

Kommentare: Tabelle zum fetalen Wachstum, die aus ASUM-Gleichungen mit polynomialer Interpretation der Standardabweichungen erstellt wurde

GA (Woche)	BPD (mm)	+/- 2 SD
11 Wochen	15,5549 mm	2,92038 mm
12 Wochen	19,3916 mm	3,32946 mm
13 Wochen	23,1541 mm	3,67624 mm
14 Wochen	26,8424 mm	3,96575 mm
15 Wochen	30,4565 mm	4,20303 mm
16 Wochen	33,9964 mm	4,39311 mm
17 Wochen	37,4621 mm	4,54103 mm
18 Wochen	40,8536 mm	4,65182 mm
19 Wochen	44,1709 mm	4,73052 mm
20 Wochen	47,414 mm	4,78216 mm

GA (Woche)	BPD (mm)	+/- 2 SD
21 Wochen	50,5829 mm	4,81176 mm
22 Wochen	53,6776 mm	4,82438 mm
23 Wochen	56,6981 mm	4,82504 mm
24 Wochen	59,6444 mm	4,81877 mm
25 Wochen	62,5165 mm	4,81061 mm
26 Wochen	65,3144 mm	4,80559 mm
27 Wochen	68,0381 mm	4,80875 mm
28 Wochen	70,6876 mm	4,82512 mm
29 Wochen	73,2629 mm	4,85974
30 Wochen	75,764 mm	4,91763 mm
31 Wochen	78,1909 mm	5,00384 mm
32 Wochen	80,5436 mm	5,1234 mm
33 Wochen	82,8221 mm	5,28134 mm
34 Wochen	85,0264 mm	5,48269 mm
35 Wochen	87,1565 mm	5,73249 mm
36 Wochen	89,2124 mm	6,03577 mm
37 Wochen	91,1941 mm	6,39757 mm
38 Wochen	93,1016 mm	6,82292 mm
39 Wochen	94,9349 mm	7,31686 mm
40 Wochen	96,694 mm	7,88441 mm
41 Wochen	98,3789 mm	8,53062 mm

BPD NACH GA - CFEF2000

Name: CFEF 2000

Autor: CFEF

Jahr: 2000

Literatur: Crequat J, Duyme M und Brodaty G, Fetal growth charts by the French College of fetal ultrasonography and the Inserm U 155 , Biometry 2000, 28, pp 435-455, 2000

Kommentare: <http://cfef.org/>

GA (Woche)	FL (mm)	3%	10%	90%	97%
11 Wochen	15,36 mm	12,08 mm	13,12 mm	17,6 mm	18,63 mm
12 Wochen	19,4 mm	15,81 mm	16,96 mm	21,81 mm	22,92 mm
13 Wochen	23,3 mm	19,47 mm	20,71 mm	25,92 mm	27,12 mm
14 Wochen	27,14 mm	23,05 mm	24,36 mm	29,92 mm	31,23 mm
15 Wochen	30,89 mm	26,56 mm	27,93 mm	33,82 mm	35,23 mm
16 Wochen	34,53 mm	29,97 mm	31,41 mm	37,62 mm	39,08 mm
17 Wochen	38,12 mm	33,32 mm	34,85 mm	41,35 mm	42,87 mm
18 Wochen	41,58 mm	36,55 mm	38,15 mm	44,97 mm	46,56 mm
19 Wochen	45 mm	39,76 mm	41,46 mm	48,52 mm	50,18 mm
20 Wochen	48,22 mm	42,85 mm	44,56 mm	51,9 mm	53,64 mm
21 Wochen	51,43 mm	45,86 mm	47,66 mm	55,23 mm	57 mm
22 Wochen	54,53 mm	48,79 mm	50,61 mm	58,44 mm	60,3 mm
23 Wochen	57,51 mm	51,63 mm	53,48 mm	61,54 mm	63,45 mm
24 Wochen	60,42 mm	54,38 mm	56,31 mm	64,57 mm	66,5 mm
25 Wochen	63,25 mm	57,04 mm	59 mm	67,48 mm	69,42 mm
26 Wochen	65,94 mm	59,62 mm	61,64 mm	70,24 mm	72,27 mm
27 Wochen	68,55 mm	62,12 mm	64,15 mm	72,92 mm	75 mm
28 Wochen	71,03 mm	64,5 mm	66,61 mm	75,52 mm	77,6 mm
29 Wochen	73,5 mm	66,84 mm	68,98 mm	77,97 mm	80,09 mm
30 Wochen	75,8 mm	69,07 mm	71,21 mm	80,37 mm	82,52 mm
31 Wochen	78 mm	71,22 mm	73,39 mm	82,63 mm	84,8 mm
32 Wochen	80,16 mm	73,3 mm	75,49 mm	84,8 mm	87 mm
33 Wochen	82,14 mm	75,24 mm	77,46 mm	86,84 mm	89,04 mm
34 Wochen	84,07 mm	77,14 mm	79,36 mm	88,8 mm	91 mm
35 Wochen	85,9 mm	78,94 mm	81,14 mm	90,61 mm	92,83 mm
36 Wochen	87,61 mm	80,64 mm	82,88 mm	92,35 mm	94,56 mm
37 Wochen	89,24 mm	82,27 mm	84,5 mm	93,97 mm	96,19 mm
38 Wochen	90,7 mm	83,78 mm	86 mm	95,42 mm	97,66 mm
39 Wochen	92,1 mm	85,22 mm	87,43 mm	96,86 mm	99,05 mm
40 Wochen	93,45 mm	86,57 mm	88,78 mm	98,13 mm	100,31 mm
41 Wochen	94 mm	87 mm	89 mm	99 mm	101 mm

BPD NACH GA - HADLOCK1984

Name: Hadlock 1984

Autor: Hadlock

Jahr: 1984

Literatur: Hadlock F.P, Deter R.L, Harrist R.B. und Park S.K
Estimating fetal age: computer-assisted analysis of multiple fetal growth parameters, Radiology, 152, pp 497-501, 1984

GA (Woche)	BPD (cm)	+/- 1 SD
12 Wochen	1,73459 cm	0,3 cm
12,5 Wochen	1,92586 cm	0,3 cm
13 Wochen	2,11598 cm	0,3 cm
13,5 Wochen	2,30492 cm	0,3 cm
14 Wochen	2,49262 cm	0,3 cm
14,5 Wochen	2,67903 cm	0,3 cm
15 Wochen	2,86413 cm	0,3 cm
15,5 Wochen	3,04784 cm	0,3 cm
16 Wochen	3,23014 cm	0,3 cm
16,5 Wochen	3,41098 cm	0,3 cm
17 Wochen	3,59031 cm	0,3 cm
17,5 Wochen	3,76808 cm	0,3 cm
18 Wochen	3,94425 cm	0,3 cm
18,5 Wochen	4,11877 cm	0,3 cm
19 Wochen	4,2916 cm	0,3 cm
19,5 Wochen	4,46269 cm	0,3 cm
20 Wochen	4,632 cm	0,3 cm
20,5 Wochen	4,79948 cm	0,3 cm
21 Wochen	4,96508 cm	0,3 cm
21,5 Wochen	5,12876 cm	0,3 cm
22 Wochen	5,29047 cm	0,3 cm
22,5 Wochen	5,45017 cm	0,3 cm
23 Wochen	5,60781 cm	0,3 cm
23,5 Wochen	5,76335 cm	0,3 cm
24 Wochen	5,91674 cm	0,3 cm

GA (Woche)	BPD (cm)	+/- 1 SD
24,5 Wochen	6,06793 cm	0,3 cm
25 Wochen	6,21687 cm	0,3 cm
25,5 Wochen	6,36354 cm	0,3 cm
26 Wochen	6,50786 cm	0,3 cm
26,5 Wochen	6,64981 cm	0,3 cm
27 Wochen	6,78934 cm	0,3 cm
27,5 Wochen	6,92639 cm	0,3 cm
28 Wochen	7,06093 cm	0,3 cm
28,5 Wochen	7,1929 cm	0,3 cm
29 Wochen	7,32227 cm	0,3 cm
29,5 Wochen	7,44899 cm	0,3 cm
30 Wochen	7,573 cm	0,3 cm
30,5 Wochen	7,69427 cm	0,3 cm
31 Wochen	7,81275 cm	0,3 cm
31,5 Wochen	7,92839 cm	0,3 cm
32 Wochen	8,04115 cm	0,3 cm
32,5 Wochen	8,15098 cm	0,3 cm
33 Wochen	8,25784 cm	0,3 cm
33,5 Wochen	8,36168 cm	0,3 cm
34 Wochen	8,46246 cm	0,3 cm
34,5 Wochen	8,56012 cm	0,3 cm
35 Wochen	8,65462 cm	0,3 cm
35,5 Wochen	8,74593 cm	0,3 cm
36 Wochen	8,83398 cm	0,3 cm
36,5 Wochen	8,91875 cm	0,3 cm
37 Wochen	9,00017 cm	0,3 cm
37,5 Wochen	9,0782 cm	0,3 cm
38 Wochen	9,15281 cm	0,3 cm
38,5 Wochen	9,22394 cm	0,3 cm
39 Wochen	9,29154 cm	0,3 cm
39,5 Wochen	9,35558 cm	0,3 cm
40 Wochen	9,416 cm	0,3 cm

BPD NACH GA - JEANTY1984

Name: Jeanty 1984

Autor: Jeanty

Jahr: 1984

Literatur: Jeanty P und Romero R, Obstetrical Ultrasound, McGraw-Hill, 1984

GA (Woche)	BPD (mm)	5%	95%
10 Wochen	14 mm	9 mm	18 mm
11 Wochen	17 mm	13 mm	22 mm
12 Wochen	21 mm	16 mm	25 mm
13 Wochen	24 mm	20 mm	29 mm
14 Wochen	28 mm	23 mm	32 mm
15 Wochen	31 mm	27 mm	36 mm
16 Wochen	35 mm	30 mm	39 mm
17 Wochen	38 mm	34 mm	43 mm
18 Wochen	42 mm	37 mm	46 mm
19 Wochen	45 mm	40 mm	49 mm
20 Wochen	48 mm	44 mm	53 mm
21 Wochen	51 mm	47 mm	56 mm
22 Wochen	55 mm	50 mm	59 mm
23 Wochen	58 mm	53 mm	62 mm
24 Wochen	61 mm	56 mm	65 mm
25 Wochen	64 mm	59 mm	68 mm
26 Wochen	67 mm	62 mm	71 mm
27 Wochen	70 mm	65 mm	74 mm
28 Wochen	72 mm	68 mm	77 mm
29 Wochen	75 mm	70 mm	79 mm
30 Wochen	77 mm	73 mm	82 mm
31 Wochen	79 mm	75 mm	84 mm
32 Wochen	82 mm	77 mm	86 mm
33 Wochen	84 mm	79 mm	88 mm
34 Wochen	86 mm	81 mm	90 mm

GA (Woche)	BPD (mm)	5%	95%
35 Wochen	87 mm	83 mm	92 mm
36 Wochen	89 mm	84 mm	93 mm
37 Wochen	90 mm	86 mm	95 mm
38 Wochen	91 mm	87 mm	96 mm
39 Wochen	93 mm	88 mm	97 mm
40 Wochen	93 mm	89 mm	98 mm

BPD NACH GA - MERZ1988

Name: Merz 1988

Autor: Merz

Jahr: 1988

Literatur: Merz E, Goldhofer W und Timor-Tritsch E , Ultrasound in Gynecology and Obstetrics, Textbook and Atlas, Georg Thieme Verlag , 1991

Kommentare: Von Merz, E., Habilitationsschrift, Universitäts-Frauenklinik Mainz, 1988

GA (Woche)	BPD (mm)	5%	95%
12 Wochen	20 mm	15 mm	24 mm
13 Wochen	24 mm	19 mm	28 mm
14 Wochen	28 mm	23 mm	32 mm
15 Wochen	31 mm	27 mm	36 mm
16 Wochen	35 mm	30 mm	40 mm
17 Wochen	39 mm	34 mm	44 mm
18 Wochen	43 mm	38 mm	48 mm
19 Wochen	46 mm	41 mm	51 mm
20 Wochen	50 mm	45 mm	55 mm
21 Wochen	53 mm	48 mm	58 mm
22 Wochen	56 mm	51 mm	62 mm
23 Wochen	60 mm	54 mm	65 mm
24 Wochen	63 mm	57 mm	68 mm
25 Wochen	66 mm	60 mm	71 mm

GA (Woche)	BPD (mm)	5%	95%
26 Wochen	69 mm	63 mm	74 mm
27 Wochen	72 mm	66 mm	77 mm
28 Wochen	74 mm	69 mm	80 mm
29 Wochen	77 mm	71 mm	83 mm
30 Wochen	79 mm	74 mm	85 mm
31 Wochen	82 mm	76 mm	88 mm
32 Wochen	84 mm	78 mm	90 mm
33 Wochen	86 mm	80 mm	92 mm
34 Wochen	89 mm	82 mm	95 mm
35 Wochen	91 mm	84 mm	97 mm
36 Wochen	93 mm	86 mm	99 mm
37 Wochen	94 mm	88 mm	101 mm
38 Wochen	96 mm	90 mm	103 mm
39 Wochen	98 mm	91 mm	104 mm
40 Wochen	99 mm	93 mm	106 mm

Scheitel-Steiß-Länge (SSL nach GA)

SSL NACH GA - JEANTY1984

Name: Jeanty 1984

Autor: Jeanty

Jahr: 1984

Literatur: Jeanty P und Romero R, Obstetrical Ultrasound, McGraw-Hill, 1984

GA (EW)	SSL (mm)
6W0T	4 mm
6W1T	5 mm
6W2T	6 mm
6W3T	6 mm
6W4T	7 mm

GA (EW)	SSL (mm)
6W5T	8 mm
6W6T	8 mm
7W0T	9 mm
7W1T	10 mm
7W2T	10 mm
7W3T	11 mm
7W4T	12 mm
7W5T	13 mm
7W6T	14 mm
8W0T	15 mm
8W1T	16 mm
8W2T	17 mm
8W3T	18 mm
8W4T	19 mm
8W5T	20 mm
8W6T	21 mm
9W0T	22 mm
9W1T	23 mm
9W2T	24 mm
9W3T	26 mm
9W4T	27 mm
9W5T	28 mm
9W6T	29 mm
10W0T	31 mm
10W1T	32 mm
10W2T	33 mm
10W3T	35 mm
10W4T	36 mm
10W5T	38 mm
10W6T	39 mm
11W0T	40 mm
11W1T	41 mm

GA (EW)	SSL (mm)
11W2T	43 mm
11W3T	44 mm
11W4T	46 mm
11W5T	47 mm
11W6T	49 mm

SSL NACH GA - HANSMANN1986

Name: Hansmann 1986

Autor: Hansmann

Jahr: 1986

Literatur: Hansmann, Hackeloer, Staudach und Wittman, Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology, Springer-Verlag, New York, 1986

GA (EW)	SSL (mm)	+/- 2 SD
7W1T	6,9 mm	4,6 mm
7W2T	7,6 mm	4,85 mm
7W3T	8,3 mm	5,1 mm
7W4T	9 mm	5,35 mm
7W5T	9,6 mm	5,65 mm
7W6T	10,2 mm	5,9 mm
8W0T	10,8 mm	6,1 mm
8W1T	11,4 mm	6,4 mm
8W2T	12,1 mm	6,65 mm
8W3T	12,7 mm	6,9 mm
8W4T	13,3 mm	7,15 mm
8W5T	14 mm	7,4 mm
8W6T	14,7 mm	7,7 mm
9W0T	15,4 mm	7,95 mm
9W1T	16,2 mm	8,2 mm
9W3T	17,8 mm	8,7 mm
9W5T	19,6 mm	9,25 mm

GA (EW)	SSL (mm)	+/- 2 SD
10W0T	21,5 mm	9,75 mm
10W2T	23,6 mm	10,3 mm
10W4T	25,9 mm	10,75 mm
10W6T	28,3 mm	11,3 mm
11W2T	32,4 mm	12,05 mm
11W4T	35,3 mm	12,6 mm
11W6T	38,3 mm	13,1 mm
12W2T	43,2 mm	13,9 mm
12W4T	46,6 mm	14,55 mm
12W6T	50,2 mm	14,9 mm
13W2T	55,6 mm	15,65 mm
13W4T	59,4 mm	16,15 mm
13W6T	63,1 mm	16,7 mm
14W2T	68,8 mm	17,5 mm
14W4T	72,6 mm	17,5 mm
14W6T	76,3 mm	18,5 mm
15W2T	81,8 mm	19,3 mm
15W4T	85,4 mm	19,8 mm
15W6T	88,9 mm	20,3 mm
16W2T	93,9 mm	21,1 mm
16W4T	97,1 mm	21,6 mm
16W6T	100,1 mm	22,1 mm
17W2T	104,4 mm	22,9 mm
17W4T	107 mm	23,4 mm
17W6T	109,5 mm	23,9 mm
18W2T	113 mm	24,7 mm
18W4T	115,1 mm	25,25 mm
18W6T	117,2 mm	25,7 mm
19W2T	120 mm	26,5 mm
19W4T	121,9 mm	27,05 mm
19W6T	123,7 mm	27,5 mm
20W1T	125,5 mm	28,05 mm

GA (EW)	SSL (mm)	+/- 2 SD
20W3T	127,4 mm	28,55 mm
20W5T	129,4 mm	29,1 mm
21W0T	131,6 mm	29,6 mm
21W1T	132,8 mm	29,85 mm
21W2T	134 mm	30,05 mm

Femurlänge (FL nach GA)

FL NACH GA - ASUM2003

Name: ASUM 2003

Autor: ASUM

Jahr: 2003

Literatur: ASUM und Campbell Westerway S , Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

Kommentare: Tabelle zum fetalen Wachstum, die aus ASUM-Gleichungen mit polynomialer Interpretation der Standardabweichungen erstellt wurde

GA (Woche)	FL (mm)	+/- 2 SD
11 Wochen	5,7551 mm	1,90788 mm
12 Wochen	8,7962 mm	2,42423 mm
13 Wochen	11,8149 mm	2,88716 mm
14 Wochen	14,8088 mm	3,2994 mm
15 Wochen	17,7755 mm	3,66367 mm
16 Wochen	20,7126 mm	3,98271 mm
17 Wochen	23,6177 mm	4,25924 mm
18 Wochen	26,4884 mm	4,49599 mm
19 Wochen	29,3223 mm	4,6957 mm
20 Wochen	32,117 mm	4,8611 mm
21 Wochen	34,8701 mm	4,99491 mm
22 Wochen	37,5792 mm	5,09986 mm

GA (Woche)	FL (mm)	+/- 2 SD
23 Wochen	40,2419 mm	5,17869 mm
24 Wochen	42,8558 mm	5,23413 mm
25 Wochen	45,4185 mm	5,2689 mm
26 Wochen	47,9276 mm	5,28574 mm
27 Wochen	50,3807 mm	5,28737 mm
28 Wochen	52,7754 mm	5,27652 mm
29 Wochen	55,1093 mm	5,25593 mm
30 Wochen	57,38 mm	5,22833 mm
31 Wochen	59,5851 mm	5,19644 mm
32 Wochen	61,7222 mm	5,16299 mm
33 Wochen	63,7889 mm	5,13072 mm
34 Wochen	65,7828 mm	5,10236 mm
35 Wochen	67,7015 mm	5,08063 mm
36 Wochen	69,5426 mm	5,06827 mm
37 Wochen	71,3037 mm	5,068 mm
38 Wochen	72,9824 mm	5,08255 mm
39 Wochen	74,5763 mm	5,11466 mm
40 Wochen	76,083 mm	5,16706 mm
41 Wochen	77,5001 mm	5,24247 mm

FL NACH GA - CFEF2000

Name: CFEF 2000

Autor: CFEF

Jahr: 2000

Literatur: Crequat J, Duyme M und Brodaty G, Fetal growth charts by the French College of fetal ultrasonography and the Inserm U 155 , Biometry 2000, 28, pp 435-455, 2000

Kommentare: <http://cfef.org/>

GA (Woche)	FL (mm)	3%	10%	90%	97%
12 Wochen	6,33 mm	2,76 mm	3,89 mm	8,79 mm	10 mm

GA (Woche)	FL (mm)	3%	10%	90%	97%
13 Wochen	9,88 mm	2,76 mm	7,29 mm	12,42 mm	13,65 mm
14 Wochen	13,33 mm	9,4 mm	10,65 mm	16 mm	17,27 mm
15 Wochen	16,66 mm	12,56 mm	13,87 mm	19,44 mm	20,77 mm
16 Wochen	19,95 mm	15,7 mm	17 mm	22,8 mm	24,18 mm
17 Wochen	23,12 mm	18,74 mm	20,12 mm	26,13 mm	27,53 mm
18 Wochen	26,23 mm	21,69 mm	23,14 mm	29,3 mm	30,8 mm
19 Wochen	29,25 mm	24,59 mm	26,06 mm	32,44 mm	33,91 mm
20 Wochen	32,23 mm	27,42 mm	28,94 mm	35,48 mm	37,03 mm
21 Wochen	35,05 mm	30,12 mm	31,72 mm	38,41 mm	40 mm
22 Wochen	37,87 mm	32,83 mm	34,39 mm	41,3 mm	42,91 mm
23 Wochen	40,5 mm	35,34 mm	37 mm	44,03 mm	45,71 mm
24 Wochen	43,16 mm	37,89 mm	39,58 mm	46,75 mm	48,42 mm
25 Wochen	45,69 mm	40,33 mm	42,04 mm	49,36 mm	51,08 mm
26 Wochen	48,17 mm	42,66 mm	44,4 mm	51,88 mm	53,62 mm
27 Wochen	50,53 mm	44,95 mm	46,72 mm	54,32 mm	56,09 mm
28 Wochen	52,8 mm	47,13 mm	48,94 mm	56,64 mm	58,45 mm
29 Wochen	54,94 mm	49,22 mm	51,06 mm	58,91 mm	60,72 mm
30 Wochen	57,13 mm	51,3 mm	53,14 mm	61,08 mm	62,92 mm
31 Wochen	59,15 mm	53,26 mm	55,13 mm	63,14 mm	65,04 mm
32 Wochen	61,11 mm	55,12 mm	57,04 mm	65,19 mm	67,07 mm
33 Wochen	63 mm	56,96 mm	58,87 mm	67,1 mm	69,03 mm
34 Wochen	64,76 mm	58,69 mm	60,62 mm	68,88 mm	70,84 mm
35 Wochen	66,47 mm	60,33 mm	62,29 mm	70,65 mm	72,63 mm
36 Wochen	68,13 mm	61,9 mm	63,89 mm	72,34 mm	74,3 mm
37 Wochen	69,63 mm	63,4 mm	65,36 mm	73,91 mm	75,89 mm
38 Wochen	71,11 mm	64,81 mm	66,79 mm	75,38 mm	77,41 mm
39 Wochen	72,48 mm	66,16 mm	68,19 mm	76,81 mm	78,84 mm
40 Wochen	73,79 mm	67,42 mm	69,47 mm	78,14 mm	80,17 mm
41 Wochen	74 mm	68 mm	70 mm	79 mm	81 mm

FL NACH GA - HADLOCK1984

Name: Hadlock 1984

Autor: Hadlock

Jahr: 1984

Literatur: Hadlock F.P, Deter R.L, Harrist R.B. und Park S.K
Estimating fetal age: computer-assisted analysis of multiple fetal growth parameters, Radiology, 152, pp 497-501, 1984

GA (Woche)	FL (cm)	+/- 1 SD
12 Wochen	0,7244 cm	0,3 cm
12,5 Wochen	0,89625 cm	0,3 cm
13 Wochen	1,0664 cm	0,3 cm
13,5 Wochen	1,23485 cm	0,3 cm
14 Wochen	1,4016 cm	0,3 cm
14,5 Wochen	1,56665 cm	0,3 cm
15 Wochen	1,73 cm	0,3 cm
15,5 Wochen	1,89165 cm	0,3 cm
16 Wochen	2,0516 cm	0,3 cm
16,5 Wochen	2,20985 cm	0,3 cm
17 Wochen	2,3664 cm	0,3 cm
17,5 Wochen	2,52125 cm	0,3 cm
18 Wochen	2,6744 cm	0,3 cm
18,5 Wochen	2,82585 cm	0,3 cm
19 Wochen	2,9756 cm	0,3 cm
19,5 Wochen	3,12365 cm	0,3 cm
20 Wochen	3,27 cm	0,3 cm
20,5 Wochen	3,41465 cm	0,3 cm
21 Wochen	3,5576 cm	0,3 cm
21,5 Wochen	3,69885 cm	0,3 cm
22 Wochen	3,8384 cm	0,3 cm
22,5 Wochen	3,97625 cm	0,3 cm
23 Wochen	4,1124 cm	0,3 cm
23,5 Wochen	4,24685 cm	0,3 cm
24 Wochen	4,3796 cm	0,3 cm

GA (Woche)	FL (cm)	+/- 1 SD
24,5 Wochen	4,51065 cm	0,3 cm
25 Wochen	4,64 cm	0,3 cm
25,5 Wochen	4,76765 cm	0,3 cm
26 Wochen	4,8936 cm	0,3 cm
26,5 Wochen	5,01785 cm	0,3 cm
27 Wochen	5,1404 cm	0,3 cm
27,5 Wochen	5,26125 cm	0,3 cm
28 Wochen	5,3804 cm	0,3 cm
28,5 Wochen	5,49785 cm	0,3 cm
29 Wochen	5,6136 cm	0,3 cm
29,5 Wochen	5,72765 cm	0,3 cm
30 Wochen	5,84 cm	0,3 cm
30,5 Wochen	5,95065 cm	0,3 cm
31 Wochen	6,0596 cm	0,3 cm
31,5 Wochen	6,16685 cm	0,3 cm
32 Wochen	6,2724 cm	0,3 cm
32,5 Wochen	6,37625 cm	0,3 cm
33 Wochen	6,4784 cm	0,3 cm
33,5 Wochen	6,57885 cm	0,3 cm
34 Wochen	6,6776 cm	0,3 cm
34,5 Wochen	6,77465 cm	0,3 cm
35 Wochen	6,87 cm	0,3 cm
35,5 Wochen	6,96365 cm	0,3 cm
36 Wochen	7,0556 cm	0,3 cm
36,5 Wochen	7,14585 cm	0,3 cm
37 Wochen	7,2344 cm	0,3 cm
37,5 Wochen	7,32125 cm	0,3 cm
38 Wochen	7,4064 cm	0,3 cm
38,5 Wochen	7,48985 cm	0,3 cm
39 Wochen	7,5716 cm	0,3 cm
39,5 Wochen	7,65165 cm	0,3 cm
40 Wochen	7,73 cm	0,3 cm

FL NACH GA - JEANTY1984

Name: Jeanty 1984

Autor: Jeanty

Jahr: 1984

Literatur: Jeanty P und Romero R, Obstetrical Ultrasound, McGraw-Hill, 1984

GA (Woche)	FL (mm)	5%	95%
12 Wochen	8 mm	4 mm	13 mm
13 Wochen	11 mm	6 mm	16 mm
14 Wochen	14 mm	9 mm	18 mm
15 Wochen	17 mm	12 mm	21 mm
16 Wochen	20 mm	15 mm	24 mm
17 Wochen	23 mm	18 mm	27 mm
18 Wochen	25 mm	21 mm	30 mm
19 Wochen	28 mm	24 mm	33 mm
20 Wochen	31 mm	26 mm	36 mm
21 Wochen	34 mm	29 mm	38 mm
22 Wochen	36 mm	32 mm	41 mm
23 Wochen	39 mm	35 mm	44 mm
24 Wochen	42 mm	37 mm	46 mm
25 Wochen	44 mm	40 mm	49 mm
26 Wochen	47 mm	42 mm	51 mm
27 Wochen	49 mm	45 mm	54 mm
28 Wochen	52 mm	47 mm	56 mm
29 Wochen	54 mm	50 mm	59 mm
30 Wochen	56 mm	52 mm	61 mm
31 Wochen	59 mm	54 mm	63 mm
32 Wochen	61 mm	56 mm	65 mm
33 Wochen	63 mm	58 mm	67 mm
34 Wochen	65 mm	60 mm	69 mm
35 Wochen	67 mm	62 mm	71 mm
36 Wochen	68 mm	64 mm	73 mm

GA (Woche)	FL (mm)	5%	95%
37 Wochen	70 mm	65 mm	74 mm
38 Wochen	71 mm	67 mm	76 mm
39 Wochen	73 mm	68 mm	77 mm
40 Wochen	74 mm	70 mm	79 mm

FL NACH GA - MERZ1988

Name: Merz 1988

Autor: Merz

Jahr: 1988

Literatur: Merz E, Goldhofer W und Timor-Tritsch E , Ultrasound in Gynecology and Obstetrics, Textbook and Atlas, Georg Thieme Verlag , 1991

Kommentare: Von Merz, E., Habilitationsschrift, Universitäts-Frauenklinik Mainz, 1988

GA (Woche)	FL (mm)	5%	95%
12 Wochen	9 mm	5 mm	13 mm
13 Wochen	12 mm	8 mm	16 mm
14 Wochen	15 mm	11 mm	19 mm
15 Wochen	18 mm	14 mm	22 mm
16 Wochen	21 mm	17 mm	25 mm
17 Wochen	24 mm	20 mm	28 mm
18 Wochen	27 mm	22 mm	31 mm
19 Wochen	30 mm	25 mm	34 mm
20 Wochen	32 mm	28 mm	37 mm
21 Wochen	35 mm	31 mm	40 mm
22 Wochen	38 mm	34 mm	42 mm
23 Wochen	41 mm	36 mm	45 mm
24 Wochen	43 mm	39 mm	48 mm
25 Wochen	46 mm	41 mm	51 mm
26 Wochen	49 mm	44 mm	53 mm
27 Wochen	51 mm	46 mm	56 mm

GA (Woche)	FL (mm)	5%	95%
28 Wochen	53 mm	49 mm	58 mm
29 Wochen	56 mm	51 mm	61 mm
30 Wochen	58 mm	53 mm	63 mm
31 Wochen	60 mm	56 mm	65 mm
32 Wochen	63 mm	58 mm	68 mm
33 Wochen	65 mm	60 mm	70 mm
34 Wochen	67 mm	62 mm	72 mm
35 Wochen	69 mm	64 mm	74 mm
36 Wochen	71 mm	66 mm	76 mm
37 Wochen	73 mm	68 mm	78 mm
38 Wochen	75 mm	69 mm	80 mm
39 Wochen	76 mm	71 mm	82 mm
40 Wochen	78 mm	73 mm	84 mm

Kopfumfang (HC nach GA)

HC NACH GA - ASUM2003

Name: ASUM 2003

Autor: ASUM

Jahr: 2003

Literatur: ASUM und Campbell Westerway S , Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

Kommentare: Tabelle zum fetalen Wachstum, die aus ASUM-Gleichungen mit polynomialer Interpretation der Standardabweichungen erstellt wurde

GA (Woche)	HC (mm)	+/- 2 SD
11 Wochen	54,9661 mm	14,4875 mm
12 Wochen	69,5524 mm	14,7958 mm
13 Wochen	83,7989 mm	15,1475 mm
14 Wochen	97,7056 mm	15,5381 mm

GA (Woche)	HC (mm)	+/- 2 SD
15 Wochen	111,272 mm	15,9634 mm
16 Wochen	124,5 mm	16,4189 mm
17 Wochen	137,387 mm	16,9003 mm
18 Wochen	149,934 mm	17,4032 mm
19 Wochen	162,142 mm	17,9232 mm
20 Wochen	174,01 mm	18,4561 mm
21 Wochen	185,538 mm	18,9973 mm
22 Wochen	196,726 mm	19,5426 mm
23 Wochen	207,575 mm	20,0877 mm
24 Wochen	218,084 mm	20,628 mm
25 Wochen	228,252 mm	21,1593 mm
26 Wochen	238,082 mm	21,6772 mm
27 Wochen	247,571 mm	22,1773 mm
28 Wochen	256,72 mm	22,6553 mm
29 Wochen	265,53 mm	23,1068 mm
30 Wochen	274 mm	23,5274 mm
31 Wochen	282,13 mm	23,9128 mm
32 Wochen	289,92 mm	24,2586 mm
33 Wochen	297,371 mm	24,5604 mm
34 Wochen	304,482 mm	24,8139 mm
35 Wochen	311,252 mm	25,0148 mm
36 Wochen	317,684 mm	25,1585 mm
37 Wochen	323,775 mm	25,2409 mm
38 Wochen	329,526 mm	25,2574 mm
39 Wochen	334,938 mm	25,2039 mm
40 Wochen	340,01 mm	25,0758 mm
41 Wochen	344,742 mm	24,8688 mm

HC NACH GA - CFEF2000

Name: CFEF

Autor: CFEF

Jahr: 2000

Literatur: Crequat J, Duyme M und Brodaty G, Fetal growth charts by the French College of fetal ultrasonography and the Inserm U 155 , Biometry 2000, 28, pp 435-455, 2000

Kommentare: <http://cfef.org/>

GA (Woche)	HC (mm)	3%	10%	90%	97%
16 Wochen	120,86 mm	105,8 mm	110,58 mm	131,25 mm	136,11 mm
17 Wochen	134,49 mm	118,67 mm	123,78 mm	145,38 mm	150,39 mm
18 Wochen	147,55 mm	131,08 mm	136,36 mm	158,92 mm	164,11 mm
19 Wochen	160,29 mm	143 mm	148,53 mm	172,14 mm	177,48mm
20 Wochen	172,47 mm	154,53 mm	160,21 mm	184,86 mm	190,54 mm
21 Wochen	184,21 mm	165,41 mm	171,49 mm	197,12 mm	203,09 mm
22 Wochen	195,74 mm	176,12 mm	182,35 mm	208,91 mm	215,15 mm
23 Wochen	206,64 mm	186,32 mm	192,31 mm	220,26 mm	226,76 mm
24 Wochen	217,18 mm	196,19 mm	203 mm	231,39 mm	238 mm
25 Wochen	227,32 mm	205,5 mm	212,4 mm	241,91 mm	248,81 mm
26 Wochen	236,72 mm	214,44 mm	221,57 mm	252 mm	259,23 mm
27 Wochen	246 mm	222,87 mm	230,33 mm	261,75 mm	269,13 mm
28 Wochen	254,77 mm	231 mm	238,56 mm	271 mm	278,57 mm
29 Wochen	263 mm	238,4 mm	246,35 mm	279,71 mm	287,56 mm
30 Wochen	270,84 mm	245,86 mm	253,74 mm	288,13 mm	296 mm
31 Wochen	278,33 mm	252,54 mm	260,81 mm	296 mm	304,27 mm
32 Wochen	285,29 mm	258,86 mm	267,22 mm	303,54 mm	312 mm
33 Wochen	292 mm	264,62mm	273,38 mm	310,4 mm	319,1 mm
34 Wochen	298,1 mm	270,14 mm	279 mm	317 mm	325,91 mm
35 Wochen	303,62 mm	275,33 mm	284,23 mm	323 mm	332,16 mm
36 Wochen	308,81 mm	279,79 mm	289 mm	328,75 mm	338 mm
37 Wochen	313,52 mm	283,9 mm	293,32 mm	334 mm	343,34 mm
38 Wochen	317,88 mm	287,63 mm	297,29 mm	338,64 mm	348,29 mm
39 Wochen	321,86 mm	290,88 mm	300,76 mm	343 mm	352,67 mm
40 Wochen	324 mm	293 mm	303 mm	346 mm	356 mm

HC NACH GA - HADLOCK1984

Name: Hadlock 1984

Autor: Hadlock

Jahr: 1984

Literatur: Hadlock F.P, Deter R.L, Harrist R.B. und Park S.K
Estimating fetal age: computer-assisted analysis of multiple fetal growth parameters, Radiology, 152, pp 497-501, 1984

GA (Woche)	HC (cm)	+/- 1 SD
12 Wochen	6,79971 cm	1 cm
12,5 Wochen	7,52234 cm	1 cm
13 Wochen	8,2402 cm	1 cm
13,5 Wochen	8,9531 cm	1 cm
14 Wochen	9,66083 cm	1 cm
14,5 Wochen	10,3632 cm	1 cm
15 Wochen	11,0601 cm	1 cm
15,5 Wochen	11,7512 cm	1 cm
16 Wochen	12,4363 cm	1 cm
16,5 Wochen	13,1154 cm	1 cm
17 Wochen	13,7882 cm	1 cm
17,5 Wochen	14,4544 cm	1 cm
18 Wochen	15,114 cm	1 cm
18,5 Wochen	15,7667 cm	1 cm
19 Wochen	16,4123 cm	1 cm
19,5 Wochen	17,0507 cm	1 cm
20 Wochen	17,6816 cm	1 cm
20,5 Wochen	18,3049 cm	1 cm
21 Wochen	18,9203 cm	1 cm
21,5 Wochen	19,5277 cm	1 cm
22 Wochen	20,1269 cm	1 cm
22,5 Wochen	20,7177 cm	1 cm
23 Wochen	21,2998 cm	1 cm
23,5 Wochen	21,8732 cm	1 cm
24 Wochen	22,4376 cm	1 cm

GA (Woche)	HC (cm)	+/- 1 SD
24,5 Wochen	22,9929 cm	1 cm
25 Wochen	23,5388 cm	1 cm
25,5 Wochen	24,0751 cm	1 cm
26 Wochen	24,6016 cm	1 cm
26,5 Wochen	25,1183 cm	1 cm
27 Wochen	25,6248 cm	1 cm
27,5 Wochen	26,121 cm	1 cm
28 Wochen	26,6066 cm	1 cm
28,5 Wochen	27,0816 cm	1 cm
29 Wochen	27,5457 cm	1 cm
29,5 Wochen	27,9987 cm	1 cm
30 Wochen	28,4404 cm	1 cm
30,5 Wochen	28,8707 cm	1 cm
31 Wochen	29,2893 cm	1 cm
31,5 Wochen	29,696 cm	1 cm
32 Wochen	30,0907 cm	1 cm
32,5 Wochen	30,4732 cm	1 cm
33 Wochen	30,8433 cm	1 cm
33,5 Wochen	31,2007 cm	1 cm
34 Wochen	31,5453 cm	1 cm
34,5 Wochen	31,877 cm	1 cm
35 Wochen	32,1955 cm	1 cm
35,5 Wochen	32,5005 cm	1 cm
36 Wochen	32,7921 cm	1 cm
36,5 Wochen	33,0698 cm	1 cm
37 Wochen	33,3336 cm	1 cm
37,5 Wochen	33,5833 cm	1 cm
38 Wochen	33,8186 cm	1 cm
38,5 Wochen	34,0394 cm	1 cm
39 Wochen	34,2455 cm	1 cm
39,5 Wochen	34,4367 cm	1 cm
40 Wochen	34,6128 cm	1 cm

HC NACH GA - JEANTY1984

Name: Jeanty 1984

Autor: Jeanty

Jahr: 1984

Literatur: Jeanty P und Romero R, Obstetrical Ultrasound, McGraw-Hill, 1984

GA (Woche)	HC (mm)	5%	95%
12 Wochen	75 mm	51 mm	100 mm
13 Wochen	88 mm	64 mm	112 mm
14 Wochen	101 mm	76 mm	125 mm
15 Wochen	113 mm	89 mm	138 mm
16 Wochen	126 mm	101 mm	150 mm
17 Wochen	138 mm	114 mm	163 mm
18 Wochen	151 mm	126 mm	175 mm
19 Wochen	163 mm	138 mm	187 mm
20 Wochen	175 mm	150 mm	199 mm
21 Wochen	187 mm	162 mm	211 mm
22 Wochen	198 mm	174 mm	223 mm
23 Wochen	210 mm	185 mm	234 mm
24 Wochen	221 mm	196 mm	245 mm
25 Wochen	232 mm	207 mm	256 mm
26 Wochen	242 mm	218 mm	266 mm
27 Wochen	252 mm	228 mm	277 mm
28 Wochen	262 mm	238 mm	286 mm
29 Wochen	271 mm	247 mm	296 mm
30 Wochen	281 mm	256 mm	305 mm
31 Wochen	289 mm	265 mm	313 mm
32 Wochen	297 mm	273 mm	322 mm
33 Wochen	305 mm	281 mm	329 mm
34 Wochen	312 mm	288 mm	336 mm
35 Wochen	319 mm	294 mm	343 mm
36 Wochen	325 mm	300 mm	349 mm

GA (Woche)	HC (mm)	5%	95%
37 Wochen	330 mm	306 mm	355 mm
38 Wochen	335 mm	311 mm	359 mm
39 Wochen	339 mm	315 mm	364 mm
40 Wochen	343 mm	319 mm	367 mm

HC NACH GA - MERZ1988

Name: Merz 1988

Autor: Merz

Jahr: 1988

Literatur: Merz E, Goldhofer W und Timor-Tritsch E , Ultrasound in Gynecology and Obstetrics, Textbook and Atlas, Georg Thieme Verlag , 1991

Kommentare: Von Merz, E., Habilitationsschrift, Universitäts-Frauenklinik Mainz, 1988

GA (Woche)	HC (mm)	5%	95%
12 Wochen	76 mm	63 mm	90 mm
13 Wochen	90 mm	77 mm	104 mm
14 Wochen	104 mm	90 mm	118 mm
15 Wochen	117 mm	104 mm	132 mm
16 Wochen	131 mm	117 mm	146 mm
17 Wochen	144 mm	130 mm	159 mm
18 Wochen	157 mm	142 mm	172 mm
19 Wochen	169 mm	155 mm	185 mm
20 Wochen	182 mm	167 mm	197 mm
21 Wochen	194 mm	179 mm	210 mm
22 Wochen	205 mm	190 mm	222 mm
23 Wochen	217 mm	201 mm	233 mm
24 Wochen	228 mm	212 mm	245 mm
25 Wochen	239 mm	223 mm	256 mm
26 Wochen	249 mm	233 mm	266 mm
27 Wochen	259 mm	243 mm	277 mm

GA (Woche)	HC (mm)	5%	95%
28 Wochen	269 mm	253 mm	287 mm
29 Wochen	279 mm	262 mm	296 mm
30 Wochen	288 mm	271 mm	306 mm
31 Wochen	296 mm	279 mm	315 mm
32 Wochen	305 mm	288 mm	323 mm
33 Wochen	313 mm	296 mm	332 mm
34 Wochen	321 mm	303 mm	340 mm
35 Wochen	328 mm	311 mm	347 mm
36 Wochen	336 mm	318 mm	355 mm
37 Wochen	342 mm	324 mm	362 mm
38 Wochen	349 mm	331 mm	368 mm
39 Wochen	355 mm	337 mm	375 mm
40 Wochen	361 mm	343 mm	381 mm

Humeruslänge (HL nach GA)

HL NACH GA - ASUM2003

Name: ASUM 2003

Autor: ASUM

Jahr: 2003

Literatur: ASUM und Campbell Westerway S , Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

Kommentare: Tabelle zum fetalen Wachstum, die aus ASUM-Gleichungen mit polynomialer Interpretation der Standardabweichungen erstellt wurde

GA (Woche)	HL (mm)	+/- 2 SD
11 Wochen	6,496 mm	2,5658 mm
12 Wochen	9,4544 mm	3,03711 mm
13 Wochen	12,3586 mm	3,44905 mm
14 Wochen	15,208 mm	3,80497 mm

GA (Woche)	HL (mm)	+/- 2 SD
15 Wochen	18,002 mm	4,10823 mm
16 Wochen	20,74 mm	4,36216 mm
17 Wochen	23,4214 mm	4,57012 mm
18 Wochen	26,0456 mm	4,73545 mm
19 Wochen	28,612 mm	4,8615 mm
20 Wochen	31,12 mm	4,95163 mm
21 Wochen	33,569 mm	5,00917 mm
22 Wochen	35,9584 mm	5,03748 mm
23 Wochen	38,2876 mm	5,0399 mm
24 Wochen	40,556 mm	5,01978 mm
25 Wochen	42,763 mm	4,98048 mm
26 Wochen	44,908 mm	4,92533 mm
27 Wochen	46,9904 mm	4,85769 mm
28 Wochen	49,0096 mm	4,7809 mm
29 Wochen	50,965 mm	4,69831 mm
30 Wochen	52,856 mm	4,61328 mm
31 Wochen	54,682 mm	4,52914 mm
32 Wochen	56,4424 mm	4,44925 mm
33 Wochen	58,1366 mm	4,37695 mm
34 Wochen	59,764 mm	4,31559 mm
35 Wochen	61,324 mm	4,26853 mm
36 Wochen	62,816 mm	4,2391 mm
37 Wochen	64,2394 mm	4,23066 mm
38 Wochen	65,5936 mm	4,24655 mm
39 Wochen	66,878 mm	4,29012 mm
40 Wochen	68,092 mm	4,36473 mm
41 Wochen	69,235 mm	4,47371 mm

HL NACH GA - JEANTY1984

Name: Jeanty 1984

Autor: Jeanty

Jahr: 1984

Literatur: Jeanty P und Romero R, Obstetrical Ultrasound, McGraw-Hill, 1984

GA (Woche)	HL (mm)	5%	95%
12 Wochen	9 mm		
13 Wochen	11 mm	6 mm	16 mm
14 Wochen	14 mm	9 mm	19 mm
15 Wochen	17 mm	12 mm	22 mm
16 Wochen	20 mm	15 mm	25 mm
17 Wochen	22 mm	18 mm	27 mm
18 Wochen	25 mm	20 mm	30 mm
19 Wochen	28 mm	23 mm	33 mm
20 Wochen	30 mm	25 mm	35 mm
21 Wochen	33 mm	28 mm	38 mm
22 Wochen	35 mm	30 mm	40 mm
23 Wochen	38 mm	33 mm	42 mm
24 Wochen	40 mm	35 mm	45 mm
25 Wochen	42 mm	37 mm	47 mm
26 Wochen	44 mm	39 mm	49 mm
27 Wochen	46 mm	41 mm	51 mm
28 Wochen	48 mm	43 mm	53 mm
29 Wochen	50 mm	45 mm	55 mm
30 Wochen	51 mm	47 mm	56 mm
31 Wochen	53 mm	48 mm	58 mm
32 Wochen	55 mm	50 mm	60 mm
33 Wochen	56 mm	51 mm	61 mm
34 Wochen	58 mm	53 mm	63 mm
35 Wochen	59 mm	54 mm	64 mm
36 Wochen	61 mm	56 mm	65 mm
37 Wochen	62 mm	57 mm	67 mm
38 Wochen	63 mm	59 mm	68 mm
39 Wochen	65 mm	60 mm	70 mm
40 Wochen	66 mm	61 mm	71 mm

Frontooccipitaler Durchmesser (FOD nach GA)

OFD VON GA – ASUM2003

Name: ASUM 2003

Autor: ASUM

Jahr: 2003

Literatur: ASUM und Campbell Westerway S , Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

Kommentare: Tabelle zum fetalen Wachstum, die aus ASUM-Gleichungen mit polynomialer Interpretation der Standardabweichungen erstellt wurde

GA (Woche)	FOD (mm)	+/- 2 SD
11 Wochen	18,6426 mm	2,20666 mm
12 Wochen	24,0012 mm	2,36762 mm
13 Wochen	29,2268 mm	2,52938 mm
14 Wochen	34,3194 mm	2,6916 mm
15 Wochen	39,279 mm	2,85394 mm
16 Wochen	44,1056 mm	3,01606 mm
17 Wochen	48,7992 mm	3,1776 mm
18 Wochen	53,3598 mm	3,33824 mm
19 Wochen	57,7874 mm	3,49763 mm
20 Wochen	62,082 mm	3,65542 mm
21 Wochen	66,2436 mm	3,81128 mm
22 Wochen	70,2722 mm	3,96486
23 Wochen	74,1678 mm	4,11583 mm
24 Wochen	77,9304 mm	4,26383 mm
25 Wochen	81,56 mm	4,40853 mm
26 Wochen	85,0566 mm	4,54958 mm
27 Wochen	88,4202 mm	4,68665 mm
28 Wochen	91,6508 mm	4,81939 mm
29 Wochen	94,7484 mm	4,94745 mm

GA (Woche)	FOD (mm)	+/- 2 SD
30 Wochen	97,713 mm	5,07051 mm
31 Wochen	100,545 mm	5,18821 mm
32 Wochen	103,243 mm	5,30021 mm
33 Wochen	105,809 mm	5,40617 mm
34 Wochen	108,241 mm	5,50575 mm
35 Wochen	110,541 mm	5,59861 mm
36 Wochen	112,708 mm	5,68441 mm
37 Wochen	114,741 mm	5,76279 mm
38 Wochen	116,642 mm	5,83343 mm
39 Wochen	118,409 mm	5,89598 mm
40 Wochen	120,044 mm	5,95009 mm
41 Wochen	121,546 mm	5,99543 mm

Transverser Abdomendurchmesser (TAD nach GA)

TAD VON GA – CFEF2000

Name: CFEF

Autor: CFEF

Jahr: 2000

Literatur: Crequat J, Duyme M und Brodaty G, Fetal growth charts by the French College of fetal ultrasonography and the Inserm U 155 , Biometry 2000, 28, pp 435-455, 2000

Kommentare: <http://cfef.org/>

GA (Woche)	TAD (mm)	3%	10%	90%	97%
11 Wochen	13,5 mm	9,68 mm	11 mm	16 mm	17,25 mm
12 Wochen	17 mm	12,68 mm	14 mm	20 mm	21,46 mm
13 Wochen	20,56 mm	15,6 mm	17,25 mm	24 mm	25,51 mm
14 Wochen	24 mm	18,69 mm	20,41 mm	27,84 mm	29,56 mm

GA (Woche)	TAD (mm)	3%	10%	90%	97%
15 Wochen	27,69 mm	21,76 mm	23,64 mm	31,74 mm	33,61 mm
16 Wochen	31,21 mm	25 mm	27 mm	35,53 mm	37,48 mm
17 Wochen	34,7 mm	28,23 mm	30,34 mm	39,21 mm	41,39 mm
18 Wochen	38,31 mm	31,54 mm	33,64 mm	42,89 mm	45,14 mm
19 Wochen	41,69 mm	34,78 mm	37 mm	46,42 mm	48,59 mm
20 Wochen	45,21 mm	38,16 mm	40,26 mm	50 mm	52,2 mm
21 Wochen	48,34 mm	41,14 mm	43,46 mm	53,22 mm	55,63 mm
22 Wochen	51,57 mm	44,21 mm	46,61 mm	56,75 mm	59,08 mm
23 Wochen	54,72 mm	47 mm	49,47 mm	60 mm	62,46 mm
24 Wochen	57,88 mm	49,77 mm	52,39 mm	63,43 mm	66 mm
25 Wochen	61 mm	52,54 mm	55,18 mm	66,74 mm	69,44 mm
26 Wochen	64 mm	55,17 mm	58 mm	70,12 mm	72,89 mm
27 Wochen	67,11 mm	57,72 mm	60,73 mm	73,42 mm	76,42 mm
28 Wochen	70,27 mm	60,43 mm	63,58 mm	76,8 mm	79,87 mm
29 Wochen	73,27 mm	63,13 mm	66,36 mm	80,17 mm	83,33 mm
30 Wochen	76,17 mm	65,8 mm	69,17 mm	83,45 mm	86,75 mm
31 Wochen	79,25 mm	68,35 mm	71,88 mm	86,68 mm	90,13 mm
32 Wochen	82,1 mm	70,9 mm	74,43 mm	89,76 mm	93,36 mm
33 Wochen	84,78 mm	73,08 mm	76,75 mm	92,89 mm	96,64 mm
34 Wochen	87,55 mm	75,25 mm	79,08 mm	95,89 mm	99,86 mm
35 Wochen	90 mm	77 mm	81,1 mm	99 mm	103 mm
36 Wochen	92,36 mm	78,48 mm	82,9 mm	102 mm	106,31 mm
37 Wochen	94,81 mm	79,79 mm	84,6 mm	105 mm	109,67 mm
38 Wochen	97 mm	80,92 mm	86,1 mm	108,19 mm	113,29 mm
39 Wochen	99,33 mm	81,85 mm	87,41 mm	111,34 mm	117 mm
40 Wochen	101,64 mm	82,58 mm	88,59 mm	114,52 mm	120,7 mm
41 Wochen	103 mm	82,8 mm	89,2 mm	117 mm	123 mm

Tibia (TIB nach GA)

TIB VON GA – JEANTY1984

Name: Jeanty 1984

Autor: Jeanty

Jahr: 1984

Literatur: Jeanty P und Romero R, Obstetrical Ultrasound, McGraw-Hill, 1984

GA (Woche)	TIB (mm)	5%	95%
12 Wochen	7 mm		
13 Wochen	10 mm		
14 Wochen	12 mm	7 mm	17 mm
15 Wochen	15 mm	9 mm	20 mm
16 Wochen	17 mm	12 mm	22 mm
17 Wochen	20 mm	15 mm	25 mm
18 Wochen	22 mm	17 mm	27 mm
19 Wochen	25 mm	20 mm	30 mm
20 Wochen	27 mm	22 mm	33 mm
21 Wochen	30 mm	25 mm	35 mm
22 Wochen	32 mm	27 mm	38 mm
23 Wochen	35 mm	30 mm	40 mm
24 Wochen	37 mm	32 mm	42 mm
25 Wochen	40 mm	34 mm	45 mm
26 Wochen	42 mm	37 mm	47 mm
27 Wochen	44 mm	39 mm	49 mm
28 Wochen	46 mm	41 mm	51 mm
29 Wochen	48 mm	43 mm	53 mm
30 Wochen	50 mm	45 mm	55 mm
31 Wochen	52 mm	47 mm	57 mm
32 Wochen	54 mm	48 mm	59 mm
33 Wochen	55 mm	50 mm	60 mm

GA (Woche)	TIB (mm)	5%	95%
34 Wochen	57 mm	52 mm	62 mm
35 Wochen	58 mm	53 mm	64 mm
36 Wochen	60 mm	55 mm	65 mm
37 Wochen	61 mm	56 mm	67 mm
38 Wochen	63 mm	58 mm	68 mm
39 Wochen	64 mm	59 mm	69 mm
40 Wochen	66 mm	61 mm	71 mm

Ulna (ULNA nach GA)

ULNA NACH GA – JEANTY1984

Name: Jeanty 1984

Autor: Jeanty

Jahr: 1984

Literatur: Jeanty P und Romero R, Obstetrical Ultrasound, McGraw-Hill, 1984

GA (Woche)	ULNA (mm)	5%	95%
12 Wochen	7 mm	3 mm	11 mm
13 Wochen	10 mm	5 mm	15 mm
14 Wochen	13 mm	8 mm	18 mm
15 Wochen	16 mm	11 mm	21 mm
16 Wochen	18 mm	13 mm	23 mm
17 Wochen	21 mm	16 mm	26 mm
18 Wochen	24 mm	19 mm	29 mm
19 Wochen	26 mm	21 mm	31 mm
20 Wochen	29 mm	24 mm	34 mm
21 Wochen	31 mm	26 mm	36 mm
22 Wochen	33 mm	28 mm	38 mm
23 Wochen	36 mm	31 mm	41 mm
24 Wochen	38 mm	33 mm	43 mm

GA (Woche)	ULNA (mm)	5%	95%
25 Wochen	40 mm	35 mm	45 mm
26 Wochen	42 mm	37 mm	47 mm
27 Wochen	44 mm	39 mm	49 mm
28 Wochen	46 mm	41 mm	51 mm
29 Wochen	48 mm	43 mm	53 mm
30 Wochen	49 mm	44 mm	54 mm
31 Wochen	51 mm	46 mm	56 mm
32 Wochen	53 mm	48 mm	58 mm
33 Wochen	54 mm	49 mm	59 mm
34 Wochen	56 mm	51 mm	61 mm
35 Wochen	57 mm	52 mm	62 mm
36 Wochen	58 mm	53 mm	63 mm
37 Wochen	60 mm	55 mm	65 mm
38 Wochen	61 mm	56 mm	66 mm
39 Wochen	62 mm	57 mm	67 mm
40 Wochen	63 mm	58 mm	68 mm

Gleich. u. Tab. zum Gestationsalter

Abdomenumfang (GA nach AU)

GA NACH AU - ASUM2003

Name: ASUM 2003

Autor: ASUM

Jahr: 2003

Literatur: ASUM und Campbell Westerway S , Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

Eingangsparameter: AU (mm)

Mindestgrenze: 52

Höchstgrenze: 367

Ausgang: GA (Woche)

Gleichung:

$$0,0000367* _AU* _AU + 0,07715 * _AU + 7,192$$

GA NACH AU - CFEF2000

Name: CFEF

Autor: CFEF

Jahr: 2000

Literatur: Crequat J, Duyme M und Brodaty G, Fetal growth charts by the French College of fetal ultrasonography and the Inserm U 155 , Biometry 2000, 28, pp 435-455, 2000

Kommentare: <http://cfef.org/>

AU (mm)	GA (Woche)
95 mm	15 Wochen
106,4 mm	16 Wochen
118 mm	17 Wochen
129,2 mm	18 Wochen
140,4 mm	19 Wochen
151,4 mm	20 Wochen
162,3 mm	21 Wochen
173 mm	22 Wochen
183,6 mm	23 Wochen
194 mm	24 Wochen
204,4 mm	25 Wochen
214,5 mm	26 Wochen
224,5 mm	27 Wochen
234,4 mm	28 Wochen
244 mm	29 Wochen
253,6 mm	30 Wochen

AU (mm)	GA (Woche)
263 mm	31 Wochen
272,2 mm	32 Wochen
281,2 mm	33 Wochen
290,2 mm	34 Wochen
298,8 mm	35 Wochen
307,4 mm	36 Wochen
316 mm	37 Wochen
324,7 mm	38 Wochen
332,4 mm	39 Wochen
339 mm	40 Wochen

GA NACH AU - HADLOCK1984

Name: Hadlock 1984

Autor: Hadlock

Jahr: 1984

Literatur: Hadlock F.P, Deter R.L, Harrist R.B. und Park S.K
Estimating fetal age: computer-assisted analysis of multiple fetal growth parameters, Radiology, 152, pp 497-501, 1984

AU (cm)	GA (Woche)	+/- 2 SD
4,6 cm	11,68 Wochen	1,66 Wochen
5,3 cm	12,232 Wochen	1,66 Wochen
6 cm	12,7876 Wochen	1,66 Wochen
6,7 cm	13,3467 Wochen	1,66 Wochen
7,3 cm	13,8287 Wochen	1,66 Wochen
8 cm	14,3944 Wochen	1,66 Wochen
8,6 cm	14,8821 Wochen	1,66 Wochen
9,3 cm	15,4543 Wochen	1,66 Wochen
9,9 cm	15,9475 Wochen	1,66 Wochen
10,6 cm	16,5263 Wochen	1,66 Wochen
11,2 cm	17,0252 Wochen	1,66 Wochen
11,9 cm	17,6105 Wochen	1,66 Wochen

AU (cm)	GA (Woche)	+/- 2 SD
12,5 cm	18,115 Wochen	2,06 Wochen
13,1 cm	18,6221 Wochen	2,06 Wochen
13,7 cm	19,1318 Wochen	2,06 Wochen
14,4 cm	19,7297 Wochen	2,06 Wochen
15 cm	20,245 Wochen	2,06 Wochen
15,6 cm	20,7629 Wochen	2,06 Wochen
16,2 cm	21,2834 Wochen	2,06 Wochen
16,8 cm	21,8065 Wochen	2,06 Wochen
17,4 cm	22,3321 Wochen	2,06 Wochen
17,9 cm	22,7722 Wochen	2,06 Wochen
18,5 cm	23,3026 Wochen	2,06 Wochen
19,1 cm	23,8356 Wochen	2,06 Wochen
19,7 cm	24,3712 Wochen	2,18 Wochen
20,2 cm	24,8195 Wochen	2,18 Wochen
20,8 cm	25,3599 Wochen	2,18 Wochen
21,3 cm	25,8122 Wochen	2,18 Wochen
21,9 cm	26,3573 Wochen	2,18 Wochen
22,4 cm	26,8135 Wochen	2,18 Wochen
23 cm	27,3634 Wochen	2,18 Wochen
23,5 cm	27,8236 Wochen	2,18 Wochen
24 cm	28,2856 Wochen	2,18 Wochen
24,6 cm	28,8424 Wochen	2,18 Wochen
25,1 cm	29,3083 Wochen	2,18 Wochen
25,6 cm	29,7761 Wochen	2,18 Wochen
26,1 cm	30,2457 Wochen	2,96 Wochen
26,6 cm	30,717 Wochen	2,96 Wochen
27,1 cm	31,1902 Wochen	2,96 Wochen
27,6 cm	31,6651 Wochen	2,96 Wochen
28,1 cm	32,1419 Wochen	2,96 Wochen
28,6 cm	32,6205 Wochen	2,96 Wochen
29,1 cm	33,1008 Wochen	2,96 Wochen
29,5 cm	33,4864 Wochen	2,96 Wochen

AU (cm)	GA (Woche)	+/- 2 SD
30 cm	33,97 Wochen	2,96 Wochen
30,5 cm	34,4554 Wochen	2,96 Wochen
30,9 cm	34,845 Wochen	2,96 Wochen
31,4 cm	35,3337 Wochen	2,96 Wochen
31,8 cm	35,7259 Wochen	3,04 Wochen
32,3 cm	36,2177 Wochen	3,04 Wochen
32,7 cm	36,6125 Wochen	3,04 Wochen
33,2 cm	37,1077 Wochen	3,04 Wochen
33,6 cm	37,5051 Wochen	3,04 Wochen
34 cm	37,9036 Wochen	3,04 Wochen
34,4 cm	38,3033 Wochen	3,04 Wochen
34,8 cm	38,7041 Wochen	3,04 Wochen
35,3 cm	39,2068 Wochen	3,04 Wochen

GA NACH AU - HANSMANN1986

Name: Hansmann 1986

Autor: Hansmann

Jahr: 1986

Literatur: Hansmann, Hackeloer, Staudach und Wittman, Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology, Springer-Verlag, New York, 1986

AU (cm)	GA (Woche)
5,3 cm	12 Wochen
6,3 cm	13 Wochen
7,5 cm	14 Wochen
8,5 cm	15 Wochen
9,7 cm	16 Wochen
10,7 cm	17 Wochen
11,6 cm	18 Wochen
12,6 cm	19 Wochen

AU (cm)	GA (Woche)
13,5 cm	20 Wochen
14,5 cm	21 Wochen
15,5 cm	22 Wochen
16,5 cm	23 Wochen
17,3 cm	24 Wochen
18,3 cm	25 Wochen
19,1 cm	26 Wochen
20,2 cm	27 Wochen
21,1 cm	28 Wochen
22,2 cm	29 Wochen
23 cm	30 Wochen
24 cm	31 Wochen
24,9 cm	32 Wochen
25,8 cm	33 Wochen
26,8 cm	34 Wochen
27,7 cm	35 Wochen
28,7 cm	36 Wochen
29,6 cm	37 Wochen
30,6 cm	38 Wochen
31,5 cm	39 Wochen
32 cm	40 Wochen

GA NACH AU - MERZ1988

Name: Merz 1988

Autor: Merz

Jahr: 1988

Literatur: Merz E, Goldhofer W und Timor-Tritsch E , Ultrasound in Gynecology and Obstetrics, Textbook and Atlas, Georg Thieme Verlag , 1991

Kommentare: Von Merz, E., Habilitationsschrift, Universitäts-Frauenklinik Mainz, 1988

AU (mm)	GA (EW)	5%	95%
56 mm	12W1T	10W6T	13W2T
58 mm	12W2T	11W1T	13W4T
60 mm	12W4T	11W2T	13W5T
62 mm	12W5T	11W4T	13W6T
64 mm	12W6T	11W5T	14W1T
66 mm	13W1T	11W6T	14W2T
68 mm	13W2T	12W0T	14W4T
70 mm	13W4T	12W1T	14W5T
72 mm	13W4T	12W3T	14W6T
74 mm	13W6T	12W4T	15W1T
76 mm	14W0T	12W6T	15W2T
78 mm	14W1T	12W6T	15W4T
80 mm	14W3T	13W1T	15W5T
82 mm	14W4T	13W2T	15W6T
84 mm	14W6T	13W4T	16W1T
86 mm	15W0T	13W5T	16W2T
88 mm	15W1T	13W6T	16W4T
90 mm	15W3T	14W0T	16W5T
92 mm	15W4T	14W1T	16W6T
94 mm	15W5T	14W3T	17W1T
96 mm	15W6T	14W4T	17W2T
98 mm	16W1T	14W6T	17W4T
100 mm	16W2T	14W6T	17W5T
102 mm	16W4T	15W1T	17W6T
104 mm	16W5T	15W2T	18W1T
106 mm	16W6T	15W4T	18W2T
108 mm	17W1T	15W5T	18W3T
110 mm	17W2T	15W6T	18W4T
112 mm	17W3T	16W0T	18W6T
114 mm	17W4T	16W1T	19W0T
116 mm	17W6T	16W3T	19W1T
118 mm	18W0T	16W4T	19W3T

AU (mm)	GA (EW)	5%	95%
120 mm	18W1T	16W6T	19W4T
122 mm	18W3T	17W0T	19W6T
124 mm	18W4T	17W1T	20W0T
126 mm	18W6T	17W2T	20W1T
128 mm	19W0T	17W4T	20W3T
130 mm	19W1T	17W5T	20W4T
132 mm	19W2T	17W6T	20W6T
134 mm	19W4T	18W0T	21W0T
136 mm	19W5T	18W1T	21W1T
138 mm	19W6T	18W3T	21W3T
140 mm	20W1T	18W4T	21W4T
142 mm	20W2T	18W6T	21W6T
144 mm	20W4T	19W0T	22W0T
146 mm	20W5T	19W1T	22W1T
148 mm	20W6T	19W2T	22W3T
150 mm	21W1T	19W4T	22W4T
152 mm	21W1T	19W5T	22W6T
154 mm	21W3T	19W6T	23W0T
156 mm	21W4T	20W1T	23W1T
158 mm	21W6T	20W1T	23W3T
160 mm	22W0T	20W3T	23W4T
162 mm	22W1T	20W4T	23W6T
164 mm	22W3T	20W6T	24W0T
166 mm	22W4T	21W0T	24W1T
168 mm	22W6T	21W1T	24W3T
170 mm	23W0T	21W2T	24W4T
172 mm	23W1T	21W4T	24W6T
174 mm	23W2T	21W5T	25W0T
176 mm	23W4T	21W6T	25W1T
178 mm	23W5T	22W1T	25W3T
180 mm	23W6T	22W1T	25W4T
182 mm	24W1T	22W3T	25W6T

AU (mm)	GA (EW)	5%	95%
184 mm	24W2T	22W4T	26W0T
186 mm	24W4T	22W6T	26W1T
188 mm	24W5T	23W0T	26W3T
190 mm	24W6T	23W1T	26W4T
192 mm	25W0T	23W2T	26W6T
194 mm	25W1T	23W4T	27W0T
196 mm	25W3T	23W5T	27W1T
198 mm	25W4T	23W6T	27W3T
200 mm	25W6T	24W1T	27W4T
202 mm	26W0T	24W2T	27W6T
204 mm	26W1T	24W3T	27W6T
206 mm	26W3T	24W4T	28W1T
208 mm	26W4T	24W6T	28W2T
210 mm	26W6T	25W0T	28W4T
212 mm	27W0T	25W1T	28W5T
214 mm	27W1T	25W2T	28W6T
216 mm	27W2T	25W4T	29W1T
218 mm	27W4T	25W5T	29W2T
220 mm	27W5T	25W6T	29W4T
222 mm	27W6T	26W1T	29W5T
224 mm	28W1T	26W2T	29W6T
226 mm	28W2T	26W3T	30W1T
228 mm	28W4T	26W4T	30W2T
230 mm	28W5T	26W6T	30W4T
232 mm	28W6T	27W0T	30W5T
234 mm	29W0T	27W1T	30W6T
236 mm	29W1T	27W3T	31W1T
238 mm	29W3T	27W4T	31W2T
240 mm	29W4T	27W5T	31W4T
242 mm	29W6T	27W6T	31W5T
244 mm	30W0T	28W1T	31W6T
246 mm	30W1T	28W2T	32W1T

AU (mm)	GA (EW)	5%	95%
248 mm	30W3T	28W3T	32W2T
250 mm	30W4T	28W4T	32W4T
252 mm	30W6T	28W6T	32W5T
254 mm	30W6T	29W0T	32W6T
256 mm	31W1T	29W1T	33W1T
258 mm	31W2T	29W3T	33W2T
260 mm	31W4T	29W4T	33W4T
262 mm	31W5T	29W5T	33W5T
264 mm	31W6T	29W6T	33W6T
266 mm	32W1T	30W1T	34W1T
268 mm	32W2T	30W2T	34W2T
270 mm	32W4T	30W4T	34W4T
272 mm	32W5T	30W4T	34W5T
274 mm	32W6T	30W6T	34W6T
276 mm	33W0T	31W0T	35W1T
278 mm	33W1T	31W1T	35W2T
280 mm	33W3T	31W3T	35W4T
282 mm	33W4T	31W4T	35W5T
284 mm	33W6T	31W5T	35W6T
286 mm	34W0T	31W6T	36W1T
288 mm	34W1T	32W1T	36W2T
290 mm	34W3T	32W2T	36W4T
292 mm	34W4T	32W4T	36W5T
294 mm	34W5T	32W4T	36W6T
296 mm	34W6T	32W6T	37W1T
298 mm	35W1T	33W0T	37W1T
300 mm	35W2T	33W1T	37W3T
302 mm	35W4T	33W3T	37W4T
304 mm	35W5T	33W4T	37W6T
306 mm	35W6T	33W5T	38W0T
308 mm	36W1T	33W6T	38W1T
310 mm	36W2T	34W1T	38W3T

AU (mm)	GA (EW)	5%	95%
312 mm	36W4T	34W2T	38W4T
314 mm	36W4T	34W4T	38W6T
316 mm	36W6T	34W4T	39W0T
318 mm	37W0T	34W6T	39W1T
320 mm	37W1T	35W0T	39W3T
322 mm	37W3T	35W1T	39W4T
324 mm	37W4T	35W3T	39W6T
326 mm	37W6T	35W4T	40W0T
328 mm	38W0T	35W5T	40W1T
330 mm	38W1T	35W6T	40W3T
332 mm	38W3T	36W1T	40W4T
334 mm	38W4T	36W2T	40W6T
336 mm	38W5T	36W4T	41W0T
338 mm	38W6T	36W5T	41W1T
340 mm	39W1T	36W6T	41W3T
342 mm	39W2T	37W0T	41W4T
344 mm	39W4T	37W1T	41W6T
346 mm	39W5T	37W3T	42W0T
348 mm	39W6T	37W4T	42W1T

Biparietaler Durchmesser (GA nach BPD)

GA NACH BPD - ASUM2003

Name: ASUM 2003

Autor: ASUM

Jahr: 2003

Literatur: ASUM und Campbell Westerway S , Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

Eingangsparameter: BPD (mm)

Mindestgrenze: 16

Höchstgrenze: 98

Ausgang: GA (Woche)

Gleichung:

$$0,397 * _BPD - 0,00306 * _BPD^2 + 0,00002788 * _BPD^3 + 4,933$$

GA NACH BPD - CFEF2000

Name: CFEF

Autor: CFEF

Jahr: 2000

Literatur: Crequat J, Duyme M und Brodaty G, Fetal growth charts by the French College of fetal ultrasonography and the Inserm U 155 , Biometry 2000, 28, pp 435-455, 2000

Kommentare: <http://cfef.org/>

BPD (mm)	GA (Woche)
15,36 mm	11 Wochen
19,4 mm	12 Wochen
23,3 mm	13 Wochen
27,14 mm	14 Wochen
30,89 mm	15 Wochen
34,53 mm	16 Wochen
38,12 mm	17 Wochen
41,58 mm	18 Wochen
45 mm	19 Wochen
48,22 mm	20 Wochen
51,43 mm	21 Wochen
54,53 mm	22 Wochen
57,51 mm	23 Wochen
60,42 mm	24 Wochen
63,25 mm	25 Wochen
65,94 mm	26 Wochen

BPD (mm)	GA (Woche)
68,55 mm	27 Wochen
71,03 mm	28 Wochen
73,5 mm	29 Wochen
75,8 mm	30 Wochen
78 mm	31 Wochen
80,16 mm	32 Wochen
82,14 mm	33 Wochen
84,07 mm	34 Wochen
85,9 mm	35 Wochen
87,61 mm	36 Wochen
89,24 mm	37 Wochen
90,7 mm	38 Wochen
92,1 mm	39 Wochen
93,45 mm	40 Wochen
94 mm	41 Wochen

GA NACH BPD - HADLOCK1984

Name: Hadlock 1984

Autor: Hadlock

Jahr: 1984

Literatur: Hadlock F.P, Deter R.L, Harrist R.B. und Park S.K
Estimating fetal age: computer-assisted analysis of multiple fetal growth parameters, Radiology, 152, pp 497-501, 1984

BPD (cm)	GA (Woche)	+/- 2 SD
1,7 cm	12,5438 Wochen	1,19 Wochen
1,9 cm	12,9608 Wochen	1,19 Wochen
2,1 cm	13,3913 Wochen	1,19 Wochen
2,3 cm	13,8352 Wochen	1,19 Wochen
2,5 cm	14,2925 Wochen	1,19 Wochen
2,7 cm	14,7632 Wochen	1,19 Wochen
2,9 cm	15,2473 Wochen	1,19 Wochen

BPD (cm)	GA (Woche)	+/- 2 SD
3,1 cm	15,7448 Wochen	1,19 Wochen
3,2 cm	15,9986 Wochen	1,19 Wochen
3,4 cm	16,5163 Wochen	1,19 Wochen
3,6 cm	17,0473 Wochen	1,19 Wochen
3,8 cm	17,5917 Wochen	1,19 Wochen
3,9 cm	17,869 Wochen	1,73 Wochen
4,1 cm	18,4336 Wochen	1,73 Wochen
4,3 cm	19,0115 Wochen	1,73 Wochen
4,5 cm	19,6029 Wochen	1,73 Wochen
4,6 cm	19,9036 Wochen	1,73 Wochen
4,8 cm	20,5151 Wochen	1,73 Wochen
5 cm	21,14 Wochen	1,73 Wochen
5,1 cm	21,4575 Wochen	1,73 Wochen
5,3 cm	22,1025 Wochen	1,73 Wochen
5,5 cm	22,7609 Wochen	1,73 Wochen
5,6 cm	23,0951 Wochen	1,73 Wochen
5,8 cm	23,7737 Wochen	1,73 Wochen
5,9 cm	24,118 Wochen	2,18 Wochen
6,1 cm	24,8166 Wochen	2,18 Wochen
6,2 cm	25,1709 Wochen	2,18 Wochen
6,4 cm	25,8897 Wochen	2,18 Wochen
6,5 cm	26,2541 Wochen	2,18 Wochen
6,7 cm	26,993 Wochen	2,18 Wochen
6,8 cm	27,3674 Wochen	2,18 Wochen
6,9 cm	27,7452 Wochen	2,18 Wochen
7,1 cm	28,5109 Wochen	2,18 Wochen
7,2 cm	28,8988 Wochen	2,18 Wochen
7,3 cm	29,29 Wochen	2,18 Wochen
7,5 cm	30,0825 Wochen	2,18 Wochen
7,6 cm	30,4838 Wochen	3,08 Wochen
7,7 cm	30,8884 Wochen	3,08 Wochen
7,8 cm	31,2964 Wochen	3,08 Wochen

BPD (cm)	GA (Woche)	+/- 2 SD
7,9 cm	31,7077 Wochen	3,08 Wochen
8,1 cm	32,5404 Wochen	3,08 Wochen
8,2 cm	32,9618 Wochen	3,08 Wochen
8,3 cm	33,3866 Wochen	3,08 Wochen
8,4 cm	33,8147 Wochen	3,08 Wochen
8,5 cm	34,2461 Wochen	3,08 Wochen
8,6 cm	34,6809 Wochen	3,08 Wochen
8,7 cm	35,119 Wochen	3,08 Wochen
8,8 cm	35,5605 Wochen	3,08 Wochen
8,9 cm	36,0054 Wochen	3,2 Wochen
9 cm	36,4536 Wochen	3,2 Wochen
9,1 cm	36,9052 Wochen	3,2 Wochen
9,2 cm	37,3601 Wochen	3,2 Wochen
9,3 cm	37,8183 Wochen	3,2 Wochen
9,4 cm	38,2799 Wochen	3,2 Wochen

GA NACH BPD - HANSMANN1986

Name: Hansmann 1986

Autor: Hansmann

Jahr: 1986

Literatur: Hansmann, Hackeloer, Staudach und Wittman, Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology, Springer-Verlag, New York, 1986

BPD (mm)	GA (Tag)	5%	95%
29 mm	94 Tage	86 Tage	101 Tage
30 mm	96 Tage	89 Tage	103 Tage
31 mm	98 Tage	90 Tage	106 Tage
32 mm	100 Tage	93 Tage	108 Tage
33 mm	102 Tage	94 Tage	111 Tage
34 mm	105 Tage	96 Tage	114 Tage
35 mm	107 Tage	99 Tage	115 Tage

BPD (mm)	GA (Tag)	5%	95%
36 mm	109 Tage	101 Tage	118 Tage
37 mm	112 Tage	104 Tage	120 Tage
38 mm	114 Tage	105 Tage	123 Tage
39 mm	116 Tage	108 Tage	125 Tage
40 mm	119 Tage	110 Tage	127 Tage
41 mm	121 Tage	112 Tage	130 Tage
42 mm	123 Tage	115 Tage	132 Tage
43 mm	125 Tage	116 Tage	134 Tage
44 mm	127 Tage	118 Tage	136 Tage
45 mm	130 Tage	121 Tage	139 Tage
46 mm	132 Tage	123 Tage	141 Tage
47 mm	134 Tage	125 Tage	144 Tage
48 mm	136 Tage	126 Tage	146 Tage
49 mm	138 Tage	127 Tage	148 Tage
50 mm	140 Tage	130 Tage	148 Tage
51 mm	143 Tage	133 Tage	153 Tage
52 mm	145 Tage	135 Tage	155 Tage
53 mm	147 Tage	136 Tage	158 Tage
54 mm	150 Tage	140 Tage	160 Tage
55 mm	152 Tage	142 Tage	161 Tage
56 mm	154 Tage	145 Tage	163 Tage
57 mm	156 Tage	147 Tage	165 Tage
58 mm	159 Tage	150 Tage	167 Tage
59 mm	161 Tage	151 Tage	171 Tage
60 mm	163 Tage	153 Tage	172 Tage
61 mm	165 Tage	155 Tage	175 Tage
62 mm	168 Tage	158 Tage	178 Tage
63 mm	170 Tage	160 Tage	179 Tage
64 mm	172 Tage	162 Tage	182 Tage
65 mm	174 Tage	165 Tage	184 Tage
66 mm	176 Tage	167 Tage	187 Tage
67 mm	178 Tage	169 Tage	190 Tage

BPD (mm)	GA (Tag)	5%	95%
68 mm	181 Tage	171 Tage	191 Tage
69 mm	183 Tage	174 Tage	193 Tage
70 mm	185 Tage	175 Tage	195 Tage
71 mm	187 Tage	177 Tage	199 Tage
72 mm	190 Tage	179 Tage	200 Tage
73 mm	192 Tage	182 Tage	205 Tage
74 mm	195 Tage	183 Tage	207 Tage
75 mm	197 Tage	185 Tage	209 Tage
76 mm	200 Tage	187 Tage	212 Tage
77 mm	202 Tage	190 Tage	215 Tage
78 mm	205 Tage	191 Tage	220 Tage
79 mm	208 Tage	192 Tage	224 Tage
80 mm	210 Tage	195 Tage	225 Tage
81 mm	213 Tage	198 Tage	228 Tage
82 mm	217 Tage	202 Tage	232 Tage
83 mm	219 Tage	203 Tage	236 Tage
84 mm	223 Tage	206 Tage	240 Tage
85 mm	226 Tage	209 Tage	242 Tage
86 mm	229 Tage	211 Tage	246 Tage
87 mm	233 Tage	212 Tage	253 Tage
88 mm	236 Tage	217 Tage	255 Tage
89 mm	240 Tage	221 Tage	259 Tage
90 mm	243 Tage	224 Tage	262 Tage
91 mm	246 Tage	225 Tage	271 Tage
92 mm	251 Tage	233 Tage	275 Tage
93 mm	257 Tage	236 Tage	278 Tage
94 mm	262 Tage	243 Tage	281 Tage
95 mm	269 Tage	247 Tage	287 Tage
96 mm	272 Tage	247 Tage	290 Tage
97 mm	273 Tage	251 Tage	294 Tage
98 mm	275 Tage	255 Tage	294 Tage
99 mm	276 Tage	256 Tage	298 Tage

BPD (mm)	GA (Tag)	5%	95%
100 mm	277 Tage	257 Tage	296 Tage
101 mm	278 Tage	260 Tage	298 Tage
102 mm	279 Tage	260 Tage	296 Tage
103 mm	280 Tage	261 Tage	296 Tage
104 mm	281 Tage	262 Tage	296 Tage
105 mm	282 Tage	265 Tage	296 Tage

GA NACH BPD - JEANTY1984

Name: Jeanty 1984

Autor: Jeanty

Jahr: 1984

Literatur: Jeanty P und Romero R, Obstetrical Ultrasound, McGraw-Hill, 1984

BPD (mm)	GA (EW)	5%	95%
10 mm	9W1T	6W4T	11W6T
11 mm	9W4T	6W6T	12W1T
12 mm	9W5T	7W0T	12W3T
13 mm	10W0T	7W2T	12W5T
14 mm	10W2T	7W4T	12W6T
15 mm	10W4T	7W6T	13W1T
16 mm	10W6T	8W1T	13W3T
17 mm	11W1T	8W3T	13W5T
18 mm	11W2T	8W4T	14W0T
19 mm	11W4T	8W6T	14W1T
20 mm	11W6T	9W1T	14W4T
21 mm	12W1T	9W3T	14W6T
22 mm	12W3T	9W5T	15W0T
23 mm	12W4T	9W6T	15W2T
24 mm	12W6T	10W1T	15W4T
25 mm	13W1T	10W4T	15W6T
26 mm	13W3T	10W5T	16W1T

BPD (mm)	GA (EW)	5%	95%
27 mm	13W5T	11W0T	16W3T
28 mm	14W0T	11W2T	16W4T
29 mm	14W1T	11W4T	16W6T
30 mm	14W4T	11W6T	17W1T
31 mm	14W6T	12W1T	17W3T
32 mm	15W1T	12W2T	17W5T
33 mm	15W2T	12W4T	18W0T
34 mm	15W4T	12W6T	18W2T
35 mm	15W6T	13W1T	18W4T
36 mm	16W1T	13W4T	18W6T
37 mm	16W3T	13W5T	19W1T
38 mm	16W5T	14W0T	19W3T
39 mm	17W0T	14W2T	19W5T
40 mm	17W2T	14W4T	19W6T
41 mm	17W4T	14W6T	20W1T
42 mm	17W6T	15W1T	20W4T
43 mm	18W1T	15W3T	20W6T
44 mm	18W3T	15W5T	21W1T
45 mm	18W5T	16W0T	21W3T
46 mm	19W0T	16W2T	21W5T
47 mm	19W2T	16W4T	22W0T
48 mm	19W4T	16W6T	22W2T
49 mm	19W6T	17W1T	22W4T
50 mm	20W2T	17W4T	22W6T
51 mm	20W4T	17W6T	23W1T
52 mm	20W6T	18W1T	23W4T
53 mm	21W1T	18W4T	23W6T
54 mm	21W4T	18W6T	24W1T
55 mm	21W6T	19W1T	24W4T
56 mm	22W1T	19W4T	24W6T
57 mm	22W4T	19W6T	25W1T
58 mm	22W6T	20W1T	25W4T

BPD (mm)	GA (EW)	5%	95%
59 mm	23W1T	20W4T	25W6T
60 mm	23W4T	20W6T	26W1T
61 mm	23W6T	21W1T	26W4T
62 mm	24W1T	21W4T	26W6T
63 mm	24W4T	21W6T	27W1T
64 mm	24W6T	22W1T	27W4T
65 mm	25W2T	22W4T	27W6T
66 mm	25W4T	22W6T	28W2T
67 mm	26W0T	23W2T	28W4T
68 mm	26W3T	23W5T	29W0T
69 mm	26W5T	24W0T	29W3T
70 mm	27W1T	24W3T	29W6T
71 mm	27W4T	24W6T	30W1T
72 mm	27W6T	25W1T	30W4T
73 mm	28W2T	25W4T	30W6T
74 mm	28W5T	26W0T	31W2T
75 mm	29W1T	26W3T	31W5T
76 mm	29W4T	26W6T	32W1T
77 mm	29W6T	27W1T	32W4T
78 mm	30W2T	27W4T	33W0T
79 mm	30W5T	28W0T	33W3T
80 mm	31W1T	28W4T	33W6T
81 mm	31W4T	28W6T	34W2T
82 mm	32W0T	29W2T	34W5T
83 mm	32W4T	29W6T	35W1T
84 mm	32W6T	30W1T	35W4T
85 mm	33W3T	30W5T	36W0T
86 mm	33W6T	31W1T	36W4T
87 mm	34W2T	31W4T	37W0T
88 mm	34W6T	32W1T	37W3T
89 mm	35W2T	32W4T	37W6T
90 mm	35W5T	33W0T	38W3T

BPD (mm)	GA (EW)	5%	95%
91 mm	36W1T	33W4T	38W6T
92 mm	36W5T	34W0T	39W3T
93 mm	37W1T	34W4T	39W6T
94 mm	37W5T	35W0T	40W3T
95 mm	38W2T	35W4T	40W6T

GA NACH BPD - MERZ1988

Name: Merz 1984

Autor: Merz

Jahr: 1988

Literatur: Merz E, Goldhofer W und Timor-Tritsch E , Ultrasound in Gynecology and Obstetrics, Textbook and Atlas, Georg Thieme Verlag , 1991

Kommentare: Von Merz, E., Habilitationsschrift, Universitäts-Frauenklinik Mainz, 1988

BPD (mm)	GA (EW)	5%	95%
21 mm	12W1T	10W5T	13W5T
22 mm	12W3T	10W6T	13W6T
23 mm	12W5T	11W1T	14W1T
24 mm	13W0T	11W4T	14W4T
25 mm	13W1T	11W5T	14W5T
26 mm	13W4T	12W0T	15W0T
27 mm	13W6T	12W1T	15W3T
28 mm	14W1T	12W4T	15W5T
29 mm	14W2T	12W5T	15W6T
30 mm	14W4T	13W0T	16W1T
31 mm	14W6T	13W2T	16W4T
32 mm	15W1T	13W4T	16W6T
33 mm	15W3T	13W6T	17W0T
34 mm	15W5T	14W0T	17W3T
35 mm	16W0T	14W2T	17W5T

BPD (mm)	GA (EW)	5%	95%
36 mm	16W2T	14W4T	18W0T
37 mm	16W4T	14W6T	18W1T
38 mm	16W6T	15W1T	18W4T
39 mm	17W1T	15W3T	18W6T
40 mm	17W3T	15W5T	19W1T
41 mm	17W5T	15W6T	19W4T
42 mm	18W0T	16W1T	19W6T
43 mm	18W2T	16W4T	20W1T
44 mm	18W4T	16W6T	20W3T
45 mm	18W6T	17W1T	20W5T
46 mm	19W1T	17W3T	21W0T
47 mm	19W3T	17W4T	21W1T
48 mm	19W5T	17W6T	21W4T
49 mm	20W0T	18W1T	21W6T
50 mm	20W3T	18W4T	22W1T
51 mm	20W5T	18W6T	22W4T
52 mm	21W0T	19W1T	22W6T
53 mm	21W2T	19W3T	23W1T
54 mm	21W4T	19W5T	23W4T
55 mm	21W6T	20W0T	23W6T
56 mm	22W1T	20W2T	24W1T
57 mm	22W4T	20W4T	24W3T
58 mm	22W6T	20W6T	24W5T
59 mm	23W1T	21W1T	25W1T
60 mm	23W4T	21W4T	25W4T
61 mm	23W6T	21W6T	25W6T
62 mm	24W1T	22W1T	26W1T
63 mm	24W4T	22W4T	26W4T
64 mm	24W6T	22W6T	26W6T
65 mm	25W1T	23W1T	27W1T
66 mm	25W4T	23W4T	27W4T
67 mm	25W6T	23W6T	27W6T

BPD (mm)	GA (EW)	5%	95%
68 mm	26W1T	24W1T	28W2T
69 mm	26W4T	24W3T	28W4T
70 mm	26W6T	24W5T	28W6T
71 mm	27W1T	25W1T	29W2T
72 mm	27W4T	25W4T	29W5T
73 mm	27W6T	25W6T	30W0T
74 mm	28W2T	26W1T	30W3T
75 mm	28W4T	26W4T	30W5T
76 mm	29W0T	26W6T	31W1T
77 mm	29W3T	27W1T	31W4T
78 mm	29W6T	27W4T	32W0T
79 mm	30W1T	27W6T	32W2T
80 mm	30W4T	28W2T	32W5T
81 mm	30W6T	28W5T	33W1T
82 mm	31W2T	29W1T	33W4T
83 mm	31W5T	29W4T	33W6T
84 mm	32W1T	29W6T	34W2T
85 mm	32W4T	30W2T	34W5T
86 mm	32W6T	30W5T	35W1T
87 mm	33W2T	31W0T	35W4T
88 mm	33W6T	31W4T	36W1T
89 mm	34W1T	31W6T	36W4T
90 mm	34W4T	32W2T	36W6T
91 mm	35W1T	32W6T	37W3T
92 mm	35W4T	33W1T	37W6T
93 mm	35W6T	33W4T	38W1T
94 mm	36W3T	34W0T	38W6T
95 mm	36W6T	34W4T	39W2T
96 mm	37W2T	34W6T	39W5T
97 mm	37W6T	35W3T	40W1T
98 mm	38W2T	35W6T	40W5T
99 mm	38W6T	36W3T	41W1T

BPD (mm)	GA (EW)	5%	95%
100 mm	39W2T	36W6T	41W6T
101 mm	39W6T	37W2T	42W2T
102 mm	40W2T	37W6T	42W6T

Scheitel-Steiß-Länge (GA nach SSL)

GA NACH SSL - ASUM2003

Name: ASUM 2003

Autor: ASUM

Jahr: 2003

Literatur: ASUM und Campbell Westerway S , Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

Eingangsparameter: SSL (mm)

Mindestgrenze: 1

Höchstgrenze: 87

Ausgang: GA (Woche)

Gleichung:

$$-0,0007 * _SSL * _SSL + 0,1584 * _SSL + 5,2876$$

GA NACH SSL - HANSMANN1986

Name: Hansmann 1986

Autor: Hansmann

Jahr: 1986

Literatur: Hansmann, Hackeloer, Staudach und Wittman, Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology, Springer-Verlag, New York, 1986

SSL (mm)	GA (EW)	- 2 SD	+ 2 SD
6 mm	6W1T	5W1T	7W0T
7 mm	6W2T	5W3T	7W2T
8 mm	6W4T	5W4T	7W3T
9 mm	6W6T	5W6T	7W6T
10 mm	7W0T	6W1T	8W0T
11 mm	7W2T	6W2T	8W1T
12 mm	7W3T	6W3T	8W3T
13 mm	7W4T	6W5T	8W4T
14 mm	7W6T	6W6T	8W6T
15 mm	8W0T	7W0T	9W0T
16 mm	8W2T	7W2T	9W1T
17 mm	8W3T	7W3T	9W2T
18 mm	8W4T	7W4T	9W4T
19 mm	8W5T	7W5T	9W5T
20 mm	8W6T	7W6T	9W6T
21 mm	9W0T	8W0T	10W0T
22 mm	9W1T	8W1T	10W1T
23 mm	9W2T	8W2T	10W2T
24 mm	9W3T	8W3T	10W3T
26 mm	9W5T	8W5T	10W5T
28 mm	10W0T	8W6T	11W1T
30 mm	10W2T	9W1T	11W2T
32 mm	10W3T	9W2T	11W4T
34 mm	10W5T	9W4T	11W5T
36 mm	10W6T	9W5T	12W0T
38 mm	11W1T	9W6T	12W2T
40 mm	11W2T	10W1T	12W3T
42 mm	11W3T	10W2T	12W4T
44 mm	11W4T	10W3T	12W6T
46 mm	11W6T	10W5T	13W0T
48 mm	12W0T	10W6T	13W2T
50 mm	12W1T	10W6T	13W3T

SSL (mm)	GA (EW)	- 2 SD	+ 2 SD
52 mm	12W2T	11W0T	13W4T
54 mm	12W3T	11W0T	13W5T
56 mm	12W4T	11W1T	13W6T
58 mm	12W5T	11W2T	14W0T
60 mm	12W6T	11W3T	14W1T
63 mm	13W0T	11W4T	14W3T
66 mm	13W2T	11W5T	14W5T
70 mm	13W3T	12W0T	15W0T
73 mm	13W5T	12W1T	15W1T
76 mm	13W6T	12W2T	15W3T
80 mm	14W1T	12W4T	15W5T
83 mm	14W2T	12W5T	16W0T
86 mm	14W4T	12W6T	16W2T
90 mm	14W6T	13W1T	16W4T
93 mm	15W1T	13W3T	16W6T
96 mm	15W3T	13W4T	17W1T
100 mm	15W5T	13W6T	17W3T
103 mm	16W0T	14W1T	17W6T
106 mm	16W2T	14W3T	18W1T
110 mm	16W4T	14W5T	18W4T
113 mm	17W0T	15W0T	19W0T
116 mm	17W2T	15W2T	19W2T
120 mm	17W4T	15W4T	19W4T
123 mm	18W0T	16W0T	20W0T
126 mm	18W2T	16W2T	20W3T
130 mm	18W6T	16W5T	20W6T
133 mm	19W1T	17W0T	21W2T
136 mm	19W4T	17W3T	21W6T
140 mm	20W0T	17W6T	22W2T
143 mm	20W3T	18W1T	22W5T
146 mm	20W6T	18W4T	23W1T
150 mm	21W3T	19W0T	23W5T

GA NACH SSL - JEANTY1984

Name: Jeanty 1984

Autor: Jeanty

Jahr: 1984

Literatur: Jeanty P und Romero R, Obstetrical Ultrasound, McGraw-Hill, 1984

SSL (mm)	GA (EW)
5 mm	6W2T
6 mm	6W4T
7 mm	6W5T
8 mm	6W6T
9 mm	7W1T
10 mm	7W2T
11 mm	7W3T
12 mm	7W4T
13 mm	7W6T
14 mm	7W6T
15 mm	8W1T
16 mm	8W1T
17 mm	8W3T
18 mm	8W4T
19 mm	8W4T
20 mm	8W6T
21 mm	8W6T
22 mm	9W0T
23 mm	9W1T
24 mm	9W1T
25 mm	9W3T
26 mm	9W4T
27 mm	9W4T
28 mm	9W5T
29 mm	9W6T

SSL (mm)	GA (EW)
30 mm	9W6T
31 mm	10W0T
32 mm	10W1T
33 mm	10W1T
34 mm	10W2T
35 mm	10W3T
36 mm	10W4T
37 mm	10W4T
38 mm	10W5T
39 mm	10W6T
40 mm	10W6T
41 mm	11W0T
42 mm	11W1T
43 mm	11W1T
44 mm	11W1T
45 mm	11W2T
46 mm	11W3T
47 mm	11W4T
48 mm	11W4T
49 mm	11W5T
50 mm	11W6T
51 mm	11W6T
52 mm	11W6T
53 mm	12W0T
54 mm	12W1T

Femurlänge (GA nach FL)

GA NACH FL - ASUM2003

Name: ASUM 2003

Autor: ASUM

Jahr: 2003

Literatur: ASUM und Campbell Westerway S , Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

Eingangsparameter: FL (mm)

Mindestgrenze: 8

Höchstgrenze: 77

Ausgang: GA (Woche)

Gleichung:

$$0,41 * _FL - 0,002884 * _FL * _FL + 0,00003924 * _FL * _FL * _FL + 8,284$$

GA NACH FL - CFEF2000

Name: CFEF

Autor: CFEF

Jahr: 2000

Literatur: Crequat J, Duyme M und Brodaty G, Fetal growth charts by the French College of fetal ultrasonography and the Inserm U 155 , Biometry 2000, 28, pp 435-455, 2000

Kommentare: <http://cfef.org/>

FL (mm)	GA (Woche)
6,33 mm	12 Wochen
9,88 mm	13 Wochen
13,33 mm	14 Wochen
16,66 mm	15 Wochen
19,95 mm	16 Wochen
23,12 mm	17 Wochen
26,23 mm	18 Wochen
29,25 mm	19 Wochen
32,23 mm	20 Wochen
35,05 mm	21 Wochen

FL (mm)	GA (Woche)
37,87 mm	22 Wochen
40,5 mm	23 Wochen
43,16 mm	24 Wochen
45,69 mm	25 Wochen
48,17 mm	26 Wochen
50,53 mm	27 Wochen
52,8 mm	28 Wochen
54,94 mm	29 Wochen
57,13 mm	30 Wochen
59,15 mm	31 Wochen
61,11 mm	32 Wochen
63 mm	33 Wochen
64,76 mm	34 Wochen
66,47 mm	35 Wochen
68,13 mm	36 Wochen
69,63 mm	37 Wochen
71,11 mm	38 Wochen
72,48 mm	39 Wochen
73,79 mm	40 Wochen
74 mm	41 Wochen

GA NACH FL - CHITTY1997

Name: Chitty 1997

Autor: Chitty

Jahr: 1997

Literatur: Altman D.G and Chitty L.S, New charts for ultrasound dating of pregnancy, Ultrasound Obstet. Gynecol, Vol 10, pp 174-191, 1997

FL (mm)	GA (EW)	5%	95%
10 mm	13W0T	12W1T	13W6T
11 mm	13W2T	12W3T	14W1T
12 mm	13W4T	12W5T	14W4T

FL (mm)	GA (EW)	5%	95%
13 mm	13W6T	13W0T	14W6T
14 mm	14W1T	13W1T	15W1T
15 mm	14W3T	13W3T	15W3T
16 mm	14W5T	13W5T	15W6T
17 mm	15W0T	14W0T	16W1T
18 mm	15W2T	14W2T	16W3T
19 mm	15W5T	14W4T	16W6T
20 mm	16W0T	14W6T	17W1T
21 mm	16W2T	15W1T	17W3T
22 mm	16W4T	15W3T	17W6T
23 mm	16W6T	15W5T	18W1T
24 mm	17W2T	16W0T	18W4T
25 mm	17W4T	16W2T	18W6T
26 mm	17W6T	16W4T	19W2T
27 mm	18W2T	16W6T	19W5T
28 mm	18W4T	17W1T	20W0T
29 mm	18W6T	17W4T	20W3T
30 mm	19W2T	17W6T	20W5T
31 mm	19W4T	18W1T	21W1T
32 mm	20W0T	18W3T	21W4T
33 mm	20W2T	18W5T	22W0T
34 mm	20W5T	19W1T	22W2T
35 mm	21W0T	19W3T	22W5T
36 mm	21W3T	19W5T	23W1T
37 mm	21W5T	20W1T	23W4T
38 mm	22W1T	20W3T	24W0T
39 mm	22W4T	20W5T	24W3T
40 mm	22W6T	21W1T	24W6T
41 mm	23W2T	21W3T	25W2T
42 mm	23W5T	21W6T	25W5T
43 mm	24W1T	22W1T	26W1T
44 mm	24W3T	22W4T	26W4T

FL (mm)	GA (EW)	5%	95%
45 mm	24W6T	22W6T	27W1T
46 mm	25W2T	23W2T	27W4T
47 mm	25W5T	23W4T	28W0T
48 mm	26W1T	24W0T	28W3T
49 mm	26W4T	24W3T	29W0T
50 mm	27W0T	24W5T	29W3T
51 mm	27W3T	25W1T	30W0T
52 mm	27W6T	25W4T	30W3T
53 mm	28W2T	26W0T	31W0T
54 mm	28W5T	26W2T	31W3T
55 mm	29W2T	26W5T	32W0T
56 mm	29W5T	27W1T	32W3T
57 mm	30W1T	27W4T	33W0T
58 mm	30W4T	28W0T	33W4T
59 mm	31W1T	28W3T	34W1T
60 mm	31W4T	28W6T	34W4T
61 mm	32W1T	29W2T	35W1T
62 mm	32W4T	29W5T	35W5T
63 mm	33W1T	30W1T	36W2T
64 mm	33W4T	30W4T	36W6T
65 mm	34W1T	31W0T	37W3T
66 mm	34W4T	31W3T	38W0T
67 mm	35W1T	32W0T	38W5T

GA NACH FL - HADLOCK1984

Name: Hadlock 1984

Autor: Hadlock

Jahr: 1984

Literatur: Hadlock F.P, Deter R.L, Harrist R.B. und Park S.K
Estimating fetal age: computer-assisted analysis of multiple fetal growth parameters, Radiology, 152, pp 497-501, 1984

FL (cm)	GA (Woche)	+/- 2 SD
0,7 cm	12,1553 Wochen	1,38 Wochen
0,9 cm	12,7017 Wochen	1,38 Wochen
1,1 cm	13,2617 Wochen	1,38 Wochen
1,2 cm	13,5468 Wochen	1,38 Wochen
1,4 cm	14,1272 Wochen	1,38 Wochen
1,6 cm	14,7212 Wochen	1,38 Wochen
1,7 cm	15,0233 Wochen	1,38 Wochen
1,9 cm	15,6377 Wochen	1,38 Wochen
2 cm	15,95 Wochen	1,38 Wochen
2,2 cm	16,5848 Wochen	1,38 Wochen
2,4 cm	17,2332 Wochen	1,38 Wochen
2,5 cm	17,5625 Wochen	1,38 Wochen
2,7 cm	18,2313 Wochen	1,8 Wochen
2,8 cm	18,5708 Wochen	1,8 Wochen
3 cm	19,26 Wochen	1,8 Wochen
3,1 cm	19,6097 Wochen	1,8 Wochen
3,3 cm	20,3193 Wochen	1,8 Wochen
3,4 cm	20,6792 Wochen	1,8 Wochen
3,5 cm	21,0425 Wochen	1,8 Wochen
3,7 cm	21,7793 Wochen	1,8 Wochen
3,8 cm	22,1528 Wochen	1,8 Wochen
4 cm	22,91 Wochen	1,8 Wochen
4,1 cm	23,2937 Wochen	1,8 Wochen
4,2 cm	23,6808 Wochen	1,8 Wochen
4,4 cm	24,4652 Wochen	2,08 Wochen
4,5 cm	24,8625 Wochen	2,08 Wochen
4,6 cm	25,2632 Wochen	2,08 Wochen
4,7 cm	25,6673 Wochen	2,08 Wochen
4,9 cm	26,4857 Wochen	2,08 Wochen
5 cm	26,9 Wochen	2,08 Wochen
5,1 cm	27,3177 Wochen	2,08 Wochen
5,2 cm	27,7388 Wochen	2,08 Wochen

FL (cm)	GA (Woche)	+/- 2 SD
5,4 cm	28,5912 Wochen	2,08 Wochen
5,5 cm	29,0225 Wochen	2,08 Wochen
5,6 cm	29,4572 Wochen	2,08 Wochen
5,7 cm	29,8953 Wochen	2,08 Wochen
5,8 cm	30,3368 Wochen	2,96 Wochen
5,9 cm	30,7817 Wochen	2,96 Wochen
6 cm	31,23 Wochen	2,96 Wochen
6,1 cm	31,6817 Wochen	2,96 Wochen
6,2 cm	32,1368 Wochen	2,96 Wochen
6,3 cm	32,5953 Wochen	2,96 Wochen
6,4 cm	33,0572 Wochen	2,96 Wochen
6,5 cm	33,5225 Wochen	2,96 Wochen
6,6 cm	33,9912 Wochen	2,96 Wochen
6,7 cm	34,4633 Wochen	2,96 Wochen
6,8 cm	34,9388 Wochen	2,96 Wochen
6,9 cm	35,4177 Wochen	2,96 Wochen
7 cm	35,9 Wochen	3,12 Wochen
7,1 cm	36,3857 Wochen	3,12 Wochen
7,2 cm	36,8748 Wochen	3,12 Wochen
7,3 cm	37,3673 Wochen	3,12 Wochen
7,4 cm	37,8632 Wochen	3,12 Wochen
7,5 cm	38,3625 Wochen	3,12 Wochen
7,6 cm	38,8652 Wochen	3,12 Wochen
7,7 cm	39,3713 Wochen	3,12 Wochen

GA NACH FL - HANSMANN1986

Name: Hansmann 1986

Autor: Hansmann

Jahr: 1986

Literatur: Hansmann, Hackeloer, Staudach und Wittman, Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology, Springer-Verlag, New York, 1986

FL (cm)	GA (Woche)
1 cm	13 Wochen
1,2 cm	14 Wochen
1,6 cm	15 Wochen
1,8 cm	16 Wochen
2,2 cm	17 Wochen
2,5 cm	18 Wochen
2,8 cm	19 Wochen
3,1 cm	20 Wochen
3,4 cm	21 Wochen
3,6 cm	22 Wochen
3,9 cm	23 Wochen
4,1 cm	24 Wochen
4,4 cm	25 Wochen
4,7 cm	26 Wochen
4,9 cm	27 Wochen
5,1 cm	28 Wochen
5,4 cm	29 Wochen
5,6 cm	30 Wochen
5,9 cm	31 Wochen
6,1 cm	32 Wochen
6,3 cm	33 Wochen
6,5 cm	34 Wochen
6,7 cm	35 Wochen
6,9 cm	36 Wochen
7,1 cm	37 Wochen
7,3 cm	38 Wochen
7,4 cm	39 Wochen
7,5 cm	40 Wochen

GA NACH FL - JEANTY1984

Name: Jeanty 1984

Autor: Jeanty

Jahr: 1984

Literatur: Jeanty P und Romero R, Obstetrical Ultrasound, McGraw-Hill, 1984

FL (mm)	GA (EW)	5%	95%
10 mm	12W4T	10W3T	14W6
11 mm	12W6T	10W5T	15W1
12 mm	13W2T	11W1T	15W4
13 mm	13W4T	11W3T	15W6
14 mm	13W6T	11W5T	16W1
15 mm	14W1T	12W0T	16W3
16 mm	14W4T	12W3T	16W6
17 mm	14W6T	12W5T	17W1
18 mm	15W1T	13W0T	17W3
19 mm	15W4T	13W3T	17W6
20 mm	15W6T	13W5T	18W1
21 mm	16W2T	14W1T	18W4
22 mm	16W4T	14W3T	18W6
23 mm	16W6T	14W5T	19W1
24 mm	17W2T	15W1T	19W4
25 mm	17W4T	15W3T	19W6
26 mm	18W0T	15W6T	20W1
27 mm	18W2T	16W1T	20W4
28 mm	18W5T	16W4T	20W6
29 mm	19W0T	16W6T	21W1
30 mm	19W3T	17W1T	21W4
31 mm	19W6T	17W4T	22W0
32 mm	20W1T	17W6T	22W2
33 mm	20W4T	18W2T	22W5
34 mm	20W6T	18W5T	23W1

FL (mm)	GA (EW)	5%	95%
35 mm	21W1T	19W0T	23W3
36 mm	21W4T	19W3T	23W6
37 mm	22W0T	19W6T	24W1
38 mm	22W3T	20W1T	24W4
39 mm	22W5T	20W4T	24W6
40 mm	23W1T	20W6T	25W2
41 mm	23W4T	21W2T	25W5
42 mm	23W6T	21W5T	26W1
43 mm	24W2T	22W1T	26W4
44 mm	24W5T	22W4T	26W6
45 mm	25W0T	22W6T	27W1
46 mm	25W3T	23W1T	27W4
47 mm	25W6T	23W4T	28W0
48 mm	26W1T	24W0T	28W3
49 mm	26W4T	24W3T	28W6
50 mm	27W0T	24W6T	29W1
51 mm	27W3T	25W1T	29W4
52 mm	27W6T	25W4T	30W0
53 mm	28W1T	26W0T	30W3
54 mm	28W4T	26W3T	30W6
55 mm	29W1T	26W6T	31W2
56 mm	29W4T	27W2T	31W5
57 mm	29W6T	27W5T	32W1
58 mm	30W2T	28W1T	32W4
59 mm	30W5T	28W4T	32W6
60 mm	31W1T	28W6T	33W2
61 mm	31W4T	29W3T	33W6
62 mm	32W0T	29W6T	34W1
63 mm	32W3T	30W1T	34W4
64 mm	32W6T	30W5T	35W1
65 mm	33W2T	31W1T	35W4
66 mm	33W5T	31W4T	35W6

FL (mm)	GA (EW)	5%	95%
67 mm	34W1T	32W0T	36W3
68 mm	34W4T	32W3T	36W6
69 mm	35W0T	32W6T	37W1
70 mm	35W4T	33W2T	37W5
71 mm	35W6T	33W5T	38W1
72 mm	36W3T	34W1T	38W4
73 mm	36W6T	34W4T	39W0
74 mm	37W2T	35W1T	39W4
75 mm	37W5T	35W4T	39W6
76 mm	38W1T	36W0T	40W3
77 mm	38W4T	36W3T	40W6
78 mm	39W1T	36W6T	41W2
79 mm	39W4T	37W2T	41W5
80 mm	40W0T	37W6T	42W1

GA NACH FL - MERZ1988

Name: Merz 1988

Autor: Merz

Jahr: 1988

Literatur: Merz E, Goldhofer W und Timor-Tritsch E , Ultrasound in Gynecology and Obstetrics, Textbook and Atlas, Georg Thieme Verlag , 1991

Kommentare: Von Merz, E., Habilitationsschrift, Universitäts-Frauenklinik Mainz, 1988

FL (mm)	GA (EW)	5%	95%
10 mm	12W2T	11W1T	13W4T
11 mm	12W5T	11W4T	13W6T
12 mm	13W0T	11W6T	14W1T
13 mm	13W2T	12W1T	14W4T
14 mm	13W5T	12W3T	15W0T
15 mm	14W0T	12W5T	15W2T

FL (mm)	GA (EW)	5%	95%
16 mm	14W3T	13W1T	15W5T
17 mm	14W5T	13W3T	16W0T
18 mm	15W1T	13W6T	16W3T
19 mm	15W3T	14W1T	16W5T
20 mm	15W6T	14W4T	17W1T
21 mm	16W1T	14W6T	17W3T
22 mm	16W4T	15W1T	17W6T
23 mm	16W6T	15W3T	18W1T
24 mm	17W1T	15W6T	18W4T
25 mm	17W4T	16W1T	19W1T
26 mm	17W6T	16W3T	19W3T
27 mm	18W2T	16W6T	19W6T
28 mm	18W4T	17W1T	20W1T
29 mm	19W0T	17W4T	20W4T
30 mm	19W3T	17W6T	20W6T
31 mm	19W5T	18W1T	21W1T
32 mm	20W1T	18W4T	21W4T
33 mm	20W4T	18W6T	22W1T
34 mm	20W6T	19W1T	22W3T
35 mm	21W1T	19W4T	22W6T
36 mm	21W4T	20W0T	23W1T
37 mm	21W6T	20W2T	23W4T
38 mm	22W2T	20W5T	23W6T
39 mm	22W5T	21W0T	24W3T
40 mm	23W1T	21W3T	24W6T
41 mm	23W3T	21W5T	25W1T
42 mm	23W6T	22W1T	25W4T
43 mm	24W1T	22W4T	25W6T
44 mm	24W4T	22W6T	26W3T
45 mm	25W0T	23W1T	26W6T
46 mm	25W3T	23W4T	27W1T
47 mm	25W6T	24W0T	27W4T

FL (mm)	GA (EW)	5%	95%
48 mm	26W1T	24W3T	28W0T
49 mm	26W4T	24W5T	28W2T
50 mm	26W6T	25W1T	28W5T
51 mm	27W2T	25W4T	29W1T
52 mm	27W5T	25W6T	29W4T
53 mm	28W1T	26W1T	30W0T
54 mm	28W4T	26W4T	30W4T
55 mm	29W0T	27W0T	31W0T
56 mm	29W3T	27W3T	31W3T
57 mm	29W6T	27W6T	31W6T
58 mm	30W1T	28W1T	32W1T
59 mm	30W4T	28W4T	32W4T
60 mm	31W0T	29W0T	33W0T
61 mm	31W4T	29W4T	33W4T
62 mm	31W6T	29W6T	33W6T
63 mm	32W2T	30W2T	34W2T
64 mm	32W6T	30W6T	34W6T
65 mm	33W1T	31W1T	35W1T
66 mm	33W4T	31W4T	35W4T
67 mm	34W1T	32W0T	36W1T
68 mm	34W4T	32W3T	36W4T
69 mm	35W0T	32W6T	37W1T
70 mm	35W3T	33W2T	37W4T
71 mm	35W6T	33W6T	38W0T
72 mm	36W2T	34W1T	38W3T
73 mm	36W6T	34W4T	39W0T
74 mm	37W2T	35W1T	39W4T
75 mm	37W5T	36W0T	39W6T
76 mm	38W1T	36W0T	40W3T
77 mm	38W5T	36W4T	40W6T
78 mm	39W1T	37W0T	41W3T
79 mm	39W4T	37W3T	41W6T

FL (mm)	GA (EW)	5%	95%
80 mm	40W1T	37W6T	42W2T

Fruchtblase (GA nach FB)

GA NACH GS - DAYA1991

Name: Daya 1991

Autor: Daya

Jahr: 1991

Literatur: Daya S, Woods S, Ward S, Lappalainen R and Caco R, Early pregnancy assessment with transvaginal ultrasound scanning, CMAJ, Vol 144(4), pp 441-446, 1991

FB (mm)	GA (Tag)	5%	95%
2 mm	34,9 Tage	31,6 Tage	38,2 Tage
3 mm	35,8 Tage	32,5 Tage	39,1 Tage
4 mm	36,6 Tage	33,3 Tage	39,9 Tage
5 mm	37,5 Tage	34,2 Tage	40,8 Tage
6 mm	38,4 Tage	35,1 Tage	41,7 Tage
7 mm	39,3 Tage	36 Tage	42,6 Tage
8 mm	40,2 Tage	36,9 Tage	43,5 Tage
9 mm	41,1 Tage	37,8 Tage	44,3 Tage
10 mm	41,9 Tage	38,7 Tage	45,2 Tage
11 mm	42,8 Tage	39,5 Tage	46,1 Tage
12 mm	43,7 Tage	40,4 Tage	47 Tage
13 mm	44,6 Tage	41,3 Tage	47,9 Tage
14 mm	45,5 Tage	42,2 Tage	48,7 Tage
15 mm	46,3 Tage	43,1 Tage	49,6 Tage
16 mm	47,2 Tage	44 Tage	50,5 Tage
17 mm	48,1 Tage	44,8 Tage	51,4 Tage
18 mm	49 Tage	45,7 Tage	52,3 Tage

FB (mm)	GA (Tag)	5%	95%
19 mm	49,9 Tage	46,6 Tage	53,2 Tage
20 mm	50,8 Tage	47,5 Tage	54 Tage
21 mm	51,6 Tage	48,3 Tage	54,9 Tage
22 mm	52,5 Tage	49,2 Tage	55,8 Tage
23 mm	53,4 Tage	50,1 Tage	56,7 Tage
24 mm	54,3 Tage	51 Tage	57,6 Tage
25 mm	55,2 Tage	51,9 Tage	58,5 Tage
26 mm	56 Tage	52,7 Tage	59,4 Tage
27 mm	56,9 Tage	53,6 Tage	60,3 Tage
28 mm	57,8 Tage	54,5 Tage	61,1 Tage
29 mm	58,7 Tage	55,4 Tage	62 Tage
30 mm	59,6 Tage	56,2 Tage	62,9 Tage

Kopfumfang (GA nach HC)

GA NACH HC - ASUM2003

Name: ASUM 2003

Autor: ASUM

Jahr: 2003

Literatur: ASUM und Campbell Westerway S , Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

Eingangsparameter: HC (mm)

Mindestgrenze: 59

Höchstgrenze: 344

Ausgang: GA (Woche)

Gleichung:

$$0,0001797* _HC* _HC + 0,02631* _HC + 9,667$$

GA NACH HC - CFEF2000

Name: CFEF

Autor: CFEF

Jahr: 2000

Literatur: Crequat J, Duyme M und Brodaty G, Fetal growth charts by the French College of fetal ultrasonography and the Inserm U 155 , Biometry 2000, 28, pp 435-455, 2000

Kommentare: <http://cfef.org/>

HC (mm)	GA (Woche)
120,86 mm	16 Wochen
134,49 mm	17 Wochen
147,55 mm	18 Wochen
160,29 mm	19 Wochen
172,47 mm	20 Wochen
184,21 mm	21 Wochen
195,74 mm	22 Wochen
206,64 mm	23 Wochen
217,18 mm	24 Wochen
227,32 mm	25 Wochen
236,72 mm	26 Wochen
246 mm	27 Wochen
254,77 mm	28 Wochen
263 mm	29 Wochen
270,84 mm	30 Wochen
278,33 mm	31 Wochen
285,29 mm	32 Wochen
292 mm	33 Wochen
298,1 mm	34 Wochen
303,62 mm	35 Wochen
308,81 mm	36 Wochen
313,52 mm	37 Wochen
317,88 mm	38 Wochen
321,86 mm	39 Wochen

HC (mm)	GA (Woche)
324 mm	40 Wochen

GA NACH HC - CHITTY1997

Name: Chitty 1997

Autor: Chitty 1997

Jahr: 1997

Literatur: Altman D.G and Chitty L.S, New charts for ultrasound dating of pregnancy, Ultrasound Obstet. Gynecol, Vol 10, pp 174-191, 1997

HC (mm)	GA (EW)	5%	95%
85 mm	12W6T	12W1T	13W4T
90 mm	13W2T	12W4T	14W0T
95 mm	13W5T	12W6T	14W3T
100 mm	14W0T	13W2T	14W6T
105 mm	14W3T	13W4T	15W2T
110 mm	14W6T	14W0T	15W6T
115 mm	15W2T	14W3T	16W2T
120 mm	15W5T	14W5T	16W5T
125 mm	16W1T	15W1T	17W1T
130 mm	16W3T	15W3T	17W4T
135 mm	16W6T	15W6T	18W0T
140 mm	17W2T	16W1T	18W3T
145 mm	17W5T	16W4T	18W6T
150 mm	18W1T	17W0T	19W2T
155 mm	18W3T	17W2T	19W5T
160 mm	18W6T	17W5T	20W1T
165 mm	19W2T	18W0T	20W4T
170 mm	19W5T	18W3T	21W0T
175 mm	20W0T	18W5T	21W3T
180 mm	20W3T	19W1T	21W6T
185 mm	20W6T	19W3T	22W2T
190 mm	21W2T	19W6T	22W6T

HC (mm)	GA (EW)	5%	95%
195 mm	21W5T	20W1T	23W2T
200 mm	22W0T	20W4T	23W5T
205 mm	22W3T	20W6T	24W1T
210 mm	22W6T	21W2T	24W4T
215 mm	23W2T	21W5T	25W0T
220 mm	23W5T	22W0T	25W4T
225 mm	24W1T	22W3T	26W0T
230 mm	24W4T	22W6T	26W3T
235 mm	25W0T	23W1T	27W0T
240 mm	25W3T	23W4T	27W3T
245 mm	25W6T	24W0T	28W0T
250 mm	26W3T	24W3T	28W3T
255 mm	26W6T	24W6T	29W0T
260 mm	27W3T	25W2T	29W4T
265 mm	27W6T	25W5T	30W1T
270 mm	28W3T	26W2T	30W5T
275 mm	29W0T	26W5T	31W2T
280 mm	29W4T	27W2T	32W0T
285 mm	30W1T	27W5T	32W4T
290 mm	30W5T	28W2T	33W2T
295 mm	31W2T	28W6T	34W0T
300 mm	32W0T	29W3T	34W5T
305 mm	32W5T	30W0T	35W3T
310 mm	33W3T	30W5T	36W2T
315 mm	34W1T	31W2T	37W1T
320 mm	34W6T	32W0T	38W0T
325 mm	35W5T	32W5T	38W6T

GA NACH HC - HADLOCK1984

Name: Hadlock 1984

Autor: Hadlock 1984

Jahr: 1984

Literatur: Hadlock F.P, Deter R.L, Harrist R.B. und Park S.K
Estimating fetal age: computer-assisted analysis of multiple fetal growth parameters, Radiology, 152, pp 497-501, 1984

HC (cm)	GA (Woche)	+/- 2 SD
6,8 cm	12,7263 Wochen	1,19 Wochen
7,5 cm	13,1366 Wochen	1,19 Wochen
8,2 cm	13,5534 Wochen	1,19 Wochen
8,9 cm	13,9775 Wochen	1,19 Wochen
9,7 cm	14,4718 Wochen	1,19 Wochen
10,4 cm	14,9135 Wochen	1,19 Wochen
11 cm	15,2993 Wochen	1,19 Wochen
11,7 cm	15,7585 Wochen	1,19 Wochen
12,4 cm	16,228 Wochen	1,19 Wochen
13,1 cm	16,7084 Wochen	1,19 Wochen
13,8 cm	17,2004 Wochen	1,19 Wochen
14,4 cm	17,6318 Wochen	1,19 Wochen
15,1 cm	18,1469 Wochen	1,48 Wochen
15,8 cm	18,6753 Wochen	1,48 Wochen
16,4 cm	19,1393 Wochen	1,48 Wochen
17 cm	19,6139 Wochen	1,48 Wochen
17,7 cm	20,1816 Wochen	1,48 Wochen
18,3 cm	20,6805 Wochen	1,48 Wochen
18,9 cm	21,1914 Wochen	1,48 Wochen
19,5 cm	21,7145 Wochen	1,48 Wochen
20,1 cm	22,2502 Wochen	1,48 Wochen
20,7 cm	22,7989 Wochen	1,48 Wochen
21,3 cm	23,3611 Wochen	1,48 Wochen
21,9 cm	23,937 Wochen	1,48 Wochen
22,4 cm	24,4278 Wochen	2,06 Wochen
23 cm	25,0301 Wochen	2,06 Wochen
23,5 cm	25,5434 Wochen	2,06 Wochen
24,1 cm	26,1733 Wochen	2,06 Wochen

HC (cm)	GA (Woche)	+/- 2 SD
24,6 cm	26,7101 Wochen	2,06 Wochen
25,1 cm	27,258 Wochen	2,06 Wochen
25,6 cm	27,8172 Wochen	2,06 Wochen
26,1 cm	28,3879 Wochen	2,06 Wochen
26,6 cm	28,9703 Wochen	2,06 Wochen
27,1 cm	29,5648 Wochen	2,06 Wochen
27,5 cm	30,0491 Wochen	2,06 Wochen
28 cm	30,6656 Wochen	2,06 Wochen
28,4 cm	31,1679 Wochen	2,98 Wochen
28,8 cm	31,6784 Wochen	2,98 Wochen
29,3 cm	32,3281 Wochen	2,98 Wochen
29,7 cm	32,8574 Wochen	2,98 Wochen
30,1 cm	33,3953 Wochen	2,98 Wochen
30,4 cm	33,8043 Wochen	2,98 Wochen
30,8 cm	34,3574 Wochen	2,98 Wochen
31,2 cm	34,9194 Wochen	2,98 Wochen
31,5 cm	35,3468 Wochen	2,98 Wochen
31,8 cm	35,7792 Wochen	2,98 Wochen
32,2 cm	36,3639 Wochen	2,98 Wochen
32,5 cm	36,8084 Wochen	2,98 Wochen
32,8 cm	37,2583 Wochen	3,2 Wochen
33 cm	37,5611 Wochen	3,2 Wochen
33,3 cm	38,0198 Wochen	3,2 Wochen
33,5 cm	38,3286 Wochen	3,2 Wochen
33,8 cm	38,7963 Wochen	3,2 Wochen
34 cm	39,1112 Wochen	3,2 Wochen
34,2 cm	39,4285 Wochen	3,2 Wochen
34,4 cm	39,7483 Wochen	3,2 Wochen
34,6 cm	40,0705 Wochen	3,2 Wochen

GA NACH HC - HANSMANN1986

Name: Hansmann 1986

Autor: Hansmann

Jahr: 1986

Literatur: Hansmann, Hackeloer, Staudach und Wittman, Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology, Springer-Verlag, New York, 1986

HC (cm)	GA (Woche)
10,6 cm	14 Wochen
11,5 cm	15 Wochen
12,7 cm	16 Wochen
14 cm	17 Wochen
15,2 cm	18 Wochen
16,4 cm	19 Wochen
17,6 cm	20 Wochen
19 cm	21 Wochen
20,3 cm	22 Wochen
21,5 cm	23 Wochen
22,6 cm	24 Wochen
24 cm	25 Wochen
25,1 cm	26 Wochen
26,3 cm	27 Wochen
27,4 cm	28 Wochen
28,4 cm	29 Wochen
29,3 cm	30 Wochen
30,3 cm	31 Wochen
31,1 cm	32 Wochen
31,8 cm	33 Wochen
32,5 cm	34 Wochen
33,2 cm	35 Wochen
33,7 cm	36 Wochen
34 cm	37 Wochen
34,4 cm	38 Wochen

HC (cm)	GA (Woche)
34,7 cm	39 Wochen
34,9 cm	40 Wochen

GA NACH HC - JEANTY1984

Name: Jeanty 1984

Autor: Jeanty

Jahr: 1984

Literatur: Jeanty P und Romero R, Obstetrical Ultrasound, McGraw-Hill, 1984

HC (mm)	GA (EW)	5%	95%
80 mm	13W2T	11W3T	15W2T
85 mm	13W5T	11W5T	15W4T
90 mm	14W0T	12W0T	15W6T
95 mm	14W2T	12W2T	16W2T
100 mm	14W4T	12W4T	16W4T
105 mm	14W6T	13W0T	16W6T
110 mm	15W2T	13W2T	17W1T
115 mm	15W4T	13W4T	17W4T
120 mm	15W6T	13W6T	17W6T
125 mm	16W2T	14W2T	18W1T
130 mm	16W4T	14W4T	18W4T
135 mm	16W6T	15W0T	18W6T
140 mm	17W2T	15W2T	19W2T
145 mm	17W4T	15W5T	19W4T
150 mm	18W0T	16W0T	20W0T
155 mm	18W3T	16W3T	20W2T
160 mm	18W5T	16W6T	20W5T
165 mm	19W1T	17W1T	21W1T
170 mm	19W4T	17W4T	21W3T
175 mm	19W6T	18W0T	21W6T
180 mm	20W2T	18W3T	22W2T

HC (mm)	GA (EW)	5%	95%
185 mm	20W5T	18W6T	22W5T
190 mm	21W1T	19W1T	23W1T
195 mm	21W4T	19W4T	23W4T
200 mm	22W0T	20W1T	24W0T
205 mm	22W3T	20W4T	24W3T
210 mm	23W0T	21W0T	24W6T
215 mm	23W3T	21W3T	25W3T
220 mm	23W6T	21W6T	25W6T
225 mm	24W3T	22W3T	26W2T
230 mm	24W6T	22W6T	26W6T
235 mm	25W3T	23W3T	27W2T
240 mm	25W6T	23W6T	27W6T
245 mm	26W3T	24W3T	28W2T
250 mm	26W6T	25W0T	28W6T
255 mm	27W3T	25W4T	29W3T
260 mm	28W0T	26W0T	30W0T
265 mm	28W4T	26W4T	30W4T
270 mm	29W1T	27W1T	31W1T
275 mm	29W5T	27W6T	31W5T
280 mm	30W2T	28W3T	32W2T
285 mm	31W0T	29W0T	32W6T
290 mm	31W4T	29W4T	33W4T
295 mm	32W1T	30W2T	34W1T
300 mm	32W6T	30W6T	34W6T
305 mm	33W4T	31W4T	35W3T
310 mm	34W1T	32W2T	36W1T
315 mm	34W6T	32W6T	36W6T
320 mm	35W4T	33W4T	37W4T
325 mm	36W2T	34W2T	38W2T
330 mm	37W0T	35W0T	39W0T
335 mm	37W5T	35W6T	39W5T
340 mm	38W4T	36W4T	40W3T

HC (mm)	GA (EW)	5%	95%
345 mm	39W2T	37W2T	41W2T
350 mm	40W0T	38W1T	42W0T
355 mm	40W6T	38W6T	42W6T
360 mm	41W5T	39W5T	43W4T

GA NACH HC - MERZ1988

Name: Merz 1988

Autor: Merz

Jahr: 1988

Literatur: Merz E, Goldhofer W und Timor-Tritsch E , Ultrasound in Gynecology and Obstetrics, Textbook and Atlas, Georg Thieme Verlag , 1991

Kommentare: Von Merz, E., Habilitationsschrift, Universitäts-Frauenklinik Mainz, 1988

HC (mm)	GA (EW)	5%	95%
72 mm	12W1T	11W0T	13W1T
74 mm	12W2T	11W1T	13W4T
76 mm	12W3T	11W1T	13W4T
78 mm	12W4T	11W2T	13W5T
80 mm	12W5T	11W4T	13W6T
82 mm	12W6T	11W4T	14W0T
84 mm	12W6T	11W5T	14W1T
86 mm	13W1T	11W6T	14W2T
88 mm	13W1T	12W0T	14W3T
90 mm	13W2T	12W1T	14W4T
92 mm	13W4T	12W2T	14W5T
94 mm	13W4T	12W3T	14W6T
96 mm	13W5T	12W4T	14W6T
98 mm	13W6T	12W5T	15W1T
100 mm	14W0T	12W6T	15W1T
102 mm	14W1T	12W6T	15W4T

HC (mm)	GA (EW)	5%	95%
104 mm	14W2T	13W0T	15W5T
106 mm	14W3T	13W1T	15W5T
108 mm	14W4T	13W2T	15W6T
110 mm	14W5T	13W3T	16W0T
112 mm	14W16T	13W4T	16W1T
114 mm	15W0T	13W5T	16W2T
116 mm	15W1T	13W6T	16W3T
118 mm	15W2T	14W0T	16W4T
120 mm	15W3T	14W1T	16W5T
122 mm	15W4T	14W1T	17W0T
124 mm	15W5T	14W2T	17W1T
126 mm	15W6T	14W3T	17W1T
128 mm	16W0T	14W4T	17W3T
130 mm	16W1T	14W5T	17W4T
132 mm	16W2T	14W6T	17W5T
134 mm	16W3T	15W0T	17W6T
136 mm	16W4T	15W1T	18W0T
138 mm	16W5T	15W2T	18W1T
140 mm	16W6T	15W4T	18W2T
142 mm	17W0T	15W4T	18W3T
144 mm	17W1T	15W6T	18W4T
146 mm	17W2T	15W6T	18W5T
148 mm	17W4T	16W0T	19W0T
150 mm	17W4T	16W1T	19W1T
152 mm	17W6T	16W2T	19W2T
154 mm	17W6T	16W3T	19W3T
156 mm	18W1T	16W4T	19W4T
158 mm	18W1T	16W5T	19W5T
160 mm	18W3T	16W6T	19W6T
162 mm	18W4T	17W0T	20W0T
164 mm	18W5T	17W1T	20W1T
166 mm	18W6T	17W2T	20W2T

HC (mm)	GA (EW)	5%	95%
168 mm	19W0T	17W4T	20W4T
170 mm	19W1T	17W4T	20W4T
172 mm	19W2T	17W6T	20W6T
174 mm	19W3T	17W6T	20W6T
176 mm	19W4T	18W0T	21W1T
178 mm	19W6T	18W1T	21W3T
180 mm	19W6T	18W2T	21W4T
182 mm	20W1T	18W4T	21W5T
184 mm	20W1T	18W4T	21W6T
186 mm	20W3T	18W6T	22W0T
188 mm	20W4T	19W0T	22W1T
190 mm	20W5T	19W1T	22W2T
192 mm	20W6T	19W2T	22W4T
194 mm	21W1T	19W4T	22W5T
196 mm	21W1T	19W4T	22W6T
198 mm	21W3T	19W5T	23W0T
200 mm	21W4T	19W6T	23W2T
202 mm	21W5T	20W0T	23W3T
204 mm	21W6T	20W1T	23W4T
206 mm	22W1T	20W3T	23W6T
208 mm	22W1T	20W4T	23W6T
210 mm	22W3T	20W5T	24W1T
212 mm	22W4T	20W6T	24W2T
214 mm	22W5T	21W0T	24W3T
216 mm	22W6T	21W1T	24W4T
218 mm	23W1T	21W3T	24W6T
220 mm	23W2T	21W4T	25W0T
222 mm	23W4T	21W6T	25W1T
224 mm	23W4T	21W6T	25W2T
226 mm	23W6T	22W1T	25W4T
228 mm	24W0T	22W1T	25W6T
230 mm	24W1T	22W3T	26W0T

HC (mm)	GA (EW)	5%	95%
232 mm	24W3T	22W4T	26W1T
234 mm	24W4T	22W5T	26W2T
236 mm	24W5T	22W6T	26W4T
238 mm	24W6T	23W1T	26W5T
240 mm	25W1T	23W2T	26W6T
242 mm	25W2T	23W4T	27W1T
244 mm	25W4T	23W5T	27W2T
246 mm	25W5T	23W6T	27W4T
248 mm	25W6T	24W1T	27W5T
250 mm	26W0T	24W1T	27W6T
252 mm	26W1T	24W3T	28W0T
254 mm	26W3T	24W4T	28W1T
256 mm	26W4T	24W6T	28W3T
258 mm	26W6T	25W0T	28W4T
260 mm	27W0T	25W1T	28W6T
262 mm	27W1T	25W3T	29W0T
264 mm	27W3T	25W4T	29W1T
266 mm	27W4T	25W6T	29W3T
268 mm	27W6T	26W0T	29W4T
270 mm	28W1T	26W1T	30W0T
272 mm	28W2T	26W3T	30W1T
274 mm	28W4T	26W4T	30W3T
276 mm	28W5T	26W6T	30W4T
278 mm	28W6T	27W0T	30W6T
280 mm	29W1T	27W1T	31W0T
282 mm	29W2T	27W3T	31W1T
284 mm	29W4T	27W5T	31W4T
286 mm	29W6T	27W6T	31W5T
288 mm	30W0T	28W1T	31W6T
290 mm	30W1T	28W2T	32W1T
292 mm	30W4T	28W4T	32W3T
294 mm	30W5T	28W6T	32W4T

HC (mm)	GA (EW)	5%	95%
296 mm	30W6T	29W0T	32W6T
298 mm	31W1T	29W1T	33W0T
300 mm	31W3T	29W3T	33W3T
302 mm	31W4T	29W4T	33W4T
304 mm	31W6T	29W6T	33W6T
306 mm	32W1T	30W1T	34W1T
308 mm	32W2T	30W2T	34W2T
310 mm	32W4T	30W4T	34W4T
312 mm	32W6T	30W6T	34W6T
314 mm	33W1T	31W1T	35W1T
316 mm	33W3T	31W3T	35W3T
318 mm	33W4T	31W4T	35W4T
320 mm	33W6T	31W6T	36W0T
322 mm	34W1T	32W0T	36W1T
324 mm	34W3T	32W2T	36W4T
326 mm	34W5T	32W4T	36W6T
328 mm	34W6T	32W6T	37W0T
330 mm	35W1T	33W1T	37W2T
332 mm	35W4T	33W2T	37W5T
334 mm	35W6T	33W4T	38W0T
336 mm	36W1T	33W6T	38W2T
338 mm	36W3T	34W1T	38W4T
340 mm	36W4T	34W3T	38W6T
342 mm	36W6T	34W5T	39W1T
344 mm	37W1T	35W0T	39W3T
346 mm	37W4T	35W2T	39W5T
348 mm	37W6T	35W4T	40W1T
350 mm	38W1T	35W6T	40W4T
352 mm	38W4T	36W1T	40W6T
354 mm	38W6T	36W4T	41W1T
356 mm	39W1T	36W6T	41W3T
358 mm	39W4T	37W1T	41W6T

HC (mm)	GA (EW)	5%	95%
360 mm	39W6T	37W4T	42W1T
362 mm	40W1T	37W6T	42W3T
364 mm	40W4T	38W1T	42W6T

Humeruslänge (GA nach HL)

GA NACH HL - ASUM2003

Name: ASUM 2003

Autor: ASUM

Jahr: 2003

Literatur: ASUM und Campbell Westerway S , Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

Eingangsparameter: HL (mm)

Mindestgrenze: 8

Höchstgrenze: 68

Ausgang: GA (Woche)

Gleichung:

$$0,406 * _HL - 0,002804 * _HL * _HL + 0,0000563 * _HL * _HL * _HL + 8,411$$

GA NACH HL - JEANTY1984

Name: Jeanty 1984

Autor: Jeanty

Jahr: 1984

Literatur: Jeanty P and Romero R, Obstetrical Ultrasound, McGraw-Hill, 1984

HL (mm)	GA (EW)	5%	95%
10 mm	12W4T	9W6T	15W2T
11 mm	12W6T	10W1T	15W4T
12 mm	13W1T	10W3T	15W6T
13 mm	13W4T	10W6T	16W1T
14 mm	13W6T	11W1T	16W4T
15 mm	14W1T	11W3T	16W6T
16 mm	14W4T	11W6T	17W2T
17 mm	14W6T	12W1T	17W4T
18 mm	15W1T	12W4T	18W0T
19 mm	15W4T	12W6T	18W2T
20 mm	15W6T	13W1T	18W5T
21 mm	16W2T	13W4T	19W1T
22 mm	16W5T	13W6T	19W3T
23 mm	17W1T	14W2T	19W6T
24 mm	17W3T	14W5T	20W1T
25 mm	17W6T	15W1T	20W4T
26 mm	18W1T	15W4T	21W0T
27 mm	18W4T	15W6T	21W3T
28 mm	19W0T	16W2T	21W6T
29 mm	19W3T	16W5T	22W1T
30 mm	19W6T	17W1T	22W4T
31 mm	20W2T	17W4T	23W0T
32 mm	20W5T	18W0T	23W4T
33 mm	21W1T	18W3T	23W6T
34 mm	21W4T	18W6T	24W2T
35 mm	22W0T	19W2T	24W6T
36 mm	22W4T	19W5T	25W1T
37 mm	22W6T	20W1T	25W5T
38 mm	23W3T	20W4T	26W1T
39 mm	23W6T	21W1T	26W4T
40 mm	24W2T	21W4T	27W1T
41 mm	24W6T	22W0T	27W4T

HL (mm)	GA (EW)	5%	95%
42 mm	25W2T	22W4T	28W0T
43 mm	25W5T	23W0T	28W4T
44 mm	26W1T	23W4T	29W0T
45 mm	26W5T	24W0T	29W4T
46 mm	27W1T	24W4T	30W0T
47 mm	27W5T	25W0T	30W4T
48 mm	28W1T	25W4T	31W0T
49 mm	28W6T	26W0T	31W4T
50 mm	29W2T	26W4T	32W0T
51 mm	29W6T	27W1T	32W4T
52 mm	30W2T	27W4T	33W1T
53 mm	30W6T	28W1T	33W4T
54 mm	31W3T	28W5T	34W1T
55 mm	32W0T	29W1T	34W5T
56 mm	32W4T	29W6T	35W2T
57 mm	33W1T	30W2T	35W6T
58 mm	33W4T	30W6T	36W3T
59 mm	34W1T	31W3T	36W6T
60 mm	34W6T	32W0T	37W4T
61 mm	35W2T	32W4T	38W1T
62 mm	35W6T	33W1T	38W5T
63 mm	36W4T	33W6T	39W2T
64 mm	37W1T	34W3T	39W6T
65 mm	37W5T	35W0T	40W4T
66 mm	38W2T	35W4T	41W1T
67 mm	38W6T	36W1T	41W5T
68 mm	39W4T	36W6T	42W2T
69 mm	40W1T	37W3T	42W6T

Frontooccipitaler Durchmesser (FOD)

GA NACH OFD - ASUM2003

Name: ASUM 2003

Autor: ASUM

Jahr: 2003

Literatur: ASUM und Campbell Westerway S , Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

Eingangsparameter: FOD (mm)

Mindestgrenze: 21

Höchstgrenze: 122

Ausgang: Gest.-Alter (Woche)

Gleichung:

$$0,381 * _FOD - 0,00344 * _FOD * _FOD + 0,00002298 * _FOD * _FOD * _FOD + 4,189$$

GA NACH OFD - HANSMANN1986

Name: Hansmann 1986

Autor: Hansmann

Jahr: 1986

Literatur: Hansmann, Hackeloer, Staudach und Wittman, Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology, Springer-Verlag, New York, 1986

FOD (cm)	GA (Woche)
3,1 cm	14 Wochen
3,8 cm	15 Wochen
4,1 cm	16 Wochen
4,6 cm	17 Wochen
5 cm	18 Wochen

FOD (cm)	GA (Woche)
5,4 cm	19 Wochen
5,8 cm	20 Wochen
6,3 cm	21 Wochen
6,7 cm	22 Wochen
7,2 cm	23 Wochen
7,6 cm	24 Wochen
8 cm	25 Wochen
8,4 cm	26 Wochen
8,8 cm	27 Wochen
9,1 cm	28 Wochen
9,5 cm	29 Wochen
9,8 cm	30 Wochen
10 cm	31 Wochen
10,3 cm	32 Wochen
10,5 cm	33 Wochen
10,7 cm	34 Wochen
10,9 cm	35 Wochen
11,1 cm	36 Wochen
11,2 cm	37 Wochen
11,3 cm	38 Wochen
11,4 cm	39 Wochen
11,5 cm	40 Wochen

Transverser Abdomendurchmesser (GA nach TAD)

GA NACH TAD - CFEF2000

Name: CFEF

Autor: CFEF

Jahr: 2000

Literatur: Crequat J, Duyme M und Brodaty G, Fetal growth charts by the French College of fetal ultrasonography and the Inserm U 155 , Biometry 2000, 28, pp 435-455, 2000

Kommentare: Fhttp://cfef.org/

TAD (mm)	GA (Woche)
13,5 mm	11 Wochen
17 mm	12 Wochen
20,56 mm	13 Wochen
24 mm	14 Wochen
27,69 mm	15 Wochen
31,21 mm	16 Wochen
34,7 mm	17 Wochen
38,31 mm	18 Wochen
41,69 mm	19 Wochen
45,21 mm	20 Wochen
48,34 mm	21 Wochen
51,57 mm	22 Wochen
54,72 mm	23 Wochen
57,88 mm	24 Wochen
61 mm	25 Wochen
64 mm	26 Wochen
67,11 mm	27 Wochen
70,27 mm	28 Wochen
73,27 mm	29 Wochen
76,17 mm	30 Wochen
79,25 mm	31 Wochen
82,1 mm	32 Wochen
84,78 mm	33 Wochen
87,55 mm	34 Wochen
90 mm	35 Wochen
92,36 mm	36 Wochen
94,81 mm	37 Wochen
97 mm	38 Wochen

TAD (mm)	GA (Woche)
99,33 mm	39 Wochen
101,64 mm	40 Wochen
103 mm	41 Wochen

Tibia (GA nach TIB)

GA NACH TIB - JEANTY1984

Name: Jeanty 1984

Autor: Jeanty

Jahr: 1984

Literatur: Jeanty P und Romero R, Obstetrical Ultrasound, McGraw-Hill, 1984

TIB (mm)	GA (EW)	5%	95%
10 mm	13W3T	10W4T	16W2T
11 mm	13W5T	10W6T	16W4T
12 mm	14W1T	11W1T	17W0T
13 mm	14W3T	11W4T	17W2T
14 mm	14W6T	11W6T	17W5T
15 mm	15W1T	12W1T	18W0T
16 mm	15W4T	12W4T	18W3T
17 mm	15W6T	13W0T	18W6T
18 mm	16W1T	13W2T	19W1T
19 mm	16W4T	13W5T	19W4T
20 mm	17W0T	14W1T	19W6T
21 mm	17W3T	14W4T	20W2T
22 mm	17W6T	14W6T	20W5T
23 mm	18W1T	15W1T	21W1T
24 mm	18W4T	15W4T	21W3T
25 mm	18W6T	16W0T	21W6T
26 mm	19W2T	16W3T	22W1T

TIB (mm)	GA (EW)	5%	95%
27 mm	19W5T	16W6T	22W4T
28 mm	20W1T	17W1T	23W0T
29 mm	20W4T	17W4T	23W4T
30 mm	21W0T	18W1T	23W6T
31 mm	21W3T	18W4T	24W2T
32 mm	21W6T	18W6T	24W5T
33 mm	22W1T	19W2T	25W1T
34 mm	22W4T	19W5T	25W4T
35 mm	23W1T	20W1T	26W0T
36 mm	23W4T	20W4T	26W3T
37 mm	23W6T	21W0T	26W6T
38 mm	24W3T	21W4T	27W2T
39 mm	24W6T	21W6T	27W5T
40 mm	25W2T	22W3T	28W1T
41 mm	25W5T	22W6T	28W4T
42 mm	26W1T	23W2T	29W1T
43 mm	26W4T	23W5T	29W4T
44 mm	27W1T	24W1T	30W0T
45 mm	27W4T	24W4T	30W4T
46 mm	28W0T	25W1T	30W6T
47 mm	28W4T	25W4T	31W3T
48 mm	29W0T	26W1T	31W6T
49 mm	29W3T	26W4T	32W2T
50 mm	29W6T	27W0T	32W6T
51 mm	30W3T	27W4T	33W2T
52 mm	30W6T	28W0T	33W6T
53 mm	31W3T	28W4T	34W2T
54 mm	31W6T	29W0T	34W6T
55 mm	32W3T	29W4T	35W2T
56 mm	32W6T	30W0T	35W6T
57 mm	33W3T	30W4T	36W2T
58 mm	33W6T	31W0T	36W6T

TIB (mm)	GA (EW)	5%	95%
59 mm	34W3T	31W4T	37W2T
60 mm	34W6T	32W0T	37W6T
61 mm	35W3T	32W4T	38W2T
62 mm	35W6T	33W0T	38W6T
63 mm	36W4T	33W4T	39W3T
64 mm	37W0T	34W1T	39W6T
65 mm	37W4T	34W4T	40W3T
66 mm	38W0T	35W1T	41W0T
67 mm	38W4T	35W5T	41W4T
68 mm	39W1T	36W1T	42W0T
69 mm	39W5T	36W6T	42W4T

Ulna (GA nach ULNA)

GA NACH ELLE - JEANTY1984

Name: Jeanty 1984

Autor: Jeanty

Jahr: 1984

Literatur: Jeanty P und Romero R, Obstetrical Ultrasound, McGraw-Hill, 1984

ULNA (mm)	GA (EW)	5%	95%
10 mm	13W1T	10W1T	16W1T
11 mm	13W4T	10W4T	16W4T
12 mm	13W6T	10W6T	16W6T
13 mm	14W1T	11W1T	17W2T
14 mm	14W4T	11W4T	17W5T
15 mm	15W0T	11W6T	18W0T
16 mm	15W3T	12W2T	18W3T
17 mm	15W5T	12W5T	18W6T
18 mm	16W1T	13W1T	19W1T

ULNA (mm)	GA (EW)	5%	95%
19 mm	16W4T	13W4T	19W4T
20 mm	16W6T	13W6T	20W0T
21 mm	17W2T	14W2T	20W3T
22 mm	17W5T	14W5T	20W6T
23 mm	18W1T	15W1T	21W1T
24 mm	18W4T	15W4T	21W4T
25 mm	19W0T	16W0T	22W1T
26 mm	19W3T	16W3T	22W4T
27 mm	19W6T	16W6T	22W6T
28 mm	20W2T	17W2T	23W3T
29 mm	20W6T	17W5T	23W6T
30 mm	21W1T	18W1T	24W2T
31 mm	21W5T	18W4T	24W6T
32 mm	22W1T	19W1T	25W1T
33 mm	22W5T	19W4T	25W5T
34 mm	23W1T	20W1T	26W1T
35 mm	23W4T	20W4T	26W5T
36 mm	24W1T	21W1T	27W1T
37 mm	24W4T	21W4T	27W5T
38 mm	25W1T	22W1T	28W1T
39 mm	25W4T	22W4T	28W5T
40 mm	26W1T	23W1T	29W1T
41 mm	26W5T	23W4T	29W5T
42 mm	27W1T	24W1T	30W2T
43 mm	27W5T	24W5T	30W6T
44 mm	28W2T	25W1T	31W2T
45 mm	28W6T	25W6T	31W6T
46 mm	29W3T	26W2T	32W3T
47 mm	29W6T	26W6T	33W0T
48 mm	30W4T	27W3T	33W4T
49 mm	31W1T	28W0T	34W1T
50 mm	31W4T	28W4T	34W5T

ULNA (mm)	GA (EW)	5%	95%
51 mm	32W1T	29W1T	35W2T
52 mm	32W6T	29W5T	35W6T
53 mm	33W3T	30W2T	36W3T
54 mm	34W0T	30W6T	37W0T
55 mm	34W4T	31W4T	37W5T
56 mm	35W1T	32W1T	38W2T
57 mm	35W6T	32W6T	38W6T
58 mm	36W3T	33W3T	39W4T
59 mm	37W1T	34W0T	40W1T
60 mm	37W5T	34W4T	40W6T
61 mm	38W2T	35W2T	41W3T
62 mm	39W0T	35W6T	42W0T
63 mm	39W4T	36W4T	42W5T
64 mm	40W2T	37W1T	43W2T

Gleichungen und Tabellen zum geschätzten Fetalgewicht

Gestationsalter (GFG nach GA)

GFG NACH GA - CFEF2014

Name: CFEF2014

Autor: CFEF

Jahr: 2014

Literatur: Courbe d'estimation de poids foetal 2014 par le CFEF - Janvier 2015 - Massoud M., Duyme M., Fontanges M., Collège Français d'Echographie Foetale (CFEF), Combourieu D. - Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction - Accepté le 15 janvier 2015

Kommentare: <http://cfef.org/>

GA (Woche)	GFG (g)	3%	10%	90%	97%
17 Wochen	182,04g	148,35 g	159,1 g	204,98 g	215,72 g
18 Wochen	242,75 g	202,89 g	215,61 g	269,9 g	282,62 g
19 Wochen	299,47 g	251,15 g	266,57 g	332,37 g	347,79 g
20 Wochen	356,66 g	297,62 g	316,46 g	396,86 g	415,71 g
21 Wochen	418,22 g	346,17 g	369,16 g	467,27 g	490,26 g
22 Wochen	487,39 g	400,08 g	427,94 g	546,84 g	574,7 g
23 Wochen	566,84 g	461,98 g	495,45 g	638,23 g	671,69 g
24 Wochen	658,6 g	533,93 g	573,72 g	743,48 g	783,27 g
25 Wochen	764,1 g	617,35 g	664,18 g	864,01 g	910,85 g
26 Wochen	884,16 g	713,05 g	767,66 g	1.000,65 g	1.055,26 g
27 Wochen	1.018,97 g	821,24 g	884,34 g	1.153,6 g	1.216,71 g
28 Wochen	1.168,15 g	941,51 g	1.013,84 g	1.322,45 g	1.394,78 g
29 Wochen	1.330,66 g	1.072,85 g	1.155,13 g	1.506,19 g	1.588,47 g
30 Wochen	1.504,87 g	1.213,62 g	1.306,57 g	1.703,17 g	1.796,13 g
31 Wochen	1.688,55 g	1.361,58 g	1.465,93 g	1.911,17 g	2.015,52 g
32 Wochen	1.878,84 g	1.513,89 g	1.630,36 g	2.127,32 g	2.243,8 g
33 Wochen	2.072,28 g	1.667,06 g	1.796,39 g	2.348,17 g	2.477,49 g
34 Wochen	2.264,78 g	1.817,03 g	1.959,93 g	2.569,63 g	2.712,53 g
35 Wochen	2.451,66 g	1.959,12 g	2.116,31 g	2.787,02 g	2.944,21 g
36 Wochen	2.627,63 g	2.088 g	2.260,22 g	2.995,03 g	3.167,25 g
37 Wochen	2.786,76 g	2.197,79 g	2.385,76 g	3.187,76 g	3.375,73 g
38 Wochen	2.922,53 g	2.281,95 g	2.486,39 g	3.358,68 g	3.563,12 g

GFG NACH GA - DOUBILET1997

Name: Doubilet 1997

Autor: Doubilet

Jahr: 1997

Literatur: J Ultrasound Med. 1997 Apr

GA (Woche)	GFG (g)	5%	10%	90%	95%
25 Wochen	660 g	450 g	490 g	889 g	968 g
26 Wochen	760 g	523 g	568 g	1.016 g	1.103 g
27 Wochen	875 g	609 g	660 g	1.160 g	1.257 g
28 Wochen	1.005 g	707 g	765 g	1.322 g	1.430 g
29 Wochen	1.153 g	820 g	884 g	1.504 g	1.623 g
30 Wochen	1.319 g	947 g	1.020 g	1.706 g	1.836 g
31 Wochen	1.502 g	1.090 g	1.171 g	1.928 g	2.070 g
32 Wochen	1.702 g	1.249 g	1.338 g	2.167 g	2.321 g
33 Wochen	1.918 g	1.422 g	1.519 g	2.421 g	2.587 g
34 Wochen	2.146 g	1.608 g	1.714 g	2.687 g	2.865 g
35 Wochen	2.383 g	1.804 g	1.919 g	2.959 g	3.148 g
36 Wochen	2.622 g	2.006 g	2.129 g	3.230 g	3.428 g
37 Wochen	2.859 g	2.210 g	2.340 g	3.493 g	3.698 g
38 Wochen	3.083 g	2.409 g	2.544 g	3.736 g	3.947 g
39 Wochen	3.288 g	2.595 g	2.735 g	3.952 g	4.164 g
40 Wochen	3.462 g	2.762 g	2.904 g	4.127 g	4.340 g
41 Wochen	3.597 g	2.900 g	3.042 g	4.254 g	4.462 g
42 Wochen	3.685 g	3.002 g	3.142 g	4.322 g	4.523 g
43 Wochen	3.717 g	3.061 g	3.195 g	4.324 g	4.515 g

GFG NACH GA - HADLOCK1991

Name: Hadlock 1991

Autor: Hadlock

Jahr: 1991

Literatur: Hadlock FP1, Harrist RB, Martinez-Poyer J, In utero analysis of fetal growth: a sonographic weight standard, Radiology. 1991 Oct, 181(1):129-33.

GA (Woche)	GFG (g)	3%	10%	90%	97%
10 Wochen	35g	26g	29g	41g	44g
11 Wochen	45g	34g	37g	53g	56g

GA (Woche)	GFG (g)	3%	10%	90%	97%
12 Wochen	58g	43g	48g	68g	73g
13 Wochen	73g	55g	61g	85g	91g
14 Wochen	93g	70g	77g	109g	116g
15 Wochen	117g	88g	97g	137g	146g
16 Wochen	146g	110g	121g	171g	183g
17 Wochen	181g	136g	150g	212g	226g
18 Wochen	223g	167g	185g	261g	279g
19 Wochen	273g	205g	227g	319g	341g
20 Wochen	331g	248g	275g	387g	414g
21 Wochen	399g	299g	331g	467g	499g
22 Wochen	478g	359g	398g	559g	598g
23 Wochen	568g	426g	471g	665g	710g
24 Wochen	670g	503g	556g	784g	838g
25 Wochen	785g	589g	652g	918g	981g
26 Wochen	913g	685g	758g	1.068g	1.141g
27 Wochen	1.055g	791g	876g	1.234g	1.319g
28 Wochen	1.210g	908g	1.004g	1.416g	1.513g
29 Wochen	1.379g	1.034g	1.145g	1.613g	1.724g
30 Wochen	1.559g	1.169g	1.294g	1.824g	1.946g
31 Wochen	1.751g	1.313g	1.453g	2.049g	2.189g
32 Wochen	1.953g	1.465g	1.621g	2.285g	2.441g
33 Wochen	2.162g	1.622g	1.794g	2.530g	2.703g
34 Wochen	2.377g	1.783g	1.973g	2.781g	2.971g
35 Wochen	2.595g	1.946g	2.154g	3.036g	3.244g
36 Wochen	2.813g	2.110g	2.335g	3.291g	3.516g
37 Wochen	3.028g	2.271g	2.513g	3.543g	3.785g
38 Wochen	3.236g	2.427g	2.686g	3.786g	4.045g
39 Wochen	3.435g	2.576g	2.851g	4.019g	4.294g
40 Wochen	3.619g	2.714g	3.004g	4.234g	4.524g
41 Wochen	3.787g	2.840g	3.143g	4.431g	4.734g
42 Wochen	3.934g	2.951g	3.265g	4.603g	4.918g

GFG NACH GA - OKEN2003 - ALLE

Name: Oken 2003 - Alle (Kurvenanpassungsdaten)

Autor: Oken

Jahr: 2003

Literatur: BMC Pediatr. 2003, 3:6. Online veröffentlicht 08. Jul. 2003 DOI:10,1186/1471-2431-3-3 A nearly continuous measure of birth weight for gestational age using a United States national reference Emily Oken, Ken P Kleinman, Janet Rich-Edwards und Matthew W Gillman

Kommentar: Anstatt eines direkten Nachschlageverfahrens wird eher eine mathematische Kurvenanpassung für Oken Z-Scores verwendet. Dies ist vergleichbar mit den Näherungen, die für die meisten standardmäßigen Perzentilberechnungen (z. B. Hadlock) verwendet werden. Oken-Perzentile sind am 10., 50. und 90. Ankerperzentil präzise. Zwischen den Ankerperzentilen kann eine geringe Abweichung gegenüber den veröffentlichten Werten auftreten, die im Allgemeinen weniger als 5 % beträgt, was klinisch akzeptabel ist und innerhalb der Grenzen normaler Ultraschallmessungen liegt.

GA (Woche)	GFG (g)	3%	10%	90%	97%
22 Wochen	510g	304g	373g	764g	1.086g
23 Wochen	583g	341g	435g	807g	1.123g
24 Wochen	653g	391g	483g	907g	1.246g
25 Wochen	746g	425g	529g	1.021g	1.376g
26 Wochen	869g	454g	576g	1.235g	1.691g
27 Wochen	988g	509g	645g	1.431g	1.936g
28 Wochen	1.134g	557g	726g	1.772g	2.292g
29 Wochen	1.328g	653g	878g	2.240g	2.619g
30 Wochen	1.541g	766g	1.003g	2.641g	2.893g
31 Wochen	1.809g	931g	1.204g	2.958g	3.148g
32 Wochen	2.095g	1.153g	1.444g	3.181g	3.402g
33 Wochen	2.391g	1.354g	1.673g	3.374g	3.610g
34 Wochen	2.629g	1.573g	1.928g	3.494g	3.788g
35 Wochen	2.814g	1.809g	2.155g	3.603g	3.963g
36 Wochen	2.966g	2.025g	2.354g	3.657g	4.030g
37 Wochen	3.136g	2.257g	2.552g	3.770g	4.115g

GA (Woche)	GFG (g)	3%	10%	90%	97%
38 Wochen	3.301g	2.470g	2.750g	3.912g	4.229g
39 Wochen	3.421g	2.609g	2.884g	4.025g	4.332g
40 Wochen	3.509g	2.688g	2.962g	4.110g	4.411g
41 Wochen	3.563g	2.717g	3.004g	4.166g	4.489g
42 Wochen	3.514g	2.637g	2.924g	4.138g	4.478g
43 Wochen	3.470g	2.599g	2.892g	4.082g	4.417g
44 Wochen	3.479g	2.599g	2.897g	4.103g	4.421g

GFG NACH GA - OKEN2003 - FRAUEN

Name: Oken 2003 - Frauen (Kurvenanpassungsdaten)

Autor: Oken

Jahr: 2003

Literatur: BMC Pediatr. 2003, 3:6. Online veröffentlicht 08. Jul. 2003 DOI:10.1186/1471-2431-3-6 A nearly continuous measure of birth weight for gestational age using a United States national reference Emily Oken, Ken P Kleinman, Janet Rich-Edwards und Matthew W Gillman

Kommentar: Anstatt eines direkten Nachschlageverfahrens wird eher eine mathematische Kurvenanpassung für Oken Z-Scores verwendet. Dies ist vergleichbar mit den Näherungen, die für die meisten standardmäßigen Perzentilberechnungen (z. B. Hadlock) verwendet werden. Oken-Perzentile sind am 10., 50. und 90. Ankerperzentil präzise. Zwischen den Ankerperzentilen kann eine geringe Abweichung gegenüber den veröffentlichten Werten auftreten, die im Allgemeinen weniger als 5 % beträgt, was klinisch akzeptabel ist und innerhalb der Grenzen normaler Ultraschallmessungen liegt.

GA (Woche)	GFG (g)	3%	10%	90%	97%
22 Wochen	482g	299g	362g	736g	1.063g
23 Wochen	564g	333g	416g	790g	1.105g
24 Wochen	626g	371g	470g	880g	1.254g
25 Wochen	712g	410g	504g	977g	1.337g
26 Wochen	835g	439g	556g	1.201g	1.684g

GA (Woche)	GFG (g)	3%	10%	90%	97%
27 Wochen	947g	501g	622g	1.416g	1.951g
28 Wochen	1.087g	523g	693g	1.762g	2.298g
29 Wochen	1.286g	626g	845g	2.296g	2.648g
30 Wochen	1.500g	737g	965g	2.659g	2.897g
31 Wochen	1.777g	924g	1.180g	2.977g	3.171g
32 Wochen	2.061g	1.135g	1.390g	3.196g	3.402g
33 Wochen	2.371g	1.326g	1.638g	3.345g	3.594g
34 Wochen	2.597g	1.546g	1.872g	3.461g	3.755g
35 Wochen	2.771g	1.756g	2.099g	3.559g	3.915g
36 Wochen	2.904g	1.984g	2.299g	3.597g	3.955g
37 Wochen	3.068g	2.209g	2.495g	3.685g	4.029g
38 Wochen	3.232g	2.432g	2.694g	3.827g	4.137g
39 Wochen	3.354g	2.573g	2.834g	3.936g	4.236g
40 Wochen	3.441g	2.659g	2.919g	4.024g	4.316g
41 Wochen	3.494g	2.687g	2.949g	4.082g	4.384g
42 Wochen	3.451g	2.601g	2.893g	4.053g	4.380g
43 Wochen	3.408g	2.572g	2.849g	4.003g	4336
44 Wochen	3.411g	2.564g	2.863g	4.025g	4341

GFG NACH GA - OKEN2003 - MÄNNER

Name: Oken 2003 - Männer (Kurvenanpassungsdaten)

Autor: Oken

Jahr: 2003

Literatur: BMC Pediatr. 2003, 3:6. Online veröffentlicht 08. Jul. 2003 DOI:10.1186/1471-2431-3-6 A nearly continuous measure of birth weight for gestational age using a United States national reference Emily Oken, Ken P Kleinman, Janet Rich-Edwards und Matthew W Gillman

Kommentar: Anstatt eines direkten Nachschlageverfahrens wird eher eine mathematische Kurvenanpassung für Oken Z-Scores verwendet. Dies ist vergleichbar mit den Näherungen, die für die meisten standardmäßigen Perzentilberechnungen (z. B. Hadlock) verwendet werden. Oken-Perzentile sind am 10., 50. und 90. Ankerperzentil

präzise. Zwischen den Ankerperzentilen kann eine geringe Abweichung gegenüber den veröffentlichten Werten auftreten, die im Allgemeinen weniger als 5 % beträgt, was klinisch akzeptabel ist und innerhalb der Grenzen normaler Ultraschallmessungen liegt.

GA (Woche)	GFG (g)	3%	10%	90%	97%
22 Wochen	520g	313g	393g	764g	1.086g
23 Wochen	597g	353g	453g	822g	1.138g
24 Wochen	680g	400g	498g	923g	1.263g
25 Wochen	771g	456g	554g	1.049g	1.394g
26 Wochen	898g	466g	594g	1.245g	1.684g
27 Wochen	1.023g	511g	674g	1.442g	1.935g
28 Wochen	1.170g	585g	766g	1.784g	2.287g
29 Wochen	1.360g	679g	906g	2.183g	2.595g
30 Wochen	1.577g	796g	1.044g	2.617g	2.891g
31 Wochen	1.834g	931g	1.241g	2.947g	3.147g
32 Wochen	2.115g	1.162g	1.475g	3.175g	3.401g
33 Wochen	2.410g	1.381g	1.712g	3.373g	3.617g
34 Wochen	2.658g	1.607g	1.957g	3.517g	3.799g
35 Wochen	2.849g	1.841g	2.192g	3.639g	3.995g
36 Wochen	3.013g	2.071g	2.410g	3.705g	4.061g
37 Wochen	3.193g	2.310g	2.609g	3.826g	4.170g
38 Wochen	3.366g	2.524g	2.807g	3.968g	4.297g
39 Wochen	3.489g	2.661g	2.947g	4.082g	4.399g
40 Wochen	3.580g	2.745g	3.029g	4.166g	4.485g
41 Wochen	3.636g	2.771g	3.063g	4.252g	4.561g
42 Wochen	3.583g	2.682g	2.979g	4.224g	4.552g
43 Wochen	3.537g	2.648g	2.949g	4.167g	4.477g
44 Wochen	3.545g	2.650g	2.954g	4.167g	4.481g

Abdomenumfang und biparietaler Durchmesser (GFG nach AU, BPD)

GFG NACH AU, BPD - HADLOCK1984

Name: Hadlock 1984 - GFG nach AU und BPD

Autor: Hadlock

Jahr: 1984

Literatur: Hadlock F.P, Harrist R.B, Carpenter R.J, Deter R.L und Park S.K, Sonographic estimation of fetal weight. The value of femur length in addition to head and abdomen measurements, Radiology, 150, pp 535-540, 1984

Kommentare: Mittlere Abweichung +/- SD (%) 0,4 +/- 9,1

Eingangsparameter: AU (cm)

Mindestgrenze: 4.6

Höchstgrenze: 35.3

Eingangsparameter: BPD (cm)

Mindestgrenze: 1.7

Höchstgrenze: 9.4

Ausgang: GFG 2 (g)

Gleichung:

$$10^{(1,1134+0,05845*_{ac}-0,000604*_{ac}^2-0,007365*_{ac}^3+0,000595*_{bpd}+0,1694*_{bpd}^2)}$$

GFG NACH AU, BPD - MERZ1991

Name: Merz 1991 - GFG nach AU und BPD

Autor: Merz

Jahr: 1991

Literatur: Merz E, Goldhofer W und Timor-Tritsch E , Ultrasound in Gynecology and Obstetrics, Textbook and Atlas, Georg Thieme Verlag , 1991

Kommentare: Von Merz E, Lieser H, Schicketanz KH und Härle J, Intrauterine Gewichtsschätzung mittels Ultraschall. Ein Vergleich mehrerer Gewichtsschätzungsmethoden sowie die Entwicklung einer neuen Formel zur Bestimmung des Fetalgewichtes, Ultraschall Med, pp 15-24, 1988

Eingangsparameter: AU (cm)

Mindestgrenze: 21

Höchstgrenze: 37

Eingangsparameter: BPD (cm)

Mindestgrenze: 7

Höchstgrenze: 11

Ausgang: GFG 2 (g)

Gleichung:

$157,07186 * _ac + 15,90931 * _bpd^2 - 3200,40479$

Abdomenumfang, biparietaler Durchmesser und Femurlänge (GFG nach AU, BPD, FL)

GFG NACH AU, BPD, FL - HADLOCK1985

Name: Hadlock 1985 - GFG nach AU, BPD und FL

Autor: Hadlock

Jahr: 1985

Literatur: Hadlock F.P, Harrist R.B, Sharman R.S, Deter R.L, Park S.K, Estimation of fetal weight with the use of head, body, and femur

measurements--a prospective study, Am.J.Obstet.Gynecol., 151, pp 333-337, 1985

Kommentare: Mittlere Abweichung +/- SD (%) 0,3 +/- 7,5

Eingangsparameter: AU (cm)

Mindestgrenze: 4.6

Höchstgrenze: 35.3

Eingangsparameter: BPD (cm)

Mindestgrenze: 1.7

Höchstgrenze: 9.4

Eingangsparameter: FL (cm)

Mindestgrenze: 0.7

Höchstgrenze: 7.7

Ausgang: GFG 3 (g)

Gleichung: $10^{(1,335-0,0034*_{ac}*_{fl}+0,0316*_{bpd}+0,0457*_{ac}+0,1623*_{fl})}$

Abdomenumfang, biparietaler Durchmesser, Femurlänge und Kopfumfang (GFG nach AU, BPD, FL, HC)

GFG NACH AU, BPD, FL - HADLOCK1985

Name: Hadlock 1985 - GFG nach AU, BPD, FL und HC

Autor: Hadlock

Jahr: 1985

Literatur: Hadlock F.P, Harrist R.B, Sharman R.S, Deter R.L, Park S.K, Estimation of fetal weight with the use of head, body, and femur

measurements--a prospective study, Am.J.Obstet.Gynecol., 151, pp 333-337, 1985

Kommentare: Mittlere Abweichung +/- SD (%) 0,1 +/- 7,4

Eingangsparameter: AU (cm)

Mindestgrenze: 4.6

Höchstgrenze: 35.3

Eingangsparameter: BPD (cm)

Mindestgrenze: 1.7

Höchstgrenze: 9.4

Eingangsparameter: FL (cm)

Mindestgrenze: 0.7

Höchstgrenze: 7.7

Eingangsparameter: HC (cm)

Mindestgrenze: 6.8

Höchstgrenze: 34.6

Ausgang: GFG 4 (g)

Gleichung: $10^{(1,3596-0,00386*_{ac}*_{fl}+0,0064*_{hc}+0,00061*_{bpd}*_{ac}+0,0424*_{ac}+0,174*_{fl})}$

Abdomenumfang und Femurlänge (GFG nach AU, FL)

GFG NACH AU UND FL - HADLOCK1985

Name: Hadlock 1985 - GFG nach AU und FL

Autor: Hadlock

Jahr: 1985

Literatur: Hadlock F.P, Harrist R.B, Sharman R.S, Deter R.L, Park S.K, Estimation of fetal weight with the use of head, body, and femur measurements--a prospective study, Am.J.Obstet.Gynecol., 151, pp 333-337, 1985

Kommentare: Mittlere Abweichung +/- SD (%) 0,3 +/- 8,0

Eingangsparameter: AU (cm)

Mindestgrenze: 4.6

Höchstgrenze: 35.3

Eingangsparameter: FL (cm)

Mindestgrenze: 0.7

Höchstgrenze: 7.7

Ausgang: GFG 2 (g)

Gleichung: $10^{(1,304+0,05281*_{ac}+0,1938*_{fl}-0,004*_{ac}*_{fl})}$

Abdomenumfang, Femurlänge und Kopfumfang (GFG nach AU, FL, HC)

GFG NACH AU, FL UND HC - HADLOCK1985

Name: Hadlock 1985 - GFG nach AU, FL und HC

Autor: Hadlock

Jahr: 1985

Literatur: Hadlock F.P, Harrist R.B, Sharman R.S, Deter R.L, Park S.K, Estimation of fetal weight with the use of head, body, and femur measurements--a prospective study, Am.J.Obstet.Gynecol., 151, pp 333-337, 1985

Kommentare: Mittlere Abweichung +/- SD (%) 0,0 +/- 7,5

Eingangsparameter: AU (cm)

Mindestgrenze: 4.6

Höchstgrenze: 35.3

Eingangsparameter: FL (cm)

Mindestgrenze: 0.7

Höchstgrenze: 7.7

Eingangsparameter: HC (cm)

Mindestgrenze: 6.8

Höchstgrenze: 34.6

Ausgang: GFG 3 (g)

Gleichung: $10^{(1,326-0.00326*_{ac}*_{fl}+0,0107*_{hc}+0,0438*_{ac}+0,158*_{fl})}$

Abdomenumfang und Kopfumfang (GFG nach AU, HC)

GFG NACH AU UND HC - HADLOCK1984

Name: Hadlock 1984 - GFG nach AU und HC

Autor: Hadlock

Jahr: 1984

Literatur: Hadlock F.P, Harrist R.B, Carpenter R.J, Deter R.L und Park S.K, Sonographic estimation of fetal weight. The value of femur length in addition to head and abdomen measurements, Radiology, 150, pp 535-540, 1984

Kommentare: Mittlere Abweichung +/- SD (%) 0,4 +/- 9,1

Eingangsparameter: AU (cm)

Mindestgrenze: 4.6

Höchstgrenze: 35.3

Eingangsparameter: HC (cm)

Mindestgrenze: 6.8

Höchstgrenze: 34.6

Ausgang: GFG 2 (g)

Gleichung: $10^{(1,182+0.0273*_{hc} + 0,07057*_{ac} - 0,00063*_{ac}^2 - 0,0002184*_{hc}*_{ac})}$

Biparietaler Durchmesser und Transverser thorakaler Durchmesser (GFG nach BPD, TTD)

GFG NACH BPD UND TTD - HANSMANN 1986

Name: Hansmann 1986 - GFG nach BPD und TTD

Autor: Hansmann

Jahr: 1986

Literatur: Hansmann, Hackeloer, Staudach und Wittman, Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology, Springer-Verlag, New York, 1986

Kommentare: Mittlere Abweichung +/- SD (%) 15,8

Eingangsparameter: BPD (cm)

Mindestgrenze: 6

Höchstgrenze: 10.9

Eingangsparameter: TTD (cm)

Mindestgrenze: 4.9

Höchstgrenze: 12.1

Ausgang: GFG 2 (kg)

Gleichung: $= - 1,05775 *_{bpd} + 0,649145 *_{ttd} + 0,0930707 *_{bpd}^2 - 0,020562 *_{ttd}^2 + 0,515263$

Stichwortverzeichnis

Symbole

- 3D-Bildgebung, 249
 - 3D History Loop, 255
 - 3D Messungen, 256
 - 3D und SWE, 256
- Akquisition, 249
- Multi Slice (MS), 254
- Multi-Planare Rekonstruktion (MPR), 251

A

- Ablage auf dem System, 126
- Ablagebereich, 126
- Ablenkgeschwindigkeit, 244
- Ablenkgeschwindigkeit; M-Modus, 275
- Abmischung, 227
- Absorption, 64
- Abtastvolumen
 - Größe, 239
 - Positionierung, 239
- Akustische Leistungstabellen, 459
 - Modus-Übersicht, 463
 - SC6-1 Schallkopf, 473
 - SE12-3 Schallkopf, 491
 - SEV12-3 Schallkopf, 499
 - SL10-2 Schallkopf, 514
 - SL15-4 Schallkopf, 466
 - SLH22-6 Schallkopf, 532
 - SLV16-5 Schallkopf, 507
 - SMC12-3 Schallkopf, 521
- Symbole, 461
- XC6-1 Schallkopf, 482
- XP5-1 Schallkopf, 527

ALARA

- Anwendung des ALARA-Prinzips, 89
- Anwendung von ALARA mit dem System, 94
- Auswirkungen der Anwendungsmodi, 79
- Auswirkungen der Schallkopfwahl, 79
- Auswirkungen der Systemfunktionen, 78
- Belastungszeit kontrollieren, 77
- Das ALARA-Prinzip, 76
- Steuerung der Systemeinstellungen, 77
- Steuerung der Ultraschallenergie, 76
- Steuerung des Kontrollvorgangs, 77
- Alarm-System, 110
- Annotations
 - Bibliothek der Annotations, 283
 - Startposition, 283
- Anwendungsgebiete, 6
- Anzeigeeinheit, 211
- Anzeigeformat
 - M-Modus, 275
 - PW, 241
 - SWE, 212
- AutoTGC (Siehe Time Gain Compensation (TGC))

B

- B-Modus, 185

- Tipps zum Schallen, 205
 - Bedienpult
 - Bewegen des Bedienpults, 121
 - Knopftechnik, 153
 - Reinigung, 435
 - Reinigungshäufigkeit, 433
 - Schwenken des Bedienpults, 121
 - Beginn einer Untersuchung, 162
 - Berichte, 335
 - Berichtaufbau, 337
 - Generieren von Berichten, 350
 - Bewegen des Systems, 130
 - BI-RADS, 327
 - Bilder drucken, 361
 - Bilder und Clips aufnehmen, 353
 - Bildgebungs-Modi, 171
 - Bildorientierung
 - Links / Rechts, 182
 - Oben/unten, 182
 - Bioeffekte und Biophysik im Ultraschall, 50
 - Biopsie
 - Biopsie-Führungslinien, 192
 - Biopsie-Nadelführungen, kompatibel, 147
 - Body Markers, 279
 - Breites Bild, 191
- C**
- CD/DVD-Laufwerk, 20
 - Clinical Data Export, 366
 - Clips
 - Abspielen, 183
 - Conformance Standards, 7
 - Contrast Enhanced Ultrasound Imaging (CEUS), 260
 - Tipps zum Schallen, 269
- D**
- Datum und Uhrzeit, Einstellung (Siehe Datum, Uhrzeit einstellen)
 - Datum, Uhrzeit einstellen, 387
 - Desinfektionsmittel (Siehe und Reinigungs- und Desinfektionsprodukte)
 - DICOM
 - DICOM Optionen, 393
 - DICOM-Drucker, 362, 400
 - DICOM-Konformitätserklärung, 372
 - DICOM-Speicher, 397
 - Geräte, 396
 - Symbole, 174
 - Digitaler Zoom, 181
 - Diskpflege, 403
 - Doppler-Linie, 239
 - Drucker
 - Konfiguration, 396
 - Systemintegrierte Drucker, 22
 - Zusätzlicher Drucker, 22
 - Duale Bildgebung, 182
 - Duplex-Modus (Siehe Simultane Duplex- und Triple-Modi)
 - DVD
 - Auswerfen einer DVD, 364
 - Laufwerkposition, 20
 - DVI-Port, 19
 - Dynam. Bereich
 - B-Modus, 188
 - CEUS, 268
- E**
- Ein/Aus
 - Symbole, 32
 - System ein- und ausschalten, 156
 - Einfrieren, 177
 - Eingabe von Patientendaten, 162
 - Elastizitätsbereich, 211
 - Elektrische Betriebsanforderungen, 16
 - Elektromagnetische Aussendungen (Siehe Erklärung)

zu elektromagnetischen
Aussendungen)
Elektromagnetische Interferenzen,
38
Erklärung zu elektromagnetischen
Aussendungen, 42
Erste Schritte, 156

F

Farb-Modi, 217
 Color Flow imaging (CFI), 217
 Color Power Imaging (CPI),
 217
 Directional Color Power
 Imaging (DCPI), 218
 Tipps zum Schallen, 235
Farbe ausblenden, 222
Farbpriorität, 226
Fehlersuche, 455
Festplatten-Pflege (Siehe
Diskpflege)
Flash, 266
Flash-Leistung, 267
Flash-Unterdrückung, 227
Fokusbereich (Siehe Management
des Fokusbereichs)
Fußschalter, 19
Fußstützen, 129

G

Gain, 178
Gel
 Empfohlene Kontaktgele, 134
 Gelhalter, 126
Genauigkeit (Siehe
Messgenauigkeit)
Geschwindigkeits-Optimierung,
223
Geschwindigkeitsbereich, 211
Glättung
 Farbe, 225
 M-Modus, 276

SWE, 213
Griffe, 128

H

Harmonic Imaging, 187
High PRF, 244
Hinweissymbole, 174

I

Immunität (Siehe Störfestigkeits-
Erklärung)
Impulswiederholungsfrequenz
(PRF)
 PRF, 190
Individuelle Systemeinstellungen,
381
 Administration, 395
 Geräteeinstellungen, 390
 Messungen, 420
 System/Anzeige, 384
 Systemdiagnose, 429
Invertieren
 Farbe, 222
 PW, 242

K

Kabelhalterung, 125
Kavitation
 Kavitation auslösende Faktoren,
 68
 Kavitation und die Rolle der
 Gasblasen, 68
 Kavitationstypen, 69
Kennzahlen als Indikatoren
thermischer und mechanischer
Effekte, 58
Klinische Anwendungen,
Beispiele
 Abdomen/Pelvis, 103
 Bewegungsapparat, 102
 Endokavitäre Anwendungen
 (nicht geburtshilflich), 105

- Obstetrik, 107
- Pädiatrie, 109
- Small Parts, 100
- Vaskulär, 106
- Knopftechnik, 153
- Kontakte
 - China, 10
 - Deutschland, 10
 - Frankreich, 9
 - Großbritannien, 10
 - Service, 10
 - USA, 9
- Kontraindikationen, 6
- Kontrastbildgebung (Siehe Contrast Enhanced Ultrasound Imaging (CEUS))
- Kontrastmittel, 264

- L**
- Lagerung des Systems, 26
- Latex
 - Allergische Reaktionen, 144
 - Schallkopf-Schutzhüllen, 136
- Lautsprecher, 122
- Lautstärkeregelung, 122
- Lenkrollen-Sperren, 129
- Links / Rechts (Siehe Bildorientierung Links/Rechts)
- Literaturverzeichnis, 537
- Luftfilter
 - Empfohlene Reinigungsabstände, 433
 - Reinigung, 436

- M**
- M-Modus, 270
- Management des Fokusbereichs, 179
- Mechanischer Index (MI), 59, 82, 173
- Mechanismen für thermische und nicht-thermische biologische Effekte, 53
- Messungen, 285
 - % Durchmesserreduktion, 293
 - % Flächeninhaltsreduktion, 294
 - 3D Messungen, 256
 - B-Modus Ratio, 293
 - d:D, 290
 - Distance Ratio (Distanzverhältnis), 295
 - Distanz, 286
 - Doppler Zeit, 297
 - Doppler-Gefälle, 299
 - Doppler-Kurve, 299
 - Ellipse, 287
 - Follikelzählung, 295
 - Funktionen, 305
 - Genauigkeit, 308
 - Hüftwinkel, 290
 - IMT, 291
 - Kurven Distanz, 200
 - Multi Q-Box, 303
 - PSV / EDV, 298
 - PW Autotracer, 297
 - Q-Box, 301
 - Q-Box Ratio, 302
 - Q-Box Umfahren, 302
 - Tiefe, 289
 - Umfahren, 288
 - Volumen, 289
- Messungen über Module (Siehe Messungen)
- Miniaturlinien, 359
- Modality Worklist, 166
- Monitor
 - Anzeige, 173
 - Beschreibung, 120
 - Empfohlene Reinigungsabstände, 433
 - Reinigung, 435

- MPR (Siehe Multi-Planare Rekonstruktion)
 - Multi Slice (MS), 254
 - Aktive Ansicht, 254
 - Anzeige, 254
 - Navigation, 255
 - Multi-Planare Rekonstruktion, 251
 - Aktive Ansicht, 251
 - Anzeige, 251
 - Navigation, 252
 - Rotation, 252
 - MVI, 265
- N**
- Netzwerk
 - Konfiguration, 401
 - werkzeuge, 402
 - Nulllinie
 - Farbe, 224
 - PW, 243
- O**
- Oben/unten (Siehe Bildorientierung Oben/Unten)
 - Opazität, 212
 - Output Display Standard, 81
- P**
- Panoramabild, 195
 - Patente, iii
 - Patientenberichte (Siehe Berichte)
 - Patientendaten
 - Eingeben neuer Patientendaten, 162
 - Laden einer Patientendatei aus der Modality Worklist, 166
 - Patientendaten editieren, 169
 - Patientennamen ausblenden, 184
 - Patientenverzeichnis, 358
 - Persistenz
 - B-Modus, 190
 - Farbe, 226
 - SWE, 214
 - Physikalischer Überblick, 13
 - POI, 265
 - Potentielle Gefahren bei hoher Ausgangsleistung, 52
 - Power
 - Kabel, 132
 - Schalter, 156
 - Prospective Clip, 354
 - Pulsed Wave Doppler (PW), 236
 - Pulswellengeschwindigkeit (PWV), 202
 - PW Winkel fein, 241
 - PWV (Siehe Pulswellengeschwindigkeit (PWV))
- Q**
- Query and Retrieve, 371
- R**
- Reinigung des Systems, 433
 - Reinigungs- und Desinfektionsprodukte, 445
 - Für den SC6-1, 445, 448
 - Für den SE12-3, 446
 - Für den SEV12-3, 447
 - Für den SL10-2, 445
 - Für den SL15-4, 445
 - Für den SLV16-5, 448
 - Für den SMC12-3, 445
 - Für den XP5-1, 448
 - Für die SLH20-6, 448
 - Retrospektiver Clip, 353
- S**
- Schallgeschwindigkeit (Siehe TissueTuner)
 - Schallköpfe
 - Anschließen, 123
 - Auswählen, 160
 - Lagern, Aufheben, 124

Reinigung und Desinfektion, 441
 Schutzhüllen, 136
 Schalleistung
 B-Modus, 189
 CEUS, 267
 Farb-Modi, 225
 M-Modus, 274
 PW, 241
 SWE, 213
 Schutzhüllen
 Für den SC6-1, 138
 Für den SE12-3, 139
 Für den SEV12-3, 140
 Für den SL10-2, 142
 Für den SL15-4, 138
 Für den SLH20-6, 140
 Für den SLV16-5, 140
 Für den SMC12-3, 143
 Für den XC6-1, 138
 Für den XP5-1, 142
 Sektorgröße, 191
 Service, 10, 11
 ShearWave-Elastographie, 207
 Tipps zum Schallen, 215
 Sicherheit
 Allgemeine Gerätesicherheit, 34
 Elektrische Sicherheit, 36
 Mechanische Sicherheit, 47
 Sichere Durchführung von Ultraschalluntersuchungen mit dem SuperSonic Imagine System, 50
 Thermische Sicherheit, 46
 Simultane Duplex- und Triple-Modi, 244
 Skala
 Farbe, 222
 PW, 243
 Sprachen, 387
 Steuerung
 Farbe, 225
 PW, 240
 Störfestigkeits-Erklärung, 43
 Strahlenenergie, 70
 Streueffekt, 65
 SuperCompound, 189
 SuperRes, 191
 SWE (Siehe ShearWave-Elastographie)
 SWE-Optimierung, 210
 Symbole, 32 (Siehe Hinweissymbole)
 System im Überblick, 117
 Systemabmessungen, 15
 Systemkonfiguration (Siehe Individuelle Systemeinstellungen)

T
 Tastatur, 163
 Temperatur-, Luftdruck- und Feuchtigkeitsgrenzen, 26
 TGC (Siehe Time Gain Compensation (TGC))
 Thermische Bioeffekte, 60
 Thermischer Index (TI), 82, 85, 173
 Thy-RADS, 331
 Tiefe, 177
 Time Gain Compensation (TGC), 178
 Adaptiver TGC-Modus, 179
 Auto TGC-Offset, 190
 AutoTGC, 178
 ManualTouchTGC, 179
 Timer, 266
 TissueTuner, 188
 Touchscreen
 Beschreibung, 176
 Knopftechnik, 154
 Reinigung, 436

U

- UltraFast Doppler, 227, 228
- Ultraschall-Anwendung, 51
- Untersuchung beenden, 170, 379
- Untersuchung fortsetzen, 379
- Untersuchung senden, 363
- Untersuchung überarbeiten, 357
- Upgrades und Updates, 12
- USB Ports, 17

V

- Vergleichen von Bildern, 360
- Verwendungszweck, 5
- Volumenmessungen
 - 2D, 289
 - 3D, 256
- Voreinstellungen, 407

W

- Wandfilter
 - Farbe, 223
 - PW, 243
- Wärmeleitungs-Effekt, 65
- Worklist (Siehe Modality Worklist)
- Worksheet, 342

Z

- Zertifikate, 8
- Zoom, 180
 - HD Zoom, 181
- Zubehör
 - Gele, 134
 - Schallkopf-Schutzhüllen, 136
- Zusätzliche Video-Geräte, 24

Kapitel 13.

ANMERKUNGEN



SUPERSONIC
imagine